

Iniziare ad usare il dispositivo Tobii C-Series



Iniziare ad usare il dispositivo della C-Series

Questa guida aiuta a impostare e iniziare a utilizzare il dispositivo della C-Series.

Il dispositivo della C-Series è fornito completo di supporto. Il supporto può essere aperto, mantenendo così il dispositivo eretto, o può essere ripiegato, per utilizzare il dispositivo appoggiato su un tavolo o una scrivania. Se il dispositivo della C-Series viene portato sul corpo con la tracolla, il supporto deve essere ripiegato.

Inoltre, il dispositivo della C-Series è compatibile con molti altri sistemi di montaggio. Per montare un altro tipo di staffa di montaggio, è necessario rimuovere il supporto in dotazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale dell'utente del sistema di montaggio.



Il supporto è fornito con il dispositivo della C-Series.

⚠ Supporto pieghevole da non usare con CI5 or con CEye collegato.

Installare le batterie

Per controllare il livello di carica delle batterie, premere il pulsante "Push" sul retro della batteria. (vedere A)

Le lampadine verdi indicano la percentuale di carica rimasta nella batteria.


Nota: Le batterie sono "sostituibili a caldo" e possono essere scambiate e/o sostituite con un gruppo di batterie di riserva per la C-Series. Notare che le batterie vengono consegnate con mezza carica.

Posizionare il dispositivo della C-Series a faccia in giù su una superficie liscia. Fare scorrere la batteria nel retro del dispositivo. Le linguette in gomma della batteria entrano per ultime e si trovano sul fondo del dispositivo. Quando le batterie si agganciano al loro posto, si sente un clic. (vedere B, C, D)

Per rimuovere le batterie, posizionare il dispositivo della C-Series a faccia in giù su una superficie stabile. Usare entrambe le mani per far scivolare verso l'esterno le linguette di gomma sulla batteria. Quando vengono rilasciate si sente un clic. Sollevare la batteria e rimuoverla dal dispositivo.



Installare le batterie e controllare il livello di carica.

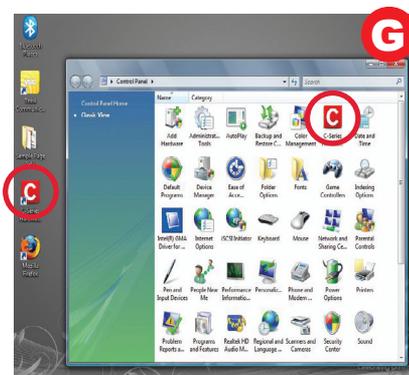

Avvio del dispositivo della C-Series

1. Montare l'alimentatore inserendo l'adattatore sulla presa. (vedere E)
 2. Inserire il cavo di alimentazione nella base del dispositivo e inserire la presa. (vedere F)
- Nota:** Le batterie vengono consegnate con mezza carica.

3. Premere il pulsante sul lato superiore destro del dispositivo della C-Series per accendere l'unità. Due luci verdi lampeggeranno brevemente ai lati dello schermo. Ciò indica che il dispositivo è in fase di avvio.

4. Quando il dispositivo si avvia per la prima volta, appariranno delle informazioni di sicurezza. Leggere le informazioni e seguire le istruzioni come descritto.

Ad esempio: Al primo avvio del dispositivo, gli altoparlanti sono inattivi, poiché sono piuttosto potenti e possono produrre suoni molto alti. Per attivare gli altoparlanti è necessario leggere e accettare una liberatoria.

Impostazione del metodo di accesso

È possibile accedere al dispositivo della C-Series in diversi modi: accesso a sfioramento, accesso a sfioramento guida per tastiera, accesso via interruttore, o controllo oculare. Per utilizzare la guida per tastiera o il controllo oculare, è necessario acquistare separatamente questi dispositivi. Per ulteriori istruzioni sul montaggio di

questi dispositivi, fare riferimento al loro manuale dell'utente.

Impostazione per accesso a sfioramento

Per accedere al dispositivo di C-Series in maniera ottimale, calibrare il touch screen. Per calibrare il touch screen:
 Aprire le Opzioni hardware della C-Series tramite la scorciatoia sul desktop. (vedere G)
 Scegliere touch screen
 Fare clic su Calibra.
 Seguire poi le istruzioni che appaiono sullo schermo.

Impostazione per controllo oculare

Per utilizzare il dispositivo della C-Series con il controllo oculare, è necessario acquistare un CEye. Alla consegna del CEye, si riceve una Guida per iniziare che specifica come utilizzare il CEye insieme alla C-Series.

Impostazione per scansione con interruttore

Il dispositivo della C-Series ha due ingressi disponibili per la scansione con interruttore. Inserire l'interruttore nell'ingresso adatto. Per utenti che utilizzano un solo interruttore, inserire l'interruttore nell'ingresso 1. (vedere F)
 Per abilitare l'avvio e la disattivazione del dispositivo della C-Series con l'interruttore, aprire **Opzioni hardware della C-Series > Interruttori**, e marcare le

caselle appropriate. (vedere H alla pagina seguente)

Per programmare l'interruttore in modo che emuli la pressione di un tasto, aprire **Opzioni hardware della C-Series > Interruttori** e scegliere Impostazione, sulla destra dello schermo.

Nota: Se l'interruttore deve emulare la pressione di un tasto, le impostazioni di input del tasto devono corrispondere alle impostazioni di scansione del software di comunicazione, se il metodo di input selezionato è la scansione.

Regolazione delle impostazioni

Regolare le impostazioni per volume, retroilluminazione, licenze, wireless e altre funzioni software tramite **Menu Start di Windows > Pannello di controllo (Classic View) > Opzioni hardware della C-Series** o facendo doppio clic sulla scorciatoia per Opzioni hardware della C-Series sul desktop. (vedere G)

Per regolare l'hardware del dispositivo, scegliere la voce che interessa dal menu sul lato sinistro di Opzioni hardware della C-Series. La finestra di dialogo fornisce la descrizione delle funzioni. (vedere H alla pagina seguente)

Impostazione dei tasti di accesso rapido

È possibile personalizzare i tre tasti sul lato del dispositivo della C-Series per eseguire una varietà di azioni. Nel menu **Opzioni**

hardware della C-Series > Tasti, scegliere Imposta azione a destra del tasto A.

Nota: In questo menu è possibile disattivare le azioni del tasto scegliendo “Nessuna azione selezionata”. In alternativa, selezionare le altre azioni per visualizzare le possibili funzioni per ogni azione. Descrizioni dettagliate di tutte le azioni sono disponibili nel Manuale dell'utente della C-Series.

Software di comunicazione

Se il software di comunicazione è stato acquistato, esso sarà preinstallato sul dispositivo della C-Series.

Se il software di comunicazione non si avvia immediatamente, fare doppio clic sulla scorciatoia sul desktop di Windows. In alternativa, aprire il software tramite il menu Start/Programmi.

Per fare in modo che il software di comunicazione si avvii automaticamente quando si accende il dispositivo della C-Series:


1. Aprire il menu Start sul desktop di Windows.
2. Selezionare Tutti i programmi
3. Fare clic destro su Startup
4. Selezionare Apri
5. Trascinare la scorciatoia del software di comunicazione dal desktop alla cartella Startup.

(vedere I)



Spegnimento

Per spegnere il dispositivo della C-Series, chiudere tutti i programmi. Sul desktop di Windows, aprire il Menu Start e toccare la freccia in fondo a destra. Scegliere Spegni. (vedere J)

Nota: In alternativa, è possibile programmare uno dei tasti laterali o interruttori per lo spegnimento.

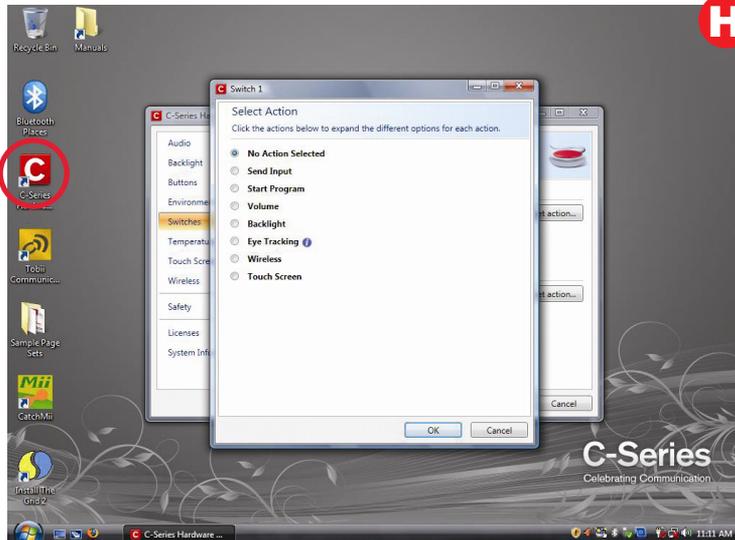

Regolare le impostazioni dell'interruttore in Opzioni hardware della C-Series.

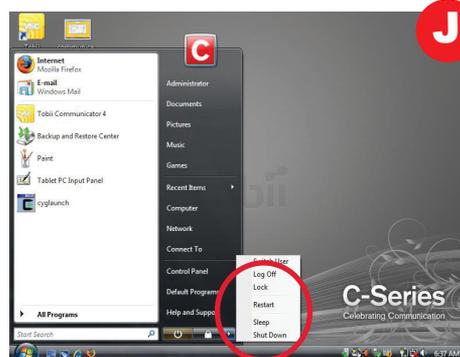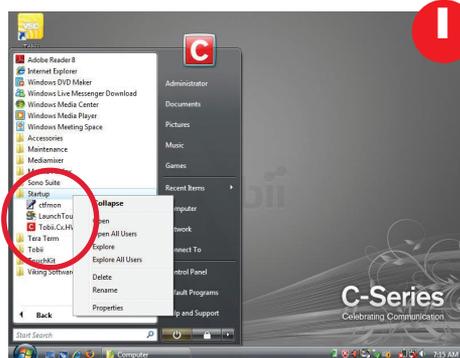

© Tobii®. Le illustrazioni e le specifiche non si applicano necessariamente a prodotti e servizi offerti su ogni mercato locale. Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

EMEA
Tobii Technology AB
Karlsrovägen 2D
S-182 53 Danderyd
Svezia
Telefono: +46 8 663 69 90
Fax: +46 8 30 14 00
sales@tobii.com

EUROPA CENTRALE
Tobii Technology GmbH
Niedenau 45
D-60325 Frankfurt am Main
Germania
Telefono: +49 69 24 75 03 40
Fax: +49 69 24 75 03 429
sales.de@tobii.com

NORVEGIA
Tobii Norge
Thormøhlens gate 55
5008 Bergen
Norvegia
Telefono: +47 55 55 10 60
Fax: +47 55 55 10 61
sales.no@tobii.com

ASIA
Tobii Technology, Ltd.
3-4-13 Takanawa, Minato-ku
Tokyo 108-0074
Giappone
Telefono: +81-3-5793-3316
Fax: +81-3-5793-3317
sales.jp@tobii.com

AMERICA SETTENTRIONALE
Tobii ATI
333 Elm Street
Dedham, MA 02026
Gratuito: 800-793-9227
Telefono: 781-461-8200
Fax: 781-461-8213
Web: www.tobiiati.com
sales.us@tobii.com