

Komma igång med Tobii C-Series



Komma igång med C-Series

Den här guiden hjälper dig att börja använda C-Seriesenheten.

C-Series levereras med ett stativ. Stativet kan öppnas så att C-Seriesenheten är stående eller så kan det vikas in så att enheten kan användas liggande på ett bord. Stativet bör vikas in om C-Seriesenheten bärs med en axelrem.

C-Series är också kompatibel med många olika monteringsystem. Det monterade stativet måste tas bort om du vill använda ett annat fäste. I användarhandboken för monteringsystemet finns mer information.

Installera batterierna

Om du vill kontrollera batterinivån trycker du ned knappen "push" på baksidan av batteriet. (se A) De gröna lamporna visar hur hög batterinivån är i procent.

Obs! Batterier kan bytas under drift och kan alterneras och/eller ersättas av en extra uppsättning C-Seriesbatterier. Observera att batterierna levereras halvladdade.

Placera C-Seriesenheten med ovasidan nedåt på en mjuk yta. Skjut in batterierna på enhetens baksida. Gummifästena på batteriet skjuts in sist och sitter längst ned på enheten. Du hör ett klickljud när batterierna sitter på plats. (se B, C, D)

Om du vill ta ur batterierna placerar du enheten med ovasidan nedåt på ett stabilt underlag. Använd båda händerna för att skjuta isär gummifästena på batteriet. Klickljud hörs när fästena lossas. Lyft upp batteriet och ta ut det ur enheten.





C-Seriesenheten levereras med ett utfällbart stativ.

⚠ Det utfällbara stativet är inte avsett att användas tillsammans med CI5 eller med en ansluten CEye.



Installera batterierna och kontrollera batterinivån.

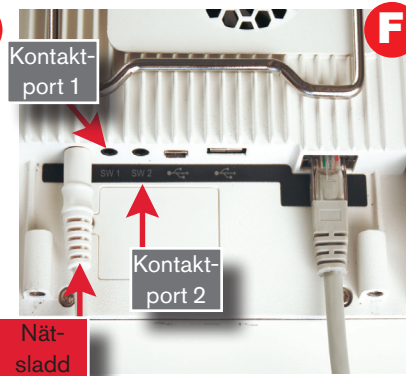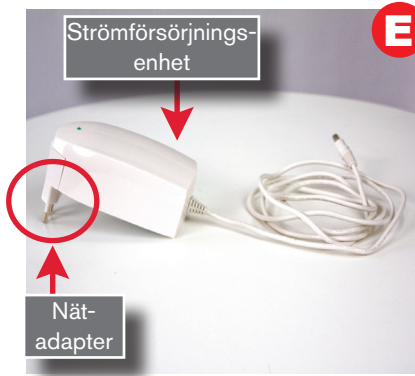

Sätta på C-Seriesenheten

1. Koppla strömförsörjningen genom att sätta i nätadaptern i eluttaget. (se E)
2. Sätt i nätsladden längst ned på C-Seriesenheten. (se F)

Obs! Nya batterier levereras halvladdade.

3. Tryck på den översta knappen på C-Seriesenhetens högra sida för att aktivera den. Två gröna lampor blinkar en kort stund på var sida av skärmen. Det här visar att enheten startas.
4. Säkerhetsinformation visas när enheten startas första gången. Läs informationen och följ instruktionerna.

Exempel: När du startar en enhet för första gången är högtalarna inaktiva och med att de är kraftfulla och kan användas på hög volym. För att du ska kunna aktivera högtalarna måste du läsa och acceptera en ansvarsfriskrivning.

Ställa in styrningsmetod

C-Seriesenheten kan styras på flera olika sätt: peka, peka med en fingerguide, använda kontakt eller ögonstyrning. Utrustning för fingerguide och ögonstyrning köps som tillval. Instruktioner för hur du installerar dessa finns i bruksanvisningen.

Ställa in pekstyrning

Om du vill styra C-Seriesenheten med pekskärmen bör du kalibrera pekskärmen. Så här kalibrerar du pekskärmen:

Öppna menyn Maskinvarualternativ för C-Series via genvägen på skrivbordet. (se G)

Välj Pekskärm.

Klicka på Kalibrera.

Följ sedan instruktionerna på skärmen.

Ställa in Eye Control

Om du ska använda C-Seriesenheten med ögonstyrning måste du köpa en CEye. CEye levereras med en startguide som beskriver hur du använder CEye tillsammans med C-Seriesenheten.

Ställa in kontaktskanning

C-Seriesenheten har två portar för kontaktskanning. Sätt i kontakten i lämplig port. Om du använder en enkel kontakt sätter du in kontakten i port 1. (se F)

Om du vill aktivera att kontakten sätter på och stänger på C-Seriesenheten öppnar du **Maskinvarualternativ för C-Series > Kontakter** och markerar lämpliga rutor. (se H på nästa sida)

Om du vill programmera att kontakten emulerar en tangenttryckning öppnar du

Maskinvarualternativ för C-Series > Kontakter och väljer Ange åtgärd till höger på skärmen.

Obs! Om kontakten har programmerats att emulera en tangenttryckning måste tangentinställningarna vara samma som i kommunikationsprogrammets skanningsinställningar om skanning är manövermetoden.

Justera inställningar

Inställningar för volym, bakgrundsbelysning, licenser, trådlöst och andra maskinvarufunktioner justeras via **Start-menyn i Windows > Kontrollpanelen (klassiskt läge) > Maskinvarualternativ för C-Series** eller genom att dubbelklicka på genvägen Maskinvarualternativ för C-Series på skrivbordet. (se G)

Välj menyobjektet på vänster sida av Maskinvarualternativ för C-Series om du vill göra justeringar av maskinvaran på din enhet. I dialogrutan finns beskrivningar av funktionerna. (se H på nästa sida)

Inställningar för snabbåtkomstknapp

De tre knapparna på sidan av C-serie-enheten kan ställas in att utföra olika åtgärder. Gå till **Maskinvarualternativ för C-Series > Knappar** och välj Ange åtgärd till höger om knapp A.

Obs! På den här menyn kan du avaktivera att knappen utför någon åtgärd genom att välja "Ingen åtgärd vald". Du kan även välja de andra åtgärderna för att visa möjliga funktioner för varje åtgärd. Detaljerade beskrivningar av alla åtgärder finns i bruksanvisningen för C-Series.

Kommunikationsprogram

Om du har köpt kommunikationsprogrammet levereras C-Serisenheten med programmet installerat.

Om kommunikationsprogrammet inte startar direkt gör du så här: Dubbelklicka på genvägen för programvaran på Windows-skrivbordet. Du kan också öppna programvaran genom att gå till Start-menyn och välja Program.

Så här anger du att kommunikationsprogramvaran startar när C-Serisenheten startas:


1. Öppna Start-menyn i Windows.
2. Välj Alla program
3. Högerklicka på Autostart
4. Välj Öppna
5. Dra genvägen till kommunikationsprogrammet från skrivbordet till startmappen.

(se I)



Stänga av

Om du vill stänga av C-Serisenheten stänger du alla program. Öppna Start-menyn i Windows och peka på pilen längst ned till höger. Välj Stäng av. (se J)

Obs! En av sidoknapparna eller kontakten kan också programmeras som avstängningsknapp.

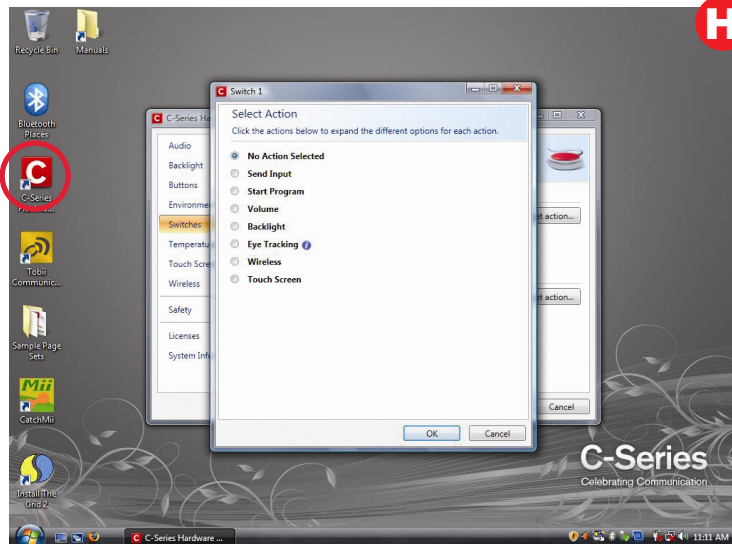

Justera kontaktinställningar i Maskinvarualternativ för C-Series.

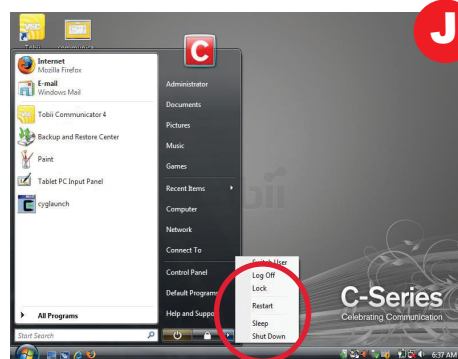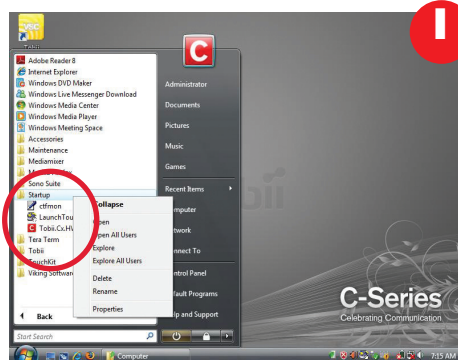

tobii
www.tobii.com

© Tobii®. Illustrationer och specifikationer gäller inte nödvändigtvis produkter och tjänster som erbjuds på varje lokal marknad. Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

EMEA

Tobii Technology AB
Karlsrovägen 2D
S-182 53 Danderyd
Sverige
Telefon: +46 8 663 69 90
Fax: +46 8 30 14 00
sales@tobii.com

CENTRALEUROPA

Tobii Technology GmbH
Niedenau 45
D-603 25 Frankfurt am Main
Tyskland
Telefon: +49 69 24 75 03 40
Fax: +49 69 24 75 03 429
sales.de@tobii.com

NORGE

Tobii Norge
Thormøhlens gate 55
5008 Bergen
Norge
Telefon: +47 55 55 10 60
Fax: +47 55 55 10 61
sales.no@tobii.com

ASIEN

Tobii Technology, Ltd.
3-4-13 Takanawa, Minato-ku
Tokyo 108-0074
Japan
Telefon: +81-3-5793-3316
Fax: +81-3-5793-3317
sales.jp@tobii.com

NORDAMERIKA

Tobii ATI
333 Elm Street
Dedham, MA 02026
Avgiftsfritt: 800-793-9227
Telefon: 781-461-8200
Fax: 781-461-8213
Webb: www.tobiiati.com
sales.us@tobii.com