

## Companion Lizenz Communicator 5

Zusätzlich zu Communicator 5 auf der I-Serie (+), können sie Communicator noch auf bis zu 3 weiteren Computern aktivieren, z.B. auf Therapeutenrechnern oder auch auf Computern von den Angehörigen des Nutzers. Dafür müssen sie die Companion Lizenz für Communicator 5 beziehen. Dafür sind die folgenden Schritte durchzuführen:

**Hinweis:** Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die I-Serie (+) mit dem Internet zu verbinden, so können Sie an einem anderen, mit dem Internet verbundenen PC auf die Seite <http://mytobiidynavox.com/device/attachdevice> gehen und bei Schritt 8 fortfahren. Den erforderlichen I-Series Produktschlüssel finden Sie im Control Center der I-Serie (+) im Menüpunkt „I-Series Produktschlüssel“.

1. I-Serie(+) Einschalten.
2. I-Serie(+) mit dem Internet verbinden.
3. **Schnellmenü** aufrufen. Für mehr Informationen, siehe **Erste Schritte Communicator 5**.
4. Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen**.
5. Wählen Sie den **System** Tab.
6. Wählen Sie die Taste **Lizenzverwalter**.
7. Wählen Sie den **Companion License...** Button.
8. Auf der **myTobiiDynavox Seite**, melden Sie sich mit **Benutzername** und **Passwort** an und wählen Sie die **Anmelden** Schaltfläche. oder  
Erstellen Sie sich einen Account über den **„Registrieren“** Button.
9. Sie werden automatisch auf die richtige Webseite weitergeleitet.
10. Ihr I-Serie(+) Produktschlüssel wird automatisch in das System eingetragen.
11. Wählen Sie Gerät zuordnen, um Ihr **Gerät am System** anzumelden.
12. Sie werden wieder auf Ihre **Account Status** Seite zurückgeleitet.
13. Im Abschnitt **Tobii Dynavox I-Series(+)** mit **Communicator** finden Sie Ihren **Companion Lizenzschlüssel**.

### Support für Ihr Tobii Dynavox-Gerät

#### Onlinehilfe

Bitte sehen Sie zuerst online auf der entsprechenden Support-Seite für Ihr Tobii Dynavox-Gerät nach. Dort finden Sie aktuelle Informationen zu Fragen sowie Tipps und Tricks rund um Ihr Produkt. Sie finden unsere Support-Seiten online auf: [www.TobiiDynavox.com](http://www.TobiiDynavox.com) oder [www.myTobiiDynavox.com](http://www.myTobiiDynavox.com).

#### Kontakt zu Tobii Dynavox Fachhändler

Bei Fragen zu und Problemen mit Ihrem Produkt nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Fachhändler oder Wiederverkäufer von Tobii Dynavox auf, um Unterstützung zu erhalten. Dieser kennt sich mit Ihren persönlichen Gerätekonfigurationen aus und kann Ihnen am besten mit Tipps und Schulungen zu Ihrem Produkt behilflich sein. Die Kontaktdaten finden Sie auf [www.TobiiDynavox.com/contact](http://www.TobiiDynavox.com/contact).