

## Companion Lizenz Communicator 5

Zusätzlich zu Communicator 5 auf Ihrem I-Serie Gerät, können Sie Communicator noch auf bis zu 3 weiteren Computern aktivieren, z.B. auf Therapeutenrechnern oder auch auf Computern von den Angehörigen des Nutzers. Dafür müssen Sie die Companion Lizenz für Communicator 5 beziehen. Dafür sind die folgenden Schritte durchzuführen:

**Hinweis:** Sollten Sie keine Möglichkeit haben, Ihr Gerät mit dem Internet zu verbinden, so können Sie an einem anderen, mit dem Internet verbundenen PC auf die Seite <http://mytobiidynavox.com/device/attachdevice> gehen und bei Schritt 8 fortfahren. Den erforderlichen Produktschlüssel finden Sie im Control Center bzw. den Hardware Settings der I-Serie im Menüpunkt „Produktschlüssel“ oder auf Ihrem „Tobii Dynamox – Informationsblatt mit Produktschlüssel und Konfigurationscode“, den Sie mit Ihrem Gerät bekommen haben.

1. I-Serie einschalten.
2. I-Serie mit dem Internet verbinden.
3. In Communicator 5 das **Schnellmenü** aufrufen. Für mehr Informationen, siehe **Erste Schritte Communicator 5**.
4. Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen**.
5. Wählen Sie den **System** Tab.
6. Wählen Sie die Taste **Lizenzverwalter**.
7. Wählen Sie den **Companion License...** Button.
8. Melden Sie sich auf der **myTobiiDynamox Seite** mit **Benutzername** und **Passwort** an und wählen Sie **Anmelden** oder erstellen Sie sich einen Account über den **„Registrieren“** Button.
9. Sie werden automatisch auf die richtige Webseite weitergeleitet.
10. Ihr I-Serie Produktschlüssel wird automatisch in das System eingetragen.
11. Wählen Sie **Companion holen**, um Ihr Gerät am System anzumelden.
12. Sie werden nun auf die **Mein Konto - Lizenzen** Seite umgeleitet.
13. Hier finden Sie nun Ihren **Companion Lizenzschlüssel**.

Companion Lizenz Communicator 5 v1.2 – de-DE

Copyright ©Tobii AB (publ). Abbildungen und Spezifikationen gelten nicht zwangsläufig für Produkte und Dienstleistungen, die auf dem jeweiligen lokalen Markt verfügbar sind. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle anderen Warenzeichen gehören dem jeweiligen Besitzer.

### Support für Ihr Tobii Dynamox-Gerät

**Onlinehilfe**  
Bitte sehen Sie zuerst online auf der entsprechenden Support-Seite für Ihr Tobii Dynamox-Gerät nach. Dort finden Sie aktuelle Informationen zu Fragen sowie Tipps und Tricks rund um Ihr Produkt. Sie finden unsere Support-Seiten online auf: [www.TobiiDynamox.com](http://www.TobiiDynamox.com) oder [www.myTobiiDynamox.com](http://www.myTobiiDynamox.com).

### Kontakt zu Tobii Dynamox Fachhändler

Bei Fragen zu und Problemen mit Ihrem Produkt nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Fachhändler oder Wiederverkäufer von Tobii Dynamox auf, um Unterstützung zu erhalten. Dieser kennt sich mit Ihren persönlichen Gerätekonfigurationen aus und kann Ihnen am besten mit Tipps und Schulungen zu Ihrem Produkt behilflich sein. Die Kontaktdaten finden Sie auf [www.TobiiDynamox.com/contact](http://www.TobiiDynamox.com/contact).