

Dekontaminering av enheter

Prosedyreanbefaling for bruk i kliniske omgivelser

Introduksjon

Hensikten med dette dokumentet er å gi en detaljert beskrivelse av hvordan man håndterer og dekontaminerer alle enheter og utstyr som brukes i klinikken på riktig måte, for å beskytte personell mot infeksjon og smittsom sykdom.

Påkrevd utstyr

Antall	Delenummer	Beskrivelse
1		Lateksfrie nitrilhansker
1		Vernebriller
1		Tapetkniv
1		Mikrozid® sensitive liquid eller tilsvarende
1		Rengjøringsmiddel til glass
1		Papirhåndklær

Bakgrunn

Forutsetninger

Dette dokumentet forutsetter at brukeren har lest og forstår sikkerhetsdatabladene for alle og et hvert rengjøringsmiddel

Gjeldende produkter

Tobii I-Series	Tobii PCEye Go	Tobii Dynavox PCEye Mini	Tobii Dynavox EyeMobile Plus
Tobii C-Series	Tobii Dynavox PCEye Explore	Tobii Dynavox PCEye Plus	Tobii Dynavox I-Series(+)
Tobii S32	Dynavox Maestro	Tobii Dynavox Indi®	Tobii Dynavox I-110
Tobii PCEye	Dynavox T-Series	Tobii Dynavox EyeR	

Prosedyre

Hensikt

Å beskytte personell i kliniske omgivelser mot infeksjon og smittsom sykdom ved dekontaminering og rengjøring av alle tilgjengelige og brukte enheter og utstyr..

Støtte for Tobii Dynavox-enheten

Få hjelp via Internett

Besøke den produktspesifikke støttesiden for Tobii Dynavox-enheten din. Den inneholder oppdatert informasjon om problemer, tips og triks relatert til produktet. Du finner Support-sidene våre på nett på: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontakt salgsrepresentanten eller forhandleren din

Kontakt din Tobii Dynavox-representant eller autoriserte forhandler for hjelp hvis du har spørsmål om produktet. De er best kjent med ditt personlige oppsett og er de som best kan hjelpe deg med tips og produktopplæring. For kontaktinformasjon se www.TobiiDynavox.com/contact

Omfang

Det anbefales at dekontaminering utføres på alle tilgjengelige og brukte enheter før videre behandling.

Mottak av enhet

1. Alt utstyr for dekontaminering må leveres til det angitte regjeringsområdet. Slikt utstyr skal ikke dekontamineres utenfor dette området.
2. Vernebriller og lateksfrie nitrilhansker MÅ benyttes ved håndtering av utstyr eller materialer som ikke enda har blitt dekontaminert.
3. Åpne esken forsiktig med en tapetkniv. (hvis aktuelt)
4. Pakk ut enheten og eventuelt inkludert tilbehør. (hvis aktuelt)



Alle innpakkingsmaterialer skal avhendes. Se *Avhending av innpakkingsmaterialer*

Dekontaminering og rengjøring

1. Dersom enheten har en fuktighetsbeskytter, fjern denne og kast den.
2. Spray enheten med Mikrozyd® sensitive liquid eller tilsvarende og la den virke i minst ett minutt. Desinfiseringsmiddelet vil fordampe i løpet av den tiden.
3. Eventuelt inkludert tilbehør må også desinfiseres, med Mikrozyd® sensitive liquid eller tilsvarende.
4. Dersom enheten har et display, rengjør displayet med et papirhåndkle og rengjøringsmiddel for glass.
5. Når dekontamineringen er fullført legges enhetene i beholdere sammen med eventuelt inkludert tilbehør, og løses ut for innkommende inspeksjon og testing.
6. Kast brukte papirhåndklær og rengjøringsutstyr på riktig måte.

Avhending av innpakkingsmaterialer

1. Esker skal brytes opp så de er flate.
2. Avhend esker og innpakkingsmaterialer i egnet beholder for avfall/resirkulering.

Støtte for Tobii Dynavox-enheten

Få hjelp via Internett

Besøke den produktspesifikke støttesiden for Tobii Dynavox-enheten din. Den inneholder oppdatert informasjon om problemer, tips og triks relatert til produktet. Du finner Support-sidene våre på nett på: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontakt salgsrepresentanten eller forhandleren din

Kontakt din Tobii Dynavox-representant eller autoriserte forhandler for hjelp hvis du har spørsmål om produktet. De er best kjent med ditt personlige oppsett og er de som best kan hjelpe deg med tips og produktopplæring. For kontaktinformasjon se www.TobiiDynavox.com/contact