

Dekontamination des Geräts

Empfohlenes Verfahren bei Verwendung in medizinischen Einrichtungen

Anleitung

Dieses Dokument dient als detaillierte Anleitung für den sachgemäßen Umgang mit in medizinischen Einrichtungen verfügbaren und verwendeten Geräten und Anlagen sowie zu ihrer Dekontamination, um Mitarbeiter vor Ansteckung und übertragbaren Krankheiten zu schützen.

Benötigte Hilfsmittel

Menge	Artikelnummer	Beschreibung
1		Nitrilhandschuhe ohne Latex
1		Schutzbrille
1		Teppichmesser
1		Mikrozid® Schnelldesinfektionsmittel
1		Glasreiniger
1		Papiertücher

Hintergrund

Voraussetzungen

In diesem Dokument wird davon ausgegangen, dass der Benutzer die Sicherheitsdatenblätter der jeweiligen Reinigungsmittel gelesen und verstanden hat.

Gilt für folgende Produkte

Tobii I-Series	Tobii Dynavox PCEye Explore	Tobii Dynavox Indi®	Tobii Dynavox Indi® 7
Tobii C-Series	Dynavox Maestro	Tobii Dynavox EyeR	Tobii Dynavox Speech Case
Tobii S32	Dynavox T-Series	Tobii Dynavox EyeMobile Plus	
Tobii PCEye	Tobii Dynavox PCEye Mini	Tobii Dynavox I-Series(+)	
Tobii PCEye Go	Tobii Dynavox PCEye Plus	Tobii Dynavox I-110	

Support für Ihr Tobii Dynavox-Gerät

Onlinehilfe
Bitte sehen Sie zuerst online auf der entsprechenden Support-Seite für Ihr Tobii Dynavox-Gerät nach. Dort finden Sie aktuelle Informationen zu Fragen sowie Tipps und Tricks rund um Ihr Produkt. Unsere Support-Seiten finden Sie im Internet unter: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontakt zu Tobii Dynavox Fachhändler
Bei Fragen zu und Problemen mit Ihrem Produkt nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Fachhändler oder Wiederverkäufer von Tobii Dynavox auf, um Unterstützung zu erhalten. Dieser kennt sich mit Ihren persönlichen Gerätekonfigurationen aus und kann Ihnen am besten mit Tipps und Schulungen zu Ihrem Produkt behilflich sein. Die Kontaktdaten finden Sie auf www.TobiiDynavox.com/contact

Verfahrensweise

Zweck

Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen durch Dekontamination und Reinigung aller verfügbaren und verwendeten Geräte und Anlagen vor Ansteckung und übertragbaren Krankheiten zu schützen.

Bereich

Jedes verfügbare bzw. verwendete Gerät sollte im ersten Arbeitsschritt diesem Verfahren unterzogen werden.

Entgegennahme des Geräts

1. Jedes zur Dekontamination vorgesehene Gerät muss in dem für die Reinigung vorgesehenen Bereich gebracht werden. Derartige Geräte dürfen nicht außerhalb dieses Bereichs dekontaminiert werden.
2. Bei der Handhabung noch nicht dekontaminierter Geräte oder Materialien MÜSSEN Nitrilhandschuhe ohne Latex und eine Schutzbrille getragen werden.
3. Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig mit einem Teppichmesser. (Falls zutreffend)
4. Packen Sie das Gerät und sämtliche Zubehörteile aus. (Falls zutreffend)



Das Verpackungsmaterial ist vollständig zu entsorgen. Siehe *Entsorgung des Verpackungsmaterials*

Dekontamination und Reinigung

1. Entfernen und entsorgen Sie möglicherweise an dem Gerät befestigte Feuchtigkeitsfänger.
2. Sprühen Sie das Gerät mit Mikrocid® Schnelldesinfektionsmittel ein und lassen Sie es mindestens eine Minute lang einwirken. Diesen Zeitraum benötigt das Desinfektionsmittel, um zu verdunsten.
3. Sämtliche Zubehörteile müssen ebenfalls mit dem Schnelldesinfektionsmittel Mikrocid® oder einem gleichwertigen anderen Produkt desinfiziert werden.
4. Sollte das Gerät ein Display haben, reinigen Sie es mit Glasreiniger und einem Papiertuch.
5. Nach Abschluss der Dekontamination werden die Geräte und sämtliches Zubehör ins Lager gebracht und zur Kontrolle und Überprüfung freigegeben.
6. Entsorgen Sie benutzte Papiertücher und Reinigungsmaterialien sachgemäß.

Entsorgung des Verpackungsmaterials

1. Kartons sollten flach zusammengelegt werden.
2. Entsorgen Sie Karton und Verpackungsmaterial in der dafür vorgesehenen Abfalltonne.

Support für Ihr Tobii Dynavox-Gerät

Onlinehilfe
Bitte sehen Sie zuerst online auf der entsprechenden Support-Seite für Ihr Tobii Dynavox-Gerät nach. Dort finden Sie aktuelle Informationen zu Fragen sowie Tipps und Tricks rund um Ihr Produkt. Unsere Support-Seiten finden Sie im Internet unter: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontakt zu Tobii Dynavox Fachhändler
Bei Fragen zu und Problemen mit Ihrem Produkt nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Fachhändler oder Wiederverkäufer von Tobii Dynavox auf, um Unterstützung zu erhalten. Dieser kennt sich mit Ihren persönlichen Gerätekonfigurationen aus und kann Ihnen am besten mit Tipps und Schulungen zu Ihrem Produkt behilflich sein. Die Kontaktdaten finden Sie auf www.TobiiDynavox.com/contact