

Dekontamination der Geräte

Empfohlenes Vorgehen

Anleitung

Der Zweck dieses Dokuments ist die Bereitstellung einer detaillierten Beschreibung der ordnungsgemäßen Entgegennahme und Dekontamination aller eingehender Geräte und Zubehör zum Schutz des Personals vor Infektionen und übertragbaren Krankheiten.

Benötigte Produkte

Anzahl	Produktnummer	Beschreibung
1		Latexfreie Nitrilhandschuhe
1		Schutzbrille
1		Cuttermesser
1		Mikrozid® sensitive liquid oder gleichwertig
1		Glasreiniger
1		Papiertücher

Hintergrund

Annahme

Dieses Dokument setzt voraus, dass der Nutzer die Sicherheitsdatenblätter für alle Reinigungsmittel gelesen und verstanden hat.

Zutreffende Produkte

Tobii I-Series	Tobii PCEye Go	Tobii Dynavox PCEye Mini
Tobii C-Series	Tobii Dynavox PCEye Explore	
Tobii S32	Dynavox Maestro	
Tobii PCEye	Dynavox T-Series	

Ablauf

Ziel

Der Schutz des Personals vor Infektionen und ansteckenden Krankheiten durch die Dekontamination aller eingehenden Geräte und Zubehör.

Hilfe für Ihr Tobii Dynavox Gerät

Online

Schauen Sie auf die produktbezogene Support-Seite Ihres Tobii Dynavox Gerätes. Dort finden Sie aktuelle Informationen zum Produkt. Die Support-Seiten finden Sie auf: www.TobiiDynavox.de oder www.myTobiiDynavox.com.

Kontaktieren Sie Ihren Händler

Kontaktieren Sie bei Fragen oder Problemen mit Ihrem Produkt einen zertifizierten Vertriebspartner von Tobii Dynavox. Diese sind mit Ihren individuellen Einstellungen vertraut und können Sie am besten unterstützen. Schauen Sie für Kontaktinformationen auf www.TobiiDynavox.de/handlerverzeichnis

Umfang

Eine Dekontamination wird für alle eingehenden Reparaturen, Leihgeräte und Rücksendungen empfohlen, bevor mit diesen weitergearbeitet wird.

Eingang des Gerätes

1. Eingegangene Pakete mit zurückgeschickten Geräten und Zubehör sollen zum vorgesehenen Reinigungsbereich gebracht werden. Das Paket sollte nicht außerhalb dieses Bereichs ausgepackt werden.
2. Die latexfreien Nitrilhandschuhe und Schutzbrille MÜSSEN während der Arbeit mit jeglichen Geräten oder Zubehör, das noch nicht dekontaminiert wurde, getragen werden.
3. Öffnen Sie das Paket vorsichtig mit einem Cuttermesser.
4. Entnehmen Sie das Gerät und sämtliches Zubehör.



Alle Verpackungsmaterialien werden entsorgt. Schauen Sie dazu in *Entsorgung von Verpackungsmaterial*

Dekontamination und Reinigung

1. Wenn das Gerät mit einem Feuchtigkeitsschutz versehen ist, entfernen und entsorgen Sie diesen.
2. Sprühen Sie das Gerät mit Mikrocid®sensitive liquid oder gleichwertig ein und lassen Sie dieses mindestens eine Minute wirken. Das Desinfektionsmittel verdampft während dieser Zeit.
3. Sämtliches enthaltene Zubehör muss ebenfalls mit Mikrocid®sensitive liquid oder gleichwertig dekontaminiert werden.
4. Wenn das Gerät einen Bildschirm hat, reinigen Sie diesen mit Glasreiniger und Papiertuch.
5. Nach Beendigung der Dekontamination werden die Geräte zusammen mit dem mitgelieferten Zubehör verpackt und für die Inspektion und Prüfung freigegeben.
6. Entsorgen Sie sorgfältig alle verwendeten Papiertücher und Reinigungsmaterialien.

Entsorgung von Verpackungsmaterial

1. Die Pakete sollten flach zusammengefaltet werden.
2. Entsorgung von Paketen und Verpackungsmaterial in die vorgesehenen Behälter.

Hilfe für Ihr Tobii Dynavox Gerät

Online

Schauen Sie auf die produktbezogene Support-Seite Ihres Tobii Dynavox Gerätes. Dort finden Sie aktuelle Informationen zum Produkt. Die Support-Seiten finden Sie auf: www.TobiiDynavox.de oder www.myTobiiDynavox.com.

Kontaktieren Sie Ihren Händler

Kontaktieren Sie bei Fragen oder Problemen mit Ihrem Produkt einen zertifizierten Vertriebspartner von Tobii Dynavox. Diese sind mit Ihren individuellen Einstellungen vertraut und können Sie am besten unterstützen. Schauen Sie für Kontaktinformationen auf www.TobiiDynavox.de/handlerverzeichnis