

## Dekontamination der Geräte

### Empfohlenes Vorgehen

### Anleitung

Der Zweck dieses Dokuments ist die Bereitstellung einer detaillierten Beschreibung der ordnungsgemäßen Entgegennahme und Dekontamination aller eingehender Geräte und Zubehör zum Schutz des Personals vor Infektionen und übertragbaren Krankheiten.

### Benötigte Produkte

Anzahl	Produktnummer	Beschreibung
1		Latexfreie Nitrilhandschuhe
1		Schutzbrille
1		Cuttermesser
1		Mikrozid® sensitive liquid oder gleichwertig
1		Glasreiniger
1		Papiertücher

### Hintergrund

#### Annahme

Dieses Dokument setzt voraus, dass der Nutzer die Sicherheitsdatenblätter für alle Reinigungsmittel gelesen und verstanden hat.

### Zutreffende Produkte

Tobii I-Series	Tobii PCEye Go	Tobii Dynavox PCEye Mini	Tobii Dynavox EyeMobile Plus
Tobii C-Series	Tobii Dynavox PCEye Explore	Tobii Dynavox PCEye Plus	Tobii Dynavox I-Series(+)
Tobii S32	Dynavox Maestro	Tobii Dynavox Indi™	
Tobii PCEye	Dynavox T-Series	Tobii Dynavox EyeR	

### Ablauf

#### Ziel

Der Schutz des Personals vor Infektionen und ansteckenden Krankheiten durch die Dekontamination aller eingehenden Geräte und Zubehör.

### Support für Ihr Tobii Dynavox-Gerät

Onlinehilfe  
Bitte sehen Sie zuerst online auf der entsprechenden Support-Seite für Ihr Tobii Dynavox-Gerät nach. Dort finden Sie aktuelle Informationen zu Fragen sowie Tipps und Tricks rund um Ihr Produkt. Sie finden unsere Support-Seiten online auf: [www.TobiiDynavox.com](http://www.TobiiDynavox.com) oder [www.myTobiiDynavox.com](http://www.myTobiiDynavox.com).

Kontakt zu Tobii Dynavox Fachhändler  
Bei Fragen zu und Problemen mit Ihrem Produkt nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Fachhändler oder Wiederverkäufer von Tobii Dynavox auf, um Unterstützung zu erhalten. Dieser kennt sich mit Ihren persönlichen Gerätekonfigurationen aus und kann Ihnen am besten mit Tipps und Schulungen zu Ihrem Produkt behilflich sein. Die Kontaktdaten finden Sie auf [www.TobiiDynavox.com/contact](http://www.TobiiDynavox.com/contact).

## Umfang

Eine Dekontamination wird für alle eingehenden Reparaturen, Leihgeräte und Rücksendungen empfohlen, bevor mit diesen weitergearbeitet wird.

## Eingang des Gerätes

1. Eingegangene Pakete mit zurückgeschickten Geräten und Zubehör sollen zum vorgesehenen Reinigungsbereich gebracht werden. Das Paket sollte nicht außerhalb dieses Bereichs ausgepackt werden.
2. Die latexfreien Nitrilhandschuhe und Schutzbrille MÜSSEN während der Arbeit mit jeglichen Geräten oder Zubehör, das noch nicht dekontaminiert wurde, getragen werden.
3. Öffnen Sie das Paket vorsichtig mit einem Cuttermesser.
4. Entnehmen Sie das Gerät und sämtliches Zubehör.



Alle Verpackungsmaterialien werden entsorgt. Schauen Sie dazu in *Entsorgung von Verpackungsmaterial*

## Dekontamination und Reinigung

1. Wenn das Gerät mit einem Feuchtigkeitsschutz versehen ist, entfernen und entsorgen Sie diesen.
2. Sprühen Sie das Gerät mit Mikrozyd® sensitive liquid oder gleichwertig ein und lassen Sie dieses mindestens eine Minute wirken. Das Desinfektionsmittel verdampft während dieser Zeit.
3. Sämtliches enthaltene Zubehör muss ebenfalls mit Mikrozyd® sensitive liquid oder gleichwertig dekontaminiert werden.
4. Wenn das Gerät einen Bildschirm hat, reinigen Sie diesen mit Glasreiniger und Papiertuch.
5. Nach Beendigung der Dekontamination werden die Geräte zusammen mit dem mitgelieferten Zubehör verpackt und für die Inspektion und Prüfung freigegeben.
6. Entsorgen Sie sorgfältig alle verwendeten Papiertücher und Reinigungsmaterialien.

## Entsorgung von Verpackungsmaterial

1. Die Pakete sollten flach zusammengefaltet werden.
2. Entsorgung von Paketen und Verpackungsmaterial in die vorgesehenen Behälter.

## Support für Ihr Tobii Dynavox-Gerät

Onlinehilfe  
Bitte sehen Sie zuerst online auf der entsprechenden Support-Seite für Ihr Tobii Dynavox-Gerät nach. Dort finden Sie aktuelle Informationen zu Fragen sowie Tipps und Tricks rund um Ihr Produkt. Sie finden unsere Support-Seiten online auf: [www.TobiiDynavox.com](http://www.TobiiDynavox.com) oder [www.myTobiiDynavox.com](http://www.myTobiiDynavox.com).

### Kontakt zu Tobii Dynavox Fachhändler

Bei Fragen zu und Problemen mit Ihrem Produkt nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Fachhändler oder Wiederverkäufer von Tobii Dynavox auf, um Unterstützung zu erhalten. Dieser kennt sich mit Ihren persönlichen Gerätekonfigurationen aus und kann Ihnen am besten mit Tipps und Schulungen zu Ihrem Produkt behilflich sein. Die Kontaktdaten finden Sie auf [www.TobiiDynavox.com/contact](http://www.TobiiDynavox.com/contact).