
Anmerkungen zu dieser Version

DynaVox M³-Software, Version 1.03

In diesem Dokument werden die in der Version 1.03 der DynaVox M³-Software enthaltenen neuen Funktionen und Änderungen zusammengefasst.

Neue Funktionen

- Das Menü *Symbol auswählen* ermöglicht nun eine "Platzhalter"-Suche mit einem Stern (*) als Platzhalter. Wenn Sie zum Beispiel **Auto*** eingeben, werden alle Symbole angezeigt, die mit *Auto* beginnen (wie *Autorennen* oder *Autobahn*). Geben Sie ***tag** ein, so werden Symbole angezeigt, die mit *Tag* enden (wie *Montag*, *Dienstag* oder *Geburtstag*).
- Im Menü *Import* können importierte Grafiken nun entweder als Symbole (werden der Symbolsammlung *My Symbols* hinzugefügt) oder als Bilder (werden im Ordner *Images* gespeichert) importiert werden. Bilder, die im Ordner *Images* enthalten sind, können als Hintergrundbild auf Seiten oder für Szenenbilder verwendet werden.
- Die Symbolsammlung *PCS 2008 Addendum* wurde in die vorhandene PCS-Symbolsammlung hinzugefügt und bietet nun ungefähr 1000 zusätzliche Symbole.

Verbesserungen

Es wurden zahlreiche Veränderungen an den M³ Seiten vorgenommen:

- Die Seitennamen wurden ins Deutsche übersetzt.
- Symbolbezeichnungen wurden überarbeitet.
- Die Bezeichnungen im Systemmenü wurden überarbeitet.
- Die länderspezifische Symbolsammlung für Deutschland wurde hinzugefügt.

Weitere Änderungen

- Die Aktion *Verzögertes Abschalten* schaltet das M³ nach einer von Ihnen festgelegten Zeit aus, wenn diese einem Button hinzugefügt wird.
- Die Symbolsammlung *Virtual Symbols* wurde entfernt.
- Die *MightyMo/MiniMo* Seiten-Sets sind nicht länger in der M³ Serie verfügbar.

Behobene Probleme

- In der vorherigen Version der Software wurde der Inhalt des Nachrichtenfensters bei Auswahl nicht gesprochen, wenn die Auswahlmethode Berühren war und Klick in den erweiterten Einstellungen aktiviert wurde. Dieses ist nun möglich.

-
- In der vorherigen Version der Software wurden Änderungen häufig nicht gespeichert, wenn Sie im Menü *M3 Setup* den Button *Daten speichern* gewählt haben und anschließend einen HARDRESET oder Neustart durchgeführt haben. Dieses wurde behoben.
 - In der vorherigen Version der Software konnte die Software in eine Endlosschleife versetzt werden, wenn versucht wurde eine neue Seite zu erstellen und keine Systemtastatur festgelegt war. Dieses wurde behoben.

Bekannte Fehler

- Wenn Symbole über das Menü *Import* hinzugefügt werden, sollte der Name nicht länger als 200 Zeichen sein.
- Wenn Scanning als Auswahlmethode verwendet wird, können im Hintergrund grafische Erscheinungen auftreten. Es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Diese verschwinden, wenn das Fenster im Vordergrund geschlossen wird.
- Sollten Sie versuchen, ein benutzerspezifisches Symbol ohne die Eingabe einer Bezeichnung hinzuzufügen, so reagiert das M³ nicht mehr.
- Wenn Sie Scanning als Auswahlmethode verwenden, sollten die folgenden Einstellungen **nicht** zeitgleich verwendet werden:
 - *Setup Button scannen* (im Menü *Einstellung - Scanning*) ist nicht ausgewählt.
 - *Bildschirm* (im Menü *Einstellung - Scanning*) *reagiert nicht* ist eingestellt.

Diese Kombination verhindert den Zugang zum *Setup* Menü, bis Sie einen Button mit der Aktion *Setup öffnen* programmieren.