

DynaVox AccessIT mit Microsoft Windows XP (Deutsch) verwenden

Das Zubehör DynaVox AccessIT ermöglicht es Ihnen Informationen von einem DynaVox Gerät zu einem Desktop Computer zu senden.

Damit der Computer mit dem Betriebssystem Windows XP (Deutsch) Daten fehlerfrei vom AccessIT Gerät empfangen kann, müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- Fügen Sie "Englisch (USA)" als Eingabesprache für die Tastatur hinzu
- Setzen Sie die Eingabesprache für die Windows Anwendung, die die Daten empfangen soll, auf "Englisch (USA)"

 **HINWEIS**

Diese Instruktionen müssen Sie auch durchführen, wenn Sie ein offenes DynaVox Series 5 Gerät mit dem Betriebssystem Windows XP (Deutsch) verwenden und Sie die Bildschirmtastaturen der Series5 Software nutzen möchten um Daten an ein anderes Windows Programm, das auf Ihrem Series 5 Gerät installiert ist, zu senden.

Schritt 1 - "Englisch (USA)" als Eingabesprache zur Tastatur hinzufügen

 **HINWEIS**

Dieser Schritt muss nur einmal am Computer oder am offenen Series 5 Gerät durchgeführt werden.

Auf dem Windows Desktop:

1. Öffnen Sie **Systemsteuerung**.
2. Wählen Sie **Regions- und Sprachoptionen**.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Sprachen**.
4. Wählen Sie den Button **Details**. Das Menü Textdienste und Eingabesprachen wird geöffnet.
5. Im Sichtfenster unter Installierte Dienste wählen Sie **Englisch (USA)**.

Wenn "Englisch (USA)" im Sichtfenster nicht verfügbar ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie **Hinzufügen**.
- Wählen Sie das Menü **Eingabegebietsschema** und wählen Sie **Englisch (USA)**.
- Wählen Sie **Tastaturlayout/IME**.
- In der Auswahl wählen Sie **Englisch (USA)**.
- Wählen Sie den Button **Eingabegebietsschema-Leiste**.

-
- Aktivieren Sie die Zeile **Eingabegebietsschema-Leiste auf dem Desktop anzeigen** und bestätigen Sie diese Auswahl mit **OK**.
 - Schließen Sie das Menü mit **OK**.
 - Wählen Sie **Übernehmen**.

Die Sprachanzeige wird nun auf der Windows Oberfläche angezeigt. Sie können diese nun mit der Maus in die Taskleiste verschieben. Die Eingabesprache Englisch hat die Bezeichnung "EN", Deutsch hat die Bezeichnung "DE".



HINWEIS

Das Standard-Tastenkürzel zum Wechseln zwischen den Eingabesprachen ist linkes Alt+Shift.

(Optional:) Wenn Sie ein Tastenkürzel zum Wechseln der aktuellen Eingabesprache einrichten möchten, wählen Sie den Button **Tastatur** unter Einstellungen. Im Menü **Erweiterte Tastatureinstellungen** können Sie eine Tastenkombination für ein ausgewähltes Eingabegebietsschema festlegen und mit **Tastenkombination ändern** bestätigen.

6. Wählen Sie **OK** um das Menü *Textdienste und Eingabesprachen* zu schließen.
7. Wählen Sie **OK** um das Menü *Regions-und Sprachoptionen* zu schließen.
8. Schließen Sie die *Systemsteuerung*.

Schritt 2 - Einstellen der Eingabesprache für eine Windows-Anwendung

Immer wenn Sie Daten über den AccessIT an ein Windows Programm senden möchten, müssen Sie die Eingabesprache für diese Anwendung auf Englisch stellen.



HINWEIS

Diese Schritte werden nur im geöffneten Windows Programm ausgeführt. Wenn Sie ein anderes Programm (eine andere Anwendung) öffnen, müssen Sie diese Schritte wiederholen während das Programm aktiv ist.



HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Funktion Num Lock an Ihrer Tastatur aktiviert ist.

1. Öffnen Sie das Windows Programm, das die Daten über den AccessIT oder von einer Bildschirmtastatur empfangen soll (z.B. Microsoft Word, Notepad).
2. Wählen Sie **DE** in der Sprachanzeige der Windows Taskleiste und stellen Sie die Eingabesprache auf **EN Englisch (USA)**.



HINWEIS

Wenn Sie ein eigenes Tastenkürzel zum Wechseln der Eingabesprache für die Tastatur erstellt haben, können Sie dieses Tastenkürzel verwenden.

3. Wenn Sie die Übertragung der Daten über den AccessIT abgeschlossen haben, klicken Sie wieder auf EN in der Sprachanzeige der Taskleiste und stellen Sie die Eingabesprache wieder auf DE Deutsch (Deutschland).

**HINWEIS**

Wenn Sie ein eigenes Tastenkürzel zum Wechseln der Eingabesprache für die Tastatur erstellt haben, können Sie dieses Tastenkürzel verwenden.

DynaVox AccessIT mit Microsoft Windows Vista & Windows 7 (Deutsch) verwenden

Das Zubehör DynaVox AccessIT ermöglicht es Ihnen Informationen von einem DynaVox Gerät zu einem Desktop Computer zu senden.

Damit der Computer mit dem Betriebssystem Windows Vista & Windows 7 (Deutsch) Daten fehlerfrei vom AccessIT Gerät empfangen kann, müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- Fügen Sie "Englisch (USA)" als Eingabesprache für die Tastatur hinzu
- Setzen Sie die Eingabesprache für die Windows Anwendung, die die Daten empfangen soll, auf "Englisch (USA)"



HINWEIS

Diese Instruktionen müssen Sie auch durchführen, wenn Sie ein offenes DynaVox Series 5 Gerät mit dem Betriebssystem Windows Vista (Deutsch) verwenden und Sie die Bildschirmtastaturen der Series5 Software nutzen möchten um Daten an ein anderes Windows Programm, das auf Ihrem Series 5 Gerät installiert ist, zu senden.

Schritt 1 - "Englisch (USA)" als Eingabesprache zur Tastatur hinzufügen



HINWEIS

Dieser Schritt muss nur einmal am Computer oder am offenen Series 5 Gerät durchgeführt werden.

Auf dem Windows Desktop:

1. Öffnen Sie **Systemsteuerung**.

Arbeiten Sie unter der klassischen Ansicht von Vista, so fahren Sie bei Punkt 3 fort.

2. Wählen Sie **Zeit, Sprache und Region**.



HINWEIS

In Windows 7 und wählen Sie eine **Region und Sprache** weiter zu Schritt 4 fort.

3. Wählen Sie **Regions- und Sprachoptionen**.
4. Wählen Sie die Registerkarte **Tastaturen und Sprachen**. Sie befinden sich nun im Menü **Textdienste & Eingabesprachen**.
5. Wählen Sie den Punkt **Tastaturen ändern**.

Im Sichtfenster unter Installierte Dienste wählen Sie **Englisch (USA)**.

Wenn "Englisch (USA)" im Sichtfenster nicht verfügbar ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie **Hinzufügen**.
- Suchen Sie in der Auswahl **Englisch (USA)**.
- Klicken Sie auf das Plus-Zeichen bei Englisch (USA).
- In der Erweiterung klicken Sie auf das Plus-Zeichen bei **Tastatur** unter Englisch (USA).
- Klicken Sie auf **US**.
- Schließen Sie das Menü mit **OK**.
- Wählen Sie **Übernehmen**.
- Schließen Sie das Fenster mit **OK**.

Die Sprachanzeige sollte nun unten rechts neben der Windows Taskleiste erscheinen. Die Eingabesprache Englisch hat die Bezeichnung "EN", Deutsch hat die Bezeichnung "DE".

**HINWEIS**

Das Standard-Tastenkürzel zum Wechseln zwischen den Eingabesprachen ist linkes Alt+Shift.

(Optional:) Wenn Sie ein Tastenkürzel zum Wechseln der aktuellen Eingabesprache einrichten möchten, wählen Sie die Registerkarte **Erweiterte Tastatureinstellungen** unter **Textdienste & Eingabesprache (s.o.)**. Im Menü **Erweiterte Tastatureinstellungen** können Sie eine Tastenkombination für ein ausgewähltes Eingabegebietsschema festlegen und mit **Tastenkombination ändern** bestätigen.

6. Wählen Sie **OK** um das Menü *Textdienste & Eingabesprachen* zu schließen.

**HINWEIS**

In Windows 7 und wählen Sie **OK** um das Menü *Region und Sprache* weiterhin Schritt 8 fort.

7. Wählen Sie **OK** um das Menü *Regions-und Sprachoptionen* zu schließen.
8. Schließen Sie die *Systemsteuerung*.

Schritt 2 - Einstellen der Eingabesprache für eine Windows-Anwendung

Immer wenn Sie Daten über den AccessIT an ein Windows Programm senden möchten, müssen Sie die Eingabesprache für diese Anwendung auf Englisch stellen.

**HINWEIS**

Diese Schritte werden nur im geöffneten Windows Programm ausgeführt. Wenn Sie ein anderes Programm (eine andere Anwendung) öffnen, müssen Sie diese Schritte wiederholen während das Programm aktiv ist.

**HINWEIS**

Stellen Sie sicher, dass die Funktion Num Lock an Ihrer Tastatur aktiviert ist.

-
1. Öffnen Sie das Windows Programm, das die Daten über den AccessIT oder von einer Bildschirmstastatur empfangen soll (z.B. Microsoft Word, Notepad).
 2. Wählen Sie **DE** in der Sprachanzeige der Windows Taskleiste und stellen Sie die Eingabesprache auf **EN Englisch (USA)**.

**HINWEIS**

Wenn Sie ein eigenes Tastenkürzel zum Wechseln der Eingabesprache für die Tastatur erstellt haben, können Sie dieses Tastenkürzel verwenden.

3. Wenn Sie die Übertragung der Daten über den AccessIT abgeschlossen haben, klicken Sie wieder auf **EN** in der Sprachanzeige der Taskleiste und stellen Sie die Eingabesprache wieder auf **DE Deutsch (Deutschland)**.

**HINWEIS**

Wenn Sie ein eigenes Tastenkürzel zum Wechseln der Eingabesprache für die Tastatur erstellt haben, können Sie dieses Tastenkürzel verwenden.
