

Introduktion

Introduktion til MyTobii P10

tobii



Introduktion til MyTobii P10

Denne vejledning skal hjælpe dig med at opstille og begynde at bruge MyTobii P10.

MyTobii P10 kan anvendes med flere forskellige monteringsystemer. Daessy-monteringsystemet (*se**) fastgøres til den nederste del af P10 og kræver afstandsstykker. Ergotron-monteringsystemet fastgøres til den øverste del af P10.

Fastgørelse af Ergotron-stativet

1. Underdelen af Ergotron-bordstativet, som leveres med MyTobii, skal monteres først. Sørg for, at underdelen er sikkert monteret på et bord, som kan bære vægten af P10, selv når monteringsarmen er forlænget. (*se A*)
2. Monter stativets anden del og tilspænd den med en unbrakonøgle. (*se B*)
3. Anbring forsigtigt P10 nedad på en overflade, der ikke ridser skærmen. Brug de fire plastiksruer til at montere Ergotron-bordstativets arm ved først at placere dem i modsatte hjørner. Fjederen skal vende mod undersiden af P10. (*se C*)
4. Løft forsigtigt P10 og monteringsarmen op, og fastgør den til resten af monteringssystemet. (*se D*)

Sådan tænder du for MyTobii P10


1. Sæt netledningen ind i bunden af P10 og tilslut den.
2. Tryk på den forreste knap på P10 for at tænde for enheden. Sluk for P10 ved at afslutte MyTobii-softwaren og vælge Startmenu/Luk i proceslinjen i Windows.
3. Tryk på knapperne, der sidder øverst bag på enheden for at justere lydstyrken.



P10 med netledning, AC-adapter og Ergotron-monteringssæt




() P10 med Daessy-monteringssæt*

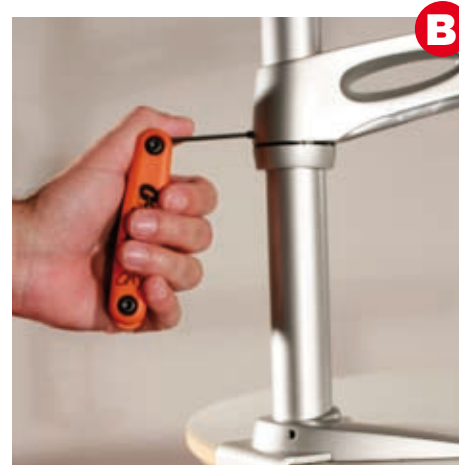



1. På skrivebordet i MyTobii skal du gå til menuen **Indstillinger**. Du kan gøre dette ved at røre nederste højre hjørne af skærmen og vælge knappen Indstillinger, som vises på skærmen.

(se F)

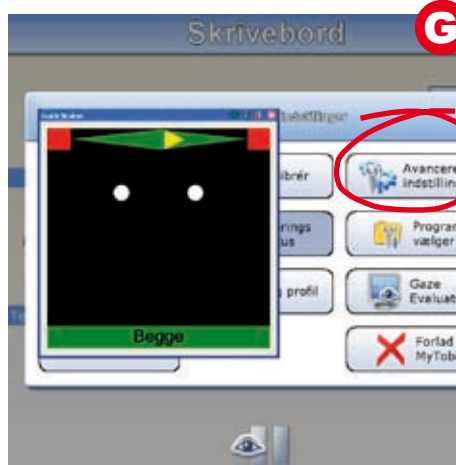

2. I menuen **Indstillinger** skal du vælge **Spor Status**.


Der vises et vindue, som angiver, om brugerens øjne registreres af systemet. Den gule trekant øverst i dialogboksen Spor Status bør være i midten. Det viser, at brugeren sidder i en passende afstand til øjenstyring. De to hvide cirkler, der repræsenterer brugerens øjne, bør være så tæt på midten af dialogboksen som muligt. En indikatorlinje nederst i dialogboksen Spor Status bliver grøn, hvis den kan spore brugerens øjne.

Hvis brugeren kun bruger det ene øje, kan det være nødvendigt at foretage justeringer i menuen **Avancerede indstillinger**.

(se G)

Hvis afstandsmåleren ikke vises, når du åbner dialogboksen Spor Status, skal du klikke på den lille grønne diamant i øverste højre hjørne af dialogboksen Spor Status.

(se H)

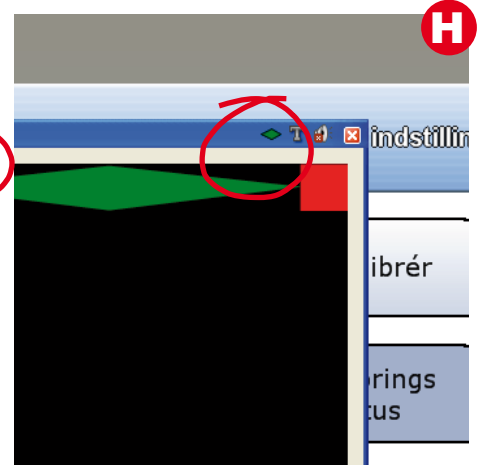

3. Luk dialogboksen Spor Status ved at berøre øverste højre hjørne af vinduet for at lukke det eller ved at klikke på knappen **Spor Status** i menuen Indstillinger.

4. Gå til menuen **Kalibrering**. Den starter med det samme.

5. Når kalibreringen er færdig, skal du **lukke** menuen **Indstillinger**. Du befinder dig nu på MyTobii-skrivebordet (se næste afsnit).


Hvis kalibreringen mislykkedes, skal du prøve igen. Hvis den mislykkes igen, skal du gå til **Avancerede indstillinger** (der er ikke adgang til denne menu med øjenstyring).

Bemærk! I menuen Indstillinger kan du vælge adgangsmetode (dvæle, blink, knap). Almindeligvis skal du prøve dvæle med standardindstillingen for dvæle (ca. 1000 msek.) i mindst 5 minutter! Det er ofte den nemmeste metode til øjenstyring, og det er bedst at afprøve den, inden muligheden udelukkes.

Hvis kalibreringen mislykkedes, skal du åbne Avancerede indstillinger.

1. Vælg Kalibrering (i venstre side af skærmen). (Se I)
2. In denne menu kan du ændre farver, stimulustype og aktivt øje til kalibrering. Se i brugervejledningen, hvis du har brug for flere oplysninger.
3. Vælg Kalibrer igen.
4. Hvis kalibreringen lykkedes, skal du lukke "Avancerede indstillinger" og lukke menuen "Indstillinger", indtil du er på MyTobii-skrivebordet.
5. Hvis kalibreringen stadig ikke lykkes, skal du måske justere Kalibreringsområdet. Se i brugervejledningen eller kontakt din MyTobii-repræsentant eller Teknisk Support, hvis du ikke kender denne funktion.

Bemærk! I denne menu kan du også ændre kalibreringsstimulussen fra et punkt til et billede samt ændre stimulussens størrelse og hastighed.

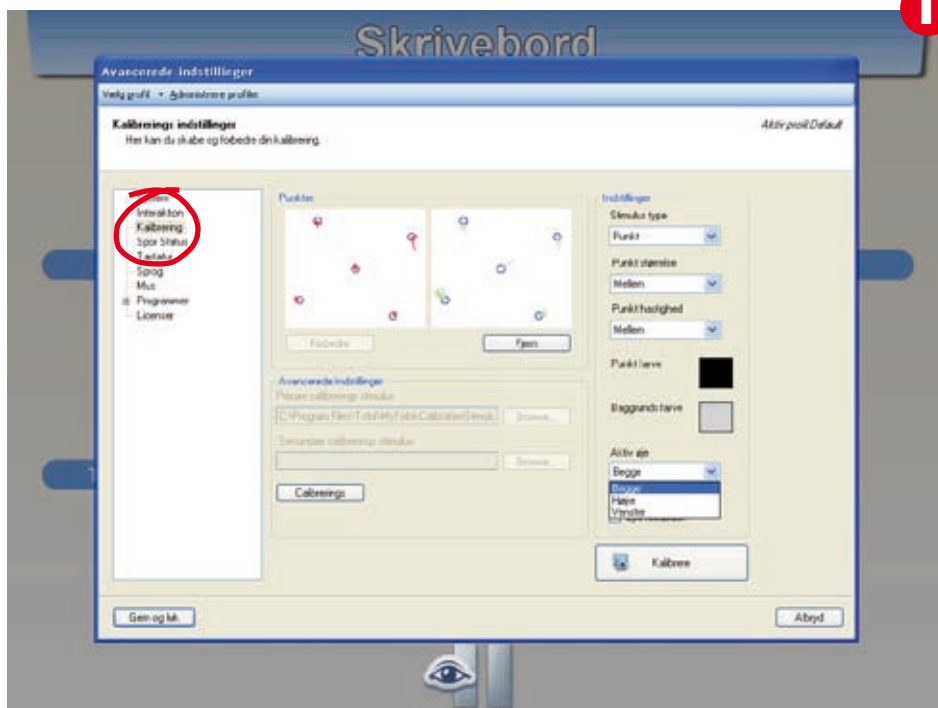

Sådan fastlægges den hensigtsmæssige knapstørrelse til Øjenstyring:

For at fastlægge den hensigtsmæssige gitterstørrelse til en ny bruger skal du vælge "Gaze Evaluator" i menuen Grundlæggende indstillinger. Dette kan kun gøres, hvis der er tilsluttet et USB-tastatur til MyTobii P10, så du har kontrol over, hvilke gitterstørrelser brugeren har adgang til. For at vurdere den hensigtsmæssige gitter- og knapstørrelse skal du vælge "Gitterevaluator".

Gitterevaluator:


1. Sæt dit USB-tastatur til.
2. Åbn Gitterevaluator. (Se J)
3. Vælg nr. 3 "Test af gitterstørrelse"
4. Et gitter på 2x1 åbnes automatisk. Instruér brugeren i først at se på det ene element og derefter på det andet. Du ved, om brugeren har valgt en knap, hvis den skifter til en mørkegrå farve, når den vælges.

5. Flyt til næste gitterstørrelse med højre piletast på dit tastatur.
6. Når du har fundet den rette gitterstørrelse, skal du trykke på ESC på tastaturet.
7. Nu ved du, hvilken gitterstørrelse der passer til brugeren! Du kan gå ind i din kommunikationssoftware og vælge et layout, der passer til størrelsen.

For at få yderligere hjælp bedes du læse i brugervejledningen til MyTobii P10, anden P10-dokumentation og/eller kontakte Teknisk Support.

Meld dig ind i MyTobii-gruppen, et virtuelt mødested for alle brugere af MyTobii. Her kan du finde oplysninger, stille spørgsmål og dele ideer med folk fra hele verden.

Besøg www.mytobiicomunity.com

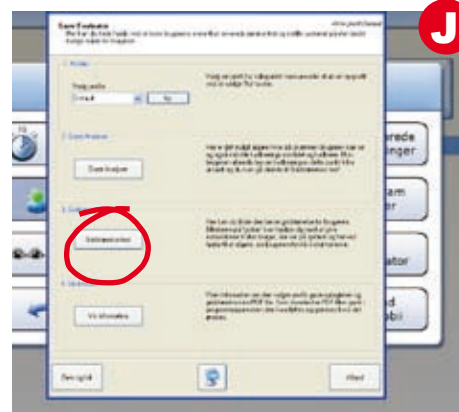

Sverige
Tobii Technology AB
Karlsrovägen 2D
S-182 53 Danderyd
Sverige
+46 8 663 69 90 Tlf.
+46 8 30 14 00 Fax
sales@tobii.com

USA
Tobii ATI
333 Elm Street
Dedham, MA 02026
USA
+1-800-793-9227 Gratis
+1-781-461-8200 Kontor
+1-781-461-8213 Fax
sales.us@tobii.com

Tyskland
Tobii Technology GmbH
Niedenau 45
60325 Frankfurt am Main
Tyskland
+49 69 24 75 03 40 Tlf.
+49 69 24 75 03 429 Fax
sales.de@tobii.com

Japan
Tobii Technology, Ltd.
3-4-13 Takanawa,
Minato-ku
Tokyo 108-0074
Japan
+81-3-5793-3316 Tlf.
+81-3-5793-3317 Fax
sales.jp@tobii.com

mytobii
www.tobii.com