

Komma igång

Komma igång med MyTobii P10

tobii



Komma igång med MyTobii P10

Den här handboken är avsedd att hjälpa dig att installera och börja använda MyTobii P10.

MyTobii P10 kan användas tillsammans med en mängd olika fästen. Daessy-fästsystemet (*Se **) fästs i den nedre delen av P10-skärmen och kräver särskilda distansbrickor. Ergotron-fästsystemet fästs i den övre delen av P10-skärmen.

Montering av Ergotron-fästet

1. Först måste du skruva fast bordsfästet för det Ergotron-fäste som kan levereras som tillbehör med MyTobii. Kontrollera att bordsfästet sitter säkert på ett bord som håller för vikten hos P10-skärmen, också när fästets arm dragits ut.

(se A)

2. Sätt fast fästets andra del och dra åt med en insexnyckel.

(se B)

3. Lägg försiktigt ned P10-skärmen på en yta som inte repar skärmen. Fäst armen för Ergotron-fästet med hjälp av de fyra plastskruvarna, som du fäster korsvis. Fjäderska ska vara vänd mot P10-skärmens undersida. (se C)

4. Lyft försiktigt upp P10-skärmen med fästarmen och sätt fast den i resten av fästsystemet. (se D)

Slå på MyTobii P10

1. Sätt i nätsladden på undersidan av P10-skärmen och sedan i vägguttaget.
2. Slå på skärmen genom att trycka på knappen på framsidan. Du stänger av P10-skärmen genom att gå från MyTobii-programvaran till Aktivitetsfältet i Windows och sedan välja: Start-menyn/ Stäng av.
3. Du kan justera volymen genom att trycka på knapparna längst upp på baksidan av skärmen.





P10 med nätsladd, nätdapter och Ergotron-fästsystem



(*) P10 med Daessy-fäste



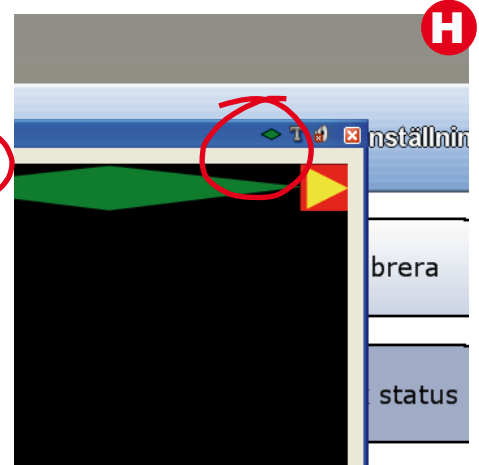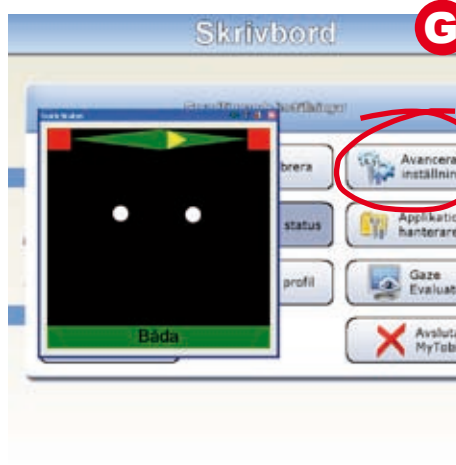

1. Öppna **Inställning**-menyn på MyTobii-skrivbordet. Detta kan du göra genom att peka på den blå menylisten i överkant av skärmen eller i det undre högra hörnet av skärmen och välja menyknappen **Inställningar** som visas på skärmen.
(se F)

2. Välj **Track status** på menyn **Inställningar**.
Ett fönster öppnas och visar om användarens ögon kan registreras av systemet. Den gula triangeln överst i Track Status-fönstret ska visas i mitten, vilket visar att användaren befinner sig på ett idealiskt avstånd för ögonstyrning. De två vita cirklar som representerar användarens ögon ska vara så nära mitten av rutan som möjligt. Statusfältet i fönstrets underkant växlar till grön färg om användarens ögon kan spåras av enheten.

Om användaren endast använder ett öga, kan du behöva ändra inställningarna på menyn **Avancerade inställningar**.
(se G)

Om avståndsmätaren inte visas när du öppnar fönstret Track Status klickar du på den lilla gröna romben i det övre högra hörnet av Track Status-fönstret.
(se H)

3. Stäng Track Status-fönstret genom att peka i det övre högra hörnet av fönstret eller genom att klicka på knappen **Track Status** i menyn **Inställningar**.
4. Öppna menyn **Kalibrering**. Kalibreringen startar direkt.
5. När kalibreringen slutförts **stänger** du menyn **Inställningar**. Du har åter hamnat på MyTobii-skrivbordet (se nästa avsnitt).


Om kalibreringen misslyckades försöker du en gång till. Om den misslyckas en gång till, öppnar du menyn **Avancerade inställningar** (den här menyn kan inte nås med ögonstyrning).

*Obs! I menyn **Inställningar** kan du välja vilken typ av manövermetod som ska användas (autoklick, blinkklick, knapp). Prova först att använda autoklick med standardfördröjning (ung. 1000 ms) i minst 5 minuter. Detta är ofta den enklaste formen av ögonstyrning och det är bäst att prova denna metod först innan den utesluts.*

Om kalibreringen misslyckades, öppnar du Avancerade inställningar.

1. Välj Kalibrering (till vänster på skärmen). (Se I)
2. I den här menyn kan du byta färger, stimulustyp och aktivt öga för kalibreringen. Mer information finns i handboken.
3. Välj Kalibrera en gång till.
4. Om kalibreringen lyckades stänger du Avancerade inställningar och sedan också menyn Inställningar så att du kommer tillbaka till MyTobii-skrivbordet.
5. Om kalibreringen inte lyckades den här gången heller kan du behöva justera kalibreringsarean. Mer information om den här funktionen finns i handboken, men du kan också kontakta din MyTobii-representant eller teknisk support.

Obs! I den här menyn kan du också byta kalibreringsstimulit från en punkt till en bild och du kan också ändra storlek och hastighet för stimulusbilden.

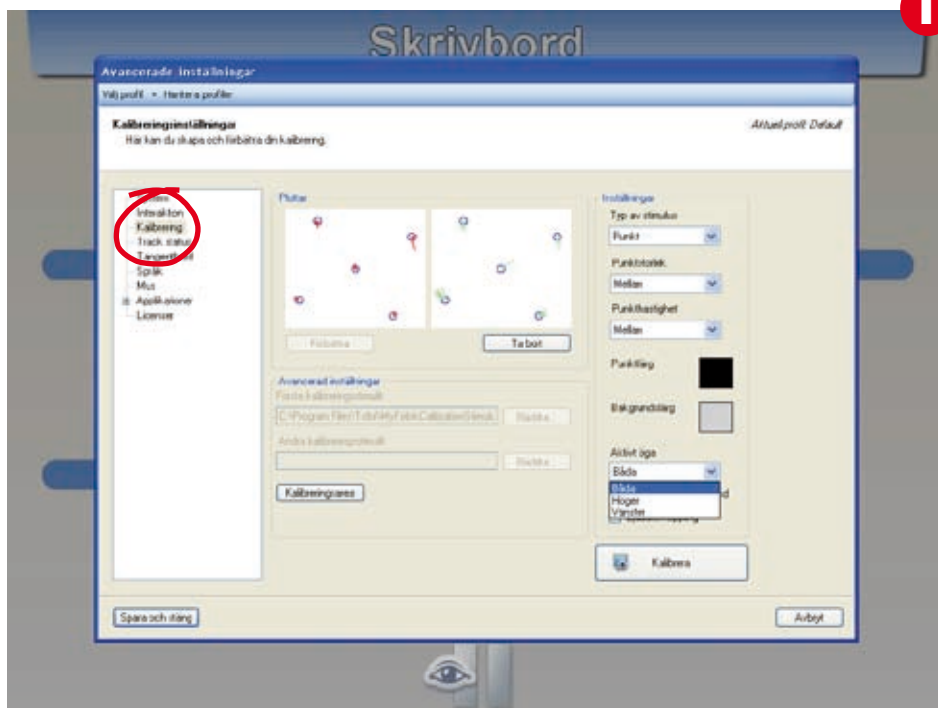

Så här bestämmer du en lämplig storlek för ögonstyrning:

För att kunna hitta en lämplig rutnätsstorlek för en ny användare väljer du Gaze Evaluator på menyn Grundläggande inställningar. Denna dialogruta kan endast användas med ett USB-tangentbord inkopplat till MyTobii P10, vilket gör att du har kontroll över vilka rutnätsstorlekar användaren får tillgång till. Bestäm sedan lämpliga rutnäts- och knappstorlekar genom att välja Grid Evaluator.

Grid Evaluator:


1. Koppla in ditt USB-tangentbord.
2. Öppna Grid Evaluator. (Se J)
3. Välj 3: Grid Size Test
4. Ett rutnät med 2x1 rutor öppnas. Be användaren att först titta i den ena rutan och sedan i den andra. Du märker när användaren har valt en knapp eftersom den byter färg till mörkgrå varje gång den väljs.

5. Byt till nästa rutnätsstorlek med hjälp av högerpilen på tangentbordet.
6. När du har hittat en lämplig rutnätsstorlek trycker du på ESC på tangentbordet.
7. Nu vet du vilken rutnätsstorlek som passar den här användaren. Då kan du gå över till kommunikationsprogramvaran och välja ett layoutexempel som överensstämmer med denna storlek.

Du hittar mer information i handboken för MyTobii P10, i övriga snabbguider för P10 eller genom att kontakta teknisk support.

Gå med i användargruppen för MyTobii, en virtuell mötesplats för alla MyTobii-användare. Här hittar du information och kan ställa frågor och dela idéer med människor över hela världen.

Besök www.mytobiicommunity.com

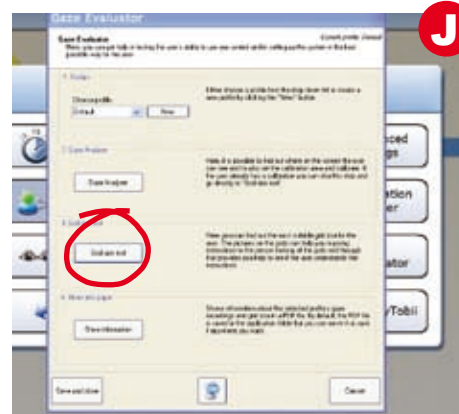

Sverige
Tobii Technology AB
Karlsrovägen 2D
S-182 53 Danderyd
Sverige
+46 8 663 69 90 telefon
+46 8 30 14 00 fax
sales@tobii.com

USA
Tobii ATI
333 Elm Street
Dedham, MA 02026
USA
+1-800-793-9227 avgiftsfritt
+1-781-461-8200 växel
+1-781-461-8213 fax
sales.us@tobii.com

Tyskland
Tobii Technology GmbH
Niedenu 45
60325 Frankfurt am Main
Tyskland
+49 69 24 75 03 40 telefon
+49 69 24 75 03 429 fax
sales.de@tobii.com

Japan
Tobii Technology, Ltd.
3-4-13 Takanawa,
Minato-ku
Tokyo 108-0074
Japan
+81-3-5793-3316 telefon
+81-3-5793-3317 fax
sales.jp@tobii.com

mytobii
www.tobii.com