

Communicator 5 Accessible Apps - Accessible SMS (Android Messages): Kurzanleitung

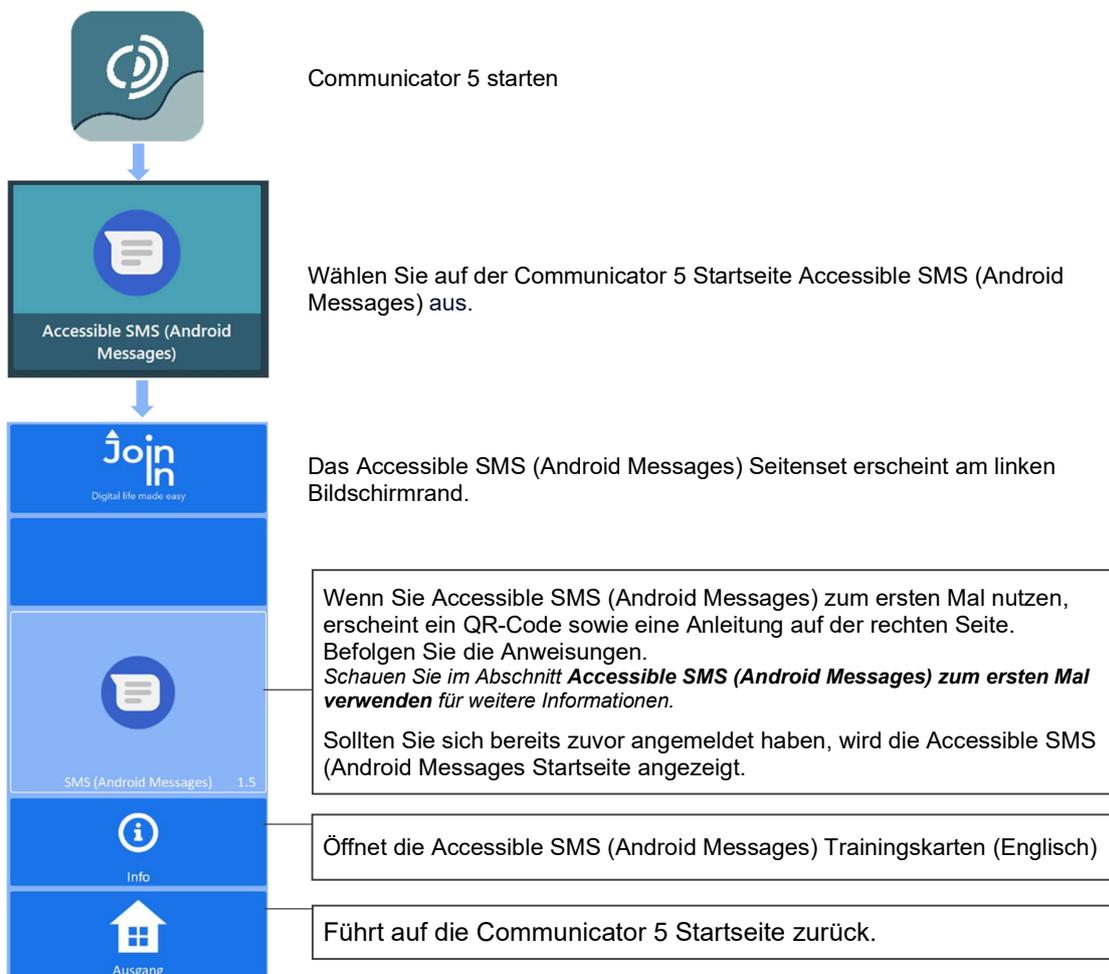
Dieses Dokument enthält Anweisungen zur Verwendung von Accessible SMS (Android Messages) in der Communicator 5 Accessible Apps-Sammlung, um mit Familie und Freunden in Verbindung zu bleiben.

Anforderungen: Um Accessible SMS (Android Messages) verwenden zu können, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein.

- Ein Android-Smartphone oder -Tablet (mit SIM-Karte) mit installierter Messages-App (von Google)
- Das Smartphone/Tablet muss bei Nutzung von Accessible SMS (Android Messages) auf einem Kommunikationsgerät mit dem Internet verbunden sein.
- Das Kommunikationsgerät muss mit dem Internet verbunden sein.

Hinweis: Schauen Sie für Anweisungen zum Einrichten der Communicator 5 Startseite mit den Accessible Apps Seitensets in das Dokument **Quick Guide - Getting Started with Communicator 5 Accessible Apps**.

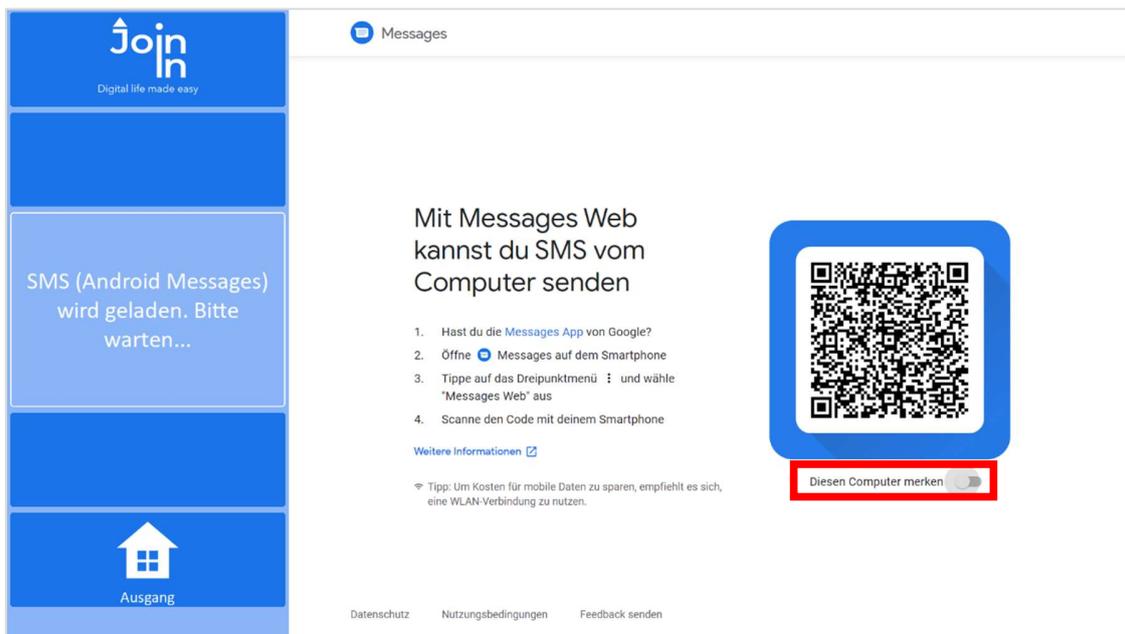
Starten von Accessible SMS (Android Messages)



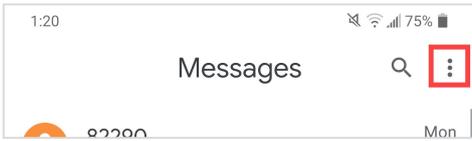
Accessible SMS (Android Messages) zum ersten Mal verwenden

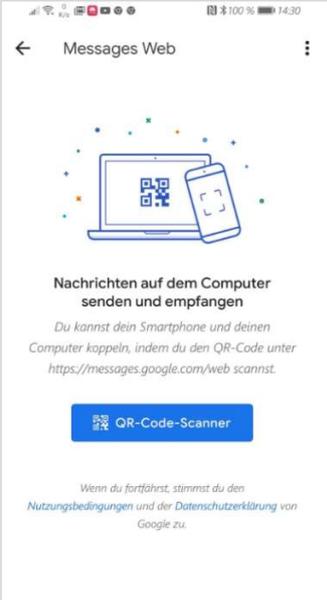
Nachdem Sie Accessible SMS (Android Messages) gestartet und das SMS (Android Messages) Feld auf der Startseite ausgewählt haben, wechselt die Seite im linken Bereich zur Hauptseite und auf der rechten Seite erscheint ein QR Code sowie eine Anleitung zum Einrichten von Accessible SMS (Android Messages).

Hinweis: Der QR-Code läuft nach einem kurzen Zeitraum der Inaktivität ab, wenn der Anwender bspw. zuerst noch das Telefon vorbereiten muss. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Option **Diesen Computer merken** unter dem QR-Code aktiviert ist, wenn der Benutzer möchte, dass sein Gerät gespeichert wird.



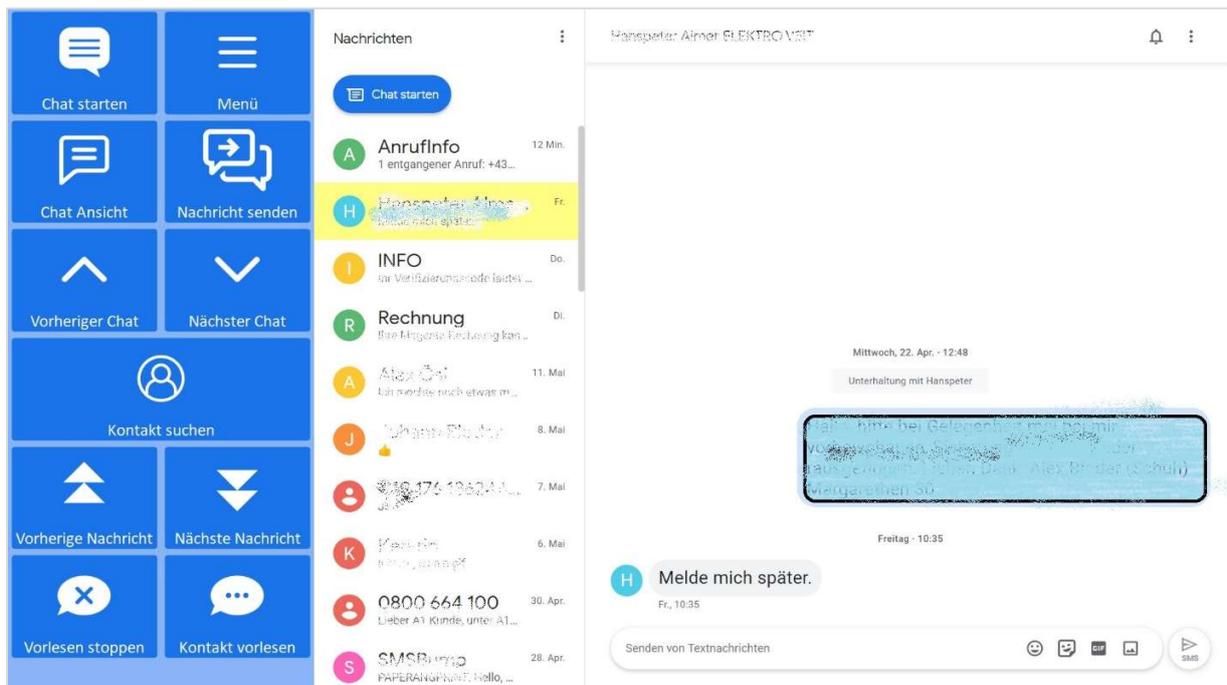
Auf dem Telefon/Tablet des Anwenders

	<p>„Messages“ öffnen</p>
	<p>Auf der "Messages" Startseite Menü (3 Punkte) auswählen.</p>
	<p>Im erscheinenden Menü Messages Web auswählen.</p>

	<p>Wählen Sie im Menü QR-Code-Scanner aus, um die Kopplung zwischen dem Telefon/Tablet und dem Kommunikationsgerät (oder dem Computer) des Anwenders durchzuführen.</p>
	<p>Richten Sie die Kamera des Telefon/Tablet auf den Bereich von Accessible SMS (Android Messages), wo der QR-Code zu sehen ist, um diesen zu scannen.</p>

Auf dem Kommunikationsgerät - Accessible SMS (Android Messages)

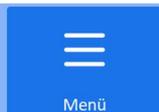
Direkt nachdem der QR-Code gescannt wurde, wird die rechte Seite neu geladen und die „Messages“ Hauptseite angezeigt.



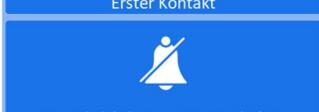
Nachrichten verschicken, Chats und Kontakte verwalten

Nach dem Start und/oder ersten Einrichten von Accessible SMS (Android Messages) bietet die Seite Felder für sämtliche Funktionen von Messages auf eine einfache Weise an.

Haupt-Bedienseite

Öffnen Sie den Chat, und wählen Sie einen Kontakt aus, mit dem Sie den Chat starten möchten.	 Chat starten	 Menü	Wechseln zur Menüseite <i>Schauen Sie in den Abschnitt Menüseite für weitere Informationen</i>
Wechseln zu einer Seite zum Verwalten der Nachrichten des ausgewählten Chats <i>Schauen Sie in den Abschnitt Chat-Ansicht für weitere Informationen.</i>	 Chat Ansicht	 Nachricht senden	Sendet eine Nachricht (Text, Emoji, Bild, Datei, usw.) an den ausgewählten Kontakt.
Navigiert zum Kontakt oberhalb des ausgewählten Kontakts	 Vorheriger Chat	 Nächster Chat	Navigiert zum Kontakt unterhalb des ausgewählten Kontakts
	 Kontakt suchen		Anzeigen der Kontaktliste des Benutzers zum Durchsuchen und Auswählen eines Kontakts
Scrollt mehrere Nachrichten im Chat des ausgewählten Kontakts nach oben	 Vorherige Nachricht	 Nächste Nachricht	Scrollt mehrere Nachrichten im Chat des ausgewählten Kontakts nach oben
Vorlesen stoppen	 Vorlesen stoppen	 Kontakt vorlesen	Das Gerät liest den Namen des ausgewählten Kontaktes laut vor

Menüseite

Auswählen von Kontakten zum Erstellen einer Gruppe und Starten eines Gruppenchats	 Gruppenchat starten	 Zurück	Keht zur vorherigen Seite zurück
Springt zum ersten Kontakt im Chatverlauf	 Erster Kontakt		
	 Benachrichtigung stummschalten		Benachrichtigungen stummschalten
Archivieren des ausgewählten Chats	 zum Archiv	 Chat löschen	Löschen des ausgewählten Chats
Wiederherstellen von Android Messages, schließen von weiteren Fenstern und mehr <i>(Schauen Sie in das Dokument Quick Guide - Communicator 5 Accessible Apps - Utilities and Options für weitere Informationen)</i>	 Werkzeuge	 Einstellungen	Lautstärke anpassen, Textgröße ändern, automatisches Vorlesen und mehr <i>(Schauen Sie in das Dokument Quick Guide - Communicator 5 Accessible Apps - Utilities and Options für weitere Informationen)</i>
	 Ausgang (Communicator Startseite)		Führt auf die Communicator 5 Startseite zurück

Chatansicht Seite

