


Sett inn kort

Påse at strekkoden vender opp under rammen.

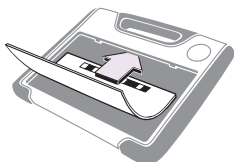


Bruk Fingerguider

Sett inn lang kant først, og trykk ned. Klikk på plass.



Ta opp lyd


Trykk og hold Modusknappen, trykk Ta opp-knappen, slipp Modus-, slipp så Ta opp-knappen. Trykk/hold en tast, snakk nær mik-en!

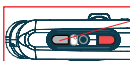

Trykk Modus knapp og gå ut av Ta opp

Ta opp IR

Først, samme prosedyre som ved lydopptak. Trykk så og slipp Ta opp-knappen på nytt. Trykk/slipp en tast, ta opp!

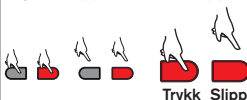

Inn og ut av Oppsettmodus

Uten kort på plass hold på Modusknappen, og trykk grønn pil for å gå inn. Trykk rød pil for å gå ut.



Endre høyttalervolum

I Oppsettmodus + for mer, - for mindre. Med et kort på plass hold Modusknappen samtidig.



Modusknapp

Oppsettmodus

For endringer i Oppsettmodus se: Tobii S32 brukerhåndbok > Oppsettmeny > Tobii S32 Scan.

S32 Support

Kontakt forhandler eller besøk: www.tobii.com.

Viktige LED-lamper

- ○ ● - Spiller av lyd
- ○ ● - Utfører IR
- ● ● - Med lyd: Feil eller låst
- ● ● - Rødt blink: Venter på å ta opp lyd
- ● ○ - Blink: Venter på å ta opp IR
- ○ ○ - Sender/ mottar data