


Sätta i kort

Se till att streckkoden är vänd uppåt under ramen.

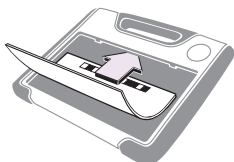



Sätta på fingerguide

Sätt i långsidan först, tryck sedan ned. Klickar på plats.



Spela in ljud

Håll ned knappen Läge, tryck på knappen Inspelning, släpp först Läge och sedan Inspelning. Håll ned en tangent, tala nära mikrofonen!

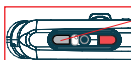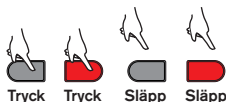

Tryck på Läge för att avsluta insp.läge

Spela in IR

Följ först proceduren för ljudinspelning. Tryck sedan ned/släpp inspelningsknappen en andra gång. Tryck/släpp tangent, spela in!



Tryck Släpp

Öppna/avsluta inställningsläget

Håll ned lägesknappen (inget kort isatt) och tryck på grön pil när du vill öppna. Avsluta med röd pil.



Ändra högtalarvolymen

I inställn.läget, + för högre, - för lägre. Håll ned lägesknappen samtidigt (med kort isatt).



Lägesknapp

Inställningsläget

Göra ändringar i inställn.läget, se: Användarhandbok för Tobii S32>Inställn.menyn>Scan.

Support S32

Kontakta försäljaren eller besök: www.tobii.com.

Viktiga lampor

- ○ ● - Spela upp ljud
- ○ ● - IR används
- ● ● - Med ljud:
Fel eller låst
- ● ● - Blinkande röd: Väntar, inspelning ljud
- ● ○ - Blinkar: Väntar, inspelning IR
- ○ ○ - Överför/tar emot data