


Sätta i kort

Se till att streckkoden är vänd uppåt under ramen.

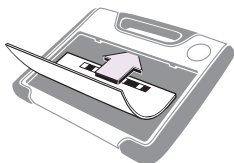


Sätta på fingerguide

Sätt i långsidan först, tryck sedan ned. Klickar på plats.



Spela in ljud

Håll ned knappen Läge, tryck på knappen Inspelning, släpp först Läge och sedan Inspelning. Håll ned en tangent, tala nära mikrofonen!

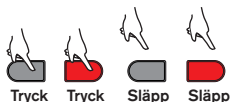

Spela in IR

Följ först proceduren för ljudinspelning. Tryck sedan ned/släpp inspelningsknappen en andra gång. Tryck/släpp tangent, spela in!



Ändra trycktid

Håll ned lägesknappen (med/utan kort) och tryck på + för att öka trycktiden och på - för att minska.



Ändra högtalarvolymen

Håll ned lägesknappen (med/utan kort) och tryck på + för att höja och - för att sänka.



■ - Lägesknapp

Knappsatslås

Håll ned lägesknappen (med/utan kort isatt) och tryck på knapp-satslåset.



Viktiga lampor

- ○ ● - Spela upp ljud
- ○ ● - IR används
- ● ● - Med ljud:
Fel eller låst
- ● ● - Blinkande röd: Väntar, inspelning ljud
- ● ○ - Blinkar: Väntar, inspelning IR
- ○ ○ - Överför/tar emot data

Support S32

Kontakta försäljaren eller besök: www.tobii.com.