


Snap™ Core First®

Benutzerhandbuch

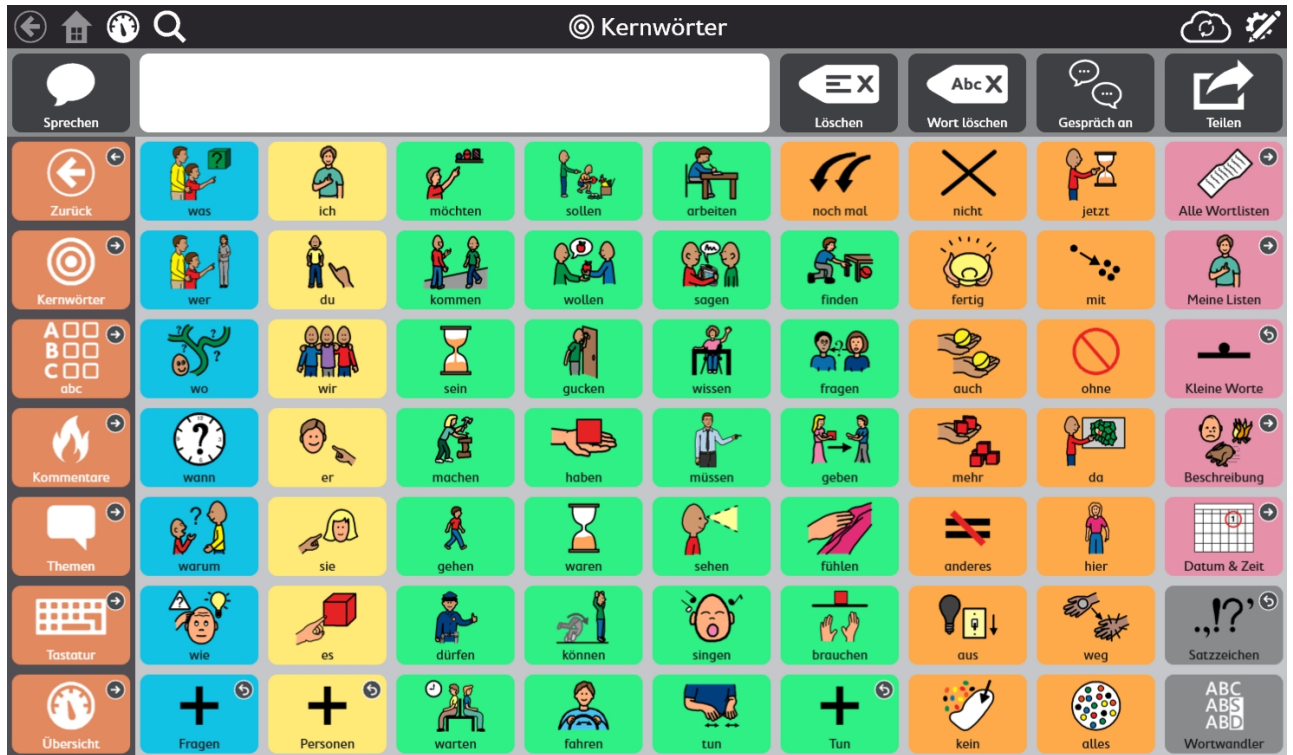

Benutzerhandbuch Snap™ Core First®

Version 1.10

01/2020

Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © Tobii AB (publ)

Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers darf kein Teil dieses Dokuments vervielfältigt, in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise weitergegeben werden, sei es elektronisch, per Fotokopie, Aufnahme oder auf andere Art.

Der beanspruchte Urheberrechtsschutz umfasst alle Formen und Arten von urheberrechtlich schützbarem Material und von Informationen, die durch geschriebenes oder richterlich festgelegtes Recht erlaubt oder im Folgenden gewährt sind, einschließlich, ohne Beschränkung auf aus den Softwareprogrammen generiertes Material, das auf dem Bildschirm dargestellt wird, wie z. B. Bildschirmanzeigen, Menüs usw.

Dieses Dokument enthält Informationen, an denen Tobii Dynavox die Urheberrechte besitzt. Jegliche Vervielfältigung, ob vollständig oder auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch Tobii Dynavox.

Bei in diesem Dokument erwähnten Produkten kann es sich um Warenzeichen und bzw. oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer handeln. Herausgeber oder Verfasser erheben keinerlei Ansprüche auf diese Warenzeichen.

Dieses Dokument wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Herausgeber und Verfasser haften nicht für Fehler bzw. Auslassungen oder für Schäden, die aus einer Nutzung der im Dokument enthaltenen Informationen oder einer Verwendung der zugehörigen Programme sowie des Quellcodes resultieren. Herausgeber und Verfasser haften in keinsten Weise für Gewinnausfälle oder andere wirtschaftliche Schäden, die tatsächlich oder angeblich, direkt oder indirekt durch dieses Dokument verursacht wurden.

Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Aktuelle Versionen dieses Dokuments finden Sie auf der Tobii Dynavox-Webseite unter www.TobiiDynavox.com.

Kontaktinformationen:

Tobii Dynavox AB
Karlsrovägen 2D
182 53 Danderyd
Schweden

+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA

+1-800-344-1778



Inhalt

1	Willkommen	7
1.1	Systemvoraussetzungen	7
1.2	Wie Sie Snap Core First erhalten.....	8
1.2.1	Sprachfunktionen erwerben	8
2	Hilfsmittel und Support	9
2.1	Tobii Dynavox Pathways for Core First (aktuell nur auf Englisch).....	9
2.2	Internet-Hilfsmittel und Support	9
3	Erste Schritte	10
3.1	Einen neuen Benutzer einrichten.....	10
3.2	Einen vorhandenen Benutzer wiederherstellen.....	10
3.3	Ein Seitenset wählen.....	11
3.3.1	Core First	11
3.4	Eine Rastergröße wählen	13
4	Navigation.....	14
5	Die obere Menüleiste.....	15
5.1	Rückseite	15
5.2	Startseite.....	15
5.3	Übersicht.....	15
5.4	Suchen.....	15
5.5	Anzeige für das Partnerfenster	17
5.6	Datenverfolgung	17
5.7	Synchronisierung	18
5.8	Bearbeiten.....	18
6	Das Mitteilungsfenster	19
6.1	Sprechen.....	19
6.2	Mitteilungsfenster.....	19
6.3	Löschen	19
6.4	Löschen	19
6.5	Gespräch	20
6.6	In Feld kopieren	20
6.7	Teilen	20
7	Die Werkzeugleiste „Core First“	21
7.1	Rückseite	21
7.2	Kernwörter.....	21
7.3	Kommentare.....	22
7.4	Themen.....	22
7.4.1	Themen Wörter.....	22
7.4.2	Unterstützung	22
7.5	Tastatur	24
7.6	Übersicht.....	25
7.7	Wortformen	25
7.8	Unterstützte Navigation	25
7.9	ABC	25
8	Bearbeiten	27
8.1	Das Bearbeitungsmenü	27
8.2	Ein Feld hinzufügen.....	27

8.3	Ein Feld verschieben	28
8.4	Größe eines Feldes ändern	28
8.5	Bearbeitungswerkzeuge für Felder	30
8.5.1	Rückgängig und Wiederherstellen	30
8.5.2	Ein Feld kopieren und einfügen	30
8.5.3	Alle Felder auswählen	31
8.5.4	Mehrere Felder auswählen	31
8.5.5	Auswahlrahmen	32
8.5.6	Ein Feld ausblenden/anzeigen	32
8.5.7	Ein Feld löschen	33
8.5.8	Namen der Bearbeitungswerkzeuge aus-/einklappen	33
8.6	Feldinhalt	33
8.6.1	Bezeichnung des Feldes	33
8.6.2	Aktiver Inhalt	34
8.6.3	Mitteilung	36
8.6.4	Audiofeedback	37
8.6.5	Bild	37
8.6.6	Feldtyp	38
8.7	Feldaktionen	39
8.7.1	Eine Aktion löschen	42
8.7.2	Feldaktionen neu ordnen	42
8.7.3	Whiteboard	43
8.7.4	AccessIT	44
8.8	Stil des Feldes	45
8.8.1	Farbe des Feldes	46
8.8.2	Rahmen des Feldes	46
8.8.3	Bezeichnung des Feldes	46
8.9	Verknüpfung mit Seite/Neue Seite erstellen	48
8.9.1	Ein Verknüpfungsfeld in einer leeren Zelle erstellen	48
8.9.2	Eine Verknüpfung von einem bereits vorhandenen Feld erstellen	48
8.9.3	Verknüpfung mit neuer Seite/Neue Seite erstellen	49
8.9.4	Verknüpfung auf bestehende Seite	49
8.9.5	Verknüpfung mit neuer Kopie einer vorhandenen Seite	49
8.9.6	Importieren und mit Seite verknüpfen	49
8.9.7	Zurück nach Auswahl	50
8.10	Sprachregeln des Feldes	52
8.11	Fernbedienungen	52
8.12	Seite bearbeiten	53
8.12.1	Seitenname	53
8.12.2	Symbol für die Seite	54
8.12.3	Sprachregeln der Seite	54
8.12.4	Rastergröße der Seite	55
8.12.5	Hintergrundfarbe der Seite	56
8.12.6	Mitteilungsfenster zeigen/verbergen	56
8.12.7	Seite löschen	56
8.12.8	Seiten importieren/exportieren	57
8.13	Scangruppen	57
8.13.1	Optionen für Scangruppen	58
8.14	Den Mitteilungsbereich bearbeiten	58
8.15	Die Werkzeugleiste bearbeiten	60

9	Seitenset-Einstellungen	61
9.1	Seitenset	61
9.1.1	Seitenset auswählen	61
9.1.2	Neues Seitenset erstellen	61
9.1.3	Seitenset umbenennen und Beschreibung bearbeiten	62
9.1.4	Seitenset löschen	62
9.1.5	Startseite festlegen	62
9.1.6	Tastaturseite einrichten	62
9.2	Rastergröße	63
9.3	Stil des Seitensets	63
9.3.1	Schriftart für die Bezeichnung von Feldern	63
9.3.2	Schriftgröße für die Bezeichnung von Feldern	63
9.3.3	Fettschreibung für die Bezeichnung von Feldern	64
9.3.4	Feldlayouts	64
9.3.5	Seitenset – Darstellung Verknüpfung	64
9.3.6	Seitenset – Abstand Felder	65
9.3.7	Standard-Hintergrundfarben	65
9.3.8	Schriftart für Mitteilungsfenster	65
9.3.9	Schriftgröße für Mitteilungsfenster	65
9.3.10	Textfarbe für Mitteilungsfenster	65
9.4	Weitere Einstellungen für Seitenset	65
9.5	Lernfähige Felder	66
9.6	Abschnitt „Über“	67
9.6.1	Seitenset – Einstellungen für Entwickler von Inhalten	67
10	Freigeben und Speichern	68
10.1	Benutzer	68
10.1.1	Einen Benutzer sichern	68
10.1.2	Einen Benutzer wiederherstellen	68
10.2	Seitensets	68
10.2.1	Ein Seitenset importieren	68
10.2.2	Eine Kopie eines Seitensets speichern	69
10.2.3	Eine Kopie eines Seitensets teilen (über myTobiiDynavox)	70
10.2.4	Seitenset synchronisieren	70
10.3	Seitenpakete	73
10.3.1	Seitenpaket exportieren	73
10.3.2	Seitenpaket importieren	74
11	Benutzereinstellungen	76
11.1	Benutzer wechseln	76
11.2	Einen neuen Benutzer einrichten	76
11.3	Einen Benutzer sichern	76
11.4	Einen Benutzer wiederherstellen	77
11.5	Einen Benutzer bearbeiten/umbenennen	78
11.6	Einen Benutzer löschen	78
11.7	Anmeldung bei Ihrem myTobiiDynavox-Konto	79
11.8	Stimme	79
11.8.1	Die Stimme für die Sprachausgabe	79
11.8.2	Geschwindigkeit der Stimme	80
11.8.3	Sprachausnahmen	80
11.9	Sprachausgabegerät	81

11.10	Sprachspezifische Stimmen	82
11.11	Weitere Einstellungen für Benutzer	82
11.11.1	Spracheinstellungen	82
11.11.2	Einstellungen für das Mitteilungsfenster	82
11.11.3	Vorhersage-Einstellungen	83
11.11.4	Synchronisierungseinstellungen	83
11.12	Auswahlmethode	83
11.12.1	Die Auswahlmethode einstellen	84
11.12.2	Berühren – Optionen	84
11.12.3	Optionen für „Berühren“	85
11.12.4	Optionen für „Loslassen“	86
11.12.5	Optionen für „Mit Maus verweilen“	87
11.12.6	Optionen für Gaze Interaction	88
11.12.7	Optionen für Scanning:	89
11.13	Datenverfolgung	92
11.13.1	Feldnutzung nachverfolgen	92
11.13.2	Feld in der oberen Menüleiste anzeigen	93
11.13.3	Feldnutzungszähler anzeigen	94
11.13.4	Modelling-Zähler anzeigen	94
11.13.5	Daten verwalten	95
12	Systemeinstellungen	96
12.1	Einstellungen	96
12.1.1	Passwort	96
12.1.2	Bildschirmeinstellung (Nur Windows)	96
12.1.3	Bearbeitungsmodus – Sprache	96
12.2	Gerät	97
12.2.1	Einstellungen für das Partnerfenster	97
12.3	Store	97
12.4	Symbolbibliotheken	97
12.4.1	Sucheinstellungen	97
12.4.2	Installierte und als Download erhältliche Symbole	97
12.4.3	Symbolsets neu anordnen	98
12.5	Hilfe & Tutorials	98
12.5.1	Videos	98
12.5.2	Pathways für Core First	98
12.5.3	Einführung	98
12.5.4	Externe Hilfe	99
12.6	Über	99
12.6.1	Software-Updates	99

1 Willkommen



Abbildung 1.1 Snap Core First – Schnellantworten

Tobii Dynavox Snap Core First ist eine symbolbasierte Kommunikationssoftware für Menschen, die Symbole zur Kommunikation verwenden. Es ist sowohl für den/die Benutzer/in als auch für seinen/ihren Kommunikationspartner einfach zu bedienen und intuitiv gestaltet. Snap Core First ist die ideale Lösung für Menschen mit Autismus, Down-Syndrom, Zerebralparese und geistigen Behinderungen. Mit Snap bieten wir ein symbolbasiertes Kommunikationssystem und alles, was Eltern, Lehrer oder Therapeuten brauchen, um Benutzer auf dem Weg zu erfolgreicher Kommunikation, Spracherwerb und Alphabetisierung zu unterstützen. Unser Ansatz beruht auf 3 wesentlichen Stützen erfolgreicher Kommunikation: Entwicklung, Teilhabe und Alphabetisierung.

Snap Core First ist nicht einfach eine weitere Software zur Unterstützten Kommunikation, sondern ein umfassendes Programm, um Menschen unabhängig von ihrer Ausgangssituation auf den Weg zu Alphabetisierung und Selbständigkeit im Alltag zu bringen. Im Zentrum von Snap steht Core First, ein Seitenset von Tobii Dynavox zur systematischen Bereitstellung von Kernvokabular, Themen, Kommentaren, Verhaltensunterstützung, Wortlisten und Tastaturen. Core First beruht auf Forschungsergebnissen der University of North Carolina in Chapel Hill und hilft unter Rückgriff auf das motorische Gedächtnis beim kontinuierlichen Aufbau von Vokabular und Kompetenzen: Dadurch kann der/die Benutzer/in auf- und abwärts skalieren und weiß immer, wo die Wörter zu finden sind. Mit diesen Funktionen kann der/die Benutzer/in die Inhalte an seine/ihre Bedürfnisse anpassen, sich fortwährend weiterentwickeln und Alphabetisierung und Selbständigkeit erreichen.

1.1 Systemvoraussetzungen

Tabelle 1.1 Windows-Betriebssystem

	Betriebssystem	Architektur	Speicher	Anfassen	Kamera
Minimum	Windows 10 Version 1607	x86	2 GB	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich
Empfohlen	Windows 10 Version 1607	x86	4 GB	Integrierte Touch-Funktion	Integrierte Kamera

Tabelle 1.2 iOS

	Betriebssystem	Gerät	Speicher	Anfassen	Kamera
Minimum	iOS 10	iPad Air 2 iPad Mini 4	2 GB	Integrierte Touch-Funktion	Nicht erforderlich
Empfohlen	iOS 11	iPad der 5. Generation	4 GB	Integrierte Touch-Funktion	Integrierte Kamera

1.2 Wie Sie Snap Core First erhalten

Snap Core First ist für Windows-Geräte im Microsoft Store und für iOS im Apple App Store erhältlich. Wählen Sie die Vollversion von Snap Core First, wenn Sie von Anfang an alle Funktionen von Snap Core First nutzen möchten. In der kostenlosen Version von Snap Core First sind alle Funktionen außer der Sprachfunktion und der Symbolsammlung METACOM enthalten – z. B. die Inhalte von Core First, das Erstellen und Bearbeiten von Seiten, das Erstellen von Benutzern, Sicherung, Wiederherstellung und Synchronisierung. Die Sprachfunktion ist jedoch eingeschränkt. Die vollständige Sprachfunktion ist als In-App-Kauf erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die Inhalte mit METACOM-Symbolen dargestellt sind und in der Testversion somit ohne Symbole dargestellt werden. Erwerben Sie dafür entweder die METACOM-Symbole zusätzlich als In-App-Kauf oder arbeiten Sie mit den integrierten PCS-Symbolen.

In der kostenlosen Version der App deaktivierte Sprachfunktionen

- Wiedergabe des Mitteilungsfensters
- Durch Anwählen von Feldern ausgelöste Wiedergabe von Sprache oder Aufnahmen
- Durch Verhaltensunterstützung ausgelöste Wiedergabe von Sprache oder Aufnahmen
- Audiofeedback

In der kostenlosen Version der App enthaltene Sprachfunktionen

- Audio-Aufnahme (im Bearbeitungsmodus)
- Vorschau für Audio-Aufnahme (im Bearbeitungsmodus)
- Stimmvorschau
- Vorschau für Sprachausnahme (im Bearbeitungsmodus)

1.2.1 Sprachfunktionen erwerben

Durch einen einmaligen In-App-Kauf können Sie die Sprachfunktionen von Snap Core First auf schnelle und sichere Weise erwerben.

1. Starten Sie Snap Core First.

2. Wählen Sie das Feld „Sprache deaktiviert“ in der oberen Menüleiste.
3. Bestätigen Sie den Kauf im Dialogfenster.



2 Hilfsmittel und Support

Tobii Dynavox stellt Ihnen zahlreiche kostenlose Hilfsmittel zur Verfügung, die Ihre Nutzung von Snap Core First unterstützen und ergänzen. Lassen Sie sich diese Tools nicht entgehen – nutzen Sie Ihre Software von Tobii Dynavox optimal!

2.1 Tobii Dynavox Pathways for Core First (aktuell nur auf Englisch)



Pathways for Core First ist ein kostenloses Hilfsmittel, damit Sie die Produkte von Tobii Dynavox so effektiv und effizient wie möglich nutzen können. So erlernen Sie wissenschaftlich gestützte Techniken, um optimale Kommunikationsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit und vieles mehr zu erreichen.

Pathways for Core First begleitet Sie von Anfang an auf Ihrem Weg mit Snap Core First und begünstigt den Lernerfolg bei Dialogfähigkeit, Spracherwerb und Alphabetisierung. Pathways for Core First:

- bietet einen klaren, auf Sie persönlich zugeschnittenen Wegweiser für die ersten Schritte.
- begünstigt Entwicklungen bei jeder Person, unabhängig von ihrem Alter oder ihren Fähigkeiten.
- unterrichtet Sie darin, auf unterschiedlichen Gebieten Kompetenzen zu fördern, z. B. durch die Verwendung von Kernvokabular, die Erweiterung des Vokabulars, die Verwendung von Snap Core First im Alltag und vieles mehr.
- zeigt Ihnen, wie Snap Core First soziale Kompetenzen stärkt und im Umgang mit verschiedenen Situationen hilft, beispielsweise bei fehlgeschlagener Kommunikation, Navigation und Bedienung des Geräts und der Förderung positiver Verhaltensweisen.
- stärkt mit den „Besten Tipps“ die Kompetenzen von Kommunikationspartnern.
- unterstützt die fortlaufende Personalisierung von Core First.

Die Vollversion von Pathways for Core First ist als kostenloses Programm für Windows und iOS erhältlich. Pathways for Core First steht Ihnen online über Ihren Webbrowser zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.tobiidynavox.com/learn/pathways.

2.2 Internet-Hilfsmittel und Support

myTobiiDynavox ist Ihr persönliches Internetportal zur Speicherung und Freigabe von Daten. Sie können die Sicherungsdateien eines Benutzers auf myTobiiDynavox hochladen, um sie zu sichern und mit Ihrem gesamten Kommunikationsteam zu teilen.

Gehen Sie auf myTobiiDynavox.com, um ein kostenloses Konto einzurichten.



Auf tobiidynavox.com/support-training/ erhalten Sie Hilfe, Schulung und andere Unterstützung, z. B.:

- Antworten auf häufig gestellte Fragen
- Schulungsvideos (in Englisch)
- Downloads
- Aufzeichnungen von Webinaren (in Englisch)
- Live-Support

3 Erste Schritte

Wenn Sie Snap Core First zum ersten Mal starten, werden Ihnen ein paar Fragen gestellt, damit Sie die Software an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Diese Einstellungen können Sie nötigenfalls später noch ändern.

3.1 Einen neuen Benutzer einrichten

Einfach **Erste Schritte** anklicken, und in weniger als einer Minute sind Sie startbereit!



3.2 Einen vorhandenen Benutzer wiederherstellen

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie bereits eine Sicherungsdatei für einen Benutzer haben, die Sie wiederherstellen möchten.

Sicherungsdatei für einen Benutzer von myTobiiDynavox wiederherstellen

1. Wählen Sie **Vorhandenen Benutzer wiederherstellen**.
2. Wenn Sie im Moment nicht bei myTobiiDynavox angemeldet sind, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort

ein, und wählen Sie dann  **Weiter**.

3. Wählen Sie erst eine Sicherungsdatei für einen Benutzer aus der Liste aus, und gehen Sie dann auf  **Weiter**.

Sicherungsdatei für einen Benutzer von lokaler Datei wiederherstellen

1. Wählen Sie **Vorhandenen Benutzer wiederherstellen**.
2. Wählen sie **Von lokaler Datei wiederherstellen**.
3. Suchen Sie nach der Sicherungsdatei für den Benutzer, wählen Sie sie aus, und gehen Sie dann auf **Öffnen**.

3.3 Ein Seitenset wählen

3.3.1 Core First

Core First ist das wichtigste Seitenset, das in der Snap-Software zur Verfügung steht. Es fördert durch verschiedene, zusammen genutzte Kommunikationswerkzeuge Entwicklung, Teilhabe und Alphabetisierung.

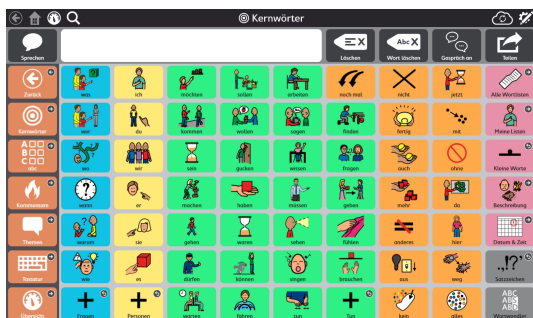


Abbildung 3.1 Seitenset Core First

Das Markenzeichen von Core First ist unsere Kernwortstrategie. Forschungen, klinische Untersuchungen und Verbrauchertests dienen als Grundlage für die:

- Wortauswahl zur Verwendung in möglichst vielen verschiedenen Umgebungen.
- Wortplatzierung und Benutzeroberfläche.
- Reihenfolge der Einführung neuer Wörter.
- Feste Position von Wörtern, während systematisch neue hinzugefügt werden.
- Effiziente Navigation.
- Unterstützung beim Erlernen neuer Wörter und ihrer Kombination zu eigenen Mitteilungen.

Zu den zusätzlichen Kommunikationswerkzeugen in Core First gehören:

- Kommentare – schnelle und zuverlässig auffindbare Mitteilungen, die für sich verwendet oder kombiniert werden können.
- Tastatur – durch Eingabe von Buchstaben in das Mitteilungsfenster können Wörter erstellt oder verändert werden.
- Wortlisten – nach Kategorien geordnet und daher leicht auffindbar.
- Themen – unterstützen die Interaktion in bestimmten Umgebungen oder rund um bestimmte Themen.
- Hilfe – unterstützt Benutzer in Bezug auf Verhalten und soziale Kommunikation.
- Übersicht – Fernsteuerung, Lautstärkeregelung und vieles mehr jederzeit griffbereit!

Das Seitenset Core First bietet Benutzern bestmöglichen Zugang zu schnell auffindbaren Inhalten und zugleich optimale Möglichkeiten, einzigartige und spezifische Mitteilungen zu erstellen. Mit Core First können Benutzer im Hier und Jetzt an schnellen Unterhaltungen über für sie wichtige Themen teilnehmen. Außerdem haben sie die Freiheit, neue Mitteilungen zu erstellen, von denen nicht im Voraus abzusehen war, dass sie gebraucht werden. Mit den bereitgestellten Werkzeugen bleiben die kommunizierenden Personen aktiv an der jeweiligen Situation beteiligt und im Dialog mit ihren Gesprächspartnern.

Alphabetisierung ist eine wichtige Kompetenz, die zwingend zu einem Kommunikationsprogramm dazugehört. Die Verwendung von Tastaturen mit Anlautwiedergabe und ein innovativer ABC-Ansatz unterstützen jeden Nutzer auf dem Weg zu seiner Alphabetisierung.

Zu guter Letzt: Core First ist weder für jede/n Benutzer/in gleich, noch unveränderlich und statisch. Ein wichtiges Grundprinzip ist die Kontinuität über alle Rastergrößen hinweg. Wenn die kommunizierende Person dazulernt und Zusatzoptionen benötigt, um komplexere Mitteilungen zu machen, wird Core First ergänzt – die Inhalte bleiben an zuverlässig auffindbaren Orten.

3.3.1.1 Textseitenset (nur in Englisch verfügbar)

Dieses Seitenset wurde für Benutzer konzipiert, die zur Kommunikation nicht auf Symbole angewiesen sind. Dieses Textseitenset wird für Sprecher empfohlen, die gut lesen und Texte verfassen können.



Dieses Textseitenset ist zur Verwendung mit der Rastergröße 7x10 empfohlen.

3.3.1.2 Version des Seitensets

Der Setup-Assistent zeigt automatisch für die Spracheinstellungen Ihres Geräts (falls in Snap verfügbar) die richtigen Seitensets an. Wenn Sie **Sprache ändern** wählen, sehen Sie die Seitensets, die in anderen Sprachen zur Verfügung stehen.


- Chinesisch (Vereinfacht)
- Tschechisch (CZ)
- Dänisch (DK)
- Niederländisch (NL)
- Englisch (CA)
- Englisch (GB)
- Englisch (USA)
- Französisch (FR)
- Französisch (CA)
- Deutsch (DE)
- Deutsch (Schweiz)
- Isländisch (IS)
- Italienisch (IT)
- Norwegisch (NO)
- Portugiesisch (BR)
- Portugiesisch (PT)
- Spanisch (ES)
- Spanisch (Lateinamerika)
- Spanisch (USA)
- Schwedisch (SE)
- In Kürze folgen weitere Sprachen!

3.4 Eine Rastergröße wählen

Die Wahl der Rastergröße hängt von mehreren Faktoren ab: Die Möglichkeit zur fehlerfreien Bedienung ist vorrangig, außerdem können Einschränkungen der Sehfähigkeit oder der Aufmerksamkeitsspanne eine Rolle spielen. Wenn die Auswahl nicht schnell oder fehlerfrei genug erfolgt, beginnen Sie mit einer kleineren Rastergröße, sodass der/die Benutzer/in größere Felder vor sich hat. Die Rastergröße lässt sich problemlos über die Seitenset-Einstellungen ändern, daher müssen Sie nicht beim ersten Versuch die ideale Rastergröße finden. Wenn sich die sprachlichen oder körperlichen Fähigkeiten der betreffenden Person ändern, können Sie die Rastergröße komplexer gestalten bzw. vereinfachen.

i Um das Mitteilungsfenster und/oder die Werkzeugleiste anzuzeigen, müssen Sie eine Rastergröße mit mindestens 3 Reihen und 3 Zeilen wählen.


Tabelle 3.1 Beispiele für Rastergrößen (eine Auswahl)

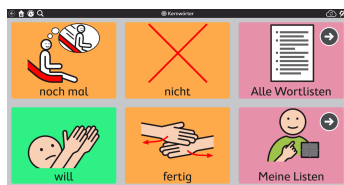

2x3




3x4

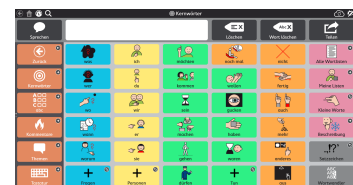

6x6

4 Navigation

Im Seitenset Core First gibt es viel zu entdecken! Lesen Sie weiter um zu erfahren, wie Sie in Snap durch die Inhalte navigieren und alles finden, was Sie zur Kommunikation benötigen.

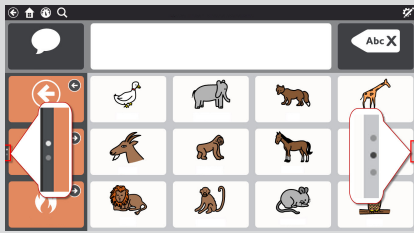Scrollen	Sie können sowohl in der Werkzeugleiste als auch in der Seite auf und ab scrollen. Die Seitenanzeige (Punkte, die links für die Werkzeugleiste und rechts für die Seite angezeigt werden) weist darauf hin, wenn oben oder unten weitere Inhalte verfügbar sind.  Je nach Einstellungen und Auswahlmethode scrollen Sie, indem Sie über den Touchscreen wischen oder ein Navigationsfeld auswählen. Siehe Abschnitt 11.12.2 <i>Berühren – Optionen</i>.	
Felder mit Verknüpfungen	Über Felder mit Verknüpfungen gelangen Sie auf eine andere Seite. Siehe Abschnitt 8.9 <i>Verknüpfung mit Seite/Neue Seite erstellen</i> .	
Zurück nach Auswahl	Über „Zurück nach Auswahl“ gelangen Sie auf eine andere Seite, treffen dort eine Auswahl und kehren anschließend automatisch auf die vorhergehende Seite zurück. Siehe Abschnitt 8.9.7 <i>Zurück nach Auswahl</i> .	
Das Feld „Zurück“	Das Feld „Zurück“ funktioniert so wie der Zurück-Pfeil in einem Internet-Browser. Wenn Sie einmal „Zurück“ wählen, kehren Sie zur vorherigen Seite zurück. Durch mehrfaches Anwählen bewegen Sie sich rückwärts durch den Seitenverlauf.	
Obere Menüleiste	Auf der linken Seite der oberen Menüleiste finden Sie die Felder „Zurück“, „Startseite“, „Übersicht“ und „Suchen“. Siehe Abschnitt 5 <i>Die obere Menüleiste</i> .	

5 Die obere Menüleiste

5.1 Rückseite

Das Feld „Zurück“  bringt Sie automatisch zurück zur zuletzt besuchten Seite.

5.2 Startseite

Das Feld „Startseite“  bringt Sie zur Startseite zurück (der ersten Seite, die beim Start von Snap Core First erscheint). Mit dem Feld „Startseite“ können Sie von jedem Punkt der Software aus zurück zur Startseite gelangen. Zum Ändern der Startseite siehe Abschnitt 9.1.5 *Startseite festlegen*.

5.3 Übersicht


Mit dem Feld „Übersicht“  können Sie schnell auf Ihre Übersichtsseite zugreifen. Die Übersicht dient zur schnellen Betätigung häufig verwendeter Steuerungselemente, insbesondere solcher, die sich nicht auf das Vokabular beziehen (z. B. Lautstärkeregelung, Fernbedienung).

5.4 Suchen


 „Suchen“ ist nur mit der Auswahlmethode „Berühren“ verfügbar.

Mit dem Such-Tool  können Sie für jedes Wort herausfinden, an welchem Ort es sich in Snap Core First befindet. Geben Sie einfach einen Suchbegriff ein. Daraufhin erscheinen die visuellen Hinweise. Die visuellen Hinweise führen Sie zu dem gesuchten Wort, sodass Sie es später selbständig wiederfinden können.

1. Wählen Sie das Symbol für **Suchen**  in der oberen Menüleiste.
2. Geben Sie einen Suchbegriff ein.

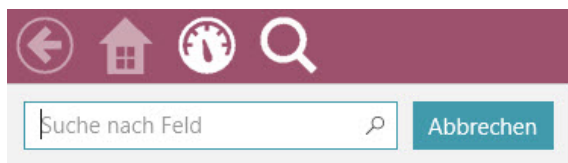

- Wählen Sie in den Suchergebnissen das gesuchte Feld aus.

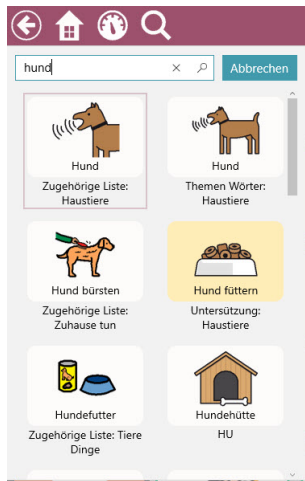

- Wählen Sie auf jeder Seite das hervorgehobene Feld aus, bis Sie das gesuchte Feld erreichen.



Möglicherweise müssen Sie scrollen, um das nächste Feld zu sehen. Achten Sie daher auf Pfeile, die Ihnen die Richtung anzeigen!





Merken Sie sich die hervorgehobenen Felder, damit Sie sich beim nächsten Mal selbständig an den Pfad erinnern.

Sie können die Suche jederzeit abbrechen, indem Sie eine Auswahl außerhalb des hervorgehobenen Pfads treffen.

5.5 Anzeige für das Partnerfenster



Die Anzeige für das Partnerfenster steht nur auf dem Tobii Dynavox I-13 und I-16 zur Verfügung.

Die Anzeige für das Partnerfenster informiert den Benutzer über den Status des Partnerfensters auf der Rückseite des Geräts.

Spiegel – zeigt den Text, der gerade im Partnerfenster zu sehen ist.



Symbol – das Symbol zeigt, dass das Partnerfenster eingeschaltet ist. Bei ausgeschaltetem Partnerfenster ist das Symbol nicht zu sehen.



Wie Sie den Darstellungsstil des Partnerfensters ändern, siehe Abschnitt 12.2.1 *Einstellungen für das Partnerfenster*.

5.6 Datenverfolgung



Die Datenverfolgung steht nur bei der Auswahlmethode „Touch“ oder direktem Anklicken per Maus zur Verfügung.



Wenn das Feld „Datenverfolgung“ aktiviert ist, haben Sie schnellen Zugriff auf folgende Einstellungen: Modelling-Modus, Feldnutzungszähler anzeigen, Modelling-Zähler anzeigen und Daten verwalten. Weitere Informationen zur Datenverfolgung finden Sie im Abschnitt 11.13 *Datenverfolgung*.

5.7 Synchronisierung



Die Synchronisierung steht nur bei der Auswahlmethode „Berühren“ oder direktem Anklicken per Maus zur Verfügung.



Das Feld „Synchronisierung“ dient dazu, ein Seitenset per Synchronisierung mit anderen zu teilen oder ein Seitenset, das bereits per Synchronisierung geteilt wurde, zu aktualisieren. Weitere Informationen zur Synchronisierung finden Sie im Abschnitt *10.2.4 Seitenset synchronisieren*.

Wie Sie das Feld „Synchronisierung“ im Anwendungsmodus verbergen, erfahren Sie in Abschnitt *11.11.4 Synchronisierungseinstellungen*.

5.8 Bearbeiten



Die Bearbeitungsfunktion steht nur bei der Auswahlmethode „Berühren“ oder direktem Anklicken per Maus zur Verfügung.



Wählen Sie das Feld „Bearbeiten“, um Änderungen an Ihrem Seitenset vorzunehmen und auf „Einstellungen“ zuzugreifen.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *8 Bearbeiten*.

6 Das Mitteilungsfenster

Das Mitteilungsfenster zeigt den Text der erstellten Mitteilung und die Steuerungselemente, um sie mit anderen zu teilen.



Um das Mitteilungsfenster anzuzeigen, müssen Sie eine Rastergröße mit mindestens 3 Reihen und 3 Zeilen wählen.



Wie Sie das Mitteilungsfenster bearbeiten, erfahren Sie unter *8.14 Den Mitteilungsbereich bearbeiten*.

6.1 Sprechen



Mit diesem Feld können Sie den aktuellen Inhalt des Mitteilungsfensters wiedergeben.

6.2 Mitteilungsfenster



Das Mitteilungsfenster zeigt den Text, den Sie anderen gerne als gesprochenen oder geschriebenen Text mitteilen möchten. Es kann auch Symbole enthalten. Sie können den Text entweder über eine Tastaturseite direkt in das Mitteilungsfenster eingeben oder über ein Feld hinzufügen.

Zu den Einstellungen für das Mitteilungsfenster siehe Abschnitt *11.11.2 Einstellungen für das Mitteilungsfenster, Seite 82*.

6.3 Löschen



Löscht den gesamten Inhalt des Mitteilungsfensters.

6.4 Löschen



Löscht das letzte Wort im Mitteilungsfenster.

6.5 Gespräch



Schaltet den Gesprächsmodus ein und aus. Wenn Sie die Gesprächsfunktion aktivieren, wird der aktuelle Inhalt des Mitteilungsfensters zwischengespeichert und das Mitteilungsfenster geleert. Im Gesprächsmodus können Sie neuen Inhalt in das Mitteilungsfenster eingeben und per Sprachausgabe wiedergeben. Wenn Sie die Gesprächsfunktion ausschalten, wird der Inhalt des Mitteilungsfensters wiederhergestellt, sodass Sie einfach weitermachen können, wo Sie aufgehört haben.

6.6 In Feld kopieren



Kopiert den Text im Mitteilungsfenster, der anschließend einem Feld hinzugefügt werden kann. Mit dieser praktischen Methode können Benutzer selbst spontan ihre Felder bearbeiten!

6.7 Teilen



Mit dieser praktischen und benutzerfreundlichen Funktion können Sie Inhalte aus dem Mitteilungsfenster an ein AccessIT-3-Gerät (8.7.4 AccessIT) oder ein Feld auf der aktuellen Seite (6.6 *In Feld kopieren*) senden. Zudem können Sie diese in den Zwischenspeicher des Systems kopieren.

Über „Weitere“ können sie den Text im Mitteilungsfenster an eine App Ihrer Wahl (z. B. Twitter, Facebook usw.) senden.




Das Menü des Feldes „Weitere“ ist nur mit der Auswahlmethode „Berühren“ verfügbar.



7 Die Werkzeugleiste „Core First“

Wie sie die Werkzeugleiste bearbeiten, erfahren Sie unter *8.15 Die Werkzeugleiste bearbeiten*.

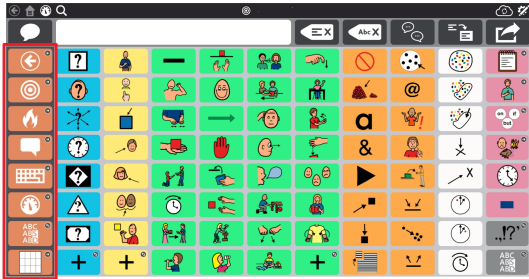

7.1 Rückseite

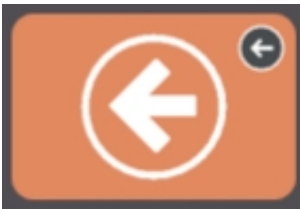


Abbildung 7.1 Das Feld „Zurück“ – Werkzeugleiste „Core First“

Das Feld „Zurück“ funktioniert so wie der Zurück-Pfeil in einem Browser. Sie können damit zur vorherigen Seite zurückkehren.

7.2 Kernwörter

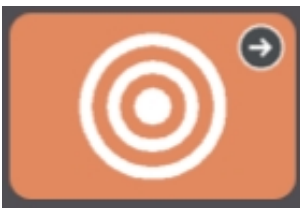


Abbildung 7.2 Das Feld „Kernwörter“ – Werkzeugleiste „Core First“

Mit diesem Feld können Sie die Seite „Kernwörter“ öffnen. Das Markenzeichen von Core First ist unsere Kernwortstrategie, die auf Forschung, klinischen Untersuchungen und Benutzertests beruht. Die Hauptfunktionen der Seite „Kernwörter“ sind unter anderem:

- Wortauswahl zur Verwendung in möglichst vielen verschiedenen Umgebungen.
- Wortplatzierung.
- Reihenfolge der Einführung neuer Wörter.
- Feste Position von Wörtern, während systematisch neue hinzugefügt werden.
- Effiziente Navigation.
- Unterstützung beim Erlernen neuer Wörter und ihrer Kombination zu einzigartigen Mitteilungen.

7.3 Kommentare



Abbildung 7.3 Das Feld „Kommentare“ – Werkzeugleiste „Core First“

Kommentare sind schnelle und zuverlässig auffindbare Mitteilungen, die für sich verwendet oder kombiniert werden können. Es handelt sich dabei um kurze Wörter, die das Gespräch in Gang halten, die Aufmerksamkeit auf den Sprecher lenken oder als Kommentar dienen. Außerdem gehören häufig verwendete Mitteilungen dazu, die persönliche Bedürfnisse, Begrüßungen, soziale Interaktionen, Gefühle, Fragen und die Korrektur fehlgeschlagener Kommunikation zum Inhalt haben. Kommentare werden sofort ausgesprochen, ohne Text in das Mitteilungsfenster einzufügen.


7.4 Themen



Abbildung 7.4 Das Feld „Themen“ – Werkzeugleiste „Core First“


Themen unterstützen die Interaktion in bestimmten Umgebungen oder rund um bestimmte Themen. Wenn Sie auf der Seite „Themen“ ein Thema auswählen, werden Ihnen relevante Wörter und Sätze hierzu angezeigt. Sie können Ihr Seitenset individuell gestalten, indem Sie eigene Themen hinzufügen!

7.4.1 Themen Wörter

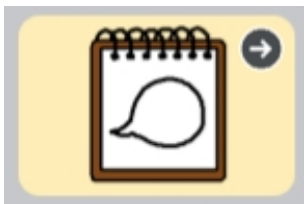

Diese Seiten enthalten häufig verwendete Wörter zu dem ausgewählten Thema.

7.4.2 Unterstützung

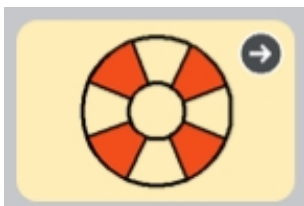

Die Unterstützung hilft Benutzern in Bezug auf Verhalten und soziale Kommunikation.

7.4.2.1 Zuerst, dann

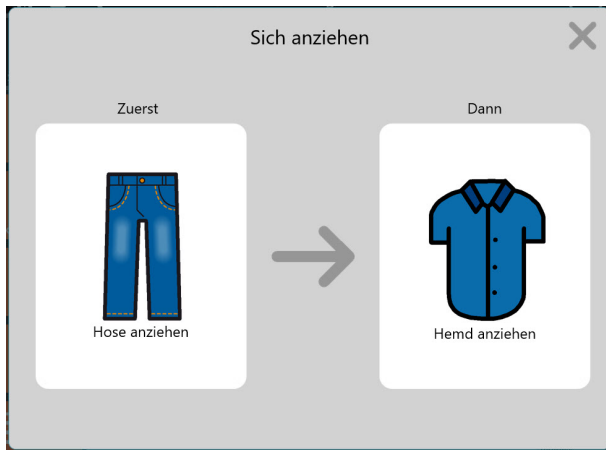


Abbildung 7.5 Unterstützung „Zuerst-dann“

Diese Hilfe zeigt zweistufige Ereignisfolgen, durch die Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung und logische Schritte eingeübt werden können.

7.4.2.2 Ablaufplan



Abbildung 7.6 Unterstützung „Ablaufplan“

Der Ablaufplan zeigt mehrstufige Ereignisfolgen, durch die das Konzept von Ursache und Wirkung und Abfolgen logischer Schritte eingeübt werden können.

7.4.2.3 Skript

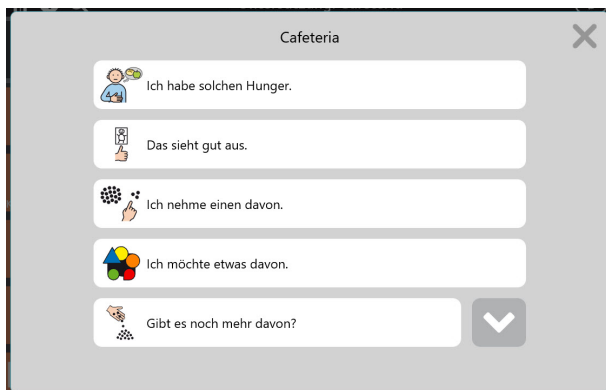


Abbildung 7.7 Unterstützung „Skript“

Ein Skript stellt vorformulierte Sätze bereit, die in Bezug auf das jeweilige Thema häufig verwendet werden. Skripte entwerfen soziale Geschichten und dienen als Vorbild für angemessene Gesprächsformen.

7.4.2.4 Timer



Abbildung 7.8 Obere Menüleiste mit Timer

Der Timer besteht aus einer rückwärts laufenden Uhr und einer beweglichen Farbleiste in der oberen Menüleiste. Die Sekundenzahl bezeichnet die verbleibende Zeit und die farbige Leiste schwindet in dem Maß, in dem die Zeit verstreicht. Wenn der Alarm aktiviert wurde, ertönt ein Signal, sobald die Zeit vorüber ist.

Um den Timer zu deaktivieren, wählen Sie rechts von der oberen Menüleiste das **X** an.

 Wenn Sie die Ausgangszeit oder die Einstellungen für den Alarm ändern möchten, bearbeiten Sie das Feld und wählen Sie die Aktion „Timer“.

7.5 Tastatur



Abbildung 7.9 Das Feld „Tastatur“ – Werkzeugleiste „Core First“

Die Tastaturseite bietet Felder mit einzelnen Buchstaben, die wie die Tasten einer Tastatur gehandhabt werden können und zusätzlich auch noch den Anlaut wiedergeben (bei bestimmten Tastaturen). Mit dieser Seite können Sie Wörter erstellen, die zur Zeit nicht in Ihrem Seitenset zur Verfügung stehen, oder die Zeichensetzung verändern. Zur Einrichtung der Tastaturseite nach Ihren Wünschen siehe [9.1.6 Tastaturseite einrichten](#).

7.6 Übersicht



Abbildung 7.10 Das Feld „Übersicht“ – Werkzeugleiste „Core First“

Die Übersicht dient zur schnellen Betätigung häufig verwendeter Steuerungselemente, insbesondere solcher, die sich nicht auf das Vokabular beziehen (z. B. Lautstärkeregelung, Fernbedienung).

7.7 Wortformen



Abbildung 7.11 Das Feld „Wortwandler“ – Symbolleiste „Core First“

Auf der Seite „Wortwandler“ werden verschiedene Formen (Zeit, Zahl usw.) des letzten Wortes im Mitteilungsfenster angezeigt. Wenn Sie die gewünschte Wortform auswählen, wird das Wort im Mitteilungsfenster aktualisiert.

7.8 Unterstützte Navigation



Abbildung 7.12 Unterstützte Navigation – Symbolleiste „Core First“

Für die besonders für Anfänger geeigneten Rastergrößen (<3x3) ist die Seite „Unterstützte Navigation“ die Startseite. Über das Feld „Unterstützte Navigation“ in der Symbolleiste können Sie von allen Rastergrößen aus auf die Seite zugreifen.

7.9 ABC



Dieses Feld öffnet den Bereich für das aus LiterAACy bekannte ABC-Vokabular. Sie finden dort mehr als 3600 nach ihren beiden Anfangsbuchstaben geordnete Wörter aus dem Kern- und Randwortschatz.

- Der ABC-Bereich bietet Unterstützung beim Erlernen und Anwenden von Lese- und Schreibfähigkeiten.

- Bei Auswahl eines Buchstabens erklingt ein phonetisches Feedback.
- Es gibt zwei Versionen dieser Funktion, eine mit Großbuchstaben und eine mit Kleinbuchstaben. Die Schaltfläche „abc“ mit Kleinbuchstaben ist standardmäßig voreingestellt. Wenn Sie Großbuchstaben verwenden möchten, machen Sie in der Symbolleiste die Schaltfläche „ABC“ (Großbuchstaben) sichtbar und verbergen die Schaltfläche „abc“ (Kleinbuchstaben). Siehe Abschnitt 8.5.6 *Ein Feld ausblenden/anzeigen*.

8 Bearbeiten

Um Änderungen an einem Feld, einer Seite oder einem Benutzer vorzunehmen, muss die Software im Bearbeitungsmodus sein. Sie können den Bearbeitungsmodus jederzeit durch Auswahl des Feldes  **Bearbeiten** erreichen.



Das Feld „Bearbeiten“ und der Bearbeitungsmodus sind nur mit der Auswahlmethode „Berühren“ verfügbar.

Im Bearbeitungsmodus können Sie die Inhalte für die meisten Seiten doppelt anklicken um festzustellen, wie sie sich im Anwendungsmodus verhalten.

8.1 Das Bearbeitungsmenü

Das Bearbeitungsmenü enthält alle Werkzeuge und Registerkarten, um Änderungen am Seitenset und der Software vorzunehmen.

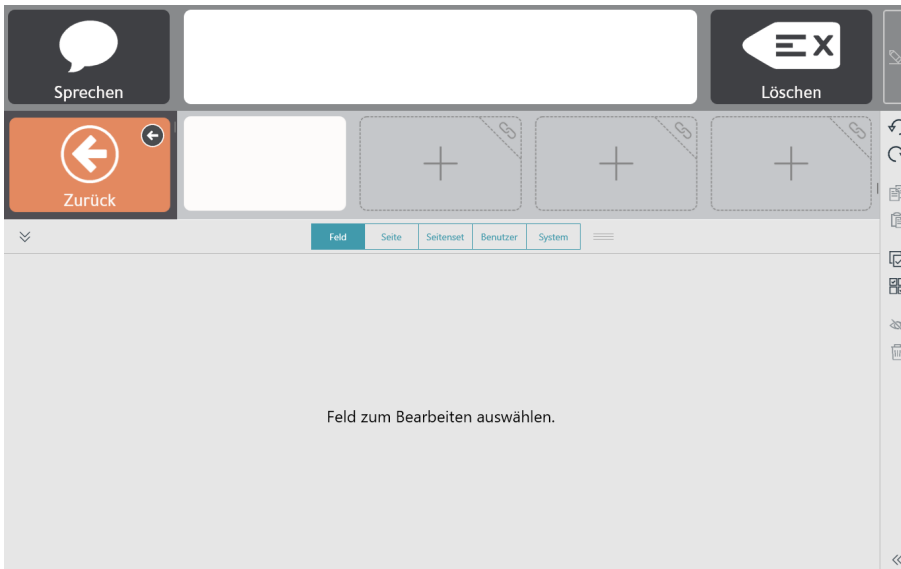


Abbildung 8.1 Das Bearbeitungsmenü (in der erweiterten Darstellung)

Wählen Sie , um die erweiterte Darstellung des Bearbeitungsmenüs anzuzeigen.

Wenn Sie  in der erweiterten Darstellung des Menüs aufwärts oder abwärts ziehen, können Sie die Größe des Bearbeitungsmenüs nach Wunsch verändern.

8.2 Ein Feld hinzufügen

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.


- Wählen Sie das  in einer beliebigen leeren Zelle auf der Seite, um ein neues Feld zu erstellen.




Abbildung 8.2 Leere Zelle

8.3 Ein Feld verschieben

- Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
- Wählen und halten Sie das Feld, das Sie verschieben möchten, und ziehen Sie es an den gewünschten Ort. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Feld auf der Seite zu platzieren:
 - Tauschen – Wenn Sie das Feld genau auf einem anderen Feld ablegen, tauschen die beiden Felder auf der Seite ihre Plätze. Wenn der gewünschte Ort im Raster schwarz umrandet ist, zeigt dies einen Tausch an.

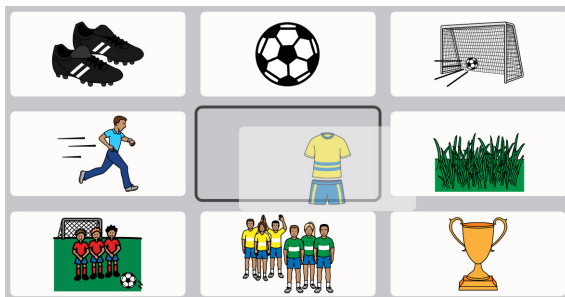

- Einfügen – Wenn Sie das ausgewählte Feld zwischen zwei Feldern ablegen, rücken die weiter rechts bzw. unten gelegenen Felder beiseite, um Platz für das Feld zu schaffen. Die Felder bleiben auf der Seite in derselben Reihenfolge von links nach rechts bzw. von oben nach unten. Das Einfügen des Feldes wird durch eine senkrechte bzw. waagerechte Leiste angezeigt.

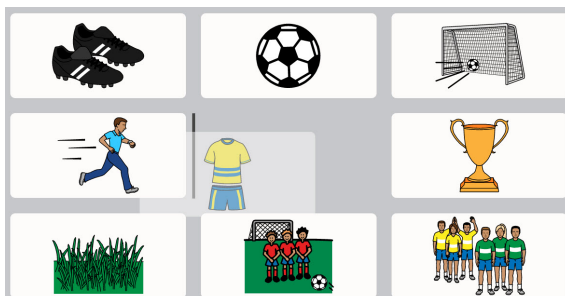

Sie können das Feld horizontal (wie oben gezeigt) oder vertikal einfügen.



Wenn Sie ein Feld verschieben, so gilt dies nur für die aktuelle Rastergröße.

8.4 Größe eines Feldes ändern

Sie können die Größe eines Feldes ändern, sodass es in der Seite bzw. der Werkzeugleiste so viele Rasterzellen einnimmt, wie Sie möchten.




1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie auf der Seite oder in der Werkzeugleiste ein Feld aus.




Die Feldgröße lässt sich nur ändern, wenn ein einzelnes Feld ausgewählt wurde.

3. Drücken und halten Sie einen der blauen Punkte in den Ecken des gewünschten Feldes und ziehen Sie anschließend daran, um die Größe zu ändern.

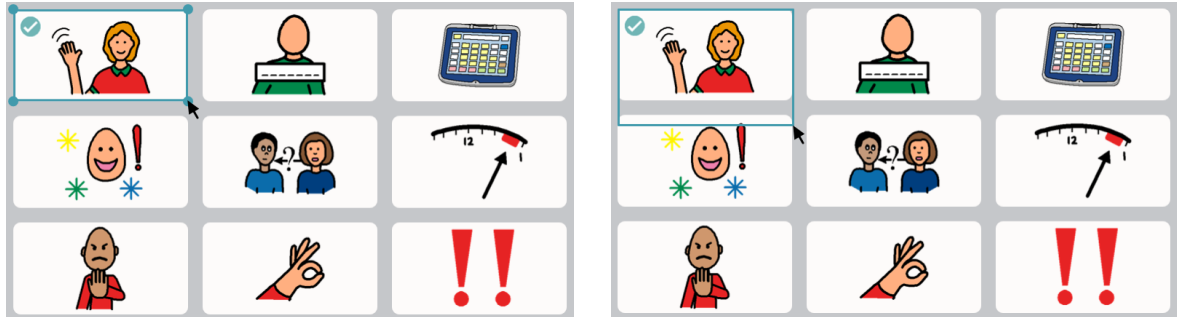

Beim Ändern der Größe können keine anderen Bereiche der Seite bzw. der Werkzeugleiste miteinbezogen werden.

4. Warten Sie, bis das Feld die gewünschte Größe hat und alle Zellen vollständig ausfüllt, und lassen Sie dann los.

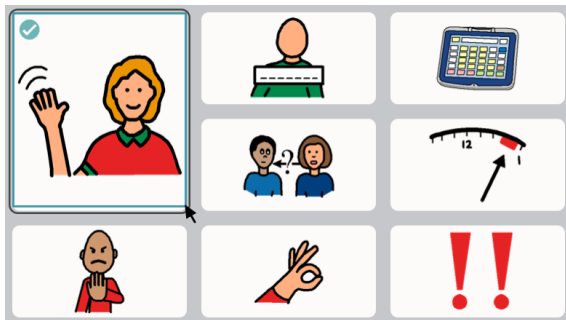

Sie können ein Feld nicht so vergrößern oder verschieben, dass es ein Navigationsfeld (zum Scrollen) bedeckt. Beim Vergrößern eines Feldes werden die überlagerten Felder in die nächstliegenden leeren Felder verschoben.



Wenn Sie die Größe eines Feldes ändern, so gilt dies nur für die aktuelle Rastergröße.

8.5 Bearbeitungswerkzeuge für Felder

Mit den Werkzeugen rechts im Fenster der App können Sie das/die derzeit ausgewählte(n) Feld(er) bearbeiten.



Abbildung 8.3 Bearbeitungswerkzeuge für Felder – Werkzeugnamen (von oben nach unten): Rückgängig, Wiederherstellen, Kopieren, Einfügen, Alle auswählen, Mehrfachauswahl, Ausblenden/Anzeigen, Löschen, Aus-/Einklappen

8.5.1 Rückgängig und Wiederherstellen

Mit dem Werkzeug  „Rückgängig“ können Sie für den aktuellen Benutzer und das aktuelle Seitenset bis zu 100 Bearbeitungsschritte rückgängig machen. Das Werkzeug  „Wiederherstellen“ setzt die zuletzt mit dem Werkzeug „Rückgängig“ rückgängig gemachte Veränderung wieder in Kraft.



Die Bearbeitungsschritte können nur so lange rückgängig gemacht werden, bis ein anderer Benutzer bzw. ein anderes Seitenset geladen oder Snap beendet wird.

8.5.2 Ein Feld kopieren und einfügen

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein Feld aus.
3. Wählen Sie das Werkzeug  **Kopieren**.
Beachten Sie, dass das Werkzeug „Einfügen“ die Anzahl der Felder anzeigt, die Sie kopiert haben.

- Wählen Sie das Werkzeug  **Einfügen**.
Das Feld wird in die erste verfügbare leere Zelle auf der Seite eingefügt.

8.5.3 Alle Felder auswählen

Mit dem Werkzeug „Alle auswählen“ wählen Sie automatisch alle Felder auf der aktuellen Seite aus, sodass Sie anschließend Sammelbearbeitungen vornehmen können.

- Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
- Wählen Sie die Registerkarte **Feld**.
- Wählen Sie das Werkzeug  **Alle auswählen**.

 Wenn Sie „Alle auswählen“ angewendet haben, können Sie einzelne Felder anklicken, um ihre Auswahl aufzuheben; die Auswahl der anderen Felder bleibt erhalten.

- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Feldern vor.
- Wenn Sie alle Felder wieder abwählen möchten, wählen Sie das Werkzeug  **Mehrfachauswahl** an.

8.5.4 Mehrere Felder auswählen

Mit dem Werkzeug  „Mehrfachauswahl“ können Sie (manuell) mehrere Felder gleichzeitig auswählen, um Sammelbearbeitungen vorzunehmen.

- Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
- Wählen Sie die Registerkarte **Feld**.
- Wählen Sie das Werkzeug  **Mehrfachauswahl**.

 Das Werkzeug „Mehrfachauswahl“ ist im deaktivierten Zustand schwarz und im aktivierten Zustand blau.

- Wählen Sie die Felder aus, die Sie gleichzeitig bearbeiten möchten.

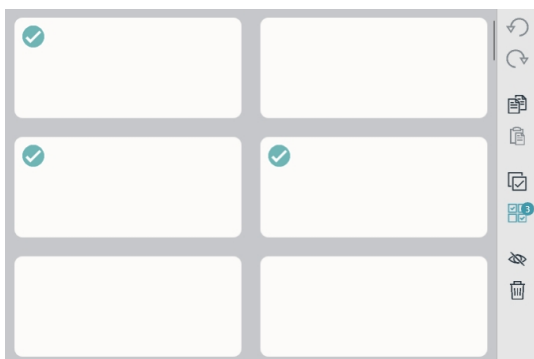


Abbildung 8.4 Mehrere ausgewählte Felder – Beachten Sie, dass das Werkzeug „Mehrfachauswahl“ anzeigt, wie viele Felder derzeit ausgewählt sind.

- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Feldern vor.

6. Wenn Sie alle Felder wieder abwählen möchten, wählen Sie das Werkzeug  **Mehrfachauswahl** an.

8.5.5 Auswahlrahmen

Das Werkzeug  „Auswahlrahmen“ bietet eine einfache Möglichkeit zur Auswahl mehrerer Felder. Einfach anklicken und ein Rechteck um die Felder ziehen, die Sie auswählen möchten.

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten** aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Feld** aus.
3. Wählen Sie das Werkzeug  **Auswahlrahmen** aus.
4. Einfach anklicken (bzw. berühren) und dann eine diagonale Linie ziehen, um ein Rechteck um alle auszuwählenden Felder zu zeichnen.

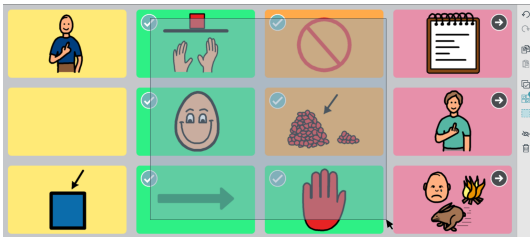


Abbildung 8.5 Der Auswahlrahmen erfasst auch Felder, die nur teilweise im Rechteck enthalten sind.



Sie können einzelne Felder anklicken und dadurch in die Auswahl einbeziehen bzw. ausschließen.

Die Auswahl der Felder kann über die Werkzeugleiste und auf der Seite getroffen werden, beides ist jedoch nicht gleichzeitig möglich.

5. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den ausgewählten Feldern vor.
6. Wenn Sie alle Felder wieder abwählen möchten, wählen Sie das Werkzeug  **Mehrfachauswahl** an.

8.5.6 Ein Feld ausblenden/anzeigen

Ausgeblendete Felder sind im Anwendungsmodus unsichtbar. Zum Beispiel können Felder, die zur Zeit noch zu anspruchsvoll sind oder die Aufmerksamkeit ablenken, ausgeblendet und zu einem späteren Zeitpunkt wieder gezeigt (sichtbar gemacht) werden.

Im Bearbeitungsmodus werden ausgeblendete Felder grau unterlegt angezeigt.

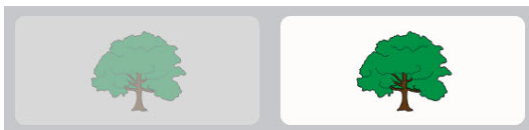


Abbildung 8.6 Ein ausgeblendetes Feld neben einem sichtbaren Feld im Bearbeitungsmodus.

8.5.6.1 Ausblenden

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein Feld, das Sie ausblenden möchten, aus.
3. Wählen Sie das Werkzeug  **Ausblenden**.



Die Standardaktion für das Werkzeug „Ausblenden/Anzeigen“ besteht in der Einstellung der Sichtbarkeit für dieses Feld an allen Orten, an denen es in dem Seitenset erscheint. Wenn Sie die Sichtbarkeit nur für das ausgewählte Beispiel, in dem das Feld auftritt, einstellen möchten, klicken und halten Sie (bzw. tippen Sie lange auf) das Werkzeug „Ausblenden/Anzeigen“ und wählen Sie **Sichtbarkeit hier ändern** aus.

8.5.6.2 Anzeigen



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein ausgeblendetes Feld aus.



3. Wählen Sie das Werkzeug **Anzeigen**.



Die Standardaktion für das Werkzeug „Ausblenden/Anzeigen“ besteht in der Einstellung der Sichtbarkeit für dieses Feld an allen Orten, an denen es in dem Seitenset erscheint. Wenn Sie die Sichtbarkeit nur für das ausgewählte Beispiel, in dem das Feld auftritt, einstellen möchten, klicken und halten Sie (bzw. tippen Sie lange auf) das Werkzeug „Ausblenden/Anzeigen“ und wählen Sie **Sichtbarkeit hier ändern** aus.

8.5.7 Ein Feld löschen



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein Feld aus.



3. Wählen Sie das Werkzeug **Löschen**.

8.5.8 Namen der Bearbeitungswerkzeuge aus-/einklappen

Wählen Sie die  doppelten Pfeile an, wenn Sie die Namen der Bearbeitungswerkzeuge anzeigen möchten. Wählen Sie die  doppelten Pfeile erneut an, wenn Sie die Namen der Werkzeuge verbergen möchten.

8.6 Feldinhalt



Abbildung 8.7 Feld mit Bezeichnung, Symbol, Hintergrundfarbe und mittelstarker Umrandung.

8.6.1 Bezeichnung des Feldes

Die Bezeichnung eines Feldes ist der Text, der auf dem Feld erscheint

8.6.1.1 Bezeichnung eines Feldes ändern



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein Feld aus.

3. Machen Sie eine Eingabe im Textfeld **Bezeichnung**.

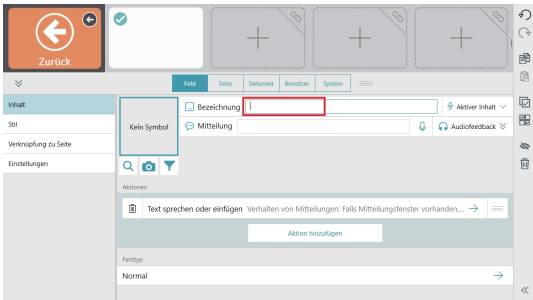


Abbildung 8.8 Textfeld „Bezeichnung“

Wie Sie andere Eigenschaften eines Feldes ändern (Schriftart, Farbe, Ort, Größe usw.), erfahren Sie in Abschnitt 8.8.3 *Bezeichnung des Feldes*.

8.6.2 Aktiver Inhalt

Aktiver Inhalt ermöglicht Ihnen die Anzeige dynamischer Informationen auf einem Feld. Die Bezeichnung und das Symbol des Feldes ändern sich je nach aktuellem Informationsstatus.

8.6.2.1 Einem Feld einen aktiven Inhalt hinzufügen

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein Feld aus.
3. Wählen Sie **Aktiver Inhalt**. (Nur verfügbar, wenn der **Feldtyp** auf **Normal** gesetzt wurde)

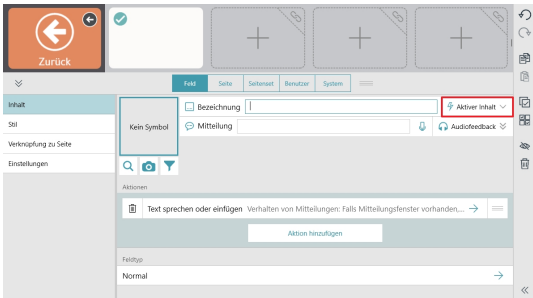


Abbildung 8.9 Aktiver Inhalt

4. Wählen Sie einen aktiven Inhaltstyp.

Aktiver Inhaltstyp	Beschreibung
Keine	Wählen Sie „Keine“ aus, wenn Sie den aktiven Inhalt des Feldes entfernen möchten.
Pausierstatus für Auswahlmethode	Hinweis: Es können nur folgende Auswahlmethoden pausiert werden: „Gaze Interaction“, „Mit Maus verweilen“. Bei anderen Auswahlmethoden sind die Felder mit aktivem Inhalt für den Pausierstatus der Auswahlmethode deaktiviert. Wenn die Aktion „Auswahlmethode pausieren“ auf dem Feld vorhanden ist (Standard), wird in der Bezeichnung die Aktion für das Feld angezeigt: „Auswahl starten“ oder „Auswahl anhalten“. Wenn die Aktion „Auswahlmethode pausieren“ nicht auf dem Feld vorhanden ist, wird in der Bezeichnung der Pausierstatus der Auswahlmethode angezeigt: „Auswahlmethode aktiv“ oder „Auswahlmethode pausiert“.

Aktiver Inhaltstyp	Beschreibung
Aktivierungszeit	Hinweis: Die Aktivierungszeit ist mit der Auswahlmethode „Berühren“ nicht verfügbar. Zeigt die Zeiteinstellungen für die aktuelle Auswahlmethode an. Die aktuellen Zeiteinstellungen hängen von der Auswahlmethode ab, zum Beispiel „Kontaktzeit“, „Scanning-Geschwindigkeit“, „Verweildauer“ usw. Weitere Informationen finden Sie unter . <i>Tabelle 8.1 Das Diagramm „Aktivierungszeit“, Seite 42</i>
Status der AccessIT-Verbindung	Zeigt den Status der Verbindung zum AccessIT 3 an. „Getrennt“, „Verbindung wird getrennt“, „Verbindung wird hergestellt“ oder „Verbunden“. Kann mit der Aktion „Mit AccessIT verbinden“ gekoppelt werden. Dadurch wird ein Feld erstellt, das den Status anzeigt und die Verbindung zu einem AccessIT-Gerät herstellt, wenn es ausgewählt wird.
Ladestand des Akkus	Zeigt den aktuellen Ladestand des Akkus in Prozent an: 0–100 %. Das Symbol ändert sich je nach Ladestand des Akkus und zeigt an, wenn das Gerät angeschlossen ist und aufgeladen wird.
Gesprächsmodus	Wenn die Aktion „Gesprächsmodus ein/aus“ auf dem Feld vorhanden ist (Standard), wird in der Bezeichnung die Aktion für das Feld angezeigt: „Gespräch aus“ oder „Gespräch an“. Wenn die Aktion „Gesprächsmodus ein/aus“ nicht auf dem Feld vorhanden ist, wird in der Bezeichnung des Feldes der aktuelle Status des Gesprächsmodus angezeigt: „Gespräch an“ oder „Gespräch aus“.
Datum	Zeigt den aktuellen Tag, den Monat und das Jahr. Das Datumsformat hängt vom Gebietschema ab.
Wochentag	Zeigt den aktuellen Wochentag an.
Feedback-Stummschaltungsstatus	Wenn die Aktion „Audiofeedback Stummschaltung ein/aus“ auf dem Feld vorhanden ist (Standard), wird in der Bezeichnung die Aktion für das Feld angezeigt: „Audiofeedback stummschalten“ oder „Stummschaltung des Audiofeedbacks aufheben“. Wenn die Aktion „Audiofeedback Stummschaltung ein/aus“ nicht auf dem Feld vorhanden ist, wird in der Bezeichnung des Feldes der aktuelle Stummschaltungsstatus für das Audiofeedback angezeigt: „Audiofeedback stumm“ oder „Audiofeedback nicht stumm“.
Feedback-Lautstärke	Zeigt die Lautstärke des Audiofeedbacks an: 0–100 %. Kann mit den Aktionen „Audiofeedback lauter“ bzw. „Audiofeedback leiser“ gekoppelt werden. Dadurch wird ein Feld zur Regelung der Lautstärke erstellt, das zugleich die Lautstärke des Feedbacks anzeigt.
Helligkeit des Partnerfensters	Nur für Tobii Dynavox I-13 und I-16. Zeigt die Helligkeit des Partnerfensters in Prozent an: 0–100 %. Kann mit den Aktionen „Helligkeit des Partnerfensters erhöhen“ und „Helligkeit des Partnerfensters senken“ kombiniert werden, sodass ein Feld entsteht, mit dem sich die Helligkeit des Partnerfensters zugleich steuern und anzeigen lässt.
Status des Partnerfensters	Nur für Tobii Dynavox I-13 und I-16. Wenn die Aktion „Partnerfenster ein-/ausschalten“ auf dem Feld vorhanden ist (Standard), wird in der Bezeichnung die Aktion für das Feld angezeigt: „Partnerfenster einschalten“ oder „Partnerfenster ausschalten“. Wenn die Aktion „Partnerfenster ein-/ausschalten“ nicht auf dem Feld vorhanden ist, wird in der Bezeichnung des Feldes der aktuelle Status des Partnerfensters angezeigt: „Partnerfenster ein“ oder „Partnerfenster aus“.
Sprechstatus	Wenn die Aktion „Mitteilungsfenster sprechen“ auf dem Feld vorhanden ist (Standard), wird in der Bezeichnung die Aktion für das Feld angezeigt: „Sprechen“ oder „Anhalten“. Wenn die Aktion „Mitteilungsfenster sprechen“ nicht auf dem Feld vorhanden ist, wird in der Bezeichnung des Feldes der aktuelle Sprechstatus angezeigt: „Sprechen“ oder „Sprachausgabe stoppen“.

Aktiver Inhaltstyp	Beschreibung
Stummschaltungsstatus der Sprachausgabe	Wenn die Aktion „Sprachwiedergabe ein/aus“ auf dem Feld vorhanden ist (Standard), wird in der Bezeichnung die Aktion für das Feld angezeigt: „Stummschalten“ oder „Stummschaltung aufheben“. Wenn die Aktion „Sprachwiedergabe ein/aus“ nicht auf dem Feld vorhanden ist, wird in der Bezeichnung des Feldes der aktuelle Sprachstummschaltungsstatus angezeigt: „Stumm“ oder „Nicht stumm“.
Sprachlautstärke	Zeigt die Sprachlautstärke an: 0–100 %. Kann mit den Aktionen „Sprachlautstärke erhöhen“ bzw. „Sprachlautstärke verringern“ gekoppelt werden. Dadurch wird ein Feld zur Regelung der Lautstärke erstellt, das zugleich die Sprachlautstärke anzeigt.
Uhrzeit	Zeigt die aktuelle Systemzeit in Stunden und Minuten an. Das Zeitformat wird von den Regionaleinstellungen des Betriebssystems festgelegt. Hinweis: Das Symbol ist ein stilisiertes Ziffernblatt, das nicht die Zeit anzeigt.

8.6.3 Mitteilung

Die Mitteilung ist der Text, der ins Mitteilungsfenster eingefügt wird, wenn das Feld ausgewählt wird. Wenn kein Mitteilungsfenster vorhanden ist, wird die Mitteilung ausgesprochen.

8.6.3.1 Mitteilung ändern

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein Feld aus.
3. Machen Sie eine Eingabe im Textfeld **Mitteilung**.

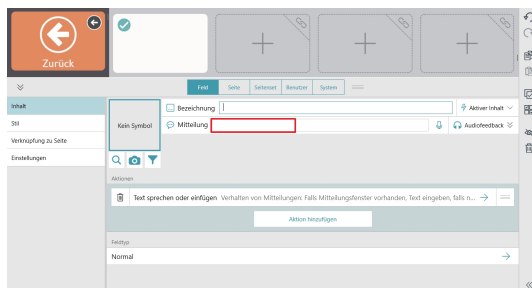


Abbildung 8.10 Textfeld „Mitteilung“

Wie Sie eine personalisierte Mitteilung als Tonaufnahme aufzeichnen können, erfahren Sie in Abschnitt 8.6.3.2 *Eine Aufnahme erstellen*.

8.6.3.2 Eine Aufnahme erstellen



Wenn Sie für ein(e) bestimmte(s) Mitteilung bzw. Audiofeedback sowohl eine Aufnahme als auch einen Text eingegeben haben, müssen Sie angeben, welche dieser beiden Optionen im Anwendungsmodus wiedergegeben werden soll. Wählen Sie den Pfeil an, um entweder den Text oder die Aufnahme als aktive Option festzulegen.

1. Um die Aufnahme zu starten, wählen und halten Sie  **Aufnahme**.
2. Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, lassen Sie  **Aufnahme** los.



3. Um Ihre Aufnahme anzuhören, wählen Sie **Wiedergabe**.



- Um Ihre Aufnahme zu löschen, wählen Sie das **X**.



8.6.4 Audiofeedback

Das Audiofeedback kann mit den Auswahlmethoden Loslassen, Mit Maus verweilen, Gaze Interaction und Scanning verwendet werden. Das Audiofeedback ist eine Vorschau für das Feld und wird gesprochen, wenn das Feld hervorgehoben, aber noch nicht ausgewählt wurde.

8.6.4.1 Das Audiofeedback für ein Feld ändern

- Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
- Wählen Sie ein Feld aus.
- Wählen Sie **Audiofeedback**, um die Zeile zu erweitern.

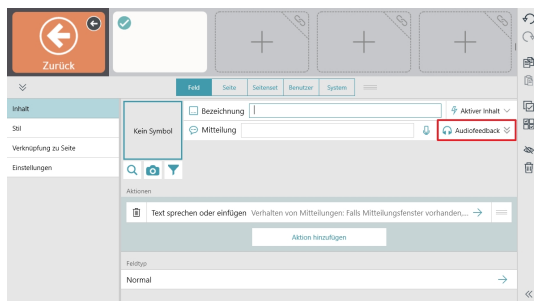


Abbildung 8.11 Das Textfeld „Audiofeedback“

- Machen Sie eine Eingabe im Feld **Audiofeedback**.


Wie Sie ein personalisiertes Audiofeedback aufzeichnen können, erfahren Sie in Abschnitt 8.6.3.2 *Eine Aufnahme erstellen*.

8.6.5 Bild

Ein Feld kann ein Foto oder ein Symbol enthalten.

8.6.5.1 Das Bild für ein Feld ändern


- Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
- Wählen Sie ein Feld aus.
- Fügen Sie dem Feld ein Bild hinzu:
 - Um nach einem Symbol zu suchen:
 - Wählen Sie das Feld  **Symbolsuche**. Daraufhin wird das Dialogfeld „Symbolsuche“ geöffnet.

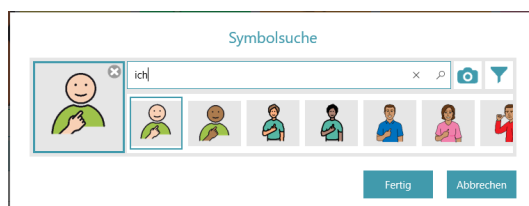

- Grenzen Sie Ihre Suche durch Eingabe in das Textfeld ein.
- Wählen Sie das gewünschte Symbol.

- d. Wählen Sie **Fertig**.
- Wenn Sie mit der Kamera ein Foto für das Bild machen möchten:
 - a. Wählen Sie das Feld  **Kamera**.
 - b. Wählen Sie **Von der Kamera**.
 - c. Verwenden Sie die Kamera an Ihrem Gerät, um ein Foto aufzunehmen.
- Wenn Sie ein Bild verwenden möchten, das auf Ihrem Gerät gespeichert ist:
 - a. Wählen Sie das Feld  **Kamera**.
 - b. Wählen Sie **Aus Bildarchiv**.
 - c. Navigieren Sie mit dem Dateibrowser zur gewünschten Bilddatei.

Wenn das Feld kein Bild enthalten soll, wählen Sie das **X** in der Ecke des aktuellen Symbols oder nehmen Sie für das Layout des Feldes die Einstellung „Nur Bezeichnung“ vor. Siehe Abschnitt 8.8.3.5 *Feldlayout*.

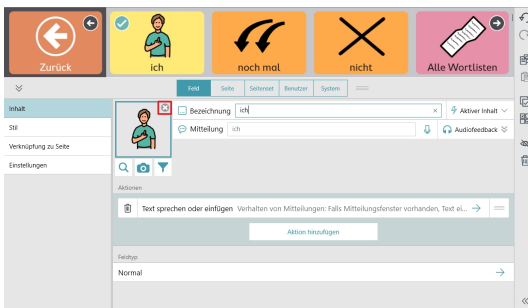

8.6.5.2 Die Ergebnisse der Symbolsuche filtern

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein Feld aus.
3. Wählen Sie das Feld  **Symbolfilter**.
4. Wählen Sie die Funktionen, die Sie in den Ergebnissen Ihrer Symbolsuche sehen möchten (Erwachsener, Kind, männlich, weiblich).


 Ihre Filtereinstellungen bleiben aktiv, bis Sie sie erneut bearbeiten.

8.6.6 Feldtyp

Die Einstellung „Feldtyp“ legt fest, wie sich ein Feld verhält.

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein Feld aus.
3. Wählen Sie **Feldtyp** aus.
4. Wählen Sie einen Feldtyp aus der Liste aus
 - **Normal** – kann ein Symbol, eine Bezeichnung und Aktionen enthalten. Standardmäßig ist die Aktion „Sprechen/Text eingeben“ voreingestellt.
 - **Vorhersage** – antizipiert das nächste Wort anhand der aktuellen Inhalte im Mitteilungsfenster. Wenn Sie dieses Feld auswählen, wird das aktuell angezeigte Wort in das Mitteilungsfenster eingefügt.
 - **Tastatur** – dient zum Einfügen eines einzelnen Buchstaben in das Mitteilungsfenster und reagiert entsprechend auf Modifikatoren (beispielsweise die Umschalt- oder die Feststelltaste).

- **Wortform** – ändert das Zielwort so, dass es der angegebenen Wortform entspricht (d. h. Plural, Vergangenheit usw.). Als Ziel kann eine von zwei Optionen festgelegt werden: entweder das letzte Wort im Mitteilungsfenster oder alle Grammatikfelder.

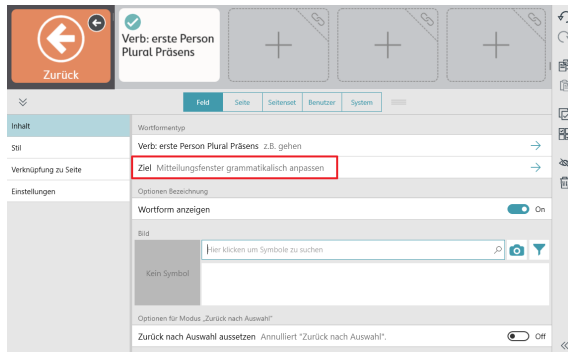

Damit die Wortformfunktion wie vorgesehen funktioniert, müssen die Einstellungen für die Sprachregeln bei den Feldern des Typs „Wortform“ und „Grammatik“ gleich sein.

- **Grammatik** – kann die eigene Bezeichnung aufgrund des aktuellen Inhalts im Mitteilungsfenster oder eines ausgewählten Feldes des Typs „Wortform“ bzw. „Impliziertes Subjekt“ an die voraussichtlich benötigte grammatikalische Form des Wortes anpassen.
- **Impliziertes Subjekt** — (nur für Spanisch) wenn ein passendes Pronomen eingefügt wird, kann ein Feld des Typs „Impliziertes Subjekt“ verwendet werden, um die Wortform von Feldern des Typs „Grammatik“ zu ändern und die dazugehörige Bezeichnung in das Mitteilungsfenster einzufügen. Wenn es einmal ausgewählt wird, ändert ein Feld des Typs „Impliziertes Subjekt“ Felder des Typs „Grammatik“ dem jeweiligen Pronomen entsprechend. Wenn es ein zweites Mal ausgewählt wird, wird die Bezeichnung (das Pronomen) des Feldes „Impliziertes Subjekt“ in das Mitteilungsfenster eingefügt.
Wenn die Sprachregeln des Feldes „Impliziertes Subjekt“ auf Spanisch (Mexiko, Spanien oder USA) eingestellt sind, kann eines der folgenden Pronomen auf das Feld angewendet werden:

- yo
- tú
- usted
- él
- ella
- nosotros
- nosotras
- vosotros
- vosotras
- ustedes
- ellos
- ellas



Damit die Wortformfunktion wie vorgesehen funktioniert, müssen die Einstellungen für die Sprachregeln bei den Feldern des Typs „Impliziertes Subjekt“ und „Grammatik“ gleich sein.

8.7 Feldaktionen

Mit Aktionen können Sie Felder erstellen, die Handlungen zur Folge haben!

Aktionen für ein Feld hinzufügen oder bearbeiten



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein Feld aus.
3. Wählen Sie **Aktion hinzufügen**, um eine Aktion auszuwählen, die dem Feld hinzugefügt werden soll. (Nur verfügbar, wenn der **Feldtyp** auf **Normal** gesetzt wurde)

Aktionen für Mitteilungen	Beschreibung
Mitteilungsfenster löschen	Löscht den Inhalt des Mitteilungsfensters.
Wort löschen	Löscht das letzte Wort im Mitteilungsfenster.
Mitteilungsfenster in Feld kopieren	Den Text im Mitteilungsfenster kopieren und anschließend der Bezeichnung des vom Benutzer gewählten Feldes hinzufügen.
Mitteilungsfenster in Zwischenablage kopieren	Kopiert den Text im Mitteilungsfenster in die Zwischenablage des Systems.
Zwischenablage in Mitteilungsfenster einfügen	Fügt den Inhalt der Zwischenablage des Systems in das Mitteilungsfenster ein.
Mitteilungsfenster teilen	
Mitteilungsfenster sprechen	Spricht den Inhalt des Mitteilungsfensters aus.
Text sprechen oder einfügen	Spricht den Text von einem Feld aus und/oder fügt ihn ein.
Satz sprechen	Spricht den letzten Satz im Mitteilungsfenster aus.
Gesprächsmodus ein/aus	Schaltet den Gesprächsmodus ein und aus. Wenn die Gesprächsfunktion aktiviert ist, wird der aktuelle Inhalt des Mitteilungsfensters zwischengespeichert und das Mitteilungsfenster anschließend geleert. Im Gesprächsmodus können Sie neuen Inhalt in das Mitteilungsfenster eingeben und per Sprachausgabe wiedergeben. Wenn Sie die Gesprächsfunktion ausschalten, wird der Inhalt des Mitteilungsfensters wiederhergestellt, sodass Sie einfach weitermachen können, wo Sie aufgehört haben.
Aktionen zur Navigation	Beschreibung
Zurück nach Auswahl abbrechen	„Zurück nach Auswahl“ wird abgebrochen. Sie bleiben auf der aktuellen Seite.
Zurück nach Auswahl aussetzen	Annulliert „Zurück nach Auswahl“.
Zurück	Geht zurück zur vorherigen Seite.
Zurück zur Startseite	Geht zurück zur Startseite.
Verknüpfung	Verknüpfung zu anderer Seite.
Übersicht öffnen	Öffnet die Seite Übersicht.
Tastatur öffnen	Öffnet die Tastaturseite.
Whiteboard öffnen***	Öffnet das Whiteboard.
Zurück nach Auswahl	Bringt Sie zu der Seite zurück, von der aus „Zurück nach Auswahl“ begonnen wurde.
Seitenset wechseln	Zu einem anderen Seitenset wechseln.
Aktionen für Verhaltensunterstützungen	Beschreibung
Zuerst dann	Zeigt in einem Popup-Fenster eine Zuerst-Dann-Folge.
Ablaufplan	Zeigt in einem Popup-Fenster einen Ablaufplan.
Skript	Zeigt in einem Popup-Fenster ein Skript.
Timer	Zeigt in der oberen Menüleiste eine Uhr an, die die angegebene Zeitspanne rückwärts ablaufen lässt.

Aktionen für Auswahlmethoden	Beschreibung
Eyetracker kalibrieren	Startet die Eyetracking-Kalibrierung.
Auswahlmethode pausieren	Pausiert die Auswahlmethode bzw. aktiviert sie wieder. Der Bezeichnungstext des Feldes zeigt, ob die Auswahlmethode derzeit pausiert oder aktiv ist. Gilt für folgende Auswahlmethoden: „Mit Maus verweilen“, „Gaze Interaction“.
Aktivierungszeit festlegen	Legt die Zeitvariable der Auswahlmethode auf den angegebenen Wert fest. Welche Zeitvariable davon betroffen ist, hängt davon ab, welche Auswahlmethode zum Zeitpunkt der Aktivierung von <i>Aktivierungszeit festlegen</i> aktiv ist.[†] Zum Beispiel können Sie die Aktion hinzufügen, wenn die Auswahlmethode „Berühren“ ist, und später aktiviert der Benutzer sie mit der Auswahlmethode „Gaze Interaction“, um die Blickverweildauer zu ändern.
Trackstatus Eyetracker	Zeigt das Fenster „Trackstatus“ für den Eyetracker an.
Aktionen zur Lautstärkeregelung	Beschreibung
Audiofeedback Stummschaltung Ein/Aus	Audiofeedback stummschalten oder Stummschaltung aufheben.
Audiofeedback leiser	Das Audiofeedback leiser stellen.
Audiofeedback lauter	Das Audiofeedback lauter stellen.
Lautstärke festlegen	Ändert die Systemlautstärke so, dass sie ein bestimmtes Niveau erreicht.
Sprachstummschaltung ein/aus	Schaltet den Ton ein oder aus.
Sprachlautstärke senken	Stellt die Lautstärke leiser.
Sprachlautstärke erhöhen	Stellt die Lautstärke lauter.
Aktionen zur Umfeldsteuerung	Beschreibung
IR-Signal senden	Das angegebene IR-Signal senden.
Aktionen für AccessIT	Beschreibung
Mit AccessIT verbinden*	Unterbricht die Verbindung mit dem zur Zeit angeschlossenen AccessIT-Gerät und zeigt dann die AccessIT-Geräteauswahl.
AccessIT zurücksetzen*	Hält die angegebenen AccessIT-Aktionen an: Textübertragung, gehaltene Tastaturtasten, Klicks und/oder durchgängige Mausbewegungen.
Feldtext senden*	Die Mitteilung oder die Bezeichnung eines Feldes an das AccessIT-Gerät senden.
Tastaturtaste senden*	Eine Tastaturtaste an das AccessIT-Gerät senden.
Text im Mitteilungsfenster senden*	Sendet den aktuellen Text im Mitteilungsfenster an das AccessIT-Gerät.
Mausklick senden*	Mausklicks an das AccessIT-Gerät senden.
Mausbewegung senden*	Mausbewegung an das AccessIT-Gerät senden.
Text senden*	Text an das AccessIT-Gerät senden.
Aktionen für „Andere Programme starten“	Beschreibung
Anwendung starten	Startet die angegebene Anwendung

Aktionen für Gerät	Beschreibung
Gerät neu starten	Startet das Gerät neu.
Gerät ausschalten	Schaltet das Gerät aus.
Umschaltfunktion Vollbildmodus	Schaltet den Vollbildmodus für das Gerät ein oder aus.

Aktion für Partnerfenster	Beschreibung
Helligkeit des Partnerfensters senken**	Verringert die Helligkeit des Partnerfensters.
Helligkeit des Partnerfensters erhöhen**	Erhöht die Helligkeit des Partnerfensters.
Partnerfenster ein-/ausschalten**	Schaltet das Partnerfenster ein bzw. aus.

* Diese Aktion erfordert ein Tobii Dynavox AccessIT 3. Siehe Abschnitt 8.7.4 *AccessIT*

** Diese Aktion erfordert ein Tobii Dynavox I-13 oder I-16.

*** Siehe Abschnitt 8.7.3 *Whiteboard*

† Liste der Zeitvariablen, die von der Aktion „Aktivierungszeit festlegen“ betroffen sind.

Tabelle 8.1 Das Diagramm „Aktivierungszeit“

Auswahlmethode	Betroffene Zeitvariable
Gaze Interaction mit Verweilen	Verweilzeit
Gaze Interaction mit Taster	Tasterkontaktzeit
Gaze Interaction mit Blinzeln	Mindestzeit für Blinzeln
Berühren/Loslassen	Kontaktzeit
Auto-Scanning mit 1 Taster	Geschwindigkeit der Scanningmarkierung
Schrittweises Scanning mit 1 Taster	Haltedauer
Verweil-Scanning mit 1 Taster	Haltedauer
Umgekehrtes Scanning	Geschwindigkeit
Mit Maus verweilen	Verweilzeit
Anfassen	keine


8.7.1 Eine Aktion löschen

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein Feld aus.
3. Wählen Sie das Feld  **Löschen** neben einer Aktion.
4. Wählen Sie das rote Feld **Löschen**, um das Löschen zu bestätigen.

8.7.2 Feldaktionen neu ordnen

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein Feld aus.

3. Wählen und halten Sie das Zeichen  für eine Aktion und ziehen Sie es in die Liste mit Aktionen in die neue Position.

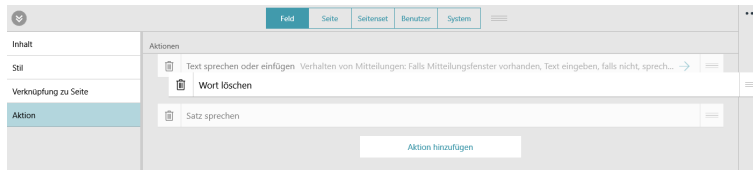


8.7.3 Whiteboard

 Das Whiteboard ist nur mit der Auswahlmethode „Berühren“ verfügbar.

Das Whiteboard ist ein Bereich, in dem Sie Bilder anzeigen und Freihandzeichnungen erstellen können. Erstellen Sie so viele Zeichnungen, wie Sie möchten. Sie bleiben erhalten, bis sie gelöscht werden.

Um das Whiteboard zu öffnen, verwenden Sie die Aktion „Whiteboard öffnen“ auf einem Feld.

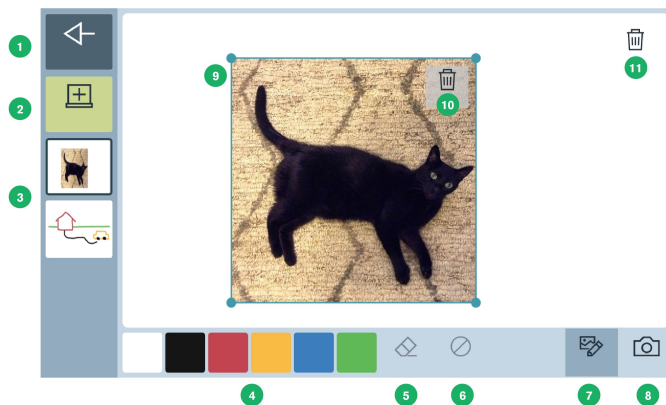

1. **Zurück:** Zum Seitenset zurückkehren.
2. **Neues Whiteboard:** Ein neues Whiteboard erstellen.
3. **Liste der vorhandenen Whiteboards:** Whiteboard auswählen und bearbeiten.
4. **Zeichenpalette:** Farbe auswählen und freihändig auf dem Whiteboard zeichnen.
5. **Löschen:** Zeichnungen in bestimmten Bereichen löschen.
6. **Alles löschen:** Leert das aktuelle Whiteboard, sodass keine Zeichnungen mehr vorhanden sind.
7. **Bilder bearbeiten:** Bilder auf dem Whiteboard anders anordnen, ihre Größe ändern oder sie löschen.
8. **Bild hinzufügen:** Dem Whiteboard ein Bild hinzufügen. Nehmen Sie mit der integrierten Kamera ein Foto auf oder suchen Sie nach einem auf dem Gerät gespeicherten Bild.

Aktionen für „Bild hinzufügen“

- Ein Foto aufnehmen
- Ein Foto auswählen

 Das Dialogfenster für diese Aktion steht nur mit der Auswahlmethode „Berühren“ zur Verfügung.

- Abbrechen
9. **Ausgewähltes Bild:** Klicken und ziehen Sie von der Mitte des Bildes aus, um es zu verschieben. Klicken und ziehen Sie vom Rand aus, um die Größe des Bildes zu ändern.
 10. **Bild löschen:** Löscht das ausgewählte Bild.
 11. **Whiteboard löschen:** Löscht das aktuelle Whiteboard.

8.7.4 AccessIT

Snap unterstützt das Tobii Dynavox AccessIT 3, ein USB-Bluetooth-Gerät zur Übermittlung von Tastatureingaben, Mausbewegungen und Mausklicks von einem Gerät mit der App Tobii Dynavox Snap Core First an einen gewöhnlichen Computer mit Windows 10. Wenn Sie mehr über das Tobii Dynavox AccessIT 3 erfahren möchten, gehen Sie auf <http://www.tobiidynavox.com/AccessIT>.



In englischen Seitensets, die mit Snap 1.7 oder höher erstellt wurden, sind AccessIT-Seiten enthalten. Auf <https://www.mytobiidynavox.com/PagesetCentral> stehen AccessIT-Seitenpakete in deutscher Sprache zum Import in Ihre bereits vorhandenen Seitensets bereit.



Im Folgenden wird der Computer, der die Befehle entgegennimmt, als „der PC“ bezeichnet, und das Gerät, von dem aus die Befehle übermittelt werden, als „das Sprachausgabegerät“.



Das AccessIT 3 nutzt die drahtlose Technologie Bluetooth®. Der PC (mit angeschlossenem AccessIT 3) und das Sprachausgabegerät müssen sich bei der Verwendung des AccessIT 3 innerhalb eines Abstands von ca. 10 Metern befinden und über Bluetooth miteinander gekoppelt sein.

Vor Durchführung der folgenden Schritte müssen sowohl das Sprachausgabegerät als auch der PC eingeschaltet und entsperrt werden.

8.7.4.1 AccessIT einrichten

Das AccessIT anschließen

1. (Auf dem PC) Verbinden Sie das AccessIT 3 mit einem USB-Anschluss.



AccessIT 3 erfordert USB 2.0 oder höher.

Bluetooth aktivieren – Sprachausgabegeräte mit Windows

1. (Auf dem Sprachausgabegerät) Wählen Sie das **Startmenü** und anschließend **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Geräte**.
3. Wählen Sie **Bluetooth**.
4. Treffen Sie für das Ein-/Aus-Kontrollkästchen **Bluetooth** die Auswahl EIN.

Bluetooth aktivieren – Sprachausgabegeräte mit iOS (iPad)

1. (Auf dem Sprachausgabegerät) Gehen Sie auf **Einstellungen > Bluetooth** und aktivieren Sie Bluetooth.

8.7.4.2 Aktionen auf dem AccessIT

Die Aktionen auf dem AccessIT sind auf eine kombinierte Verwendung ausgelegt. Für gewöhnliche PC-Vorgänge wie z. B. Anklicken und Ziehen ist mehr als eine Aktion erforderlich. Die einzelnen Aktionen werden im Folgenden beschrieben.



Wenn ein Feld mit einer AccessIT-Aktion angewählt wird, aber kein AccessIT-Gerät angeschlossen ist, wird automatisch die Auswahl der (verfügbaren) AccessIT-Geräte geöffnet.

- Mit AccessIT verbinden – Unterbricht die Verbindung zum aktuellen AccessIT-Gerät (falls vorhanden) und zeigt die AccessIT-Geräteauswahl an. Diese Aktion dient dazu, von einem AccessIT-Gerät zum anderen zu wechseln. Nicht alle AccessIT-Sitzungen müssen mit dieser Aktion beginnen, da jede AccessIT-Aktion automatisch die AccessIT-Geräteauswahl öffnet, wenn im Moment kein AccessIT-Gerät angeschlossen ist.
- AccessIT zurücksetzen – Beendet die angegebenen Befehlstypen, die derzeit ausgeführt werden: Tastaturtasten, Mausklicks, Mausbewegungen und/oder Text.
- Feldtext senden – Sendet die Mitteilung im Feld an das AccessIT-Gerät. Wenn das Feld keine Mitteilung enthält, wird die Bezeichnung des Feldes gesendet.
- Tastaturtaste senden – Sendet die angegebene Tastaturtaste. Optionen: Sie können die Taste gedrückt halten und/oder nach dem Absenden der Tastaturtaste (vor Durchführung der nächsten Aktion) eine bestimmte Zeit lang warten.
- Text im Mitteilungsfenster senden – Sendet den aktuellen Text im Mitteilungsfenster an das AccessIT-Gerät. Wenn das Mitteilungsfenster Symbole enthält, so werden diese nicht gesendet.

- Text senden – Sendet den angegebenen Text an das AccessIT-Gerät.
- Mausklick senden – Sendet den angegebenen Klicktyp (Linksklick, Rechtsklick, Mittelklick, doppelter Linksklick). Optionen: Sie können nach dem Absenden des Klicks (vor Durchführung der nächsten Aktion) eine bestimmte Zeit lang warten und/oder den Klick gedrückt halten.
- Mausbewegung senden – Sendet eine Mausbewegung an das AccessIT-Gerät. Mausbewegungen erfolgen von der aktuellen Mausposition aus. Verschieben Sie den blauen Ball zu der Position im Kreis, die der gewünschten Mausbewegung entspricht, und geben Sie dann eine Zahl in das Feld für die Entfernung ein. Die Einheit für den Abstand ist die kleinste erkennbare Mausbewegung (je nach den verwendeten Geräten und den Einstellungen für die Mausgeschwindigkeit auf dem PC zwischen 0,08 und 0,13 mm). Optionen: Durchgängige Bewegung (die Maus setzt ihre Bewegung in die angegebene Richtung fort, bis eine andere Aktion sie anhält bzw. ihre Richtung ändert oder sie den Rand des Bildschirms erreicht) und/oder nach Absenden der Mausbewegung (vor Durchführung der nächsten Aktion) eine bestimmte Zeit lang warten.



Abbildung 8.12 Richtung der Mausbewegung – Durch eine entsprechende Positionierung des blauen Balls in dem Kreis können Sie die Richtung der Mausbewegung einstellen.



Manche AccessIT-Benutzer finden es hilfreich, auf dem PC in Windows die Einstellung „Zeigerposition beim Drücken der STRG-Taste anzeigen“ zu aktivieren. Wenn Sie von Snap aus mithilfe der Aktion „Tastaturtaste senden“ die STRG-Taste absenden, erscheinen dann auf dem PC vorübergehend animierte Kreise rund um den Mauszeiger, damit er besser zu sehen ist. Wenn Sie in Windows auf diese Einstellung für die Maus zugreifen möchten, gehen Sie auf *Einstellungen > Geräte > Maus > Weitere Mausoptionen > Registerkarte Zeigeroptionen*.

8.7.4.3 Energiespareinstellungen auf dem PC und AccessIT


Ihr PC kann nur dann AccessIT-Befehle entgegennehmen, wenn er eingeschaltet und nicht im Standby-Modus ist. Damit der Zugriff auf den PC nicht unterbrochen wird, legen Sie in den Energiespareinstellungen Ihres PCs fest, dass der Computer (die Festplatte) im angeschlossenen Zustand niemals in den Standby-Modus versetzt wird.

Ihr PC empfängt auch weiterhin AccessIT-Befehle, wenn der Bildschirm (das Display) in den Energiesparmodus versetzt wird. Wenn Snap einen AccessIT-Befehl (Tastaturtaste, Mausbewegung oder Mausklick) absendet, wird der PC-Bildschirm „aufgeweckt“.

Die Energiespareinstellung in Windows finden Sie unter *Einstellungen > System > Netzbetrieb und Energiesparen*.

8.8 Stil des Feldes

In der Kategorie „Stil“ können Sie das Aussehen eines Feldes verändern.

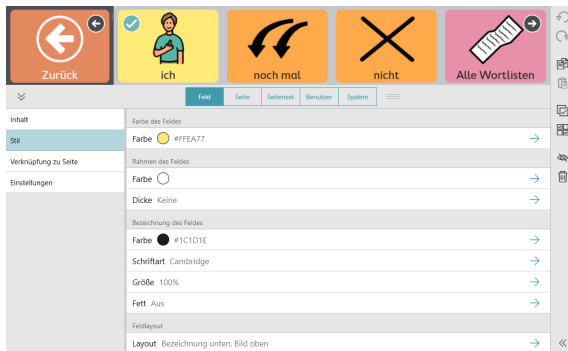

8.8.1 Farbe des Feldes



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein Feld aus.
3. Wählen Sie die Kategorie **Stil**.
4. Wählen Sie unter „Farbe des Feldes“ **Farbe** aus.
5. Wählen Sie eine Farbe aus.

8.8.2 Rahmen des Feldes

8.8.2.1 Rahmenfarbe



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein Feld aus.
3. Wählen Sie die Kategorie **Stil**.
4. Wählen Sie unter „Rahmen des Feldes“ **Farbe** aus.
5. Wählen Sie eine Farbe aus.

8.8.2.2 Rahmendicke



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein Feld aus.
3. Wählen Sie die Kategorie **Stil**.
4. Wählen Sie unter „Rahmen des Feldes“ **Dicke** aus.
5. Wählen Sie eine Rahmendicke aus – Keine, Dünn, Mittel oder Dick.



Abbildung 8.13 Mögliche Felderrahmen: Keiner, Dünn, Mittel und Dick.

8.8.3 Bezeichnung des Feldes

8.8.3.1 Farbe



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein Feld aus.
3. Wählen Sie die Kategorie **Stil**.
4. Wählen Sie unter „Bezeichnung des Feldes“ **Farbe** aus.
5. Wählen Sie eine Farbe aus.

8.8.3.2 Schriftart



Standardmäßig wird diese Einstellung unter dem Reiter „Seitenset“ vorgenommen. Wenn Sie in diesem Fall von der Standardeinstellung für das Seitenset abweichen möchten, nehmen Sie für „Seitenset-Einstellung abstimmen“ die Einstellung **Aus** vor. Wenn diese Einstellung der Einstellung für den Rest des Seitensets entsprechen soll, nehmen Sie für „Seitenset-Einstellung abstimmen“ die Einstellung **Ein** vor.



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein Feld aus.
3. Wählen Sie die Kategorie **Stil**.

4. Wählen Sie unter „Bezeichnung des Feldes“ **Schriftart** aus.
5. Wählen Sie eine Schriftart aus.

8.8.3.3 Größe



Standardmäßig wird diese Einstellung unter dem Reiter „Seitenset“ vorgenommen. Wenn Sie in diesem Fall von der Standardeinstellung für das Seitenset abweichen möchten, nehmen Sie für „Seitenset-Einstellung abstimmen“ die Einstellung **Aus** vor. Wenn diese Einstellung der Einstellung für den Rest des Seitensets entsprechen soll, nehmen Sie für „Seitenset-Einstellung abstimmen“ die Einstellung **Ein** vor.



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein Feld aus.
3. Wählen Sie die Kategorie **Stil**.
4. Wählen Sie unter „Bezeichnung des Feldes“ **Größe** aus.
5. Wählen Sie eine Größe aus.

8.8.3.4 Fett



Standardmäßig wird diese Einstellung unter dem Reiter „Seitenset“ vorgenommen. Wenn Sie in diesem Fall von der Standardeinstellung für das Seitenset abweichen möchten, nehmen Sie für „Seitenset-Einstellung abstimmen“ die Einstellung **Aus** vor. Wenn diese Einstellung der Einstellung für den Rest des Seitensets entsprechen soll, nehmen Sie für „Seitenset-Einstellung abstimmen“ die Einstellung **Ein** vor.



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein Feld aus.
3. Wählen Sie die Kategorie **Stil**.
4. Wählen Sie unter „Bezeichnung des Feldes“ **Fett** aus.
5. Nehmen Sie für „Fett“ die Einstellung **Ein** oder **Aus** vor.

8.8.3.5 Feldlayout



Standardmäßig wird diese Einstellung unter dem Reiter „Seitenset“ vorgenommen. Wenn Sie in diesem Fall von der Standardeinstellung für das Seitenset abweichen möchten, nehmen Sie für „Seitenset-Einstellung abstimmen“ die Einstellung **Aus** vor. Wenn diese Einstellung der Einstellung für den Rest des Seitensets entsprechen soll, nehmen Sie für „Seitenset-Einstellung abstimmen“ die Einstellung **Ein** vor.



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein Feld aus.
3. Wählen Sie die Kategorie **Stil**.
4. Wählen Sie unter „Feldlayout“ **Layout** aus.
5. Wählen Sie ein Layout aus der Liste aus:



Bezeichnung oben, Bild unten



Bezeichnung unten, Bild oben




Bezeichnung links, Bild rechts



Bezeichnung rechts, Bild links



Nur Bezeichnung

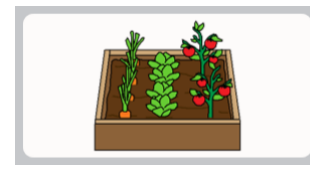

Nur Bild

8.9 Verknüpfung mit Seite/Neue Seite erstellen

Wenn Sie die Verknüpfungsfelder auswählen, öffnet sich eine andere Seite. Die Verknüpfungsfelder erkennen Sie an die-

sem Symbol  oder dem Symbol „Zurück nach Auswahl“ . Wie Sie das Aussehen der Felder „Verknüpfung“ und „Zurück nach Auswahl“ verändern, erfahren Sie in Abschnitt 9.3.5 Seitenset – Darstellung Verknüpfung.

8.9.1 Ein Verknüpfungsfeld in einer leeren Zelle erstellen

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie das Verknüpfungssymbol in einer leeren Zelle aus.



- Zur Verknüpfung mit einer neuen Seite, siehe 8.9.3 *Verknüpfung mit neuer Seite/Neue Seite erstellen*.
- Zur Verknüpfung mit einer bereits vorhandenen Seite, siehe 8.9.4 *Verknüpfung auf bestehende Seite*.
- Zur Verknüpfung mit einer (neuen) Kopie einer bereits vorhandenen Seite, siehe 8.9.5 *Verknüpfung mit neuer Kopie einer vorhandenen Seite*.
- Um eine Seite zu importieren und eine Verknüpfung zu ihr zu erstellen, siehe 8.9.6 *Importieren und mit Seite verknüpfen*.

8.9.2 Eine Verknüpfung von einem bereits vorhandenen Feld erstellen

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie das Feld aus, von dem Sie eine Verknüpfung erstellen möchten.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Feld**.
4. Wählen Sie die Kategorie **Aktion**.
5. Wählen Sie **Aktion hinzufügen** aus.

6. Wählen Sie **Verknüpfung** aus.

- Zur Verknüpfung mit einer neuen Seite, siehe 8.9.3 *Verknüpfung mit neuer Seite/Neue Seite erstellen*.
- Zur Verknüpfung mit einer bereits vorhandenen Seite, siehe 8.9.4 *Verknüpfung auf bestehende Seite*.
- Zur Verknüpfung mit einer (neuen) Kopie einer bereits vorhandenen Seite, siehe 8.9.5 *Verknüpfung mit neuer Kopie einer vorhandenen Seite*.
- Um eine Seite zu importieren und eine Verknüpfung zu ihr zu erstellen, siehe 8.9.6 *Importieren und mit Seite verknüpfen*.

8.9.3 Verknüpfung mit neuer Seite/Neue Seite erstellen

1. Wählen Sie **Link auf neue Seite**. Daraufhin wird das Dialogfeld „Neue Seite“ geöffnet.
2. Geben Sie den Namen der Seite in das Feld **Name** ein. Wählen Sie ein Symbol aus oder wählen Sie das **X**, wenn Sie kein Symbol für die Seite einrichten möchten.
3. Wählen Sie **Erstellen**, um die Verknüpfung und die neue Seite zu erstellen. Wählen Sie **Abbrechen**, um ohne Speichern zurückzukehren.



8.9.4 Verknüpfung auf bestehende Seite

1. Wählen Sie **Verknüpfung auf bestehende Seite**. Daraufhin wird das Dialogfeld „Verknüpfung auf bestehende Seite“ geöffnet.
2. Wählen Sie eine Seite aus der Liste aus.



Um eine bestimmte Seite zu suchen, machen Sie eine Eingabe im Suchfeld, oder wählen Sie „Zuletzt geöffnet“, um eine kürzlich besuchte Seite zu finden.

3. Wählen Sie **Erstellen**, um die Verknüpfung zu erstellen. Wählen Sie **Abbrechen**, um ohne Speichern zurückzukehren.

Informationen zur Funktion „Zurück nach Auswahl“ erhalten Sie im Abschnitt 8.9.7 *Zurück nach Auswahl*.

8.9.5 Verknüpfung mit neuer Kopie einer vorhandenen Seite

Mit dieser Verknüpfungsmethode können Sie eine Seite als Vorlage für eine Seite verwenden, die Sie neu erstellen.

1. Wählen Sie **Verknüpfung auf Kopie von Seite**. Daraufhin wird das Dialogfeld „Verknüpfung auf Kopie von Seite“ geöffnet.
2. Wählen Sie eine Seite aus der Liste aus.



Um eine bestimmte Seite zu suchen, machen Sie eine Eingabe im Suchfeld, oder wählen Sie „Zuletzt geöffnet“, um eine kürzlich besuchte Seite zu finden.

3. Geben Sie im Feld „Name“ einen Namen für die neue Seite ein.
4. Wählen Sie **Erstellen**, um eine Kopie der ausgewählten Seite und die Verknüpfung zu erstellen. Wählen Sie **Abbrechen**, um ohne Speichern zurückzukehren.

Informationen zur Funktion „Zurück nach Auswahl“ erhalten Sie unter 8.9.7 *Zurück nach Auswahl*.

8.9.6 Importieren und mit Seite verknüpfen

Wenn Sie eine Paketdatei mit einer Seite haben, zu der Sie gerne eine Verknüpfung erstellen möchten, können Sie die Seite mit der Funktion „Importieren und mit Seite verknüpfen“ in einem Schritt importieren und verknüpfen.

1. Wählen Sie **Importieren und mit Seite verknüpfen**. Sie können entweder von myTobiiDynavox oder von einer lokalen Datei importieren:

Von myTobiiDynavox

- a. Wählen Sie **Von myTobiiDynavox**.
Möglicherweise werden Sie dazu aufgefordert, sich bei myTobiiDynavox anzumelden. Das Dialogfeld „Seitenpaket von myTobiiDynavox herunterladen“ wird geöffnet.
- b. Wählen Sie das Seitenpaket, das Sie importieren möchten, und gehen Sie anschließend auf **Weiter**.
- c. Wählen Sie die Seite, zu der Sie die Verknüpfung erstellen möchten, und gehen Sie anschließend auf **Importieren**.



Wenn das Seitenpaket eine oder mehrere Seiten enthält, die bereits auf Ihrem Gerät vorhanden, aber nicht mit den neuen Seiten identisch sind, kommt es zu Seitenkonflikten. Wählen Sie für jeden Sei-



tenkonflikt das entsprechende Symbol und entscheiden Sie anschließend, ob die vorhandene Seite beibehalten oder mit der importierten Seite aus dem Seitenpaket überschrieben werden soll. Bevor Sie den Import des Seitenpakets fortsetzen können, müssen Sie alle Seitenkonflikte auf diese Weise beilegen.

Von lokaler Datei

- a. Wählen Sie **Von lokaler Datei**. Das Dialogfeld „Seitenpaket aus lokaler Datei importieren“ wird geöffnet.
- b. Wählen Sie **Durchsuchen** aus. Navigieren Sie zu dem gewünschten Seitenpaket (.spb) und wählen Sie dann **Öffnen**.
- c. Wählen Sie **Weiter** aus.
- d. Wählen Sie die Seite, zu der Sie die Verknüpfung erstellen möchten, und gehen Sie anschließend auf **Importieren**.



Wenn das Seitenpaket eine oder mehrere Seiten enthält, die bereits auf Ihrem Gerät vorhanden, aber nicht mit den neuen Seiten identisch sind, kommt es zu Seitenkonflikten. Wählen Sie für jeden Sei-



tenkonflikt das entsprechende Symbol und entscheiden Sie anschließend, ob die vorhandene Seite beibehalten oder mit der importierten Seite aus dem Seitenpaket überschrieben werden soll. Bevor Sie den Import des Seitenpakets fortsetzen können, müssen Sie alle Seitenkonflikte auf diese Weise beilegen.

8.9.7 Zurück nach Auswahl

Wenn die Einstellung „Zurück nach Auswahl“ aktiviert ist, entsteht eine Verknüpfung zur vorher besuchten Seite, die eine Rückkehr zur vorherigen Seite auslöst, sobald auf der verknüpften Seite eine Auswahl getroffen wurde. Felder mit Ver-



knüpfungen, für die „Zurück nach Auswahl“ aktiviert ist, haben dieses Symbol:

Wie „Zurück nach Auswahl“ funktioniert

1. Wählen Sie das Feld mit der Verknüpfung „Zurück nach Auswahl“ aus. Die verknüpfte Seite wird geöffnet.
2. Treffen Sie eine Auswahl auf der verknüpften Seite.*
Die vorherige Seite (auf der sich das Feld mit der Verknüpfung „Zurück nach Auswahl“ befindet) wird geöffnet.



* Um die Rückkehr zur vorherigen Seite auszulösen, muss das ausgewählte Feld *eine* der folgenden Aktionen enthalten:

- Text sprechen oder einfügen
- Satz sprechen
- Zurück nach Auswahl

Oder es muss sich um einen der folgenden Feldtypen handeln, die ebenfalls die Rückkehr zur vorherigen Seite auslösen:

- Grammatik
- Wortform
- Wortvorhersage
- Mit „KeyType = space“ programmierte Felder für Bildschirmtastaturen

Die folgenden Aktionen verlängern den Modus „Zurück nach Auswahl“ und lösen *nicht* die Rückkehr zur vorherigen Seite aus:

- Zurück nach Auswahl aussetzen
- Zurück
- Verknüpfung
- Impliziertes Subjekt
- Auswahlmethode pausieren
- Gespräch

Wenn ein Feld mehrere Aktionen enthält (von denen einige die Rückkehr zur vorherigen Seite auslösen und einige den Modus „Zurück nach Auswahl“ aussetzen), wird die Rückkehr zur vorherigen Seite nur dann ausgelöst, wenn das Feld auch „Zurück nach Auswahl“ enthält.

Die folgenden Aktionen brechen den Besuch der Seite ab:

- Zurück nach Auswahl abbrechen
- Zurück zur Startseite
- Übersicht öffnen
- Tastatur öffnen

8.9.7.1 „Zurück nach Auswahl“ für ein Verknüpfungsfeld aktivieren



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie das Feld mit der Verknüpfung aus.

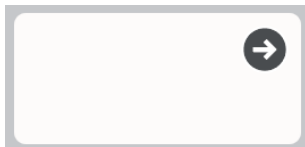


Abbildung 8.14 Beispiel für Feld mit Verknüpfung

3. Wählen Sie die Kategorie **Aktion**.
4. Wählen Sie die Aktion **Verknüpfung** aus.
5. Nehmen Sie für **Zurück nach Auswahl** die Einstellung „Ein“ vor.

8.9.7.2 Besuch verlängern, abbrechen oder von besuchter Seite zurückkehren

Sie können nach der Auswahl eines Feldes „Zurück nach Auswahl“ Aktionen durchführen, die den Besuch einer Seite unterbrechen oder verlängern. Wenn ein ausgewähltes Feld auf der besuchten Seite eine der folgenden Aktionen enthält, ändert sich der normale Ablauf „Zurück nach Auswahl“ folgendermaßen:

- Zurück nach Auswahl annullieren – trotz der Aktion(en) auf diesem Feld im Modus „Zurück nach Auswahl“ verbleiben.
- Zurück nach Auswahl abbrechen – Modus „Zurück nach Auswahl“ verlassen, aber auf der aktuellen Seite bleiben.
- Zurück nach Auswahl – Modus „Zurück nach Auswahl“ sofort (vor der Durchführung weiterer Aktionen auf diesem Feld) verlassen und zur ursprünglichen Seite zurückkehren. Alle Aktionen auf dem Feld werden ausgeführt.

8.10 Sprachregeln des Feldes

Über die Einstellungen für die Sprachregeln können Sie für das betreffende Feld die Sprache angeben, die für Symbolsuche, Symboldarstellung, Wortvorhersage, Wortform, Auto-Morphing und Sprachfunktion (falls für diese Sprache eine besondere Stimme eingerichtet wurde) verwendet wird.

Standardmäßig entsprechen die Spracheinstellungen eines Feldes den Einstellungen für das Seitenset oder die Seite. Sie können die Sprachregeln für ein Feld folgendermaßen verändern:



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.

2. Wählen Sie ein Feld aus.

3. Wählen Sie die Kategorie **Einstellungen**.

4. Wählen Sie **Sprachregeln**.

5. Wählen Sie eine Sprache aus der Liste aus:

- a. **Vollständig unterstützte Sprachen** – wirken sich auf Symbolsuche, Symboldarstellung, Wortvorhersage, Wortform, Auto-Morphing und Sprechstimme (falls für diese Sprache eine besondere Stimme eingerichtet wurde) aus.

Die Sprache **Neutral** wird hauptsächlich für Eigennamen verwendet (zum Beispiel Robert Koch oder Amsterdam). Wenn als „Neutral“ gekennzeichnete Wörter an das Mitteilungsfenster gesendet werden, werden sie mit denselben Sprachregeln wie die anderen Wörter im Mitteilungsfenster gesprochen. Wenn das Mitteilungsfenster ansonsten leer ist, werden die neutralen Wörter den für die aktuelle oder zuletzt verwendete (nicht neutrale) Seite geltenden Sprachregeln entsprechend ausgesprochen.

- b. **Andere Sprachen:** Die Sprachen in dieser Kategorie werden durch die App Snap Core First in unterschiedlichem Maß unterstützt.

8.11 Fernbedienungen

Einige Geräte von Tobii Dynavox, z. B. das Indi und das I-110, sind mit einer IR-Fernbedienung ausgestattet, die über die Snap-Software gesteuert werden kann. Auf diese Weise lassen sich diese Geräte als Fernbedienungen für Geräte wie Fernseher und Stereoanlagen einsetzen. Das Seitenset Core First enthält in der Übersicht vorprogrammierte Fernbedienungsseiten. Diese Fernbedienungsseiten enthalten Felder zur Programmierung Ihrer Fernbedienungsbefehle.



Snap-Fernbedienungen können nicht mit den Geräten Tobii Dynavox I-12(+) oder I-15(+) eingesetzt werden.

8.11.1 Ein Feld für die Fernbedienung programmieren



Die Programmierung der Fernbedienung muss nur einmal pro Feld durchgeführt werden.

Halten Sie Ihre Fernbedienung in der Hand. Sie benötigen sie, damit Ihr Gerät den IR-Befehl erlernen kann.



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.

2. Wählen Sie auf dem Bildschirm das Feld, das Sie zum Absenden des IR-Befehls programmieren möchten.

3. Wählen Sie die Registerkarte **Feld**.

4. Wählen Sie die Kategorie **Aktion**.

5. Wählen Sie **Aktion hinzufügen** aus.

6. Wählen Sie **IR-Signal senden**.

7. Wählen Sie **Aufnahme**, richten Sie anschließend die Fernbedienung auf den IR-Bereich an Ihrem Gerät von Tobii Dynavox und drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung.

8. Wenn Sie die Mitteilung „Aufnahme erfolgreich!“ sehen, wählen Sie **Fertig**.

Wenn Sie die Mitteilung „Es wurde kein Signal erkannt. Bitte versuchen Sie es erneut.“ sehen, gehen Sie zurück zu Schritt 7.

8.11.2 Fernbedienungen verwenden



Fernbedienungen sind nur für kompatible Geräte von Tobii Dynavox verfügbar.

Sie müssen Ihre Fernbedienung zunächst einrichten, indem Sie jede Taste der Fernbedienung mit dem richtigen IR-Befehl programmieren. Siehe 8.11.1 *Ein Feld für die Fernbedienung programmieren*.



Abbildung 8.15 Übersicht – das Feld „Fernbedienungen“

1. Navigieren Sie zu der Fernbedienungsseite des jeweiligen Geräts (Fernseher, Stereoanlage usw.), das Sie steuern möchten.
2. Richten Sie das IR-Fenster Ihres Geräts von Tobii Dynavox auf das Gerät, das Sie steuern möchten.
3. Wählen Sie die Taste, die dem gewünschten Befehl entspricht.

8.12 Seite bearbeiten

Änderungen im Reiter „Seite“ betreffen *nur die aktuelle Seite*. Mit den Einstellungen im Reiter „Seite“ können Sie manche Seitenset-Einstellungen außer Kraft setzen. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass das Mitteilungsfenster auf den meisten Ihrer Seiten sichtbar ist, aber nicht auf der Übersichtsseite, dann tun Sie Folgendes: 1. Aktivieren Sie das Mitteilungsfenster in den Seitenset-Einstellungen. 2. Gehen Sie zur Übersichtsseite. 3. Wählen Sie den Reiter „Seite“. 4. Wählen Sie „Seitenset-Einstellung abstimmen“. 5. Deaktivieren Sie in „Sichtbarkeit des Mitteilungsfensters der Seite“ die Einstellung „Seitenset-Einstellung abstimmen: Ein“. 6. Nehmen Sie für die Sichtbarkeit des Mitteilungsfensters die Einstellung „Aus“ vor.


8.12.1 Seitenname



Abbildung 8.16 Seitenname



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seite**.
3. Geben Sie den Namen der Seite in das Feld **Bezeichnung** ein.

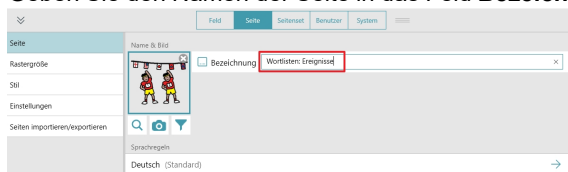

8.12.2 Symbol für die Seite


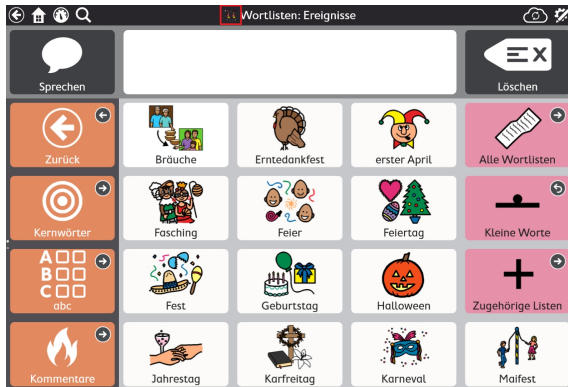


Abbildung 8.17 Symbol für die Seite

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seite**.
3. Fügen Sie ein Symbol für die Seite hinzu oder ändern Sie es:
 - Um nach einem Symbol zu suchen:

- a. Wählen Sie das Feld  **Symbolsuche**. Daraufhin wird das Dialogfeld „Symbolsuche“ geöffnet.

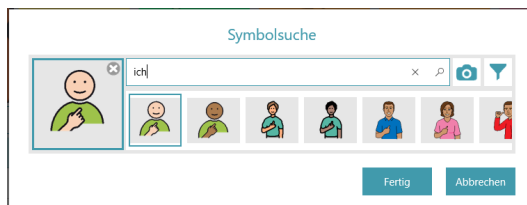

- b. Grenzen Sie Ihre Suche durch Eingabe in das Textfeld ein.
 - c. Wählen Sie das gewünschte Symbol.
 - d. Wählen Sie **Fertig**.
- Wenn Sie mit der Kamera ein Foto für das Seitensymbol machen möchten:
 - a. Wählen Sie das Feld  **Kamera**.
 - b. Wählen Sie **Von der Kamera**.
 - c. Verwenden Sie die Kamera an Ihrem Gerät, um ein Foto aufzunehmen.
 - Wenn Sie ein Bild verwenden möchten, das auf Ihrem Gerät gespeichert ist:
 - a. Wählen Sie das Feld  **Kamera**.
 - b. Wählen Sie **Aus Bildarchiv**.
 - c. Navigieren Sie mit dem Dateibrowser zur gewünschten Bilddatei.



Wenn Sie für die Seite kein Symbol verwenden möchten, wählen Sie das **X** auf dem Seitensymbol.

8.12.3 Sprachregeln der Seite

Die Sprachregeln für die Seite legen die standardmäßigen Spracheinstellungen für die Felder auf der Seite fest. Über die Einstellungen für die Sprachregeln können Sie für das betreffende Feld die Sprache bestimmen, die für Symbolsuche,

Symboldarstellung, Wortvorhersage, Wortform, Auto-Morphing und Sprachfunktion (falls für diese Sprache eine besondere Stimme eingerichtet wurde) verwendet wird.

Standardmäßig entsprechen die Spracheinstellungen eines Feldes den Einstellungen für das Seitenset oder die Seite. Wenn Sie die Sprachregeln für die Seite festlegen, übernehmen alle Felder, die auf der Seite vorhanden sind oder neu erstellt werden, die entsprechenden Einstellungen. Wie Sie die Sprachregeln für bestimmte Felder ändern, erfahren Sie in Abschnitt 8.10 *Sprachregeln des Feldes*.



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seite**.
3. Wählen Sie **Sprachregeln**.
4. Wählen Sie eine Sprache aus der Liste aus:
 - a. **Vollständig unterstützte Sprachen** – wirken sich auf Symbolsuche, Symboldarstellung, Wortvorhersage, Wortform, Auto-Morphing und Sprechstimme (falls für diese Sprache eine besondere Stimme eingerichtet wurde) aus.
Die Sprache **Neutral** wird hauptsächlich für Eigennamen verwendet (zum Beispiel Albert Einstein oder Coca-Cola). Wenn als „Neutral“ gekennzeichnete Wörter an das Mitteilungsfenster gesendet werden, werden sie mit denselben Sprachregeln wie die anderen Wörter im Mitteilungsfenster gesprochen. Wenn das Mitteilungsfenster ansonsten leer ist, werden die neutralen Wörter den für das Seitenset geltenden Sprachregeln entsprechend ausgesprochen.
 - b. **Andere Sprachen**: Die Sprachen in dieser Kategorie werden durch die App Snap Core First in unterschiedlichem Maß unterstützt.

8.12.4 Rastergröße der Seite



Standardmäßig wird diese Einstellung unter dem Reiter „Seitenset“ vorgenommen. Wenn Sie in diesem Fall von der Standardeinstellung für das Seitenset abweichen möchten, nehmen Sie für „Seitenset-Einstellung abstimmen“ die Einstellung **Aus** vor. Wenn diese Einstellung der Einstellung für den Rest des Seitensets entsprechen soll, nehmen Sie für „Seitenset-Einstellung abstimmen“ die Einstellung **Ein** vor.

8.12.4.1 Rastergröße der Seite ändern



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seite**.
3. Wählen Sie die Kategorie **Rastergröße**.
4. Nehmen Sie unter **Seitenset-Einstellung abstimmen** die Einstellung **Aus** vor.
5. Wählen Sie **Rastergröße** aus.
6. Wählen Sie eine der optimierten Rastergrößen aus oder legen Sie die Anzahl der Zeilen und Spalten fest, um eine benutzerdefinierte Rastergröße zu erstellen.




Sofern Sie nicht eine vollständig benutzerdefinierte Seite erstellen, empfehlen wir ausdrücklich, die optimierten Rastergrößen für Seitensets zu verwenden. Die optimierten Rastergrößen zeigen die vorprogrammierten Inhalte wie von unserem therapeutischen Team vorgesehen an, andere Rastergrößen hingegen möglicherweise nicht.



Um das Mitteilungsfenster und/oder die Werkzeugleiste anzuzeigen, müssen Sie Rastergröße 3x3 oder größer wählen.

Wie Sie die Größe der Zwischenräume zwischen den Feldern verändern, erfahren Sie in Abschnitt 9.3.6 *Seitenset – Abstand Felder*.


Tabelle 8.2 Beispiele für Rastergrößen (eine Auswahl)

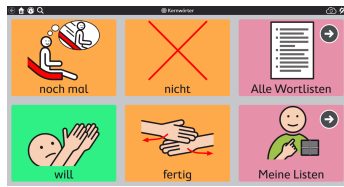

2x3



3x4

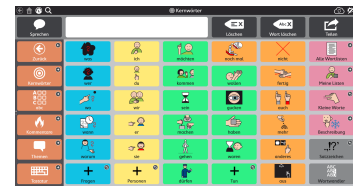

6x6

8.12.5 Hintergrundfarbe der Seite



Standardmäßig wird diese Einstellung unter dem Reiter „Seitenset“ vorgenommen. Wenn Sie in diesem Fall von der Standardeinstellung für das Seitenset abweichen möchten, nehmen Sie für „Seitenset-Einstellung abstimmen“ die Einstellung **Aus** vor. Wenn diese Einstellung der Einstellung für den Rest des Seitensets entsprechen soll, nehmen Sie für „Seitenset-Einstellung abstimmen“ die Einstellung **Ein** vor.

1. Navigieren Sie zu der Seite, deren Hintergrundfarbe Sie ändern möchten.
2. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
3. Wählen Sie den Reiter **Seite**.
4. Wählen Sie den Abschnitt **Stil**.
5. Nehmen Sie für „Seitenset-Einstellung abstimmen“ die Einstellung **Aus** vor.
6. Wählen Sie die **Farbe** aus. Die Liste mit Hintergrundfarben für die Seite wird geöffnet.
7. Wählen Sie eine Farbe aus.

8.12.6 Mitteilungsfenster zeigen/verbergen



Standardmäßig wird diese Einstellung unter dem Reiter „Seitenset“ vorgenommen. Wenn Sie in diesem Fall von der Standardeinstellung für das Seitenset abweichen möchten, nehmen Sie für „Seitenset-Einstellung abstimmen“ die Einstellung **Aus** vor. Wenn diese Einstellung der Einstellung für den Rest des Seitensets entsprechen soll, nehmen Sie für „Seitenset-Einstellung abstimmen“ die Einstellung **Ein** vor.

8.12.6.1 Sichtbarkeit des Mitteilungsfensters ändern

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seite**.
3. Wählen Sie die Kategorie **Einstellungen**.
4. Nehmen Sie für **Seitenset-Einstellung abstimmen** die Einstellung **Ein** vor, um die angezeigten Einstellungen zu übernehmen, oder die Einstellung **Aus**, um die Sichtbarkeit des Mitteilungsfensters auf dieser Seite anders als im Rest des Seitensets zu handhaben.

8.12.7 Seite löschen



Das Löschen erfolgt dauerhaft. Löschen Sie Seiten nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie sie in Zukunft nicht mehr verwenden möchten.

1. Navigieren Sie zu der Seite, die Sie löschen möchten.
2. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
3. Wählen Sie den Reiter **Seite**.
4. Wählen Sie  **Löschen**. Daraufhin wird das Dialogfeld „Seite löschen“ geöffnet.
5. Wählen Sie das Feld **Löschen**, um die Seite dauerhaft zu löschen, oder **Abbrechen**, um zu den Einstellungen für die Seite zurückzukehren, ohne sie zu löschen.



Mit den Pfeilen **Nach oben scrollen** und **Nach unten scrollen** können Sie auf der Seite nach oben bzw. unten scrollen.



Scangruppen sind keine bestimmten Felder, sondern festgelegte Bereiche auf einer Seite. Wenn Sie ein Feld verschieben, kann es an seiner neuen Position Teil einer anderen Scangruppe sein.

Die Scan-Reihenfolge verläuft von links nach rechts in von oben nach unten absteigender Reihenfolge. Die Nummern der Scangruppen hängen nicht mit der Scan-Reihenfolge zusammen.

Wenn Felder auf der Seite nicht Teil einer Scangruppe sind, werden sie einzeln gescannt.

Scangruppen gelten nur für die jeweilige Rastergröße.

- Wenn Sie eine neue Scangruppe erstellen möchten, wählen Sie die Schaltfläche  in der linken unteren Ecke aus.
- Zur Navigation zwischen verschiedenen Scangruppen wählen Sie den Kreis in der Farbe der Scangruppe, die Sie bearbeiten möchten, aus.



- Wenn Sie eine Scangruppe löschen möchten, wählen Sie sie zunächst aus (wie im vorhergehenden Schritt beschrieben) und wählen anschließend  **Scangruppe löschen** aus.

8.13.1 Optionen für Scangruppen

Farben von Scangruppen

- Wählen Sie das Werkzeug  „Farbe“ aus, wenn Sie der aktuellen Scangruppe eine Farbe zuweisen möchten. Die Farben der Scangruppen sind nur im Bearbeitungsmodus, nicht aber im Ausführungsmodus zu sehen.

Audiofeedback für Scangruppen

- In das Feld „Audiofeedback“ eingegebener Text wird laut vorgelesen, wenn die Gruppe gescannt wird (sofern die Einstellung „Audiofeedback wiedergeben“ aktiviert ist).



- Wie Sie eine Datei mit personalisiertem Audiofeedback aufnehmen können, erfahren Sie im Abschnitt 8.6.3.2 *Eine Aufnahme erstellen*.

In Gruppe bleiben

- Wenn diese Funktion aktiviert ist, beginnt der Scan in der Scangruppe von Neuem, nachdem eine Auswahl getroffen wurde. Auf diese Weise kann der Benutzer mehrere Objekte in ein und derselben Gruppe auswählen. Wenn „In Gruppe bleiben“ deaktiviert ist, beginnt die Scan-Reihenfolge wieder am Anfang der Seite, sobald eine Auswahl getroffen wurde.

8.14 Den Mitteilungsbereich bearbeiten

- Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.

2. Wählen Sie das Feld **Mitteilungsbereich bearbeiten**. Das Menü „Mitteilungsbereich bearbeiten“ wird geöffnet.



3. Die ausgewählten Felder werden im Mitteilungsbereich gezeigt. Die nicht ausgewählten Felder werden im Mitteilungsbereich verborgen.



Abbildung 8.19 Menü „Mitteilungsbereich bearbeiten“



Manchmal sind Felder in der Liste grau dargestellt. Dies bedeutet, dass nicht genug Platz im Mitteilungsbereich ist um sie anzuzeigen. Erhöhen Sie die Anzahl der Spalten im Raster, damit mehr Platz im Mitteilungsbereich zur Verfügung steht.

8.15 Die Werkzeugleiste bearbeiten

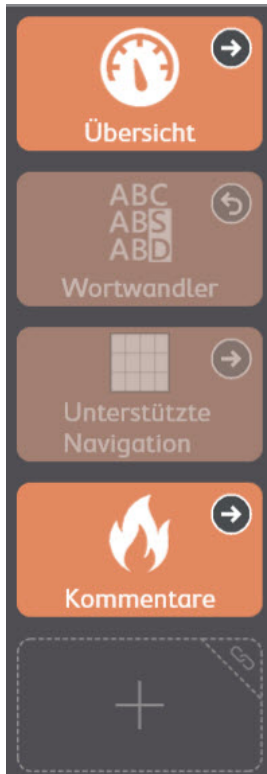


Abbildung 8.20 Die Werkzeugleiste von Core First im Bearbeitungsmodus mit Feldern, verborgenen Feldern und einer leeren Zelle.

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie ein beliebiges Feld in der Werkzeugleiste zur Bearbeitung aus.
Möglicherweise müssen Sie hin- und herscrollen, um den gesamten Inhalt der Werkzeugleiste zu sehen oder auf die leeren Zellen in der Werkzeugleiste zuzugreifen.
3. Klicken und halten Sie die Felder und legen Sie sie anschließend am gewünschten Ort auf der Werkzeugleiste ab.



Sie können die Felder nicht zwischen der Seite und der Werkzeugleiste ablegen.

9 Seitenset-Einstellungen

9.1 Seitenset

9.1.1 Seitenset auswählen



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie die Zeile unter **Seitenset von „Benutzername“**.
4. Wählen Sie ein Seitenset aus der Liste aus.

9.1.2 Neues Seitenset erstellen

Erstellen Sie ein Seitenset aus einem vorinstallierten Seitenset, einer Kopie eines vorhandenen Seitensets des Benutzers oder einer lokalen Datei.



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie die Zeile unter **Seitenset von „Benutzername“**.
4. Wählen Sie **Seitenset erstellen**.
Das Dialogfeld „Seitenset auswählen“ wird geöffnet.
5. Wählen Sie ein Seitenset aus:

Vorinstallierte Seitensets

- Das Seitenset **Core First** enthält den Inhalt von Core First.
- Wählen Sie das **leere** Seitenset, um mit einer leeren Vorlage völlig neu zu beginnen.

Benutzer-Seitensets

- Verwenden Sie eines Ihrer vorhandenen Seitensets als Vorlage (erstellen Sie eine Kopie).

Lokale Dateien

- Importieren Sie eine Seitenset-Datei (.sps), die auf Ihrem Gerät oder einem damit verbundenen Laufwerk gespeichert ist.
6. Durch Auswahl von **Weiter** wird das neue Seitenset erstellt.
 7. Geben Sie einen Namen für das neue Seitenset ein.
 8. Durch Auswahl von **Erstellen** wird das neue Seitenset erstellt. Wählen Sie **Abbrechen**, um zu den Seitenset-Einstellungen zurückzukehren, ohne das neue Seitenset zu erstellen.

Seitenpaket von myTobiiDynavox herunterladen



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie das aktuelle Seitenset.
4. Wählen Sie **Seitenset herunterladen**.



Möglicherweise werden Sie dazu aufgefordert, sich bei myTobiiDynavox anzumelden.

5. Wählen Sie erst ein Seitenset aus der Liste aus und dann **Herunterladen**.
6. Wenn der Download abgeschlossen ist, geben Sie einen Namen für das Seitenset ein und wählen Sie anschließend **Speichern**.

9.1.3 Seitenset umbenennen und Beschreibung bearbeiten

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie in der Liste der Seitensets des Benutzers das Feld  **Bearbeiten** neben dem Namen des Seitensets, das Sie gerne umbenennen möchten. Das Dialogfeld „Informationen zum Seitenset bearbeiten“ wird geöffnet.
4. Geben Sie den Text in das Feld **Name** und/oder das Feld **Beschreibung** ein.
5. Wählen Sie **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern. Wählen Sie **Abbrechen**, um zur Liste der Seitensets zurückzukehren ohne zu speichern.

9.1.4 Seitenset löschen

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
 2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
 3. Wählen Sie in der Liste der Seitensets des Benutzers das Feld  **Löschen** neben dem Namen des Seitensets, das Sie gerne löschen möchten.
-  Das derzeit aktive Seitenset können Sie nicht löschen.
4. Wählen Sie das rote Feld **Löschen**.
 5. Durch Auswahl von **Löschen** wird das Seitenset dauerhaft gelöscht. Wählen Sie **Abbrechen**, um ohne Löschen zur Liste der Seitensets zurückzukehren.

9.1.5 Startseite festlegen

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie **Startseite**.
4. Wählen Sie eine Seite aus der Liste aus.

 Um eine bestimmte Seite zu suchen, machen Sie eine Eingabe im Suchfeld, oder wählen Sie „Zuletzt geöffnet“, um eine kürzlich besuchte Seite zu finden.

Die empfohlene Startseite für die Rastergrößen 1x1 bis 2x3 ist „Unterstützte Navigation“. Für Rastergrößen 3x3 und größer schlagen wir die Startseite „Kernwörter“ vor.

9.1.6 Tastaturseite einrichten

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie **Tastaturseite**.
4. Wählen Sie eine Seite aus der Liste aus.

 Um eine bestimmte Seite zu suchen, machen Sie eine Eingabe im Suchfeld, oder wählen Sie „Zuletzt geöffnet“, um eine kürzlich besuchte Seite zu finden.

Verwenden Sie den Suchbegriff „Tastatur“, um Ihre Suchergebnisse auf Tastaturseiten zu beschränken.

9.2 Rastergröße

Die in den Seitenset-Einstellungen ausgewählte Rastergröße ist die standardmäßig eingestellte Rastergröße für den Benutzer. Alle Seiten werden standardmäßig an die in den Seitenset-Einstellungen ausgewählte Rastergröße angepasst.

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie die Kategorie **Rastergröße**.
4. Wählen Sie eine der aufgelisteten optimierten Rastergrößen aus oder wählen Sie die Anzahl der Zeilen und Spalten, um eine benutzerdefinierte Rastergröße zu erstellen.



Sofern Sie nicht eine vollständig benutzerdefinierte Seite erstellen, empfehlen wir ausdrücklich, die optimierten Rastergrößen für Seitensets zu verwenden. Die optimierten Rastergrößen zeigen die vorprogrammierten Inhalte wie von unserem therapeutischen Team vorgesehen an, andere Rastergrößen hingegen möglicherweise nicht.



Um das Mitteilungsfenster und/oder die Werkzeugleiste anzuzeigen, müssen Sie Rastergröße 3x3 oder größer wählen.

Wie Sie die Größe der Zwischenräume zwischen den Feldern verändern, erfahren Sie in Abschnitt 9.3.6 *Seitenset – Abstand Felder*.


Tabelle 9.1 Beispiele für Rastergrößen (eine Auswahl)



2x3



3x4

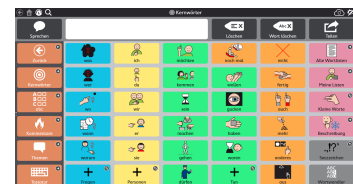

6x6

9.3 Stil des Seitensets

Die Einstellungen für den Stil des Seitensets legen fest, wie das Seitenset aussieht. Alle Seiten im Seitenset, auch neue Seiten, verwenden diese Stil-Einstellungen, sofern nicht für einzelne Seiten oder Felder manuelle Änderungen vorgenommen werden.

9.3.1 Schriftart für die Bezeichnung von Feldern

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie die Kategorie **Stil**.
4. Wählen Sie unter „Stil“ **Schriftgröße** aus.
5. Wählen Sie eine Schriftart aus.

9.3.2 Schriftgröße für die Bezeichnung von Feldern

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie die Kategorie **Stil**.
4. Wählen Sie unter „Stil“ **Schriftgröße** aus.
5. Wählen Sie eine Schriftgröße aus.

9.3.3 Fettschreibung für die Bezeichnung von Feldern



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie die Kategorie **Stil**.
4. Wählen Sie unter „Stil“ **Fett** aus.
5. Nehmen Sie für „Fett“ die Einstellung „Ein“ oder „Aus“ vor.

9.3.4 Feldlayouts



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie die Kategorie **Stil**.
4. Wählen Sie unter „Stil“ **Feldlayouts** aus.
5. Wählen Sie ein Layout aus der Liste aus:



Bezeichnung oben, Bild unten



Bezeichnung unten, Bild oben




Bezeichnung links, Bild rechts



Bezeichnung rechts, Bild links



Nur Bezeichnung

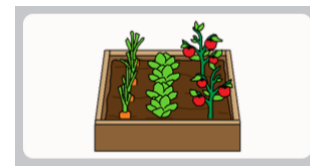

Nur Bild

9.3.5 Seitenset – Darstellung Verknüpfung

Legt das Aussehen von Feldern fest, die auf andere Seiten verweisen.



Darstellung Verknüpfung – Keine



Darstellung Verknüpfung – Pfeile



Darstellung Verknüpfung – Ordner

- **Keine** – passend zum Standardstil der Seitenset-Felder
- **Pfeile** – in der Ecke der Felder erscheint ein kleines Symbol, das ihre Funktion anzeigt (Verknüpfung zu anderer Seite, Zurück nach Auswahl oder Zurück)
- **Ordner** – die Felder mit Verknüpfungen haben die Form von Ordnern. (Der Stil wird nur auf Verknüpfungsfelder angewendet, nicht auf Felder des Typs „Zurück“ oder „Zurück nach Auswahl“).

9.3.6 Seitenset – Abstand Felder

Legt den Abstand zwischen den Feldern fest.



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie die Kategorie **Stil**.
4. Wählen Sie unter „Seiten“ **Abstand Felder** aus.
5. Wählen Sie eine Größe für den Abstand aus.

9.3.7 Standard-Hintergrundfarben



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie die Kategorie **Stil**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Zeilen, um die angegebene Hintergrundfarbe auszuwählen:
 - **Hintergrund Seite** – Standardeinstellung für die Hintergrundfarbe der Seite
 - **Hintergrund für die Werkzeugleiste** – Standardeinstellung für die Hintergrundfarbe der Werkzeugleiste
 - **Hintergrund Mitteilungsfenster** – Standardeinstellung für die Leiste mit dem Mitteilungsfenster (nicht das Mitteilungsfenster selbst).

9.3.8 Schriftart für Mitteilungsfenster



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie die Kategorie **Stil**.
4. Wählen Sie unter „Mitteilungsfenster“ **Schriftart** aus.
5. Wählen Sie eine Schriftart aus.

9.3.9 Schriftgröße für Mitteilungsfenster



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie die Kategorie **Stil**.
4. Wählen Sie unter „Mitteilungsfenster“ **Schriftgröße** aus.
5. Wählen Sie eine Schriftgröße aus.

9.3.10 Textfarbe für Mitteilungsfenster



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie die Kategorie **Stil**.
4. Wählen Sie unter „Mitteilungsfenster“ **Textfarbe** aus.
5. Wählen Sie eine Textfarbe aus.

9.4 Weitere Einstellungen für Seitenset



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie **Einstellungen**.

4. Wählen Sie einen der folgenden Punkte, um die angegebene Einstellung zu ändern:

Oberfläche

- **Mitteilungsfenster** – Bei Aktivierung wird das Mitteilungsfenster standardmäßig auf jeder Seite angezeigt.
- **Position der Werkzeugleiste** – Hier können Sie auswählen, ob die Symbolleiste jeweils links oder rechts von einer Seite angezeigt oder abgeschaltet werden soll.

Reihen in der Werkzeugleiste

- **Seitenset-Einstellung abstimmen:** – Wenn diese Funktion aktiviert ist, entspricht die Anzahl der in der Werkzeugleiste verfügbaren Zeilen der Zeilenanzahl des ausgewählten Seitensets.
Wenn Sie die Zeilenanzahl in der Werkzeugleiste unabhängig von der Rastergröße des Seitensets ändern möchten, deaktivieren Sie diese Einstellung und legen die gewünschte Zeilenanzahl fest.

Scangruppen für Seitenset

- **1. xxx, 2. yyy, 3. zzz** – Legen Sie fest, in welcher Reihenfolge die Scanninggruppen des Seitensets, d. h. die Seite, die Werkzeugleiste und das Mitteilungsfenster, gescannt werden.
Legen Sie die Scan-Reihenfolge, das Audiofeedback und die Einstellung für „In Gruppe bleiben“ für die Scanninggruppen des Seitensets, d. h. die Seite, die Werkzeugleiste und das Mitteilungsfenster, fest.

9.5 Lernfähige Felder



Dieser Abschnitt gilt nur für Tobii Dynavox I-13 und I-16.

Die lernfähigen Felder vorne am Tobii Dynavox I-13 und I-16 können per Berühren oder per Gaze Interaction angewählt

werden. Zwei dieser Felder,  und , lassen sich mit Snap Core First-Aktionen programmieren, die ausgeführt werden, wenn Sie sie bei der Verwendung von Snap Core First mit Gaze Interaction auswählen.

Aktionen mit Gaze Interaction für lernfähiges Feld festlegen

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie **Lernfähige Felder**.
4. Wählen Sie  oder  aus der Liste aus.
5. Wählen Sie **Aktion hinzufügen** aus.
6. Wählen Sie eine Aktion aus.



Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, wenn Sie weitere Aktionen festlegen möchten.

Aktionen mit Berühren für lernfähiges Feld festlegen



Das Verhalten bei Berühren des lernfähigen Feldes ist in der App Tobii Dynavox Hardware Settings festgelegt. Sie können diese App direkt über die Verknüpfung auf Ihrem Desktop oder, wie im Folgenden beschrieben, über Snap Core First starten.

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie **Lernfähige Felder**.
4. Wählen Sie **Aktionen für „Einfaches Berühren“ festlegen** aus. Die App Tobii Dynavox Hardware Settings wird gestartet.
5. Über die Dropdown-Menüs in der App Hardware Settings können Sie festlegen, mit welchen Aktionen die lernfähigen Felder bei der Touch-Eingabe belegt werden.

9.6 Abschnitt „Über“

In diesem Abschnitt werden die Versionsnummer des Seitensets und die Einstellungen für Entwickler von Inhalten angezeigt.

9.6.1 Seitenset – Einstellungen für Entwickler von Inhalten

Spezielle Einstellungen für fortgeschrittene Entwickler von Seitensets

9.6.1.1 Optimierte Rastergrößen festlegen

Hier können Sie festlegen, welche Rastergrößen für dieses Seitenset in der Liste der optimierten Rastergrößen erscheinen.



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie **Über** aus.
4. Wählen Sie **Einstellungen für Entwickler von Inhalten**.
5. Wählen Sie **Rastergrößen**.
6. Um eine Rastergröße zur Liste hinzuzufügen, scrollen Sie nach rechts und wählen Sie **Neue Größe hinzufügen** aus. Das Dialogfeld „Optimierte Rastergröße hinzufügen“ wird geöffnet.
7. Wählen Sie die Anzahl der **Zeilen** und **Spalten** für Ihre neue optimierte Rastergröße (bis zu 15x15) und wählen Sie dann **Speichern**.
8. Um eine optimierte Rastergröße zu entfernen, wählen Sie das Symbol **Löschen** in der Liste mit den Rastergrößen. Die Warnmeldung „Rastergröße löschen“ erscheint. Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Rastergröße löschen möchten, wählen Sie **Löschen**. Falls nicht, wählen Sie **Abbrechen**, um die Warnmeldung ohne Löschen zu schließen.

9.6.1.2 Sprachregeln des Seitensets

Die Sprachregeln für das Seitenset legen die standardmäßigen Spracheinstellungen für die Felder und Seiten in dem Seitenset fest. Über die Einstellungen für die Sprachregeln können Sie für das betreffende Feld die Sprache bestimmen, die für Symbolsuche, Symboldarstellung, Wortvorhersage, Wortform, Auto-Morphing und Sprachfunktion (falls für diese Sprache eine besondere Stimme eingerichtet wurde) verwendet wird.

Standardmäßig entsprechen die Spracheinstellungen eines Feldes den Einstellungen für das Seitenset oder die Seite. Wenn Sie die Sprachregeln für das Seitenset festlegen, übernehmen alle Felder, die in dem Seitenset vorhanden sind oder neu erstellt werden, die entsprechenden Einstellungen. Wie Sie die Sprachregeln für bestimmte Seiten in dem Seitenset ändern, erfahren Sie in Abschnitt 8.12.3 *Sprachregeln der Seite*. Wie Sie die Sprachregeln für bestimmte Felder ändern, erfahren Sie in Abschnitt 8.10 *Sprachregeln des Feldes*.



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie **Über** aus.
4. Wählen Sie **Einstellungen für Entwickler von Inhalten**.
5. Wählen Sie **Sprachregeln**.
6. Wählen Sie eine Sprache aus der Liste aus:
 - a. **Vollständig unterstützte Sprachen** – wirken sich auf Symbolsuche, Symboldarstellung, Wortvorhersage, Wortform, Auto-Morphing und Sprechstimme (falls für diese Sprache eine besondere Stimme eingerichtet wurde) aus.
 - b. **Andere Sprachen**: Die Sprachen in dieser Kategorie werden durch die App Snap Core First in unterschiedlichem Maß unterstützt.

10 Freigeben und Speichern

Tobii Dynavox Snap Core First bietet mehrere bequeme Möglichkeiten zum Freigeben und Speichern von Benutzern, Seitensets und Seiten. Ob Sie Ihr Seitenset über alle Geräte hinweg konsistent halten oder einem Freund ein paar neue Seiten schicken möchten – wir haben das Richtige für Sie!

- **Lokal exportieren/importieren** (Benutzer, Seitenset, Seitenpaket) – Zur Verwendung, wenn Dateien auf Ihrem lokalen Rechner gespeichert sind, Sie ein USB-Laufwerk freigeben möchten oder Sie Dateien mit jemandem teilen, der nicht über ein myTobiiDynavox-Konto verfügt.
- **Über myTobiiDynavox exportieren/importieren*** (Seitenset, Seitenpaket) – Zum Teilen von Seitensets und Seitenpaketen mit anderen myTobiiDynavox-Benutzern. In Ihrem eigenen myTobiiDynavox-Konto können Sie Dateien privat speichern und darauf zugreifen.
- **Synchronisieren*** (Seitenset) – Zum Teilen von Änderungen an einem Seitenset mit anderen Geräten und bestimmten myTobiiDynavox-Benutzern. Von einem Seitenset, das per Synchronisierung geteilt wird, verbleibt eine aktuelle Version in der Cloud, sodass an/auf einem zugelassenen Gerät/Konto vorgenommene Änderungen an dem Seitenset mit allen für dieses Seitenset synchronisierten Geräten/Konten geteilt werden.

* Um auf diese Weise Daten mit anderen zu teilen, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

Tabelle 10.1 Dateitypen, die mit anderen geteilt bzw. gespeichert werden können – Was sie enthalten

Dateityp	Seiten	Weitere Einstellungen für Seite	Weitere Einstellungen für Seitenset	Weitere Einstellungen für Benutzer	Weitere Einstellungen für System
Benutzer	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Seitenset	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Seitenpaket	Ja (Bestimmte Seiten)	Ja	Nein	Nein	Nein

10.1 Benutzer

Sicherungsdateien für Benutzer enthalten die mit dem Benutzer verbundenen Seitensets und Einstellungen. Sicherungsdateien für Benutzer enthalten keine Stimmen. Die Stimmeinstellungen bleiben jedoch erhalten und die ausgewählte Stimme wird automatisch heruntergeladen, wenn sie auf dem Gerät nicht verfügbar ist (Internetverbindung erforderlich).

10.1.1 Einen Benutzer sichern

Siehe Abschnitt 11.3 *Einen Benutzer sichern*.

10.1.2 Einen Benutzer wiederherstellen

Siehe Abschnitt 11.4 *Einen Benutzer wiederherstellen*.

10.2 Seitensets

Dateien für Seitensets enthalten alle mit dem jeweiligen Seitenset verbundenen Seiten. Sie enthalten keine benutzerbezogenen Informationen und Einstellungen.

10.2.1 Ein Seitenset importieren

Von myTobiiDynavox



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie das aktuelle Seitenset.

4. Wählen Sie **Seitenset herunterladen**.



Möglicherweise werden Sie dazu aufgefordert, sich bei myTobiiDynavox anzumelden.

5. Wählen Sie erst ein Seitenset aus der Liste aus und dann **Herunterladen**.
6. Wenn der Download abgeschlossen ist, geben Sie einen Namen für das Seitenset ein und wählen Sie anschließend **Speichern**.

Von lokaler Datei



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie das aktuelle Seitenset.
4. Wählen Sie **Seitenset erstellen**.
5. Wählen Sie den Reiter **Lokale Dateien**.
6. Wählen Sie **Durchsuchen** aus.
7. Navigieren Sie zu der gewünschten .sps-Datei, wählen Sie sie aus und wählen Sie anschließend **Öffnen**.
8. Wählen Sie **Weiter** aus.
9. Geben Sie einen einzigartigen Namen für das Seitenset ein und wählen Sie dann **Erstellen**.

10.2.2 Eine Kopie eines Seitensets speichern

10.2.2.1 Seitenpaket auf myTobiiDynavox speichern

Auf myTobiiDynavox gespeicherte Seitenset-Dateien finden Sie auf myTobiiDynavox in Meine Produkte > Snap > Seitensets.



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie das aktuelle Seitenset.
4. Wählen Sie das Symbol  **Speichern** neben dem Seitenset, das Sie gerne speichern möchten.
5. Wählen Sie **Kopie auf myTobiiDynavox speichern**.



Möglicherweise werden Sie dazu aufgefordert, sich bei myTobiiDynavox anzumelden.

6. Geben Sie einen einzigartigen Namen für das Seitenset und (optional) eine Beschreibung ein und wählen Sie dann **Speichern**.
7. Eine Fortschrittsanzeige erscheint, die den Speichervorgang anzeigt. Wenn er abgeschlossen ist, wählen Sie **Fertig**.

10.2.2.2 Seitenset lokal speichern



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie das aktuelle Seitenset.
4. Wählen Sie das Symbol  **Speichern** neben dem Seitenset, das Sie gerne speichern möchten.
5. Wählen Sie **Kopie in lokaler Datei speichern**.
6. Geben Sie einen einzigartigen Namen für das Seitenset und (optional) eine Beschreibung ein und wählen Sie dann **Weiter**.
7. Wählen Sie **Durchsuchen** aus. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem Sie Ihre Seitenset-Datei gerne speichern möchten, und wählen Sie dann **Speichern**.
8. Wählen Sie **Speichern** aus.

9. Eine Fortschrittsanzeige erscheint, die den Speichervorgang anzeigt. Wenn er abgeschlossen ist, wählen Sie **Fertig**.

10.2.3 Eine Kopie eines Seitensets teilen (über myTobiiDynavox)

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seitenset**.
3. Wählen Sie das Symbol  **Seitenset teilen** neben dem Seitenset, das Sie gerne teilen möchten.
4. Wählen Sie **Kopie freigeben**.
5. Geben Sie einen einzigartigen Namen für das Seitenset und (optional) eine Beschreibung ein und wählen Sie dann **Weiter**.
6. Geben Sie den myTobiiDynavox-Benutzernamen bzw. das E-Mail-Konto der Person an, an die Sie das Seitenset senden, und wählen Sie dann **+** aus, um sie zur Empfängerliste hinzuzufügen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um zusätzliche Empfänger hinzuzufügen. Wenn Sie alle Empfänger hinzugefügt haben, wählen Sie **Teilen**.
7. Eine Fortschrittsanzeige erscheint, die den Freigabevorgang anzeigt. Wenn er abgeschlossen ist, wählen Sie **Fertig**.



Wie Sie eine Kopie eines Seitensets lokal speichern (zum Teilen per USB-Laufwerk, E-Mail usw.), erfahren Sie unter 10.2.2.2 *Seitenset lokal speichern*.

10.2.4 Seitenset synchronisieren

Durch Synchronisierung können Sie problemlos auf mehreren Geräten dieselbe Version eines Seitensets verwenden. Bei einer Synchronisierung wird eine aktuelle Version Ihres Seitensets in der Cloud gespeichert. Über das Feld „Synchronisierung“ versenden Sie die Änderungen, die Sie auf Ihrem lokalen Gerät an dem Seitenset vorgenommen haben, und empfangen darüber hinaus Änderungen, die auf anderen (synchronisierten) Geräten vorgenommen wurden.* Wenn alle Geräte synchronisiert wurden, verfügen alle über dieselbe Version des Seitensets.

Das Feld „Synchronisierung“ in der oberen Menüleiste zeigt an, wenn eine aktualisierte Version des Seitensets verfügbar ist oder Sie lokale Änderungen vorgenommen haben, die Sie an die Cloud weitergeben können.

* Bei einer Synchronisierung kann eine Seite nicht Änderungen von mehreren Geräten gleichzeitig übernehmen. Werden an derselben Seite gleichzeitig auf verschiedenen Geräten Änderungen vorgenommen, so überschreibt das letzte Gerät, das synchronisiert wird, die Seite mit seiner Version. Die an der Bearbeitung eines synchronisierten Seitensets beteiligten Personen sollten darüber Informationen austauschen, welche Seiten sie bearbeiten, und häufig Synchronisierungen durchführen, um gleichzeitige Änderungen an derselben Seite zu vermeiden.



Bei Synchronisierungen mehrerer Geräte oder Benutzer muss die Einstellung „Navigationstyp“ bei allen synchronisierten Geräten/Benutzern übereinstimmen. Siehe Abschnitt 11.12 *Auswahlmethode*.

10.2.4.1 Seitenset mit myTobiiDynavox synchronisieren

Wenn Sie ein Seitenset mit myTobiiDynavox synchronisieren, wird eine Kopie Ihres Seitensets auf dem myTobiiDynavox-Server gespeichert. Auf diese Weise können Sie Ihre Seitensets schnell und problemlos sichern. Wenn Sie über weitere Geräte verfügen, auf denen Snap Core First läuft, können Sie das Seitenset außerdem auf diesen Geräten synchronisieren.

Das Seitenset zur Synchronisierung einrichten

1. Wählen Sie das Feld  **Synchronisieren** in der oberen Menüleiste. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für myTobiiDynavox einzugeben.
2. Wählen Sie **Synchronisieren**.
3. Das war alles! Ihr Seitenset ist nun mit Ihrem myTobiiDynavox-Konto synchron.



Jedes Mal, wenn Sie Ihr Seitenset bearbeiten, müssen Sie das Feld „Synchronisieren“ in der oberen Menüleiste anwählen, um die Änderungen an die Cloud zu schicken.

Das Seitenset auf weiteren Geräten synchronisieren

Wenn ein Seitenset bereits auf einem Ihrer Geräte zur Synchronisierung eingerichtet ist, können Sie weitere Geräte synchronisieren, indem Sie für jedes Gerät diese Schritte befolgen:

1. Wählen Sie das Feld  **Synchronisieren** in der oberen Menüleiste. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für myTobiiDynavox einzugeben.
2. Wählen Sie das Symbol  **Seitenset herunterladen** aus.
3. Wählen Sie das Seitenset, das Sie herunterladen und synchronisieren möchten, und wählen Sie anschließend **Herunterladen**.
4. Wenn der Download abgeschlossen ist, wählen Sie **Fertig** aus.
Das heruntergeladene synchronisierte Seitenset wird automatisch zum aktiven Seitenset.



Jedes Mal, wenn Sie Ihr Seitenset bearbeiten, müssen Sie das Feld „Synchronisieren“ in der oberen Menüleiste anwählen, um die Änderungen an die Cloud zu schicken und das aktualisierte Seitenset für die anderen Geräte zur Synchronisierung bereitzustellen. Es hat sich bewährt, zunächst zu synchronisieren, bevor Sie Änderungen an dem Seitenset vornehmen, und nach Abschluss der Bearbeitung erneut zu synchronisieren.

10.2.4.2 Jemanden zur Synchronisierung mit Ihrem Seitenset einladen

Wenn andere myTobiiDynavox-Benutzer mit Ihrem Seitenset synchronisieren, können sie auf ihrem/n Gerät(en) Änderungen daran vornehmen und sie zur Synchronisierung an die Cloud schicken. Bei der nächsten Synchronisierung Ihres Gerätes erhalten Sie diese Änderungen dann. Wenn Sie Änderungen an dem Seitenset vornehmen und anschließend synchronisieren, werden sie anschließend ebenso den anderen Benutzern, denen Sie die Synchronisierung mit Ihrem Seitenset gestattet haben, zur Verfügung gestellt.

Es ist nicht möglich, durch Synchronisierung Änderungen verschiedener Benutzer, die gleichzeitig dieselbe Seite bearbeitet haben, zusammenzuführen. In diesem Fall überschreibt der Benutzer, der zuletzt synchronisiert, die Seite mit seiner Version. Synchronisieren Sie direkt bevor und nachdem Sie Änderungen am Seitenset vornehmen, und kommunizieren Sie mit anderen Benutzern, die Ihr Seitenset bearbeiten, um nicht gleichzeitig dieselbe Seite zu bearbeiten.

Sie sollten nur mit Personen synchronisieren, zu denen Sie Vertrauen haben, dass sie angemessene Änderungen an Ihrem Seitenset vornehmen.



Jedes Mal, wenn Sie Ihr Seitenset bearbeiten, müssen Sie das Feld „Synchronisieren“ in der oberen Menüleiste anwählen, um die Änderungen an die Cloud zu schicken und den anderen Geräten und Benutzern das aktualisierte Seitenset zur Synchronisierung bereitzustellen.



Es hat sich bewährt, zunächst zu synchronisieren, bevor Sie Änderungen an dem Seitenset vornehmen, und nach Abschluss der Bearbeitung erneut zu synchronisieren.

1. Wählen Sie das Feld  **Synchronisieren** in der oberen Menüleiste. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für myTobiiDynavox einzugeben.
2. Wählen Sie das Symbol  **Seitenset teilen** aus.
3. Geben Sie den myTobiiDynavox-Benutzernamen bzw. die E-Mail-Adresse der Person an, mit der Sie das Seitenset teilen, und wählen Sie dann **+** aus, um sie zur Empfängerliste hinzuzufügen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um zusätzliche Empfänger hinzuzufügen. Wenn Sie alle Empfänger hinzugefügt haben, wählen Sie **Teilen**.
4. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wählen Sie **Fertig** aus. Der/die Empfänger wird/werden per E-Mail und in der App Snap Core First benachrichtigt, dass Sie ein Seitenset mit ihm/ihr geteilt haben.



Es kann nach dem Absenden der Einladung bis zu einer Stunde dauern, bis die Synchronisierungsbenachrichtigung erscheint. Sie können jederzeit durch Auswahl des Symbols „Synchronisieren“ überprüfen, ob Sie Benachrichtigungen erhalten haben.

10.2.4.2.1 Synchronisierungsgenehmigungen widerrufen

Sie können jederzeit Benutzer Ihrer synchronisierten Seitensets entfernen.

1. Wählen Sie das Feld  **Synchronisieren** in der oberen Menüleiste.
2. Wählen Sie das Symbol  **Seitenset teilen** aus.
3. Benutzer mit Synchronisierungsgenehmigung für das aktuelle Seitenset werden in dem blauen Kästchen aufgeführt. Um einen Benutzer zu entfernen, wählen Sie das **X** neben seinem/ihrer Namen bzw. seiner/ihrer E-Mail-Adresse, und anschließend **Aktualisieren**.
4. Wählen Sie **Fertig**.

10.2.4.3 Mit Seitensets anderer Benutzer synchronisieren

Wenn jemand ein Seitenset zur Synchronisierung mit Ihnen freigibt, zeigt das Synchronisierungssymbol in der oberen Menüleiste einen Benachrichtigungshinweis . Befolgen Sie die angegebenen Schritte, um die Einladung anzunehmen oder abzulehnen.

Es kann nach dem Absenden der Einladung bis zu einer Stunde dauern, bis die Synchronisierungsbenachrichtigung erscheint.

Die Synchronisierungseinladung annehmen

1. Wählen Sie das Feld  **Synchronisieren** in der oberen Menüleiste.
2. Wählen Sie das Symbol  **Seitenset herunterladen** aus.
3. Wählen Sie **Auf meinem myTobiiDynavox-Konto verfügbare Seitensets durchsuchen**.
4. Wählen Sie das Seitenset, das Sie herunterladen und synchronisieren möchten, und wählen Sie anschließend **Herunterladen**.
5. Wenn der Download abgeschlossen ist, wählen Sie **Fertig** aus.

Die Synchronisierungseinladung ablehnen

1. Wählen Sie das Feld  **Synchronisieren** in der oberen Menüleiste.
2. Wählen Sie das Symbol  **Seitenset herunterladen** aus.
3. Wählen Sie **Auf meinem myTobiiDynavox-Konto verfügbare Seitensets durchsuchen**.
4. Wählen Sie das Seitenset, das Sie ablehnen möchten, und anschließend das Symbol  **Löschen**.
5. Wählen Sie **Ablehnen**.

10.2.4.4 Synchronisiertes Seitenset auf zuvor gespeicherte Version zurücksetzen

Sie können zu einer früheren Version eines synchronisierten Seitensets zurückkehren. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie Änderungen an dem Seitenset vorgenommen haben, die Sie verwerfen oder rückgängig machen möchten.

1. Wählen Sie das Feld  **Synchronisieren** in der oberen Menüleiste.
2. Wählen Sie **Gespeicherte Versionen**.
3. Suchen Sie in der Liste nach dem Synchronisierungsdatum, das Sie wiederherstellen möchten, und wählen Sie dann **Wiederherstellen**.

10.2.4.5 Synchronisiertes Seitenset überschreiben

Verwenden Sie „Überschreiben“, wenn Sie sicherstellen möchten, dass Ihre aktuelle Version des Seitensets dieselbe Version ist, die auch in der Cloud gespeichert ist (trotz Änderungen, die möglicherweise von anderen Benutzern synchronisiert wurden).



1. Wählen Sie das Feld **Synchronisieren** in der oberen Menüleiste.
2. Wählen Sie **Erweitert**.
3. Wählen Sie **Überschreiben**.

10.2.4.6 Nur eingehende Synchronisierung

Wenn Sie im Modus „Nur eingehend“ synchronisieren, erhalten Sie Änderungen an Seitensets (die auf anderen Geräten vorgenommen wurden), versenden aber nicht ihre Änderungen an Seitensets, die Sie auf dem aktuellen Gerät vorgenommen haben. Um den Modus „Nur eingehend“ zu verwenden, muss der Bearbeitungsmodus mit einem Passwort geschützt sein. Zur Einrichtung eines Passworts und des Synchronisierungsmodus „Nur eingehend“, siehe *12.1.1 Passwort*.

10.3 Seitenpakete

Sie können einen Teil Ihres Seitensets (eine oder mehrere Seite/n Ihrer Wahl) als Seitenpaket mit anderen teilen. Seitenpakete enthalten nur die angegebenen Seiten. Wenn die Seiten Felder mit Verknüpfungen zu Seiten enthalten, die auf dem Gerät des Empfängers nicht vorhanden sind, so bleiben die Verknüpfungen wirkungslos.

10.3.1 Seitenpaket exportieren

10.3.1.1 Seitenpaket auf myTobiiDynavox exportieren



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seite**.
3. Wählen Sie **Seiten importieren/exportieren**.
4. Wählen Sie **Seitenpaket exportieren**.
5. Wählen Sie **Auf myTobiiDynavox**.
6. Wählen Sie die Seiten, die das Seitenpaket enthalten soll. Die ausgewählten Seiten werden in der Liste mit einem Häkchen versehen und erscheinen in dem blauen Kästchen.



Die aktuelle Seite wird automatisch in das Seitenpaket aufgenommen. Um sie (oder eine andere Seite) aus dem Seitenpaket zu entfernen, wählen Sie das „X“ neben dem Namen der Seite in dem blauen Kästchen.

7. Wenn Sie dem Seitenpaket die gewünschten Seiten hinzugefügt haben, wählen Sie **Weiter**. Das Dialogfeld „Seitenpaket benennen“ wird geöffnet.
8. Geben Sie im Feld „Name“ einen Namen für das Seitenpaket ein und beschreiben Sie die Seiten (optional) im Feld „Beschreibung“.
9. Wählen Sie **Exportieren**, um das Seitenpaket auf myTobiiDynavox zu speichern.
10. Wenn der Export abgeschlossen ist, wählen Sie **Fertig** aus.

10.3.1.2 Seitenpaket an lokalen Speicherort exportieren



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seite**.
3. Wählen Sie **Seiten importieren/exportieren**.
4. Wählen Sie **Seitenpaket exportieren**.
5. Wählen sie **In lokaler Datei**.
6. Wählen Sie die Seiten, die das Seitenpaket enthalten soll. Die ausgewählten Seiten werden in der Liste mit einem Häkchen versehen und erscheinen in dem blauen Kästchen.



Die aktuelle Seite wird automatisch in das Seitenpaket aufgenommen. Um sie (oder eine andere Seite) aus dem Seitenpaket zu entfernen, wählen Sie das „X“ neben dem Namen der Seite in dem blauen Kästchen.

7. Wenn Sie dem Seitenpaket die gewünschten Seiten hinzugefügt haben, wählen Sie **Weiter**. Das Dialogfeld „Seitenpaket benennen“ wird geöffnet.
8. Geben Sie im Feld „Name“ einen Namen für das Seitenpaket ein und beschreiben Sie die Seiten (optional) im Feld „Beschreibung“.
9. (Nur Windows) Wählen Sie **Weiter**.
10. (Nur Windows) Wählen Sie **Durchsuchen**. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem Sie Ihre Seitenset-Datei gerne speichern möchten, und wählen Sie dann **Speichern**.
11. Wählen Sie **Exportieren** aus.
12. Wenn der Export abgeschlossen ist, wählen Sie **Fertig** aus.

10.3.1.3 Seitenpaket zum Teilen mit anderen (über myTobiiDynavox) exportieren



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seite**.
3. Wählen Sie **Seiten importieren/exportieren**.
4. Wählen Sie **Seitenpaket exportieren**.
5. Wählen Sie **Zur Freigabe**.
6. Wählen Sie die Seiten, die das Seitenpaket enthalten soll. Die ausgewählten Seiten werden in der Liste mit einem Häkchen versehen und erscheinen in dem blauen Kästchen.



Die aktuelle Seite wird automatisch in das Seitenpaket aufgenommen. Um sie (oder eine andere Seite) aus dem Seitenpaket zu entfernen, wählen Sie das „X“ neben dem Namen der Seite in dem blauen Kästchen.

7. Wenn Sie dem Seitenpaket die gewünschten Seiten hinzugefügt haben, wählen Sie **Weiter**. Das Dialogfeld „Seitenpaket benennen“ wird geöffnet.
8. Geben Sie im Feld „Name“ einen Namen für das Seitenpaket ein und beschreiben Sie die Seiten (optional) im Feld „Beschreibung“.
9. Wählen Sie **Weiter** aus. Das Dialogfeld „Seitenpaket teilen“ wird geöffnet.
10. Geben Sie den myTobiiDynavox-Benutzernamen bzw. das E-Mail-Konto der Person an, an die Sie das Seitenset senden, und wählen Sie dann **+** aus, um sie zur Empfängerliste hinzuzufügen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um zusätzliche Empfänger hinzuzufügen. Wenn Sie alle Empfänger hinzugefügt haben, wählen Sie **Teilen**.
11. Wenn der Export abgeschlossen ist, wählen Sie **Fertig** aus.



Wie Sie ein Seitenpaket lokal speichern (zum Teilen per E-Mail, USB-Laufwerk usw.), erfahren Sie unter [10.3.1.2 Seitenpaket an lokalen Speicherort exportieren](#).

10.3.2 Seitenpaket importieren

10.3.2.1 Seitenpaket von myTobiiDynavox importieren

Mithilfe dieser Option können Sie ein Seitenpaket importieren, das Sie auf Ihrem eigenen myTobiiDynavox-Konto gespeichert haben oder das ein anderer myTobiiDynavox-Benutzer mit Ihnen geteilt hat.



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seite**.
3. Wählen Sie **Seiten importieren/exportieren**.
4. Wählen Sie **Seitenpaket importieren**.
5. Wählen Sie **Von myTobiiDynavox**. Das Dialogfeld „Seitenpaket von myTobiiDynavox auswählen“ wird geöffnet.
6. Wählen Sie ein Seitenpaket aus der Liste aus:
7. Um das ausgewählte Seitenpaket herunterzuladen, wählen Sie **Weiter**.

8. Schauen Sie sich die Liste mit den in dem Seitenpaket enthaltenen Seiten an. Wenn Sie den Import des Seitenpakets fortsetzen möchten, wählen Sie **Importieren**. Wenn Sie den Import des Seitenpakets abbrechen möchten, wählen Sie **Abbrechen**.



Wenn das Seitenpaket eine oder mehrere Seiten enthält, die bereits auf Ihrem Gerät vorhanden, aber nicht mit den neuen Seiten identisch sind, kommt es zu Seitenkonflikten. Wählen Sie für jeden Seitenkon-



flikt das entsprechende Symbol und entscheiden Sie anschließend, ob die vorhandene Seite beibehalten oder mit der importierten Seite aus dem Seitenpaket überschrieben werden soll. Bevor Sie den Import des Seitenpakets fortsetzen können, müssen Sie alle Seitenkonflikte auf diese Weise beilegen.

10.3.2.2 Seitenpaket aus lokaler Datei importieren



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie den Reiter **Seite**.
3. Wählen Sie **Seiten importieren/exportieren**.
4. Wählen Sie **Seitenpaket importieren**.
5. Wählen sie **Von lokaler Datei**.
6. Wählen Sie **Durchsuchen** aus. Navigieren Sie zu der Datei mit dem Seitenpaket (.spb), die Sie importieren möchten, und wählen Sie sie aus. Wählen Sie anschließend **Öffnen**.
7. Wählen Sie **Weiter** aus. Das Dialogfeld „Seitenpaket prüfen“ wird geöffnet.
8. Schauen Sie sich die Liste mit den in dem Seitenpaket enthaltenen Seiten an. Wenn Sie den Import des Seitenpakets fortsetzen möchten, wählen Sie **Importieren**. Wenn Sie den Import des Seitenpakets abbrechen möchten, wählen Sie **Abbrechen**.



Wenn das Seitenpaket eine oder mehrere Seiten enthält, die bereits auf Ihrem Gerät vorhanden, aber nicht mit den neuen Seiten identisch sind, kommt es zu Seitenkonflikten. Wählen Sie für jeden Seitenkon-



flikt das entsprechende Symbol und entscheiden Sie anschließend, ob die vorhandene Seite beibehalten oder mit der importierten Seite aus dem Seitenpaket überschrieben werden soll. Bevor Sie den Import des Seitenpakets fortsetzen können, müssen Sie alle Seitenkonflikte auf diese Weise beilegen.

10.3.2.3 Seitenpaket importieren und verknüpfen

Mithilfe der Funktion „Importieren und verknüpfen“ können Sie ein Seitenpaket importieren und direkt verknüpfen!

Siehe Abschnitt 8.9.6 *Importieren und mit Seite verknüpfen*.

11 Benutzereinstellungen

Mithilfe der Benutzereinstellungen können Sie das Benutzererlebnis von Snap personalisieren. Jeder Benutzer verfügt über eigene Benutzereinstellungen, die zur Anwendung kommen, wenn der Benutzer in der Software hochgeladen wird.

11.1 Benutzer wechseln



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie den aktuellen Benutzer aus.
4. Wählen Sie einen Benutzer aus der Liste „Einen Benutzer wählen“.



Der mit einem Häkchen gekennzeichnete Benutzer ist der derzeit aktive Benutzer.

11.2 Einen neuen Benutzer einrichten



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie **Neuer Benutzer**.
4. Befolgen Sie die Schritte im Einrichtungsassistenten für Benutzer, um einen neuen Benutzer zu erstellen. Wählen Sie das **X**, wenn Sie die Erstellung des neuen Benutzers abbrechen möchten.

11.3 Einen Benutzer sichern

Auf myTobiiDynavox sichern



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie den Pfeil rechts vom aktuellen Benutzer.
4. Wählen Sie das Feld  **Sichern** neben dem Namen des Benutzers, den Sie sichern möchten.
5. Wählen Sie **Auf myTobiiDynavox sichern**.



Wenn Sie im Moment nicht bei Ihrem myTobiiDynavox-Konto angemeldet sind, werden Sie nun dazu aufgefordert.

6. Geben Sie für die Sicherungsdatei Ihres Benutzers einen Namen ein, und wählen Sie dann **Weiter**.




Es kann hilfreich sein, das Sicherungsdatum in den Dateinamen einzufügen.

7. Wählen Sie **Fertig**.



Lokale Sicherungsdateien von Benutzern können auch manuell auf myTobiiDynavox verschoben werden. Gehen Sie mit Ihrem Internetbrowser auf myTobiiDynavox.com, melden Sie sich an, gehen Sie auf *Snap* > *Backups* und wählen Sie **Sicherungsdatei hochladen**.

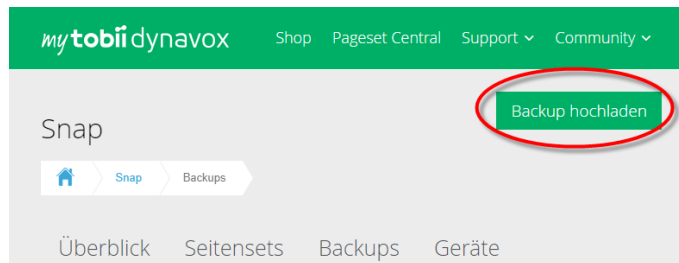

In lokaler Datei sichern

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie den Pfeil rechts vom aktuellen Benutzer.
4. Wählen Sie das Feld  **Sichern** neben dem Namen des Benutzers, den Sie sichern möchten.
5. Wählen Sie **In lokaler Datei sichern**.
6. (Windows) **Suchen** Sie nach dem Verzeichnis, in dem Sie die Sicherungsdatei speichern möchten, und wählen Sie dann **Speichern**.
(iOS) Geben Sie einen Namen für die Sicherungsdatei ein.
7. Wählen Sie **Sichern**.

11.4 Einen Benutzer wiederherstellen

Einen Benutzer von myTobiiDynavox wiederherstellen


1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie den Pfeil rechts vom aktuellen Benutzer.
4. Wählen Sie **Neuer Benutzer**.
5. Wählen Sie **Vorhandenen Benutzer wiederherstellen**.
6. Wenn Sie im Moment nicht bei myTobiiDynavox angemeldet sind, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, und wählen Sie dann **Weiter**.
7. Wählen Sie eine Sicherungsdatei für einen Benutzer aus der Liste aus, und wählen Sie dann **Weiter**.

Benutzer von lokaler Datei wiederherstellen




Auf iOS müssen auf anderen Geräten erstellte lokale Sicherungsdateien für Benutzer zunächst über iTunes in die App Snap Core First verschoben werden:

- Öffnen Sie iTunes auf Ihrem Mac oder PC.
- Verbinden Sie Ihr iPad über das mit Ihrem Gerät mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- Wählen Sie in iTunes Ihr Gerät aus.

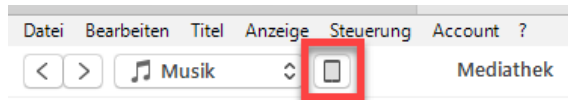

- Wählen Sie in der Symbolleiste auf der linken Seite **Apps**. Scrollen Sie anschließend zum Abschnitt „Dateien mit anderen teilen“ unten auf der Seite.
- Wählen Sie **Snap Core First** aus.

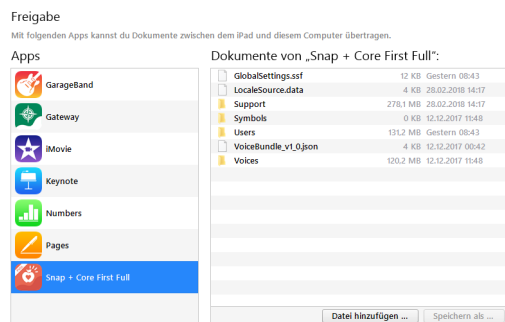

- Ziehen Sie den/die Sicherungsdatei(en) für den Benutzer in den Bereich „Snap Core First – Dokumente“.
- Über die folgenden Schritte können Sie den Benutzer auf Ihrem iPad wiederherstellen.



- Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
- Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
- Wählen Sie den Pfeil rechts vom aktuellen Benutzer.
- Wählen Sie **Neuer Benutzer**.
- Wählen Sie **Vorhandenen Benutzer wiederherstellen**.
- Wählen Sie **Von lokaler Datei wiederherstellen**.
- (Windows) Suchen Sie nach der Sicherungsdatei für den Benutzer, wählen Sie sie aus und wählen Sie anschließend **Öffnen**.
(iOS) Wählen Sie eine Sicherungsdatei für den Benutzer aus der Liste und wählen Sie anschließend **Benutzer wiederherstellen**.

11.5 Einen Benutzer bearbeiten/umbenennen



- Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
- Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
- Wählen Sie das Feld **Bearbeiten** neben dem Namen des Benutzers, den Sie bearbeiten möchten.
- Machen Sie eine Eingabe im Feld **Name**.
- Wählen Sie **Speichern**, um die Änderungen zu speichern, oder **Abbrechen**, um die Änderungen zu verwerfen.

11.6 Einen Benutzer löschen



Das Löschen eines Benutzers vom Gerät erfolgt dauerhaft. Wenn Sie glauben, dass Sie einen Benutzer später noch benötigen, erstellen Sie vor dem Löschen eine Sicherung des Benutzers **11.3 Einen Benutzer sichern**.

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.

3. Wählen Sie das Feld  **Löschen** neben dem Namen des Benutzers, den Sie löschen möchten.



Den derzeit aktiven Benutzer können Sie nicht löschen.

4. Wählen Sie das rote Feld **Löschen**.
5. Wählen Sie **Löschen** aus, um den Benutzer dauerhaft zu löschen. Wählen Sie **Abbrechen** aus, um ohne Löschen zum Menü „Einstellungen“ zurückzukehren.

11.7 Anmeldung bei Ihrem myTobiiDynavox-Konto



Die Anmeldung bei Ihrem myTobiiDynavox-Konto erfordert eine aktive Internetverbindung.

Für manche Dienste in Snap Core First (beispielsweise die Synchronisierung) müssen Sie sich bei Ihrem myTobiiDynavox-Konto anmelden. Wählen Sie **Anmelden**, um Ihre myTobiiDynavox-Anmeldedaten einzugeben oder ein neues myTobiiDynavox-Konto zu erstellen. Wenn Sie gerade angemeldet sind, werden Ihr myTobiiDynavox-Benutzername bzw. die mit Ihrem Konto verbundene E-Mail-Adresse im Abschnitt „myTobiiDynavox-Konto“ angezeigt.

11.8 Stimme

11.8.1 Die Stimme für die Sprachausgabe

Die Stimme für die Sprachausgabe ist die Stimme, die den Inhalt des Mitteilungsfensters und den zu den Feldern gehörigen Text vorliest.

Die Stimme für die Sprachausgabe ist die Standardstimme; sie ist nicht an eine bestimmte Sprache gebunden. Wenn sprachspezifische Stimmen zugewiesen wurden, so werden für die betreffenden Sprachen die sprachspezifischen Stimmen verwendet. Wie Sie sprachspezifische Stimmen zuweisen, erfahren Sie unter [11.10 Sprachspezifische Stimmen](#).



Abbildung 11.1 Reiter „Benutzer“ – Stimme

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie **Stimme**.

11.8.1.1 Installierte Stimmen

Hierbei handelt es sich um die Stimmen, die derzeit zur sofortigen Verwendung auf dem Gerät bereitstehen. Sie umfassen sowohl die vorinstallierten Stimmen als auch Stimmen, die auf das Gerät heruntergeladen wurden.



Sie können Stimmen in der Liste der installierten Stimmen löschen, nicht aber die derzeit aktive Stimme.

11.8.1.2 Stimmen zum Herunterladen

Sie können neue Stimmen herunterladen.



Sie müssen mit dem Internet verbunden sein, um Stimmen herunterzuladen.



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie **Stimme**.
4. Wählen Sie in der Liste der Stimmen, die heruntergeladen werden können, neben der gewünschten Stimme **Laden** aus.



Auf iOS wird der Download der Stimme angehalten, wenn die App „Snap Core First“ minimiert wird.

11.8.1.3 Stimmen zum Kauf

Snap Core First (Vollversion) umfasst eine Sprach-Engine und gewährt Zugang zu allen dazugehörigen Stimmen. Weitere Sprach-Engines können käuflich erworben werden. Beim Kauf einer Sprach-Engine erhalten Sie Zugang zu allen (mehr als 100) dazugehörigen Stimmen.

Stimmen – Vorschau und Kauf



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie **Stimme**.
4. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt *Kostenpflichtig*.
5. Wählen Sie  aus, um sich eine Stimme anzuhören.
Wählen Sie **Zusätzliche Stimmen kaufen** aus, wenn Sie sie kaufen möchten.

11.8.1.4 Stimmen auf Plattformen

Hierbei handelt es sich um die Stimmen, die von Ihrem Betriebssystem bereitgestellt werden, und um SAPI5-Stimmen.



Manche Stimmen werden unter Umständen zweimal aufgeführt, wenn sie auf einer nativen Plattform und auf SAPI5 vorliegen.

SAPI5 gibt es nur auf Windows.

11.8.2 Geschwindigkeit der Stimme

Die „Geschwindigkeit der Stimme“ ist die Geschwindigkeit, mit der die Wörter gesprochen werden.



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Schieben Sie den **Schieberegler für die Geschwindigkeit der Stimme** nach links, um langsamer zu sprechen, oder nach rechts, um schneller zu sprechen.

11.8.3 Sprachausnahmen

Sprachausnahmen sind Wörter oder Akronyme, die Sie die Stimme auf eine bestimmte Weise aussprechen lassen. Sprachausnahmen werden mit der Stimme verbunden, die zu dem Zeitpunkt aktiv ist, zu dem Sie die Sprachausnahme erstellen. Wenn Sie zu einer anderen Stimme wechseln und dieselben Sprachausnahmen verwenden möchten, müssen Sie die Sprachausnahmen von der vorigen Stimme importieren.

Sprachausnahmen sind auch für sprachspezifische Stimmen verfügbar. Siehe Abschnitt 11.10 *Sprachspezifische Stimmen*.



Sprachausnahmen können nicht von einer anderen Plattform importiert werden (Windows ↔ iOS).

Eine neue Sprachausnahme erstellen



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie **Sprachausnahmen**.
4. Wählen Sie **Sprachausnahme hinzufügen**.
Das Dialogfeld „Sprachausnahme hinzufügen“ wird geöffnet.

5. Geben Sie im Feld **Wort** das Wort so ein, wie es geschrieben wird.
6. Geben Sie im Feld **Aussprache** das Wort so in phonetischer Schreibweise ein, wie es ausgesprochen werden soll. Um die Aussprache zu prüfen, wählen Sie das Feld „Vorschau“.
7. Wählen Sie **Fertig**, wenn Sie die Sprachausnahme speichern möchten. Wählen Sie **Abbrechen**, wenn Sie Ihre Änderungen verwerfen und zu „Benutzereinstellungen“ zurückkehren möchten.

Eine Sprachausnahme importieren



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie **Sprachausnahmen**.
4. Wählen Sie **Von anderer Stimme importieren**.

5. Wählen Sie die Stimme aus, von der Sie Sprachausnahmen importieren möchten.



Es erscheinen nur Stimmen in der Liste, mit denen Sprachausnahmen verbunden sind.

6. Wählen Sie **Importieren**, um alle mit der ausgewählten Stimme verbundenen Sprachausnahmen zu importieren. Wählen Sie **Abbrechen**, um ohne Import zu „Benutzereinstellungen“ zurückzukehren.



Wenn Sie Sprachausnahmen von einer anderen Stimme importiert haben, empfehlen wir, sie zunächst mit der aktuellen Stimme zu testen. Wenn Sie das Feld  „Vorschau“ einer Sprachausnahme auswählen, hören Sie, wie es mit der aktuellen Stimme gesprochen wird.

11.9 Sprachausgabegerät



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.

2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie **Sprachausgabegerät**.
4. Nehmen Sie für „Standardgerät verwenden“ die Einstellung **Ein** vor, um das Windows-Standardausgabegerät zu verwenden. Nehmen Sie für „Standardgerät verwenden“ die Einstellung **Aus** vor, um die Liste der verfügbaren Ausgabegeräte zu sehen.
 - a. Wählen Sie aus der Liste ein Ausgabegerät aus, um es für die Sprachausgabe zu verwenden. Um eine Vorschau zu erhalten, wählen Sie das Feld „Wiedergabe“ für das betreffende Gerät.

11.10 Sprachspezifische Stimmen

Sie können einer Sprache eine Stimme zuweisen, damit Inhalte in dieser Sprache korrekt ausgesprochen werden.

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie **Sprachspezifische Stimmen**.
4. Wählen Sie **Stimme für andere Sprache hinzufügen**.
5. Wählen Sie **Sprache**, und wählen Sie anschließend eine Sprache aus der Liste „Sprachen für Stimmen“ aus. Nachdem Sie die Sprache ausgewählt haben, wählen Sie **Neue Stimme**.
6. Wählen Sie **Stimme**, und entscheiden Sie sich dann für eine Stimme aus dem Abschnitt „Installiert“ der Liste mit den Stimmen. Nachdem Sie die Stimme ausgewählt haben, wählen Sie **Neue Stimme**.



Manche Stimmen sind als kostenloser Download erhältlich (Internetverbindung erforderlich). Wählen Sie neben der gewünschten Stimme **Herunterladen**. Nach Abschluss des Downloads suchen Sie die Stimme im Abschnitt „Installiert“ der Liste mit den Stimmen und wählen sie aus.

7. (Optional) Stellen Sie die Geschwindigkeit der Stimme für die ausgewählte Sprache/Stimme ein.
8. (Optional) Fügen Sie Sprachausnahmen für die Stimme hinzu. Siehe Abschnitt 11.8.3 *Sprachausnahmen*.

11.11 Weitere Einstellungen für Benutzer

11.11.1 Spracheinstellungen

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie die Kategorie **Einstellungen**.
4. Nehmen Sie für „Sprachausgabe immer für neue Sprachausgabe unterbrechen“ die Einstellung **Ein** (die Sprachausgabe wird abgebrochen, wenn ein neuer Befehl erfolgt) oder **Aus** (Sprachbefehle werden in die Warteschlange eingereiht, sodass die aktuelle Sprachausgabe zu Ende gebracht und anschließend der nächste Befehl gesprochen wird) vor.

11.11.2 Einstellungen für das Mitteilungsfenster

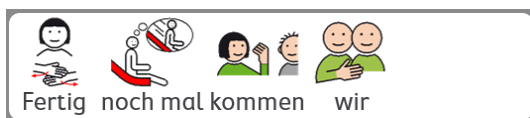


Abbildung 11.2 „Symbole im Mitteilungsfenster verwenden“ aktiviert

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie die Kategorie **Einstellungen**.
4. Nehmen Sie für die folgenden Punkte jeweils entweder die Einstellung **Ein** (aktiviert) oder **Aus** (deaktiviert) vor:

- Symbole im Mitteilungsfenster verwenden – Bei Aktivierung werden Wörter und Sätze im Mitteilungsfenster als Symbole dargestellt.
- Bei Texteingabe sprechen – Bei Aktivierung werden jedes Wort und jeder Satz während der Eingabe in das Mitteilungsfenster ausgesprochen.
- Zeichen sprechen – Bei Aktivierung wird jedes Zeichen während der Eingabe in das Mitteilungsfenster ausgesprochen.



Um „Zeichen sprechen“ zu aktivieren, muss die Einstellung „Bei Texteingabe sprechen“ aktiviert sein.

- Nach Sprachausgabe löschen – Nachdem der Text im Mitteilungsfenster gesprochen wurde, verschwindet er bei der nächsten Texteingabe.
- Grammatikfelder automatisch anpassen – Bei Aktivierung werden Felder des Typs „Grammatik“ dynamisch an den grammatikalischen Kontext der Inhalte im Mitteilungsfenster angepasst.
- Wörter automatisch zusammenziehen – Bei Aktivierung werden häufig zu einem Wort zusammengezogene Wortpaare zusammengefasst (zum Beispiel wird dann im Englischen „is not“ zu „isn't“).

11.11.3 Vorhersage-Einstellungen



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie die Kategorie **Einstellungen**.
4. Nehmen Sie für „Symbole auf Vorhersage-Feldern zeigen“ die Einstellung **Ein** (Felder des Typs „Vorhersage“ zeigen ein Symbol für das derzeit vorhergesagte Wort) oder **Aus** (Felder des Typs „Vorhersage“ zeigen nur Text) vor.

11.11.4 Synchronisierungseinstellungen



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie die Kategorie **Einstellungen**.
4. Nehmen Sie für „Synchronisierung im Anwendungsmodus aktivieren“ die Einstellung **Ein** (das Feld „Synchronisierung“ ist sowohl im Anwendungsmodus als auch im Bearbeitungsmodus in der oberen Menüleiste zu sehen) oder **Aus** (das Feld „Synchronisierung“ in der oberen Menüleiste wird im Anwendungsmodus verborgen, bleibt aber im Bearbeitungsmodus sichtbar) vor.

11.12 Auswahlmethode

Anfassen

Objekte werden aktiviert, indem sie auf dem Bildschirm entweder mit dem Finger berührt werden, oder – bei Gebrauch einer Maus – mit dem Mauszeiger angeklickt werden. Diese Auswahlmethode eignet sich für Benutzer, die den Bildschirm schnell und genau berühren können oder eine gewöhnliche Computermouse steuern und damit Linksklicks ausführen können. Objekte werden aktiviert, sobald sie berührt oder geklickt werden.

Berühren

Objekte werden aktiviert, indem sie auf dem Bildschirm entweder mit dem Finger berührt und für eine Mindestzeit gedrückt gehalten werden, oder – bei Gebrauch einer Maus – mit dem Mauszeiger angeklickt und dann für eine Mindestzeit gedrückt gehalten werden. Die Kontaktzeit legt der/die Benutzer/in fest. Diese Auswahlmethode ist für Benutzer hilfreich, die eventuell versehentlich ungewollte Objekte berühren/klicken.

Loslassen

Diese Methode ähnelt „Berühren“. Allerdings wird ein ausgewähltes Objekt aktiviert, sobald es losgelassen wird. Diese Methode erlaubt dem/der Benutzer/in, den Touchscreen längere Zeit zu berühren, ohne versehentlich etwas auszuwählen. Das bedeutet, der/die Benutzer/in kann mit einem Finger oder Zeiger über den Bildschirm gehen (ihn berühren) oder eine Maustaste gedrückt halten, während er/sie den Mauszeiger bewegt. Es wird erst etwas ausgewählt, wenn der Finger/

Zeiger vom Bildschirm abgehoben wird oder wenn die Maustaste losgelassen wird. Damit ist die Auswahlmethode „Loslassen“ ideal für Menschen, für die es einfacher ist, einen Finger/Zeiger über den Bildschirm zu ziehen, während sie diesen von Auswahl zu Auswahl bewegen.

Mit Maus verweilen

(Nur Windows) Bei der Auswahlmethode „Mit Maus verweilen“ muss der Mauszeiger auf dem Bildschirm mit einer Computermouse, einem Trackball oder einer Kopfmaus gesteuert werden. Ein Objekt wird ausgewählt, wenn der Mauszeiger für eine bestimmte Zeit auf einem Objekt verweilt oder der/die Benutzer/in einen Taster betätigt. Diese Auswahlmethode ist eine gute Wahl für Personen, die körperlich fähig sind, eine Maus zu bewegen, aber die Maustaste zum Auswählen nicht herunterdrücken können.

Gaze Interaction

(Nur Windows) Diese Methode ermöglicht es dem/der Benutzer/in, Snap Core First nur mit den Augen zu steuern. Das Auswählen erfolgt entweder, indem man den Blick für eine festgelegte Dauer (Verweilen) auf einem Objekt ruhen lässt, durch Aktivieren eines Tasters oder durch Blinzeln. Für Gaze Interaction ist ein Augensteuerungsgerät von Tobii Dynavox erforderlich.

Scanning

Ist Scanning die aktive Auswahlmethode, werden Objekte auf dem Bildschirm in einem bestimmten Muster hervorgehoben. Für Scanning trifft man per Taster bzw. Tastaturtaste eine Auswahl, sobald das gewünschte Element hervorgehoben wird. Diese Auswahlmethode ist für Menschen gedacht, denen es motorisch nicht möglich ist, direkte Auswahlmethoden zu nutzen.



Wenn Sie mehr über Auswahlmethoden erfahren möchten, können Sie sich über *System – Hilfe & Tutorials* das Video zu den Auswahlmethoden ansehen.

11.12.1 Die Auswahlmethode einstellen



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie die Kategorie **Auswahlmethode** aus.
4. Wählen Sie die aktuelle Auswahlmethode aus.
5. Wählen Sie eine Auswahlmethode aus der Liste aus.

11.12.2 Berühren – Optionen



Standardmäßig ist die Auswahlmethode „Einfaches Berühren“ eingestellt.

Bei der Auswahlmethode „Einfaches Berühren“ werden Objekte aktiviert, indem sie auf dem Bildschirm entweder mit dem Finger berührt oder – bei Gebrauch einer Maus – mit dem Mauszeiger angeklickt werden. Diese Auswahlmethode eignet sich für Benutzer, die den Bildschirm schnell und genau berühren können oder eine gewöhnliche Computermouse steuern und damit Linksklicks ausführen können. Objekte werden aktiviert, sobald sie berührt oder geklickt werden.



Navigationsart

Die Navigationsart ist die Art und Weise, wie ein/e Benutzer/in auf der Seite und auf der Symbolleiste scrollt. Sie können scrollen, indem Sie mit Ihrem Finger über den Bildschirm wischen und/oder Navigationspfeile anwählen.

Wischen

- Sie scrollen auf der Seite und der Symbolleiste auf und ab, indem sie mit Ihrem Finger über den Touchscreen wischen. (Nur bei Auswahlmethode „Einfaches Berühren“.)

Navigationspfeile

- Wenn weiter unten oder oben auf der Seite bzw. der Symbolleiste weitere Inhalte zu finden sind, werden Felder mit Pfeilen angezeigt. Die Felder zur Pfeilnavigation stehen für alle Auswahlmethoden zur Verfügung.



Wischen und Navigationspfeile


- Sowohl Wischen als auch die Navigationspfeile sind aktiviert, sodass jede Art der Navigation für Auf- und Abwärtsbewegungen durch die Inhalte verwendet werden kann. (Nur bei Auswahlmethode „Einfaches Berühren“.)

Feedbacktöne bei Auswahl

Ein Geräusch ist zu hören, wenn ein Feld ohne Sprachfunktion ausgewählt wird.

11.12.3 Optionen für „Berühren“

Wenn „Berühren“ als Auswahlmethode ausgewählt wurde, werden Objekte aktiviert, indem sie auf dem Bildschirm entweder mit dem Finger berührt und für eine Mindestzeit gedrückt gehalten werden, oder – bei Gebrauch einer Maus – mit dem Mauszeiger angeklickt und dann für eine Mindestzeit gedrückt gehalten werden. Die Kontaktzeit legt der/die Benutzer/in fest. Diese Auswahlmethode ist für Benutzer hilfreich, die eventuell versehentlich ungewollte Objekte berühren/klicken.

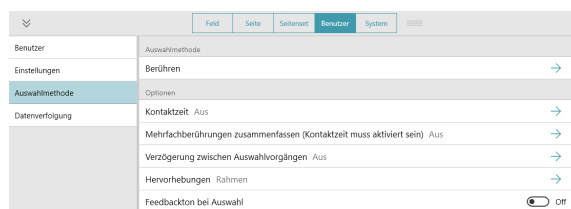

Kontaktzeit

Die Kontaktzeit ist die Mindesthaltezeit, die bei der Auswahl eines Objekts erforderlich ist, um es zu aktivieren.

Mehrfachberührungen zusammenfassen

Bei dieser Einstellung wird mehrfaches Tippen innerhalb einer festgelegten Zeitspanne zusammengefasst und als ein langes Tippen und Halten interpretiert. Diese Einstellung ist hilfreich, wenn ein/e Benutzer/in Probleme hat, ein Objekt nach der Auswahl zu halten ohne loszulassen.

Wenn „Mehrfachberührungen zusammenfassen“ aktiviert ist, können Sie den Zeitrahmen wählen, innerhalb dessen Berührungen zusammengefasst werden. Wenn beispielsweise die Einstellung „Mittel“ vorgenommen wurde, werden alle Berührungen innerhalb eines Intervalls von 0,3 Sekunden (nach der ersten Berührung) als eine einzige lange unterbrechungsfreie Berührung interpretiert.

Verzögerung zwischen Auswahlvorgängen

Mithilfe dieser Einstellung können Sie einen Zeitraum festlegen, innerhalb dessen in Snap nach einem Auswahlvorgang keine weitere Auswahl vorgenommen werden kann. Durch „Verzögerung zwischen Auswahlvorgängen“ kann die unbeabsichtigte Mehrfachauswahl eines Objekts in der Software vermieden werden.

Wenn „Verzögerung zwischen Auswahlvorgängen“ aktiviert ist, können Sie die Zeitspanne auswählen, innerhalb derer nach einem Auswahlvorgang keine weitere Auswahl vorgenommen werden kann. Wenn beispielsweise „Mittel“ eingestellt ist, kann innerhalb von 2 Sekunden nach einer Auswahl keine weitere Auswahl vorgenommen werden.

Hervorhebungen

Wählen Sie die bevorzugte Art und Farbe von Hervorhebungen. Durch Hervorhebungen werden ausgewählte Objekte visuell gekennzeichnet. Die Hervorhebung erlischt, wenn das Objekt aktiviert wird.




1. Keine Hervorhebung
2. Rahmen
Optionen: Farbe, Dicke der Hervorhebung
3. Ganzes Feld
Option: Farbe
4. Invers

Feedbacktöne bei Auswahl

Ein Geräusch ist zu hören, wenn ein Feld ohne Sprachfunktion ausgewählt wird.

11.12.4 Optionen für „Loslassen“

Wenn „Loslassen“ verwendet wird, wird ein ausgewähltes Objekt aktiviert, sobald es losgelassen wird. Diese Methode erlaubt dem/der Benutzer/in, den Touchscreen längere Zeit zu berühren, ohne versehentlich etwas auszuwählen. Das bedeutet, der/die Benutzer/in kann mit einem Finger oder Zeiger über den Bildschirm gehen (ihn berühren) oder eine Maustaste gedrückt halten, während er/sie den Mauszeiger bewegt. Während der Mauszeiger sich über die Felder bewegt, wird jeweils das aktuell ausgewählte Feld hervorgehoben. Ein Feld wird erst aktiviert, wenn der Finger/Zeiger vom Bildschirm abgehoben wird oder wenn die Maustaste losgelassen wird. Damit ist die Auswahlmethode „Loslassen“ ideal für Menschen, für die es einfacher ist, einen Finger/Zeiger über den Bildschirm zu ziehen, während sie diesen von Auswahl zu Auswahl bewegen. Sie ist außerdem gut geeignet für Personen, denen visuelles Feedback bei der fehlerfreien Auswahl hilft.

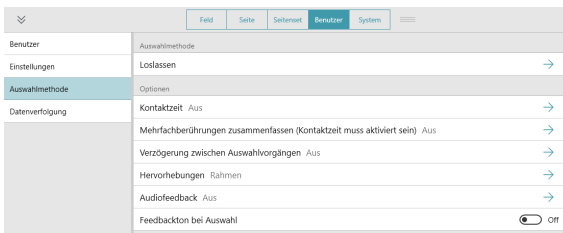

Kontaktzeit

Die Kontaktzeit ist die Mindesthaltezeit, die vor dem Loslassen eines Objekts erforderlich ist, um es zu aktivieren.

Mehrfachberührungen zusammenfassen

Bei dieser Einstellung wird mehrfaches Tippen innerhalb einer festgelegten Zeitspanne zusammengefasst und als ein langes Tippen und Halten interpretiert. Diese Einstellung ist hilfreich, wenn ein/e Benutzer/in Probleme hat, ein Objekt nach der Auswahl zu halten ohne loszulassen.

Wenn „Mehrfachberührungen zusammenfassen“ aktiviert ist, können Sie den Zeiträumen wählen, innerhalb dessen Berührungen zusammengefasst werden. Wenn beispielsweise die Einstellung „Mittel“ vorgenommen wurde, werden jegliche Berührungen innerhalb eines Intervalls von 0,3 Sekunden (nach der ersten Berührung) als eine einzige lange unterbrechungsfreie Berührung interpretiert.

Verzögerung zwischen Auswahlvorgängen

Mithilfe dieser Einstellung können Sie einen Zeitraum festlegen, innerhalb dessen in Snap nach einem Auswahlvorgang keine weitere Auswahl vorgenommen werden kann. Durch „Verzögerung zwischen Auswahlvorgängen“ kann die unbeabsichtigte Mehrfachauswahl eines Objekts in der Software vermieden werden.



Bei dieser Auswahlmethode gibt es die Option „Keine Hervorhebung“ nicht.



1. Keine Hervorhebung
2. Rahmen
Optionen: Farbe, Dicke der Hervorhebung
3. Ganzes Feld
Option: Farbe
4. Invers

Audiofeedback

Wenn „Audiofeedback“ aktiviert ist, hört der/die Benutzer/in das zu einem hervorgehobenen Objekt gehörige Audiofeedback. Ein Audiofeedback ist ein Wort oder eine kurze Mitteilung, das/die hilft, ein Objekt zu erkennen. Sie können für das Audiofeedback eine andere Stimme oder sprachspezifische Feedbackstimmen auswählen und die Geschwindigkeit der Stimme sowie die Sprachausnahmen personalisieren.

Feld „Auswahlmethode pausieren“ im Benutzermodus anzeigen

Wenn Sie diese Option aktivieren, erscheint im Benutzermodus in der oberen Menüleiste ein Feld „Auswahlmethode pausieren/fortsetzen“. Wenn Sie sie deaktivieren, wird das Feld ausgeblendet.

Feedbacktöne bei Auswahl

Ein Geräusch ist zu hören, wenn ein Feld ohne Sprachfunktion ausgewählt wird.

11.12.6 Optionen für Gaze Interaction

(Nur Windows) Diese Methode ermöglicht es dem/der Benutzer/in, Snap Core First nur mit den Augen zu steuern. Das Auswählen erfolgt entweder, indem man den Blick für eine festgelegte Dauer (Verweilen) auf einem Objekt ruhen lässt, durch Aktivieren eines Tasters oder durch Blinzeln. Für Gaze Interaction ist ein Augensteuerungsgerät von Tobii Dynavox erforderlich.

Auswahltyp

Verweilen

- Gibt Benutzern die Möglichkeit, eine Auswahl zu treffen, indem sie den Blick für eine festgelegte Dauer (Verweilzeit) auf einem Objekt ruhen lassen.
 - Verweilzeit – legt die Zeitdauer fest, die der Blick auf einem Objekt ruhen muss, damit es ausgewählt wird.

Taster

- Der/die Benutzer/in lenkt die Hervorhebung auf dem Bildschirm mit seinem/ihrer Blick und trifft die Auswahl dann mittels eines Tasters.
 - Tastereingabe – legt fest, welche Taste auf der Tastatur als Taster zur Eingabe fungiert.



Die Auswahlmethode „Taster“ mit einer Tastaturtaste oder einem Bluetooth-Taster funktioniert möglicherweise nicht außerhalb von Snap.

- Betätigungsdauer für Taster – die Zeitdauer, die der Taster betätigt werden muss, um das derzeit ausgewählte Objekt zu aktivieren.
- Wiederholungsdauer für Taster – die Zeitdauer, die der/die Benutzer zwischen zwei Betätigungen des Tasters warten muss. Vor Ablauf dieser Zeit werden weitere Versuche, den Taster zu betätigen, ignoriert.

Blinzeln

- Ermöglicht es Benutzern, eine Auswahl zu treffen, indem sie für eine festgelegte Zeitdauer blinzeln.

- Blinzelfindestdauer – legt die Mindestzeit fest, während derer die Augen des/der Benutzers/in geschlossen sein müssen, damit eine Auswahl erfolgt.
- Blinzelföchstdauer – legt die Höchstzeit fest, während derer die Augen des/der Benutzers/in geschlossen sein dürfen, damit eine Auswahl erfolgt. Wenn die Augen des/der Benutzers/in länger als die Blinzelföchstdauer geschlossen sind, wird keine Auswahl getroffen.

Feedback für Gaze Interaction

Das Feedback für Gaze Interaction ist ein visuelles Signal, das dem/der Benutzer/in zeigt, wo, wie gleichbleibend und wie lange sein/ihr Blick auf dem Bildschirm ruht.

Sie können Einstellungen für den Stil, die Farbe und die Größe des Feedbacks vornehmen.

Verzögerung nach Seitenwechsel

Nach dem Öffnen einer neuen Seite kann während der festgelegten Zeitspanne keine Auswahl vorgenommen werden. Diese Einstellung hilft, eine versehentliche Auswahl beim ersten Öffnen einer Seite zu vermeiden.

Windows Control – Typ

Legt den Modus für den Zugriff auf Desktop-Computer außerhalb von Snap fest.

- Gaze Selection – hierbei handelt es sich um eine zweistufige Auswahlmethode, wodurch die Gefahr unerwünschter Klicks reduziert wird.
- Mousemulation – dient zur Emulation und Steuerung eines standardmäßigen PC-Mauszeigers auf dem Bildschirm.

Audiofeedback

Wenn „Audiofeedback“ aktiviert ist, hört der/die Benutzer/in das zu einem hervorgehobenen Objekt gehörige Audiofeedback. Ein Audiofeedback ist ein Wort oder eine kurze Mitteilung, das/die hilft, ein Objekt zu erkennen. Sie können für das Audiofeedback eine andere Stimme auswählen und die Geschwindigkeit der Stimme sowie die Sprachausnahmen personalisieren.

Feld „Auswahlmethode pausieren“ im Benutzermodus anzeigen


Wenn Sie diese Option aktivieren, erscheint im Benutzermodus in der oberen Menüleiste ein Feld „Auswahlmethode pausieren/fortsetzen“. Wenn Sie sie deaktivieren, wird das Feld ausgeblendet.

Feedbacktöne bei Auswahl

Ein Geräusch ist zu hören, wenn ein Feld ohne Sprachfunktion ausgewählt wird.

11.12.7 Optionen für Scanning:

Ist Scanning die aktive Auswahlmethode, werden Objekte auf dem Bildschirm in einem bestimmten Muster hervorgehoben. Der/die Benutzer/in betätigt zum Auswählen einen Taster oder eine Tastaturtaste, sobald das gewünschte Element hervorgehoben wird. Diese Auswahlmethode ist für Menschen gedacht, denen es motorisch nicht möglich ist, direkte Auswahlmethoden zu nutzen.

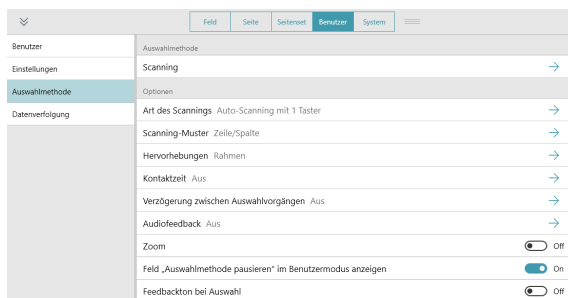

Art des Scannings

Die Einstellungen für „Art des Scannings“ legen fest, wie beim Scanning die Hervorhebung bewegt (automatisch oder durch Tastereingaben) und eine Auswahl getroffen wird.

Auto-Scanning mit 1 Taster

- Beim Autoscanning mit 1 Taster scannt die Software die Objekte auf der Seite und folgt dabei dem festgelegten Scanverhalten. Der/die Benutzer/in trifft die Auswahl durch Betätigung eines Tasters.
 - Tastereingabe – zur Auswahl stehen das Tippen auf den Bildschirm oder eine Taste auf der Tastatur.
 - Geschwindigkeit – legt fest, wie schnell das Scanning abläuft.
 - Übergangszeit – legt die Zeitspanne zwischen dem Treffen einer Auswahl und der Fortsetzung des automatischen Scannings fest.
 - Scannen nach – legt fest, wann das automatische Scanning erneut startet: Auswahl, Wechsel zu einer anderen Seite, Sprechen.
 - Vollständiges Audiofeedback sprechen und erst dann fortfahren – bei einer Aktivierung verzögert ein längeres Audiofeedback die Fortbewegung der Scanning-Hervorhebung.

Schrittweises Scanning mit 2 Tastern

- Beim schrittweisen Scanning mit 2 Tastern verwendet der/die Benutzer/in einen Taster, um die Hervorhebung von einem Objekt zum nächsten zu bewegen, und den anderen Taster, um eine Auswahl zu treffen.
 - Eingabe Taster 1 – um die Hervorhebung von einem Objekt zum nächsten zu bewegen, stehen das Tippen auf den Bildschirm oder eine Taste auf der Tastatur zur Auswahl.
 - Eingabe Taster 2 – um eine Auswahl zu treffen, stehen das Tippen auf den Bildschirm oder eine Taste auf der Tastatur zur Auswahl.



„Eingabe Taster 1“ und „Eingabe Taster 2“ müssen unterschiedlich sein.

Schrittweises Scanning mit 1 Taster

- Wenn das schrittweise Scanning mit 1 Taster aktiv ist, bewegt der Benutzer die Hervorhebung durch Auslösen des Tasters weiter (jede Auswahl bewegt die Hervorhebung um ein Intervall weiter). Um das hervorgehobene Objekt auszuwählen, betätigt der Benutzer den Taster und hält die Betätigung für die festgelegte Pausendauer aufrecht.
 - Eingabe Taster 1 – um die Hervorhebung von einem Objekt zum nächsten zu bewegen, stehen das Tippen auf den Bildschirm oder eine Taste auf der Tastatur zur Auswahl.
 - Haltedauer – die Mindesthaltezeit, die bei der Auswahl eines Objekts erforderlich ist, um es zu aktivieren.

Verweil-Scanning mit 1 Taster

- Wenn das Verweil-Scanning mit 1 Schalter aktiv ist, bewegt der Benutzer die Hervorhebung weiter, sobald er den Schalter auslöst (jede Auswahl bewegt die Hervorhebung um ein Intervall weiter). Um das hervorgehobene Objekt auszuwählen, pausiert der Benutzer während der festgelegten Pausendauer (tut nichts).
 - Eingabe Taster 1 – um die Hervorhebung von einem Objekt zum nächsten zu bewegen, stehen das Tippen auf den Bildschirm oder eine Taste auf der Tastatur zur Auswahl.
 - Pausendauer – die Mindestzeit, die beim Verweilen auf einem Objekt erforderlich ist, um es zu aktivieren.

Umgekehrtes Scanning

- Hierbei hält der/die Lernende den Taster gedrückt, damit sich die Hervorhebung weiterbewegt (die Bewegung hält an, solange der Taster gedrückt bleibt). Sobald der/die Lernende den Taster loslässt, wird das hervorgehobene Objekt ausgewählt.
 - Eingabe Taster 1 – um die Hervorhebung von einem Objekt zum nächsten zu bewegen, stehen das Tippen auf den Bildschirm oder eine Taste auf der Tastatur zur Auswahl.
 - Geschwindigkeit – wie schnell sich die Hervorhebung beim Scanning weiterbewegt (während der Taster gehalten wird).
 - Vollständiges Audiofeedback sprechen und erst dann fortfahren – bei einer Aktivierung verzögert ein längeres Audiofeedback die Fortbewegung der Scanning-Hervorhebung.

Scanverhalten

Beim Scanverhalten handelt es sich um die Reihenfolge, in der die zur Auswahl stehenden Objekte auf dem Bildschirm hervorgehoben werden. Außerdem enthält dieser Abschnitt Einstellungen in Bezug auf die Art der zu scannenden Objekte.

Muster

- Zeile/Spalte – Zeilen von oben nach unten scannen. Wenn eine Zeile ausgewählt ist, werden die Objekte in der Zeile von links nach rechts gescannt.
- Spalte/Zeile – Spalten von links nach rechts scannen. Wenn eine Spalte ausgewählt ist, werden die Objekte in der Spalte von oben nach unten gescannt.
- Linear – Die Objekte werden einzeln von links nach rechts und von oben nach unten gescannt.

Anzahl der Durchgänge

- Durchgänge – Legt fest, wie viele Male der Scan eine Zeile oder Spalte durchläuft, wenn keine Auswahl erfolgt.
- Nach letztem Durchgang – Legt fest, was geschieht, wenn der automatische Scan die festgelegte Anzahl an Durchgängen absolviert hat (nicht verfügbar, wenn als Anzahl der Durchgänge „Unendlich“ festgelegt wurde).

Gruppen-Scanning

- Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Felder auf einer Seite gruppenweise gescannt.



Die Scangruppen müssen vorab festgelegt werden. Siehe Abschnitt 8.13 *Scangruppen*.

Scanning bei letzter Auswahl beginnen

- Wenn diese Funktion aktiviert ist, beginnt das Scanning auf der Seite, auf der die letzte Auswahl erfolgt ist. Wenn sie deaktiviert ist, beginnt das Scanning nach einer Auswahl am Anfang der Seite.

Obere Menüleiste scannen

- Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die für das Scanning verfügbaren Symbole in der oberen Menüleiste (Zurück, Startseite und Überblick) gescannt. Wenn sie deaktiviert ist, werden die Symbole in der oberen Menüleiste nicht gescannt.



Die Felder „Suchen“, „Synchronisieren“, „Auswahlmethode pausieren“ und „Bearbeiten“ in der oberen Menüleiste werden nicht gescannt. Per Berührung kann jederzeit auf sie zugegriffen werden.

Leere Felder scannen


- Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Felder ohne Inhalt ebenfalls gescannt. Wenn sie deaktiviert ist, werden leere Felder nicht gescannt.

Hervorhebungen

Wählen Sie die bevorzugte Art und Farbe von Hervorhebungen. Durch Hervorhebungen werden gescannte Objekte visuell gekennzeichnet. Die Hervorhebung erlischt, wenn das Objekt aktiviert wird.



Bei dieser Auswahlmethode gibt es die Option „Keine Hervorhebung“ nicht.

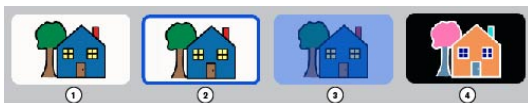

1. Keine Hervorhebung
2. Rahmen
Optionen: Farbe, Dicke der Hervorhebung
3. Ganzes Feld
Option: Farbe
4. Invers

Kontaktzeit

Die Kontaktzeit ist die Mindesthaltezeit, die bei der Auswahl eines Objekts erforderlich ist, um es zu aktivieren.

Verzögerung zwischen Auswahlvorgängen

„Verzögerung zwischen Auswahlvorgängen“ hilft, versehentliche Wiederholungen von Auswahlvorgängen zu vermeiden. Nach einem Auswahlvorgang per Taster kann die nächste Auswahl nicht vor Ablauf der in „Verzögerung zwischen Auswahlvorgängen“ festgelegten Zeit erfolgen. Bei einer Betätigung des Tasters während der Verzögerungszeit wird der Countdown zurückgesetzt.

Audiofeedback

Wenn „Audiofeedback“ aktiviert ist, hört der/die Benutzer/in das zu einem hervorgehobenen Objekt gehörige Audiofeedback. Ein Audiofeedback ist ein Wort oder eine kurze Mitteilung, das/die hilft, ein Objekt zu erkennen. Sie können für das Audiofeedback eine andere Stimme oder sprachspezifische Feedbackstimmen auswählen und die Geschwindigkeit der Stimme sowie die Sprachausnahmen personalisieren.

Zoom

Bei einer Aktivierung wird beim Scanning an die Bildschirmobjekte herangezoomt. Beim Scanning mehrerer Objekte (Zeilen oder Spalten) wird an das erste Objekt des Musters herangezoomt und die anderen Objekte werden dem festgelegten Hervorhebungsstil entsprechend hervorgehoben.

Feld „Auswahlmethode pausieren“ im Benutzermodus anzeigen

Wenn Sie diese Option aktivieren, erscheint im Benutzermodus in der oberen Menüleiste ein Feld „Auswahlmethode pausieren/fortsetzen“. Wenn Sie sie deaktivieren, wird das Feld ausgeblendet.

Feedbacktöne bei Auswahl

Ein Geräusch ist zu hören, wenn ein Feld ohne Sprachfunktion ausgewählt wird.


11.13 Datenverfolgung

11.13.1 Feldnutzung nachverfolgen

Wenn „Feldnutzung nachverfolgen“ aktiviert ist, werden Informationen zur Nutzung von Feldern in Snap Core First aufgezeichnet. Hierzu gehören die Uhrzeit der Feldnutzung, die Mitteilung, die Sprache, das Seitenset, die Seite, die Position im Raster, die Auswahlmethode (z. B. Gaze Interaction), der Modelling-Modus und ob der Inhalt des Feldes ausgesprochen oder in das Mitteilungsfenster eingefügt wurde.



Im Bearbeitungsmodus werden keine Informationen zur Feldnutzung aufgezeichnet.

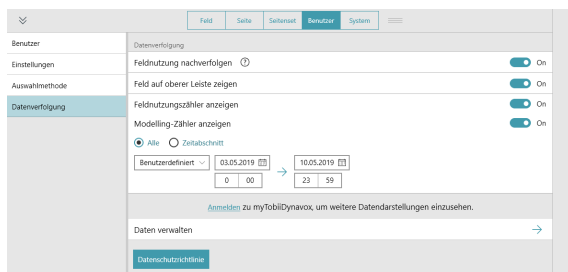

Nachverfolgung der Feldnutzung aktivieren



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie die Kategorie **Datenverfolgung**.
4. Setzen Sie **Feldnutzung nachverfolgen** auf „Ein“.
5. Lesen Sie den Datenschutzhinweis und wählen Sie **Ja**, um die Nachverfolgung der Feldnutzung zu aktivieren. Wenn Sie die Nachverfolgung der Feldnutzung nicht aktivieren möchten, wählen Sie „Nein“.



Sie können die Feldnutzungszähler rechts unten in der Software Snap Core First anzeigen, indem Sie „Feldnutzungszähler anzeigen“ und/oder „Modelling-Zähler anzeigen“ aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten **11.13.3 Feldnutzungszähler anzeigen** und **11.13.4 Modelling-Zähler anzeigen**. Weitere Datendarstellungen finden Sie in Ihrem myTobiiDynavox-Konto im Abschnitt zu **Nutzungsberichten**.

Wenn die Nachverfolgung der Feldnutzung aktiviert ist, erfolgt sie bei jeder Verwendung der Software Snap Core First. Die Richtigkeit der Nutzungsdaten ist nur gewährleistet, wenn zwischen einer Feldauswahl durch den Benutzer und Modelling-Vorgängen durch einen Betreuer oder Gesprächspartner unterschieden wird. Wenn der Benutzer mit Snap Core First über eine Auswahlmethode ohne Touch-Funktion (Mit Maus verweilen, Gaze Interaction oder Scanning) interagiert, wird jede Feldauswahl mithilfe der Touch-Funktion automatisch als Modelling aufgezeichnet. Wenn der Benutzer mit Snap Core First über eine Auswahlmethode mit Touch-Funktion interagiert, muss der Betreuer den Modelling-Modus aktivieren, bevor er beim Modelling Felder auswählt, und ihn dann wieder deaktivieren, bevor der Benutzer das nächste Mal ein Feld auswählt.



Wenn „Feldnutzung nachverfolgen“ aktiviert ist und der Benutzer eine Auswahlmethode mit Touch-Funktion verwendet, sorgen Sie dafür, dass das Feld „Obere Menüleiste anzeigen“ ebenfalls aktiviert ist. Siehe Abschnitt **11.13.2 Feld in der oberen Menüleiste anzeigen**.



Beim Teilen eines Seitensets mit Nutzungsdaten haben Sie die Möglichkeit, es entweder mit den Nutzungsdaten oder ohne sie zu teilen.

Modelling-Modus aktivieren (nur notwendig, wenn die Auswahlmethode als „Touch“, „Berühren“ oder „Berühren und Loslassen“ eingestellt ist oder der Bildschirm als Schalter verwendet wird)



Wenn Ihre derzeitige Auswahlmethode das Feld „Auswahlmethode pausieren“ in der oberen Menüleiste ein-

schließt, pausieren Sie die Auswahlmethode , bevor Sie mit den folgenden Schritten beginnen. Aktivie-

ren Sie die Auswahlmethode wieder , wenn Sie den Modelling-Modus verlassen.

1. Wählen Sie das Feld  **Datenverfolgung** in der oberen Menüleiste.
Wie Sie das Feld „Datenverfolgung“ in der oberen Menüleiste aktivieren, siehe Abschnitt **11.13.2 Feld in der oberen Menüleiste anzeigen**.
2. Aktivieren Sie den **Modelling-Modus**.
Vergessen Sie nicht, den Modelling-Modus zu deaktivieren, wenn Sie mit dem Modelling fertig sind.




Sie können den Modelling-Modus auch ein- und ausschalten, indem Sie lange auf das Feld „Datenverfolgung“ in der oberen Menüleiste tippen (tippen und halten). Wenn der Modelling-Modus aktiviert ist, sieht

das Feld „Datenverfolgung“ so aus . Wenn der Modelling-Modus deaktiviert ist, sieht das Feld „Da-

tenverfolgung“ so aus .

11.13.2 Feld in der oberen Menüleiste anzeigen

Wenn das Feld  „Datenverfolgung“ aktiviert ist, erscheint es in der oberen Menüleiste. Wenn das Feld „Datenverfolgung“ in der oberen Menüleiste aktiviert ist, haben Sie schnellen Zugriff auf folgende Einstellungen: Modelling-Modus, Feldnutzungszähler anzeigen, Modelling-Zähler anzeigen und Daten verwalten.

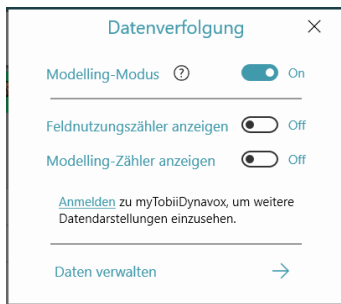

11.13.3 Feldnutzungszähler anzeigen

Bei Aktivierung erscheint auf jedem Feld eine weiße Markierung, die anzeigt, wie oft das betreffende Feld vom Nutzer im angegebenen Zeitraum ausgewählt wurde (während „Feldnutzung nachverfolgen“ aktiviert war). Standardmäßig ist als Zeitraum „Alle“ ausgewählt.

„Feldnutzungszähler anzeigen“ aktivieren (über Benutzereinstellungen)

1. Wählen Sie das Feld  **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie die Kategorie **Datenverfolgung**.
4. Setzen Sie **Feldnutzungszähler anzeigen** auf „Ein“.



Wenn Sie den Zeitraum für die Feldnutzungszählung ändern möchten, wählen Sie **Zeitraum** und verwenden Sie dann das Dropdown-Menü oder die Felder für Start- und Enddatum/-zeit.

„Feldnutzungszähler anzeigen“ aktivieren (über das Feld „Datenverfolgung“ in der oberen Menüleiste)



Wie Sie das Feld „Datenverfolgung“ in der oberen Menüleiste aktivieren, siehe Abschnitt 11.13.2 *Feld in der oberen Menüleiste anzeigen*.

1. Wählen Sie das Feld  **Datenverfolgung** in der oberen Menüleiste.
2. Aktivieren Sie **Feldnutzungszähler anzeigen**.



Wenn Sie den Zeitraum für die Feldnutzungszählung ändern möchten, wählen Sie **Zeitraum** und verwenden Sie dann das Dropdown-Menü oder die Felder für Start- und Enddatum/-zeit.

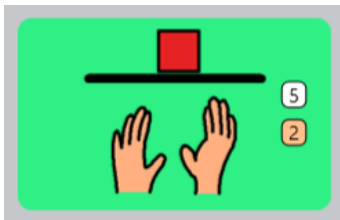


Abbildung 11.3 Feld zur Anzeige des Nutzungszählers (weiß) und des Modelling-Zählers (orange).

11.13.4 Modelling-Zähler anzeigen

Bei Aktivierung erscheint auf jedem Feld eine orangefarbene Markierung, die anzeigt, wie oft das betreffende Feld im angegebenen Zeitraum im Modelling-Modus ausgewählt wurde (während „Feldnutzung nachverfolgen“ aktiviert war). Standardmäßig ist als Zeitraum „Alle“ ausgewählt.

„Modelling-Zähler anzeigen“ aktivieren (über Benutzereinstellungen)



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie die Kategorie **Datenverfolgung**.
4. Setzen Sie **Modelling-Zähler anzeigen** auf „Ein“.



Wenn Sie den Zeitraum für die Modelling-Zählung ändern möchten, wählen Sie **Zeitraum** und verwenden Sie dann das Dropdown-Menü oder die Felder für Start- und Enddatum/-zeit.

„Modelling-Zähler anzeigen“ aktivieren (über das Feld „Datenverfolgung“ in der oberen Menüleiste)



Wie Sie das Feld „Datenverfolgung“ in der oberen Menüleiste aktivieren, siehe Abschnitt 11.13.2 *Feld in der oberen Menüleiste anzeigen*.



1. Wählen Sie das Feld **Datenverfolgung** in der oberen Menüleiste.
2. Aktivieren Sie **Modelling-Zähler anzeigen**.



Wenn Sie den Zeitraum für die Modelling-Zählung ändern möchten, wählen Sie **Zeitraum** und verwenden Sie dann das Dropdown-Menü oder die Felder für Start- und Enddatum/-zeit.

11.13.5 Daten verwalten

Setzen Sie den Feldnutzungszähler und den Modelling-Zähler für die aktuelle Seite, die Felder neben dem Mitteilungsfenster, die Felder auf der Werkzeuggeste oder für das gesamte Seitenset auf Null zurück.



Durch das Zurücksetzen des Feldnutzungszählers werden frühere Nutzungsdaten nicht gelöscht. Wenn Sie alle auf Ihrem myTobiiDynavox-Konto gespeicherten Nutzungsdaten dauerhaft löschen möchten, öffnen Sie einen Webbrowser und gehen Sie auf mytobiidynavox.com > *Snap* > *Nutzungsdaten*.

Nutzungsdaten zurücksetzen (über Benutzereinstellungen)



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie die Kategorie **Datenverfolgung**.
4. Wählen Sie **Daten verwalten** aus.
5. Wählen Sie den Bereich, in dem Sie den Feldnutzungszähler und den Modelling-Zähler auf Null zurücksetzen möchten.
6. Wählen Sie **Zurücksetzen**, um den Feldnutzungszähler und den Modelling-Zähler für den ausgewählten Bereich zurückzusetzen. Wenn Sie das Zurücksetzen abbrechen möchten, wählen Sie „Abbrechen“.

Feldnutzungszähler zurücksetzen (über das Feld „Datenverfolgung“ in der oberen Menüleiste)



Wie Sie das Feld „Datenverfolgung“ in der oberen Menüleiste aktivieren, siehe Abschnitt 11.13.2 *Feld in der oberen Menüleiste anzeigen*.



1. Wählen Sie das Feld **Datenverfolgung** in der oberen Menüleiste.
2. Wählen Sie **Daten verwalten** aus.
3. Wählen Sie den Bereich, in dem Sie den Feldnutzungszähler und den Modelling-Zähler auf Null zurücksetzen möchten.
4. Wählen Sie **Zurücksetzen**, um den Feldnutzungszähler und den Modelling-Zähler für den ausgewählten Bereich zurückzusetzen. Wenn Sie das Zurücksetzen abbrechen möchten, wählen Sie „Abbrechen“.

12 Systemeinstellungen

12.1 Einstellungen

12.1.1 Passwort

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird für den Zugriff auf den Bearbeitungsmodus, den Suchmodus und die Synchronisierungsfunktion ein vierstelliges Passwort benötigt. Die Aktivierung des Passworts beugt unbefugten Änderungen am Seitenset und den Einstellungen vor.

Passwort aktivieren



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **System**.
3. Nehmen Sie für den Wechselschalter „Passwort verwenden“ die Einstellung **Ein** vor.
4. Geben Sie ein vierstelliges Passwort ein, das nur Sie kennen und das schwer zu erraten ist.

5. Geben Sie das Passwort erneut ein, um es zu bestätigen.
6. Wenn Sie „Passwort verwenden“ aktivieren, ist das Passwort für den Bearbeitungsmodus, den Synchronisierungsmodus und den Suchmodus standardmäßig aktiviert. Ändern Sie die Einstellung für diejenigen dieser Funktionen auf „Aus“, die ohne Passwort zugänglich sein sollen.



Wenn das Passwort aktiviert und das Passwort für die Synchronisierungsfunktion deaktiviert ist, werden Synchronisierungen im Modus „Nur eingehend“ durchgeführt. Wenn Sie im Modus „Nur eingehend“ synchronisieren, erhalten Sie Änderungen an Seitensets (die auf anderen Geräten vorgenommen wurden), versenden aber nicht ihre Änderungen an Seitensets, die Sie auf dem aktuellen Gerät vorgenommen haben.

7. Wenn Sie den Bearbeitungsmodus verlassen, ist das Passwort für den Zugriff auf In-App-Käufe und, falls aktiviert, den Bearbeitungsmodus, den Synchronisierungsmodus und/oder den Suchmodus erforderlich.



Wenn Sie das Passwort bereits aktiviert haben, können Sie das Passwort über das Feld  **Bearbeiten** ändern.

Sollten Sie Ihr Passwort einmal vergessen, gelangen Sie mit dem Master-Code 0520 in den Bearbeitungsmodus und können dort sofort Ihr Passwort zurücksetzen.

12.1.2 Bildschirmeinstellung (Nur Windows)

Wenn der Vollbildmodus aktiviert ist, füllt Snap den gesamten Bildschirm Ihres Gerätes aus. Wenn der Vollbildmodus deaktiviert ist, läuft Snap in einem Fenster mit verstellbarer Größe.

12.1.3 Bearbeitungsmodus – Sprache

Wählen Sie eine Sprache für die Benutzeroberfläche im Bearbeitungsmodus.

12.2 Gerät



Der Abschnitt „Gerät“ ist nur auf dem Tobii Dynavox I-13 und I-16 vorhanden.

12.2.1 Einstellungen für das Partnerfenster

Das Partnerfenster ist ein Bildschirm auf der Rückseite des Tobii Dynavox I-13 und I-16. Das Partnerfenster teilt dem Gesprächspartner mit, dass der Benutzer etwas sagen möchte, und zeigt ihm Text zum Lesen.



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **System**.
3. Wählen Sie **Gerät**.
4. Treffen Sie in „Optionen des Partnerfensters“ eine Auswahl:
 - **Text des Mitteilungsfensters anzeigen** – zeigt das Mitteilungsfenster in Echtzeit im Partnerfenster an.
 - **Gesprochenen Text zeigen** – zeigt nur dann den Text im Partnerfenster an, wenn er gesprochen wird. Wenn die Nachricht im Mitteilungsfenster verfasst wird, zeigt das Partnerfenster eine Reihe von Punkten an, um darauf hinzuweisen, dass der Benutzer eine Nachricht vorbereitet. Während der Text im Mitteilungsfenster ausgesprochen wird, scrollt das Partnerfenster mit dem gesprochenen Text nach unten.



Das Partnerfenster zeigt nur Text an. Es zeigt keine Symbole an.

5. Treffen Sie in „Darstellungsstil des Partnerfensters“ eine Auswahl:
 - **Spiegel** – zeigt in der oberen Leiste eine Miniaturversion des Partnerfensters.
 - **Symbol** – zeigt ein Symbol, wenn das Partnerfenster eingeschaltet ist. Das Symbol wird ausgeblendet, wenn das Partnerfenster ausgeschaltet ist.
6. Schalten Sie das Partnerfenster **Ein** oder **Aus**. Wenn das Partnerfenster ausgeschaltet ist, zeigt es keinen Text an.



Außerdem können Sie mit den Feldern die Helligkeit des Bildschirms steuern und das Partnerfenster ein- bzw. ausschalten. Siehe Abschnitt 8.6.2 *Aktiver Inhalt* und 8.7 *Feldaktionen*.

12.3 Store

Hier werden weitere Funktionen von Snap Core First angezeigt, die Sie per In-App-Kauf erwerben können. Funktionen, die Sie bereits erworben haben, werden nicht aufgeführt.

12.4 Symbolbibliotheken

12.4.1 Sucheinstellungen

Wenn „Eingeschränkte Symbolsuche“ aktiviert ist, erscheinen möglicherweise anstößige Symbole nicht in der Symbolsuche, dem Mitteilungsfenster (mit Symboldarstellung) und dem Suchmodus. Wenn „Eingeschränkte Symbolsuche“ deaktiviert ist, werden bei der Symbolsuche, für die Symbole im Mitteilungsfenster und den Suchmodus alle verfügbaren Symbole verwendet.

12.4.2 Installierte und als Download erhältliche Symbole

Bei den im Abschnitt „Installierte Symbole“ aufgeführten Symbolsets handelt es sich um diejenigen Symbolsets, die derzeit installiert und auf Ihrem Gerät verfügbar sind.

Wenn Sie ein installiertes Symbolset löschen möchten, wählen Sie das Feld  **Löschen** und bestätigen Sie anschließend mit **Löschen**.



Die Symbole für das Kernvokabular können nicht gelöscht werden.

Bei den im Abschnitt „Weitere verfügbare Symbole“ aufgeführten Symbolsets handelt es sich um die kostenlosen Symbolsets, die derzeit nicht auf Ihrem Gerät installiert sind. Um ein kostenloses Symbolset herunterzuladen und zu installieren, wählen Sie neben dem gewünschten Symbolset **Herunterladen**.



Sie müssen mit dem Internet verbunden sein, um Symbolsets herunterzuladen.



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
Manche Symbolsets von Drittanbietern müssen käuflich im Store erworben werden. Siehe Abschnitt 12.3 *Store*.

12.4.3 Symbolsets neu anordnen


Die Reihenfolge der Suchergebnisse einer Symbolsuche hängt von der Reihenfolge der Symbolsets in der Liste „Installierte Symbole“ ab. Wenn Sie beispielsweise in Ihrem Seitenset vor allem kontraststarke Symbole verwenden, können Sie das kontraststarke Symbolset an den Anfang der Liste „Installierte Symbole“ setzen und auf diese Weise bei Symbolsuchen kontraststarken Symbolen (falls verfügbar) den Vorrang geben.



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **System**.
3. Wählen Sie die Kategorie **Symbolsets**.



4. Wählen und halten Sie das Zeichen eines Symbolsets in der Liste „Installierte Symbole“.
5. Ziehen Sie das Symbolset auf eine andere Position in der Liste.

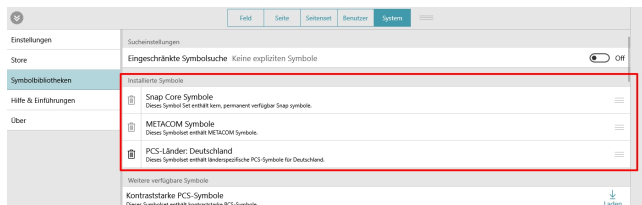

12.5 Hilfe & Tutorials

12.5.1 Videos

Schauen Sie sich die Videos an und erfahren Sie mehr über Snap Core First.

12.5.2 Pathways für Core First



Pathways for Core First ist die kostenlose App, die Ihnen zeigt, wie Sie Snap Core First am wirkungsvollsten zu Zwecken der Kommunikation, zur Alphabetisierung, Verhaltensunterstützung und für vieles mehr einsetzen können! Folgen Sie den Links in diesem Abschnitt und erfahren Sie mehr.

12.5.3 Einführung

Starten Sie noch einmal die Einführung und lernen Sie Snap noch besser kennen.

12.5.4 Externe Hilfe

Hier erhalten Sie Zugriff auf die Kurzanleitung, das Benutzerhandbuch, Leitfäden zu Seitensets, zusätzliche Videos, die Internet-Wissensdatenbank und die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung.

12.6 Über

Versionsinformationen zu Snap Core First.

12.6.1 Software-Updates



Gilt nur für Windows.

Die App „Snap Core First“ wird automatisch in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

So überprüfen Sie manuell, ob eine neue Version vorliegt, und laden das Update herunter:



1. Wählen Sie das Feld **Bearbeiten** aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **System** aus.
3. Wählen Sie die Kategorie **Über** aus.
4. Wenn ein Update zur Verfügung steht, wird es unter der EAN-Nummer angezeigt. Sie können die aktualisierte Version abrufen, indem Sie **Update installieren** auswählen.

Copyright ©Tobii AB (publ). Möglicherweise werden auf dem jeweiligen lokalen Markt nicht alle Produkte und Dienstleistungen angeboten. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Warenzeichen gehören dem jeweiligen Besitzer.

Support für Ihr Tobii Dynavox-Gerät

Onlinehilfe

Bitte sehen Sie zuerst online auf der entsprechenden Support-Seite für Ihr Tobii Dynavox-Gerät nach. Dort finden Sie aktuelle Informationen zu Fragen sowie Tipps und Tricks rund um Ihr Produkt. Sie finden unsere Support-Seiten online auf: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontakt zu Tobii Dynavox Produktberater oder Fachhändler

Bei Fragen zu und Problemen mit Ihrem Produkt nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Produktberater oder Fachhändler von Tobii Dynavox auf, um Unterstützung zu erhalten. Dieser kennt sich mit Ihren persönlichen Gerätekonfigurationen aus und kann Ihnen am besten mit Tipps und Schulungen zu Ihrem Produkt behilflich sein. Die Kontaktdaten finden Sie auf www.Tobii-Dynavox.com/contact