

Tobii Dynavox Snap Scene

Startvejledning

Pathways

Hent appen kaldet Tobii Dynavox Pathways på din iPad for at se hjælpevideoer og læse artikler om forskningsbaserede strategier til anvendelse af Snap Scene med dit barn. Pathways hjælper dig med at bruge væsentlige metoder, der kan hjælpe til at opnå betydningsfulde resultater inden for sprog- og kommunikationsfærdigheder. Du kan også finde alle instruktionsvideoerne for Pathways på myTobiiDynavox.com

Afspilningstilstand

Snap Scene har to tilstande: **Afspilningstilstand** hvor barnet vælger scener fra navigationsbaren og interagerer med disse scener og **Oprettelsestilstand** hvor plejeren kan oprette, redigere og administrere scener. Når barnet vælger et interaktivt område, hvilket kaldet et hotspot, i Afspilningstilstanden, vil barnet høre en lydoptagelse og muligvis se tekstmærkaten for det hotspot. Samspil med lyd og tekstmærkater kan brugerdefineres af plejeren.



Tilbagemeldingen på dit scenesamspil er et resultat af de aktiverede indstillinger samt indholdet (lydoptagelse og tekstmærkat) forbundet med hvert hotspot. Indstillingen Vis og Animér Hotspot-mærkat er som udgangspunkt deaktiveret.



Figur 1 Afspilningstilstand

Hvis du vil anvende en anden scene, skal du bruge navigationsbaren i venstre side af skærmen. Vælg en kategori i den lilla kolonne og vælg dernæst en scene i den lyserøde kolonne. Svip op og ned i kolonnerne om nødvendigt.

Anvend kontrolfunktionerne på din enheds hardware og i dit styresystem til at justere lydstyrken.

Opret en Ny Scene

1. Start **Oprettelsestilstand**.

Gå til
Redigeringstilstand

Support til din Tobii Dynavox enhed


Få hjælp på internettet

Se den produkt-specifikke support-side for din Tobii Dynavox enhed. Den indeholder opdaterede information omkring problemstillinger samt tips og tricks angående produktet. Find vores support-sider på hjemmesiden: www.TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakt din salgsrepræsentant eller forhandler.


Hvis du har spørgsmål angående dit produkt, så kontakt din lokale Tobii Dynavox-forhandler eller salgsrepræsentant for hjælp. De kender din personlige opsætning bedst og kan bedst hjælpe dig med tips og produkttræning. For kontaktoplysninger, besøg da www.TobiiDynavox.com/contact

2. Vælg den kategorimappe, som du ønsker at oprette din nye scene i.

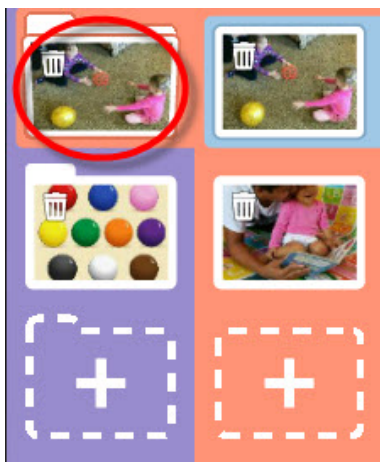

Figur 2 Vælg Kategori

3. Vælg knappen til ny scene (+). Fototilstand åbnes.

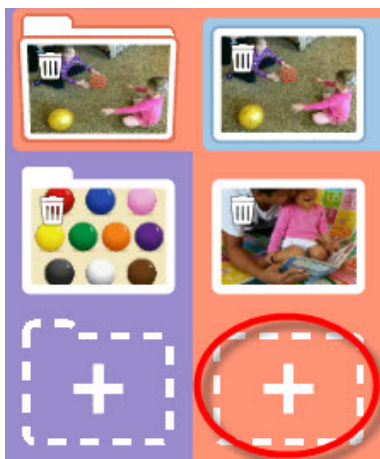

Figur 3 Ny Scene-knap

4. Tilføj et billede til din scene ved at tage et billede eller vælge en billedfil, der er lagret på din enhed:

Support til din Tobii Dynavox enhed

Få hjælp på internettet

Se den produkt-specifikke support-side for din Tobii Dynavox enhed. Den indeholder opdaterede information omkring problemstillinger samt tips og tricks angående produktet. Find vores support-sider på hjemmesiden: www.TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakt din salgsrepræsentant eller forhandler.

Hvis du har spørgsmål angående dit produkt, så kontakt din lokale Tobii Dynavox-forhandler eller salgsrepræsentant for hjælp. De kender din personlige opsætning bedst og kan bedst hjælpe dig med tips og produkttræning. For kontaktoplysninger, besøg da www.TobiiDynavox.com/contact

- a. **Tag et billede** - Tag et billede med det valgte kamera. Visningsfinderens på skærmen viser det billede, der vil blive taget, hvis du vælger denne valgmulighed.



Figur 4 Fototilstand - Tag et Billede

- b. **Vend Kamera** - Hvis din enhed har et kamera, der vender både forud og bagud, kan du anvende knappen **Vend Kamera** for at vælge det andet kamera på din enhed. Når du ser den ønskede visning i visningsfinderens på din skærm, skal du vælge knappen **Tag et billede** for at tage billedet.



Figur 5 Fototilstand - Vend Kamera

Support til din Tobii Dynavox enhed

Få hjælp på internettet

Se den produkt-specifikke support-side for din Tobii Dynavox enhed. Den indeholder opdaterede information omkring problemstillinger samt tips og tricks angående produktet. Find vores support-sider på hjemmesiden: www.TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakt din salgsrepræsentant eller forhandler.

Hvis du har spørgsmål angående dit produkt, så kontakt din lokale Tobii Dynavox-forhandler eller salgsrepræsentant for hjælp. De kender din personlige opsætning bedst og kan bedst hjælpe dig med tips og produkttræning. For kontaktoplysninger, besøg da www.TobiiDynavox.com/contact

- c. **Vælg billede** - For at vælge et billede, der er lagret på din enhed, skal du vælge knappen **Vælg billede**. Gen-nemse mapperne med pil-op-knappen eller knappen Fil... Vælg den ønskede billedetilstand og vælg dernæst den grønne knap **Vælg**.



Figur 6 Fototilstand - Vælg et Billede

- d. Hvis du ønsker at lukke Fototilstand uden at oprette en scene, skal du vælge **Luk Fototilstand**.



Support til din Tobii Dynavox enhed


Få hjælp på internettet

Se den produkt-specifikke support-side for din Tobii Dynavox enhed. Den indeholder opdaterede information omkring problemstillinger samt tips og tricks angående produktet. Find vores support-sider på hjemmesiden: www.TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakt din salgsrepræsentant eller forhandler.

Hvis du har spørgsmål angående dit produkt, så kontakt din lokale Tobii Dynavox-forhandler eller salgsrepræsentant for hjælp. De kender din personlige opsætning bedst og kan bedst hjælpe dig med tips og produkttræning. For kontaktoplysninger, besøg da www.TobiiDynavox.com/contact

- Anvend skydebaren nederst på billedet for at skalere billedet til den ønskede størrelse. Træk skydebarens håndtag mod **+** for at zoome ind og mod **—** for at zoome ud.

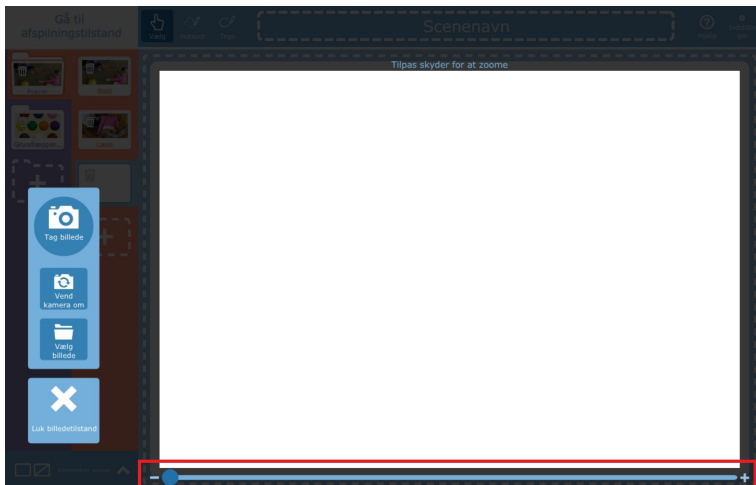

Figur 7 Fototilstand - Skaleringsværktøj

- Træk i billedet for at centrere det.
- Når du er færdig med at skalere og centrere dit foto, skal du vælge **Accepter** for at gemme det. For at tage et billede igen eller vælge en anden billedfil skal du vælge **Tag igen** eller **Tilbage**. For at lukke fotoskærmen uden at gemme skal du vælge **Luk Fototilstand**.

Rediger en Scene

- Start **Oprettelsestilstand**.
- Vælg den scene, du ønsker at redigere.
- (Valgfrit) Tilføj eller Rediger Scenenavnet ved at vælge og dernæst skrive tekst i feltet øverst på skærmen.



Figur 8 Værktøjslinje til Oprettelsestilstand

- Anvend værktøjerne i værktøjslinjen til at foretage ændringer til din scene.

Sceneværktøjer

Rediger din scene med værktøjerne i værktøjslinjen: Vælg, Hotspot og Tegn.

.1 Vælg et Hotspot

Anvend **Vælg værktøj** for at vælge et eksisterende hotspot.



Support til din Tobii Dynavox enhed

Få hjælp på internettet

Se den produkt-specifikke support-side for din Tobii Dynavox enhed. Den indeholder opdaterede information omkring problemstillinger samt tips og tricks angående produktet. Find vores support-sider på hjemmesiden: www.TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakt din salgsrepræsentant eller forhandler.


Hvis du har spørgsmål angående dit produkt, så kontakt din lokale Tobii Dynavox-forhandler eller salgsrepræsentant for hjælp. De kender din personlige opsætning bedst og kan bedst hjælpe dig med tips og produkttræning. For kontaktoplysninger, besøg da www.TobiiDynavox.com/contact

.2 Opret og Rediger et Hotspot

Opret et nyt hotspot med **Hotspot-værktøjet** for at lave omrids om en genstand eller et område i en scene. Et hotspot er et valgbart område i en scene, som kan afspille en lydoptagelse eller vise en tekstmærkat i Afspilningstilstanden.




Når du har oprettet et hotspot (eller valgt et eksisterende hotspot), har du mulighed for at give dit hotspot en mærkat, lave en lydoptagelse eller slette hotspottet.

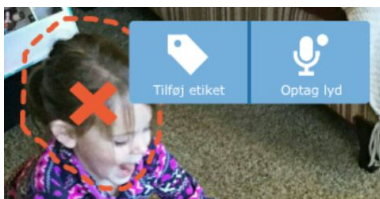

Figur 9 Hotspotvalgmuligheder


.2.1 Tilføj en Hotspot-mærkat

1. Vælg **Tilføj Mærkat**.
2. Vælg tekstfeltet og skriv dernæst en mærkat.

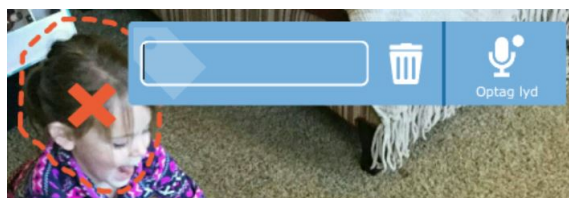


.2.2 Lydoptagelse til Hotspot

1. Vælg **Indspil lyd**. Optagelsen begynder med det samme (angivet af en blinkende rød cirkel).

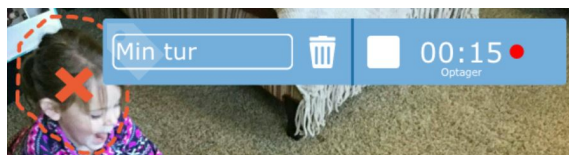

Figur 10 Indspil lyd

2. Når du er færdig med at optage, skal du vælge den firkantede knap for at stoppe optagelsen.
3. Tryk på den trekantede (afspil)-knap for at høre den optagede lyd.

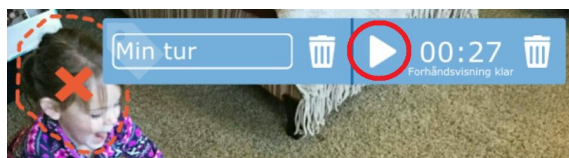

Figur 11 Forhåndsvisning af Lyd

Support til din Tobii Dynavox enhed


Få hjælp på internettet

Se den produkt-specifikke support-side for din Tobii Dynavox enhed. Den indeholder opdaterede information omkring problemstillinger samt tips og tricks angående produktet. Find vores support-sider på hjemmesiden: www.TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakt din salgsrepræsentant eller forhandler.

Hvis du har spørgsmål angående dit produkt, så kontakt din lokale Tobii Dynavox-forhandler eller salgsrepræsentant for hjælp. De kender din personlige opsætning bedst og kan bedst hjælpe dig med tips og produkttræning. For kontaktoplysninger, besøg da www.TobiiDynavox.com/contact


- i** Hvis du vil lave en ny lydoptagelse til et hotspot, der allerede har lyd, kan du vælge skraldespandsikonet **slet** for at fjerne den eksisterende optagelse og dernæst vælge **Optag Lyd** for at oprette en ny optagelse.

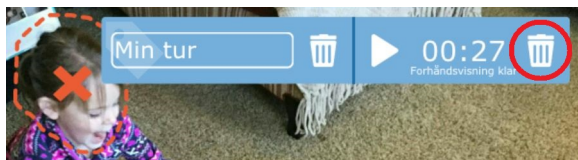

Figur 12 Slet Lyd

.2.3 Slet et Hotspot

1. Anvend **Vælg værktøj** for at vælge et hotspot.
2. Vælg det røde **X** for at slette hotspottet.

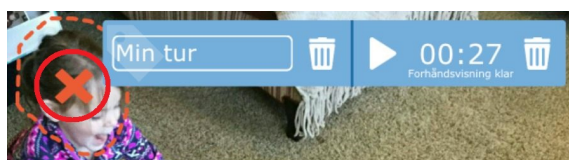

.3 Tegn

Anvend **Tegneværktøjet** for at tegne frihånds-linjer hvor som helst i en scene.



Figur 13 Tegneværktøj

- Du kan vælge imellem seks forskellige farver til **stregfarven**.
- Vælg en af de **tolinjetykkelser**.
- Værktøjet **Slet** anvendes til at fjerne dele af din tegning på kontrolleret vis.
- Knappen **Ryd** fjerner alle tegninger fra din scene.



Figur 14 Scene med Tegninger

Support til din Tobii Dynavox enhed

Få hjælp på internettet

Se den produkt-specifikke support-side for din Tobii Dynavox enhed. Den indeholder opdaterede information omkring problemstillinger samt tips og tricks angående produktet. Find vores support-sider på hjemmesiden: www.TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakt din salgsrepræsentant eller forhandler.

Hvis du har spørgsmål angående dit produkt, så kontakt din lokale Tobii Dynavox-forhandler eller salgsrepræsentant for hjælp. De kender din personlige opsætning bedst og kan bedst hjælpe dig med tips og produkttræning. For kontaktoplysninger, besøg da www.TobiiDynavox.com/contact