

## Tobii Dynavox Snap Scene

### Guide de démarrage rapide

#### Pathways

Téléchargez l'application Tobii Dynavox Pathways sur votre iPad pour voir des vidéos et lire des articles à propos des méthodes mises au point par les experts pour vous servir de Snap Scene avec votre enfant. Pathways vous aidera à élaborer des stratégies efficaces pour améliorer significativement ses facultés de langage et de communication. Vous pouvez également visionner des vidéos d'aide à l'utilisation de Pathways sur [myTobiiDynavox.com](http://myTobiiDynavox.com)

#### Mode lecture

Snap Scene inclut deux modes : Le **mode Lecture**, dans lequel l'enfant peut choisir des scènes à partir de la barre de navigation et interagir avec ces scènes, et le **mode Créer**, dans lequel le soignant peut créer, modifier et organiser ses propres scènes. En mode lecture, quand l'enfant sélectionne une zone interactive que l'on appelle point chaud, il entend un enregistrement audio et peut voir une étiquette avec du texte qui correspond à ce point chaud. Les interactions possibles avec l'audio et le texte peuvent être personnalisées par le soignant.



La réponse aux interactions est déterminée à la fois par les paramètres activés et par le contenu (enregistrement audio et texte de l'étiquette) associé à chaque point chaud. Le paramètre Afficher et animer l'étiquette du point chaud est désactivé par défaut.

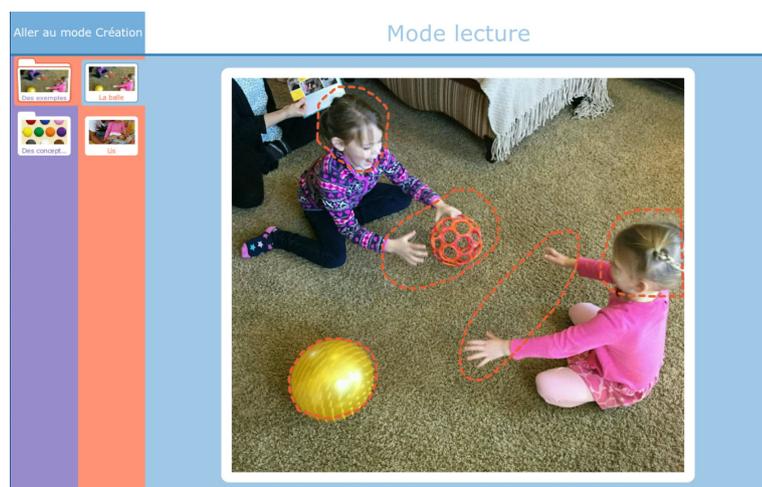


Figure 1 Mode lecture

Pour interagir avec une autre scène, utilisez la barre de navigation sur le côté gauche de l'écran. Sélectionnez une catégorie dans la colonne violette, puis choisissez une scène dans la colonne rose. Si nécessaire, faites glisser vers le haut et vers le bas pour faire défiler les colonnes.

Utilisez les contrôles audio de votre équipement et du système d'exploitation de votre appareil pour régler le volume.

#### Assistance pour votre appareil Tobii Dynavox

##### Obtenir de l'aide en ligne

Veillez prendre connaissance de la page d'assistance spécifique de votre produit Tobii Dynavox. Elle contient des informations à jour concernant les éventuels problèmes et les conseils et astuces relatifs à votre produit. Notre page d'assistance en ligne se trouve sur : [www.TobiiDynavox.com](http://www.TobiiDynavox.com) ou [www.myTobiiDynavox.com](http://www.myTobiiDynavox.com).

##### Contactez votre représentant commercial ou revendeur

Pour les questions et problèmes concernant votre produit, contactez le représentant commercial Tobii Dynavox ou un revendeur autorisé. C'est lui qui connaît le mieux votre installation personnelle et est par conséquent le mieux à même de vous aider et vous former. Pour obtenir le détail des coordonnées, allez sur [www.TobiiDynavox.com/contact](http://www.TobiiDynavox.com/contact)

## Créer une nouvelle scène

1. Passer au **Mode créer**.
2. Sélectionnez le dossier de la catégorie dans lequel vous souhaitez créer votre nouvelle scène.



Figure 2 Sélectionner une catégorie

3. Sélectionnez le bouton nouvelle scène (+). Le mode Photo va s'ouvrir.

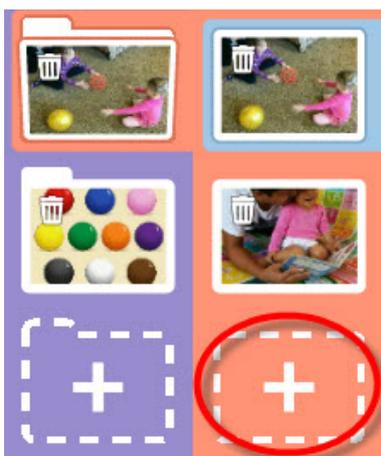


Figure 3 Bouton nouvelle scène

4. Ajoutez une photo à votre scène en prenant une nouvelle photo ou en sélectionnant un fichier image en stockage local sur votre appareil :

### Assistance pour votre appareil Tobii Dynavox

#### Obtenir de l'aide en ligne

Veuillez prendre connaissance de la page d'assistance spécifique de votre produit Tobii Dynavox. Elle contient des informations à jour concernant les éventuels problèmes et les conseils et astuces relatifs à votre produit. Notre page d'assistance en ligne se trouve sur : [www.TobiiDynavox.com](http://www.TobiiDynavox.com) ou [www.myTobiiDynavox.com](http://www.myTobiiDynavox.com).

#### Contactez votre représentant commercial ou revendeur

Pour les questions et problèmes concernant votre produit, contactez le représentant commercial Tobii Dynavox ou un revendeur autorisé. C'est lui qui connaît le mieux votre installation personnelle et est par conséquent le mieux à même de vous aider et vous former. Pour obtenir le détail des coordonnées, allez sur [www.TobiiDynavox.com/contact](http://www.TobiiDynavox.com/contact)

- a. **Prendre une photo** — Prenez une photo avec l'appareil photo actuellement sélectionné. Le viseur à l'écran affiche l'image qui sera capturée lorsque vous sélectionnez cette option.



Figure 4 Mode photo — Prendre une photo

- b. **Passer à l'autre appareil photo** — Si votre appareil possède un appareil photo à l'avant et à l'arrière, vous pouvez utiliser le bouton **Passer à l'autre appareil photo** pour passer de l'un à l'autre. Lorsque vous avez obtenu la vue désirée par l'intermédiaire du viseur sur votre écran, sélectionnez le bouton **Prendre une photo** pour capturer l'image.



Figure 5 Mode photo — Passer à l'autre appareil photo

## Assistance pour votre appareil Tobii Dynavox

### Obtenir de l'aide en ligne

Veillez prendre connaissance de la page d'assistance spécifique de votre produit Tobii Dynavox. Elle contient des informations à jour concernant les éventuels problèmes et les conseils et astuces relatifs à votre produit. Notre page d'assistance en ligne se trouve sur : [www.TobiiDynavox.com](http://www.TobiiDynavox.com) ou [www.myTobiiDynavox.com](http://www.myTobiiDynavox.com).

### Contactez votre représentant commercial ou revendeur

Pour les questions et problèmes concernant votre produit, contactez le représentant commercial Tobii Dynavox ou un revendeur autorisé. C'est lui qui connaît le mieux votre installation personnelle et est par conséquent le mieux à même de vous aider et vous former. Pour obtenir le détail des coordonnées, allez sur [www.TobiiDynavox.com/contact](http://www.TobiiDynavox.com/contact)

- c. **Choisir une Photo** — Pour choisir un fichier photo en stockage local sur votre appareil, sélectionnez le bouton **Choisir une photo**. Parcourez les fichiers en utilisant la flèche, ou à l'aide du bouton Fichiers.... Sélectionnez le fichier photo désiré, puis sélectionnez le bouton **Sélectionner**.



Figure 6 Mode photo — Choisir une photo

- d. Si vous souhaitez quitter le mode photo sans créer de nouvelle scène, sélectionnez **Quitter le mode photo**.



## Assistance pour votre appareil Tobii Dynavox

### Obtenir de l'aide en ligne

Veuillez prendre connaissance de la page d'assistance spécifique de votre produit Tobii Dynavox. Elle contient des informations à jour concernant les éventuels problèmes et les conseils et astuces relatifs à votre produit. Notre page d'assistance en ligne se trouve sur : [www.TobiiDynavox.com](http://www.TobiiDynavox.com) ou [www.myTobiiDynavox.com](http://www.myTobiiDynavox.com).

### Contactez votre représentant commercial ou revendeur

Pour les questions et problèmes concernant votre produit, contactez le représentant commercial Tobii Dynavox ou un revendeur autorisé. C'est lui qui connaît le mieux votre installation personnelle et est par conséquent le mieux à même de vous aider et vous former. Pour obtenir le détail des coordonnées, allez sur [www.TobiiDynavox.com/contact](http://www.TobiiDynavox.com/contact)

- Utilisez le curseur en bas de la photo afin de dimensionner l'image à la taille souhaitée. Faites glisser le curseur vers **+** pour agrandir l'image, et vers **—** pour réduire.

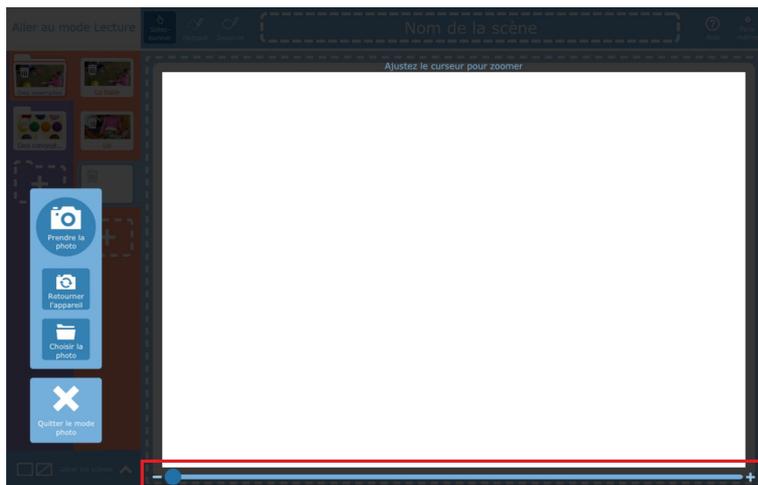


Figure 7 Mode photo — Outil de dimension

- Tirez l'image pour la centrer.
- Lorsque vous avez obtenu la taille souhaitée et avez centré la photo, sélectionnez **Accepter** pour enregistrer. Pour prendre la photo une nouvelle fois ou choisir un autre fichier image, sélectionnez **Prendre à nouveau** ou **Retour**. Pour quitter l'écran photo sans enregistrer, sélectionnez **Quitter le mode photo**.

## Modifier une scène

- Passer au **Mode créer**. 
- Sélectionnez la scène que vous souhaitez modifier.
- (Optionnel) Ajoutez ou modifiez le nom de la scène en sélectionnant, puis en tapant le nom dans le champ texte en haut de l'écran.



Figure 8 Barre d'outils du mode Créer

- Utilisez les outils de la barre pour modifier votre scène.

## Outils de la scène

Modifiez votre scène grâce aux outils de la barre d'outils : Sélectionner, Point chaud, et Dessiner.

### .1 Sélectionner un point chaud

Utilisez l'**outil Sélectionner** pour sélectionner un point chaud existant.



## Assistance pour votre appareil Tobii Dynavox

Obtenir de l'aide en ligne

Veuillez prendre connaissance de la page d'assistance spécifique de votre produit Tobii Dynavox. Elle contient des informations à jour concernant les éventuels problèmes et les conseils et astuces relatifs à votre produit. Notre page d'assistance en ligne se trouve sur : [www.TobiiDynavox.com](http://www.TobiiDynavox.com) ou [www.myTobiiDynavox.com](http://www.myTobiiDynavox.com).

Contactez votre représentant commercial ou revendeur

Pour les questions et problèmes concernant votre produit, contactez le représentant commercial Tobii Dynavox ou un revendeur autorisé. C'est lui qui connaît le mieux votre installation personnelle et est par conséquent le mieux à même de vous aider et vous former. Pour obtenir le détail des coordonnées, allez sur [www.TobiiDynavox.com/contact](http://www.TobiiDynavox.com/contact)

## .2 Créer et modifier un point chaud

Créez un nouveau point chaud à l'aide de l'**outil Point chaud** afin de définir les contours d'un objet ou d'une zone dans la scène. Un point chaud est une zone dans une scène qui, lorsqu'on la sélectionne peut lire un enregistrement audio et afficher une étiquette comprenant du texte.



Une fois le point chaud créé (ou que vous avez sélectionné un point chaud existant), vous pourrez y associer une étiquette, effectuer un enregistrement audio, ou supprimer le point chaud.


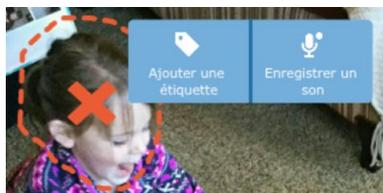


Figure 9 Options du point chaud

### .2.1 Ajouter une étiquette pour le point chaud

1. Sélectionnez **Ajouter une étiquette**.
2. Sélectionnez le champ texte, puis saisissez le texte de l'étiquette.

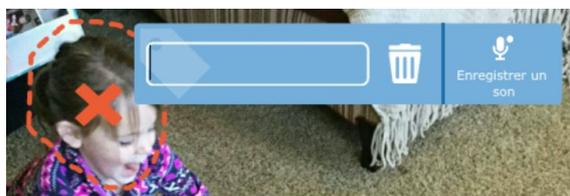

### .2.2 Enregistrement sonore pour le point chaud

1. Sélectionnez **Enregistrer un son**. L'enregistrement commencera aussitôt (comme le signal le cercle rouge clignotant).

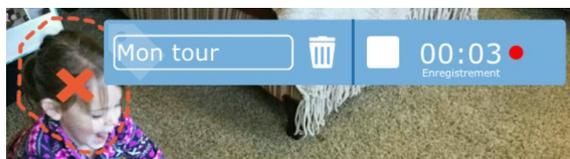


Figure 10 Enregistrer un son

2. Une fois l'enregistrement terminé, sélectionnez le bouton carré pour arrêter l'enregistrement.
3. Pour entendre le son enregistré, sélectionnez le bouton en forme de triangle (le bouton lecture).

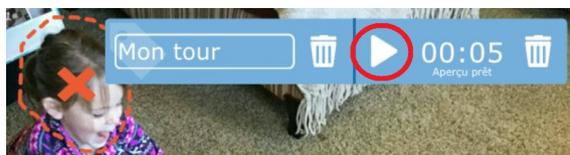


Figure 11 Aperçu du son

## Assistance pour votre appareil Tobii Dynavox

Obtenir de l'aide en ligne

Veuillez prendre connaissance de la page d'assistance spécifique de votre produit Tobii Dynavox. Elle contient des informations à jour concernant les éventuels problèmes et les conseils et astuces relatifs à votre produit. Notre page d'assistance en ligne se trouve sur : [www.TobiiDynavox.com](http://www.TobiiDynavox.com) ou [www.myTobiiDynavox.com](http://www.myTobiiDynavox.com).

Contactez votre représentant commercial ou revendeur

Pour les questions et problèmes concernant votre produit, contactez le représentant commercial Tobii Dynavox ou un revendeur autorisé. C'est lui qui connaît le mieux votre installation personnelle et est par conséquent le mieux à même de vous aider et vous former. Pour obtenir le détail des coordonnées, allez sur [www.TobiiDynavox.com/contact](http://www.TobiiDynavox.com/contact)

- i** Si vous souhaitez réaliser un nouvel enregistrement pour un point chaud auquel un son est déjà associé, sélectionnez l'icône de la corbeille **Supprimer** pour supprimer le son existant, puis sélectionnez **Enregistrer un son** pour créer un nouvel enregistrement.


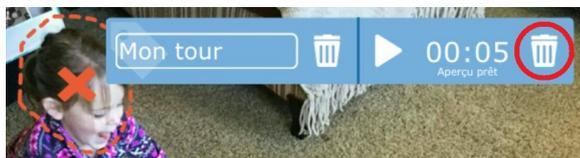


Figure 12 Supprimer un son

## .2.3 Supprimer un point chaud

1. Utilisez l'**outil Sélectionner** pour sélectionner un point chaud.
2. Sélectionner le **X** rouge pour supprimer le point chaud.

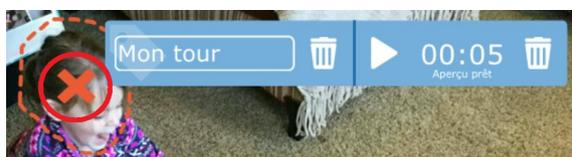

## .3 Dessiner

Utilisez l'**outil Dessiner** pour créer des lignes à main levée n'importe où sur la scène.



Figure 13 Outil Dessiner

- Vous pouvez sélectionner une **couleur de ligne** au sein d'une palette de six couleurs.
- Sélectionnez l'une des deux options d'**épaisseur de ligne**.
- L'outil **Gommer** sert à supprimer des parties de votre dessin de manière contrôlée.

## Assistance pour votre appareil Tobii Dynavox

Obtenir de l'aide en ligne

Veuillez prendre connaissance de la page d'assistance spécifique de votre produit Tobii Dynavox. Elle contient des informations à jour concernant les éventuels problèmes et les conseils et astuces relatifs à votre produit. Notre page d'assistance en ligne se trouve sur : [www.TobiiDynavox.com](http://www.TobiiDynavox.com) ou [www.myTobiiDynavox.com](http://www.myTobiiDynavox.com).

Contactez votre représentant commercial ou revendeur

Pour les questions et problèmes concernant votre produit, contactez le représentant commercial Tobii Dynavox ou un revendeur autorisé. C'est lui qui connaît le mieux votre installation personnelle et est par conséquent le mieux à même de vous aider et vous former. Pour obtenir le détail des coordonnées, allez sur [www.TobiiDynavox.com/contact](http://www.TobiiDynavox.com/contact)

- Le bouton **Effacer** supprime toutes les lignes dessinées de votre scène.

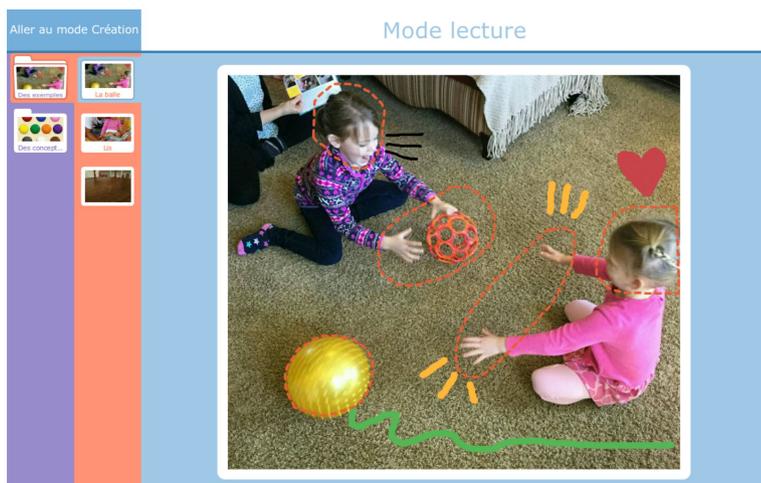


Figure 14 Scène avec dessins

## Assistance pour votre appareil Tobii Dynavox

### Obtenir de l'aide en ligne

Veuillez prendre connaissance de la page d'assistance spécifique de votre produit Tobii Dynavox. Elle contient des informations à jour concernant les éventuels problèmes et les conseils et astuces relatifs à votre produit. Notre page d'assistance en ligne se trouve sur : [www.TobiiDynavox.com](http://www.TobiiDynavox.com) ou [www.myTobiiDynavox.com](http://www.myTobiiDynavox.com).

### Contactez votre représentant commercial ou revendeur

Pour les questions et problèmes concernant votre produit, contactez le représentant commercial Tobii Dynavox ou un revendeur autorisé. C'est lui qui connaît le mieux votre installation personnelle et est par conséquent le mieux à même de vous aider et vous former. Pour obtenir le détail des coordonnées, allez sur [www.TobiiDynavox.com/contact](http://www.TobiiDynavox.com/contact)