

Tobii Dynavox T7 Hurtigstartguide

Velkommen til Tobii Dynavox T7 Hurtigstartguide! Dette dokumentet vil gi en introduksjon til din nye kommunikasjonsløsning – hvor du finner ting og hva du kan forvente når du slår på din T7. Vi gratulerer deg med å ha valgt kompromissløs supplerende kommunikasjon og ønsker deg mye moro mens du utforsker din T7.

Maskinvareoversikt

1. **Ladeindikator:** Oransje når batteriet lades. Blir blå når batteriet er fulladet.
2. **Lyssensor:** Justerer skjermens lysstyrke i henhold til omgivelsesbelysningen.
3. **Kamera foran:** Tar bilder av objekter foran skjermen (f.eks. selvportretter).
4. **Volumbryter:** Trykk på + på bryteren for å øke volumet. Trykk på - på bryteren for å senke volumet.
5. **Høytalere:** Doble høyttalere gir volumbredde.
6. **Kamera bak:** Brukes til å ta egendefinerte bilder.
7. **Infrarødt vindu bak:** Send infrarøde signaler.
8. **Reimfeste:** Festepunkt for stroppen.
9. **Ladeport:** Sett inn adapteren/laderen for å lade batteriet.
10. **Mikro-USB-port:** Koble til en mikro-til-vanlig USB-kabel.
11. **Inntak for høyttaler / hodetelefoner / ekstern mikrofon:** Koble til en ekstern høyttaler, hodetelefoner eller en ekstern mikrofon.
12. **Strømknapp:** Trykk og hold til startbildet vises for å skru på enheten. Trykk og slipp for å sette enheten i hvilemodus. Trykk og hold til avslutningsmenyen vises for å skru av.
13. **Innebygget mikrofon:** Ta opp tale og egendefinerte lyder.



Støtte for Tobii Dynavox-enheten

Få hjelp via Internett

Besøke den produktspesifikke støttesiden for Tobii Dynavox-enheten din. Den inneholder oppdatert informasjon om problemer og tips og triks for produktet. Finn støttesidene dine på: www.TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakt salgsrepresentanten eller forhandleren din

For spørsmål angående produktet, kontakt din Tobii Dynavox-representant eller autoriserte forhandler for hjelp. De er kjent med personlige oppsett og er de som best kan hjelpe deg med tips og produktopplæring. For kontakthinformatjon se www.TobiiDynavox.com/contact

Batterier lades

Sett laderen som fulgte med T7 inn i en stikkontakt. Koble laderen til ladeporten (9) på enheten. Ladeindikatoren (1) lyser oransje når enheten lader og vil bli blå når batteriet er fullt.

Når enheten er fulladet, kobler du fra laderen og lyset slås automatisk av.


Første oppstart

Ikke bruk denne teknologien før og usikker på hvor du skal begynne? Nå trenger du ikke gjette deg frem. Første gang du skruer på enheten, er det bare å finne og velge Compass-ikonet på skrivebordet. Derfra tar vi over.



Oversikt over tilpasningsveiviseren

Bruk **tilpasningsveiviseren** for å tilpasse enheten til dine behov. Bare velg **Start tilpasningsveivisere** og deretter **Veiviser for nytt sidesett** (for nye brukere) eller **Velg et sidesett** (for mer erfarne brukere). Du kan også bruke din egen Compass-sikkerhetskopi ved å gjenopprette den fra enten myTobiiDynavox eller fra datamaskinen din.

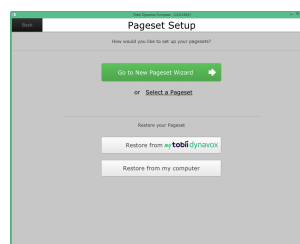

Ressurser

Når du er gjennom tilpasningsveiviseren, er du klar til å sette i gang. Har du fremdeles noe du lurer på? Du finner svarene i hjelperessursene våre.

myTobiiDynavox

Logg på myTobiiDynavox for å få implementeringsstøtte og verktøy, finne ressurser for teknisk support, og å laste opp, laste ned og dele kommunikasjonssider. Gå til www.myTobiiDynavox.com for å sette i gang. Klikk på **Registrer** og registrer din nye Device!

Kunnskapsbase og hjelp

Du har tilgang til kunnskapsbasen og hjelpevideoer døgnet rundt. Det er bare å velge knappen **Innstillinger** og velge **Hjelp** i menyen.

Teknisk support Gå til **www.mytobiidynavox.com > Community & Support > mytobiidynavox Community**

Gå til online-biblioteket for å få tilgang til artikler i kunnskapsbasen, finne produkttips, og utføre spesialsøk, eller besøk **Community Q&A**-delen. Eller - hvis du har problemer med din Device, kan du her sette i gang reparasjonsprosessen ved å åpne en ny sak.

Før du kontakter Support, må du ha klart ditt Device-serienummer. Det befinner seg på undersiden av Device og under **Innstillinger > Hjelp > Om Mitt Device**-serienummer er: _____.



Annen viktig informasjon om Device, inkludert tiltenkt bruk og informasjon om opphavsrett, finner du i T-Series bruker-manual. Få mer informasjon ved å gå til **Innstillinger > Hjelp**.

Støtte for Tobii Dynavox-enheten

Få hjelp via Internett

Besøk den produktspesifikke støttesiden for Tobii Dynavox-enheten din. Den inneholder oppdatert informasjon om problemer og tips og triks for produktet. Finn støttesidene dine på: www.TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakt salgsrepresentanten eller forhandleren din

For spørsmål angående produktet, kontakt din Tobii Dynavox-representant eller autoriserte forhandler for hjelp. De er kjent med personlige oppsett og er de som best kan hjelpe deg med tips og produktopplæring. For kontaktinformasjon se www.TobiiDynavox.com/contact