

Tobii Dynavox Virtual Remote

Brugervejledning



Brugervejledning Tobii Dynavox Virtual Remote

Version 1.1

06/2017

Alle rettigheder forbeholdes.

Copyright © Tobii AB (publ)

Ingen del af denne vejledning må gengives, gemmes i en database eller overføres i nogen form eller på nogen måde (ad elektronisk, fotokopiering, optagelsesteknisk eller anden vej), uden forudgående skriftlig tilladelse fra udgiveren.

Den angivne ophavsret inkluderer ethvert format og alle dele af det ophavsretligt beskyttede materiale og informationer, som måtte være tilladt under nuværende gældende lov eller herefter vedtaget, inklusiv, men ikke begrænset til, materialer, der er skabt fra softwareprogrammerne, som vises på skærmen, så som skærmopsætningen, menuer, osv.

Oplysningerne i dette dokument tilhører Tobii Dynavox. Gengivelse af hele eller dele af indholdet er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Tobii Dynavox.

Produkter, der henvises til i dette dokument, kan enten være varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Forlaget og forfatteren gør ikke krav på disse varemærker.

Selvom alle forhåndsregler er truffet i udarbejdelsen af dette dokument, påtager forlaget og forfatteren sig intet ansvar for fejl og mangler og ej heller for skader, der måtte opstå som følge af anvendelsen af oplysningerne i dette dokument eller brugen af eventuelt medfølgende programmer og kildekode. Forlaget og forfatteren kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlige for tab af fortjeneste eller anden erhvervsmæssig skade, der direkte eller indirekte er opstået som følge af, eller som påstås at være opstået som følge af, indholdet i dette dokument.

Ret til ændring af indholdet uden forudgående varsel forbeholdes.

Besøg Tobii Dynavoxs hjemmeside www.TobiiDynavox.com for at se, om der findes en opdateret udgave af dette dokument.

Indholdsfortegnelse

1	Om Tobii Dynavox Virtual Remote	4
1.1	Tilsluttet brug.....	4
1.2	Systemkrav.....	4
2	Installer og opstart.....	5
2.1	Installation af Tobii Dynavox Virtual Remote.....	5
2.2	Opstart af Tobii Dynavox Virtual Remote.....	5
3	Virtual Remote Overblik.....	6
3.1	Menuen til Virtual Remote.....	6
3.2	Den aktive fjernbetjening	7
3.3	Knapperne.....	7
4	Sådan bruges Tobii Dynavox Virtual Remote	9
4.1	Første opstart	9
4.2	Skift aktiv fjernbetjening.....	9
4.3	Sådan bruges knapperne på fjernbetjeningen.....	9
4.4	Tilføj fjernbetjening	10
4.4.1	Tilføj forudprogrammeret fjernbetjening	10
4.4.2	Tilføj fjernbetjening uden programmering	14
4.5	Redigeringstilstand	17
4.5.1	Ændring af fjernbetjeningens navn	17
4.5.2	Sletning af fjernbetjening.....	18
4.5.3	Ændring af aktuel aktiv knap	19
4.5.4	Ændring af en eksisterende knap uden programmering.....	22
4.5.5	Tilføjelse af ny knap i et tomt felt	24
4.6	Information	25

1 Om Tobii Dynavox Virtual Remote

1.1 Tilsigtet brug

Tobii Dynavox Virtual Remote lader dig kontrollere dine omgivelser uden brug af dine hænder! Du kan kontrollere alt. Fra TV-apparater, Apple TV-enheder, IR-legetøj og stereosystemer, til vinduer, persienner og døre!

Tobii Dynavox Virtual Remote Kræver kompatibel IR-hardware. For flere oplysninger skal du se *1.2 Systemkrav*.

Med Tobii Dynavox Virtual Remote kan du:

- Bruge forudprogrammerede fjernbetjeningssignaler
- Eller programmere dine egne fjernbetjeningssignaler

1.2 Systemkrav

Komponent	Krav
Computer og processor	2.0 gigahertz (GHz) processor eller hurtigere med to kerner (anbefalet minimum)
Hukommelse (RAM)	4 gigabyte (GB) RAM (anbefalet minimum)
Harddisk	450 megabytes (MB) RAM ledig
USB	USB 2.0
Styresystem	Virtual Remote fungerer med 32-bit og 64-bit versioner af Microsoft Windows styresystemet. Hvis du anvender 32-bit versionen af Virtual Remote med en 64-bit version af Windows styresystemet, kører programmet i et 32-bit lag af styresystemet. • Windows 7 (64-bit) • Windows 8.1 (32-bit eller 64-bit) • Windows 10 (32-bit eller 64-bit)
.NET-version	4,5
Eye tracker	Alle versioner af Eye Tracker fra Tobii Dynavox eller Tobii Tech, der understøtter Tobii Eye Tracking Core Software.
Infrarød fjernbetjening	Alle enheder udstyret med en HBR IR-chip som fx: Tobii Dynavox EyeR, Indi, I-Series, eller EyeMobile Plus

2 Installering og opstart

2.1 Installering af Tobii Dynavox Virtual Remote

Hvis Windows Control er installeret på enheden, er Virtual Remote en del af Windows Control softwaren og installeres automatisk, når du installerer Windows Control.

Hvis du skal installere Virtual Remote, kan Virtual Remote hentes fra www.TobiiDynavox.com.

Installeringsguiden installerer de følgende applikationer:

- Tobii Dynavox Virtual Remote


Følg vejledningen på skærmen for at installere Virtual Remote.

2.2 Opstart af Tobii Dynavox Virtual Remote

Sådan starter du Virtual Remote:

- Vælg ikonet  Virtual Remote i Windows,
- eller vælg  Virtual Remote fra Genveje i Windows Control.

3 Virtual Remote Overblik

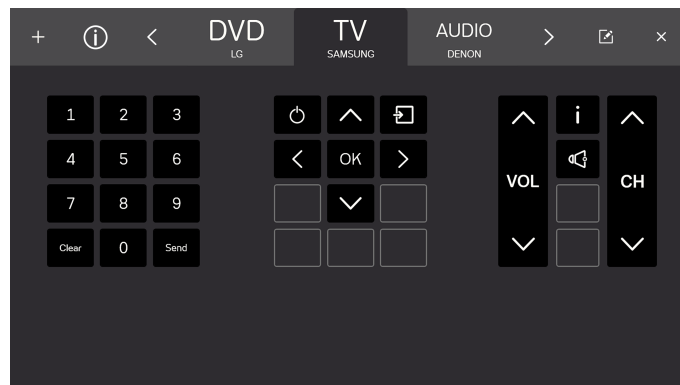

Figur 3.1 Overblik over Virtual Remote

Virtual Remote er opdelt i to områder:

- Menuen til Virtual Remote. Se 3.1 *Menuen til Virtual Remote*, side 6 for flere oplysninger.
- Den aktive fjernbetjening. Se 3.2 *Den aktive fjernbetjening*, side 7 for flere oplysninger.

3.1 Menuen til Virtual Remote




Figur 3.2 Virtual Remote-menuen

Der er følgende ikoner i menuen til Virtual Remote:

Opgaveknop	Handling	Beskrivelse
+	Tilføj fjernbetjening	Vælg punktet for at tilføje en ny fjernbetjening. Se 4.4 <i>Tilføj fjernbetjening</i> , side 10.
i	Information	Vælg punktet for at åbne siden med information. Se 4.6 <i>Information</i> , side 25.
<	Venstre	Vælg punktet for at aktivere fjernbetjeningen, der er til venstre for den aktive fjernbetjening.
>	Højre	Vælg punktet for at aktivere fjernbetjeningen, der er til højre for den aktive fjernbetjening.
	Redigeringstilstand	Vælg punktet for at åbne redigeringstilstanden på den aktive fjernbetjening. Se 4.5 <i>Redigeringstilstand</i> , side 17.
×	Luk/minimér	Vælg punktet for at minimere programmet Virtual Remote.

3.2 Den aktive fjernbetjening

Den aktive fjernbetjening er altid i midten af menuen til Virtual Remote. Se *Figur 3.3 Aktiv fjernbetjening*.

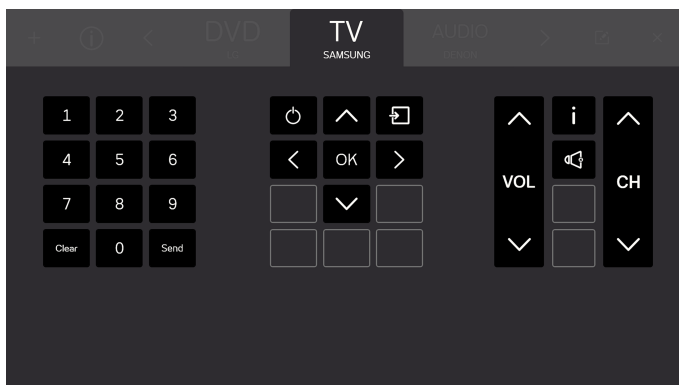


Figur 3.3 Aktiv fjernbetjening



Alle synlige knapper på skærmen vedrører den aktive fjernbetjening.

Du kan også se navnene på op til to (2) yderligere fjernbetjeninger – én på hver side af den aktive fjernbetjening. Du kan kun se navnene på de tilgængelige fjernbetjeninger. Knapperne kan først ses, når du aktiverer fjernbetjeningen.

3.3 Knapperne

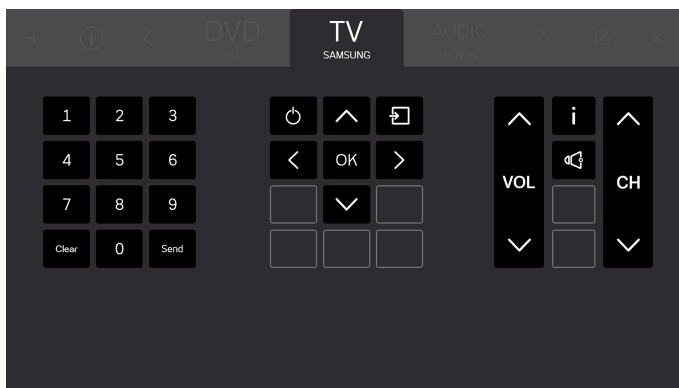


Figur 3.4 Knapperne

Alle synlige knapper på skærmen vedrører den aktive fjernbetjening. Der findes to (2) typer af knapper på fjernbetjeningen.


- Aktiv knap , se *Figur 3.5 Aktive knapper, side 8*
- Inaktive knapper , se *Figur 3.6 Inaktive knapper, side 8*



Antallet af knapper og deres funktioner varierer efter den type af system, som brugeren ønsker at kontrollere.

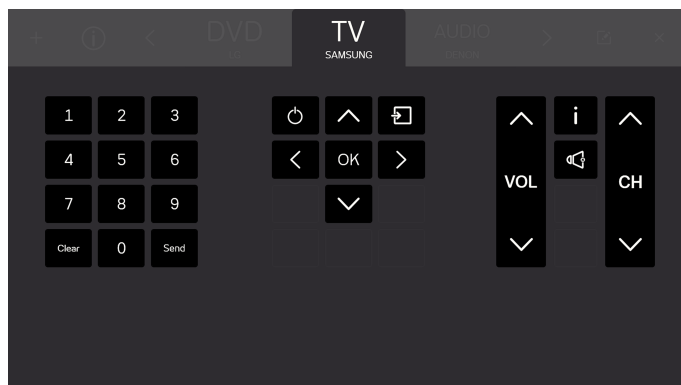

Figur 3.5 Aktive knapper

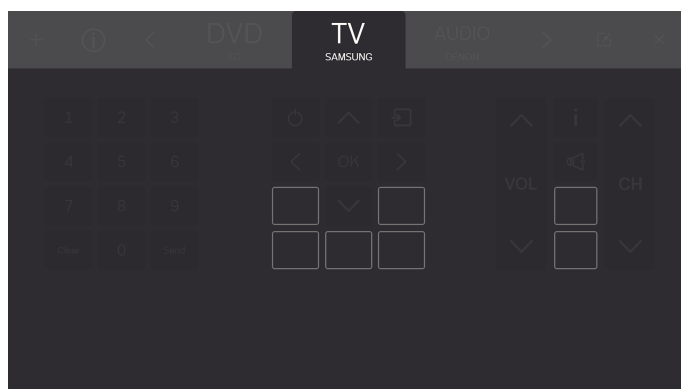

Figur 3.6 Inaktive knapper

4 Sådan bruges Tobii Dynavox Virtual Remote


Tobii Dynavox Virtual Remote lader brugeren kontrollere et TV, DVD-afspiller, stereosystem osv. med enheden.



Alle funktioner i Virtual Remote kan aktiveres med berøring eller med musen, hvilket gør det nemmere for sygeplejersker eller assistenter at hjælpe brugeren, hvis det skulle være nødvendigt.

4.1 Første opstart

En kort vejledning introducerer brugeren til layoutet af softwaren til Virtual Remote. Du skal bare følge vejledningen på skærmen.

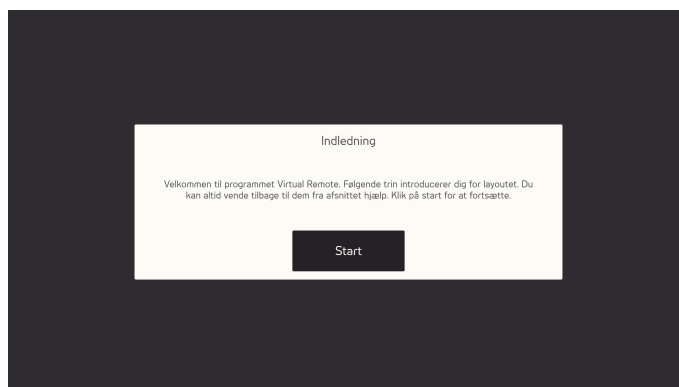

Figur 4.1 Introduktionsskærm til Virtual Remote.

4.2 Skift aktiv fjernbetjening

Sådan skiftes den aktive fjernbetjening:

- Vælg et af navnene til højre eller venstre for den aktive fjernbetjening,
- Eller brug knappen  og  for at rulle gennem de tilgængelige fjernbetjeninger.



Den aktive fjernbetjening er altid i midten af menuen til Virtual Remote.

4.3 Sådan bruges knapperne på fjernbetjeningen


Du skal blot vælge den knap, som du vil bruge, for at sende et signal til enheden. Knapperne til lydstyrke er normalt konfigureret til at sende et kontinuerligt signal, så længe der trykkes på knappen. For flere oplysninger skal du se [4.5.3.1 Signallængde](#), side 20.

Følg denne procedure for at indtaste et tal, der er større end 9 (dvs. flere tal).

Liste med trin til tal større end 9

1. Vælg tallene i den rækkefølge de skal sendes.

Alle valgte tal kan ses i en hvid kasse under talblokken på fjernbetjening.

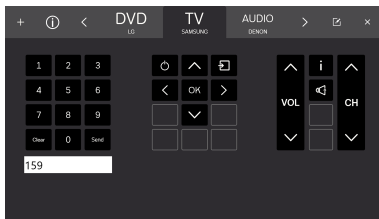

2. Vælg knappen **Send** for at sende signalerne til enheden, eller **Ryd** for at slette alle valgte tal.

4.4 Tilføj fjernbetjening +

En ny fjernbetjening kan tilføjes på to (2) måder.

4.4.1 Tilføj forudprogrammeret fjernbetjening

Følg denne procedure for at tilføje en ny forudprogrammeret fjernbetjening:

Liste med trin til tilføjelse af forudprogrammeret fjernbetjening

1. Vælg + i menuen.
2. Vælg den forudprogrammerede knap




3. Vælg type af forudprogrammeret fjernbetjening
 - TV
 - DVD/BLURAY
 - LYD




4. Vælg mærke på listen



Hvis du ikke kan finde mærket, skal du vælge **Andet**. Se 4.4.1.1 Andre fjernbetjener, side 12 for flere oplysninger

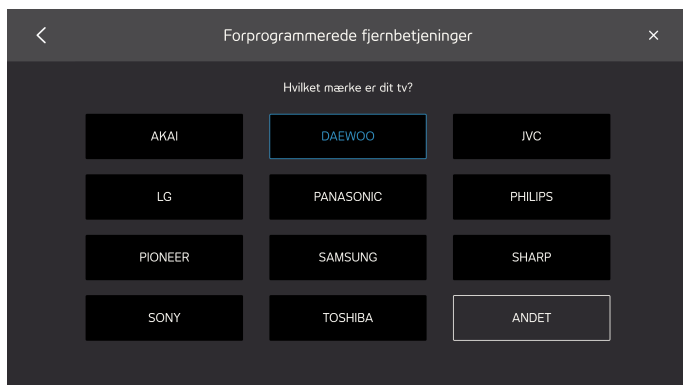


5. Når du har valgt mærke, vises et pop op-vindue med oplysning om antallet af tilgængelige forudprogrammerede fjernbetjener.

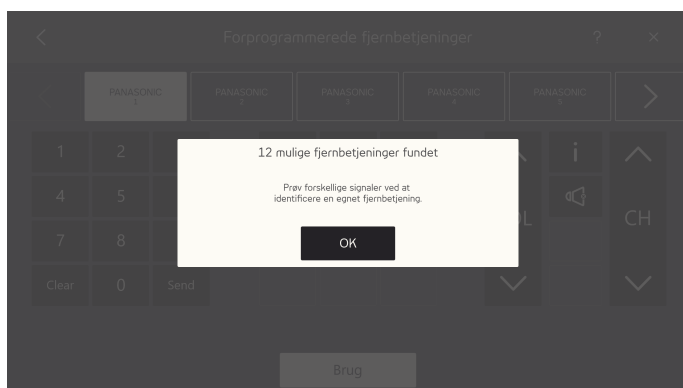

Vælg knappen **OK**.

6. Vælg fjernbetjening.

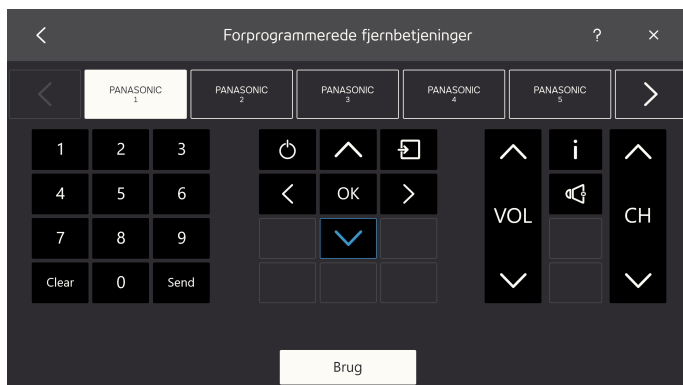


7. Prøv forskellige signaler på den valgte fjernbetjening for at finde en fjernbetjening, der passer.

8. Gentag trin 6-7, indtil du har fundet den fjernbetjening, der passer bedst.




Brug knappen < og > for at rulle gennem de tilgængelige fjernbetjener.

9. Vælg den fjernbetjening, der passer bedst.
10. Vælg knappen **Brug**.

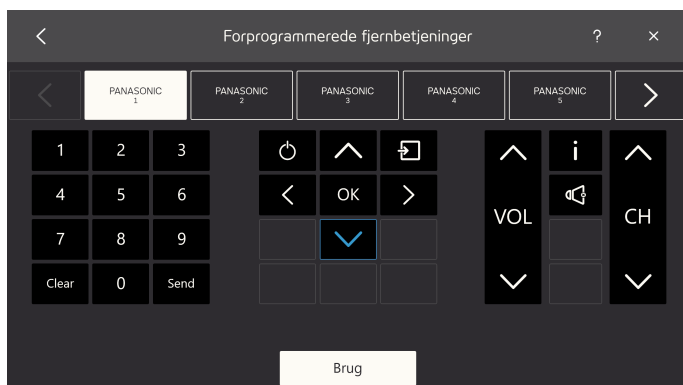

11. Den valgte fjernbetjening kopieres til de tilgængelige fjernbetjeninger.

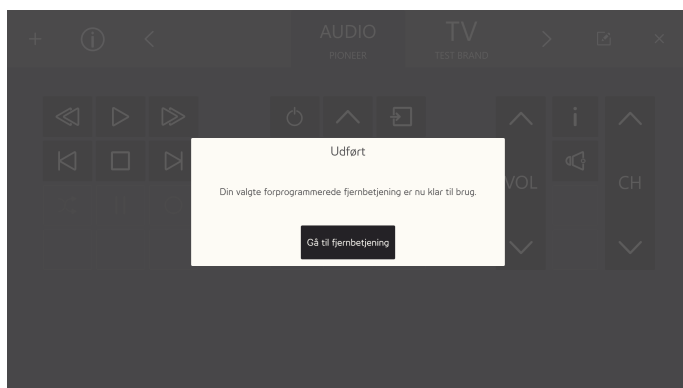


Vælg knappen **Gå til fjernbetjening** for at afslutte.

4.4.1.1 Andre fjernbetjeninger

Følg denne procedure for at tilføje andre fjernbetjeninger:


Liste med trin til tilføjelse af andre fjernbetjeninger

1. Følg trin 1-3 i listen: *Liste med trin til tilføjelse af forudprogrammeret fjernbetjening, side 10.*
2. Vælg knappen **Andet**.
3. Indtast mærkenavnet i tekstfeltet.

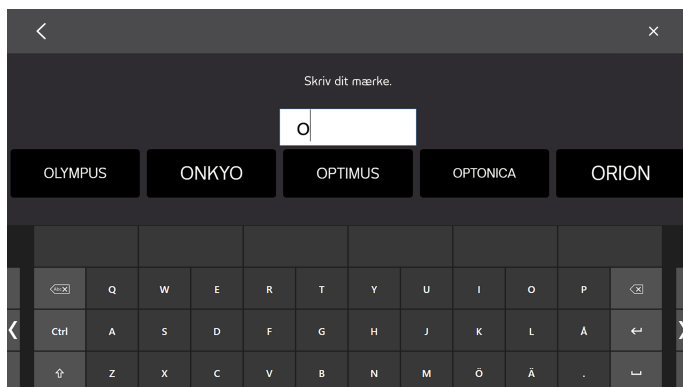





Skriv flere tegn for at indsnævre søgeresultatet.

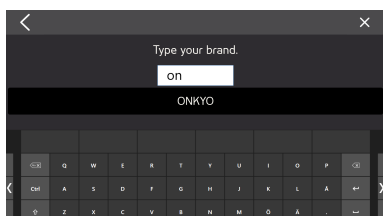

4. Vælg mærke.

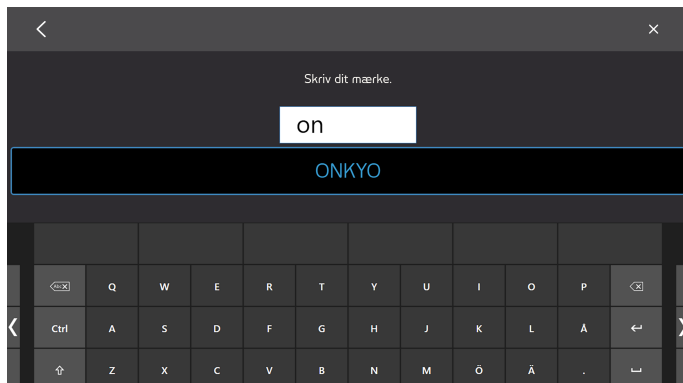

5. Når du har valgt mærke, vises et pop op-vindue med oplysning om antallet af tilgængelige forudprogrammerede fjernbetjener.

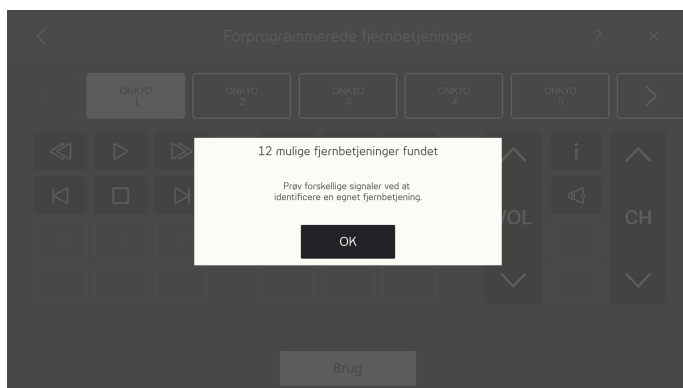

Vælg knappen **OK**.


6. Vælg fjernbetjening.



7. Prøv forskellige signaler på den valgte fjernbetjening for at finde en fjernbetjening, der passer.
8. Gentag trin 6-7, indtil du har fundet den fjernbetjening, der passer bedst.



Brug knappen

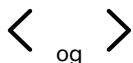


og

for at rulle gennem de tilgængelige fjernbetjening.

9. Vælg den fjernbetjening, der passer bedst.
10. Vælg knappen **Brug**.



11. Den valgte fjernbetjening kopieres til de tilgængelige fjernbetjening.

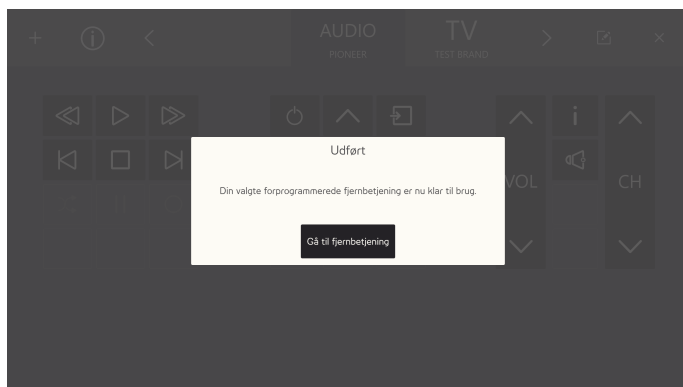

Vælg knappen **Gå til fjernbetjening** for at afslutte.

4.4.2 Tilføj fjernbetjening uden programmering

Følg denne procedure for at tilføje en ny fjernbetjening uden programmering:

Liste med trin til tilføjelse af fjernbetjening uden programmering

1. Vælg  i menuen.

2. Vælg knappen uden programmering




3. Vælg type af fjernbetjening uden programmering

- TV
- LYD
- KABELMODTAGER
- DVD eller BLURAY
- TOM SKABELON




4. Vælg knap, der skal programmeres.

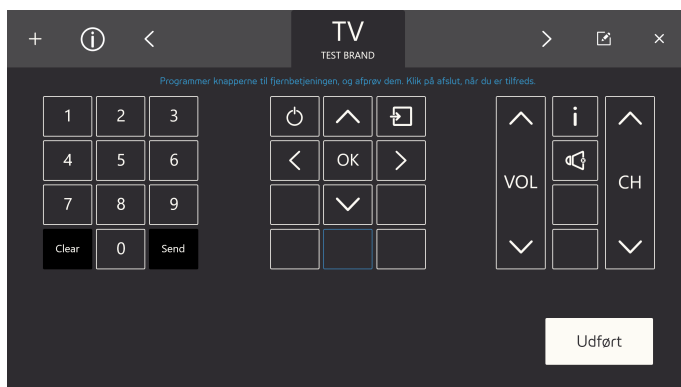


De tilgængelige ikoner varierer efter typen af fjernbetjening, der valgtes i trin 3.

5. Vælg knap, der skal programmeres.

6. Ret fjernbetjeningen mod den infrarøde modtager på din Tobii Dynavox, og tryk på den ønskede knap på fjernbetjeningen, som Virtual Remote skal lære.

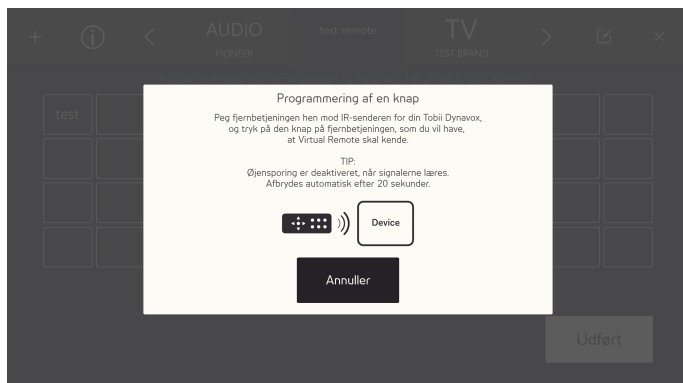

7. Når signalet er gemt i Virtual Remote, vises pop op-billedet **Udført**.

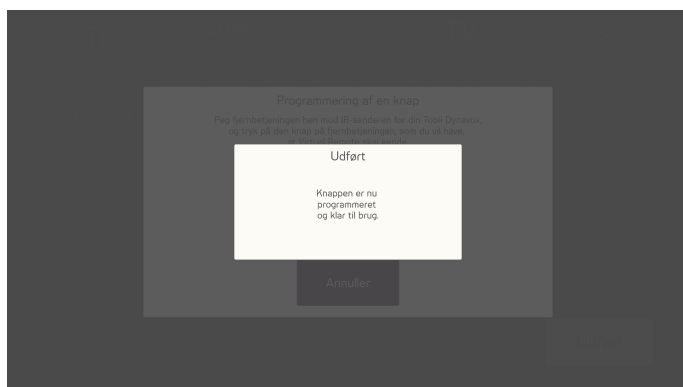

Vinduet lukkes automatisk efter et par sekunder.

8. Gentag trin 5-7, indtil du har programmeret alle nødvendige knapper på fjernbetjeningen.



For at ændre eller slette knapper på fjernbetjeningen skal du afslutte programmeringen og starte redigerings-tilstanden. For flere oplysninger om redigeringstilstanden skal du læse *4.5 Redigeringstilstand*, side 17.

9. Vælg **Udført** for at afslutte.




4.5 Redigeringstilstand



I redigeringstilstanden kan du ændre de eksisterende fjernbetjeninger. Kontrollér, at fjernbetjeningen, der skal ændres, er den aktive fjernbetjening. Følg denne procedure for at starte redigeringstilstanden:

Liste med trin i redigeringstilstand

1. Vælg knappen  (Redigeringstilstand).

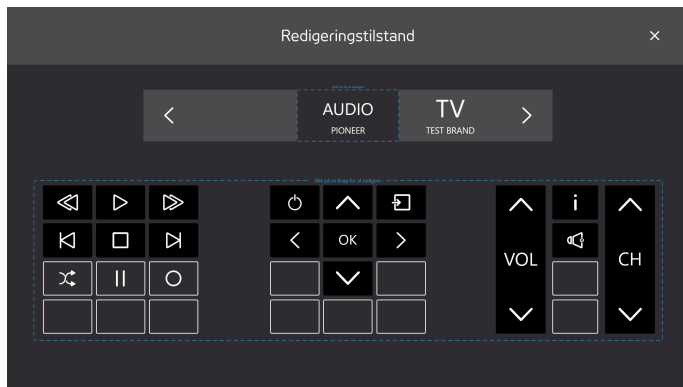


2. Vælg den del af fjernbetjeningen, der skal ændres. Følgende ændringer kan udføres:
 - Ændring af fjernbetjeningens navn, se 4.5.1 Ændring af fjernbetjeningens navn, side 17
 - Sletning af fjernbetjening, se 4.5.2 Sletning af fjernbetjening, side 18
 - Ændring af en aktuel aktiv knap, se 4.5.3 Ændring af aktuel aktiv knap.
 - Ændring af en aktuel knap uden programmering, se 4.5.4 Ændring af en eksisterende knap uden programmering, side 22.
 - Tilføjelse af ny knap i et tomt felt, se 4.5.5 Tilføjelse af ny knap i et tomt felt, side 24

4.5.1 Ændring af fjernbetjeningens navn

Følg denne procedure for at ændre fjernbetjeningens navn:


Ændring af fjernbetjeningens navn

1. Vælg knappen  (Redigeringstilstand).

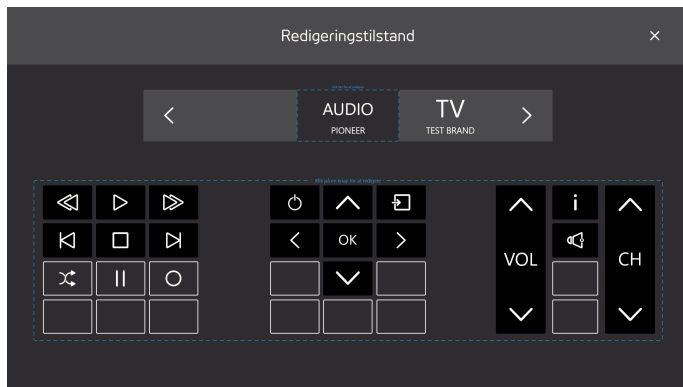

2. Vælg kassen "Vælg her for at ændre", der er rundt om fjernbetjeningens navn.

3. Vælg knappen **Nyt navn**.

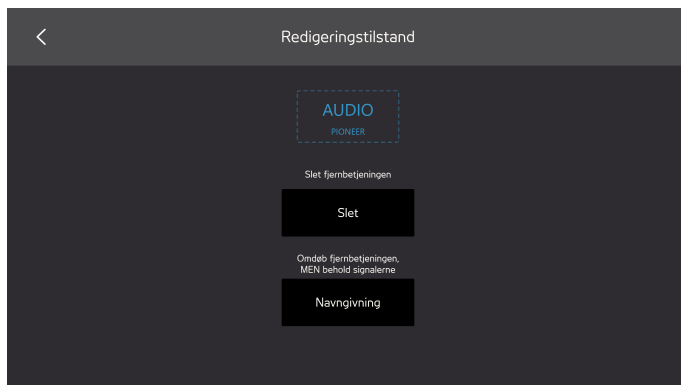

4. Indtast det nye navn.



Navnet skal være kort.



5. Vælg tasten **Enter** på tastaturet for at afslutte navneændringen.

6. Vælg ikonet  for at afslutte redigeringstilstanden.

4.5.2 Sletning af fjernbetjening


Følg denne procedure for at slette en fjernbetjening:

Liste med trin til sletning af fjernbetjening

1. Vælg knappen  (Redigeringstilstand).



2. Vælg kassen "Vælg her for at ændre", der er rundt om fjernbetjeningens navn.
3. Vælg knappen **Slet**.

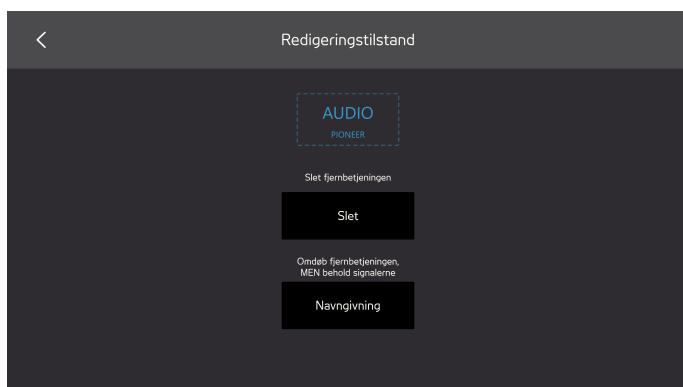

4. Vælg:
 - **Ja** for at slette
 - **Nej** for at fortryde




5. Vælg ikonet  for at afslutte redigeringstilstanden.

4.5.3 Ændring af aktuel aktiv knap


Følg denne procedure for at ændre en aktuel aktiv knap:

Liste med trin til ændring af aktuel aktiv knap

1. Vælg knappen  (Redigeringstilstand).

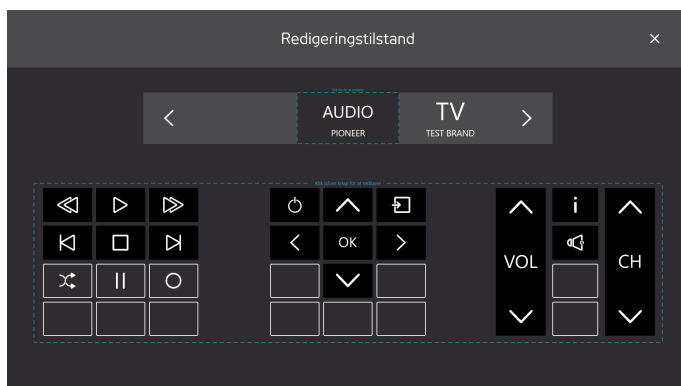

2. Vælg en knap med sort baggrund og ikon eller tekst såsom  "Vælg knap der skal ændres" i kassen rundt om knapperne på fjernbetjeningen.
3. Vælg en af følgende handlinger:
 - Signallængde, se 4.5.3.1 *Signallængde*.
 - Nyt signal, se 4.5.3.2 *Nyt signal, side 21*
 - Ændring af tekst, se 4.5.3.3 *Ændring af tekst, side 22*
 - Ændring af ikon, se 4.5.3.4 *Ændring af ikon, side 22*
 - Ryd knap sletter de gemte oplysninger på knappen.

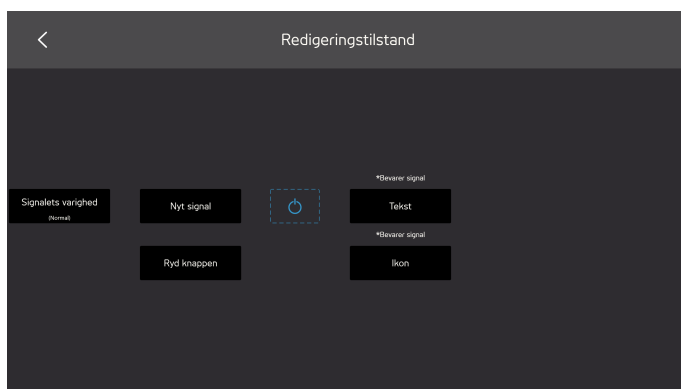

4. Vælg ikonet  for at afslutte redigeringstilstanden.

4.5.3.1 Signallængde


Du skal muligvis ændre signallængden for, at den modtagende enhed kan forstå signalet, der sendes fra Virtual Remote. Signallængden skal også indstilles, hvis knappen skal blive ved med at sende signalet lige så længe, du holder knappen nede.

Vælg en (1) af følgende muligheder:

- Normal – det infrarøde signal sendes i en kort serie.
- Lang – det infrarøde signal sendes i et (1) sekund.
- Ekstra lang – det infrarøde signal sendes i to (2) sekunder.
- Kontinuerligt – signalet sendes lige så længe, knappen holdes nede.



Her er et eksempel på en typisk indstilling af knappen til lydstyrke

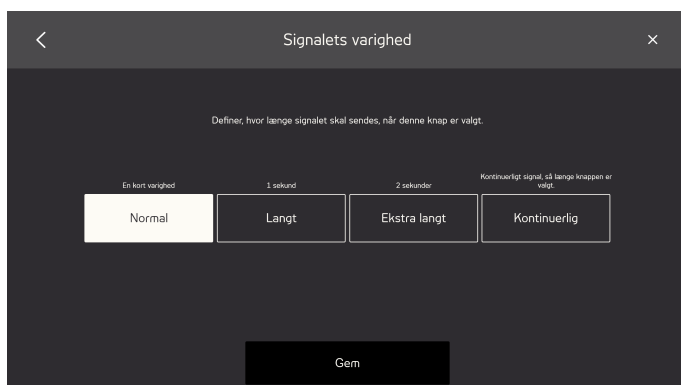


4.5.3.2 Nyt signal


Følg denne procedure for at programmere et nyt signal til en knap:

Liste med trin til nyt signal

1. Ret fjernbetjeningen mod den infrarøde modtager på din Tobii Dynavox, og tryk på den ønskede knap på fjernbetjeningen, som Virtual Remote skal lære.

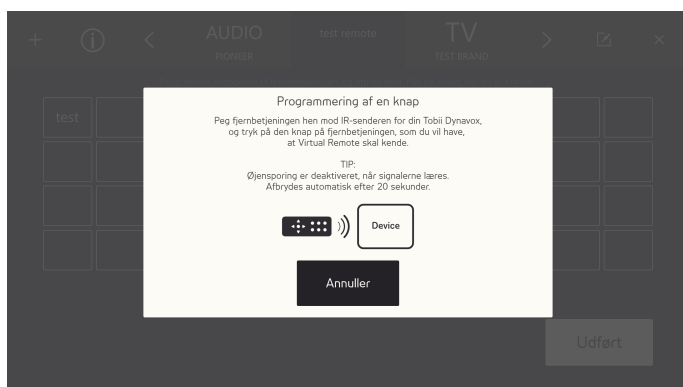

2. Når signalet er gemt i Virtual Remote, vises pop op-billedet **Udført**.

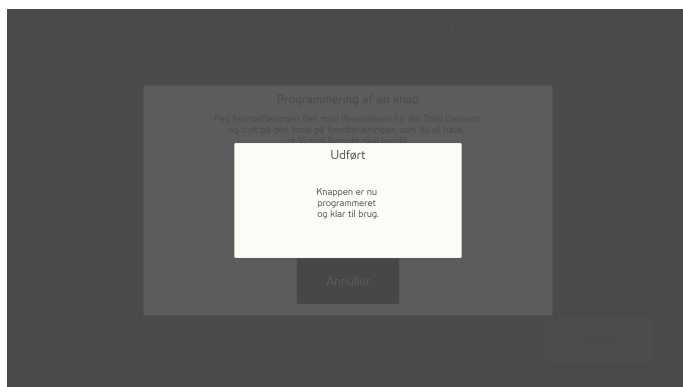


Vinduet lukkes automatisk efter et par sekunder.

4.5.3.3 Ændring af tekst

Følg denne procedure for at ændre tekst:

Liste med trin til ændring af tekst

1. Skriv teksten, der skal bruges til knappen.

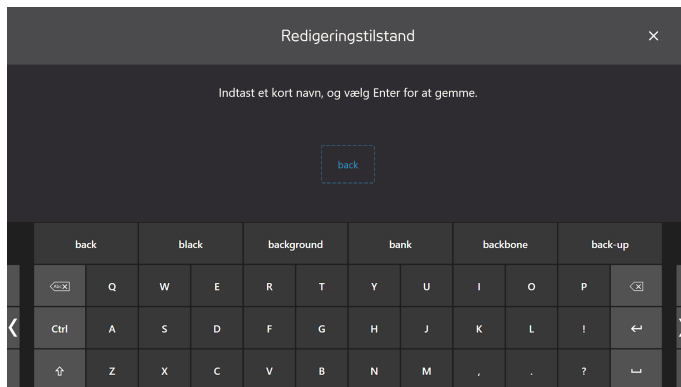


2. Vælg tasten Enter/Return på tastaturet for at godkende teksten.

4.5.3.4 Ændring af ikon

Følg denne procedure for at ændre ikon:

1. Vælg et ikon.

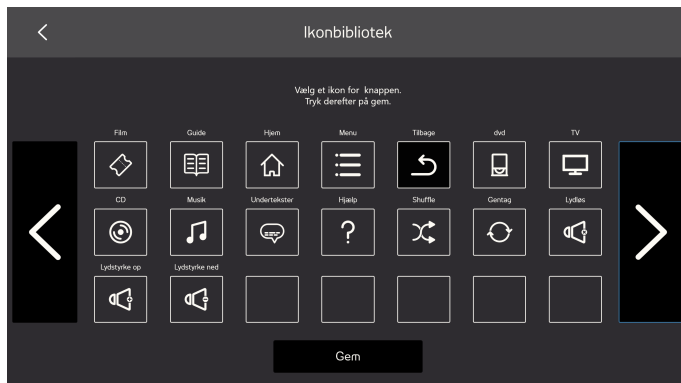


2. Vælg knappen **Gem** for at godkende ikonet.

4.5.4 Ændring af en eksisterende knap uden programmering


Følg denne procedure for at ændre en eksisterende knap uden programmering:

Liste med trin til ændring af en eksisterende knap uden programmering

1. Vælg knappen  (Redigeringstilstand).

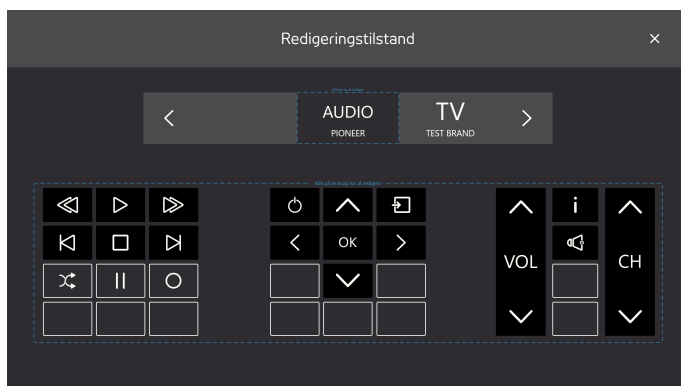

2. Vælg en knap med grå baggrund og ikon eller tekst såsom  "Vælg knap der skal ændres" i kassen rundt om knapperne på fjernbetjeningen.
3. Vælg en af følgende handlinger:
 - Programmering, se 4.5.4.1 *Programmering*, side 23
 - Ændring af tekst, se 4.5.3.3 *Ændring af tekst*, side 22
 - Ændring af ikon, se 4.5.3.4 *Ændring af ikon*, side 22
 - Ryd knap sletter de gemte oplysninger på knappen.

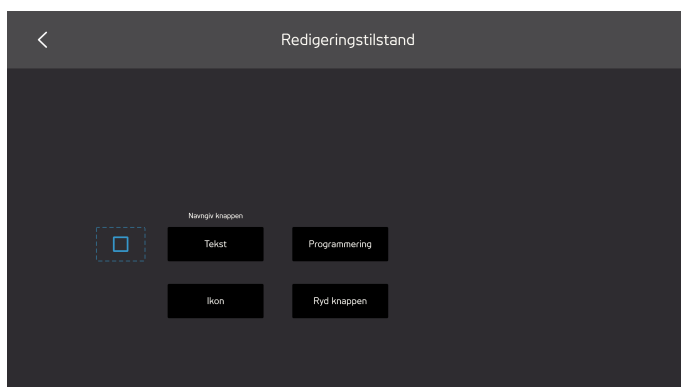


4. Vælg ikonet  for at afslutte redigeringstilstanden.

4.5.4.1 Programmering


Følg denne procedure for at programmere et signal til en knap:

Liste med trin til programmering

1. Ret fjernbetjeningen mod den infrarøde modtager på din Tobii Dynavox, og tryk på den ønskede knap på fjernbetjeningen, som Virtual Remote skal lære.

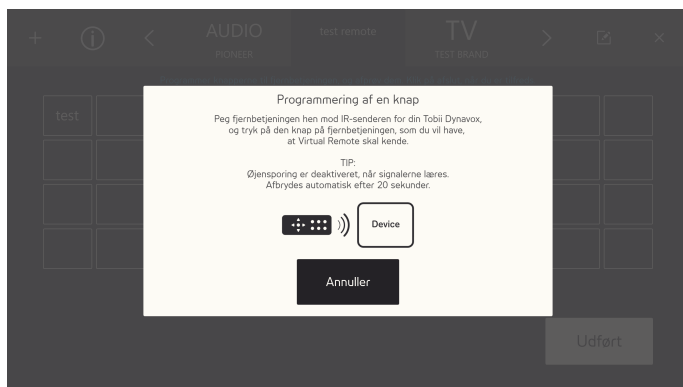

2. Når signalet er gemt i Virtual Remote, vises pop op-billedet **Udført**.

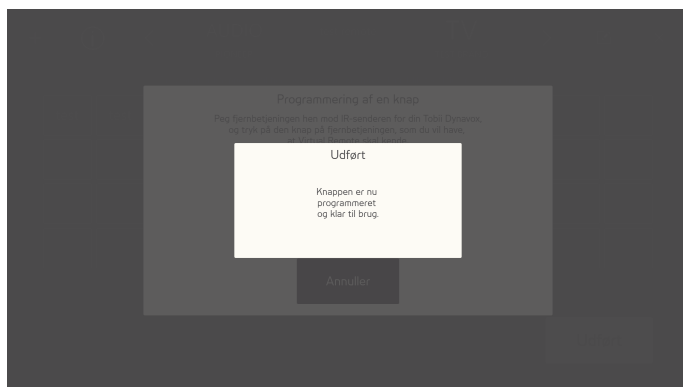

Vinduet lukkes automatisk efter et par sekunder.

4.5.5 Tilføjelse af ny knap i et tomt felt


Følg denne procedure for at tilføje en ny knap i et tomt felt:

Liste med trin til tilføjelse af ny knap i et tomt felt

1. Vælg knappen  (Redigeringstilstand).




2. Vælg en tom knap med grå baggrund såsom  "Vælg knap der skal ændres" i kassen rundt om knapperne på fjernbetjeningen.
3. Vælg en af følgende handlinger:
 - Ændring af tekst, se 4.5.3.3 Ændring af tekst, side 22
 - Ændring af ikon, se 4.5.3.4 Ændring af ikon, side 22

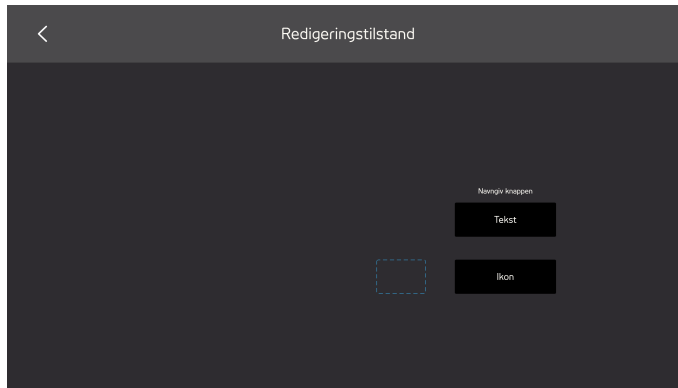

4. Vælg ikonet  for at afslutte redigeringstilstanden.


4.6 Information

På informationssiden finder du alle versionsoplysninger om både hardware og programmer.

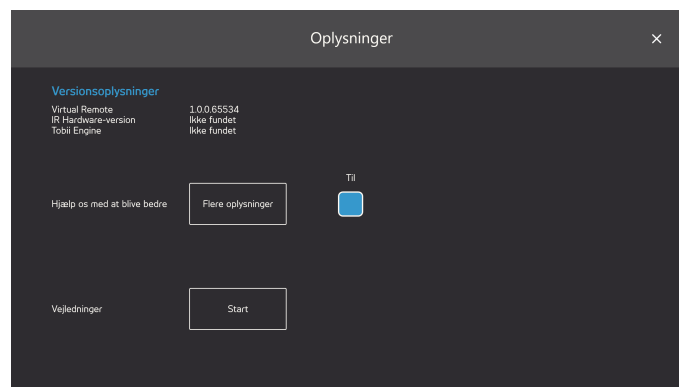

Hjælp os med at blive bedre: For at hjælpe os med at forbedre softwaren på Tobii Dynavox skal du skifte afkrydsningsfeltet

Til/fra til **Til**. Vælg knappen Mere info for at åbne siden med information om programmet. Se *Figur 4.2 Dataindsamling*, side 26 for flere oplysninger.

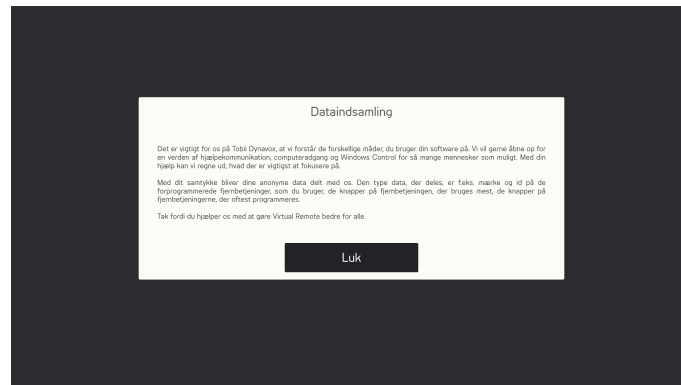

Figur 4.2 Dataindsamling

Vejledninger: Du kan også starte vejledningerne til Virtual Remote ved at vælge knappen **Start**.

Copyright © Tobii AB (offentlig). Illustrationer og specifikationer svarer ikke nødvendigvis til produkter og serviceydelser på de enkelte lokale markeder. Ret til ændring af tekniske specifikationer uden forudgående varsel forbeholdes. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Support til din Tobii Dynavox enhed

Få hjælp på internettet

Se den produkt-specifikke support-side for din Tobii Dynavox enhed. Den indeholder opdaterede information omkring problemstillinger samt tips og tricks angående produktet. Find vores support-sider på hjemmesiden: www.TobiiDynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

Kontakt din salgsrepræsentant eller forhandler.

Hvis du har spørgsmål angående dit produkt, så kontakt din lokale Tobii Dynavox-forhandler eller salgsrepræsentant for hjælp. De kender din personlige opsætning bedst og kan bedst hjælpe dig med tips og produkttræning. For kontaktoplysninger, besøg da www.TobiiDynavox.com/contact