

Tobii Dynavox Windows Control Εγχειρίδιο χρήστη

Συμπεριλαμβάνει **Virtual Remote** 



Εγχειρίδιο χρήσης Tobii Dynavox Windows Control

Έκδοση 1.0.1

05/2017

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Copyright © Tobii AB (publ)

Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή, με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο), χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Οι απαιτήσεις προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων περιλαμβάνουν όλες τις μορφές και τα θέματα πνευματικά κατοχυρωμένου υλικού και πληροφοριών που προβλέπονται από το νόμο ή από δικαστικές αποφάσεις ή από αντίστοιχες εκχωρήσεις, και συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά υλικό που παράγεται από τα προγράμματα λογισμικού, τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη, όπως οθόνες, μενού, κ.λ.π.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο είναι ιδιοκτησία της Tobii Dynavox. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή εν μέρει ή συνολικά, χωρίς την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της Tobii Dynavox απαγορεύεται.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, μπορεί να είναι είτε εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Ο εκδότης και ο συγγραφέας δεν έχει καμία αξίωση σε αυτά τα εμπορικά σήματα.

Παρά το γεγονός ότι έχουν ληφθεί όλα τα προληπτικά μέτρα για την προετοιμασία του παρόντος εγγράφου, ο εκδότης και ο συγγραφέας δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, ή από τη χρήση των προγραμμάτων και του πηγαίου κώδικα που μπορεί να το συνοδεύουν. Σε καμία περίπτωση, ο εκδότης και ο συγγραφέας δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους ή οποιαδήποτε άλλη εμπορική ζημιά που προκλήθηκε ή εικάζεται ότι έχει προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση αυτού του εγγράφου.

Το περιεχόμενο μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

Ελέγξτε τον ιστότοπο της Tobii Dynavox www.TobiiDynavox.com για τις ενημερωμένες εκδόσεις του παρόντος εγγράφου.

Πίνακας περιεχομένων

1	Σχετικά Tobii Dynavox Windows Control.....	5
1.1	Προοριζόμενη χρήση.....	5
1.2	Προδιαγραφές συστήματος	5
2	Εγκατάσταση, έναρξη και χειρισμός άδειας	6
2.1	Εγκατάσταση Tobii Dynavox Windows Control	6
2.2	Χειρισμός άδειας	6
2.2.1	Ενεργοποίηση άδειας	6
2.2.2	Απενεργοποίηση άδειας	7
2.3	Εκκίνηση πρώτη φορά.....	7
3	Η χρήση Tobii Dynavox Windows Control.....	8
3.1	Ο Windows Control Ελεγκτής	8
3.2	Παρακολούθηση κατάστασης	9
3.3	Η Windows Control Γραμμή εργασιών	10
3.4	Εργασία.....	11
3.5	Συμπληρωματικές ενέργειες	12
3.6	Συντομεύσεις	13
3.7	Μέθοδος επιλογής — Με το βλέμμα ή με το διακόπτη.....	15
3.7.1	Αυτοκόλλητες εργασίες & προεπιλογή αριστερού κλικ/πατήματος διακόπτη	15
3.7.2	Ενεργοποίηση εργασίας με πλήκτρο αντί για το διακόπτη	16
3.8	Πληκτρολόγηση με το βλέμμα.....	16
3.8.1	Γραμμή εργασιών πληκτρολογίου	18
3.8.2	Πλήκτρα Γραμμής εργασίας στο πληκτρολόγιο	18
3.8.3	Πρόβλεψη λέξης.....	19
3.9	Windows Control σε συνδυασμό με το εκάστοτε τοπικό πληκτρολόγιο	19
3.10	Eye Detection Indicator	19
4	Windows Control Ρυθμίσεις	21
4.1	Συσκευή παρακολούθησης ματιών	22
4.1.1	Η καρτέλα Βαθμονόμηση	22
4.1.1.1	Δημιουργία νέου προφίλ	22
4.1.1.2	Διαχείριση προφίλ	23
4.1.1.3	Δοκιμαστική βαθμονόμηση.....	23
4.1.1.4	Επανάληψη βαθμονόμησης	23
4.1.1.5	Τύπος βαθμονόμησης.....	24
4.1.2	Η καρτέλα Σύνθετες.....	25
4.1.2.1	Ρύθμιση οθόνης	25
4.2	Γενικές ρυθμίσεις	26
4.2.1	Η καρτέλα Γενικές.....	26
4.2.2	Η καρτέλα Σχετικά	26
4.2.2.1	Κλειδί άδειας	26
4.3	Ενεργοποίηση & Αναφώνηση	27
4.3.1	Η καρτέλα Ενεργοποίηση.....	27
4.3.2	Η καρτέλα Κατάσταση	28
4.4	Γραμμή εργασιών & Πληκτρολόγιο	29
4.4.1	Η καρτέλα μεγέθυνσης.....	29
4.4.2	Η καρτέλα Εργασία.....	29
4.4.2.1	Προβολή συμπληρωματικών εργασιών	30
4.4.2.2	Μεγιστοποίηση αριστερού κλικ	30

4.4.3	Η καρτέλα Γραμμή εργασίας.....	30
4.4.4	Η καρτέλα πληκτρολόγιο.....	31
4.5	Βοήθεια και Χρήση	32
4.5.1	Η καρτέλα Βοήθεια	32
4.5.2	Η καρτέλα Χρήση	33
5	Virtual Remote.....	34
5.1	Virtual Remote Επισκόπηση.....	34
5.1.1	Virtual Remote Μενού.....	34
5.1.2	Το ενεργό τηλεχειριστήριο.....	35
5.1.3	Τα πλήκτρα	35
5.2	Η χρήση Tobii Dynavox Virtual Remote	36
5.2.1	Κατά την πρώτη εκκίνηση	37
5.2.2	Αλλαγή ενεργού τηλεχειριστηρίου	37
5.2.3	Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο.....	37
5.2.4	Προσθήκη τηλεχειριστηρίου	37
5.2.4.1	Προσθήκη ενός ήδη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου	38
5.2.4.2	Προσθήκη ενός μη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου.....	42
5.2.5	Λειτουργία επεξεργασίας	44
5.2.5.1	Αλλαγή ονόματος τηλεχειριστηρίου	45
5.2.5.2	Διαγραφή τηλεχειριστηρίου	46
5.2.5.3	Αλλαγές σε υφιστάμενο ενεργό πλήκτρο.....	47
5.2.5.4	Αλλαγές σε υφιστάμενο μη προγραμματισμένο πλήκτρο	50
5.2.5.5	Προσθήκη νέου πλήκτρου σε ένα άδειο χώρο.....	52
5.2.6	Πληροφορίες	53

1 Σχετικά Tobii Dynavox Windows Control

1.1 Προοριζόμενη χρήση

Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του υπολογιστή σας απλά με τα μάτια σας ή με τα μάτια σας και ένα διακόπτη. Μπορείτε να κάνετε εξομίωση όλων των ενεργειών του ποντικιού, ενεργειών συρσίματος και να πληκτρολογήσετε κείμενο με το βραβευμένο μας λογισμικό. Έχουμε προσθέσει έξυπνες συντομεύσεις για να κάνουμε ευκολότερη την πρόσβαση σε όλα τα τμήματα των Windows!

1.2 Προδιαγραφές συστήματος

Στοιχείο	Προδιαγραφές
Υπολογιστής και επεξεργαστής	Επεξεργαστής 2,0 gigahertz (GHz) ή μεγαλύτερος, διπλού πυρήνα (ελάχιστος προτεινόμενος)
Μνήμη (RAM)	4 gigabyte (GB) RAM (ελάχιστη προτεινόμενη).
Σκληρός δίσκος	Τουλάχιστον 450 megabytes (MB) διαθέσιμα
USB	USB 2.0
Λειτουργικό σύστημα	Windows Control λειτουργεί με λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows 32-bits και 64-bits. Όταν χρησιμοποιείτε την έκδοση Windows Control 32-bit σε λειτουργικό σύστημα Windows 64-bit, το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στο επίπεδο των 32-bit του λειτουργικού συστήματος Windows. • Windows 7 (64-bit) • Windows 8.1 (32-bit or 64-bit) • Windows 10 (32-bit or 64-bit)
.NET version	4,5
Παρακολούθηση ματιών	Οποιαδήποτε συσκευή παρακολούθησης ματιών της Tobii Dynavox ή της Tobii Tech που υποστηρίζει λογισμικό Tobii Eye Tracking Core.
Πρόσθετες απαιτήσεις και εκτιμήσεις	Χρειάζεται σύνδεση στο Internet για την ενεργοποίηση της άδειας
Tobii Eye Tracking Core Software	Έκδοση 2.8 ή μεταγενέστερη
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων	Οποιαδήποτε συσκευή είναι εξοπλισμένη με κύκλωμα υπερύθρων HBR IR όπως οι: Tobii Dynavox EyeR, Indi, I-Series I-110, ή EyeMobile Plus.

2 Εγκατάσταση, έναρξη και χειρισμός άδειας

2.1 Εγκατάσταση Tobii Dynavox Windows Control



Στην περίπτωση που είναι εγκαταστημένο, θα πρέπει να απεγκαταστήσετε το λογισμικό Tobii Gaze Interaction πριν κάνετε εγκατάσταση Windows Control.

Windows Control μπορείτε να το κατεβάσετε από www.TobiiDynavox.com.

Ο οδηγός εγκατάστασης θα εγκαταστήσει τις παρακάτω εφαρμογές:

- Tobii Dynavox Windows Control
- Tobii Dynavox Virtual Remote

Για να εγκαταστήσετε το Windows Control, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

2.2 Χειρισμός άδειας


2.2.1 Ενεργοποίηση άδειας



Το Windows Control μπορεί να λειτουργήσει σε έως και τρεις(3) συσκευές/υπολογιστές ταυτόχρονα με την ίδια άδεια. Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Windows Control σε περισσότερες από τρεις(3) συσκευές/υπολογιστές, το Windows Control πρέπει να απενεργοποιηθεί σε μία (1) από τις άλλες συσκευές/υπολογιστές.

Όταν αγοράζετε Windows Control θα λάβετε ένα Κλειδί ενεργοποίησης λογισμικού για το λογισμικό στο e-mail Επιβεβαίωσης παραγγελίας.

Όταν το Windows Control ξεκινήσει την πρώτη φορά, θα ξεκινήσει το **License Manager**.

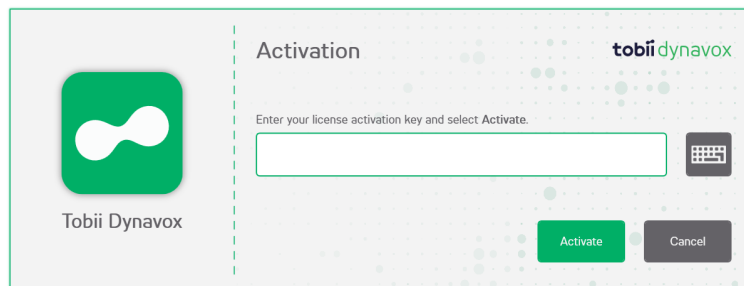


Το πλαίσιο διαλόγου της άδειας θα εμφανίσει το εικονίδιο του λογισμικού της άδειας που διαχειρίζεται.

Το **License Activation Key** είναι στο e-mail Επιβεβαίωσης παραγγελίας.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή/υπολογιστής είναι συνδεδεμένη στο Internet.
2. Εισάγετε το **License activation key**.

- Επιλέξτε το πλήκτρο Ενεργοποίηση .

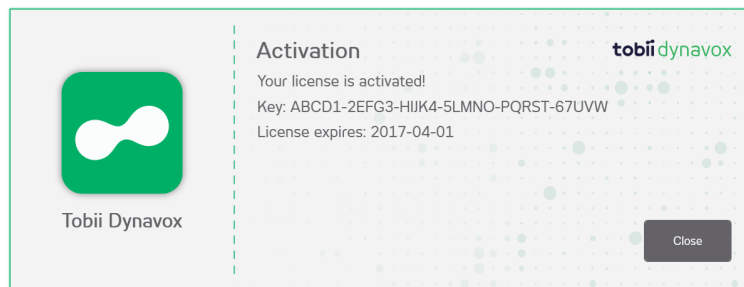

Το πλαίσιο διαλόγου της άδειας θα εμφανίσει το εικονίδιο του λογισμικού της άδειας που διαχειρίζεται.

- Επιλέξτε το πλήκτρο Κλείσιμο .

2.2.2 Απενεργοποίηση άδειας

Για απενεργοποίηση Windows Control, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή/υπολογιστής είναι συνδεδεμένη στο Internet.
- Εκκίνηση Windows Control.
- Επιλέξτε το πλήκτρο  (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ).
- Επιλέξτε το πλήκτρο  (Γενικές Ρυθμίσεις).
- Επιλέξτε την καρτέλα Σχετικά.
- Επιλέξτε το πλήκτρο Κλειδί άδειας .
- Επιλέξτε το πλήκτρο Απενεργοποίηση .



Το πλαίσιο διαλόγου της άδειας θα εμφανίσει το εικονίδιο του λογισμικού της άδειας που διαχειρίζεται.

- Επιλέξτε:
 - Ναι — για να απενεργοποιήσετε την άδεια σε αυτή τη συσκευή.
 - Όχι — για ακύρωση.

2.3 Εκκίνηση πρώτη φορά

Κατά την εκκίνηση Windows Control για πρώτη φορά ο Οδηγός διαμόρφωσης θα καθοδηγήσει το χρήστη ώστε να ολοκληρώσει τη διαμόρφωση του Windows Control. Τα βήματα του οδηγού είναι:

- Ρύθμιση προβολής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.2.1 Ρύθμιση οθόνης, σελίδα 25.
- Δημιουργία νέου προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.1 Δημιουργία νέου προφίλ.
- Δοκιμαστική βαθμονόμηση, Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.3 Δοκιμαστική βαθμονόμηση

3 Η χρήση Tobii Dynavox Windows Control


Tobii Dynavox Windows Control δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να ελέγξει ένα τυπικό λειτουργικό σύστημα Windows επιτραπέζιου υπολογιστή με μία μέθοδο δύο βημάτων ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα ανεπιθύμητων κλικ. Αποτρέπει επίσης την παρακολούθηση του κέρσορα του ποντικιού με το βλέμμα σας αντί να το ελέγχετε (δεν υπάρχει επιπλέοντας κέρσορας ποντικιού Windows Control).

1. Το πρώτο βήμα είναι η επιλογή της εργασίας που επιθυμείτε από την κλειδωμένη Γραμμή Εργασιών, κοιτάζοντας τη.
2. Για το δεύτερο βήμα κοιτάξε στο τμήμα της οθόνης που επιθυμείτε (ή το εικονίδιο στην οθόνη) στο οποίο θέλετε να εκτελέσετε την εργασία. Ενεργοποιείται μία αυτόματη λειτουργία μεγέθυνσης και τερματίζεται η επιλογή του εικονιδίου ή η εκτέλεση της εργασίας.



Όλες οι λειτουργίες στο Windows Control χρησιμοποιούν αφή και το ποντίκι, κάτι που δίνει τη δυνατότητα στον πάροχο φροντίδας ή στο βοηθό να βοηθήσει το χρήστη εάν χρειάζεται. Ο Υπεύθυνος φροντίδας ή ο Βοηθός μπορεί να επιλέξει μια Λειτουργία/Εργασία ή να αλλάξει τις ρυθμίσεις ακόμα πιο εύκολα.

3.1 Ο Windows Control Ελεγκτής

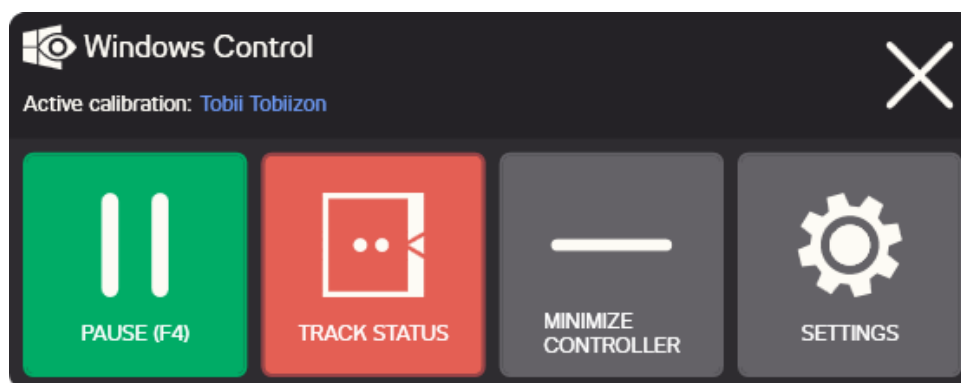


Εικόνα 3.1 Το πλήκτρο Windows Control Ελεγκτή

.	Ενέργεια	Περιγραφή
	ΠΑΥΣΗ (F4)	Ενέργεια παγώματος Windows Control. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Παύσης αλλάζει το πλήκτρο και εμφανίζεται το πλήκτρο Έναρξης. Το πλήκτρο F4 στο πληκτρολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση της εργασίας.
▶	ΕΝΑΡΞΗ (F4)	Ενέργεια εκκίνησης Windows Control. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Έναρξης αλλάζει το πλήκτρο και εμφανίζεται το πλήκτρο Παύσης. Το πλήκτρο F4 στο πληκτρολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση της εργασίας.
□	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Ενέργεια που εμφανίζει το παράθυρο της Παρακολούθησης Κατάστασης. Χρησιμοποιήστε το για να ελέγξετε εάν ο χρήστης κάθεται σωστά μπροστά από την οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε . 3.2 Παρακολούθηση κατάστασης, σελίδα 9
—	ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ	Ενέργεια που ελαχιστοποιεί το παράθυρο του ελεγκτή.

.	Ενέργεια	Περιγραφή
	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	Ενέργεια που ανοίγει τις Windows Control Ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4 Windows Control Ρυθμίσεις, σελίδα 21.
	Κλείσιμο	Ενέργεια που κλείνει το Windows Control.

3.2 Παρακολούθηση κατάστασης

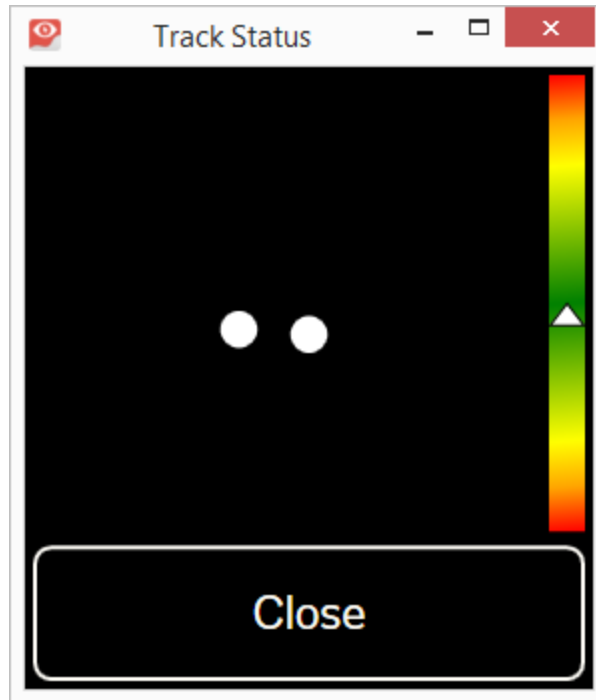

Η λειτουργία Παρακολούθηση κατάστασης χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ο χρήστης έχει τοποθετηθεί σωστά μπροστά από το μηχανισμό παρακολούθησης ματιών.

- Οι δύο (2) άσπρες τελείες — Τα μάτια του χρήστη και πώς είναι τοποθετημένα σε σχέση με την οθόνη. Στη βέλτιστη θέση, οι άσπρες τελείες θα πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο της μαύρης περιοχής.
- Η χρωματιστή γεμάτη γραμμή αριστερά με το λευκό βέλος — Πόσο μακριά ή κοντά είναι τοποθετημένος ο χρήστης από την οθόνη.
 - Εάν το λευκό βέλος είναι στο κέντρο της πράσινης περιοχής της γραμμής, ο χρήστης βρίσκεται στη βέλτιστη απόσταση από την οθόνη.
 - Εάν το βέλος είναι στο χαμηλότερο τμήμα της γραμμής, θα πρέπει να μετακινήσετε το χρήστη πιο κοντά.
 - Εάν το βέλος είναι στο πάνω μέρος της γραμμής, ο χρήστης θα πρέπει να μετακινηθεί πιο μακριά από τη γραμμή.

1. Ανοίξτε τον Windows Control Ελεγκτή.

2. Επιλέξτε το πλήκτρο  (Παρακολούθηση κατάστασης).

3. Τοποθετήστε το Χρήστη.

4. Επιλέξτε το πλήκτρο Κλείσιμο όταν ολοκληρώσετε.



Αυτό το πλήκτρο χρησιμοποιεί την περιοχή του ματιού, απλά κοιτάξτε το πλήκτρο για να το ενεργοποιήσετε.

3.3 Η Windows Control Γραμμή εργασιών

Στην κορυφή της Windows Control Γραμμής εργασιών βρίσκεται η προβολή της Παρακολούθησης κατάστασης. Σας επιτρέπει να επαληθεύσετε ότι ο μηχανισμός παρακολούθησης ματιών έχει εντοπίσει τα μάτια σας και ότι είστε τοποθετημένοι σωστά μπροστά από τη συσκευή.

Τα πλήκτρα εργασιών στη Γραμμή εργασιών του Windows Control μπορούν να είναι σε τρεις διαφορετικές λειτουργίες όπως φαίνεται στο Εικόνα 3.2 Οι λειτουργίες της Γραμμής εργασίας του *Windows Control*., σελίδα 10.

- Κανονική (Μη επιλεγμένη) - Δεν έχει επιλεγεί πλήκτρο εργασίας για το Windows Control .
- Κύρια επιλογή (Λευκό) - Το επισημασμένο πλήκτρο Εργασιών είναι επιλεγμένο και η εργασία θα εκτελεστεί μετά την αυτόματη μεγέθυνση όταν ο χρήστης κοιτάξει στο τμήμα που επιθυμεί στην οθόνη ή στο εικονίδιο πάνω σε αυτή. Εάν η μέθοδος επιλογής έχει ρυθμιστεί σε Εναλλαγή στις Windows Control Ρυθμίσεις, το επιλεγμένο πλήκτρο εργασίας θα συνεχίσει να είναι ενεργό μετά την εκτέλεση της εργασίας.



Οι συντομεύσεις των εργασιών δεν εκτελούν καμία μεγέθυνση.

- Δευτερεύουσα επιλογή (Μπλε/Λευκό) - Ίδιο με την Κύρια επιλογή αλλά με μεγαλύτερη ακρίβεια. Με την Κύρια επιλογή γίνεται σταδιακά αύξηση της μεγέθυνσης πριν την τελική εκτέλεση της εργασίας, μεγαλώνοντας το τμήμα της οθόνης και κάνοντας ευκολότερη την επιλογή του. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία κοιτάζοντας το πλήκτρο εργασίας μέχρι να αλλάξει το χρώμα, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.




Οι συντομεύσεις των εργασιών δεν εκτελούν καμία μεγέθυνση.

- Τρίτη επιλογή (αναδυόμενο μενού) — Για μερικές από τις εργασίες στη Γραμμή εργασιών, υπάρχει διαθέσιμο αναδυόμενο μενού με συμπληρωματικές εργασίες. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία κοιτάζοντας το πλήκτρο εργασίας μέχρι να ενεργοποιηθεί το αναδυόμενο μενού, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.




Στα Windows 8.1 και Windows 10 τα χρώματα της Γραμμής εργασίας προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των Windows.

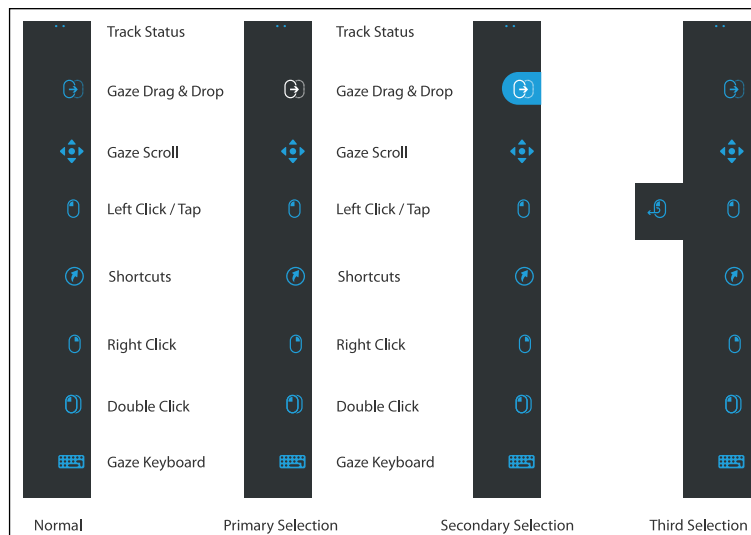

Εικόνα 3.2 Οι λειτουργίες της Γραμμής εργασίας του Windows Control .

3.4 Εργασία

Εργασία	Ενέργεια	Περιγραφή
	Τοποθέτηση κέρσορα	Εργασία που σας επιτρέπει να τοποθετείτε τον κέρσορα με το βλέμμα σας. Εκτελεί μεγέθυνση όταν χρησιμοποιείται.
	Μεταφορά και απόθεση με το βλέμμα	Εργασία που εκτελεί δύο κλικ, όπου το πρώτο αντιστοιχεί στο σημείο εκκίνησης της μεταφοράς και το δεύτερο στο σημείο απόθεσης (για τη μεταφορά αντικειμένων ή την επιλογή περιοχής). - Επιλέξτε εργασία. - Κοιτάξτε το αντικείμενο που θέλετε να μεταφέρετε ή το σημείο εκκίνησης της περιοχής επιλογής. - Εκτελέστε το Windows Control (πρώτο "κλικ") κοιτάζοντας ή από το διακόπτη. - Κοιτάξτε γρήγορα στο σημείο απόθεσης του αντικειμένου ή του τελικού σημείου της επιλογής περιοχής. - Εκτελέστε το δεύτερο "κλικ" κοιτάζοντας ή από το διακόπτη. Εκτελεί μεγέθυνση όταν χρησιμοποιείται.
	Κύλιση με το βλέμμα	εάν χρησιμοποιηθεί σε παράθυρο που μπορεί να γίνει μετακύλιση, επιτρέπει την κύλιση της σελίδας με το βλέμμα. - Επιλέξτε εργασία. - Κοιτάξτε σε οποιαδήποτε περιοχή μπορεί να γίνει μετακύλιση και κρατήστε εκεί το βλέμμα σας. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο μετακύλισης στο σημείο που κοιτάξατε. - Κοιτάξτε πάνω από το εικονίδιο για μετακύλιση προς τα επάνω. - Κοιτάξτε κάτω από το εικονίδιο για μετακύλιση προς τα κάτω. - Κοιτάξτε αριστερά από το εικονίδιο για μετακύλιση αριστερά. - Κοιτάξτε δεξιά από το εικονίδιο για μετακύλιση δεξιά. - Κατά τη διάρκεια της κύλισης, μπορείτε να κοιτάξετε ξανά το εικονίδιο (στην οθόνη, όχι το εικονίδιο της Γραμμής εργασιών) για εναλλαγή μεταξύ αριστερά/δεξιά ή πάνω/κάτω. - Κοιτάξτε ξανά Windows Control τη Γραμμή εργασιών (ή έξω από την οθόνη) για να σταματήσετε την κύλιση.  Χρησιμοποιήστε την κύλιση με το βλέμμα για να κάνετε μετακύλιση κάθετα και οριζόντια σε εφαρμογές με σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και στην οθόνη Έναρξης με το σύγχρονο περιβάλλον εργασίας των Windows.
	Αριστερό κλικ/πάτημα	Ενέργεια αριστερού κλικ, ή στην περίπτωση συσκευών αφής, πατήματος με το δάκτυλο. Στη λειτουργία διακόπτη το αριστερό κλικ/πάτημα είναι η προεπιλογή και παραμένει "κολλημένο" (δείτε 3.7.1 Αυτοκόλλητες εργασίες & προεπιλογή αριστερού κλικ/πατήματος διακόπτη, σελίδα 15). Εκτελεί μεγέθυνση όταν χρησιμοποιείται.
	Συντομεύσεις	Εργασία που ανοίγει: 3 στήλες ή προκαθορισμένες συντομεύσεις. - Σχετικά διαφορετικές εκδόσεις διαθέσιμες για Windows 7, 8.1 & 10. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 3.6 Συντομεύσεις, σελίδα 13.
	Δεξί κλικ	Εργασία που εκτελεί δεξί κλικ. Εκτελεί μεγέθυνση όταν χρησιμοποιείται.

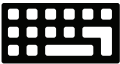Εργασία	Ενέργεια	Περιγραφή
	Διπλό κλικ	Εργασία που εκτελεί διπλό αριστερό κλικ. Όταν η μέθοδος επιλογής έχει οριστεί σε διακόπτη, η ενέργεια του διπλού κλικ είναι "κολλημένη" (δείτε 3.7.1 Αυτοκόλλητες εργασίες & προεπιλογή αριστερού κλικ/πατήματος διακόπτη, σελίδα 15). Εκτελεί μεγέθυνση όταν χρησιμοποιείται.
	Πληκτρολόγηση με το βλέμμα	Ενέργεια που ανοίγει ένα πληκτρολόγιο που ελέγχεται με το βλέμμα για πληκτρολόγηση με το βλέμμα.
	Ρυθμίσεις	Ενέργεια που ανοίγει τις Windows Control Ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4 Windows Control Ρυθμίσεις, σελίδα 21.

3.5 Συμπληρωματικές ενέργειες

Εργασία	Ενέργεια	Περιγραφή
	Κολλημένο κλικ	Αυτή η εργασία εκτελεί ένα διαφορετικό τύπο κλικ των Windows Control. Όταν επιλέξετε το κολλημένο κλικ ο κέρσοντας του ποντικιού ακολουθεί το βλέμμα σας, προσομοιώνοντας την κίνηση του ποντικιού. Όταν εστιάσετε το βλέμμα σας οπουδήποτε στην οθόνη στην επιφάνεια εργασίας ή σε εφαρμογές, ενεργοποιείται ένα χρονόμετρο παραμονής το οποίο σταματάει με ένα κλικ. Εάν το ενεργοποιήσετε με τη δευτερεύουσα επιλογή, η μεγέθυνση ενεργοποιείται πριν το κλικ, κάτι που είναι ιδανικό για μικρότερους στόχους.  Εάν η εργασία είναι "Κολλημένη" δε χρειάζεται να κοιτάξετε πίσω στη Γραμμή εργασιών εάν θέλετε να επαναλάβετε εκτέλεση της επιλεγμένης εργασίας, παρά μόνο στην περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε εργασία.

3.6 Συντομεύσεις

Windows 8.1	Windows 10
The screenshot shows the Windows 8.1 Control Shortcuts menu. It contains 18 icons arranged in a 6x3 grid. The icons are: Minimize Window, Maximize Window, Close Window, Back, Browser, Speech Recognition, Undo, Volume Up, Virtual Remote, Copy, Mute, Desktop, Paste, Volume Down, Charms, Start, Search, and App Switcher. At the bottom, there are three larger icons: Hide Taskbar, Switch Side, and Close Shortcuts.	The screenshot shows the Windows 10 Control Shortcuts menu. It contains 18 icons arranged in a 6x3 grid. The icons are: Minimize Window, Maximize Window, Close Window, Back, Browser, Speech Recognition, Undo, Volume Up, Virtual Remote, Copy, Mute, Desktop, Paste, Volume Down, Action Center, Start, Cortana, and Task View. At the bottom, there are three larger icons: Hide Taskbar, Switch Side, and Close Shortcuts.



Εάν η συντόμευση μιας λειτουργίας είναι επισημασμένη με το εικονίδιο , το παράθυρο των συντομεύσεων θα παραμείνει ανοικτό μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας, δίνοντας τη δυνατότητα για διάφορες ενεργοποιήσεις.

Συντόμευση	Ενέργεια	Win 8.1	Win 10	Περιγραφή
	Μεγιστοποίηση παραθύρου	x	x	Συντόμευση που μεγιστοποιεί το ενεργό παράθυρο/ λογισμικό.
	Πίσω	x	x	Συντόμευση που μεταφέρει ο χρήστη μία σελίδα πίσω στο πρόγραμμα περιήγησης ή σε οποιοδήποτε άλλο λογισμικό που διαθέτει παρόμοια λειτουργικότητα.
	Αναίρεση	x	x	Συντόμευση που αναιρεί την τελευταία εντολή.
	Αντιγραφή	x	x	Συντόμευση που αντιγράφει την ενεργή επιλογή.
	Επικόλληση	x	x	Συντόμευση που κάνει επικόλληση της ήδη αντιγραφμένης επιλογής.
	Εκκίνηση	x	x	Συντόμευση που εμφανίζει το μενού έναρξης των Windows.

Συντόμευση	Ενέργεια	Win 8.1	Win 10	Περιγραφή
	Απόκρυψη Γραμμής εργασιών	x	x	Συντόμευση που κρύβει τη Γραμμή εργασιών στην προβολή πλήρους οθόνης. Για να εμφανίσετε ξανά τη Γραμμή εργασιών, επιλέξτε  ή  ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται η Γραμμή εργασιών.
	Ελαχιστοποίηση παραθύρου	x	x	Συντόμευση που ελαχιστοποιεί το ενεργό παράθυρο/λογισμικό.
	Πρόγραμμα περιήγησης	x	x	Συντόμευση που εμφανίζει το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης.
	Αύξηση έντασης ήχου	x	x	Συντόμευση που αυξάνει την ένταση ήχου.
	Σίγαση	x	x	Συντόμευση που απομονώνει τον ήχο από τα ηχεία.
	Μείωση έντασης ήχου	x	x	Συντόμευση που μειώνει την ένταση ήχου.
 	Αναζήτηση Cortana	x	x	Συντόμευση που ανοίγει τη λειτουργία Αναζήτησης στα Windows. Συντόμευση που ανοίγει την Cortana. Η Cortana είναι ο έξυπνος προσωπικός σας βοηθός. Η Cortana μπορεί να κάνει αναζήτηση στο διαδίκτυο, να βρει στοιχεία στον υπολογιστή σας, να παρακολουθεί το ημερολόγιό σας, και ούτω καθεξής
	Αλλαγή πλευράς	x	x	Συντόμευση που μετακινεί το Γραμμή εργασίας δεξιά/αριστερά.
	Κλείσιμο παραθύρου	x	x	Συντόμευση που κλείνει το ενεργό παράθυρο/εφαρμογή/λογισμικό.
	Αναγνώριση φωνής	x	x	Συντόμευση που ξεκινάει τη Αναγνώριση φωνής των Windows, ή την Αναγνώριση φωνής Dragon εάν είναι εγκατεστημένη.
	Virtual Remote	x	x	Συντόμευση που ανοίγει την εφαρμογή Virtual Remote. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 5 Virtual Remote, σελίδα 34.
	Επιφάνεια εργασίας	x	x	Συντόμευση που εμφανίζει την επιφάνεια εργασίας.
 	Charms Κέντρο ενεργειών	x	x	Συντόμευση που ανοίγει το μενού Charms. Συντόμευση που ανοίγει το Κέντρο ενεργοποίησης.
	Διακόπτης εφαρμογής	x		Συντόμευση που σαρώνει όλες τις εφαρμογές του σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας και τον υπολογιστή.  Το σύνολο του λογισμικού που τρέχει στην επιφάνεια εργασίας, δεν θα είναι ορατό εδώ. Είναι ορατές μόνο από την Επιφάνεια εργασίας.

Συντόμευση	Ενέργεια	Win 8.1	Win 10	Περιγραφή
	Προβολή εργασίας		x	Συντόμευση που ανοίγει την προβολή εργασίας όπου είναι ορατές όλες οι εφαρμογές του σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας.  Η προβολή εργασίας δεν εμφανίζεται εάν είναι ανοικτή μία ή λιγότερες εφαρμογές.
	Κλείσιμο συντομεύσεων	x	x	Συντόμευση που κλείνει το μενού των Συντομεύσεων.

3.7 Μέθοδος επιλογής — Με το βλέμμα ή με το διακόπτη

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για την εκτέλεση της επιλεγμένης εργασίας.

- Με το βλέμμα — χρησιμοποιώντας τα μάτια για τον έλεγχο και την εκτέλεση της επιλεγμένης εργασίας.
- Με το διακόπτη — χρησιμοποιώντας τα μάτια για τον έλεγχο και για τη χρήση ενός μηχανικού διακόπτη που είναι συνδεδεμένος στη συσκευή για την εκτέλεση της επιλεγμένης εργασίας.

Η επιλογή της μεθόδου ρυθμίζεται από το πλαίσιο Windows Control Διαλόγου των Ρυθμίσεων, δείτε 4 *Windows Control* Ρυθμίσεις, σελίδα 21.

Πριν εκτελέσετε μια επιλογή, διαλέξτε μία εργασία από τη Γραμμή εργασιών. Κοιτάξτε την επιλεγμένη εργασία μέχρι να υπογραμμιστεί ως "Κύρια" ή "Δευτερεύουσα επιλογή".

- Βλέμμα - Για να εκτελέσετε την επιλεγμένη εργασία, κοιτάξτε στο τμήμα της οθόνης που επιθυμείτε (ή το εικονίδιο στην οθόνη) στο οποίο θέλετε να εκτελέσετε την εργασία. Ενεργοποιείται μία αυτόματη λειτουργία μεγέθυνσης και τερματίζεται η επιλογή του εικονιδίου ή η εκτέλεση της εργασίας.
- Διακόπτης - Υπάρχουν δύο διαφορετικές λειτουργίες εκτέλεσης.
 - Ενεργοποίηση του διακόπτη - η λειτουργία μεγέθυνσης εκτελείται όπως και η λειτουργία βλέμματος και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του πλαισίου Windows Control Διαλόγου των Ρυθμίσεων, δείτε 4 *Windows Control* Ρυθμίσεις, σελίδα 21.
 - Ενεργοποίηση και κράτημα του διακόπτη - η λειτουργία μεγέθυνσης εκτελεί μεγέθυνση διαρκώς και θα σταματήσει μόνο όταν απελευθερωθεί/απενεργοποιηθεί ο διακόπτης.



Όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο του βλέμματος, θα πρέπει να κοιτάξετε πίσω στη Γραμμή εργασιών για να επιλέξετε νέα εργασία πριν από την εκτέλεση της κάθε εργασίας.



Όταν η ακρίβεια έχει ρυθμιστεί στην τιμή μηδέν Windows Control στις Ρυθμίσεις, δεν εκτελείται καμία μεγέθυνση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4 *Windows Control* Ρυθμίσεις, σελίδα 21.

3.7.1 Αυτοκόλλητες εργασίες & προεπιλογή αριστερού κλικ/πατήματος διακόπτη

Όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο του διακόπτη, η λειτουργία κάνει χρήση των "αυτοκόλλητων εργασιών".

Εάν η εργασία είναι "αυτοκόλλητη" δε χρειάζεται να κοιτάξετε πίσω στη Γραμμή εργασιών εάν θέλετε να επαναλάβετε εκτέλεση της επιλεγμένης εργασίας, παρά μόνο στην περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε εργασία.

Όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο διακόπτη, το αριστερό κλικ/πάτημα είναι "κολλημένο" από προεπιλογή. Αυτό σημαίνει ότι το αριστερό κλικ/πάτημα παραμένει πάντα σε λειτουργία και ενεργοποιείται από το διακόπτη, εάν δεν επιλεγεί κάτι άλλο. Εάν επιλεγεί άλλη εργασία, θα είναι ενεργή μόνο μία φορά (για μία επιλογή) και στη συνέχεια Windows Control θα μεταβεί αυτόματα στην προεπιλογή του αριστερού κλικ/πατήματος για τις επόμενες επιλογές.

Η εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα είναι το διπλό κλικ, όταν επιλεγεί με το διακόπτη θα μετατραπεί σε "αυτοκόλλητη" εργασία, που σημαίνει ότι θα παραμείνει επιλεγμένη μέχρι να επιλεγεί άλλη εργασία (και στη συνέχεια θα μεταβεί ξανά στη λειτουργία αριστερού κλικ/πατήματος).

Αυτό είναι ιδανικό για χρήσεις όπως συνεχής/γρήγορη πλοήγηση στο Internet, ενεργοποιώντας το διακόπτη και κατά συνέπεια το Αριστερό κλικ/πάτημα μία φορά, επιτρέποντας στη συνέχεια να επιλέξετε ότι επιθυμείτε, χωρίς να χρειάζεται να επιλέγετε Αριστερό κλικ/πάτημα πολλές φορές.

3.7.2 Ενεργοποίηση εργασίας με πλήκτρο αντί για το διακόπτη



Η επιλογή του πλήκτρου “F12”, στο συνδεδεμένο πληκτρολόγιο ενεργοποιεί την επιλογή εργασίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο όπως ο συνδεδεμένος διακόπτης. Για περισσότερες πληροφορίες για τους διακόπτες, δείτε 3.7 Μέθοδος επιλογής — Με το βλέμμα ή με το διακόπτη, σελίδα 15.

3.8 Πληκτρολόγηση με το βλέμμα

Εάν επιλέξετε πληκτρολόγηση με το βλέμμα από τη Γραμμή εργασιών, θα εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο στην οθόνη. Το πληκτρολόγιο βλέμματος θα είναι στην κορυφή ή στο κάτω τμήμα της οθόνης ανάλογα με το που επιλέγει να το τοποθετήσει ο χρήστης.

Το πληκτρολόγιο μπορεί να τοποθετηθεί στην οθόνη με δύο διαφορετικούς τρόπους με την Κύρια και τη Δευτερεύουσα επιλογή της εργασίας του πληκτρολογίου.

- Με την Κύρια επιλογή:
 1. Ενεργοποιήστε την Κύρια επιλογή της εργασίας πληκτρολογίου.
 2. Επιλέξτε που θέλετε να γράψετε και το πληκτρολόγιο θα εμφανιστεί στην αντίθετη πλευρά. Εάν θέλετε να γράψετε στο χαμηλότερο τμήμα της οθόνης, το πληκτρολόγιο θα τοποθετηθεί στο πάνω τμήμα της οθόνης και αντίστροφα.



Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία παραμονής, το πληκτρολόγιο θα τοποθετηθεί απέναντι από το σημείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί διακόπτη, θα πρέπει να κοιτάξει πρώτα στο σημείο που θέλει να πληκτρολογήσει. Στη συνέχεια ο διακόπτης θα τοποθετήσει το πληκτρολόγιο απέναντι.

- Με τη Δευτερεύουσα επιλογή:
 - Το πληκτρολόγιο θα τοποθετηθεί στο κάτω μέρος της οθόνης αυτόματα.

Θα γίνει εκκίνηση της Γραμμής εργασιών μαζί με το πληκτρολόγιο βλέμματος. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 3.8.1 Γραμμή εργασιών πληκτρολογίου, σελίδα 18.

Το πληκτρολόγιο βλέμματος αποτελείται από τέσσερις σελίδες που εμφανίζονται κυκλικά. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει εύκολα ανάμεσα στις διαφορετικές σελίδες του πληκτρολογίου επιλέγοντας τα πλήκτρα της επόμενης σελίδας τέρμα αριστερά και δεξιά σε όλες τις σελίδες του πληκτρολογίου βλέμματος.


Το πλήκτρο στο οποίο κοιτάζει ο χρήστης στο πληκτρολόγιο εμφανίζεται με ένα φωτεινό πλαίσιο γύρω από το χαρακτήρα/

λειτουργία στο πλήκτρο .


Οι τέσσερις σελίδες πληκτρολογίου είναι οι εξής:



Εικόνα 3.3 Προεπιλεγμένη σελίδα εκκίνησης

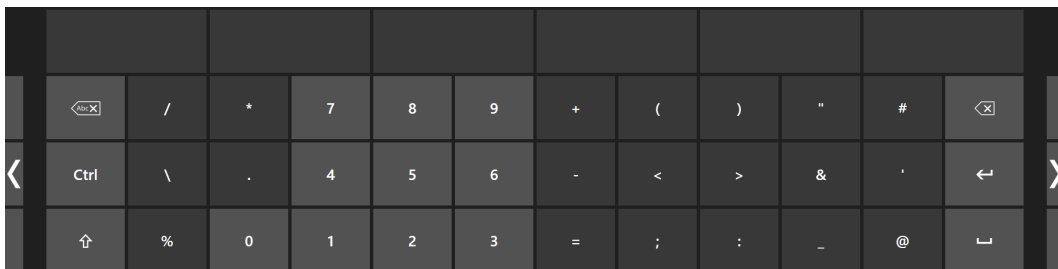

Εικόνα 3.4 Πρώτη σελίδα δεξιά

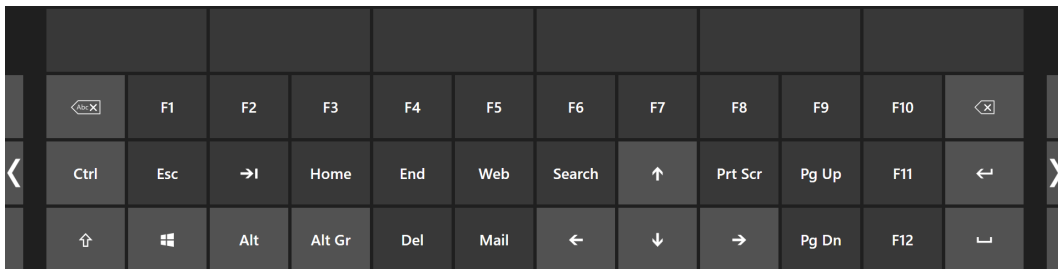

Εικόνα 3.5 Δεύτερη σελίδα δεξιά ή αριστερά



Εικόνα 3.6 Πρώτη σελίδα αριστερά

Για να αλλάξετε τη γλώσσα του πληκτρολογίου και άλλες ρυθμίσεις, δείτε 4 *Windows Control* Ρυθμίσεις, σελίδα 21.



Τα πλήκτρα Shift, Ctrl, Alt, Win και Alt Gr "κολλάνε" όταν επιλεγούν. Αυτό σημαίνει ότι θα παραμείνουν επιλεγμένα μέχρι ο χρήστης να επιλέξει ένα νέο πλήκτρο από το πληκτρολόγιο. Θα παραμείνουν κολλημένα εάν το επόμενο πλήκτρο που θα επιλεγεί είναι και αυτό πλήκτρο που "κολλάει".



Για να πληκτρολογήσετε γράμμα με τόνο:

1. Επιλέξτε τον τόνο
2. Επιλέξτε χαρακτήρα
3. Ο χαρακτήρας θα εμφανιστεί με τον επιλεγμένο τόνο.



Το αριθμητικά πλήκτρα στο πληκτρολόγιο είναι παρατεταγμένα όπως στο αριθμητικό πληκτρολόγιο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το πλήκτρο Alt για την εισαγωγή χαρακτήρων ASCII.

1. Επιλέξτε το πλήκτρο Alt
2. Επιλέξτε τον αριθμητικό συνδυασμό για την εισαγωγή χαρακτήρα ASCII
3. Επιλέξτε το πλήκτρο Alt
4. Θα εμφανιστεί ο χαρακτήρας ASCII.

3.8.1 Γραμμή εργασιών πληκτρολογίου

Στην κορυφή της Γραμμής κατάστασης του πληκτρολογίου εμφανίζεται η γραμμή παρακολούθησης κατάστασης όπως στη Windows Control Γραμμή εργασιών. Σας επιτρέπει να επαληθεύσετε ότι ο μηχανισμός παρακολούθησης ματιών έχει εντοπίσει τα μάτια σας και ότι είστε τοποθετημένοι σωστά μπροστά από τη συσκευή.

Τα πλήκτρα εργασίας στη Γραμμή εργασιών του πληκτρολογίου μπορούν να είναι σε τρεις διαφορετικές λειτουργίες όπως φαίνεται στο Εικόνα 3.7 Οι λειτουργίες της Γραμμής εργασίας στο πληκτρολόγιο, σελίδα 18.


- Κανονική (Μη επιλεγμένη) - Δεν έχει επιλεγεί πλήκτρο εργασίας για το Windows Control .
- Με την Κύρια επιλογή (λευκό) - Το επισημασμένο πλήκτρο Εργασιών είναι επιλεγμένο και η εργασία θα εκτελεστεί μετά την αυτόματη μεγέθυνση όταν ο χρήστης κοιτάξει στο τμήμα που επιθυμεί στην οθόνη ή στο εικονίδιο πάνω σε αυτή. Εάν η μέθοδος επιλογής έχει ρυθμιστεί σε Εναλλαγή στις Windows Control Ρυθμίσεις, το επιλεγμένο πλήκτρο εργασίας θα συνεχίσει να είναι ενεργό μετά την εκτέλεση της εργασίας.
- Δευτερεύουσα επιλογή(Μπλε/Λευκό) - Ίδια με την Με την Κύρια επιλογή αλλά με μεγαλύτερη ακρίβεια. Με την Κύρια επιλογή γίνεται σταδιακά αύξηση της μεγέθυνσης πριν την τελική εκτέλεση της εργασίας, μεγαλώνοντας το τμήμα της οθόνης και κάνοντας ευκολότερη την επιλογή του. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία κοιτάζοντας το πλήκτρο εργασίας μέχρι να αλλάξει το χρώμα, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.



Διαθέσιμη μόνο για τη λειτουργία του αριστερού κλικ.



Στα Windows 8.1 και Windows 10 τα χρώματα της Γραμμής εργασίας στο πληκτρολόγιο προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των Windows.

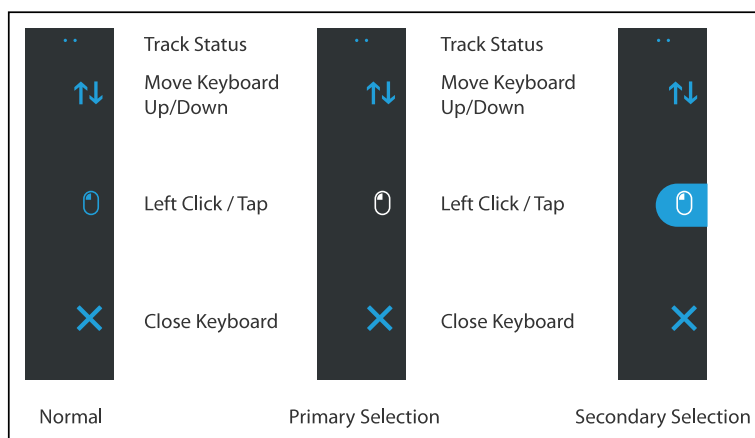


Εικόνα 3.7 Οι λειτουργίες της Γραμμής εργασίας στο πληκτρολόγιο

3.8.2 Πλήκτρα Γραμμής εργασίας στο πληκτρολόγιο

Εργασία	Ενέργεια	Περιγραφή
↑↓	Μετακίνηση πληκτρολογίου πάνω/κάτω	Εργασία που μετακινεί το πληκτρολόγιο στην κορυφή ή στο κάτω μέρος της οθόνης.  Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η δευτερεύουσα επιλογή.
⓪	Αριστερό κλικ/πάτημα	Ενέργεια αριστερού κλικ, ή στην περίπτωση συσκευών αφής, πατήματος με το δάκτυλο.
✕	Κλείσιμο	Εργασία που κλείνει το πληκτρολόγιο.

3.8.3 Πρόβλεψη λέξης

Η μηχανή πρόβλεψης λέξης που χρησιμοποιείται είναι Windows Control της SwiftKey και χρησιμοποιείται συνήθως σε tablet και smartphone. Το SwiftKey είναι ένας συνδυασμός τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης που καθιστά δυνατή την πρόβλεψη της επόμενης λέξης που σκοπεύει να πληκτρολογήσει ο χρήστης. Το SwiftKey μαθαίνει από το κείμενο που έχει γράψει ο χρήστης και παράγει προβλέψεις με βάση το κείμενο που έχει εισαχθεί και το τι έχει μάθει. Η γλώσσα της πρόβλεψης λέξης αλλάζει ανάλογα με τη γλώσσα του πληκτρολογίου.

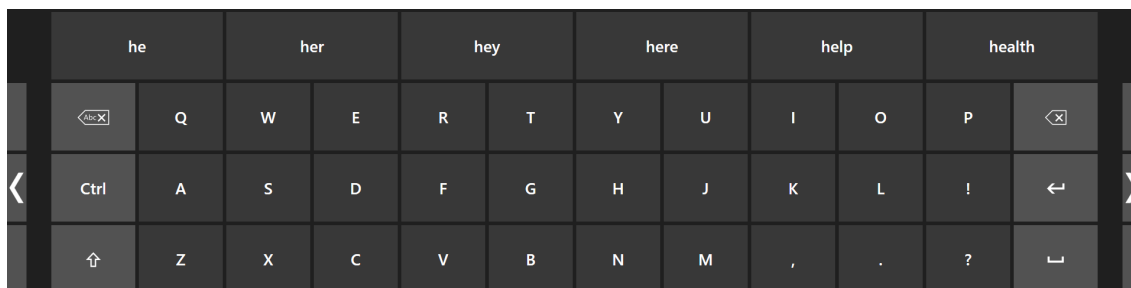


Εικόνα 3.8 Πληκτρολόγιο με ενεργοποιημένη τη λειτουργία πρόβλεψης λέξης

Όταν χρησιμοποιείται η πρόβλεψη λέξης, δείτε το 4 Windows Control Ρυθμίσεις, σελίδα 21 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης. Θα εμφανιστούν έξι (6) πλαίσια πάνω από το πληκτρολόγιο. Το αριστερό πλαίσιο εμφανίζει τη λέξη που είναι πιθανότερο να πληκτρολογηθεί και τα υπόλοιπα πέντε (5) πλαίσια περιέχουν το κάθε ένα από μία πρόβλεψη. Για να επιλέξετε μία προβλεπόμενη λέξη, απλά επιλέξτε το πλαίσιο με τη σωστή λέξη. Εάν δεν έχει τη λέξη που ψάχνετε, απλά συνεχίστε να πληκτρολογείτε και καλώς εχόντων, η λέξη που ψάχνετε θα εμφανιστεί μόλις πληκτρολογήσετε τον επόμενο χαρακτήρα.



Εάν χρησιμοποιείτε την πρόβλεψη λέξης και θέλετε να πληκτρολογήσετε λέξη που περιέχει τόνο, για παράδειγμα "καφετέρια", είναι προτιμότερο να αφήσετε την πρόβλεψη λέξης να χειριστεί τον τόνο. Απλά πληκτρολογήστε "καφετερια" και θα λάβετε πρόταση με τη λέξη "καφετέρια".

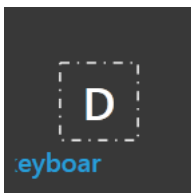


Ενώ πληκτρολογεί ο χρήστης, οι τελευταίοι 5-10 χαρακτήρες θα εμφανίζονται με μπλε στο αντίστοιχο/υπογραμμισμένο πλήκτρο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4 Windows Control Ρυθμίσεις, σελίδα 21. Η συγκεκριμένη λειτουργία βοηθάει το χρήστη να εντοπίζει εύκολα ορθογραφικά λάθη και μειώνει την ανάγκη να κοιτάει το συγκεκριμένο σημείο όπου τοποθετείται κείμενο, και κατά συνέπεια αυξάνει την ταχύτητα πληκτρολόγησης.

3.9 Windows Control σε συνδυασμό με το εκάστοτε τοπικό πληκτρολόγιο

Windows Control μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλες εφαρμογές που ελέγχονται με τα μάτια. Οι περιοχές που "ενεργοποιούνται" με το βλέμμα στις άλλες εφαρμογές εξακολουθούν να είναι ενεργές εφόσον δεν υπάρχει ενεργή εργασία στη Windows Control Γραμμή εργασιών. Εάν χρησιμοποιείτε Windows Control με το διακόπτη τα πλήκτρα εργασιών θα είναι "κολλημένα", εάν χρειάζεται να καταργήσετε την επιλογή μιας εργασίας απλά κοιτάξτε ξανά την επιλεγμένη εργασία για μικρό χρονικό διάστημα.

3.10 Eye Detection Indicator

Η Το **Eye Detection Indicator**, , είναι μία ξεχωριστή ένδειξη στο πεδίο Δραστηριότητα των Windows.

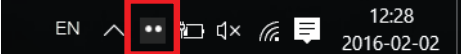, που δείχνει εάν Windows Control έχουν εντοπιστεί τα μάτια του χρήστη.

Το **Eye Detection Indicator** μπορεί να έχει διαφορετικές καταστάσεις:


- Έγινε εντοπισμός ματιών ()



Λειτουργεί επίσης ως οδηγός θέσης για το χρήστη.

- Δεν έχουν εντοπιστεί μάτια, ()
- Δεν έχει συνδεθεί Συσκευή παρακολούθησης ματιών ή είναι απενεργοποιημένη ()

4 Windows Control Ρυθμίσεις

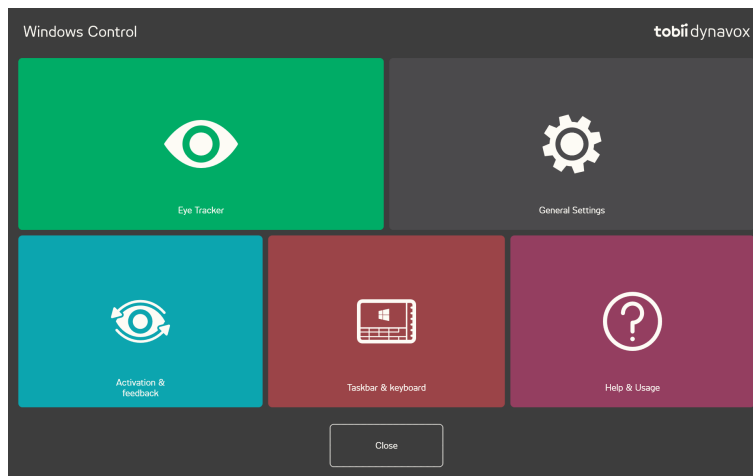


Εικονίδια	Ενέργεια	Περιγραφή
	Συσκευή παρακολούθησης ματιών	Ανοίγει τις ρυθμίσεις της Συσκευής παρακολούθησης ματιών . Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1 Συσκευή παρακολούθησης ματιών , σελίδα 22.
	τις Γενικές Ρυθμίσεις	Ανοίγει τις Γενικές Ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.2 Γενικές ρυθμίσεις , σελίδα 26.
	Ενεργοποίηση & Ένδειξη	Ανοίγει την Ενεργοποίηση & Ένδειξη . Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.3 Ενεργοποίηση & Αναφώνηση , σελίδα 27.
	Γραμμή εργασιών & Πληκτρολόγιο	Ανοίγει τις Ρυθμίσεις Γραμμή Εργασιών & το Πληκτρολόγιο. . Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.4 Γραμμή εργασιών & Πληκτρολόγιο , σελίδα 29.
	Βοήθεια & Χρήση	Ανοίγει τις Ρυθμίσεις Βοήθεια & Χρήση . Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4 Windows Control Ρυθμίσεις, σελίδα 21.

4.1 Συσσκευή παρακολούθησης ματιών



4.1.1 Η καρτέλα Βαθμονόμηση

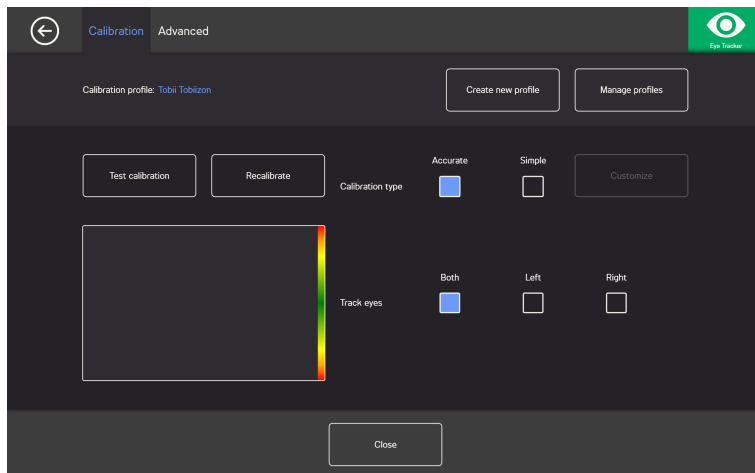

Προφίλ βαθμονόμησης: Εμφανίζει το όνομα και το προφίλ που είναι ενεργά.

Δημιουργία νέου προφίλ: Επιλέξτε αυτό το πλήκτρο για να δημιουργήσετε νέο προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.1 Δημιουργία νέου προφίλ, σελίδα 22.

Διαχείριση προφίλ: Επιλέξτε αυτό το πλήκτρο για να αλλάξετε ένα υφιστάμενο προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.2 Διαχείριση προφίλ, σελίδα 23.

Δοκιμαστική βαθμονόμηση: Επιλέξτε αυτό το πλήκτρο για να ανοίξετε τη σελίδα της δοκιμαστικής βαθμονόμησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.3 Δοκιμαστική βαθμονόμηση, σελίδα 23.

Τύπος βαθμονόμησης: Υπάρχουν δύο (2) διαφορετικοί τύποι βαθμονόμησης: Ακριβής και Απλή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.5 Τύπος βαθμονόμησης, σελίδα 24.

Παρακολούθηση ματιών: Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή θα παρακολουθεί τα μάτια του χρήστη: Και τα δύο, Το αριστερό ή το δεξί.

4.1.1.1 Δημιουργία νέου προφίλ

1. Επιλέξτε το εικονίδιο Τύπος βαθμονόμησης που χρησιμοποιείται.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.5 Τύπος βαθμονόμησης, σελίδα 24.
2. Επιλέξτε το πλήκτρο Δημιουργία νέου προφίλ .
3. Επιλέξτε Ναι για συνέχεια ή Όχι για ακύρωση.
4. Δώστε ένα όνομα στο νέο προφίλ.



Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ποντίκι και πληκτρολόγιο.

Επιτρέπονται μόνοι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες.

5. Επιλέξτε το πλήκτρο Επόμενο .
6. Τοποθετήστε το χρήστη ώστε οι δύο τελείες, που αντιστοιχούν στα μάτια του χρήστη, να είναι στο κέντρο του πλαισίου όπως φαίνεται στην οθόνη.
Η βαθμονόμηση θα ξεκινήσει όταν η δεξιά τελεία ξεκινήσει να αναβοσβήνει.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε βαθμονόμηση.
8. Δοκιμάστε τη βαθμονόμηση.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.3 Δοκιμαστική βαθμονόμηση, σελίδα 23.

- Επιλέξτε Κλείσιμο για αποδοχή της βαθμονόμησης ή για Επανάληψη βαθμονόμησης για να εκτελέσετε νέα βαθμονόμηση.

4.1.1.2 Διαχείριση προφίλ

Στη σελίδα Διαχείρισης προφίλ μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε ένα υφιστάμενο προφίλ.

Στο κέντρο της οθόνης κάτω από το ενεργό προφίλ, εμφανίζεται το όνομα του προφίλ που είναι ενεργό.

Όλα τα διαθέσιμα προφίλ θα είναι παραταγμένα ως πλήκτρα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < και > για μετακύλιση στα διαθέσιμα προφίλ.


4.1.1.2.1 Ενεργοποίηση ενός προφίλ

- Επιλέξτε το πλήκτρο με το όνομα του προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε.
- Επιλέξτε το πλήκτρο Ενεργοποίηση στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
- Επιλέξτε Ναι για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ ή Όχι για ακύρωση.
- Επιλέξτε Κλείσιμο για να αποχωρήσετε από τη σελίδα.

4.1.1.2.2 Διαγραφή προφίλ

- Επιλέξτε το πλήκτρο με το όνομα του προφίλ που θέλετε να διαγράψετε.
- Επιλέξτε το πλήκτρο Διαγραφή στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.
- Επιλέξτε Ναι για να διαγράψετε το επιλεγμένο προφίλ ή Όχι για ακύρωση.
- Επιλέξτε Κλείσιμο για να αποχωρήσετε από τη σελίδα.

4.1.1.3 Δοκιμαστική βαθμονόμηση

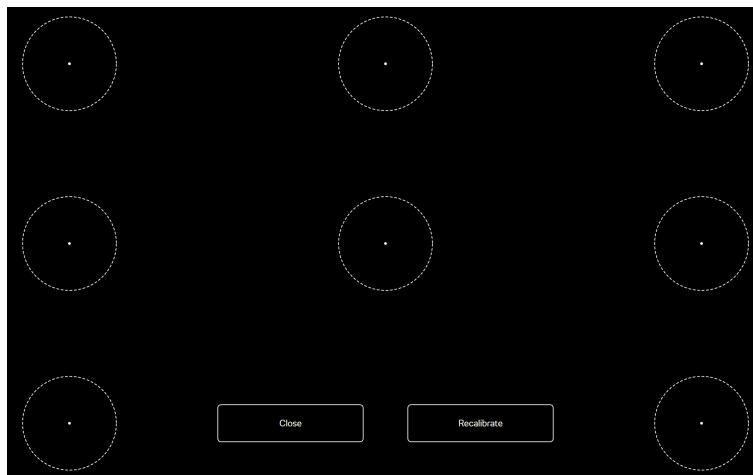

Στη σελίδα δοκιμαστικής βαθμονόμησης μπορεί να γίνει έλεγχος της βαθμονόμησης σε οκτώ (8) σημεία στην οθόνη για να διαπιστωθεί εάν ο χρήστης χρειάζεται να επαναλάβει τη βαθμονόμηση της συσκευής παρακολούθησης ματιών.

- Κοιτάξτε στην κάθε τελεία στον κάθε κύκλο στην οθόνη για να διαπιστώσετε πόσο ακριβής είναι η παρακολούθηση του ματιού στη συγκεκριμένη περιοχή.
- Επιλέξτε Κλείσιμο για αποδοχή της βαθμονόμησης ή για Επανάληψη βαθμονόμησης για να εκτελέσετε νέα βαθμονόμηση.

4.1.1.4 Επανάληψη βαθμονόμησης

- Επιλέξτε τον τύπο βαθμονόμησης που θα χρησιμοποιηθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.5 Τύπος βαθμονόμησης, σελίδα 24.

2. Επιλέξτε το πλήκτρο Επανάληψη βαθμονόμησης για να ξεκινήσετε νέα διαδικασία βαθμονόμησης για το ενεργό προφίλ.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε βαθμονόμηση.
4. Δοκιμάστε τη βαθμονόμηση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.3 Δοκιμαστική βαθμονόμηση, σελίδα 23.
5. Επιλέξτε Κλείσιμο για αποδοχή της βαθμονόμησης ή για Επανάληψη βαθμονόμησης για να εκτελέσετε νέα βαθμονόμηση.

4.1.1.5 Τύπος βαθμονόμησης

Υπάρχουν δύο (2) τύποι βαθμονόμησης διαθέσιμοι: Ακριβής και Απλή.

4.1.1.5.1 Ακριβής

Επιλέξτε το πλαίσιο Ακριβής για να ενεργοποιήσετε τον Ακριβή τύπο βαθμονόμησης.


Στον Ακριβή τύπο βαθμονόμησης, η βαθμονόμηση περιλαμβάνει επτά (7) σημεία (εντοπισμός τελειών). Ο ακριβής τύπος βαθμονόμησης είναι ο προεπιλεγμένος.

4.1.1.5.2 Απλή

Επιλέξτε το πλαίσιο Απλή για να ενεργοποιήσετε την απλή βαθμονόμηση στην περίπτωση που είναι πιο σημαντική η ταχύτητα και η απλότητα της βαθμονόμησης, παρά η υψηλή ακρίβεια.

Όταν επιλεγεί η απλή βαθμονόμηση, η διαδικασία της βαθμονόμησης μπορεί να παραμετροποιηθεί.

Επιλέξτε το πλήκτρο Παραμετροποίηση για να παραμετροποιήσετε τη διαδικασία της βαθμονόμησης.

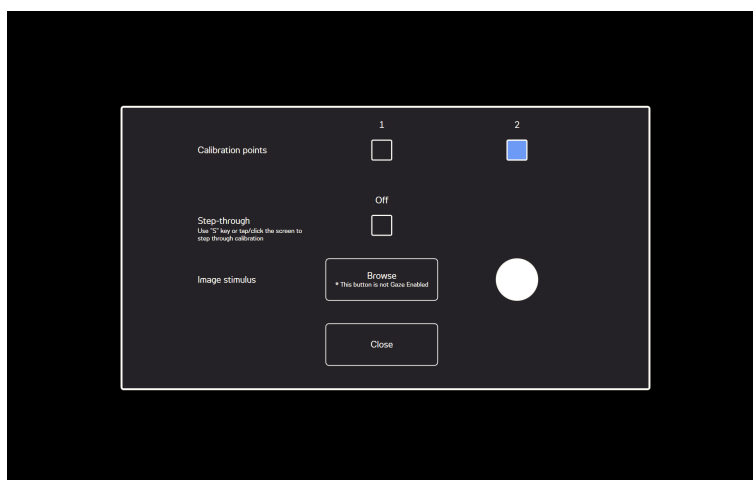

Σημεία βαθμονόμησης: Επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιηθούν **1** ή **2** σημεία βαθμονόμησης.




Η βαθμονόμηση 1 σημείου δεν είναι διαθέσιμη στο PCEye Go.

Σταδιακή εκτέλεση: Ρυθμίστε το πλαίσιο Σταδιακής εκτέλεσης On/Off στη θέση On για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο “S” στο πληκτρολόγιο ή πατήστε/κάντε κλικ στην οθόνη για σταδιακή εκτέλεση της βαθμονόμησης.

Προσαρμογή εικόνας: Επιλέξτε το πλήκτρο Περιήγηση για να αλλάξετε την εικόνα από την προεπιλεγμένη λευκή τελεία σε μία από τις ειδικές εικόνες ή σε εικόνα που προτιμά ο χρήστης ή κάτι άλλο.

Κλείσιμο: Επιλέξτε το πλήκτρο Κλείσιμο για να αποχωρήσετε από τη σελίδα.

4.1.2 Η καρτέλα Σύνθετες

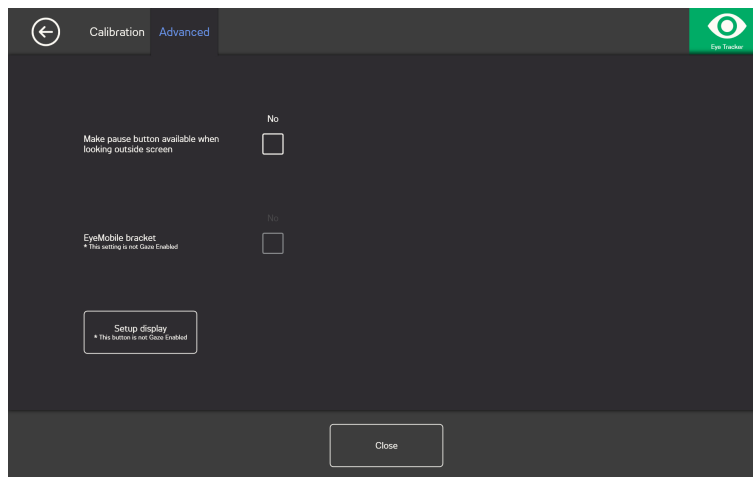


Το πλήκτρο παύσης είναι διαθέσιμο όταν κοιτάτε έξω από την οθόνη: Ενεργοποιήστε το διακόπτη On/Off στη θέση **On** το πλήκτρο της παύσης εμφανίζεται στην οθόνη όταν ο χρήστης κοιτάξει έξω από την οθόνη, για να μπορεί να κάνει παύση και να ξεκινάει ξανά την παρακολούθηση των ματιών.


Πλαίσιο EyeMobile: Ρυθμίστε το πλαίσιο ελέγχου EyeMobile στη θέση **On** εάν χρησιμοποιείται EyeMobile ή EyeMobile Mini. Η ρύθμιση του πλαισίου EyeMobile δεν αφορά το EyeMobile Plus και κατά συνέπεια είναι απενεργοποιημένη.

4.1.2.1 Ρύθμιση οθόνης

Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία (1) οθόνες, θα πρέπει να προσδιορίσετε σε ποια οθόνη είναι συνδεδεμένο το Eye tracker. Το σύστημα χρειάζεται επίσης να γνωρίζει το μέγεθος της οθόνης που χρησιμοποιείται.

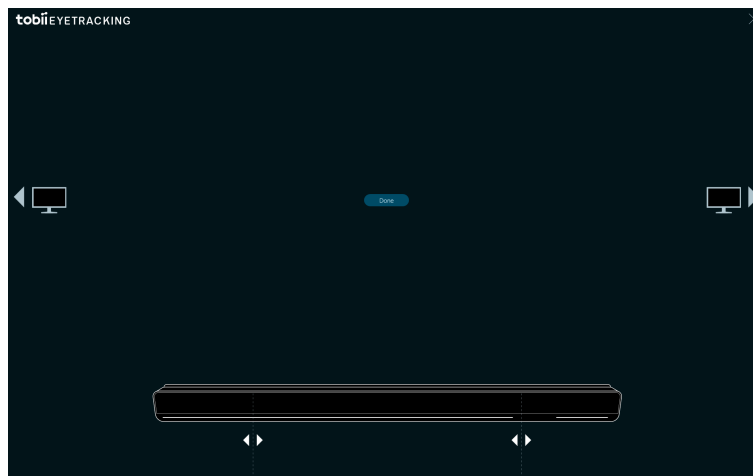

1. Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να επιλέξετε σε ποια οθόνη είναι συνδεδεμένο το eye tracker.
2. Ευθυγραμμίστε τη δεξιά και την αριστερή κάθετη γραμμή, κάτω από την αναπαράσταση του μηχανισμού παρακολούθησης ματιών στην οθόνη, με τα σημεία στην κορυφή του μηχανισμού παρακολούθησης ματιών που χρησιμοποιείται.

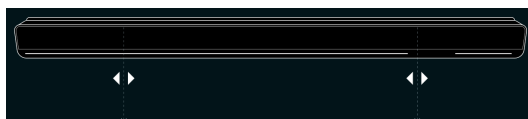


Αυτή η ενέργεια θα ρυθμίσει το μέγεθος της οθόνης που χρησιμοποιείται στο Windows Control.

3. Επιλέξτε **Done** για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

4.2 Γενικές ρυθμίσεις




4.2.1 Η καρτέλα Γενικές

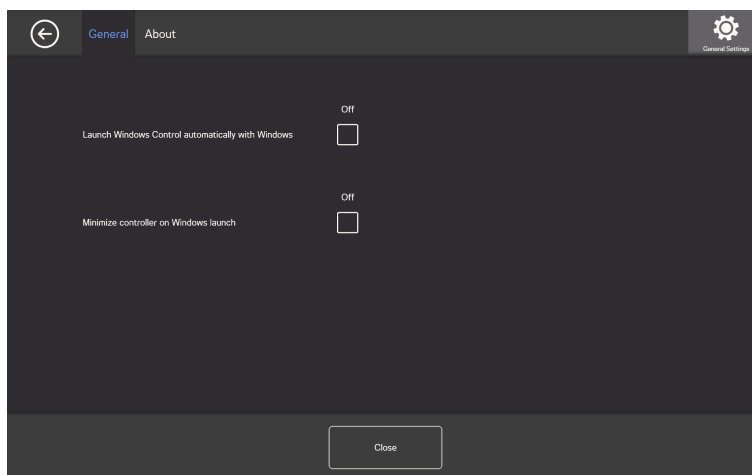

Αυτόματη εκκίνηση των **Windows Control** με τα **Windows**: Ενεργοποιήστε το διακόπτη On/Off στη θέση **On** εάν θέλετε τα Windows Control να ξεκινάνε αυτόματα μαζί με τα Windows.

Ελαχιστοποίηση ελεγκτή κατά την εκκίνηση των **Windows**: Ενεργοποιήστε το διακόπτη On/Off στη θέση **On** για να ελαχιστοποιείται Windows Control ο ελεγκτής όταν ξεκινάνε τα Windows.

4.2.2 Η καρτέλα Σχετικά

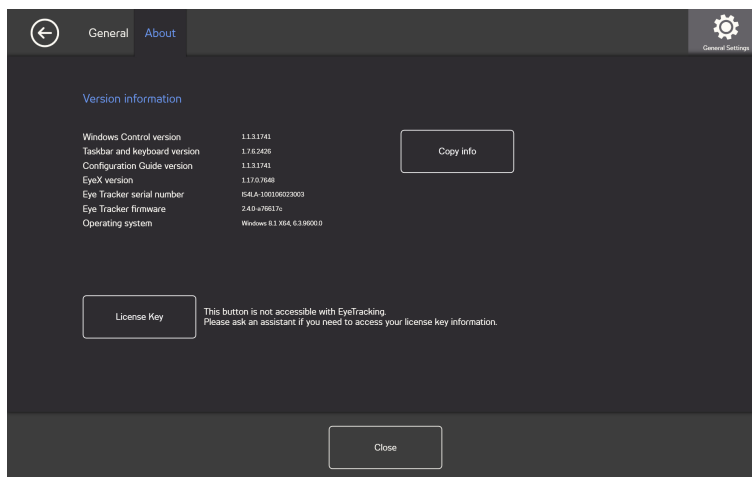

Στη σελίδα Σχετικά μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του λογισμικού και του εξοπλισμού Eye tracker. Μπορείτε να αντιγράψετε τις συγκεκριμένες πληροφορίες επιλέγοντας Αντιγραφή πληροφοριών και επικολλώντας τες σε ένα e-mail ή άλλο λογισμικό εάν χρειάζεται.

4.2.2.1 Κλειδί άδειας



Το πλήκτρο της άδειας δε μπορεί να ενεργοποιηθεί με το βλέμμα, ζητήστε βοήθεια από κάποιον εάν χρειάζεται να αλλάξετε την άδεια.


Για να ενεργοποιήσετε την άδεια, δείτε 2.2.1 Ενεργοποίηση άδειας, σελίδα 6.

Για να απενεργοποιήσετε την άδεια, δείτε 2.2.2 Απενεργοποίηση άδειας, σελίδα 7.

4.3 Ενεργοποίηση & Αναφώνηση



4.3.1 Η καρτέλα Ενεργοποίηση

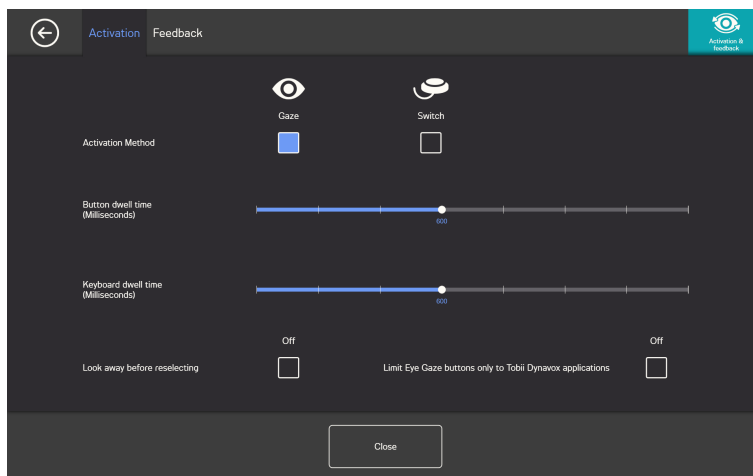

Στην καρτέλα Ενεργοποίηση, παραμετροποιούνται οι ρυθμίσεις της αλληλεπίδρασης του χρήστη Windows Control . Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει το βλέμμα ή το διακόπτη για την εκτέλεση εντολών και τη συμπεριφορά της αλληλεπίδρασης.

Μέθοδος ενεργοποίησης:

- Βλέμμα - Επιλέξτε βλέμμα για να χρησιμοποιήσετε το σημείο του βλέματος για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μεγέθυνσης, η οποία λήγει όταν εκτελεστεί η επιθυμητή εργασία.
- Διακόπτης - Επιλέξτε διακόπτη για να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μεγέθυνσης, η οποία λήγει όταν εκτελεστεί η επιθυμητή εργασία.


Πλήκτρο χρόνου παραμονής (**Milliseconds**)

Το πλήκτρο του χρόνου παραμονής μπορεί να οριστεί σε 8 επίπεδα, απλά κοιτάξτε στη θέση που επιθυμείτε για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Η αλλαγή του χρόνου παραμονής αλλάζει το διάστημα που χρειάζεται να κοιτάξει ο χρήστης σε ένα πλήκτρο πριν εκτελεστεί η εργασία. Αριστερά στην κλίμακα αντιστοιχεί σε χαμηλότερο χρόνο, και δεξιά σε μεγαλύτερο χρόνο.

Χρόνος παραμονής πληκτρολογίου (**Milliseconds**)

Ο χρόνος παραμονής του πληκτρολογίου μπορεί να οριστεί σε 8 επίπεδα, απλά κοιτάξτε στη θέση που επιθυμείτε για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Η αλλαγή του χρόνου παραμονής του πληκτρολογίου αλλάζει το διάστημα που χρειάζεται να κοιτάξει ο χρήστης σε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο πριν πατηθεί το συγκεκριμένο πλήκτρο. Αριστερά στην κλίμακα αντιστοιχεί σε χαμηλότερο χρόνο, και δεξιά σε μεγαλύτερο χρόνο.


4.3.2 Η καρτέλα Κατάσταση

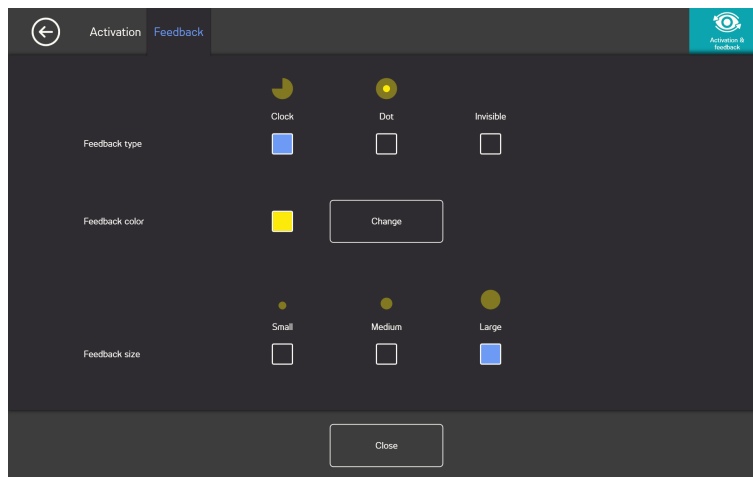

Τύπος κατάστασης:

- Ρολόι - Η οπτική ένδειξη είναι ένα ρολόι που γεμίζει κατά τη διάρκεια του προκαθορισμένου χρόνου παραμονής του πλήκτρου. Όταν το ρολό γεμίσει τελείως, εκτελείται η εργασία.
- Τελεία - Η οπτική ένδειξη είναι μία τελεία που μικραίνει ή μια στατική τελεία για όσους χρησιμοποιούν το διακόπτη όταν εκτελείται μια εργασία.
- Αόρατο - Δεν εμφανίζεται καμία οπτική ένδειξη στην οθόνη όταν εκτελείται μια εργασία.

Χρώμα κατάστασης: Επιλέξτε το πλήκτρο Αλλαγή για να αλλάξετε το χρώμα της ένδειξης. Για τα διαθέσιμα χρώματα, δείτε Εικόνα 4.1 Διαθέσιμα χρώματα, σελίδα 28.

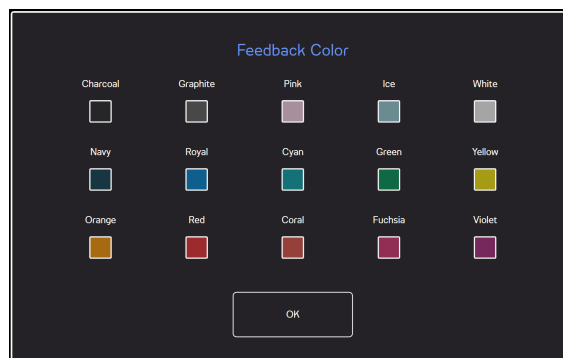

Εικόνα 4.1 Διαθέσιμα χρώματα


Μέγεθος ένδειξης: Το μέγεθος της ένδειξης του επιλεγμένου τύπου ένδειξη μπορεί να έχει τρεις (3) τιμές.

- Μικρό
- Μεσαίο
- Μεγάλο

4.4 Γραμμή εργασιών & Πληκτρολόγιο



4.4.1 Η καρτέλα μεγέθυνσης

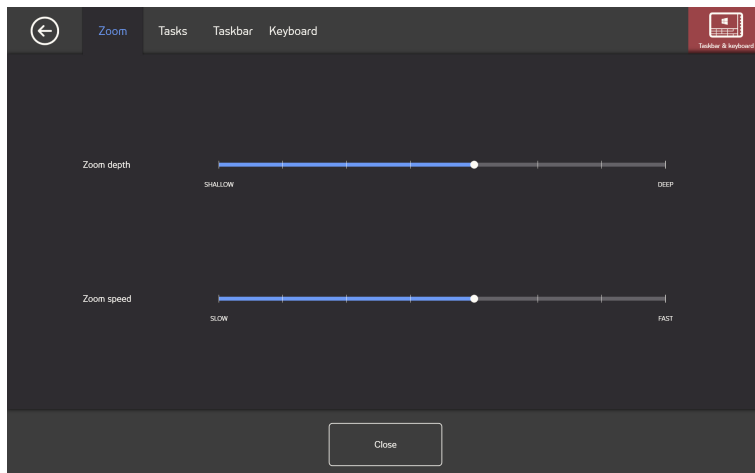

Βάθος μεγέθυνσης

Το βάθος μεγέθυνσης μπορεί να οριστεί σε 8 επίπεδα, απλά κοιτάξετε στη θέση που επιθυμείτε για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Η αλλαγή του βάθους μεγέθυνσης ρυθμίζει το επίπεδο της μεγέθυνσης πριν εκτελεστεί η εργασία. Όσο πιο δεξιά γίνεται μετακίνηση στην κλίμακα τόσο μεγαλύτερο το βάθος της μεγέθυνσης.




Εάν το βάθος έχει οριστεί στην τιμή μηδέν, δεν θα γίνει καμία μεγέθυνση. Θα είναι ένα άμεσο κλικ με την κύρια επιλογή. Με τη δευτερεύουσα επιλογή θα εξακολουθήσει να είναι μεγέθυνση.

Ταχύτητα μεγέθυνσης

Η ταχύτητα μεγέθυνσης μπορεί να οριστεί σε 8 επίπεδα, απλά κοιτάξετε στη θέση που επιθυμείτε για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Η αλλαγή της ταχύτητας επηρεάζει το πόσο γρήγορα υλοποιείται η μεγέθυνση πριν εκτελεστεί η εργασία. Όσο πιο δεξιά γίνεται μετακίνηση στην κλίμακα τόσο γρηγορότερη είναι η ταχύτητα της μεγέθυνσης.

4.4.2 Η καρτέλα Εργασία

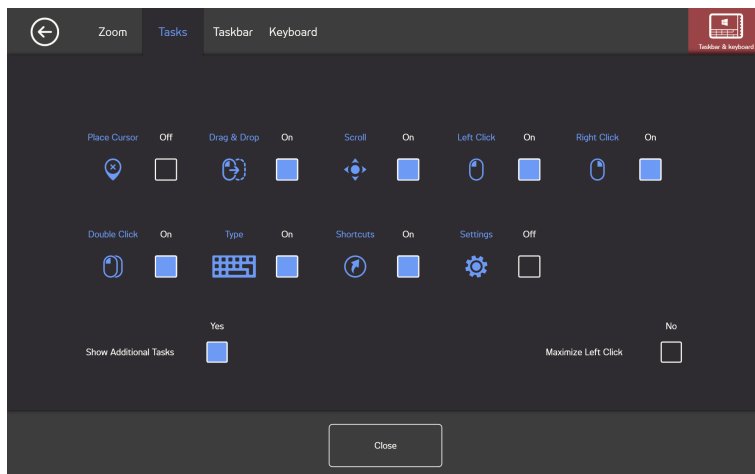

Επιλέξτε ποιες εργασίες θα χρησιμοποιηθούν στη Γραμμή εργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες για τις εργασίες, δείτε το 3.4 Εργασία, σελίδα 11.



Λάβετε υπόψη ότι όσο περισσότερες εργασίες υπάρχουν στη Γραμμή εργασιών, τόσο δυσκολότερη είναι η επιλογή τους σε μικρές οθόνες.

Ενεργοποιήστε το διακόπτη On/Off στη θέση **On** για κάθε εργασία για να ενεργοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί στη Γραμμή εργασιών.

Ενεργοποιήστε το διακόπτη On/Off στη θέση **Off** για κάθε εργασία για να απενεργοποιήσετε τη χρήση της και να μην είναι ορατή στη Γραμμή εργασιών.

4.4.2.1 Προβολή συμπληρωματικών εργασιών


Εάν επιλεγεί η θέση Off, οι συμπληρωματικές εργασίες δεν θα είναι διαθέσιμες. Εάν επιλεγεί η θέση On, οι συμπληρωματικές εργασίες θα είναι διαθέσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 3.5 Συμπληρωματικές ενέργειες, σελίδα 12.

4.4.2.2 Μεγιστοποίηση αριστερού κλικ




Η μεγιστοποίηση του αριστερού κλικ επεκτείνει την ενεργή περιοχή του αριστερού κλικ στη Γραμμή εργασιών, καθιστώντας ευκολότερη την επιλογή με αριστερό κλικ.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Μεγιστοποίηση αριστερού κλικ για να επεκτείνετε και να δώσετε έμφαση στο αριστερό κλικ στη Γραμμή εργασιών. Εάν είναι στη θέση Off, όλες οι επιλεγμένες εργασίες θα κατανεμηθούν ομοιόμορφα στη Γραμμή εργασίας. Εάν είναι στη θέση On, όλες οι εργασίες εκτός από το αριστερό κλικ θα διατηρήσουν τα αρχικά/μικρότερα μεγέθη τους και η ενέργεια του αριστερού κλικ θα γεμίσει το υπόλοιπο μέρος της Γραμμής εργασίας.

4.4.3 Η καρτέλα Γραμμή εργασίας

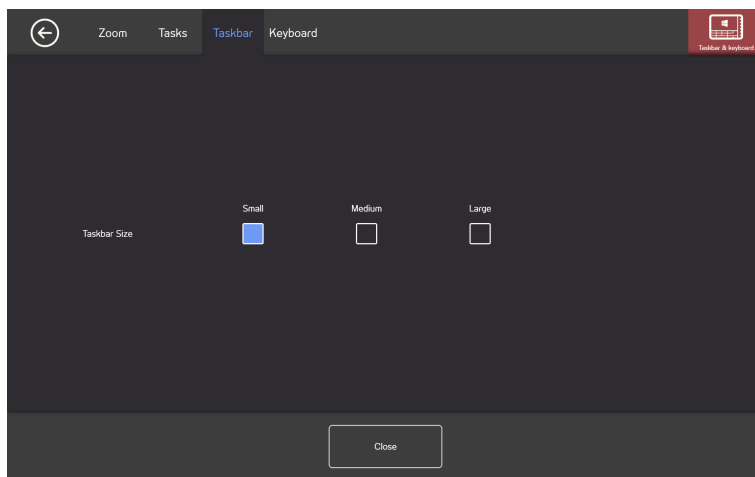


Στην καρτέλα Γραμμή εργασίας το μέγεθος της Γραμμής εργασίας μπορεί να αλλάξει ανάμεσα σε τρία (3) μεγέθη:

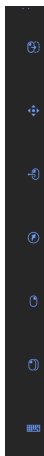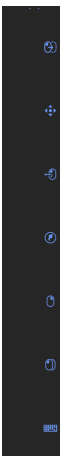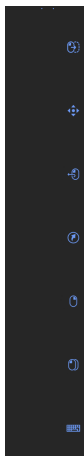Μικρό	Μεσαίο	Μεγάλο
		

Η επιλογή μεγαλύτερου μεγέθους για τη Γραμμή εργασίας επεκτείνει την ενεργή περιοχή γύρω από τη Γραμμή εργασίας για να είναι ευκολότερο για το χρήστη να επιλέξει εργασία. Η πραγματική ενεργή περιοχή επεκτείνεται έξω από την οθόνη και το εικονίδιο των εργασιών είναι πάντα στο κέντρο της ενεργής περιοχής.

4.4.4 Η καρτέλα πληκτρολόγιο

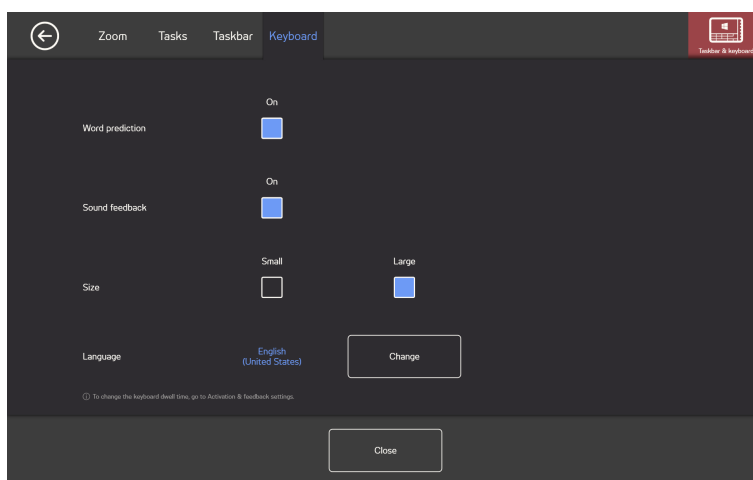

Πρόβλεψη λέξης

- Θέση **On** - Επιλέξτε τη θέση On για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πρόβλεψης λέξης όταν το χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο με το βλέμμα. (Προεπιλογή)
- Θέση **Off** - Επιλέξτε τη θέση Off για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πρόβλεψης λέξης όταν το χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο με το βλέμμα.

Ηχητική αναφώνηση

- Θέση **On** - Επιλέξτε τη θέση On για να ενεργοποιήσετε την ηχητική αναφώνηση όταν επιλέγετε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο με το βλέμμα.
- Θέση **Off** - Επιλέξτε τη θέση Off για να απενεργοποιήσετε την ηχητική αναφώνηση όταν επιλέγετε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο με το βλέμμα.

Μέγεθος

- Μικρό - Επιλέξτε Μικρό για να χρησιμοποιήσετε πληκτρολόγιο βλέμματος μικρότερου μεγέθους, το οποίο καταλαμβάνει χώρο μικρότερο από τη μισή οθόνη, δείτε Εικόνα 4.2 Διάταξη μικρού πληκτρολογίου (προεπιλογή), σελίδα 32.

- **Μεγάλο** - Επιλέξτε Μεγάλο για να χρησιμοποιήσετε πληκτρολόγιο βλέμματος μεγαλύτερου μεγέθους, το οποίο καταλαμβάνει χώρο ίσο με τη μισή οθόνη, δείτε Εικόνα 4.3 Διάταξη μεγάλου πληκτρολογίου, σελίδα 32.



Εικόνα 4.2 Διάταξη μικρού πληκτρολογίου (προεπιλογή)



Εικόνα 4.3 Διάταξη μεγάλου πληκτρολογίου


Γλώσσα

Εμφανίζεται το επιλεγμένο πληκτρολόγιο της γλώσσας. Επιλέξτε το πλήκτρο Αλλαγή για να αλλάξετε τη γλώσσα του πληκτρολογίου. Υπάρχει ένας διαφορετικός αριθμός γλωσσών διαθέσιμες.

4.5 Βοήθεια και Χρήση



4.5.1 Η καρτέλα Βοήθεια

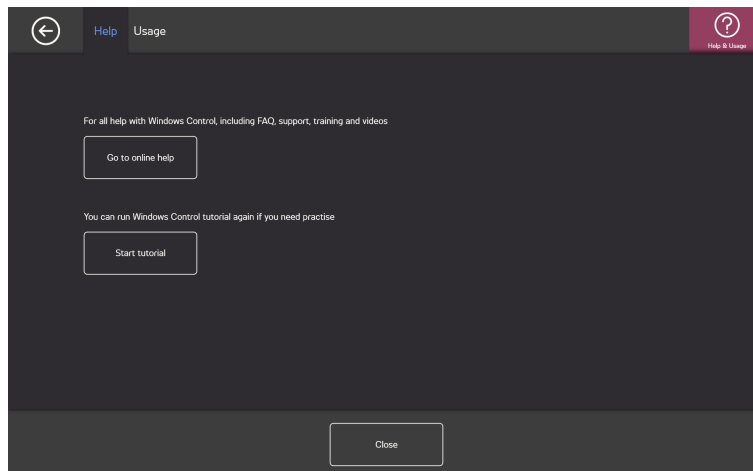


Επιλέξτε το πλήκτρο Μετάβαση στην ηλεκτρονική βοήθεια για να ανοίξετε Tobii Dynavox τις σελίδες της προϊοντικής υποστήριξης στο Internet στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης. Στις διαδικτυακές σελίδες υποστήριξης, ο χρήστης μπορεί να βρει τις Συχνές Ερωτήσεις, υποστήριξης, βίντεο και τεκμηρίωση για το Windows Control και άλλα προϊόντα της Tobii Dynavox.




Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή/υπολογιστής είναι συνδεδεμένη στο Internet.

Επιλέξτε το πλήκτρο Πατήστε το πλήκτρο του εκπαιδευτικού προγράμματος για να ξεκινήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εάν ο χρήστης χρειάζεται να κάνει περισσότερη εξάσκηση. Μπορείτε να ξεκινήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσες φορές θέλετε εάν το επιθυμεί ο χρήστης.

4.5.2 Η καρτέλα Χρήση

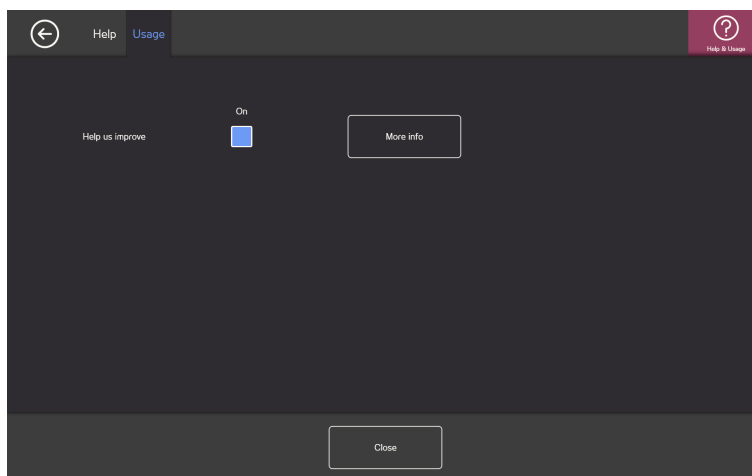

Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε: Για να μας βοηθήσετε Tobii Dynavox να βελτιώσουμε το λογισμικό, ενεργοποιήστε το διακόπτη On/Off στη θέση **On** . Επιλέξτε το πλήκτρο "Περισσότερες πληροφορίες" για να ανοίξετε μια σελίδα με πληροφορίες σχετικά με το τι αφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εικόνα 4.4 Συλλογή δεδομένων, σελίδα 33.

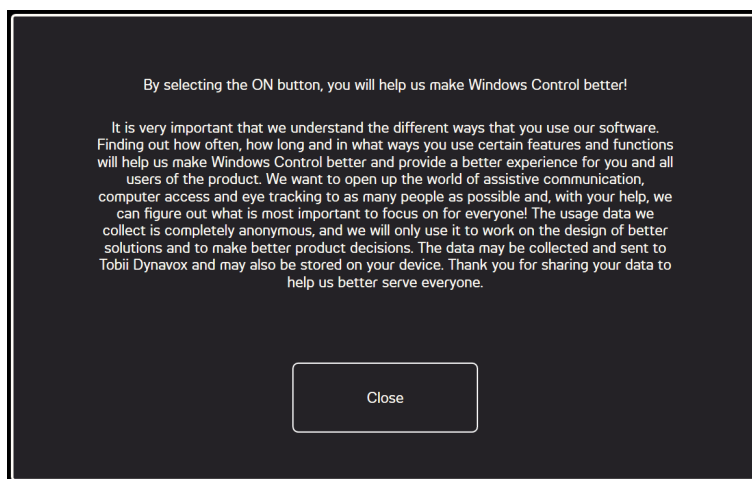

Εικόνα 4.4 Συλλογή δεδομένων

5 Virtual Remote

5.1 Virtual Remote Επισκόπηση



Εικόνα 5.1 Επισκόπηση Virtual Remote

Η Virtual Remote διαιρείται σε δύο περιοχές:

- Το Virtual Remote Μενού, για περισσότερες πληροφορίες δείτε 5.1.1 Virtual Remote Μενού, σελίδα 34.
- Το Ενεργό Τηλεχειριστήριο, για περισσότερες πληροφορίες δείτε 5.1.2 Το ενεργό τηλεχειριστήριο, σελίδα 35.

5.1.1 Virtual Remote Μενού




Εικόνα 5.2 ΤΟ Virtual Remote Μενού

Τα εικονίδια στο Virtual Remote μενού είναι:

Πλήκτρο εργασιών	Ενέργεια	Περιγραφή
+	Προσθήκη τηλεχειριστηρίου	Επιλέξτε αυτή την ενέργεια για να προσθέσετε νέο τηλεχειριστήριο, δείτε 5.2.4 Προσθήκη τηλεχειριστηρίου , σελίδα 37.
i	Πληροφορίες	Επιλέξτε αυτή την ενέργεια για να ανοίξετε τη σελίδα πληροφοριών, δείτε 5.2.6 Πληροφορίες , σελίδα 53.
<	Αριστερά	Επιλέξτε αυτή την ενέργεια για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο στα αριστερά του ενεργού τηλεχειριστηρίου.
>	Δεξιά	Επιλέξτε αυτή την ενέργεια για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο στη δεξιά πλευρά του ενεργού τηλεχειριστηρίου.
✎	Λειτουργία επεξεργασίας	Επιλέξτε αυτή την ενέργεια για να μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας στο ενεργό τηλεχειριστήριο, δείτε 5.2.5 Λειτουργία επεξεργασίας , σελίδα 44.
×	Κλείσιμο/Ελαχιστοποίηση	Επιλέξτε αυτή την ενέργεια για να ελαχιστοποιήσετε την εφαρμογή εικονικού τηλεχειριστηρίου.

5.1.2 Το ενεργό τηλεχειριστήριο

Το ενεργό τηλεχειριστήριο είναι πάντα το τηλεχειριστήριο στο κέντρο στο Virtual Remote Μενού, δείτε Εικόνα 5.3 Ενεργό Τηλεχειριστήριο.

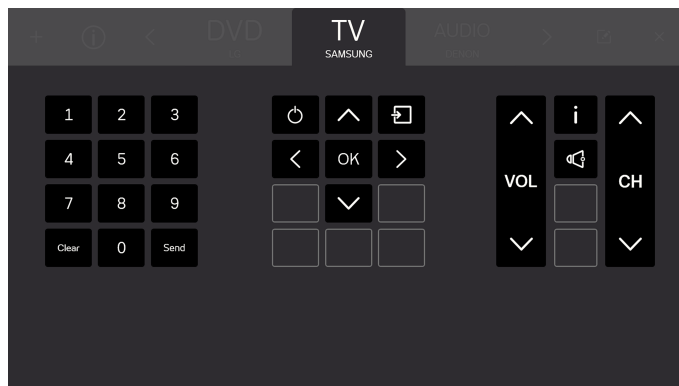


Εικόνα 5.3 Ενεργό Τηλεχειριστήριο



Όλα τα πλήκτρα που είναι ορατά στην οθόνη ανήκουν στο ενεργό τηλεχειριστήριο.

Θα μπορείτε επίσης να δείτε τα ονόματα έως δύο (2) ακόμα διαθέσιμων τηλεχειριστηρίων, στις πλευρές του τηλεχειριστηρίου. Θα μπορείτε να δείτε μόνο το όνομα και όχι τα πλήκτρα των διαθέσιμων τηλεχειριστηρίων μέχρι να ενεργοποιήσετε ένα τηλεχειριστήριο.

5.1.3 Τα πλήκτρα

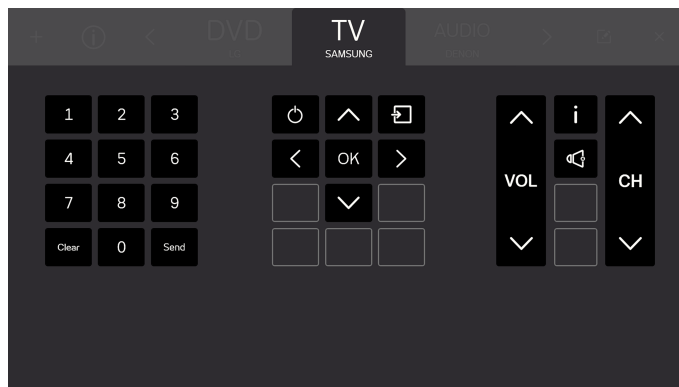


Εικόνα 5.4 Τα πλήκτρα

Όλα τα πλήκτρα που είναι ορατά στην οθόνη ανήκουν στο ενεργό τηλεχειριστήριο. Υπάρχουν δύο (2) τύποι πλήκτρων στο τηλεχειριστήριο.


- Ενεργό πλήκτρο , δείτε Εικόνα 5.5 Ενεργά πλήκτρα, σελίδα 36
- Ανενεργά πλήκτρα, , δείτε Εικόνα 5.6 Ανενεργά πλήκτρα, σελίδα 36



Ο αριθμός των πλήκτρων και των λειτουργιών των πλήκτρων διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του συστήματος που θέλει να ελέγξει ο χρήστης.

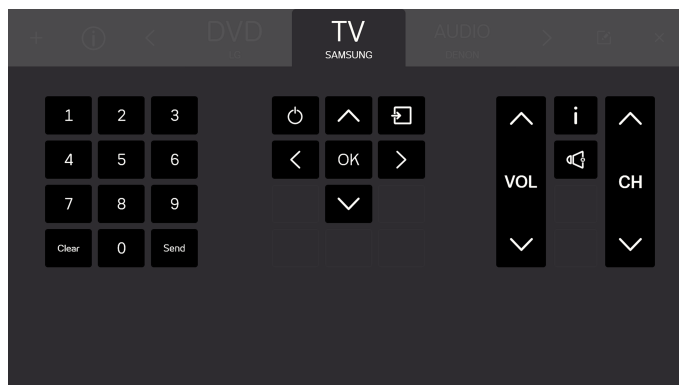

Εικόνα 5.5 Ενεργά πλήκτρα

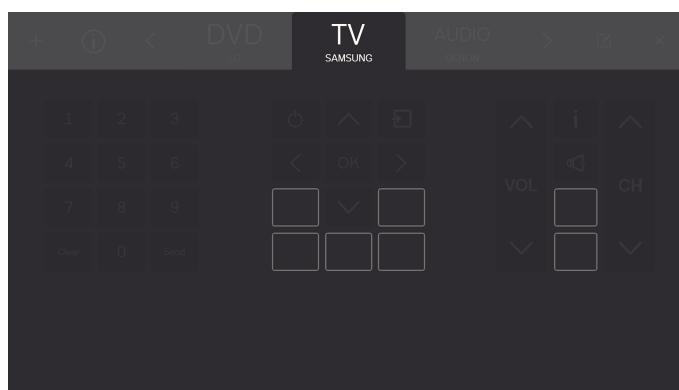

Εικόνα 5.6 Ανενεργά πλήκτρα

5.2 Η χρήση Tobii Dynavox Virtual Remote


Tobii Dynavox Virtual Remote δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να ελέγξει μια τηλεόραση, DVD, σύστημα ήχου, κλπ από τη συσκευή.



Όλες οι λειτουργίες στο Virtual Remote χρησιμοποιούν αφή και το ποντίκι, κάτι που δίνει τη δυνατότητα στον πάροχο φροντίδας ή στο βοηθό να βοηθήσει το χρήστη εάν χρειάζεται.

5.2.1 Κατά την πρώτη εκκίνηση

Ένα σύντομος οδηγός θα καθοδηγήσει το χρήστη στη διάταξη του Virtual Remote λογισμικού. Απλά ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

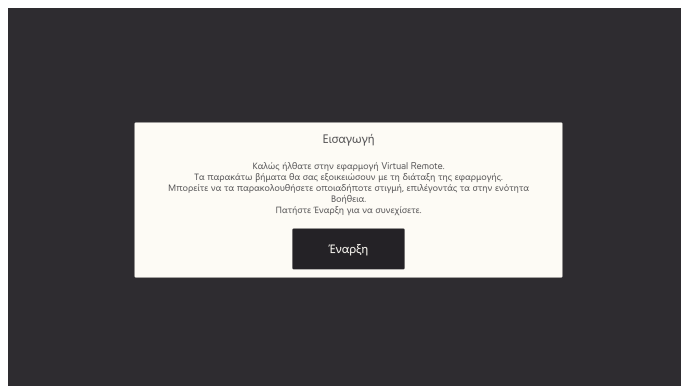

Εικόνα 5.7 Η Virtual Remote οθόνη εισαγωγής.

5.2.2 Αλλαγή ενεργού τηλεχειριστηρίου

Για να αλλάξετε ενεργό τηλεχειριστήριο:

- Επιλέξτε ένα από τα ονόματα δεξιά ή αριστερά στο ενεργό τηλεχειριστήριο.
- ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < και > για μετακύλιση στα διαθέσιμα τηλεχειριστήρια.



Το ενεργό τηλεχειριστήριο είναι πάντα το τηλεχειριστήριο στο κέντρο στο Virtual Remote Μενού.


5.2.3 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο

Απλά επιλέξτε το πλήκτρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε σήμα στη συσκευή. Τα πλήκτρα έντασης ήχου είναι συνήθως προγραμματισμένα να στέλνουν συνεχές σήμα για όσο διάστημα το πλήκτρο είναι πατημένο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 5.2.5.3.1 Μήκος σήματος, σελίδα 48.

Για να εισάγετε αριθμό μεγαλύτερο από 9 (π.χ. πολλαπλά ψηφία), ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία.

Λίστα βημάτων αριθμών μεγαλύτερους από 9

1. Επιλέξτε όλους τους αριθμούς που θέλετε να στείλετε με τη σειρά που θέλετε να στους στείλετε. Όλοι οι επιλεγμένοι αριθμοί θα είναι ορατοί σε ένα λευκό πλαίσιο κάτω από το τμήμα των αριθμών στο τηλεχειριστήριο.

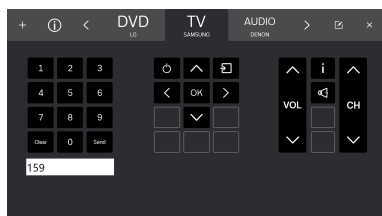

2. Επιλέξτε το εικονίδιο πλήκτρο Αποστολή για να στείλετε τα σήματα στη συσκευή ή Εκκαθάριση για να διαγράψετε όλους τους επιλεγμένους αριθμούς.

5.2.4 Προσθήκη τηλεχειριστηρίου




Υπάρχουν δύο (2) τρόποι για την προσθήκη νέου τηλεχειριστηρίου.

5.2.4.1 Προσθήκη ενός ήδη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου

Για να προσθέσετε ένα ήδη προγραμματισμένο τηλεχειριστήριο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:


Λίστα βημάτων προσθήκης ήδη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου

1. Επιλέξτε το  από το μενού.
2. Επιλέξτε το πλήκτρο "Ήδη προγραμματισμένο"

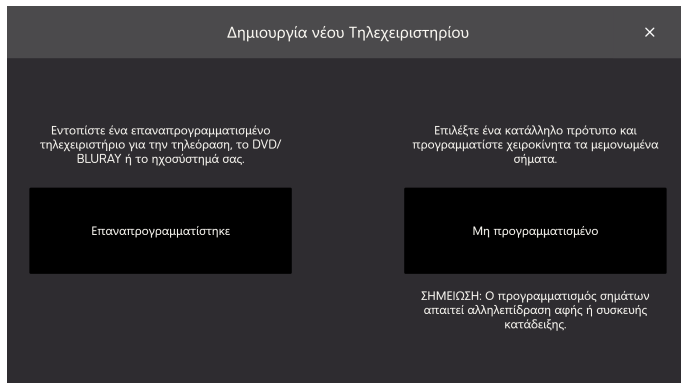

3. Επιλέξτε τύπο ήδη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου


- TV
- DVD/BLURAY
- AUDIO

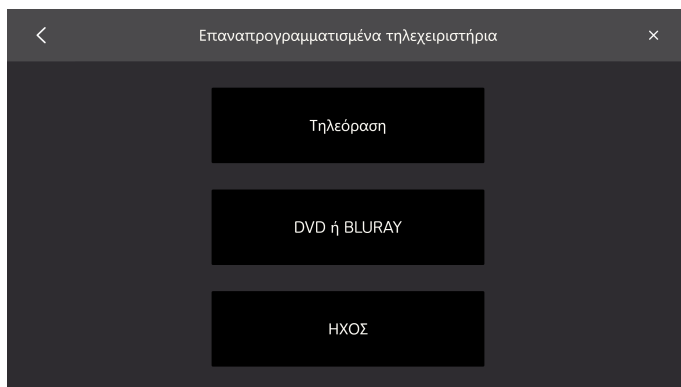


4. Επιλέξτε επωνυμία από τη λίστα



Εάν δε μπορείτε να βρείτε την επωνυμία που θέλετε, επιλέξτε πλήκτρο, για περισσότερες πληροφορίες δείτε 5.2.4.1.1 Άλλα τηλεχειριστήρια, σελίδα 40

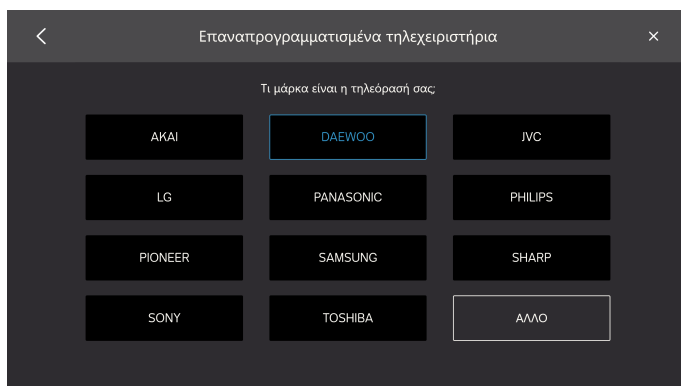


5. Όταν επιλεγεί μία επωνυμία, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα με πληροφορίες για το πόσα ήδη προγραμματισμένα τηλεχειριστήρια υπάρχουν

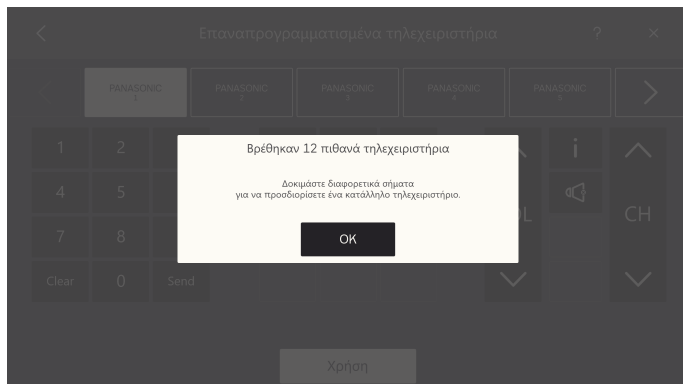

Επιλέξτε το πλήκτρο πλήκτρο "Εναρξη".

6. Επιλέξτε ένα τηλεχειριστήριο.

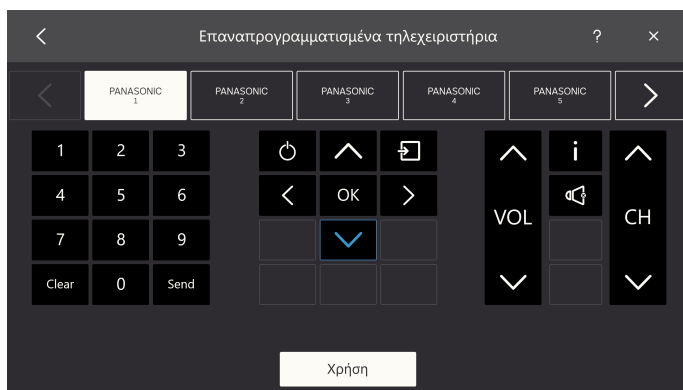


7. Δοκιμάστε τα διαφορετικά σήματα στο επιλεγμένο τηλεχειριστήριο για να βρείτε το κατάλληλο τηλεχειριστήριο.
8. Επαναλάβετε τα βήματα 6 & 7 μέχρι να βρείτε το πιο κατάλληλο τηλεχειριστήριο.




Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < και > για μετακύλιση στα διαθέσιμα τηλεχειριστήρια.

9. Επιλέξτε το πιο κατάλληλο τηλεχειριστήριο.
10. Επιλέξτε Χρήση πλήκτρο.

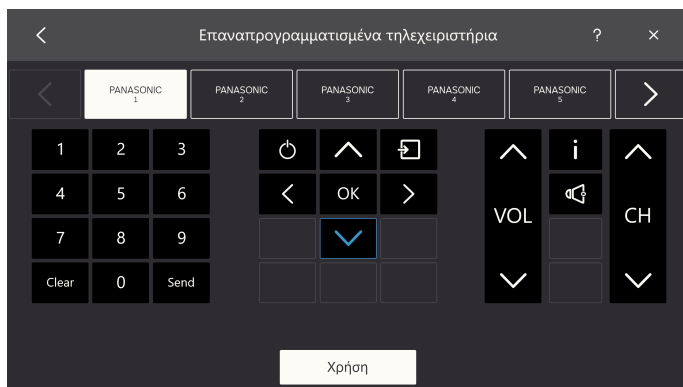

11. Το επιλεγμένο τηλεχειριστήριο θα αντιγραφεί στα διαθέσιμα τηλεχειριστήρια.

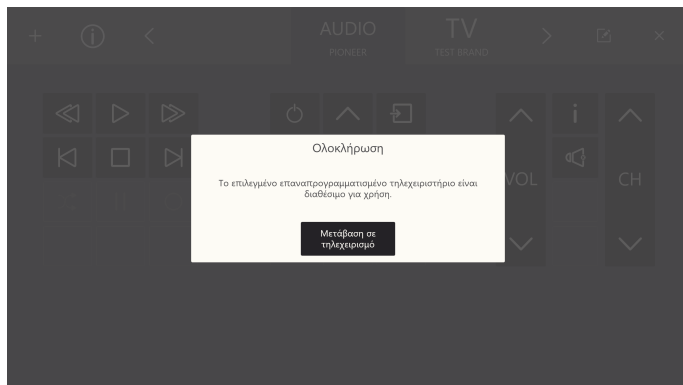


Επιλέξτε το πλήκτρο Μετάβαση στο τηλεχειριστήριο για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

5.2.4.1.1 Άλλα τηλεχειριστήρια


Για να προσθέσετε άλλα τηλεχειριστήρια, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

Λίστα βημάτων προσθήκης άλλων τηλεχειριστηρίων


1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 — 3 στη λίστα βημάτων: Λίστα βημάτων προσθήκης ήδη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου, σελίδα 38.
2. Επιλέξτε το πλήκτρο Άλλο.
3. Πληκτρολογήστε την επωνυμία στο πλαίσιο κειμένου.

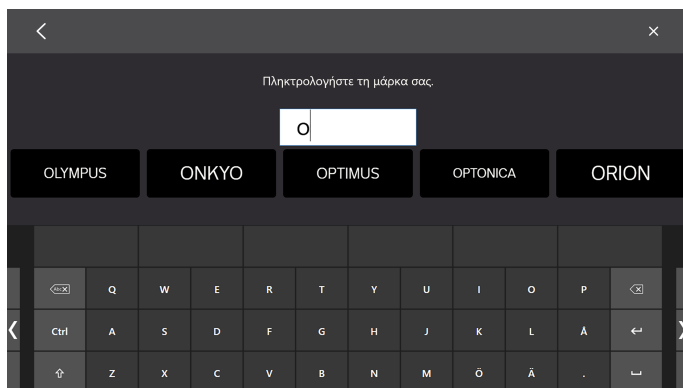


Για να περιορίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης, πληκτρολογήστε περισσότερους χαρακτήρες.

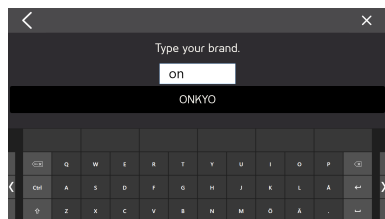

4. Επιλέξτε επωνυμία.

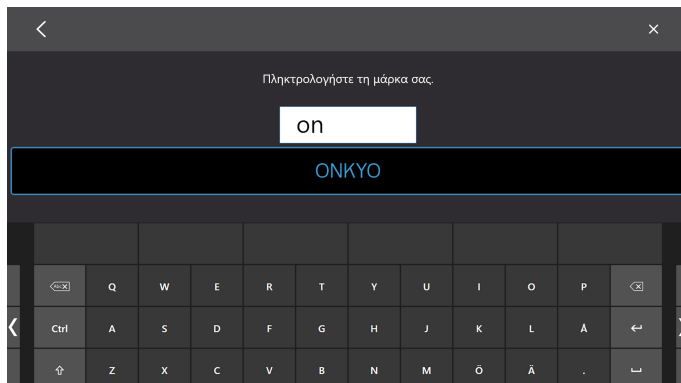


5. Όταν επιλεγεί μία επωνυμία, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα με πληροφορίες για το πόσα ήδη προγραμματισμένα τηλεχειριστήρια υπάρχουν

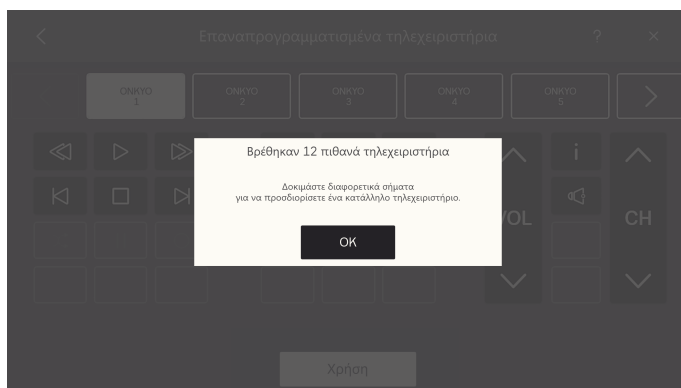

Επιλέξτε το πλήκτρο OK.

6. Επιλέξτε ένα τηλεχειριστήριο.

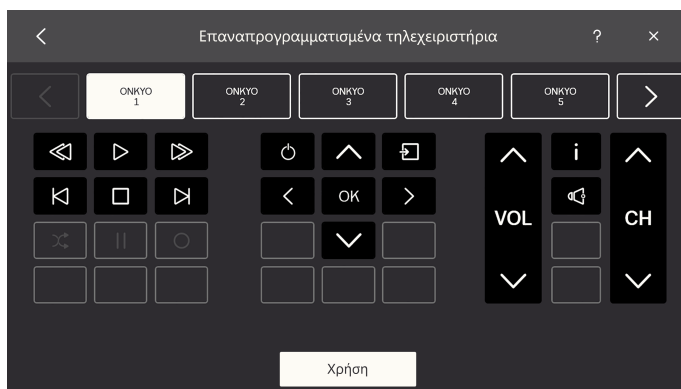


7. Δοκιμάστε τα διαφορετικά σήματα στο επιλεγμένο τηλεχειριστήριο για να βρείτε το κατάλληλο τηλεχειριστήριο.
8. Επαναλάβετε τα βήματα 6 & 7 μέχρι να βρείτε το καλύτερο δυνατό τηλεχειριστήριο.




Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < και > για μετακύλιση στα διαθέσιμα τηλεχειριστήρια.

9. Επιλέξτε το πιο κατάλληλο τηλεχειριστήριο.

10. Επιλέξτε Χρήση πλήκτρου.

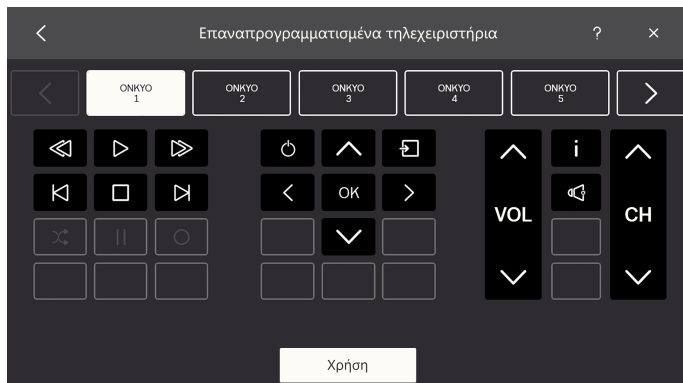

11. Το επιλεγμένο τηλεχειριστήριο θα αντιγραφεί στα διαθέσιμα τηλεχειριστήρια.

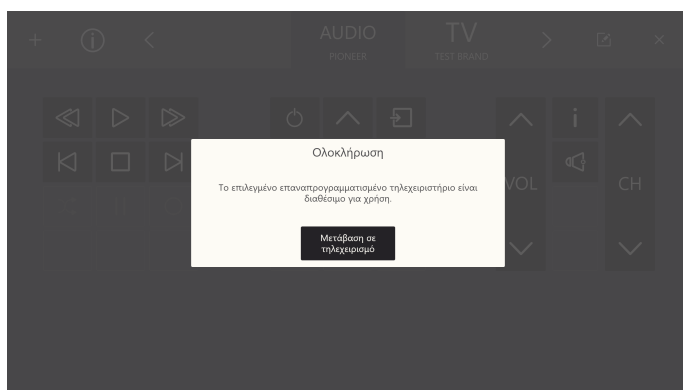


Επιλέξτε το πλήκτρο Μετάβαση στο τηλεχειριστήριο για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

5.2.4.2 Προσθήκη ενός μη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου

Για να προσθέσετε ένα μη προγραμματισμένο τηλεχειριστήριο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

Λίστα βημάτων προσθήκης μη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου


1. Επιλέξτε το  από το μενού.
2. Επιλέξτε το πλήκτρο "Μη προγραμματισμένο"

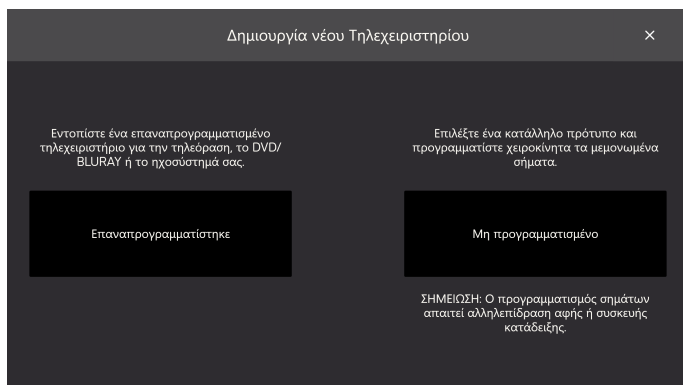

3. Επιλέξτε τύπο μη προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου

- TV
- AUDIO
- CABLE BOX

- DVD ή BLURAY
- ΚΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

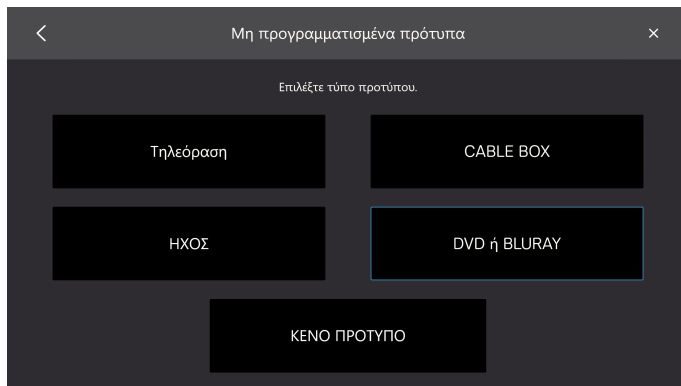

4. Επιλέξτε ένα πλήκτρο για προγραμματισμό.




Τα διαθέσιμα εικονίδια διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο τηλεχειριστηρίου που επιλέχθηκε στο Βήμα 3.

5. Επιλέξτε ένα πλήκτρο για προγραμματισμό.
6. Στοιχεύστε το τηλεχειριστήριο Tobii Dynavox στο δέκτη υπερύθρων και πατήστε το πλήκτρο που επιθυμείτε στο τηλεχειριστήριο που θέλετε να εκπαιδεύσετε το εικονικό τηλεχειριστήριο.



7. Όταν αποθηκευτεί το σήμα στο εικονικό τηλεχειριστήριο θα εμφανιστεί το μήνυμα **Done** .

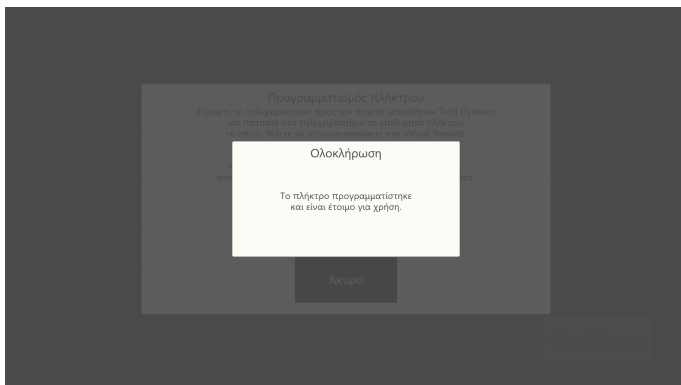

Το αναδυόμενο μήνυμα θα κλείσει αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

8. Επαναλάβετε τα βήματα 5 — 7 για να ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό όλων των πλήκτρων που επιθυμείτε στο τηλεχειριστήριο.



Για να αλλάξετε ή να διαγράψετε πλήκτρα στο Τηλεχειριστήριο θα πρέπει να ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό και να μεταβείτε στη λειτουργία Επεξεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία Επεξεργασίας, δείτε 5.2.5 Λειτουργία επεξεργασίας , σελίδα 44.

9. Επιλέξτε **Done** για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.




5.2.5 Λειτουργία επεξεργασίας



Στη λειτουργία Επεξεργασίας μπορείτε να κάνετε αλλαγές στα υφιστάμενα τηλεχειριστήρια. Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο που θέλετε να τροποποιήσετε είναι το ενεργό τηλεχειριστήριο. Για να μπει στη λειτουργία Επεξεργασίας, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

Λίστα βημάτων λειτουργίας Επεξεργασίας

1. Επιλέξτε το πλήκτρο  (λειτουργία Επεξεργασίας).

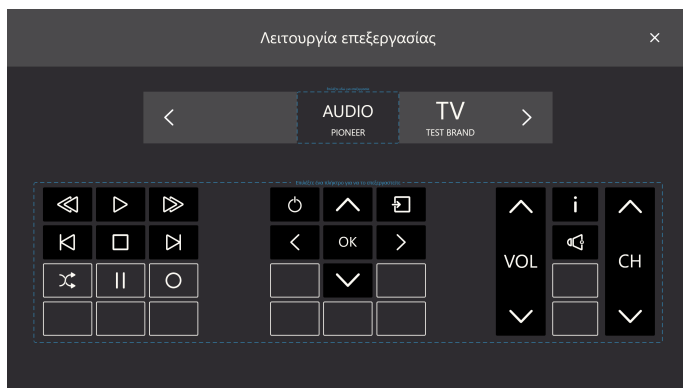


2. Επιλέξτε την ενότητα του τηλεχειριστηρίου στην οποία θέλετε να κάνετε αλλαγές. Μπορούν να γίνουν οι παρακάτω αλλαγές:
 - Αλλαγή ονόματος τηλεχειριστηρίου, δείτε 5.2.5.1 Αλλαγή ονόματος τηλεχειριστηρίου, σελίδα 45
 - Διαγραφή τηλεχειριστηρίου, δείτε 5.2.5.2 Διαγραφή τηλεχειριστηρίου, σελίδα 46
 - Αλλαγές σε υφιστάμενο ενεργό πλήκτρο, δείτε 5.2.5.3 Αλλαγές σε υφιστάμενο ενεργό πλήκτρο.
 - Αλλαγές σε υφιστάμενο μη προγραμματισμένο πλήκτρο, δείτε 5.2.5.4 Αλλαγές σε υφιστάμενο μη προγραμματισμένο πλήκτρο, σελίδα 50.
 - Προσθήκη νέου πλήκτρου σε ένα άδειο χώρο, δείτε 5.2.5.5 Προσθήκη νέου πλήκτρου σε ένα άδειο χώρο, σελίδα 52

5.2.5.1 Αλλαγή ονόματος τηλεχειριστηρίου

Για να αλλάξετε το όνομα ενός τηλεχειριστηρίου, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:


Αλλαγή ονόματος τηλεχειριστηρίου

1. Επιλέξτε το πλήκτρο  (λειτουργία Επεξεργασίας).

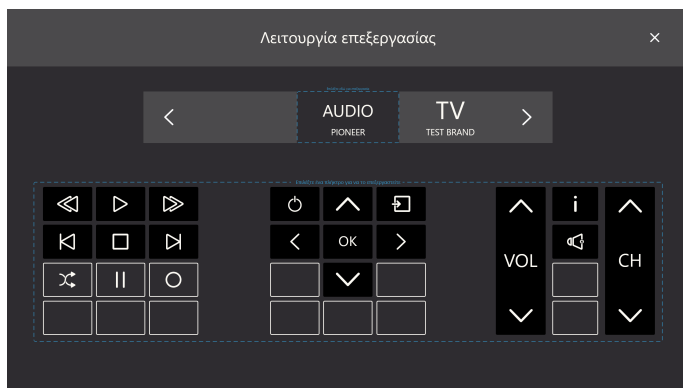

2. Επιλέξτε το πλαίσιο "Επιλέξτε εδώ για επεξεργασία" γύρω από το όνομα του τηλεχειριστηρίου.


3. Επιλέξτε το πλήκτρο Αλλαγή ετικέτας.

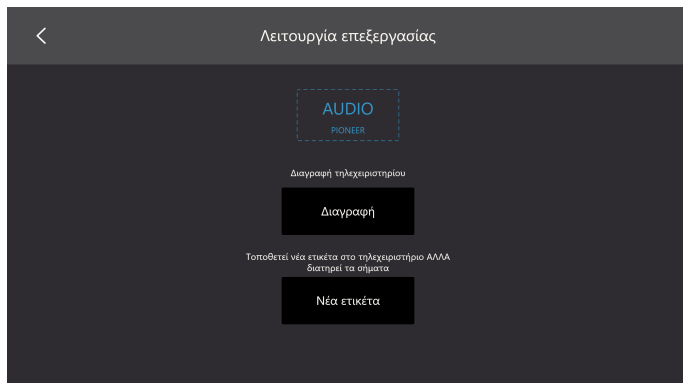

4. Πληκτρολογήστε τη νέα ετικέτα



Χρησιμοποιήστε ένα μικρό όνομα.

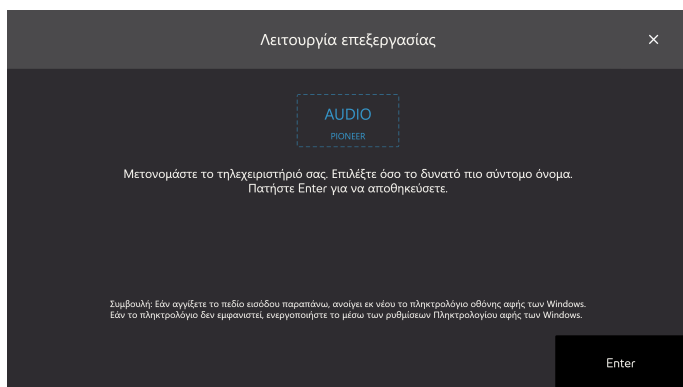

5. Επιλέξτε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο για να ολοκληρώσετε την αλλαγή του ονόματος της ετικέτας.


6. Επιλέξτε το εικονίδιο  για να βγείτε από τη λειτουργία Επεξεργασίας.

5.2.5.2 Διαγραφή τηλεχειριστηρίου


Για να διαγράψετε ένα τηλεχειριστήριο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

Λίστα βημάτων διαγραφής τηλεχειριστηρίου


1. Επιλέξτε το πλήκτρο  (Λειτουργία Επεξεργασίας).

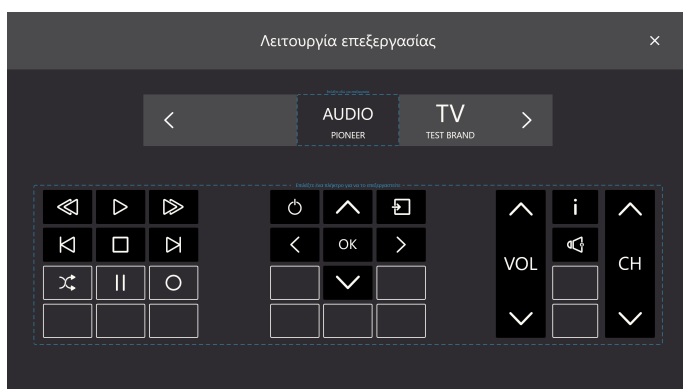

- Επιλέξτε το πλαίσιο “Επιλέξτε εδώ για επεξεργασία” γύρω από το όνομα του τηλεχειριστηρίου.
- Επιλέξτε το Πλήκτρο Διαγραφή.

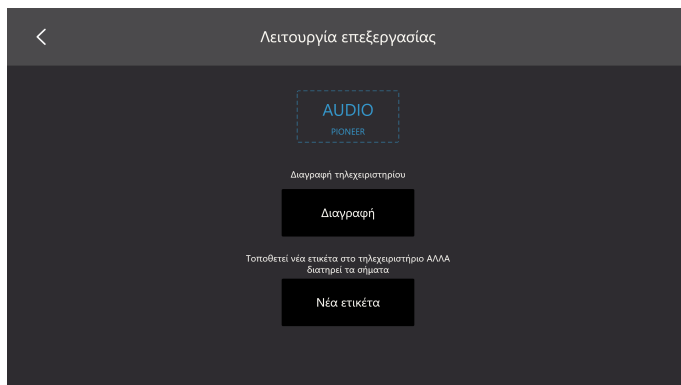

- Επιλέξτε:
 - Ναι για Διαγραφή
 - Όχι για ακύρωση

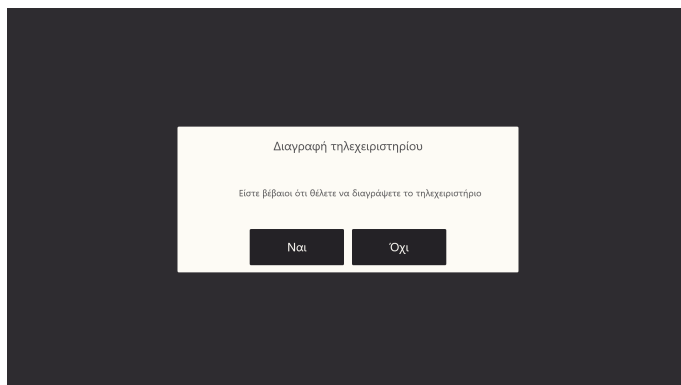


- Επιλέξτε το εικονίδιο  για να βγείτε από τη λειτουργία Επεξεργασίας.

5.2.5.3 Αλλαγές σε υφιστάμενο ενεργό πλήκτρο


Για να κάνετε αλλαγές σε ένα υφιστάμενο ενεργό πλήκτρο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

Λίστα βημάτων αλλαγών σε υφιστάμενο ενεργό πλήκτρο

- Επιλέξτε το πλήκτρο  (Λειτουργία Επεξεργασίας).

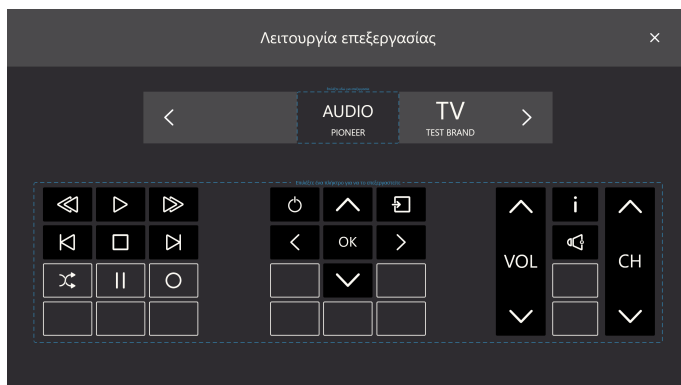

2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο με μαύρο φόντο και εικονίδιο ή κείμενο, π.χ. , στο πλαίσιο “Διαλέξτε ένα πλήκτρο για επεξεργασία” γύρω από τα πλήκτρα του τηλεχειρισμού.
3. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
 - Μήκος σήματος, δείτε 5.2.5.3.1 Μήκος σήματος.
 - Νέο σήμα, δείτε 5.2.5.3.2 Νέο σήμα, σελίδα 48
 - Αλλαγή κειμένου, δείτε 5.2.5.3.3 Αλλαγή κειμένου, σελίδα 49
 - Αλλαγή εικονιδίου, δείτε 5.2.5.3.4 Αλλαγή εικονιδίου, σελίδα 50
 - Πλήκτρο εκκαθάρισης, διαγράφει όλες τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο πλήκτρο.

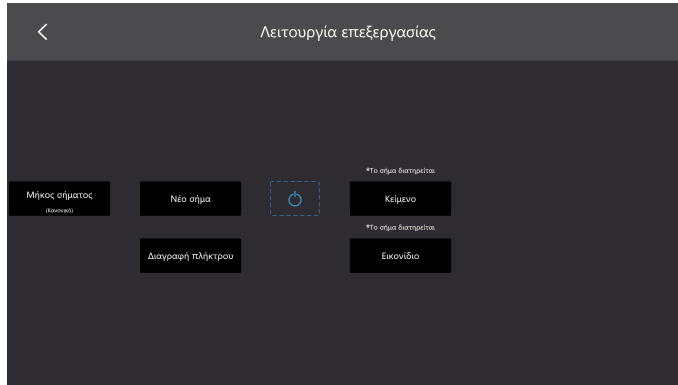

4. Επιλέξτε το εικονίδιο  για να βγείτε από τη λειτουργία Επεξεργασίας.

5.2.5.3.1 Μήκος σήματος

Προκειμένου να αντιληφθεί η μονάδα λήψης το σήμα που αποστέλλεται από εσάς Virtual Remote, ίσως χρειάζεται να αλλάξετε το μήκος του σήματος. Το μήκος σήματος πρέπει επίσης να οριστεί εάν θέλετε το πλήκτρο να στέλνει συνεχώς το σήμα κάθε φορά που το επιλέγετε.

Επιλέξτε μία (1) από τις παρακάτω εναλλακτικές:

- Κανονικό — στέλνει υπέρυθρο σήμα πολύ μικρής διάρκειας.
- Μεγάλο— στέλνει υπέρυθρο σήμα στη διάρκεια ενός (1) δευτερολέπτου.
- Υπερβολικά μεγάλο — στέλνει υπέρυθρο σήμα στη διάρκεια δύο (2) δευτερολέπτων.
- Συνεχές — στέλνει σήμα κάθε φορά που επιλέγεται το πλήκτρο.



Αυτή είναι η τυπική ρύθμιση ενός πλήκτρου έντασης ήχου για παράδειγμα



5.2.5.3.2 Νέο σήμα


Για να προγραμματίσετε ένα νέο σήμα για ένα πλήκτρο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

Λίστα βημάτων νέου σήματος

1. Στοιχεύστε το τηλεχειριστήριο Tobii Dynavox στο δέκτη υπερύθρων και πατήστε το πλήκτρο που επιθυμείτε στο τηλεχειριστήριο που θέλετε να εκπαιδεύσετε το εικονικό τηλεχειριστήριο.



2. Όταν αποθηκευτεί το σήμα στο εικονικό τηλεχειριστήριο θα εμφανιστεί το μήνυμα **Done**.

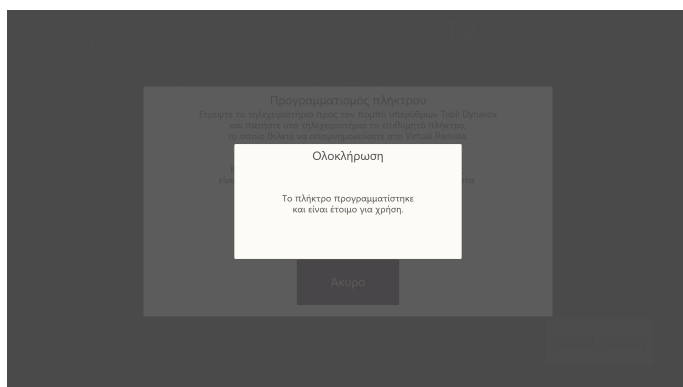


Το αναδυόμενο μήνυμα θα κλείσει αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

5.2.5.3.3 Αλλαγή κειμένου

Για να αλλάξετε κείμενο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

Λίστα βημάτων αλλαγής κειμένου

1. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θα είναι στο πλήκτρο.

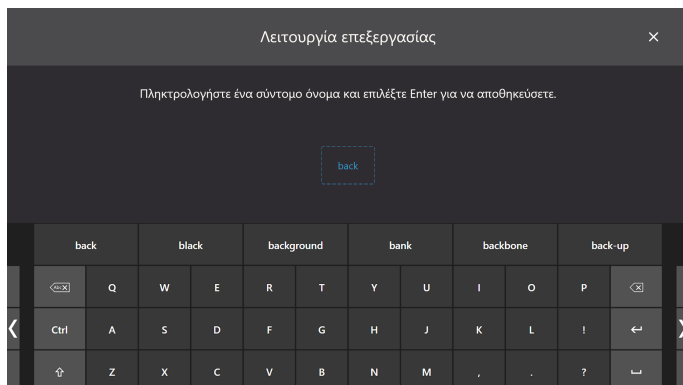


2. Πατήστε το πλήκτρο Enter/Return στο πληκτρολόγιο για να κάνετε αποδοχή του κειμένου.

5.2.5.3.4 Αλλαγή εικονιδίου

Για να αλλάξετε εικονίδιο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

1. Επιλέξτε ένα διαθέσιμο εικονίδιο.

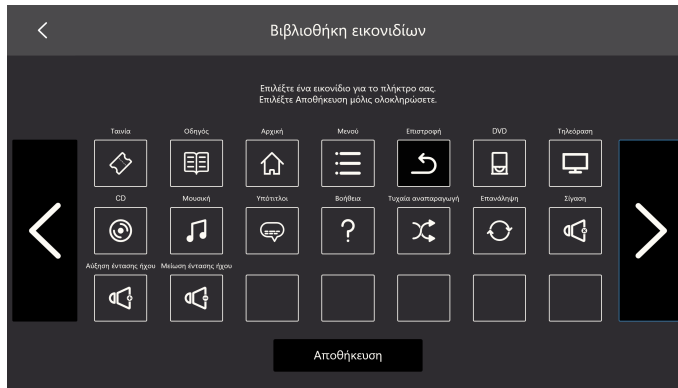


2. Επιλέξτε το πλήκτρο Αποθήκευση για αποδοχή του εικονιδίου.

5.2.5.4 Αλλαγές σε υφιστάμενο μη προγραμματισμένο πλήκτρο

Για να κάνετε αλλαγές σε ένα υφιστάμενο μη προγραμματισμένο πλήκτρο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:


Λίστα βημάτων αλλαγών σε υφιστάμενο μη προγραμματισμένο πλήκτρο

1. Επιλέξτε το πλήκτρο  (Λειτουργία Επεξεργασίας).

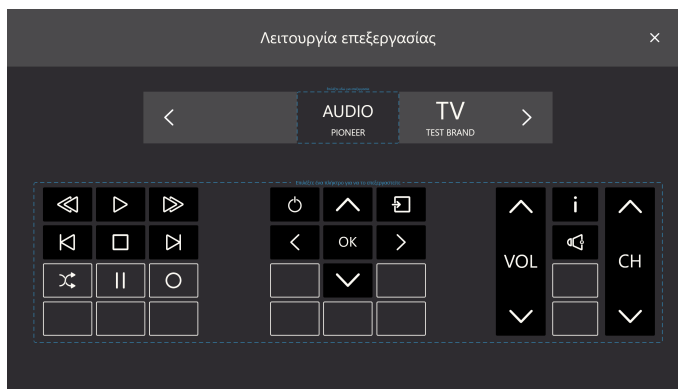

2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο με γκρι φόντο και εικονίδιο ή κείμενο, π.χ. , στο πλαίσιο "Διαλέξτε ένα πλήκτρο για επεξεργασία" γύρω από τα πλήκτρα του τηλεχειρισμού.
3. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
 - Πρόγραμμα, δείτε 5.2.5.4.1 Πρόγραμμα, σελίδα 51
 - Αλλαγή κειμένου, δείτε 5.2.5.3.3 Αλλαγή κειμένου, σελίδα 49
 - Αλλαγή εικονιδίου, δείτε 5.2.5.3.4 Αλλαγή εικονιδίου, σελίδα 50

- Πλήκτρο εκκαθάρισης, διαγράφει όλες τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο πλήκτρο.

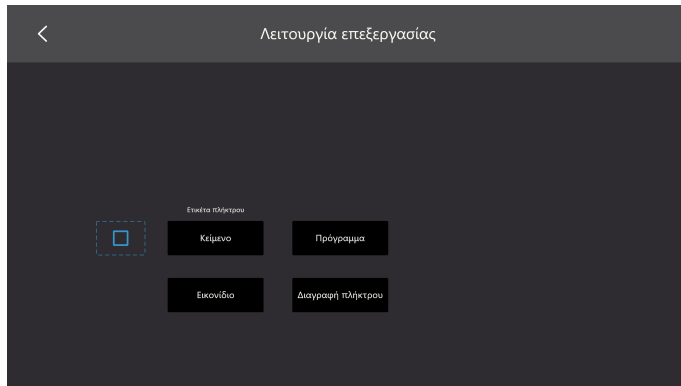


4. Επιλέξτε το εικονίδιο  για να βγείτε από τη λειτουργία Επεξεργασίας.

5.2.5.4.1 Πρόγραμμα


Για να προγραμματίσετε σήμα για ένα πλήκτρο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

Λίστα βημάτων προγράμματος

1. Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο Tobii Dynavox στο δέκτη υπερύθρων και πατήστε το πλήκτρο που επιθυμείτε στο τηλεχειριστήριο που θέλετε να εκπαιδεύσετε το εικονικό τηλεχειριστήριο.

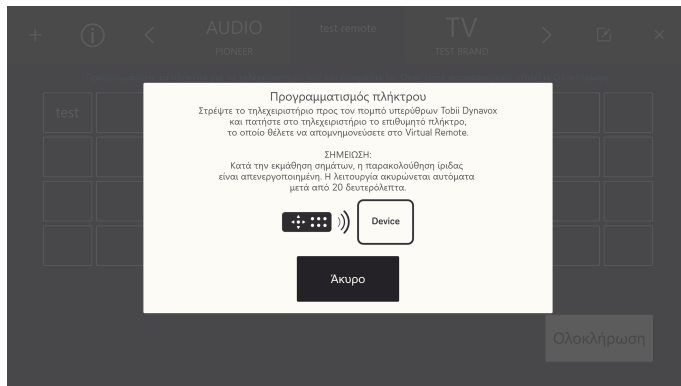

2. Όταν αποθηκευτεί το σήμα στο εικονικό τηλεχειριστήριο θα εμφανιστεί το μήνυμα **Done**.

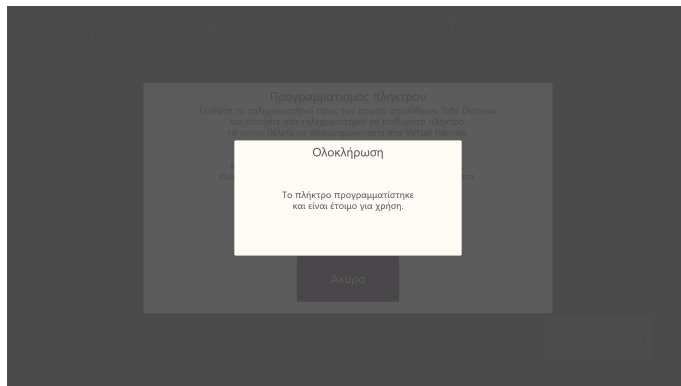


Το αναδυόμενο μήνυμα θα κλείσει αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

5.2.5.5 Προσθήκη νέου πλήκτρου σε ένα άδειο χώρο


Για να προσθέσετε ένα νέο πλήκτρο σε ένα άδειο χώρο, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

Προσθήκη νέου πλήκτρου σε ένα άδειο χώρο **Λίστα βημάτων**

1. Επιλέξτε το πλήκτρο  (Λειτουργία Επεξεργασίας).

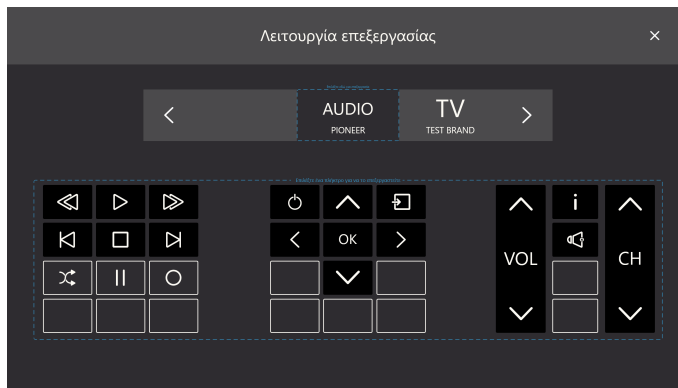

2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο με γκρι φόντο και άδειο, π.χ. , στο πλαίσιο "Διαλέξτε ένα πλήκτρο για επεξεργασία" γύρω από τα πλήκτρα του τηλεχειρισμού.
3. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
 - Αλλαγή κειμένου, δείτε 5.2.5.3.3 Αλλαγή κειμένου, σελίδα 49
 - Αλλαγή εικονιδίου, δείτε 5.2.5.3.4 Αλλαγή εικονιδίου, σελίδα 50

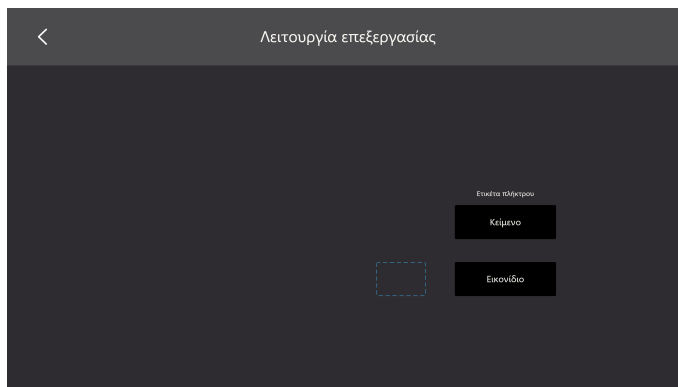


4. Επιλέξτε το εικονίδιο  για να βγείτε από τη λειτουργία Επεξεργασίας.


5.2.6 Πληροφορίες



Στη σελίδα πληροφοριών θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για την έκδοση τόσο για τον εξοπλισμό όσο και για τα διάφορα τμήματα λογισμικού.

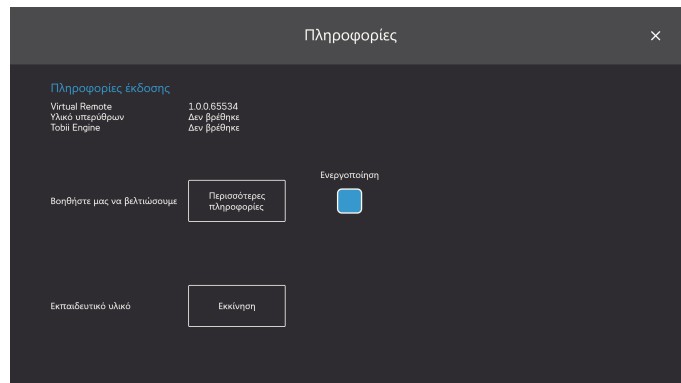

Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε: Για να μας βοηθήσετε Tobii Dynavox να βελτιώσουμε το λογισμικό, ενεργοποιήστε το διακόπτη On/Off στη θέση **On**. Επιλέξτε το πλήκτρο "Περισσότερες πληροφορίες" για να ανοίξετε μια σελίδα με πληροφορίες σχετικά με το τι αφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εικόνα 5.8 Συλλογή δεδομένων, σελίδα 53.

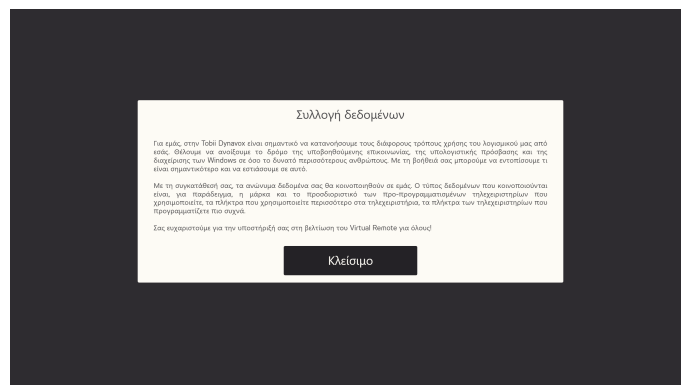

Εικόνα 5.8 Συλλογή δεδομένων

Εκπαιδευτικό υλικό: Θα μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε το Virtual Remote Εκπαιδευτικό υλικό επιλέγοντας το πλήκτρο "Έναρξη".

Copyright © Tobii AB (publ). Οι εικόνες και οι προδιαγραφές δεν ισχύουν απαραίτητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις τοπικές αγορές. Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Υποστήριξη για τη συσκευή σας Tobii Dynavox

Βοήθεια Online

Δείτε την ειδική σελίδα υποστήριξης για τη συγκεκριμένη συσκευή Dynavox. Περιέχει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με προβλήματα και συμβουλές και τεχνικές για το προϊόν. Μπορείτε να βρείτε τις σελίδες υποστήριξης online στη διεύθυνση: www.TobiiDynavox.com ή www.myTobiiDynavox.com.

Επικοινωνήστε με τον Αντιπρόσωπο πωλήσεων ή το Λιανοπωλητή σας

Για τυχόν ερωτήσεις ή προβλήματα για τον προϊόν σας, επικοινωνήστε με τον Αντιπρόσωπο πωλήσεων της Tobii Dynavox ή με τον εξουσιοδοτημένο λιανοπωλητή για βοήθεια. Γνωρίζουν τις προσωπικές σας ρυθμίσεις και μπορούν να σας βοηθήσουν καλύτερα παρέχοντάς σας συμβουλές και προϊόντική εκπαίδευση. Για τα στοιχεία επικοινωνίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.TobiiDynavox.com/contact