

Tobii Dynavox Windows Control Gebruikershandleiding

Incl. Virtual Remote 



Gebruikershandleiding Tobii Dynavox Windows Control

Versie 1.0.1

05/2017

Alle rechten voorbehouden.

Copyright © Tobii AB (publ)

Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke wijze dan ook (elektronisch, met gebruik van fotokopieën en opnamen of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De geclaimde copyright-bescherming omvat alle vormen van auteursrechtelijk beschermd materiaal en auteursrechtelijk beschermde informatie volgens de wet of hierin toegestaan, inclusief en niet beperkt tot materialen gegenereerd door de software-programma's die op het scherm worden weergegeven, zoals schermweergaven en menu's.

De informatie in dit document is eigendom van Tobii Dynavox. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tobii Dynavox is verboden.

Producten waarnaar in dit document wordt verwezen kunnen handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren. De uitgever en de auteur maken geen aanspraak op deze handelsmerken.

Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen in de voorbereiding van dit document, zijn de uitgever en de auteur niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen, noch voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie in dit document of uit het gebruik van programma's en eventuele bijbehorende broncode. De uitgever en de auteur kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van winst of enige andere commerciële schade die direct of indirect is veroorzaakt of wordt vermeend te zijn veroorzaakt door dit document.

De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Bezoek alstublieft de Tobii Dynavox website www.TobiiDynavox.com voor bijgewerkte versies van dit document.

Inhoudsopgave

1	Info Tobii Dynavox Windows Control	5
1.1	Bedoeld gebruik	5
1.2	Systeemvereisten	5
2	Installeren, starten en licentiebeheer	6
2.1	Installeren Tobii Dynavox Windows Control	6
2.2	Licentiebeheer	6
2.2.1	Licentie activeren	6
2.2.2	Licentie deactiveren	7
2.3	Eerste keer opstarten	7
3	Gebruik van Tobii Dynavox Windows Control	8
3.1	De Windows Control Controller	8
3.2	Trackstatus	9
3.3	De Windows Control Taakbalk	10
3.4	Taak	11
3.5	Aanvullende Taken	12
3.6	Snelkoppelingen	12
3.7	Selectiemethode — Blik of Schakelaar	14
3.7.1	Kleeftaken en standaard Links klikken/tikken voor Schakelaar	15
3.7.2	Een taak activeren met een toetsenbordknop in plaats van een schakelaar	15
3.8	Bliktoetsenbord	15
3.8.1	Taakbalk Toetsenbord	17
3.8.2	Taakknoppen voor de taakbalk Toetsenbord	18
3.8.3	Woordvoorspelling	18
3.9	Windows Control in combinatie met Regionaal Gebaseerde toetsenborden	19
3.10	Eye Detection Indicator	19
4	Windows Control Instellingen	20
4.1	Eye Tracker	21
4.1.1	Het tabblad Kalibratie	21
4.1.1.1	Maak een nieuw profiel aan	21
4.1.1.2	Profielen Beheren	22
4.1.1.3	Kalibratie testen	22
4.1.1.4	Opnieuw Kalibreren	22
4.1.1.5	Type Kalibratie	23
4.1.2	Het tabblad Geavanceerd	24
4.1.2.1	Instellingen Beeldscherm	24
4.2	Algemene instellingen	25
4.2.1	Het tabblad Algemeen	25
4.2.2	De Over Tab	25
4.2.2.1	Licentiecode	25
4.3	Activatie & feedback	26
4.3.1	Het tabblad Activatie	26
4.3.2	De Feedback tab	27
4.4	Taakbalk & toetsenbord	28
4.4.1	Het tabblad Zoom	28
4.4.2	De Taak tab	28
4.4.2.1	Aanvullende Taken Tonen	29

	4.4.2.2	Links Klikken Maximaliseren	29
	4.4.3	De Taakbalk Tab	29
	4.4.4	De toetsenbord tab	30
4.5		Hulp & Gebruik	31
	4.5.1	De Help Tab	31
	4.5.2	Het tabblad Gebruik	32
5		Virtual Remote.....	33
5.1		Virtual Remote Overzicht	33
	5.1.1	Virtual Remote Menu	33
	5.1.2	De Active Remote	34
	5.1.3	De Knoppen	34
5.2		Gebruik van Tobii Dynavox Virtual Remote	35
	5.2.1	Bij de eerste keer opstarten	36
	5.2.2	Veranderen Actieve Afstandsbediening	36
	5.2.3	Het gebruiken van knoppen op een afstandsbediening	36
	5.2.4	Een afstandsbediening toevoegen	36
	5.2.4.1	Een voorgeprogrammeerde afstandsbediening toevoegen	37
	5.2.4.2	Een niet-voorgeprogrammeerde Afstandsbediening toevoegen.	41
	5.2.5	Bewerkingsmodus	44
	5.2.5.1	De naam van en afstandsbediening veranderen	44
	5.2.5.2	Een Afstandsbediening verwijderen	45
	5.2.5.3	Veranderingen doorvoeren aan een Bestaande Actieve Knop	46
	5.2.5.4	Veranderingen doorvoeren aan een Bestaande, niet-geprogrammeerde Knop	49
	5.2.5.5	Een nieuwe Knop toevoegen aan een lege plek	51
	5.2.6	Informatie	52

1 Info Tobii Dynavox Windows Control

1.1 Bedoeld gebruik

Neem de volledige controle van uw computer over met enkel uw ogen, of met uw ogen en een schakelaar. U kunt alle types muis- en veegacties emuleren en typen in tekst typen met onze bekroonde software. We hebben ook slimme snelkoppelingen toegevoegd om het nog makkelijker te maken om toegang te krijgen tot alle delen van Windows!

1.2 Systeemvereisten

Component	Vereisten
Computer en processor	2.0 Gigahertz (GHz) of sneller, dual-core processor (aanbevolen minimum).
Geheugen (RAM)	4 gigabyte (GB) RAM (aanbevolen minimum).
Vaste schijf	450 megabyte (MB) beschikbaar
USB	USB 2.0
Besturingssysteem	Windows Control draait op zowel 32-bits en 64-bit versies van Microsoft Windows besturingssystemen. Als u een Windows Control 32 bits programma uitvoert op een 64-bits versie van een Windows-besturingssysteem, wordt het programma uitgevoerd in de 32-bits laag van het Windows-besturingssysteem. • Windows 7 (64-bits) • Windows 8,1 (32-bits of 64-bits) • Windows 10 (32-bits of 64-bits)
.NET-versie	4,5
Eye Tracker	Elke Eye Tracker van Tobii Dynavox van Tobii Tech die Tobii Eye Tracking Core Software ondersteunt.
Aanvullende vereisten en overwegingen	Om de licentie te kunnen activeren is een internetverbinding nodig
Tobii kernsoftware voor oogbesturing	Versie 2.8 of later
IR Afstandbediening	Elk apparaat dat is uitgerust met een HBR IR chip zoals: Tobii Dynavox EyeR, Indi, 1-Series I-110, of EyeMobile Plus

2 Installeren, starten en licentiebeheer

2.1 Installeren Tobii Dynavox Windows Control



Als het al geïnstalleerd is, moet Tobii Gaze Interaction Software worden verwijderd voordat u het installeert Windows Control.

Windows Control kan worden gedownload van www.TobiiDynavox.com.

De installatiewizard installeert de volgende toepassingen:

- Tobii Dynavox Windows Control
- Tobii Dynavox Virtual Remote

Om te installeren Windows Control, volgt u de instructies op het scherm.

2.2 Licentiebeheer


2.2.1 Licentie activeren



Het Windows Control Kan op maximaal drie (3) computers / apparaten tegelijk met dezelfde licentie lopen. Om in staat te zijn de Windows Control op meer dan drie (3) computers / apparaten te gebruiken moet de Windows Control eerst gedeactiveerd worden op één (1) van de andere computers / apparaten.

Wanneer u aanschaft Windows Control zult u een Licence Activation Key ontvangen voor de software in de bestellingbevestiging e-mail.


Wanneer de Windows Control voor het eerst wordt uitgevoerd zal **License Manager** starten.

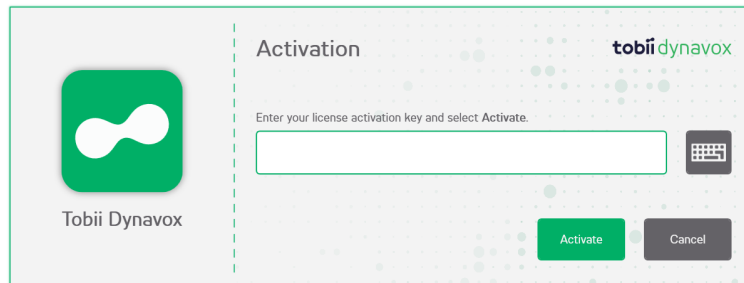

In het Licentie dialoogvenster wordt de actuele softwarepictogram weergegeven voor de licentie die wordt beheerd.

Uw **License Activation Key** kan worden gevonden in de bestellingbevestigingse-mail.

1. Controleer of de computer/het apparaat is verbonden met internet.
2. Voer de **License activation key** in.
3. Selecteer de **Activeren** knop.

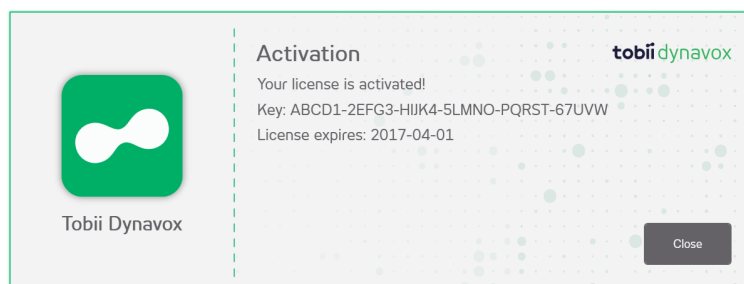



In het Licentie dialoogvenster wordt de actuele softwarepictogram weergegeven voor de licentie die wordt beheerd.

4. Selecteer de **Sluiten** knop.

2.2.2 Licentie deactiveren

Om de licentie te deactiveren Windows Control volgt u de volgende stappen.

1. Controleer of de computer/het apparaat is verbonden met internet.
2. Starten Windows Control.

3. Selecteer de  (INSTELLINGEN) knop.

4. Selecteer de  (Algemene Instellingen) knop.

5. Selecteer de **Info** tab.

6. Selecteer de **License Key** knop.

7. Selecteer de **Deactiveren** knop.



In het Licentie dialoogvenster wordt de actuele softwarepictogram weergegeven voor de licentie die wordt beheerd.

8. Selecteren:
 - **Ja** — om de licentie op dit apparaat te deactiveren.
 - **Nee** — om te annuleren.

2.3 Eerste keer opstarten

Wanneer Windows Control voor het eerst wordt gelanceerd een configuratiehandleiding zal de gebruiker begeleiden via de opstartconfiguratie van Windows Control. De stappen in het handleiding zijn:

- Stel het beeldscherm in. Voor meer informatie raadpleegt u *4.1.2.1 Instellingen Beeldscherm, pagina 24*.
- Maak een nieuw profiel aan. Voor meer informatie raadpleegt u *4.1.1.1 Maak een nieuw profiel aan..*
- Test kalibratie, Voor meer informatie, zie *4.1.1.3 Kalibratie testen*

3 Gebruik van Tobii Dynavox Windows Control


Tobii Dynavox Windows Control maakt het mogelijk voor de gebruiker om de standaard Windows omgeving te bedienen via een selectiemethode in twee stappen, waardoor de kans op ongewenst klikken afneemt. Dit voorkomt ook dat uw blik de muis-cursor volgt in plaats van bedient (er zit geen zwevende muis-cursor in). Windows Control).

1. De eerste stap is het selecteren van de gewenste taak in de vastgezette taakbalk door ernaar te kijken.
2. De tweede stap is het kijken naar het gewenste deel van het scherm (of pictogram op het scherm) waar u de taak wilt uitvoeren. Er wordt een automatische zoomfunctie ingeschakeld, die eindigt met het selecteren van het pictogram of het uitvoeren van de taak.



Alle functies in Windows Control zijn voorbereid op Aanraken en de Muis, wat het gemakkelijker maakt voor een zorgverlener of assistent om de gebruiker te helpen indien nodig. Het is hiermee veel eenvoudiger voor de zorgverlener of assistent om een functie/taak te selecteren of de instellingen voor de gebruiker te wijzigen.

3.1 De Windows Control Controller

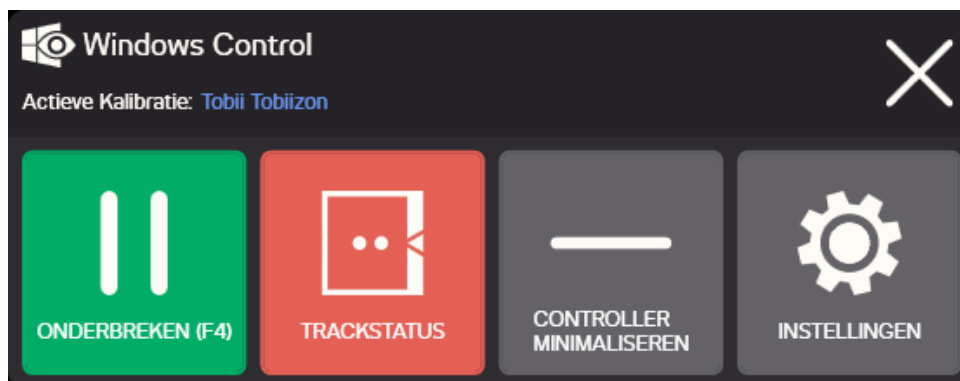


Afbeelding 3.1 De Windows Control Controller

Knop	Actie	Beschrijving
	PAUZE (F4)	Actie die pauzeert Windows Control.  De Pauzefunctie activeren zal ervoor zorgen dat de knop wordt omgezet en de Startknop wordt getoond.  De F4 toets op het toetsenbord kan gebruikt worden om de taak te activeren.
	START (F4)	Actie die start Windows Control.  De Startfunctie activeren zal ervoor zorgen dat de knop wordt omgezet en de Pauzeknop wordt getoond.  De F4 toets op het toetsenbord kan gebruikt worden om de taak te activeren.
	TRACKSTATUS	Actie die het venster Track Status zal tonen. Gebruik dit om te controleren of de gebruiker goed voor het scherm zit. Voor meer informatie raadpleegt u 3.2 <i>Trackstatus</i> , pagina 9
	MINIMALISEER CONTROLLER	Actie die het venster het controller venster zal minimaliseren.

Knop	Actie	Beschrijving
	INSTELLINGEN	Actie die de Windows Control Instellingen opent. Voor meer informatie raadpleegt u <i>4 Windows Control Instellingen, pagina 20</i> .
	Sluiten	Actie die afsluit Windows Control.

3.2 Trackstatus

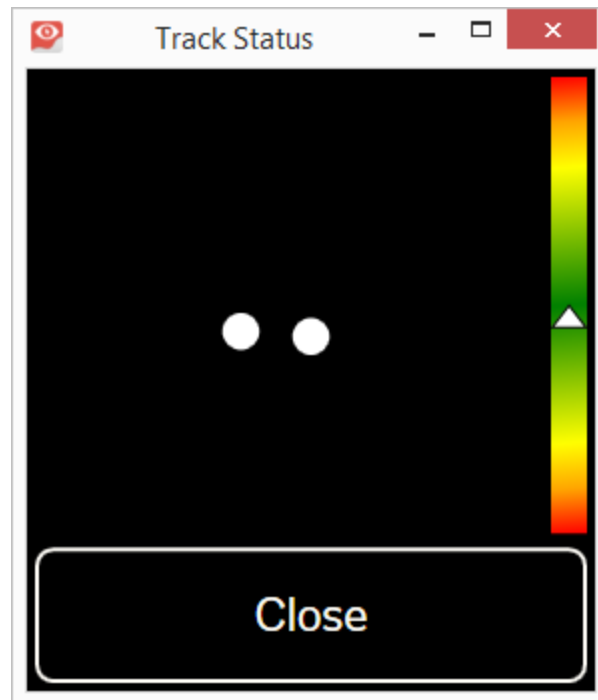

Het **Trackstatus** functie wordt gebruikt om te controleren of de gebruiker goed gepositioneerd is voor de eye tracker.

- De twee (2) witte stippen - De ogen van de gebruikers en hoe ze ten opzichte van het scherm staan. Voor een optimale positie moeten de witte stippen in het midden van het zwarte gebied liggen.
- De kleur volledige balk links met de witte pijl - Hoe ver of dicht de gebruiker is van het scherm geplaatst.
 - Als de witte pijl in het midden van het groene gedeelte van de balk staat, zit de gebruiker op de optimale afstand van het scherm.
 - Als de pijl op het onderste gedeelte van de balk staat - laat de gebruiker dichterbij zitten.
 - Als de pijl op het bovenste gedeelte van de balk staat - laat de gebruiker verder weg zitten.

1. Open de Windows Control Controller

2. Selecteer de  (Trackstatus) knop.

3. Positioneer de gebruiker.

4. Selecteer de **Sluiten** knop als u klaar bent.



Deze knop is gebaseerd op het gebied van de ogen dus kijk gewoon naar de knop om het te activeren.

3.3 De Windows Control Taakbalk

Aan de bovenkant van de Windows Control Taakbalk is er een Trackstatus viewer. Hiermee kunt u controleren of de Eye Tracker uw ogen herkent en of u goed voor het apparaat zit.

De Taakknoppen in de Windows Control taakbalk kunnen zich in drie verschillende modi bevinden, zoals getoond in *Afbeelding 3.2 De modi voor de Windows Control Taakbalk, pagina 10*.

- **Normaal (Niet-geselecteerd)** - Geen taakknop voor Windows Control is gekozen.
- **Primaire Selectie (wit)** - De gemarkeerde taakknop is geselecteerd en de taak wordt uitgevoerd na het automatisch zoomen wanneer de gebruiker naar het gewenste deel van het scherm of het pictogram op het scherm kijkt. Als de selectiemethode is ingesteld op Schakelen in het Windows Control Dialoogvenster Instellingen, blijft de gekozen taakknop actief na het uitvoeren van de taak.



De Snelkoppelingen taak zal niet zoomen.

- **Secundaire Selectie (Blauw/wit)** - Zelfde als **Primaire Selectie** maar met een hogere precisie. **Primaire Selectie** betekent dat er sterker wordt ingezoomd vóór het uitvoeren van de taak, waardoor het gewenste deel van het scherm groter wordt en het selecteren makkelijker gaat. Activeer deze modus door uw blik te laten rusten op de taakknop totdat de kleur verandert zoals hieronder getoond.




De Snelkoppelingen taak zal niet zoomen.

- **Tertiaire Selectie (popout menu)** - Voor sommige taken op de taakbalk is er een popout menu beschikbaar met Extra taken. Activeer deze modus door uw blik te laten rusten op de taakknop totdat het popout menu wordt geactiveerd zoals hieronder getoond.




In Windows 8.1 en 10 zullen de kleuren op de taakbalk zich aanpassen aan de Windows-instellingen.

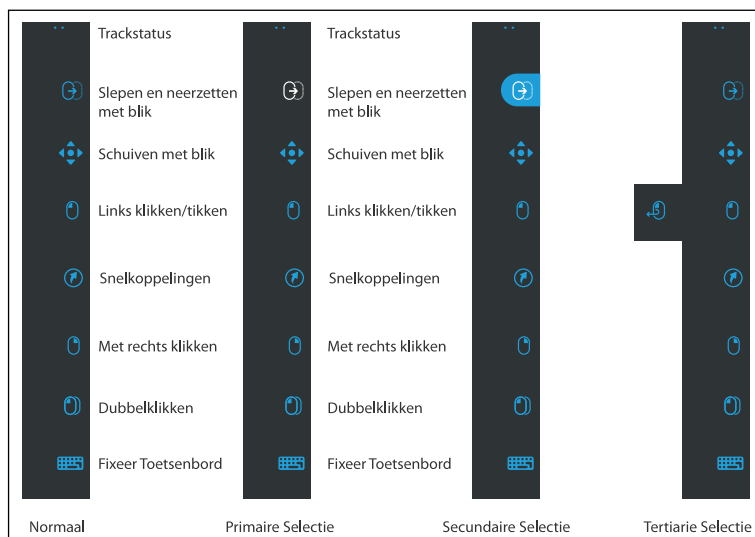

Afbeelding 3.2 De modi voor de Windows Control Taakbalk

3.4 Taak



Taak	Actie	Beschrijving
	Cursor plaatsen	Taak waarmee u de cursor kunt plaatsen waar u kijkt. Zal een zoomactie uitvoeren wanneer het wordt uitgevoerd.
	Slepen en neerzetten met blik	Taak waarmee u twee 'klikken' uitvoert, waarbij de eerste klik de beginpositie voor het slepen en de tweede klik de neerzetpositie aangeeft (om objecten te verplaatsen of gebieden te selecteren). • Selecteer de taak. • Kijk naar het object dat u wilt verplaatsen of naar het beginpunt voor de gebiedselectie. • Voer de Windows Control (eerste "klik") uit met behulp van Gaze of Schakelaar. • Kijk onmiddellijk naar de neerzetpositie voor het object of het eindpunt voor de gebiedselectie. • Voer de tweede 'klik' uit met Blick of Schakelaar. Zal een zoomactie uitvoeren wanneer het wordt uitgevoerd.
	Schuiven met blik	Taak die, indien uitgevoerd in een venster waarin kan worden geschoven, schuiven met uw blik binnen de pagina mogelijk maakt. • Selecteer de taak. • Kijk naar een gebied waarin kan worden geschoven en laat uw blik erop rusten. Het pictogram Schuiven met blik verschijnt op de bekeken plaats. • Kijk boven het pictogram om omhoog te schuiven. • Kijk onder het pictogram om omlaag te schuiven. • Kijk links van het pictogram om naar links te schuiven. • Kijk rechts van het pictogram om naar rechts te schuiven. • Kijk tijdens het schuiven opnieuw naar het pictogram (op het scherm, niet op de taakbalk) om te wisselen tussen omhoog/omlaag of links/rechts. • Kijk terug naar de Windows Control Taakbalk (of buiten het scherm) om te stoppen met scrollen.  Gebruik de taak Schuiven met blik om verticaal en horizontaal te schuiven in Modern UI-apps en in het Modern UI Windows-startscherm.
	Links klikken/tikken	Taak waarmee u eenmaal met de linkermuisknop klikt of, voor apparaten met aanraakbediening, eenmaal met de vinger tikt. In de Schakelaarmodus is Links klikken / tikken standaard ingeschakeld en "klevend" (zie 3.7.1 <i>Kleeftaken en standaard Links klikken/tikken voor Schakelaar, pagina 15</i>). Zal een zoomactie uitvoeren wanneer het wordt uitgevoerd.
	Snelkoppelingen	Taak die opent: • 3 kolommen van vooraf gedefinieerde snelkoppelingen. • iets andere zijn beschikbaar voor Windows 7, 8.1 en 10. Voor meer informatie raadpleegt u 3.6 <i>Snelkoppelingen, pagina 12</i> .
	Met rechts klikken	Taak waarmee u eenmaal met de rechtermuisknop klikt. Zal een zoomactie uitvoeren wanneer het wordt uitgevoerd.
	Dubbelklikken	Taak waarmee u dubbelklikt. Wanneer de activeringsmethode op Schakelaar staat, is de Dubbelklik een "Klevende Taak" (zie 3.7.1 <i>Kleeftaken en standaard Links klikken/tikken voor Schakelaar, pagina 15</i>). Zal een zoomactie uitvoeren wanneer het wordt uitgevoerd.

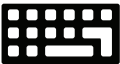Taak	Actie	Beschrijving
	Fixeer Toetsenbord	Taak waarmee een toetsenbord op het scherm voor typen met uw blik wordt geopend.
	Instellingen	Taak die de Windows Control Instellingen opent. Voor meer informatie raadpleegt u 4 Windows Control Instellingen, pagina 20.

3.5 Aanvullende Taken

Taak	Actie	Beschrijving
	Klevende Fixeer Klik	Deze taak voert een ander type interactieve kliktak voor Windows Control uit. Nadat u de Klevende Fixeer Klik-taak hebt geselecteerd, begint de muisaanwijzer uw blik te volgen, waarbij de muisbeweging wordt geëmuleerd. Wanneer u uw blik ergens op het bureaublad fixeert of in applicaties zal het de Fixeertimer activeren die zal eindigen in een klik. Door het te activeren met secundaire selectie, stelt u het in om een zoom voor de klik te activeren, bedoeld voor kleinere doelen.  Als een taak 'klevend' wordt, betekent dit dat u niet naar de taakbalk hoeft terug te kijken als u de uitvoering van een geselecteerde taak wilt herhalen, maar alleen als u een andere taak wilt uitvoeren.

3.6 Snelkoppelingen

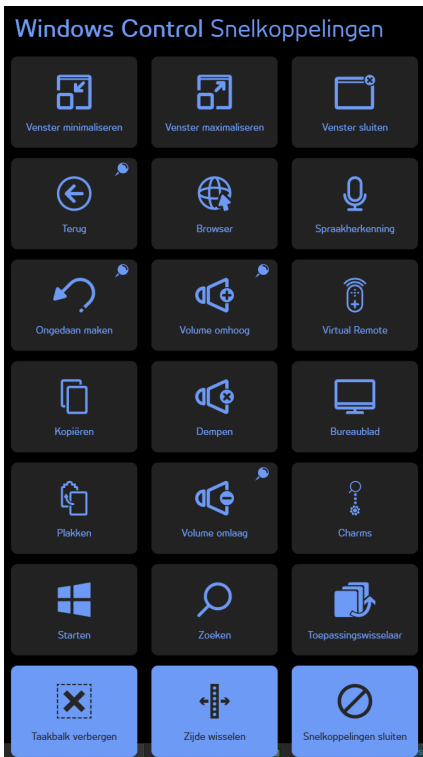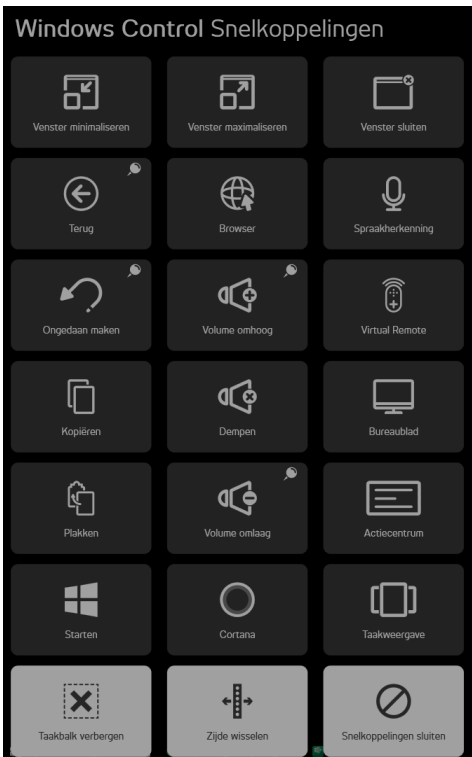Windows 8.1	Windows 10
 Windows Control Snelkoppelingen - Venster minimaliseren - Venster maximaliseren - Venster sluiten - Terug - Browser - Spraakherkenning - Ongedaan maken - Volume omhoog - Virtual Remote - Kopiëren - Dempen - Bureaublad - Plakken - Volume omlaag - Charms - Starten - Zoeken - Toepassingswisselaar - Taakbalk verbergen - Zijde wisselen - Snelkoppelingen sluiten	 Windows Control Snelkoppelingen - Venster minimaliseren - Venster maximaliseren - Venster sluiten - Terug - Browser - Spraakherkenning - Ongedaan maken - Volume omhoog - Virtual Remote - Kopiëren - Dempen - Bureaublad - Plakken - Volume omlaag - Actiecentrum - Starten - Cortana - Taakweergave - Taakbalk verbergen - Zijde wisselen - Snelkoppelingen sluiten



Als een snelkoppelingsfunctie is gemarkeerd met het  Pictogram, blijft het snelkoppelingsvenster open na het activeren van de functie, waardoor er meerdere acties mogelijk zijn.

Sneltoets	Actie	Win 8.1	Win 10	Beschrijving
	Venster Maximaliseren	x	x	Snelkoppeling die het actieve venster / app / software maximaliseert.
	Terug	x	x	Snelkoppeling die de gebruiker een pagina terug-brengt in de browser of andere software die dezelfde functionaliteit ingebouwd heeft.
	Ongedaan maken	x	x	Snelkoppeling die het laatste commando ongedaan maakt.
	Kopiëren	x	x	Snelkoppeling die de actieve selectie zal kopiëren.
	Plakken	x	x	Snelkoppeling die de selectie die ervoor was gekopieerd zal plakken.
	Starten	x	x	Functie waarmee het Startmenu van Windows wordt opgeroepen.
	Taakbalk verbergen	x	x	Snelkoppeling waarmee de taakbalk wordt verborgen voor de volledige schermweergave. U kunt de taakbalk opnieuw weergeven door  of  te selecteren, afhankelijk van de zijde waar de taakbalk zich bevindt.
	Venster Minimaliseren	x	x	Snelkoppeling die het actieve venster / app / software minimaliseert.
	Browser	x	x	Snelkoppeling die de standaard webbrowser start.
	Volume omhoog	x	x	Snelkoppeling die het volume verhoogt.
	Gedempt	x	x	Snelkoppeling die de speakers uitschakelt.
	Volume omlaag	x	x	Snelkoppeling die het volume verlaagt.
	Zoeken	x		Snelkoppeling die de zoekfunctie opent in Windows.
	Cortana		x	Snelkoppeling waarmee Cortana wordt geopend. Cortana is uw slimme persoonlijke assistent. Cortana kan zoeken op internet, dingen op uw pc terugvinden, uw agenda bijhouden en meer.
	Schakelkant	x	x	Snelkoppeling waarmee de taakbalk van rechts/links wordt verplaatst.
	Venster sluiten	x	x	Snelkoppeling die het actieve venster / app / software afsluit.
	Spraakherkenning	x	x	Snelkoppeling die Windows Spraakherkenning start, of Dragon Spraakherkenning als het geïnstalleerd is.

Sneltoets	Actie	Win 8.1	Win 10	Beschrijving
	Virtual Remote	x	x	Snelkoppeling die de Virtual Remote-toepassing opent. Voor meer informatie raadpleegt u 5 <i>Virtual Remote</i> , pagina 33.
	Bureaublad	x	x	Snelkoppeling die het bureaublad naar voren brengt.
	Charms	x		Snelkoppeling waarmee het Charms menu wordt geopend.
	Actiecentrum		x	Snelkoppeling waarmee het Actiecentrum wordt geopend.
	Toepassingswisselaar	x		Snelkoppeling waarmee u door alle actieve Modern UI apps en het bureaublad loopt.
	Taakweergave		x	 Alle programma's die actief zijn op het bureaublad zijn hier niet zichtbaar. Ze zijn alleen zichtbaar vanaf het bureaublad. Snelkoppeling waarmee de taakweergave wordt geopend, waarop alle actieve Modern UI apps zichtbaar zijn.  De taakweergave wordt niet weergegeven als er slechts één of geen enkele app is geopend.
	Snelkoppelingen Afsluiten	x	x	Snelkoppeling die het menu Snelkoppelingen afsluit.

3.7 Selectiemethode — Blick of Schakelaar

Er zijn twee methoden om de gekozen taak uit te voeren.

- **Blik** - gebruik de ogen voor zowel het controleren als het uitvoeren van de geselecteerde taak.
- **Schakelaar** - gebruik de ogen om te controleren en een mechanische knop die aangesloten is op het apparaat om de geselecteerde taak uit te voeren.

De voorkeurmethode wordt ingesteld in het Windows Control Instellingen Dialoog, zie 4 *Windows Control Instellingen*, pagina 20.

Voordat u een selectie uitvoert, moet u de uit te voeren taak selecteren in de taakbalk. Kijk naar de gekozen taak totdat deze wordt gemarkeerd als 'Primaire' of 'Secundaire selectie'.

- **Oogbesturing** - Om de gekozen taak uit te voeren rust u met uw blik op het gewenste gedeelte van het scherm (of pictogram op het scherm) waar u de taak wilt uitvoeren. Er wordt een automatische zoomfunctie ingeschakeld, die eindigt met het selecteren van het pictogram of het uitvoeren van de taak.
- **Schakelaar** - Twee verschillende uitvoeringsmodi.
 - **Enkelvoudige activatie van de Schakelaar** De zoomfunctie wordt op dezelfde manier uitgevoerd als bij de methode Blik en volgens de instellingen die zijn gekozen in het Windows Control Instellingen Dialoog, zie 4 *Windows Control Instellingen*, pagina 20.
 - **Activeren en vasthouden van de Schakelaar** - De zoomfunctie zoomt continu in en eindigt pas na het loslaten/deactiveren van de schakelaar.



Als u de Blik methode gebruikt, moet u terugkijken naar de taakbalk om een nieuwe taak te selecteren **voor** elke taakuitvoering.



Als de precisie is ingesteld op nul in Windows Control Instellingen - wordt er geen zoomen uitgevoerd. Voor meer informatie raadpleegt u 4 *Windows Control Instellingen*, pagina 20.

3.7.1 Kleeftaken en standaard Links klikken/tikken voor Schakelaar

Wanneer u de methode Schakelaar gebruikt, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 'kleeftaken'.

Als een taak 'klevend' wordt, betekent dit dat u niet naar de taakbalk hoeft terug te kijken als u de uitvoering van een geselecteerde taak wilt herhalen, maar alleen als u een andere taak wilt uitvoeren.

Wanneer u de methode Schakelaar gebruikt, is de taak Links klikken/tikken standaard 'klevend'. Dit betekent dat Links klikken/tikken altijd is ingeschakeld en altijd actief wordt bij het activeren van de schakelaar, als er niets anders is geselecteerd. Als er een andere taak geselecteerd is zal het slechts één keer actief zijn (voor een selectie) en dan Windows Control automatisch teruggaan naar de Links Klik / Tik voor de volgende selecties.

Een uitzondering hierop is de taak Dubbelklikken; wanneer u deze taak selecteert bij gebruik van de modus Schakelaar, wordt ze ook klevend. Dit betekent dat ze geselecteerd blijft totdat u een andere taak selecteert (daarna wordt Links klikken/tikken opnieuw als standaardtaak ingesteld).

Op deze manier kunt u bijvoorbeeld snel/doorlopend surfen op internet door de Schakelaar en dus de taak Links klikken/tikken eenmalig te activeren en vervolgens herhaaldelijk iets te selecteren, zonder dat u de taak Links klikken/tikken meermaals opnieuw hoeft te kiezen.

3.7.2 Een taak activeren met een toetsenbordknop in plaats van een schakelaar



Door selectie van de "toetsenbordknop F12", op een aangesloten toetsenbord, wordt een taakselectie geactiveerd. Deze kan op dezelfde manier worden gebruikt als een aangesloten schakelaar. Voor meer informatie over schakelaars raadpleegt u 3.7 *Selectiemethode — Blik of Schakelaar, pagina 14*.

3.8 Bliktoetsenbord

Door de knop Bliktoetsenbord te selecteren in de taakbalk, wordt het bliktoetsenbord als schermtoetsenbord geopend. Het bliktoetsenbord wordt boven of onder aan het scherm geplaatst, afhankelijk van welke locatie de gebruiker heeft gekozen.

Het toetsenbord kan op twee verschillende manieren op het scherm worden geplaatst met Primaire en Secundaire selectie van de toetsenbordtaak:

- Met **Primaire** selectie:
 1. Activeer de Primaire selectie van de toetsenbordtaak.
 2. Selecteer waar u wilt schrijven en het toetsenbord wordt aan de tegenovergestelde zijde gelanceerd.
Als u in de onderste helft van het scherm wilt schrijven, wordt het toetsenbord bovenaan geplaatst en andersom.



Bij gebruik van fixeren wordt het toetsenbord onmiddellijk aan de tegenovergestelde zijde van de fixatie geplaatst. Als de gebruiker een schakelaar gebruikt, moet de gebruiker eerst kijken naar waar hij/zij wil typen en vervolgens de schakelaar activeren om het toetsenbord aan de tegenovergestelde zijde te plaatsen.

- Met **Secundaire** selectie:
 - Het toetsenbord wordt automatisch onder aan het scherm geplaatst.

Samen met het bliktoetsenbord wordt ook de taakbalk Toetsenbord geopend. Voor meer informatie raadpleegt u 3.8.1 *Taakbalk Toetsenbord, pagina 17*.

Het bliktoetsenbord bestaat uit vier toetsenbordpagina's die na elkaar worden weergegeven. De gebruiker kan eenvoudig tussen de verschillende toetsenbordpagina's schakelen met behulp van de knoppen voor volgende pagina die zich helemaal links en rechts op alle pagina's van het bliktoetsenbord bevinden.

De toets op het toetsenbord waar de gebruiker naar kijkt, wordt aangegeven door een licht kader rond het teken/de functie




van de toets.


Dit zijn de vier toetsenbordpagina's:



Afbeelding 3.3 Standaard opstartpagina

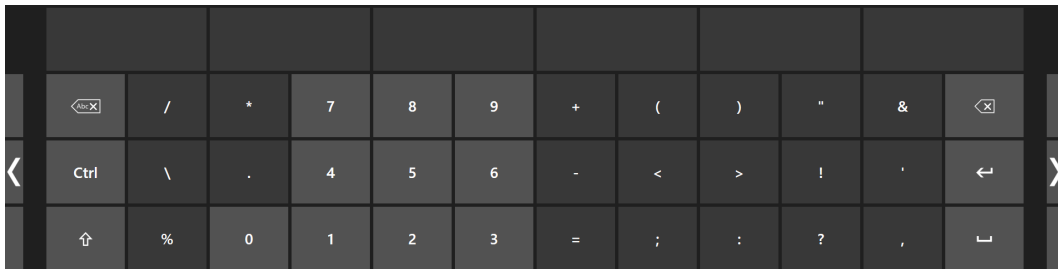

Afbeelding 3.4 Eerste pagina naar rechts

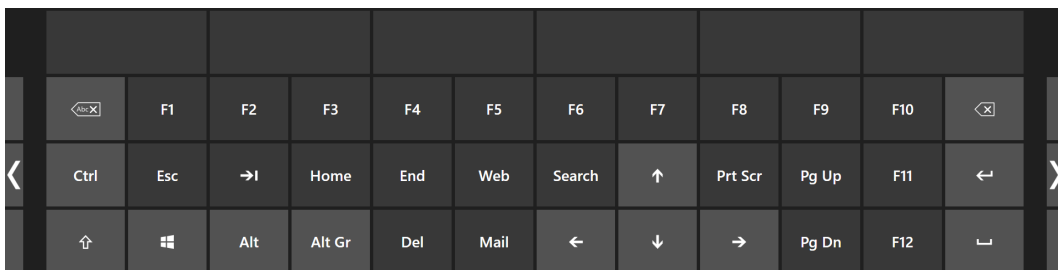

Afbeelding 3.5 Tweede pagina naar rechts of links



Afbeelding 3.6 Eerste pagina naar links

Om de taal van het toetsenbord te wijzigen en andere instellingen voor het toetsenbord, zie *4 Windows Control Instellingen*, pagina 20.



Na selectie van de Shift-, Ctrl-, Alt-, Win- en Alt Gr-toetsen blijven deze 'kleven'. Zo blijven deze toetsen geselecteerd tot de gebruiker een nieuwe toets op het toetsenbord selecteert. De toetsen blijven kleven als de volgende geselecteerde toets ook een klevende toets is.



Een letter met accent typen:

1. Selecteer het accent
2. Selecteer het teken
3. Het teken wordt weergegeven met het geselecteerde accent.



De cijfertoetsen op het toetsenbord zijn gepositioneerd zoals op een numeriek toetsenblok en kunnen in combinatie met de Alt-toets worden gebruikt voor ASCII-teken.

1. Selecteer de Alt-toets
2. Selecteer de cijfercombinatie voor het ASCII-teken
3. Selecteer de Alt-toets
4. Het ASCII-teken wordt weergegeven.

3.8.1 Taakbalk Toetsenbord

Boven aan de taakbalk van het Toetsenbord bevindt zich een trackstatusviewer, zoals in de Windows Control taakbalk. Hiermee kunt u controleren of de Eye Tracker uw ogen herkent en of u goed voor het apparaat zit.

De taakknoppen in de taakbalk Toetsenbord kunnen zich in drie verschillende modi bevinden, zoals aangegeven in *Afbeelding 3.7 Modi voor de taakbalk Toetsenbord, pagina 17*.


- **Normaal (Niet-geselecteerd)** - Geen taakknop voor Windows Control is gekozen.
- **Primaire Selectie (wit)** - De gemarkeerde taakknop is geselecteerd en de taak wordt uitgevoerd na het automatisch zoomen wanneer de gebruiker naar het gewenste deel van het scherm of het pictogram op het scherm kijkt. Als de selectiemethode is ingesteld op Schakelen in het Windows Control Dialoogvenster Instellingen, blijft de gekozen taakknop actief na het uitvoeren van de taak.
- **Secundaire Selectie (Blauw/wit)** - Zelfde als **Primaire Selectie** maar met een hogere precisie. **Primaire Selectie** betekent dat er sterker wordt ingezoomd vóór het uitvoeren van de taak, waardoor het gewenste deel van het scherm groter wordt en het selecteren makkelijker gaat. Activeer deze modus door uw blik te laten rusten op de taakknop totdat de kleur verandert zoals hieronder getoond.



Alleen beschikbaar voor de linkermuisknopfunctie.



In Windows 8.1 en 10 zullen de kleuren op de taakbalk zich aanpassen aan de Windows-instellingen.

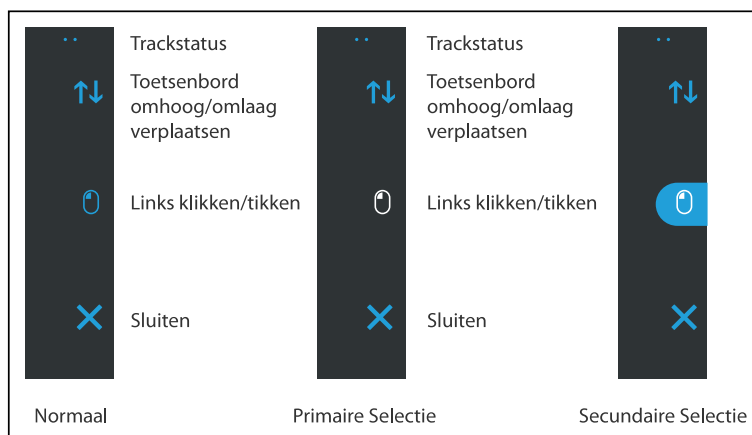


Afbeelding 3.7 Modi voor de taakbalk Toetsenbord

3.8.2 Taakknoppen voor de taakbalk Toetsenbord

Taak	Actie	Beschrijving
	Toetsenbord omhoog/omlaag verplaatsen	Taak waarmee het toetsenbord boven of onder aan het scherm wordt geplaatst.  Deze functie kan alleen worden geactiveerd als Secundaire selectie is geactiveerd.
	Links klikken/tikken	Taak waarmee u eenmaal met de linkermuisknop klikt of, voor apparaten met aanraakbediening, eenmaal met de vinger tikt.
	Sluiten	Taak waarmee het toetsenbord wordt gesloten.

3.8.3 Woordvoorspelling


De woordvoorspellingsmotor die wordt gebruikt in Windows Control is van SwiftKey en wordt veel gebruikt in tabletten en smartphones. SwiftKey maakt gebruik van verschillende technologieën voor kunstmatige intelligentie, waarmee het volgende woord dat de gebruiker wil typen, kan worden voorspeld. SwiftKey leert van eerdere teksten die de gebruiker heeft geschreven en biedt voorspellingen op basis van de momenteel ingevoerde tekst en eerder ingevoerde tekst. De taal voor woordvoorspelling varieert naargelang de instelling van Toetsenbordtaal.

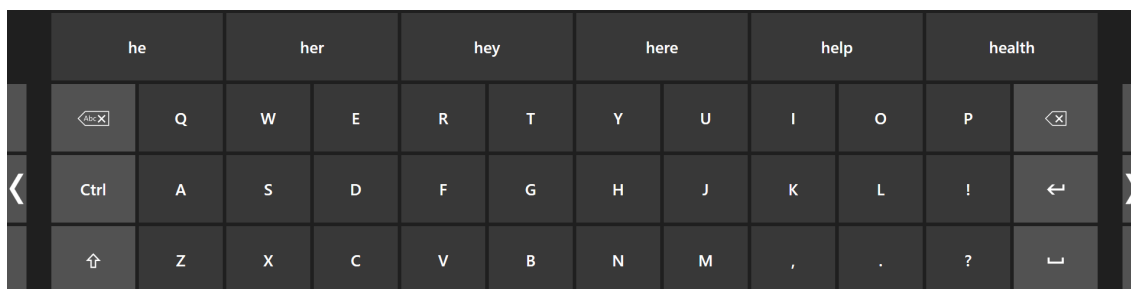

Afbeelding 3.8 Toetsenbord met woordvoorspelling geactiveerd

Wanneer woordvoorspelling wordt gebruikt (raadpleeg 4 *Windows Control Instellingen*, pagina 20 voor meer informatie over het activeren/deactiveren van Woordvoorspelling), worden er zes (6) vakjes boven het toetsenbord weergegeven. Het meest linkse vakje geeft het meest waarschijnlijke voorspelde woord weer en de overige vijf (5) vakjes bevatten elk één voorspeld woord. U kunt een voorspeld woord selecteren door het betreffende vakje te selecteren. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, typt u gewoon verder en hopelijk wordt het betreffende woord na invoer van het volgende teken weergegeven.

 Als u Woordvoorspelling gebruikt en een woord met een accent, zoals café, wilt typen, is het vaak makkelijker om het accent over te laten aan Woordvoorspelling. Typ gewoon "cafe" en een van de suggesties is dan "café".

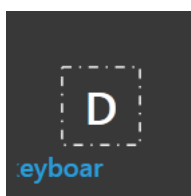


Terwijl de gebruiker typt, worden de laatste 5-10 tekens blauw weergegeven op de aangegeven/gemarkeerde toets. Voor meer informatie raadpleegt u 4 *Windows Control Instellingen*, pagina 20. Met behulp van deze functie kan de gebruiker eenvoudig spelfouten opmerken en hoeft de gebruiker niet te kijken naar de plaats waar de tekst wordt ingevoegd en is sneller typen mogelijk.

3.9 Windows Control in combinatie met Regionaal Gebaseerde toetsenborden

Windows Control kan in combinatie met andere oogbestuurde toepassingen worden gebruikt. 'Blikbestuurde' gebieden in andere toepassingen zijn actief zolang er geen taak actief is in de Windows Control werkbalk. Als u het gebruikt Windows Control met een schakelaar, blijven de taakknoppen 'kleven', als u een taak moet deselecteren kijkt u gewoon even opnieuw naar de geselecteerde taak.

3.10 Eye Detection Indicator


De **Eye Detection Indicator**, , is een discrete indicator in het veld Activiteit in Windows.

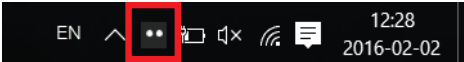 en laat zien of Windows Control de ogen van de gebruiker heeft gedetecteerd.

De **Eye Detection Indicator** kan verschillende statussen hebben:

- Ogen gedetecteerd ().
 Fungeert ook als positioneringsgids voor de gebruiker.
- Geen ogen gedetecteerd, ().
- Geen eye-tracker aangesloten of eye tracker uitgeschakeld ().

4 Windows Control Instellingen

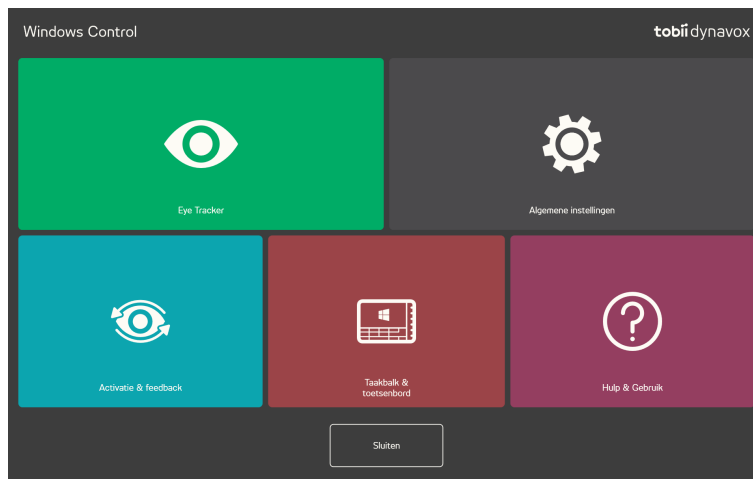


Pictogrammen	Actie	Beschrijving
	Eye Tracker	Opent de Eye Tracker Instellingen. Voor meer informatie raadpleegt u <i>4.1 Eye Tracker</i> , pagina 21.
	Algemene instellingen	Opent de Algemene Instellingen. Voor meer informatie raadpleegt u <i>4.2 Algemene instellingen</i> , pagina 25.
	Activatie & feedback	Opent de Activatie & feedback Instellingen. Voor meer informatie raadpleegt u <i>4.3 Activatie & feedback</i> , pagina 26.
	Taakbalk & toetsenbord	Opent de Taakbalk & toetsenbord Instellingen. Voor meer informatie raadpleegt u <i>4.4 Taakbalk & toetsenbord</i> , pagina 28.
	Hulp & Gebruik	Opent de Hulp & Gebruik Instellingen. Voor meer informatie raadpleegt u <i>4 Windows Control Instellingen</i> , pagina 20.

4.1 Eye Tracker



4.1.1 Het tabblad Kalibratie

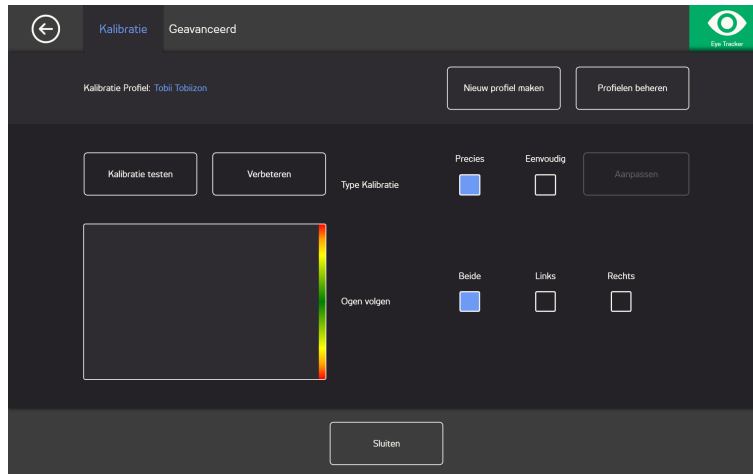

Kalibratie Profiel: Zal de naam van het actieve profiel tonen.

Maak een nieuw profiel aan. U staat op het punt om een nieuw profiel aan te maken. Voor meer informatie raadpleegt u *4.1.1.1 Maak een nieuw profiel aan., pagina 21.*

Profielen beheren Selecteer deze knop om te veranderen naar een reeds bestaand profiel. Voor meer informatie raadpleegt u *4.1.1.2 Profielen Beheren, pagina 22.*

Kalibratie testen: Selecteer deze knop om de testkalibratiepagina te openen. Voor meer informatie raadpleegt u *4.1.1.3 Kalibratie testen, pagina 22.*

Type Kalibratie: Er zijn twee (2) verschillende soorten kalibratie: **Precies** of **Eenvoudig**. Voor meer informatie raadpleegt u *4.1.1.5 Type Kalibratie, pagina 23.*

Ogen volgen: Selecteer hoe het apparaat de ogen van de gebruikers moet volgen tussen: **Beide**, **Links** of **Rechts**.

4.1.1.1 Maak een nieuw profiel aan.

1. Selecteer het **Type Kalibratie** om te gebruiken.
Voor meer informatie raadpleegt u *4.1.1.5 Type Kalibratie, pagina 23.*
2. Selecteer de **Nieuw profiel maken** knop.
3. Selecteren **Ja** om door te gaan of **Nee** — om te annuleren.
4. Geef het nieuwe profiel een naam.



Toetsenbord en muis moeten worden gebruikt.

Alleen alfanumerieke tekens kunnen worden gebruikt.

5. Selecteer de **Volgende** knop.
6. Plaats de gebruiker zodanig dat de twee punten, die de ogen van de gebruikers vertegenwoordigen, in het midden van het vak op het scherm staan.
Het kalibratieproces begint wanneer de rechter punt naar de gebruiker knippert.
7. Volg de instructies op het scherm voor het uitvoeren van een kalibratie.
8. Test de kalibratie.
Voor meer informatie raadpleegt u *4.1.1.3 Kalibratie testen, pagina 22.*
9. Selecteren **Sluiten** om de kalibratie te accepteren of **Opnieuw kalibreren** om een nieuw kalibratieproces uit te voeren.

4.1.1.2 Profielen Beheren

Op de pagina Profielen beheren kunt u een bestaand profiel activeren of verwijderen.

In het midden van het scherm, onder Actief Profiel, kunt u de naam van het actieve profiel zien.

Alle beschikbare profielen worden weergegeven als knop op de pagina, gebruik de  en  Knop om door de beschikbare profielen te scrollen.


4.1.1.2.1 Een profiel activeren

1. Selecteer de knop met de naam van het profiel om te activeren.
2. Selecteer de **Activeren** knop rechtsboven in het scherm.
3. Selecteren **Ja** om het geselecteerde profiel te activeren of **Nee** — om te annuleren.
4. Selecteren **Sluiten** om de pagina te verlaten

4.1.1.2.2 Een profiel verwijderen

1. Selecteer de knop met de naam van het profiel om te verwijderen.
2. Selecteer de **Verwijderen** knop linksboven in het scherm.
3. Selecteren **Ja** om het geselecteerde profiel te verwijderen of **Nee** — om te annuleren.
4. Selecteren **Sluiten** om de pagina te verlaten

4.1.1.3 Kalibratie testen

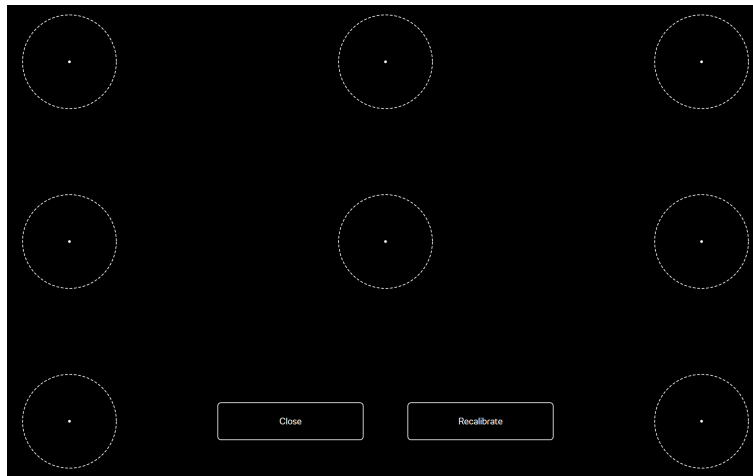

Op de testkalibratiepagina kan de kalibratie in acht (8) plaatsen op het scherm worden getest om te zien of de gebruiker de oogtracker moet kalibreren.

1. Kijk naar elke punt in elke cirkel op het scherm om te zien hoe nauwkeurig het oogvolgen gaat dat gebied.
2. Selecteren **Sluiten** om de kalibratie te accepteren of **Opnieuw kalibreren** om een nieuw kalibratieproces uit te voeren.

4.1.1.4 Opnieuw Kalibreren

1. Selecteer het **Type Kalibratie** om te gebruiken.
Voor meer informatie raadpleegt u *4.1.1.5 Type Kalibratie, pagina 23*.
2. Selecteer de **Opnieuw kalibreren** knop om een nieuw kalibratieproces voor het actieve profiel te starten.
3. Volg de instructies op het scherm voor het uitvoeren van een kalibratie.
4. Test de kalibratie. Voor meer informatie raadpleegt u *4.1.1.3 Kalibratie testen, pagina 22*.

5. Selecteren **Sluiten** om de kalibratie te accepteren of **Opnieuw kalibreren** om een nieuw kalibratieproces uit te voeren.

4.1.1.5 Type Kalibratie

Er zijn twee (2) verschillende soorten kalibratie beschikbaar: **Precies** en **Eenvoudig**.

4.1.1.5.1 Precies

Selecteer de **Precies** vakje om het meest nauwkeurige kalibratietype te activeren.


Met het nauwkeurige kalibratietype geactiveerd wordt de kalibratieprocedure een zeven (7) punten, 'pop de punten'-kalibratie. Het nauwkeurige kalibratietype is het standaard kalibratietype.

4.1.1.5.2 Eenvoudig

Selecteer het **Eenvoudig** vakje om het eenvoudige kalibratietype te activeren, wanneer het van belang is dat de kalibratie snel en gemakkelijk is, in plaats van zeer nauwkeurig.

Als het eenvoudige kalibratietype is geselecteerd, kan het kalibratieproces worden aangepast.

Selecteer de **Aanpassen** knop om het kalibratieproces aan te passen.

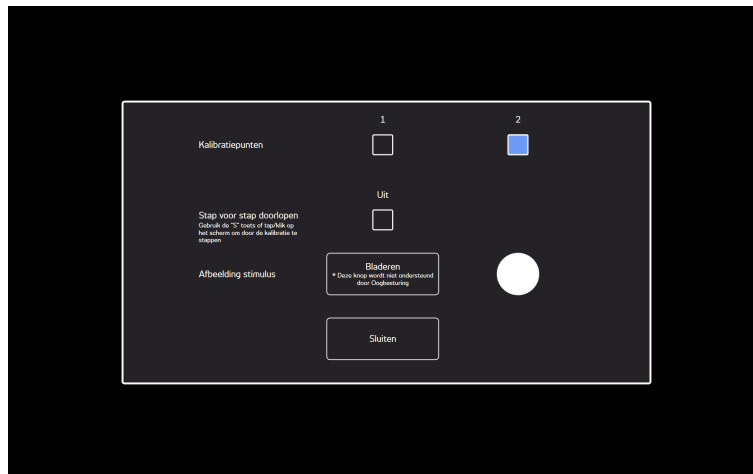

Kalibratiepunten: Selecteren als **1** of **2** kalibratiepunten moeten worden gebruikt.




1-punts kalibratie is niet beschikbaar op PCEye Go.

Stappen-door: Schakel het Stappen-door Aan/Uit selectievakje op Aan om de functie te activeren waarin u de "S" toets op een toetsenbord gebruikt om te tikken/klikken op het scherm om door de kalibratie te stappen.

Afbeelding stimulus Selecteer de **Bladeren** knop om de **Afbeelding stimulus** standaard witte punt te veranderen in een van de meegeleverde stimuli of in een afbeelding van het favoriete speelgoed van de gebruiker of iets anders.

Sluiten Selecteer de **Sluiten** knop om de pagina te verlaten

4.1.2 Het tabblad Geavanceerd

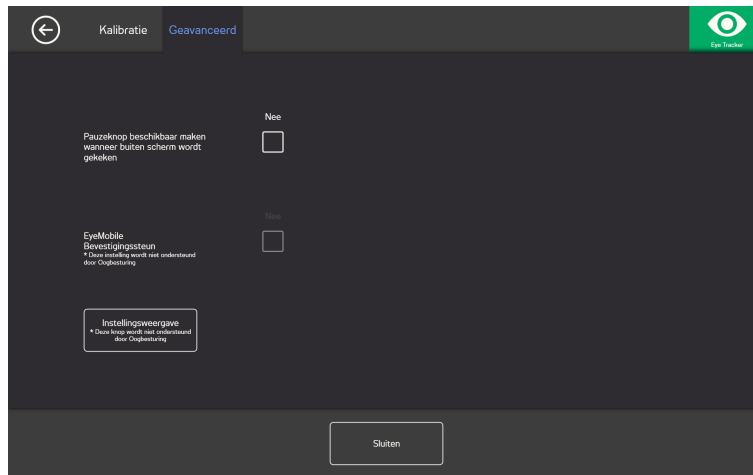


Pauzeknop beschikbaar maken wanneer buiten scherm wordt gekeken: Schakel het selectievakje Aan / Uit op **Aan** als de pauzetoets op het scherm moet verschijnen wanneer de gebruiker buiten het scherm kijkt, zodat de gebruiker gemakkelijk kan pauzeren en opnieuw beginnen met eye tracking.


EyeMobile Bevestigingssteun: Schakel het EyeMobile bevestigingssteun selectievakje Aan/Uit op **Aan** als u een EyeMobile of EyeMobile Mini gebruikt. De EyeMobile-instelling voor de bevestigingssteun is niet relevant voor EyeMobile Plus en dus uitgeschakeld.

4.1.2.1 Instellingen Beeldscherm

Als er meer dan een (1) beeldscherm gebruikt wordt, moet u opgeven op welk beeldscherm de Eye Tracker is aangesloten. Het systeem zal ook moeten weten hoe groot het beeldscherm is dat wordt gebruikt.

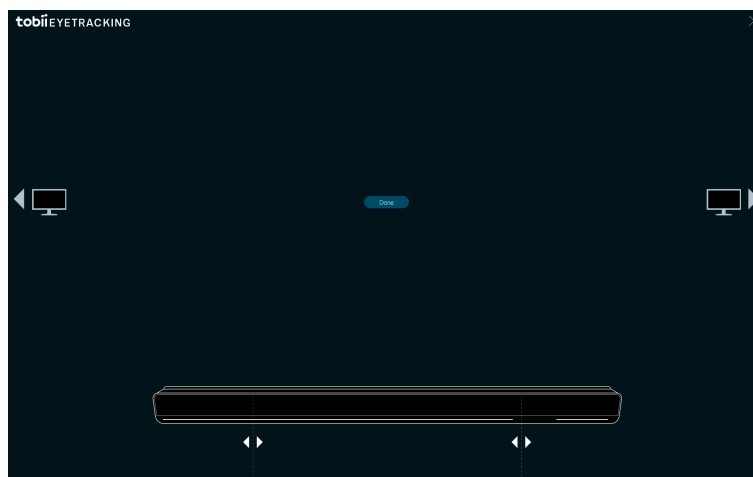

1. Gebruik de  of  om te selecteren op welk beeldscherm de oogtracker is aangesloten.
2. Lijn de linker- en rechter verticale lijn uit, die onder de visualisatie van de oogtracker op het scherm staan, met de markeringen die bovenop de oogtracker in gebruik zijn.

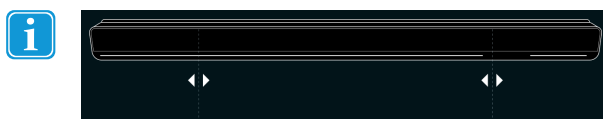


Dit zal de grootte van het beeldscherm instellen dat wordt gebruikt voor de Windows Control.

3. Selecteren **Gereed** om af te ronden.

4.2 Algemene instellingen


4.2.1 Het tabblad Algemeen

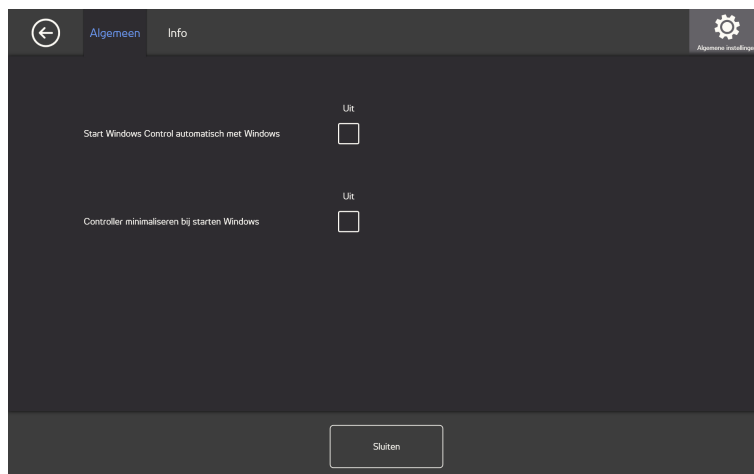

Lanceer Windows Control automatisch met Windows: Schakel het selectievakje Aan / Uit op **Aan** als Windows Control automatisch wordt gestart wanneer Windows start.

Controller minimaliseren bij starten Windows: Schakel het selectievakje Aan / Uit op **Aan** als de Windows Control Controller moet worden geminimaliseerd als Windows opstart.

4.2.2 De Over Tab

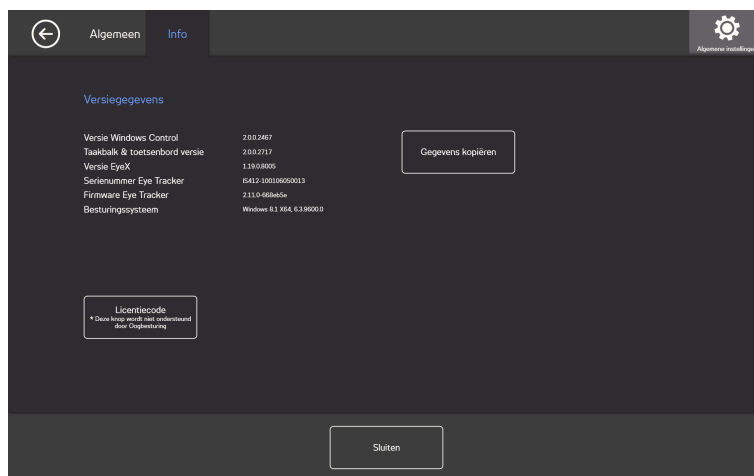

Op de Over pagina is alle Versieinformatie te vinden voor de software en de Eye tracker hardware. Deze informatie kan gemakkelijk worden gekopieerd door het selecteren van de **Informatie kopiëren** knop en dan kan het worden geplakt naar een email of andere software indien nodig.

4.2.2.1 Licentiecode



De licentieknop is niet Gaze ingeschakeld, dus vraag iemand om te helpen als u de licentie moet wijzigen.


Om de licentie te activeren zie 2.2.1 *Licentie activeren, pagina 6*.

Om de licentie te deactiveren zie 2.2.2 *Licentie deactiveren, pagina 7*.

4.3 Activatie & feedback



4.3.1 Het tabblad Activatie

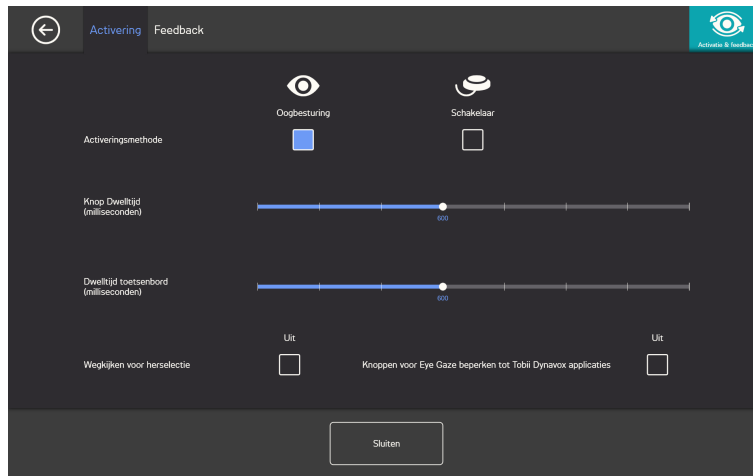

In het tabblad Activatie worden alle instellingen met betrekking tot gebruikersinteractie Windows Control ingesteld. Als de gebruiker de Blik of een Schakelaar gebruikt om de commando's uit te voeren en hoe de interactie zal werken.

Activeringsmethode:

- **Oogbesturing** - Kies Blik om de positie van uw blik te gebruiken om de zoomfunctie te activeren die eindigt met de uitvoering van de gewenste taak.
- **Schakelaar** - Kies Schakelaar om een schakelaar te gebruiken om de zoomfunctie te activeren die eindigt met de uitvoering van de gewenste taak.


Knop Fixeertijd (miliseconden)

De knop Fixeertijd kan op 8 verschillende niveaus worden ingesteld. Kijk gewoon naar de gewenste positie om de instelling te wijzigen. Door de knop Fixeertijd te wijzigen, kunt u aanpassen hoelang de gebruiker naar een knop moet kijken voordat de taak wordt uitgevoerd. Links op de schaal worden de lagere fixeertijden weergegeven en rechts de hogere snelheden.

Toetsenbord Fixeertijd (miliseconden)

De Toetsenbord Fixeertijd kan op 8 verschillende niveaus worden ingesteld. Kijk gewoon naar de gewenste positie om de instelling te wijzigen. Door de Toetsenbord Fixeertijd te wijzigen, kunt u aanpassen hoelang de gebruiker naar een toets op het toetsenbord moet kijken voordat de toets wordt uitgevoerd. Links op de schaal worden de lagere Toetsenbord fixeertijden weergegeven en rechts de hogere.


4.3.2 De Feedback tab

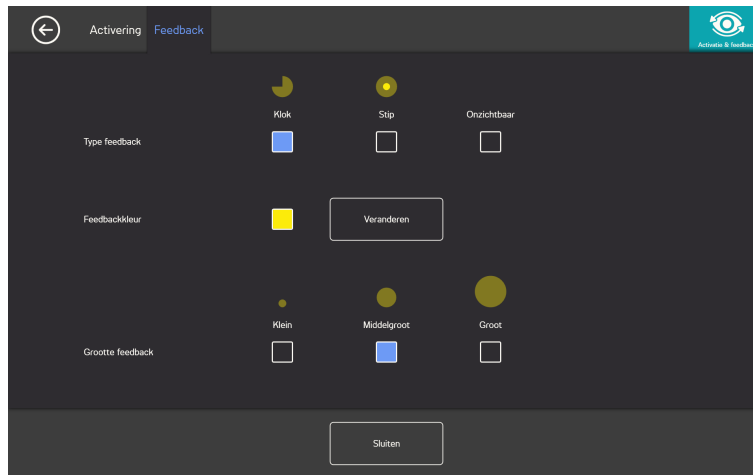

Type feedback:

- **Klok** - De visuele feedback is een klok die vult tijdens de gespecificeerde Knop Fixeertijd. Wanneer de klok volledig is opgevuld, wordt de taak uitgevoerd.
- **Stip** - De visuele feedback is een krimpende stip voor Gaze-gebruikers of een statische stip voor gebruikers van de Schakelaar wanneer er een taak wordt uitgevoerd.
- **Onzichtbaar** - Er wordt geen visuele feedback weergegeven op het scherm wanneer er een taak wordt uitgevoerd.

Feedbackkleur: Selecteer de **Veranderen** knop om de kleur van de feedback te selecteren. Voor beschikbare kleuren, zie Afbeelding 4.1 Beschikbare kleuren, pagina 27.

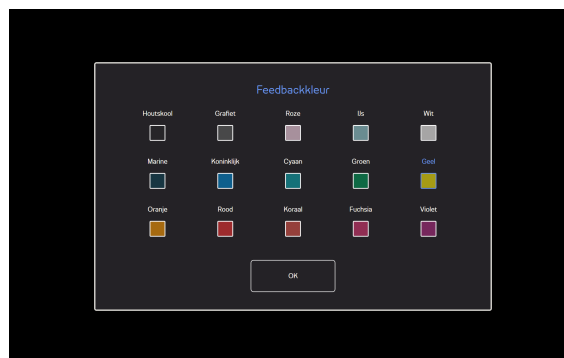


Afbeelding 4.1 Beschikbare kleuren


Grootte feedback: De feedbackgrootte van het gekozen feedbacktype kan worden ingesteld op drie (3) verschillende waarden.

- **Klein**
- **Middelgroot**
- **Groot**

4.4 Taakbalk & toetsenbord

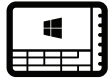

4.4.1 Het tabblad Zoom

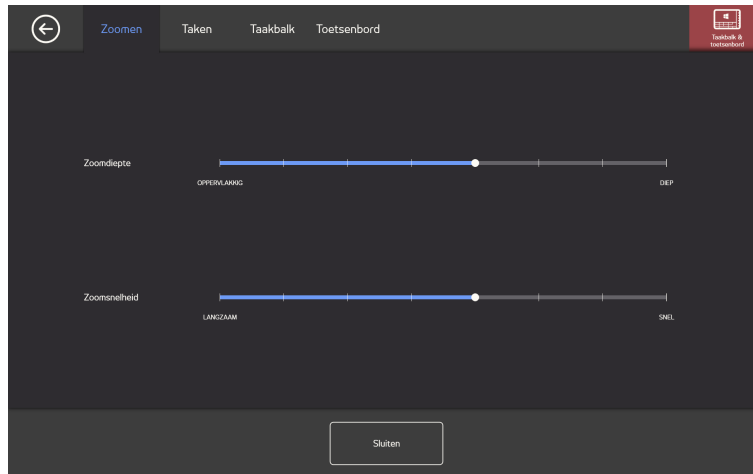

Zoomdiepte

De zoomdiepte kan op 8 verschillende niveaus worden ingesteld. Kijk gewoon naar de gewenste positie om de instelling te wijzigen. Door de diepte te wijzigen, kunt u bepalen hoe sterk er wordt ingezoomd vóór het uitvoeren van de taak. Hoe verder naar rechts op de schaal, hoe sterker er wordt ingezoomd.




Als de diepte is ingesteld op nul, wordt er niet ingezoomd. Met Primaire selectie is dit een instant klik. Met Secundaire selectie is dit nog steeds zoomen.

Zoomsnelheid

De zoomsnelheid kan op 8 verschillende niveaus worden ingesteld. Kijk gewoon naar de gewenste positie om de instelling te wijzigen. Door de snelheid te wijzigen, kunt u bepalen hoe snel er wordt ingezoomd vóór het uitvoeren van de taak. Hoe verder naar rechts op de schaal, hoe sneller er wordt ingezoomd.

4.4.2 De Taak tab.

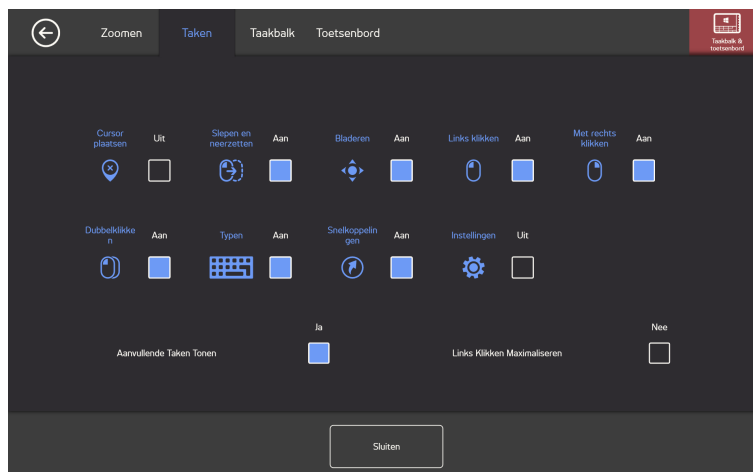

Selecteer welke taken u op de taakbalk wilt gebruiken. Voor meer informatie over de taken raadpleegt u 3.4 *Taak*, pagina 11.



Maar denk erom: een groot aantal taken op de taakbalk kan het selecteren van taken bemoeilijken op kleinere schermen.

Schakel het selectievakje Aan / Uit op **Aan** voor elke taak om het op de taakbalk te kunnen gebruiken.

Schakel het selectievakje Aan / Uit op **Uit** voor elke taak om het gebruik en de zichtbaarheid ervan op de taakbalk uit te schakelen.

4.4.2.1 Aanvullende Taken Tonen


Als u het op Uit heeft gezet, zijn de extra taken niet beschikbaar. Als u het op Aan heeft gezet, zijn de extra taken beschikbaar. Voor meer informatie raadpleegt u 3.5 Aanvullende Taken, pagina 12.

4.4.2.2 Links Klikken Maximaliseren




Door Maximaliseren Links klikken / tikken te activeren, kan het actieve gebied van de taak Links klikken / tikken in de taakbalk aanzienlijk worden vergroot, zodat de Links Klikken taak gemakkelijker geselecteerd kan worden.

Gebruik de **Links Klikken Maximaliseren** functie om de linkerkliktaak op de taakbalk groter te maken en te benadrukken. Als deze is uitgeschakeld, worden alle geselecteerde taken op gelijke afstand van elkaar geplaatst op de taakbalk. Als deze is ingeschakeld, behouden alle andere taken dan Links klikken / tikken hun originele, kleinere maten en vult de taak Links klikken / tikken de resterende ruimte op de taakbalk.

4.4.3 De Taakbalk Tab

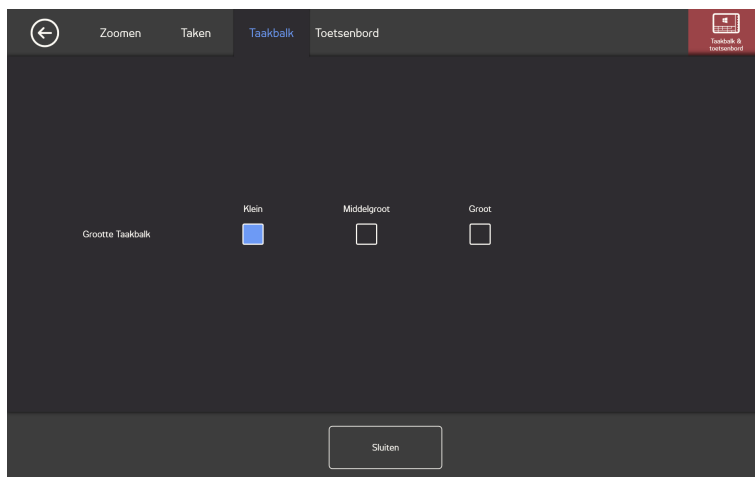


In de taakbalk tab kunt u de grootte van de taakbalk wijzigen en kiezen tussen drie (3) maten:

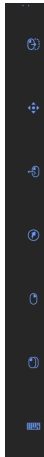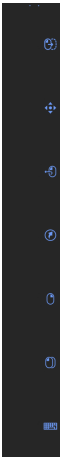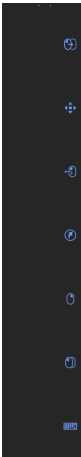Klein	Middelgroot	Groot
		

Als u een grotere grootte voor de taakbalk selecteert, wordt het actieve gebied rond de taak uitgebreid zodat het gemakkelijker wordt om de taak voor de gebruiker te selecteren. De actuele actieve regio wordt buiten het scherm uitgebreid en het icoon voor de taken ligt altijd in het midden van de actieve regio.

4.4.4 De toetsenbord tab

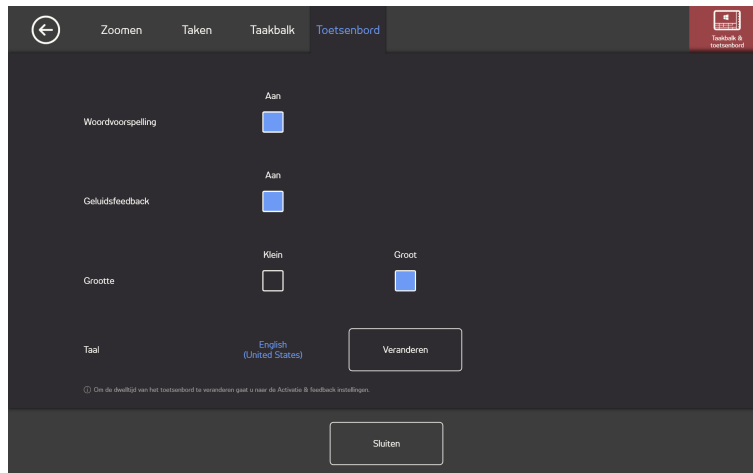

Woordvoorspelling

- **Aan** - Kies Aan om woordvoorspelling te activeren bij gebruik van het Fixatie toetsenbord. (standaard)
- **Uit** - Kies Uit om woordvoorspelling te deactiveren bij gebruik van het Fixatie toetsenbord.

Geluidsfeedback

- **Aan** Kies Aan om geluidsfeedback te activeren bij selectie van een knop op het Fixatie toetsenbord.
- **Uit** Kies Uit om geluidsfeedback te deactiveren bij selectie van een knop op het Fixatie toetsenbord.

Grootte

- **Klein** - Kies Klein om een kleiner Fixatie toetsenbord te gebruiken, dat minder dan de helft van het scherm in beslag neemt, zie *Afbeelding 4.2 Indeling klein toetsenbord (standaard), pagina 30*.
- **Groot** - Kies Groot om een groter Fixatie toetsenbord te gebruiken, dat de helft van het scherm in beslag neemt, zie *Afbeelding 4.3 Indeling groot toetsenbord, pagina 31*.



Afbeelding 4.2 Indeling klein toetsenbord (standaard)



Afbeelding 4.3 Indeling groot toetsenbord


Taal

De geselecteerde taal voor toetsenbordindeling wordt getoond. Selecteer de **Veranderen** knop om de toetsenbordindeling te wijzigen naar een andere taal. Er zijn een aantal verschillende talen voor toetsenbordindeling beschikbaar.

4.5 Hulp & Gebruik



4.5.1 De Help Tab

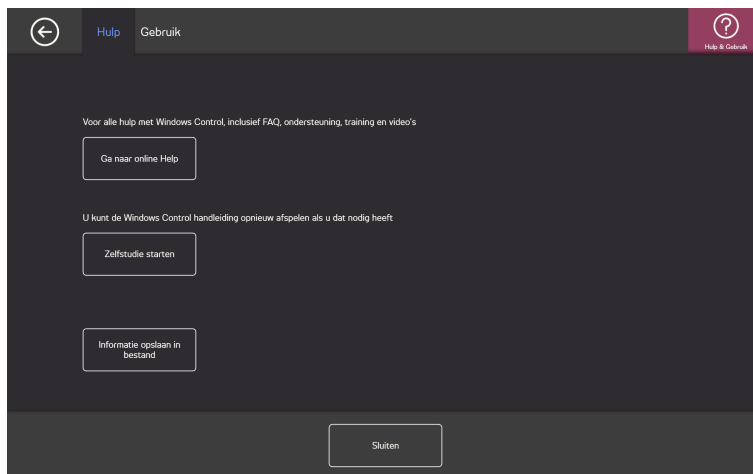


Selecteer de **Ga naar de online Help** knop om de Tobii Dynavox productondersteuningspagina's op internet te openen in de standaard webbrowser. Op de ondersteuningspagina's kan de gebruiker Veelgestelde Vragen vinden, ondersteuning, training, video's en documentatie over Windows Control en alle andere producten van Tobii Dynavox.




Controleer of de computer/het apparaat is verbonden met internet.

Selecteer de **handleiding starten** knop om de meegeleverde handleiding uit te voeren als de gebruiker meer oefening nodig heeft. De handleiding kan zo vaak gestart worden als de gebruiker wil.

4.5.2 Het tabblad Gebruik

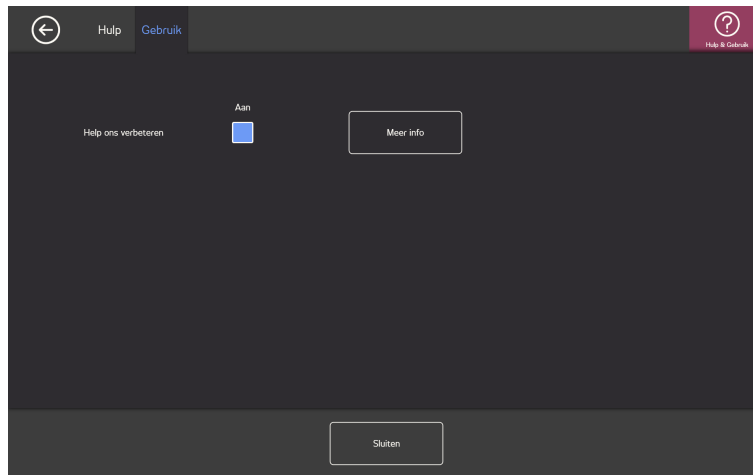

Help ons verbeteren: Om te helpen Tobii Dynavox de software te verbeteren, schakelt u het Aan/Uit selectievakje op **Aan** . Selecteer de Meer Informatie knop om een pagina te openen met informatie over waar dit allemaal over gaat. Voor meer informatie raadpleegt u *Afbeelding 4.4 Gegevens Verzamelen*, pagina 32.

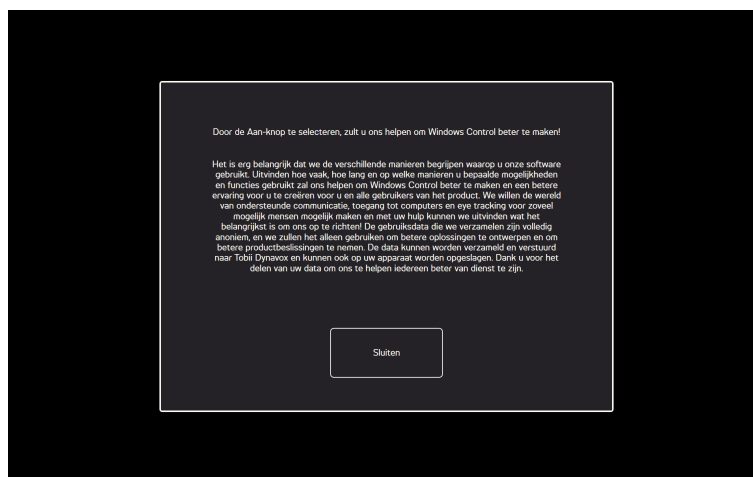

Afbeelding 4.4 Gegevens Verzamelen

5 Virtual Remote

5.1 Virtual Remote Overzicht



Afbeelding 5.1 Overzicht van Virtual Remote

Het Virtual Remote is onderverdeeld in twee gebieden:

- Het Virtual Remote Menu, voor meer informatie zie *5.1.1 Virtual Remote Menu, pagina 33*.
- De Actieve Afstandsbediening, voor meer informatie zie *5.1.2 De Active Remote, pagina 34*.

5.1.1 Virtual Remote Menu




Afbeelding 5.2 Het Virtual Remote Menu

De iconen in het Virtual Remote menu zijn:

Taakknop	Actie	Beschrijving
+	Afstandsbediening toevoegen	Selecteer deze actie om een nieuwe afstandsbediening toe te voegen, zie <i>5.2.4 Een afstandsbediening toevoegen , pagina 36</i> .
i	Informatie	Selecteer deze actie om de informatie te openen, zie <i>5.2.6 Informatie , pagina 52</i> .
<	Links	Selecteer deze actie om de afstandsbediening te activeren die aan de linkerkant zit van de actieve afstandbediening.
>	Rechts	Selecteer deze actie om de afstandbediening te activeren rechts van de actieve afstandsbediening.
	Bewerkingsmodus	Selecteer deze actie om naar de Bewerkingsmodus te gaan van de actie afstandsbediening, zie <i>5.2.5 Bewerkingsmodus , pagina 44</i> .
X	Afsluiten/Minimaliseren	Selecteer deze optie om de Virtual Remote applicatie te minimaliseren.

5.1.2 De Active Remote

De active remote is altijd de afstandsbediening die in het midden van het Virtual Remote menu staat, zie *Afbeelding 5.3 Active Remote*.

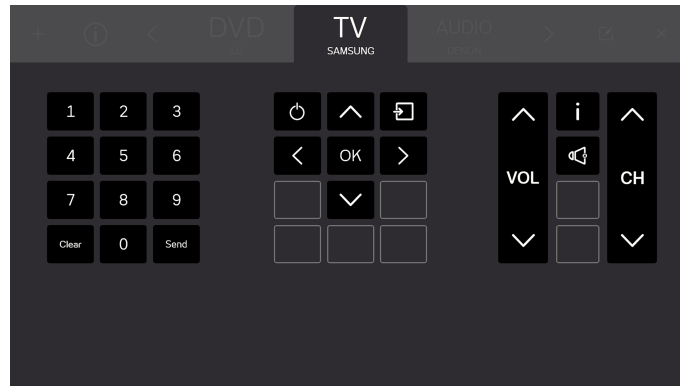


Afbeelding 5.3 Active Remote



Alle knoppen die zichtbaar zijn op het scherm behoren tot de active remote.

U zult ook in staat zijn om de namen van tot twee (2) of meer beschikbare afstandsbedieningen te zien, één aan elke kant van de active remote. U zult alleen de naam zien en niet de knoppen voor de beschikbare afstandsbedieningen totdat u een afstandsbediening actief maakt.

5.1.3 De Knoppen

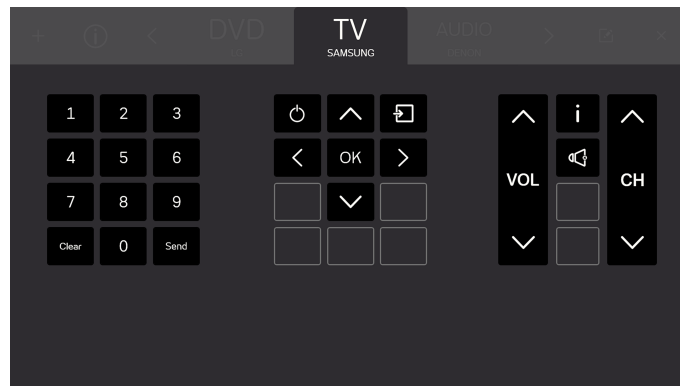


Afbeelding 5.4 De Knoppen

Alle knoppen die zichtbaar zijn op het scherm behoren tot de active remote. Er zijn twee (2) soorten knoppen op de afstandsbediening.


- Actieve Knop , zie *Afbeelding 5.5 Actieve Knoppen, pagina 35*
- Inactieve Knoppen , zie *Afbeelding 5.6 Inactieve Knoppen, pagina 35*



De hoeveelheid knoppen en de functies van de knoppen zal verschillend zijn afhankelijk van welk soort systeem de gebruiker wil controleren.

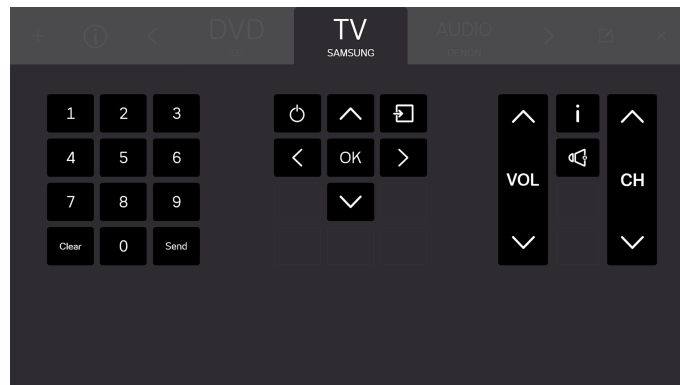

Afbeelding 5.5 Actieve Knoppen

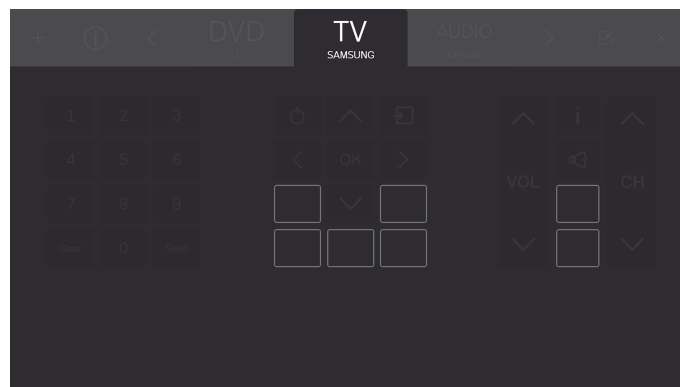

Afbeelding 5.6 Inactieve Knoppen

5.2 Gebruik van Tobii Dynavox Virtual Remote


Tobii Dynavox Virtual Remote maakt het voor de gebruiker mogelijk om een tv, dvd, audiosysteem etc. te bedienen vanaf het apparaat.



Alle functies in Virtual Remote zijn voorbereid op Aanraken en de Muis, wat het gemakkelijker maakt voor een zorgverlener of assistent om de gebruiker te helpen indien nodig.

5.2.1 Bij de eerste keer opstarten

Een korte handleiding zal de gebruiker kennis laten maken met de layout van de Virtual Remote software. Volg gewoon de instructies op het scherm.

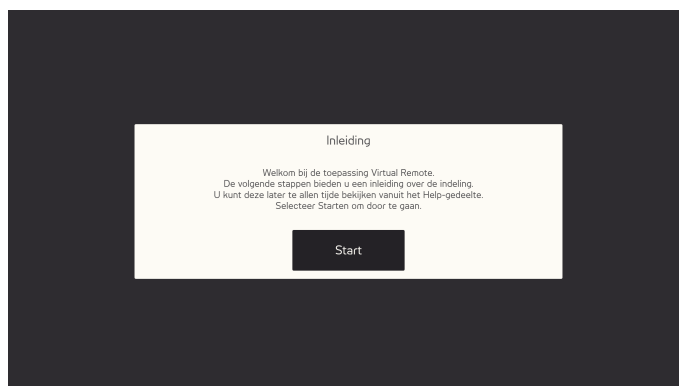

Afbeelding 5.7 Het Virtual Remote Inleiding scherm.

5.2.2 Veranderen Actieve Afstandsbediening

Om de actieve afstandsbediening te veranderen:

- Selecteer één van de namen rechts of links van de actieve afstandsbediening.
- of gebruik de < en > knop om door de beschikbare afstandsbedieningen te scrollen.



De active remote is altijd de afstandsbediening die in het midden van het Virtual Remote Menu


5.2.3 Het gebruiken van knoppen op een afstandsbediening

Selecteer gewoon een knop die u wilt gebruiken en zend het signaal naar het apparaat. Volumeknoppen worden meestal geconfigureerd om een continu signaal uit te zenden zo lang de knop geselecteerd is. Voor meer informatie raadpleegt u 5.2.5.3.1 *Lengte Signaal*, pagina 47.

Om een getal groter dan 9 in te voeren (bv. meerdere cijfers) volg de volgende procedure.

Lijst met Stappen voor Getallen groter dan 9

1. Selecteer alle cijfers in de volgorde waarop ze moeten worden verstuurd.
Alle geselecteerde cijfers zullen zichtbaar zijn in een wit vak onder het cijfergedeelte van de afstandsbediening.

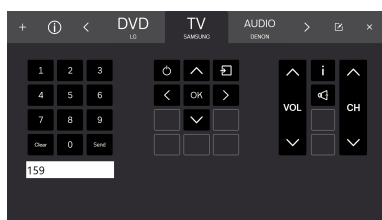

2. Selecteer de **Verzenden** knop om de signalen naar het apparaat te verzenden of **Wissen** om alle geselecteerde getallen te verwijderen.

5.2.4 Een afstandsbediening toevoegen



Er zijn twee (2) manieren om een nieuwe afstandsbediening toe te voegen.

5.2.4.1 Een voorgeprogrammeerde afstandsbediening toevoegen


Om een voorgeprogrammeerde afstandsbediening toe te voegen volgt u deze procedure:

Stappenlijst om een Voorgeprogrammeerde Afstandsbediening toe te voegen

1. Selecteer de  van het menu.
2. Selecteer de Voorgeprogrammeerde afstandsbediening knop




3. Selecteer het type Voorgeprogrammeerde afstandsbediening
 - Tv
 - DVD/BLURAY
 - AUDIO

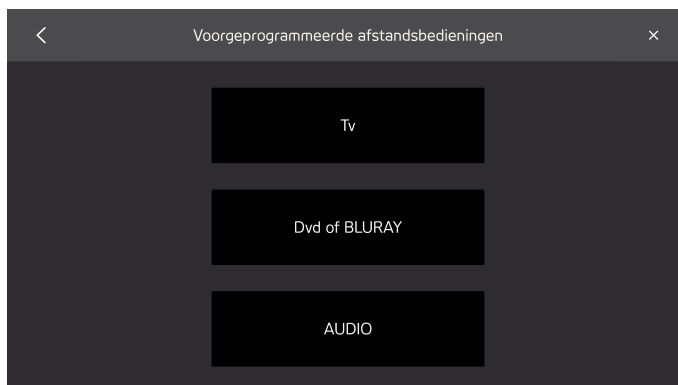


4. Selecteer het merk uit de lijst



Als u het merk niet kunt vinden, selecteert u **Overige**, voor meer informatie zie . 5.2.4.1.1 Andere Afstandsbedieningen, pagina 39

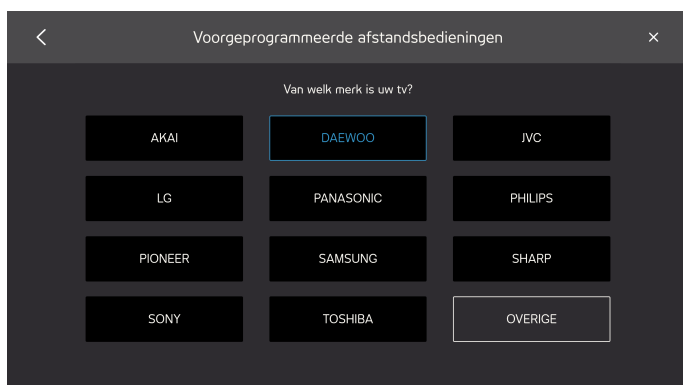

- Als een merk geselecteerd is, zal er een popup met informatie verschijnen over hoe veel verschillende voorgeprogrammeerde afstandsbedieningen er zijn.

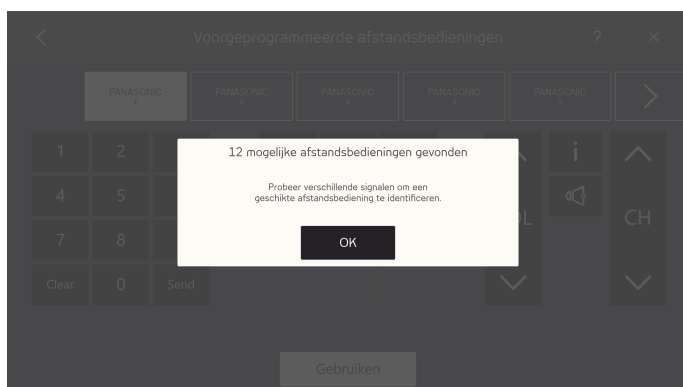

Selecteer de **OK** knop.

- Selecteer een afstandsbediening



- Probeer onze verschillende signalen op de geselecteerde afstandsbediening om een geschikte afstandsbediening te identificeren.
- Herhaal stap 6 & 7 totdat de meest geschikte afstandsbediening is gevonden.




Gebruik de < en > knop om door de beschikbare afstandsbedieningen te scrollen.

- Selecteer de geschiktste afstandsbediening.

10. Selecteren **Gebruik** knop.



11. De geselecteerde afstandsbediening zal naar de beschikbare afstandsbedieningen gekopieerd worden.

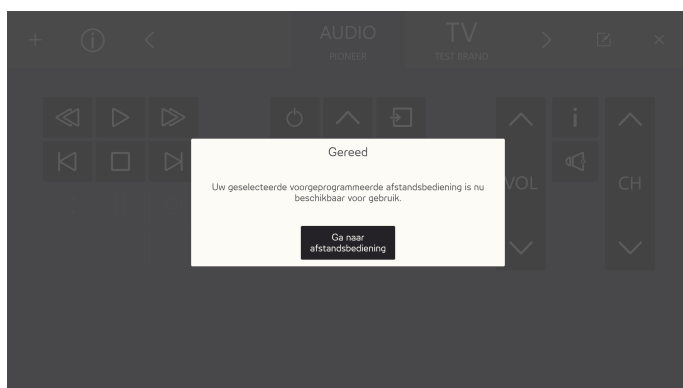


Selecteer de **Ga naar de Afstandsbediening** knop om af te ronden.

5.2.4.1.1 **Andere Afstandsbedieningen**

Om andere afstandsbedieningen toe te voegen volgt u deze procedure:


Stappenlijst Andere Afstandsbedieningen Toevoegen

1. Volg stap 1 - 3 in de stappenlijst: *Stappenlijst om een Voorgeprogrammeerde Afstandsbediening toe te voegen, pagina 37.*
2. Selecteer de **Overige** knop.
3. Type de merknaam in het tekstvak.

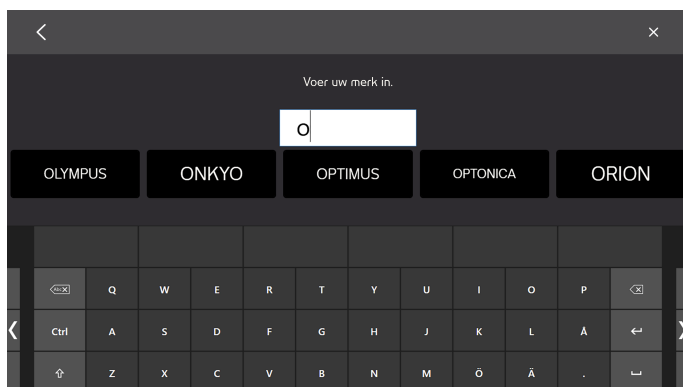





Om het zoekresultaat te beperken, type meer tekens in.

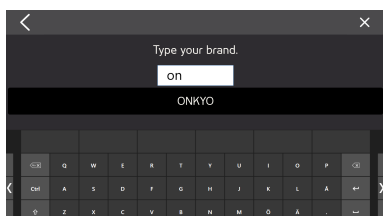

4. Selecteer het merk.

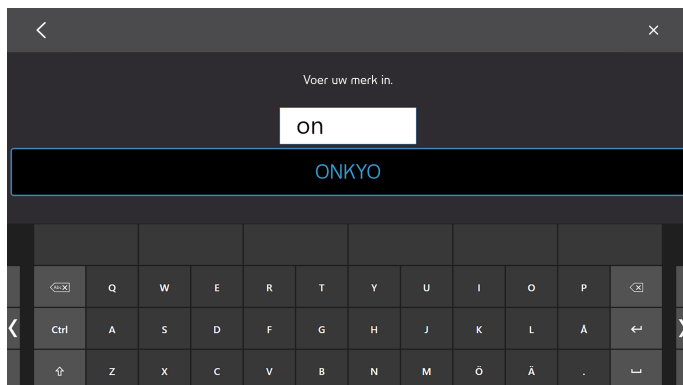

5. Als een merk geselecteerd is, zal er een popup met informatie verschijnen over hoe veel verschillende voorgeprogrammeerde afstandsbedieningen er zijn.

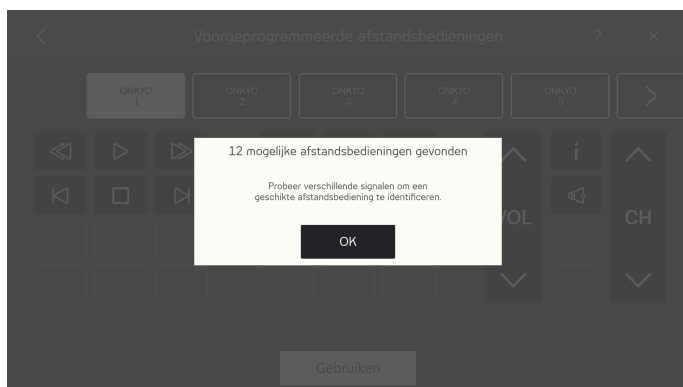

Selecteer de **OK** knop.

6. Selecteer een afstandsbediening



7. Probeer verschillende signalen op de geselecteerde afstandsbediening om een geschikte afstandsbediening te identificeren.
8. Herhaal stap 6 & 7 totdat de beste afstandsbediening is gevonden.




Gebruik de < en > knop om door de beschikbare afstandsbedieningen te scrollen.

9. Selecteer de geschiktste afstandsbediening.
10. Selecteren **Gebruik** knop.



11. De geselecteerde afstandsbediening zal naar de beschikbare afstandsbedieningen gekopieerd worden.

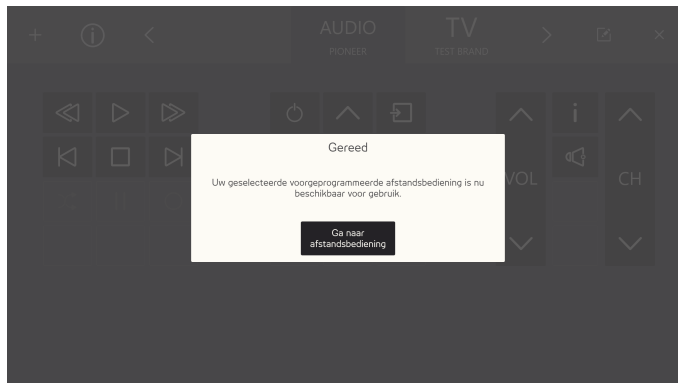

Selecteer de **Ga naar de Afstandsbediening** knop het finaliseren te beëindigen.

5.2.4.2 Een niet-voorgeprogrammeerde Afstandsbediening toevoegen.

Om een nieuwe niet-voorgeprogrammeerde afstandsbediening toe te voegen, volgt u deze procedure:

Stappenlijst Toevoegen niet-voorgeprogrammeerde afstandsbediening


1. Selecteer de + van het menu.

2. Selecteer de Niet-Voorgeprogrammeerd knop




3. Selecteer type van Niet-Voorgeprogrammeerde Afstandsbediening knop

- Tv
- AUDIO
- KABEL DOOS
- DVD of BLURAY
- LEEG SJABLOON

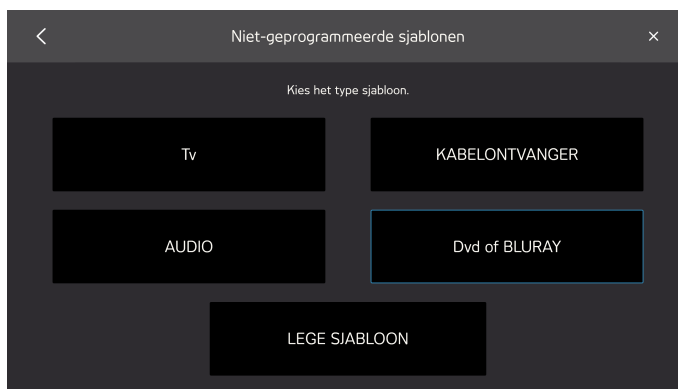


4. Selecteer een knop om te programmeren.

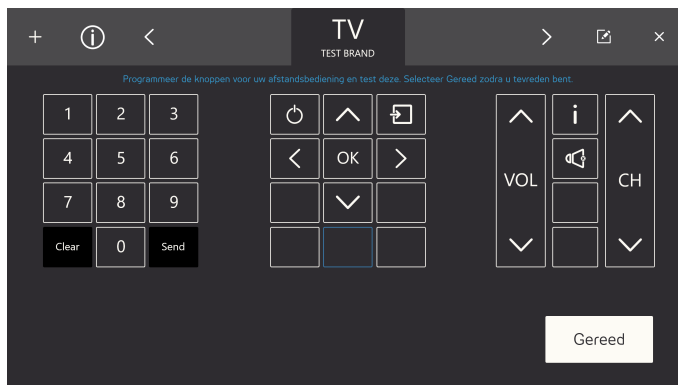


De beschikbare iconen zullen verschillen afhankelijk van welk type Afstandsbediening werd geselecteerd in Stap 3.

5. Selecteer een knop om te programmeren.

6. Richt de afstandsbediening op uw Tobii Dynavox IR ontvanger en druk op de gewenste knop op de afstandsbediening waarvan u wilt dat Virtual Remote die leert.

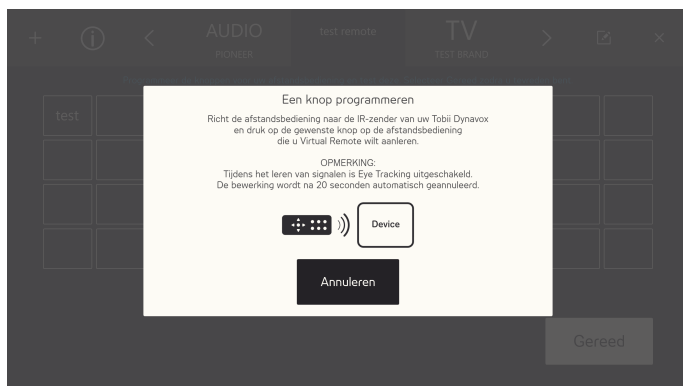

7. Als het signaal bewaard is in Virtual Remote zal de **Gereed** popup getoond worden.

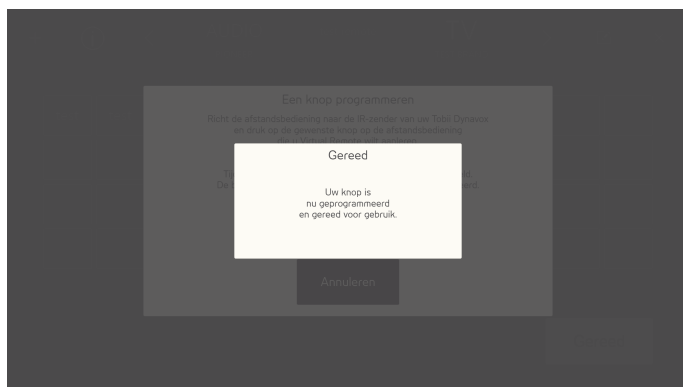


De popup zal automatisch sluiten na een paar seconden.

8. Herhaal stap 5 - 7 totdat u alle benodigde knoppen heeft geprogrammeerd op de afstandsbediening.



Om knoppen op de Afstandsbediening te veranderen of te verwijderen moet u programmeren beëindigen en naar de Bewerkingsmodus gaan. Voor meer informatie over Bewerkingsmodus, [pagina 44](#).

9. Selecteren **Gereed** om af te ronden.

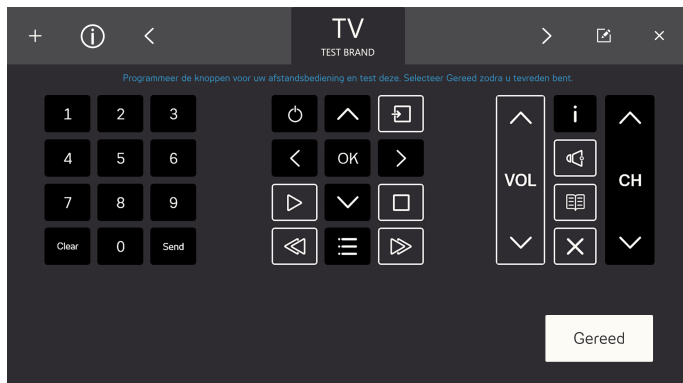


5.2.5 Bewerkingsmodus



Met Bewerkingsmodus kunt u veranderingen doorvoeren op bestaande afstandsbedieningen. Zorg ervoor dat de afstandsbediening die u wilt bewerken in de actieve modus staat. Om de Bewerkingsmodus in te gaan, volgt u de volgende procedure:

Stappenlijst Bewerkingsmodus

1. Selecteer de  (Bewerkingsmodus) knop.

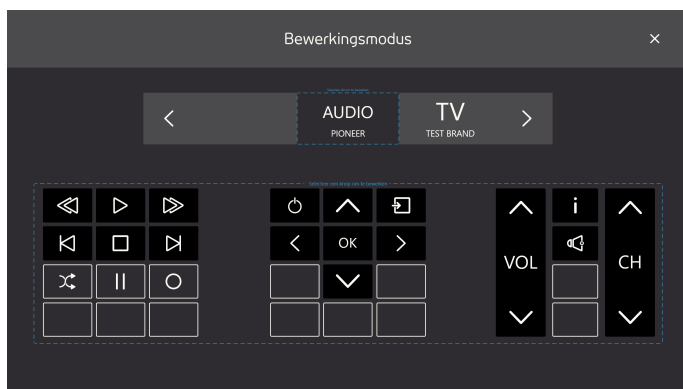


2. Selecteer welk onderdeel van de afstandsbediening u wilt veranderen. De volgende veranderingen kunnen worden doorgevoerd:
 - Naam veranderen van de Afstandsbediening, zie 5.2.5.1 *De naam van en afstandsbediening veranderen*, pagina 44
 - Een Afstandsbediening verwijderen, zie 5.2.5.2 *Een Afstandsbediening verwijderen*, pagina 45
 - Veranderingen doorvoeren op een bestaande actieve knop, zie 5.2.5.3 *Veranderingen doorvoeren aan een Bestaande Actieve Knop*.
 - Veranderingen doorvoeren op een bestaande, niet-geprogrammeerde knop, zie 5.2.5.4 *Veranderingen doorvoeren aan een Bestaande, niet-geprogrammeerde Knop*, pagina 49.
 - Een nieuwe knop toevoegen aan een lege plek, zie 5.2.5.5 *Een nieuwe Knop toevoegen aan een lege plek*, pagina 51

5.2.5.1 De naam van en afstandsbediening veranderen

Om de naam van een afstandsbediening te veranderen, volgt u deze procedure:


De naam van en afstandsbediening veranderen

1. Selecteer de  (Bewerkingsmodus) knop.

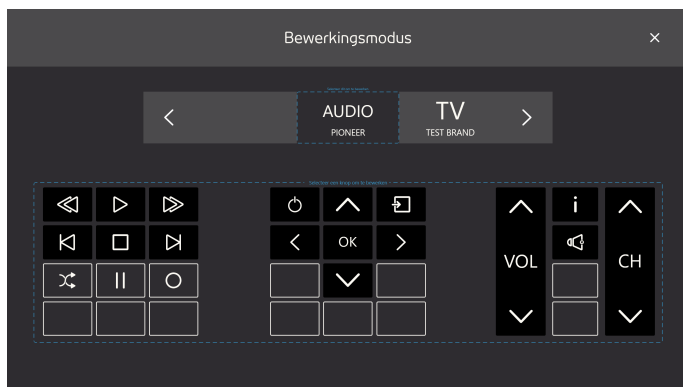

2. Selecteer het "Selecteer hier om te bewerken" vak rond de naam van de afstandsbediening.

3. Selecteer de **Hernoemen** knop.

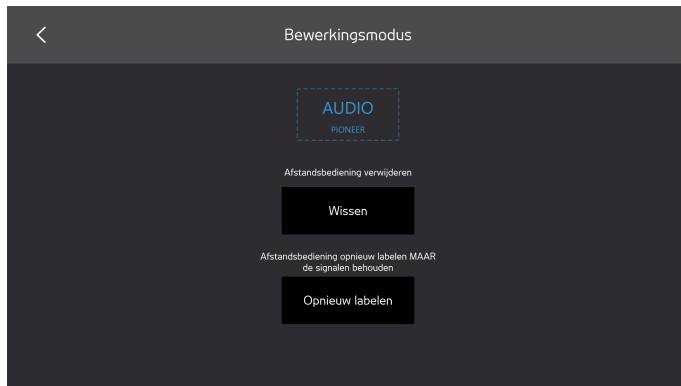

4. Type het nieuwe label in.



Zorg ervoor dat u een korte naam gebruikt.




5. Selecteer de **Enter** toets op het toetsenbord om het hernoemen af te ronden.
6. Selecteer het  icoon om de Bewerkingsmodus te verlaten.

5.2.5.2 Een Afstandsbediening verwijderen


Om een afstandsbediening te verwijderen, volgt u de volgende procedure:

Stappenlijst voor het Verwijderen van een Afstandsbediening


1. Selecteer de  (Bewerkingsmodus) knop.

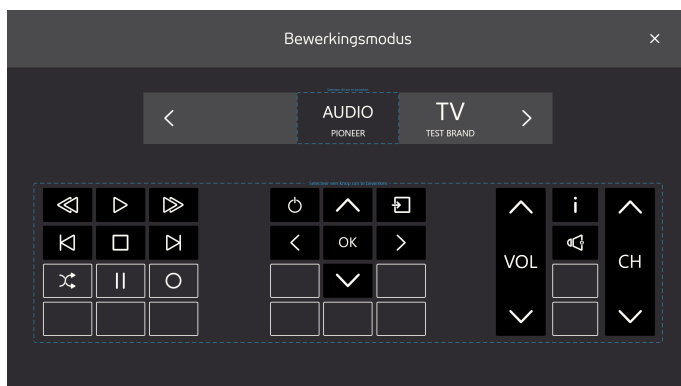

2. Selecteer het "Selecteer hier om te bewerken" vak rond de naam van de afstandsbediening.
3. Selecteer de **Verwijderen** knop.

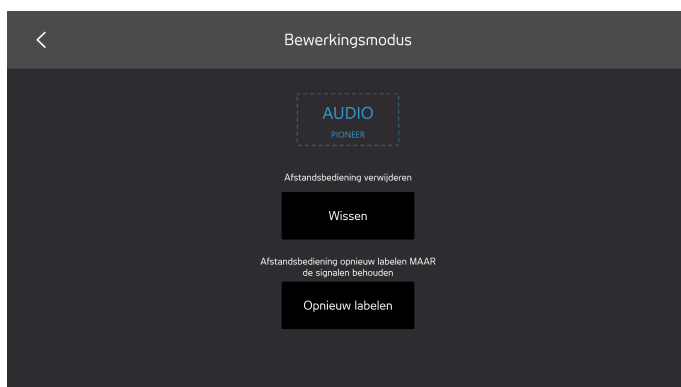

4. Selecteren:
 - **Ja** om te Verwijderen
 - **Nee** om te Annuleren

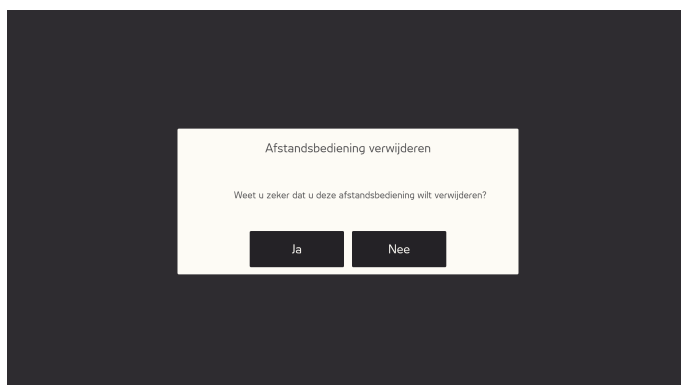


5. Selecteer het  icoon om de Bewerkingsmodus te verlaten.

5.2.5.3 Veranderingen doorvoeren aan een Bestaande Actieve Knop


Om veranderingen door te voeren aan een bestaande actieve knop volgt u deze procedure:

Stappenlijst Veranderingen doorvoeren aan een Bestaande Actieve Knop

1. Selecteer de  (Bewerkingsmodus) knop.

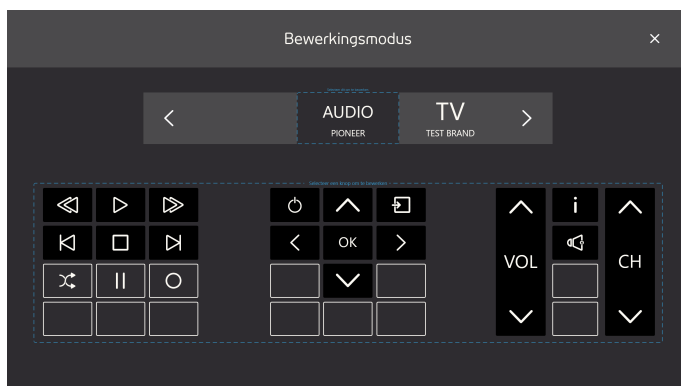

2. Selecteer een knop met een zwarte achtergrond en icoon of tekst, bv. , in het "Selecteer een knop om te bewerken" vak rond de afstandsbedieningsknoppen.
3. Selecteer een van de volgende acties:
 - Lengte Signaal, zie 5.2.5.3.1 *Lengte Signaal*.
 - Nieuw Signaal, zie 5.2.5.3.2 *Nieuw Signaal*, pagina 48
 - Tekst veranderen, zie 5.2.5.3.3 *Tekst veranderen*, pagina 48
 - Icoon veranderen, zie 5.2.5.3.4 *Veranderen Icoon*, pagina 49
 - Wis Knop, zal alle informatie die opgeslagen is omtrent de knop verwijderen.

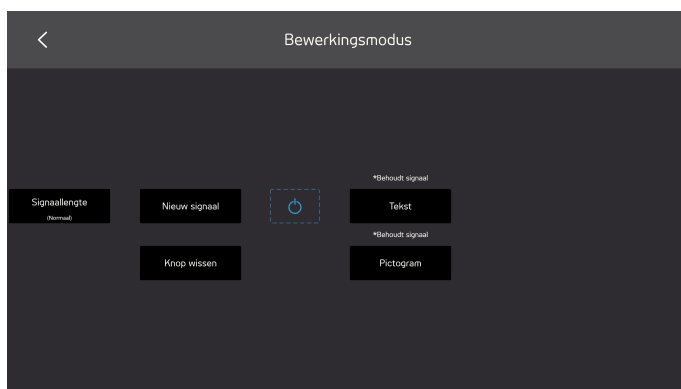

4. Selecteer het  icoon om de Bewerkingsmodus te verlaten.

5.2.5.3.1 Lengte Signaal


Om de ontvangende eenheid te kunnen begrijpen van het signaal dat verzonden werd vanuit de Virtual Remote, kan het nodig zijn om de lengte van het signaal te veranderen. De lengte van het signaal moet ook ingesteld worden als u een knop een signaal wilt laten uitzenden zolang u de knop geselecteerd heeft.

Selecteer één (1) van de volgende alternatieven:

- Normaal - zal het IR-signaal uitzenden in één korte stoot.
- Lang - zal het IR-signaal uitzenden gedurende één (1) seconde.
- Extra lang - zal het IR-signaal uitzenden gedurende twee (2) seconden.
- Continu - zal het signaal uitzenden zolang de knop is geselecteerd.



Dit is een typische instelling voor een volumeknop bijvoorbeeld.

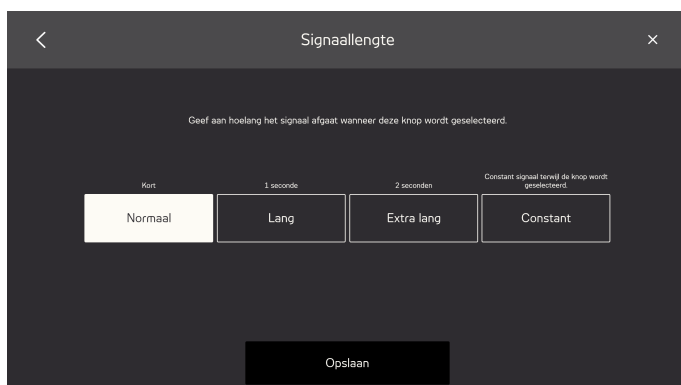


5.2.5.3.2 Nieuw Signaal


Om een nieuw signaal voor een knop te programmeren, volgt u de volgende procedure:

Stappenlijst Nieuw Signaal

1. Richt de afstandsbediening op uw Tobii Dynavox IR ontvanger en druk op de gewenste knop op de afstandsbediening waarvan u wilt dat Virtual Remote die leert.

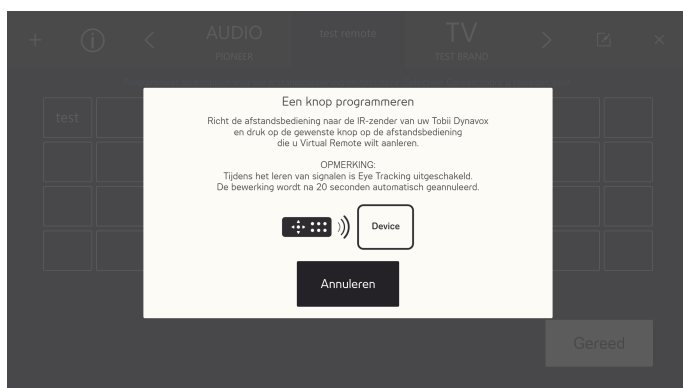

2. Als het signaal bewaard is in Virtual Remote zal de **Gereed** popup getoond worden.

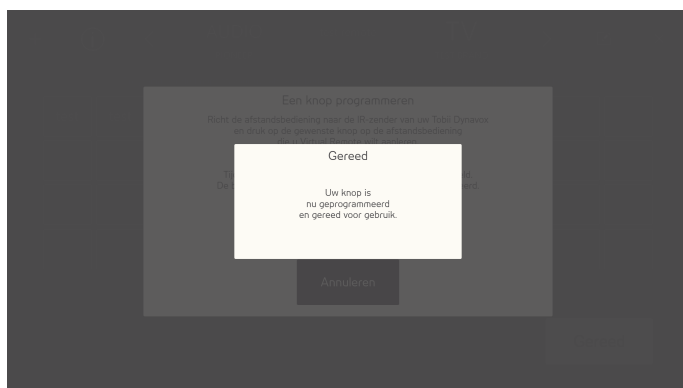

De popup zal automatisch sluiten na een paar seconden.

5.2.5.3.3 Tekst veranderen

Om tekst te veranderen, volgt u deze procedure:

Stappenlijst Tekst veranderen

1. Type de tekst in die op de knop moet staan.




2. Selecteer de Enter/Return toets op het toetsenbord om de tekst te accepteren.

5.2.5.3.4 Veranderen Icoon

Om een icoon te veranderen, volgt u de volgende procedure:

1. Selecteer een beschikbaar icoon.

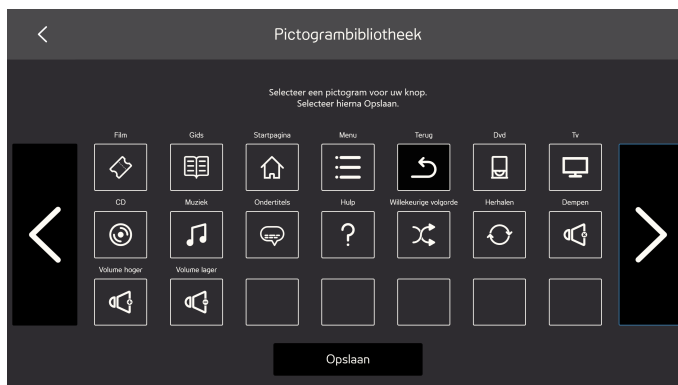


2. Selecteer de **Opslaan** knop om het icoon te accepteren.

5.2.5.4 Veranderingen doorvoeren aan een Bestaande, niet-geprogrammeerde Knop


Om veranderingen door te voeren aan een bestaande, niet-geprogrammeerde knop, volgt u deze procedure:

Stappenlijst Veranderingen doorvoeren aan een Bestaande, niet-geprogrammeerde knop

1. Selecteer de  (Bewerkingsmodus) knop.

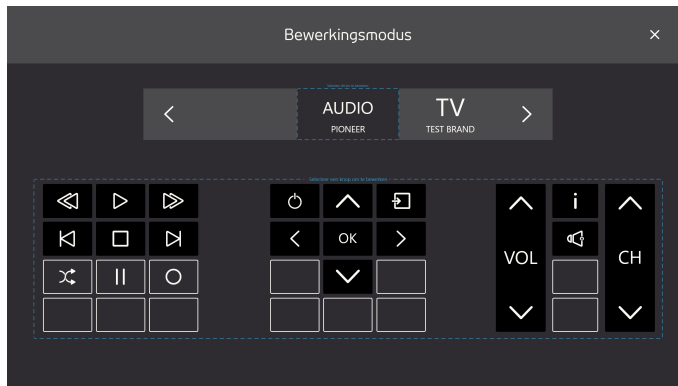

2. Selecteer een knop, met een grijze achtergrond en icoon of tekst, bv. , in het "Selecteer een knop om te bewerken" vak rond de afstandsbedieningsknoppen.
3. Selecteer een van de volgende acties:
 - Programmeren, zie 5.2.5.4.1 Programmeren, pagina 50
 - Tekst veranderen, zie 5.2.5.3.3 Tekst veranderen, pagina 48
 - Icoon veranderen, zie 5.2.5.3.4 Veranderen Icoon, pagina 49
 - Wisknop, zal alle informatie die opgeslagen is omtrent de knop verwijderen.

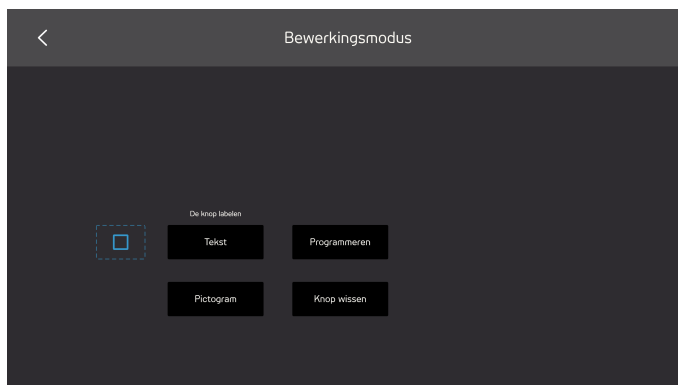


4. Selecteer het  icoon om de Bewerkingsmodus te verlaten.

5.2.5.4.1 Programmeren


Om een signaal voor een knop te programmeren, volgt u deze procedure:

Stappenlijst Programmeren

1. Richt de afstandsbediening op uw Tobii Dynavox IR ontvanger en druk op de gewenste knop op de afstandsbediening waarvan u wilt dat Virtual Remote die leert.

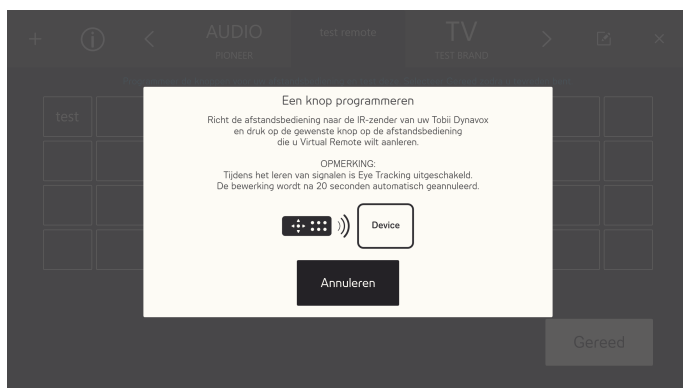

2. Als het signaal bewaard is in Virtual Remote zal de **Gereed** popup getoond worden.

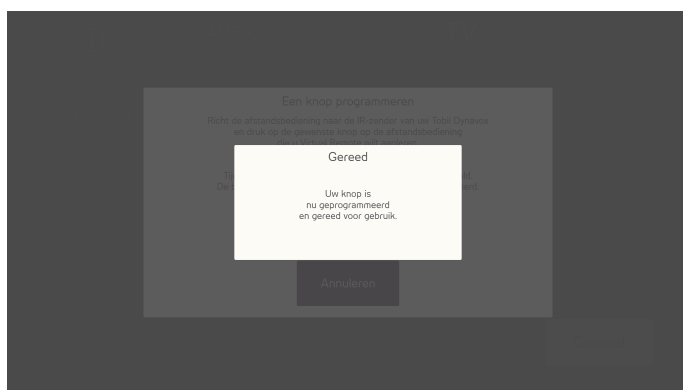


 De popup zal automatisch sluiten na een paar seconden.

5.2.5.5 Een nieuwe Knop toevoegen aan een lege plek


Om een nieuwe knop toe te voegen aan een lege plek volgt u deze procedure:

Stappenlijst voor Een nieuwe knop toevoegen aan een Lege Plek

1. Selecteer de  (Bewerkingsmodus) knop.

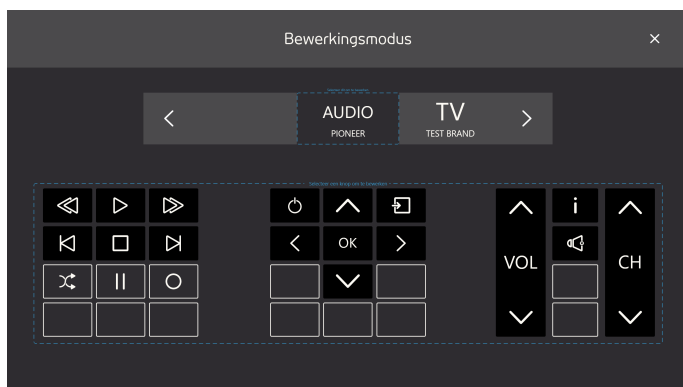


2. Selecteer een knop met een grijze achtergrond die leeg is, bv. , in het "Selecteer een knop om te bewerken" vak rond de afstandsbedieningsknoppen.
3. Selecteer een van de volgende acties:
 - Tekst veranderen, zie 5.2.5.3.3 *Tekst veranderen, pagina 48*
 - Icoon veranderen, zie 5.2.5.3.4 *Veranderen Icoon, pagina 49*

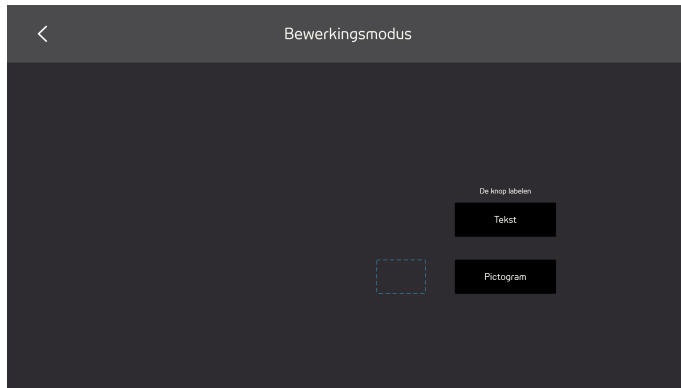


4. Selecteer het  icoon om de Bewerkingsmodus te verlaten.

5.2.6 Informatie

In de informatiepagina zult u alle Versie-informatie vinden voor zowel de hardware en de verschillende onderdelen van de software.

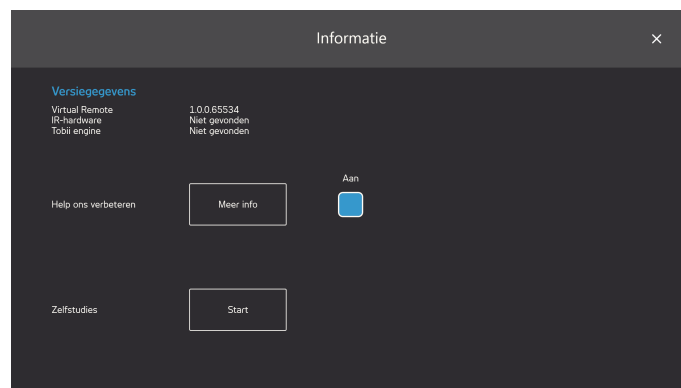

Help ons verbeteren: Om te helpen Tobii Dynavox de software te verbeteren, schakelt u het Aan/Uit selectievakje op **Aan** . Selecteer de Meer Informatie knop om een pagina te openen met informatie over waar dit allemaal over gaat. Voor meer informatie raadpleegt u *Afbeelding 5.8 Gegevens Verzamelen, pagina 53*.

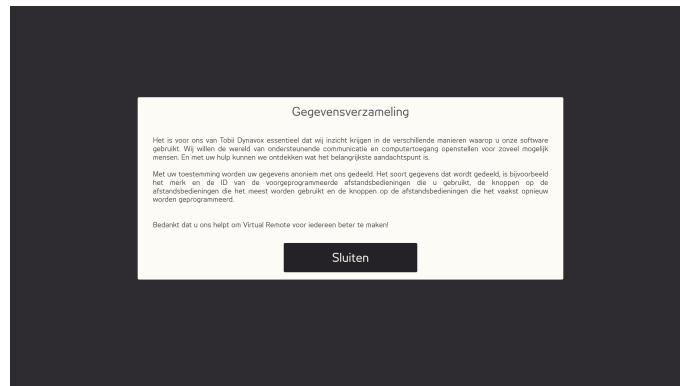

Afbeelding 5.8 Gegevens Verzamelen

Handleidingen: U kunt de Handleiding ook kunnen lanceren Virtual Remote door de **Lanceer** knop te selecteren.

Copyright © Tobii AB (publ). Afbeeldingen en specificaties van producten en diensten gelden niet noodzakelijkerwijs voor elke lokale markt. Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren.

Ondersteuning voor uw Tobii Dynavox apparaat

Online help

Raadpleeg de productspecifieke ondersteuningspagina voor uw Tobii Dynavox apparaat. Hier vindt u actuele informatie over problemen en tips en trucs voor het product. Onze ondersteuningspagina's vindt u online op: www.TobiiDynavox.com of www.myTobiiDynavox.com.

Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger of wederverkoper

Neem bij vragen of problemen met betrekking tot uw product contact op met uw Tobii Dynavox verkoopvertegenwoordiger of erkende wederverkoper voor hulp. Wederverkopers zijn het meest bekend met uw persoonlijke configuratie en kunnen u het beste helpen met tips en producttraining. Voor contactgegevens, bezoek www.TobiiDynavox.com/contact