

Tobii Dynavox Windows Control

Manuel de l'utilisateur

Virtual Remote inclus 



Manuel de l'utilisateur Tobii Dynavox Windows Control

Version 1.2

06/2018

Tous droits réservés

Copyright © Tobii AB (publ)

Il est interdit de reproduire toute partie de ce document, de stocker des données qui en sont issues, ou de les transmettre sous quelque forme que ce soit (électronique, photocopie, enregistrement, ou autre) sans permission préalable écrite de l'éditeur.

La protection du copyright concerne toutes les formes, sujets, contenus et matériaux soumis au copyright, ainsi que les informations autorisées par l'autorité statuaire ou judiciaire, et les cas cités ci-après, y compris sans limitation, les matériaux générés par les programmes du logiciel qui sont affichés à l'écran tels que les fenêtres, les menus, etc.

Les informations du présent document sont la propriété de Tobii Dynavox. Toute reproduction, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite préalable de Tobii Dynavox est interdite.

Les produits répertoriés dans ce document peuvent correspondre à des marques et/ou des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. L'éditeur et l'auteur ne revendiquent aucune de ces marques.

Bien que toutes les précautions aient été prises lors de la préparation de ce document, l'éditeur et l'auteur ne pourront être tenus responsables pour toute erreur ou omission, ou pour les dommages entraînés par l'utilisation des informations contenues dans ce document, ou par l'utilisation des programmes et du code source qui peuvent l'accompagner. En aucun cas l'éditeur et l'auteur ne pourront être tenus responsables en cas de perte de profits ou tout autre dommage commercial résultant, directement ou indirectement, de ce document.

Le contenu est susceptible d'être modifié sans avertissement préalable.

Veuillez consulter le site web de Tobii Dynavox www.TobiiDynavox.com pour les versions mises à jour de ce document.

Coordonnées :

Tobii Dynavox
, Karlsrovagen 2D
, 182 53 Danderyd,
Suède

+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
États-Unis

+1-800-344-1778

Table des matières

1	À propos de Tobii Dynavox Windows Control	5
1.1	Utilisation prévue.....	5
1.2	Système nécessaire.....	5
2	Installation, démarrage, et gestion de la licence.....	6
2.1	Installation de Tobii Dynavox Windows Control	6
2.2	Gestion de la licence	6
2.2.1	Activation de la licence	6
2.2.1.1	Activation en ligne	6
2.2.1.2	Activation hors ligne	7
2.2.2	Désactivation de la licence	8
2.3	Au premier démarrage.....	9
3	Utilisation du Tobii Dynavox Windows Control.....	10
3.1	Le panneau de commande Windows Control.....	10
3.2	État du suivi.....	11
3.3	La barre des tâches Windows Control.....	12
3.3.1	Modes pour la barre des tâches Windows Control	12
3.4	Tâches ordinaires	13
3.4.1	Le comportement des tâches ordinaires dans les différents modes.....	14
3.5	Tâches continues	15
3.5.1	Le comportement des tâches continues dans les différents modes.....	15
3.6	Clic sécurisé.....	16
3.7	Raccourcis	17
3.8	Méthodes de sélection — Regard ou Contacteur.....	19
3.8.1	Active par défaut avec Regard et contacteur.....	19
3.8.2	Activer une tâche avec une touche du clavier au lieu d'un interrupteur.	19
3.9	Clavier Regard.....	20
3.9.1	Barre des tâches clavier.....	21
3.9.2	Boutons de tâches pour la barre des tâches Clavier	22
3.9.3	Prédiction de mots	22
3.10	Windows Control combiné à des applications régionales	23
3.11	Eye Detection Indicator	23
4	Paramètres de Windows Control	24
4.1	Commande oculaire	25
4.1.1	L'onglet Calibrage.....	25
4.1.1.1	Gérer les Profils	25
4.1.1.2	Créer un nouveau profil	26
4.1.1.3	Résultats du calibrage.....	26
4.1.1.4	Tester le calibrage.....	27
4.1.1.5	Recalibrage.....	27
4.1.1.6	Type de calibrage.....	27
4.1.2	L'onglet Avancé	29
4.1.2.1	Affichage de la configuration.....	29
4.2	Paramètres généraux	30
4.2.1	L'onglet Général	30
4.2.2	L'onglet À propos.....	30
4.2.2.1	Clé de licence.....	31
4.3	Aide et formation :	31

4.3.1	L'onglet Aide	31
4.3.2	L'onglet Utilisation	32
4.4	Activation et rétroaction	32
4.4.1	L'onglet Activation	32
4.4.1.1	Paramètres du mode Regard	32
4.4.1.2	Paramètres du mode Regard et contacteur	33
4.4.2	L'onglet Rétroaction	34
4.5	Barre des tâches	35
4.5.1	L'onglet barre des tâches	35
4.5.1.1	Tâches	35
4.5.1.2	Maximiser le clic gauche	35
4.5.1.3	Taille de la barre des tâches	36
4.5.1.4	Masquer automatiquement	36
4.5.2	L'onglet Sélection	36
4.5.2.1	Sélection primaire	37
4.5.2.2	Sélection secondaire	37
4.5.2.3	Sélection tertiaire	37
4.5.3	L'onglet Zoom	37
4.6	Clavier	38
5	Virtual Remote	40
5.1	Aperçu de Virtual Remote	40
5.1.1	Menu Virtual Remote	40
5.1.2	La télécommande active	41
5.1.3	Les boutons	41
5.2	Utilisation du Tobii Dynavox. Virtual Remote	42
5.2.1	Au premier démarrage	43
5.2.2	Changer la télécommande active	43
5.2.3	Utiliser les boutons d'une télécommande	43
5.2.4	Ajouter une télécommande	43
5.2.4.1	Ajouter une télécommande pré-programmée	44
5.2.4.2	Ajouter une télécommande non-programmée	48
5.2.5	Mode Edit (Modifier)	51
5.2.5.1	Modifier le nom d'une télécommande	51
5.2.5.2	Supprimer une télécommande	52
5.2.5.3	Modifier un bouton actif existant	53
5.2.5.4	Modifier un bouton non-programmé existant	56
5.2.5.5	Ajouter un nouveau bouton dans un espace vide	58
5.2.6	Informations	59

1 À propos de Tobii Dynavox Windows Control

1.1 Utilisation prévue

Commandez l'ensemble de votre ordinateur en n'utilisant que vos yeux, ou vos yeux et un contacteur. Vous pouvez imiter tous les types d'actions de souris et de balayage et taper du texte avec notre logiciel primé.. Nous avons également ajouté des raccourcis intelligents pour faciliter encore plus votre accès à l'ensemble de Windows !

1.2 Système nécessaire

Composants	Prérequis
Ordinateur et processeur	2,0 gigahertz (GHz) ou plus rapide, processeur Dual-Core (minimum recommandé).
Mémoire (RAM)	4 gigaoctets (Go) de RAM (minimum recommandé)
Disque dur	450 mégaoctets (Mo) d'espace disponible
USB	USB 2.0
Système d'exploitation	Versions 64 bit de : • Windows 7 • Windows 8,1 • Windows 10
Version de .NET	4.5
Commande oculaire	Toute commande oculaire de Tobii Dynavox ou Tobii Tech prenant en charge le logiciel de base Tobii Eye Tracking.
Considérations et remarques supplémentaires	Pour l'activation de la licence, une connexion Internet est nécessaire.
Logiciel de base Tobii Eye Tracking	Version 2.8 ou ultérieure
Télécommande IR	Tout appareil équipé d'une puce infrarouge HBR, comme : Tobii Dynavox EyeR, Indi, I-Series I-110, ou EyeMobile Plus.

2 Installation, démarrage, et gestion de la licence

2.1 Installation de Tobii Dynavox Windows Control



Si le logiciel Tobii Gaze Interaction est déjà installé, il doit être désinstallé avant de procéder à l'installation de Windows Control.

Windows Control peut être téléchargé à partir de www.TobiiDynavox.com.

L'assistant d'installation installera les application suivantes.

- Tobii Dynavox Windows Control
- Tobii Dynavox Virtual Remote

Pour installer Windows Control, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

2.2 Gestion de la licence


2.2.1 Activation de la licence



Windows Control peut être exécutée sur (3) ordinateurs ou appareils à la fois avec la même licence. Pour être en mesure d'utiliser Windows Control sur plus de trois (3) ordinateurs ou appareils, Windows Control doit d'abord être désactivée sur l'un (1) des autres ordinateurs/appareils.

Lorsque vous achetez Windows Control, vous recevrez une Licence Activation Key pour le logiciel dans l'e-mail de confirmation de commande.

Lorsque Windows Control est exécutée pour la première fois, **License Manager** démarre.

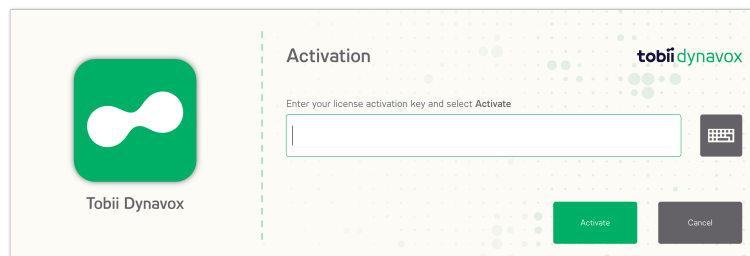

La boîte de dialogue de la licence affiche l'icône du logiciel concerné par la licence en cours de manipulation.


Votre **License Activation Key** se trouve dans l'e-mail de confirmation de commande.

2.2.1.1 Activation en ligne

Pour un ordinateur ou appareil connecté à Internet.

1. Vérifiez que l'ordinateur/appareil est connecté à Internet.
2. Saisissez la **License activation key**.

3. Sélectionnez le bouton **Activer**.

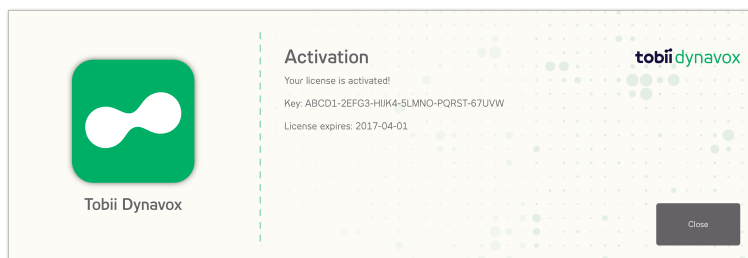


La boîte de dialogue de la licence affiche l'icône du logiciel concerné par la licence en cours de manipulation.

4. Sélectionnez le bouton **Fermer**.


2.2.1.2 Activation hors ligne


Pour un ordinateur ou appareil qui n'est pas connecté à Internet.


1. Saisissez la **License activation key**.
2. Sélectionnez le bouton **Activer**.

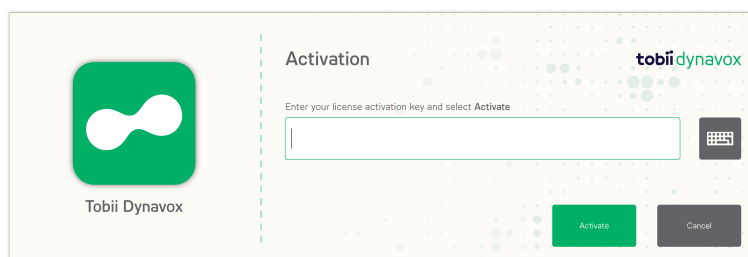

3. Sélectionnez l'icône  (info).

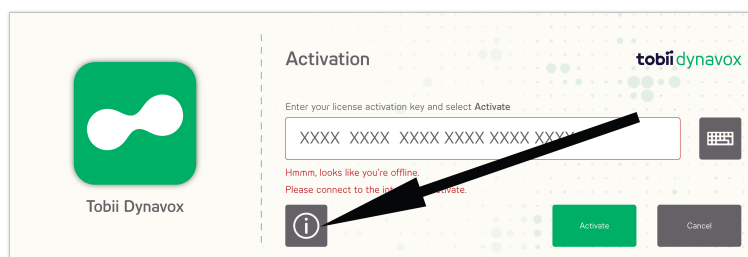

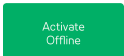4. Sélectionnez le bouton  (Activer en ligne).

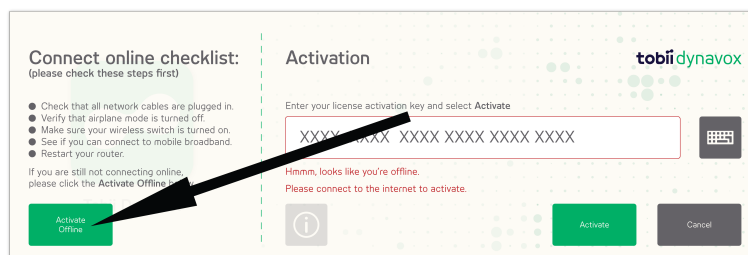


5. Effectuez l'une des actions suivantes :


- Sur un appareil connecté à Internet, allez à : <https://www.tobiidynavox.com/activation-key/> et suivez les instructions en ligne.

- Contactez l'assistance de Tobii Dynavox ou votre revendeur local.


Vous devrez vous munir du nom d'ordinateur indiqué dans cette boîte de dialogue :

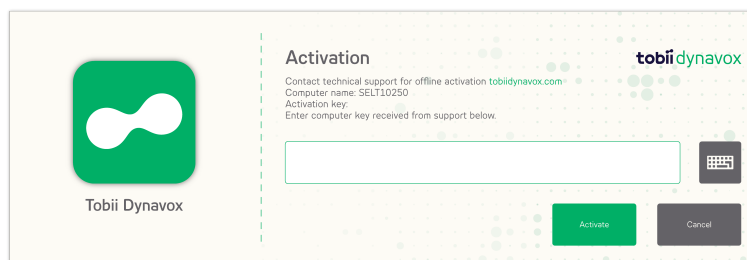

6. Saisissez l'**Activation Key** (clé d'activation) fournie parmi l'un des choix ci-dessus.

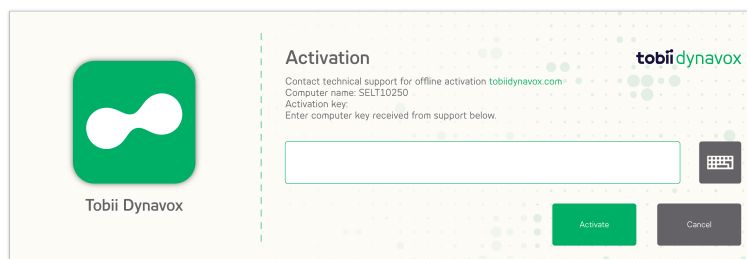

7. Sélectionnez le bouton **Activer**.

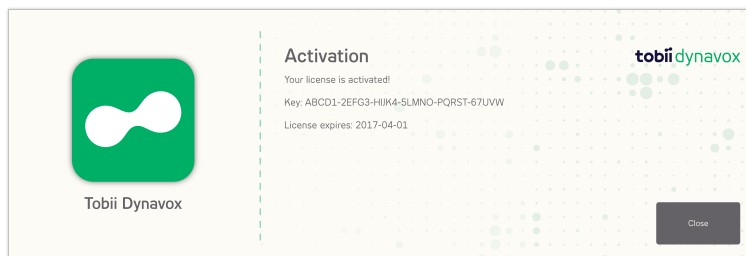

8. Sélectionnez le bouton **Fermer**.

2.2.2 Désactivation de la licence

Procédez comme suit pour désactiver Windows Control.

1. Vérifiez que l'ordinateur/appareil est connecté à Internet.
2. Démarrez Windows Control .
3. Sélectionnez le bouton  (PARAMÈTRES)
4. Sélectionnez le bouton  (Paramètres généraux).
5. Sélectionnez l'onglet **À propos**.
6. Sélectionnez le bouton **Clé de licence...**

7. Sélectionnez le bouton **Désactiver**.



La boîte de dialogue de la licence affiche l'icône du logiciel concerné par la licence en cours de manipulation.

8. Sélectionnez :
- **Oui** — pour désactiver la licence sur cet appareil.
 - **Non** — pour annuler.

2.3 Au premier démarrage

Lorsque Windows Control est lancé pour la première fois, un guide de configuration guide l'utilisateur dans la configuration de démarrage de Windows Control. Les étapes indiquées dans le guide sont les suivantes :

- Configurer l' affichage. Pour en savoir plus, voir *4.1.2.1 Affichage de la configuration, page 29*.
- Créer un nouveau profil Pour en savoir plus, voir *4.1.1.2 Créer un nouveau profil*.
- Test de calibrage, pour en savoir plus, voir *4.1.1.4 Tester le calibrage*

3 Utilisation du Tobii Dynavox. Windows Control

Tobii Dynavox Windows Control permet à l'utilisateur de commander le système d'exploitation Windows standard à l'aide d'une méthode de sélection en deux temps, qui réduit les risques de clics indésirables. Il empêche également le curseur de la souris de suivre votre regard (aucun curseur de souris flottant avec Windows Control).

1. La première étape consiste à sélectionner la tâche souhaitée dans la barre des tâches fixe en la fixant du regard.
2. La seconde étape consiste à regarder la section souhaitée de l'écran (ou l'icône affichée à l'écran) dans laquelle vous souhaitez exécuter la tâche concernée. Une fonction de zoom automatique est activée, débouchant sur la sélection de l'icône ou l'exécution de la tâche.



Toutes les fonctions de Windows Control sont accessibles par la souris et l'écran tactile, ce qui facilite l'assistance qu'un aide-soignant ou un assistant peut apporter à l'utilisateur. Pour le soignant ou l'assistant il est beaucoup plus facile de sélectionner une fonction ou une tâche ou encore de modifier les paramètres de l'utilisateur.

3.1 Le panneau de commande Windows Control


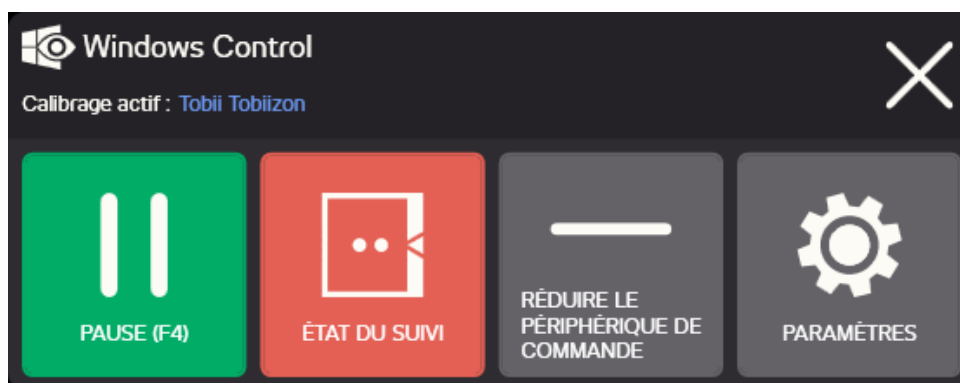


Figure 3.1 Le panneau de commande Windows Control

Bouton	Action	Description
	PAUSE (F4)	Action qui met Windows Control en pause.  L'activation de la fonction Pause remplace le bouton par le bouton Démarrer.  La touche F4 du clavier peut être utilisée pour activer la tâche.
	DÉMARRER (F4)	Action qui démarre Windows Control.  L'activation de la fonction Démarrer remplace le bouton par le bouton Pause.  La touche F4 du clavier peut être utilisée pour activer la tâche.
	ÉTAT DU SUIVI	Action qui affiche la fenêtre d'état du suivi. Utilisez-la pour vérifier que l'utilisateur est assis correctement en face de l'écran. Pour en savoir plus, voir 3.2 État du suivi, page 11
	RÉDUIRE LA COMMANDE	Action qui réduit la fenêtre de la commande.

Bouton	Action	Description
	PARAMÈTRES	Action qui ouvre les paramètres de Windows Control Pour en savoir plus, voir <i>4 Paramètres de Windows Control, page 24</i> .
	Fermer	Action qui termine Windows Control.

3.2 État du suivi

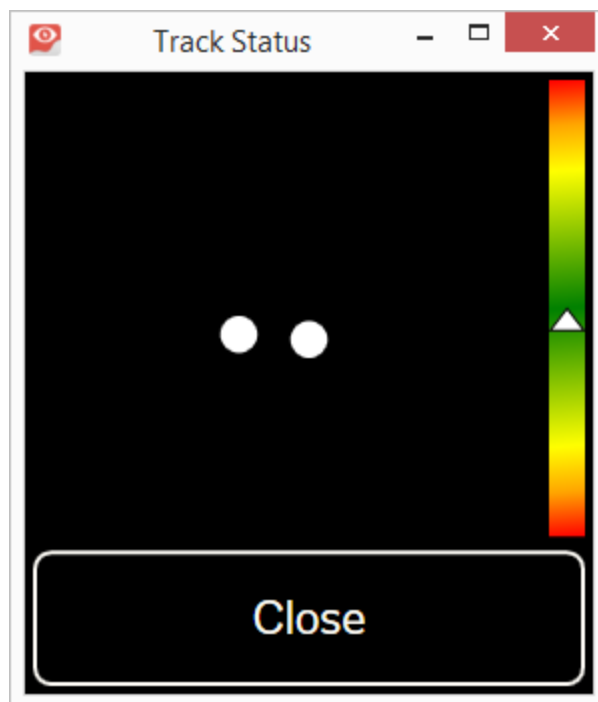

La fonction **État du suivi** est utilisée pour vérifier que l'utilisateur est assis correctement en face de la commande oculaire.

- Les deux (2) points blancs — Les yeux de l'utilisateur et la façon dont ils sont positionnés face à l'écran. Pour une position optimale, les points blancs doivent être au centre de la zone noire.
- La barre de couleurs avec une flèche blanche sur la gauche — Distance à laquelle l'utilisateur est positionné face à l'écran.
 - Si la flèche blanche est au centre de la zone verte, l'utilisateur est positionné à une distance optimale de l'écran.
 - Si la flèche se trouve dans la partie inférieure de la barre, l'utilisateur doit se rapprocher.
 - Si la flèche se trouve dans la partie supérieure de la barre, l'utilisateur doit s'éloigner.

1. Ouvre le panneau de commande Windows Control.

2. Sélectionnez le bouton  (État du Suivi).

3. Positionner l'utilisateur.

4. Sélectionnez le bouton **Fermer** lorsque vous avez terminé.



Ce bouton est activé par le regard, donc il vous suffit de le regarder pour l'activer.

3.3 La barre des tâches Windows Control.

Au sommet de la barre des tâches Windows Control se trouve un visualiseur de l'état du suivi. Celui-ci vous permet de vérifier que la commande oculaire reconnaît vos yeux et que vous êtes correctement positionné en face de l'appareil.

Les touches de tâche dans la barre des tâches Windows Control peuvent se présenter dans trois modes différents, comme montré sur *Figure 3.2 Modes pour la barre des tâches Windows Control, page 13*.



La barre des tâches peut être masquée ou affichée à l'aide de la touche « F2 »  sur un clavier normal (et non avec le clavier de Windows Control).

3.3.1 Modes pour la barre des tâches Windows Control



Les trois modes différents sont valables pour les tâches ordinaires, voir 3.4 *Tâches ordinaires*, et pour les tâches continues, voir 3.5 *Tâches continues*.



Les tâches de clics sécurisés n'ont aucun mode de sélection secondaire.

- **Normal (aucune sélection)** - Aucune touche de tâche pour Windows Control n'est sélectionnée.
- **Sélection principale (blanc)** - La touche de tâche marquée est sélectionnée et la tâche sera exécutée après le zoom automatique lorsque l'utilisateur fixera du regard la position souhaitée à l'écran ou l'icône. Si la méthode de sélection est réglée sur Interrupteur dans la boîte de dialogue des paramètres Windows Control, la touche de tâche sélectionnée restera active après l'exécution de la tâche.
- **Sélection auxiliaire(bleu/blanc)** - Identique à la **Sélection principale**, mais avec une meilleure précision. **Sélection secondaire** signifie que le zoom va davantage en profondeur avant l'exécution finale de la tâche, agrandissant ainsi la section souhaitée de l'écran et facilitant toute sélection à l'intérieur de celle-ci. Activez ce mode en laissant reposer votre regard sur la touche de tâche jusqu'à ce que la couleur change conformément à l'illustration en dessous.



Non valide pour les Raccourcis et les tâches de configuration.

- **Sélection tertiaire (menu contextuel)** — Un menu contextuel contenant les tâches continues correspondantes est disponible pour certaines des tâches de la barre des tâches. Consultez la section 3.5 *Tâches continues, page 15* et 3.6 *Clic sécurisé, page 16* pour les tâches de clic sécurisé. Vous pouvez accéder à la tâche continue ou la tâche de clic sécurisé en posant votre regard sur le bouton de tâche jusqu'à l'activation du menu contextuel, conformément à *Figure 3.2 Modes pour la barre des tâches Windows Control, page 13* et sélectionner la tâche continue ou de clic sécurisé pour remplacer la tâche ordinaire par la tâche continue ou de clic sécurisé sur la barre des tâches. La tâche continue ou de clic sécurisé demeurera sur la barre des tâches et la tâche ordinaire sera située dans la section tertiaire. Renouvelez la procédure afin de remplacer la tâche continue ou de clic sécurisé par la tâche ordinaire sur la barre des tâches.



Non valide pour les Raccourcis et les tâches de configuration.

Pour configurer le mode qui doit être utilisé, l'utilisateur doit aller à : 4.5.2 *L'onglet Sélection, page 36*. Le mode primaire est activé par défaut.



Figure 3.2 Modes pour la barre des tâches Windows Control

3.4 Tâches ordinaires

Icône	Tâche/ action	Description
	Déplacer le curseur	Tâche vous permettant de placer le curseur à l'aide de votre regard. Un zoom sera effectué une fois la tâche exécutée.
	Glisser-déposer du regard	Tâche qui exécute deux clics : le premier représente la position de départ du glissement et le second la position de déplacement (pour déplacer des objets ou sélectionner des zones). - Sélectionnez la tâche. - Fixez du regard l'objet à déplacer ou le point de départ de la sélection de la zone. - Exécutez le Windows Control (premier « click ») via le mode Regard ou Contacteur. - Posez immédiatement votre regard sur la position de déplacement de l'objet ou le point d'arrivée de la sélection de la zone. - Exécutez le second « clic » via le mode Regard ou Contacteur. Un zoom sera effectué une fois la tâche exécutée.

Icône	Tâche/ action	Description
	Défilement regard	Tâche qui, si elle est exécutée dans une fenêtre déroulante, permet de faire défiler la page à l'aide du regard. • Sélectionnez la tâche. • Fixez du regard une zone déroulante et maintenez votre regard sur celle-ci. L'icône Défilement regard apparaît à cet endroit. • Posez votre regard au-dessus de l'icône pour faire défiler vers le haut. • Posez votre regard en dessous de l'icône pour faire défiler vers le bas. • Regarder à gauche de l'icône pour faire défiler vers la gauche. • Regarder à droite de l'icône pour faire défiler vers la droite • Pendant le défilement, regarder à nouveau l'icône (sur l'écran et non pas l'icône de la barre des tâches) pour basculer entre haut/bas et gauche/droite • Reposez votre regard sur la barre des tâches Windows Control (ou en dehors de l'écran) pour interrompre le défilement.  Utilisez la tâche Défilement regard pour défiler verticalement et horizontalement dans les applications de l'IU moderne et l'écran de démarrage Windows de l'IU moderne.
	Clic gauche/frappe	Tâche qui exécute un simple clic à gauche ou, pour les appareils tactiles, l'équivalent d'une frappe de doigt simple. En mode Contacteur, Clic gauche/frappe est une fonction « continue » activée par défaut (voir 3.8.1 <i>Active par défaut avec Regard et contacteur</i>, page 19) Un zoom sera effectué une fois la tâche exécutée.
	Raccourcis	Tâche qui ouvre : • 3 colonnes de raccourcis prédéfinis. • Légèrement différents pour Windows 7, 8.1 et 10. Pour en savoir plus, voir 3.7 <i>Raccourcis</i>, page 17.
	Clic droit	Tâche qui exécute un simple clic à droite. Un zoom sera effectué une fois la tâche exécutée.
	Double clic	Tâche qui exécute un double clic à gauche. Lorsque la méthode d'activation est définie sur Contacteur, le double clic est une « tâche continue » (voir 3.8.1 <i>Active par défaut avec Regard et contacteur</i>, page 19). Un zoom sera effectué une fois la tâche exécutée.
	Clavier Regard	Tâche qui ouvre un clavier Regard activé sur l'écran pour la frappe avec le regard. Pour en savoir plus, voir 3.9 <i>Clavier Regard</i>, page 20.
	Paramètres	Tâche qui ouvre les paramètres de Windows Control Pour en savoir plus, voir 4 <i>Paramètres de Windows Control</i>, page 24.

3.4.1 Le comportement des tâches ordinaires dans les différents modes

Tâche	Primaire	Secondaire	Tertiaire^a
Déplacer le curseur	Zoom normal	Zoom profond	Passer en Déplacement continu du curseur
Glisser-déplacer	Zoom normal	Zoom profond	Passer à glisser-déposer continu ou glisser-déposer sécurisé

Tâche	Primaire	Secondaire	Tertiaire ^a
Défilement regard	Zoom normal	Zoom profond	Non applicable
Clic gauche/frappe	Zoom normal	Zoom profond	Passer à clic/frappe gauche continu(e) ou clic/frappe gauche sécurisé(e)
Raccourcis	Aucun zoom	Non applicable	Non applicable
Clic droit	Zoom normal	Zoom profond	Passer à clic droit continu ou clic droit sécurisé
Double clic	Zoom normal	Zoom profond	Passer à double clic continu ou double clic sécurisé
Clavier Regard	Pour en savoir plus, voir 3.9 <i>Clavier Regard</i> , page 20.		
Paramètres	Aucun zoom	Non applicable	Non applicable
a. Pour plus d'informations sur les différentes tâches continues, voir 3.5 <i>Tâches continues</i> , page 15.			

3.5 Tâches continues

Icône	Tâche/ action	Description
	Clic gauche continu/ frappe continue	Les tâches « continues » permettent l'activation d'une tâche sans qu'il soit nécessaire de la sélectionner dans la barre des tâches. Sélectionnez la tâche continue dans la barre des tâches une seule fois et le curseur suivra votre regard. L'action correspondante sera effectuée à l'emplacement souhaité lorsque le regard se fixera sur l'écran. La tâche demeurera active une fois l'action exécutée, ce qui signifie qu'il ne sera plus nécessaire de l'activer à nouveau à partir de la barre des tâches. Pour désactiver la tâche continue, il suffit simplement de regarder la barre des tâches jusqu'à ce que la tâche concernée n'apparaisse plus en surbrillance.  Le mode de sélection secondaire n'est pas disponible pour le Déplacement continu du curseur, car cette tâche ne fera que déplacer le curseur sur l'écran.
	Clic gauche continu	
	Glisser-déposer continu	
	Déplacement continu du curseur	
	Clic droit continu	

3.5.1 Le comportement des tâches continues dans les différents modes

Tâche/ action	Primaire	Secondaire	Tertiaire ^a
Clic gauche continu/ frappe continue	Zoom normal	Zoom profond	Passer à clic/frappe gauche ou clic/frappe gauche sécurisé(e)
Clic gauche continu	Zoom normal	Zoom profond	Passer à double clic ou double clic sécurisé
Glisser-déposer continu	Zoom normal	Zoom profond	Passer à glisser-déposer ou glisser-déposer sécurisé
Déplacement continu du curseur	Aucun zoom	Non applicable	Passer en Déplacement du curseur
Clic droit continu	Zoom normal	Zoom profond	Passer à clic droit ou clic droit sécurisé
a. Pour plus d'informations sur les différentes tâches continues, voir 3.4 <i>Tâches ordinaires</i> , page 13.			

3.6 Clic sécurisé

Icône	Tâche/ action	Description
	Clic/frappe gauche sécurisé(e)	Les tâches de clic sécurisé vous permettent d'effectuer vos opérations bancaires (etc) en toute sécurité, sans courir le risque de commettre des erreurs de frappe grâce à une action en deux étapes. Zoomez d'abord, puis sélectionnez pour exécuter. Sélectionnez la tâche de clic sécurisé dans la barre des tâches de la sélection tertiaire. L'action correspondante sera effectuée à l'emplacement souhaité lorsque le regard se fixera sur l'écran. La tâche effectue un zoom dans la nouvelle fenêtre, dans laquelle l'emplacement de fixation du regard est représenté par l'icône  , voir <i>Figure 3.3 Exécuter le clic sécurisé</i>, page 16. Pour effectuer le clic sécurisé au centre de  , sélectionnez l'icône  .  Les tâches de clic sécurisé sont disponibles pour le clic gauche, le clic droit, le double clic et la fonction glisser-déposer.
	Double clic sécurisé	
	Clic droit sécurisé	
	Glisser-déposer sécurisé	

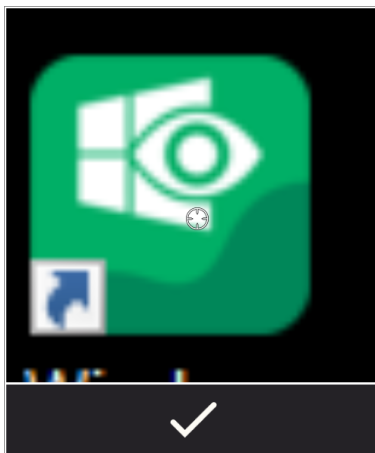


Figure 3.3 Exécuter le clic sécurisé

3.7 Raccourcis

Windows 8,1	Windows 10
Windows Control Raccourcis - Réduire la fenêtre - Agrandir la fenêtre - Fermer la fenêtre - Retour arrière - Navigateur - Reconnaissance vocale - Annuler - Augmenter le volume - Virtual Remote - Copier - Muet - Bureau - Coller - Baisser le volume - Charmes - Démarrer - Rechercher - Commutateur d'applications - Masquer la barre des tâches - Changer de côté - Fermer les raccourcis	Windows Control Raccourcis - Réduire la fenêtre - Agrandir la fenêtre - Fermer la fenêtre - Retour arrière - Navigateur - Reconnaissance vocale - Annuler - Augmenter le volume - Virtual Remote - Copier - Muet - Bureau - Coller - Baisser le volume - Centre d'actions - Démarrer - Cortana - Vue des tâches - Masquer la barre des tâches - Changer de côté - Fermer les raccourcis



Si l'icône  se trouve sur une fonction Raccourcis, la fenêtre des raccourcis restera ouverte après activation de cette même fonction, ce qui permet plusieurs activations.

Raccourci	Action	Win 8.1	Win 10	Description
	Agrandir la fenêtre	x	x	Raccourci qui agrandit la fenêtre, l'application ou le logiciel actif.
	Arrière	x	x	Raccourci qui fait revenir l'utilisateur à la page précédente sur le navigateur Web ou tout autre logiciel avec le même type de fonctionnalité intégrée.
	Annuler	x	x	Raccourci qui annule la dernière commande.
	Copier	x	x	Raccourci qui copie la sélection active.
	Coller	x	x	Raccourci qui colle la sélection précédemment copiée.
	Commencer	x	x	Raccourci qui appelle le menu de démarrage de Windows.
	Cacher la barre des tâches	x	x	Raccourci qui masque la barre des tâches pour voir la totalité de l'écran. Pour faire réapparaître la barre des tâches, sélectionner  ou  selon le côté où se situe la barre des tâches.

Raccourci	Action	Win 8.1	Win 10	Description
	Réduire la fenêtre	x	x	Raccourci qui réduit la fenêtre, l'application ou le logiciel actif.
	Navigateur	x	x	Raccourci qui démarre le navigateur Web par défaut.
	Augmenter le volume	x	x	Raccourci qui augmente le volume.
	Muet	x	x	Raccourci qui coupe le son des haut-parleurs.
	Baisser le volume	x	x	Raccourci qui baisse le volume.
 	Rechercher Cortana	x	x	Raccourci qui ouvre la fonction de recherche sous Windows. Raccourci qui ouvre Cortana. Cortana est votre assistant personnel intelligent. Il peut effectuer des recherches sur le web, trouver des éléments sur votre PC, effectuer le suivi de votre calendrier, etc.
	Passer d'un côté à l'autre	x	x	Raccourci qui déplace la barre des tâches vers la droite ou vers la gauche.
	Fermer la fenêtre	x	x	Raccourci qui ferme la fenêtre, l'application ou le logiciel actif.
	Speech Recognition	x	x	Raccourci qui démarre Windows Speech Recognition, ou Dragon Speech Recognition s'il est installé.
	Virtual Remote	x	x	Raccourci qui ouvre l'application Virtual Remote. Pour en savoir plus, voir 5 <i>Virtual Remote</i> , page 40.
	Bureau	x	x	Raccourci qui appelle le bureau.
 	Charms Centre d'actions	x	x	Raccourci qui ouvre le menu Charms. Raccourci qui ouvre le centre d'actions.
 	Commutateur d'application Aperçu des tâches	x	x	Raccourci qui bascule à la volée entre le bureau et toutes les applications de l'IU moderne.  Tous les logiciels en exécution sur le bureau ne sont pas visibles ici. Ils ne sont visibles que sur le bureau. Raccourci qui ouvre l'aperçu des tâches, dans lequel toutes les applications qui s'exécutent sur une interface utilisateur (IU) moderne sont visibles.  L'aperçu des tâches n'apparaît pas si seule une application ou moins est ouverte.
	Fermer les raccourcis	x	x	Raccourci qui ferme le menu Raccourcis.

3.8 Méthodes de sélection — Regard ou Contacteur

Il existe deux méthodes pour exécuter la tâche sélectionnée.

- Regard — utilisation des yeux pour contrôler et exécuter la tâche sélectionnée.
- Regard et contacteur — utilisation des yeux pour contrôler un bouton mécanique branché à l'appareil afin d'exécuter la tâche sélectionnée.

La méthode de sélection est réglée depuis la boîte de dialogue des paramètres Windows Control, voir *4 Paramètres de Windows Control*, page 24.

Avant de procéder à une sélection, vous choisissez une tâche à exécuter dans la barre des tâches. Fixez la tâche sélectionnée du regard jusqu'à ce qu'elle s'affiche comme « Sélection principale », « secondaire » ou .

- **Regard** - Afin d'exécuter la tâche choisie, posez votre regard sur la section souhaitée de l'écran (ou l'icône affichée à l'écran) dans laquelle vous souhaitez exécuter la tâche concernée. Une fonction de zoom automatique est activée, débouchant sur la sélection de l'icône ou l'exécution de la tâche.
- **Regard et contacteur** - Deux modes d'exécution différents.
 - **Activation unique de l'interrupteur** - la fonction de zoom est exécutée de la même manière que dans le cas de la méthode Regard et selon les paramètres réglés dans la boîte de dialogue des paramètres Windows Control, voir *4 Paramètres de Windows Control*, page 24.
 - **Activez l'interrupteur et maintenez-le enfoncé** - la fonction de zoom reste activée jusqu'à ce que vous relâchiez/désactiviez l'interrupteur.



Lorsque vous utilisez la méthode Regard, vous devez regarder à nouveau la barre des tâches **avant** de pouvoir exécuter une tâche.



Lorsque la profondeur du zoom est définie sur Légère dans Windows Control Settings - il n'est pas possible de zoomer. Pour en savoir plus, voir *4 Paramètres de Windows Control*, page 24.

3.8.1 Active par défaut avec Regard et contacteur

La méthode Regard et contacteur utilise une fonction appelée « Active par défaut ».

Lorsqu'une tâche est « Active par défaut », vous n'avez plus à reposer votre regard sur la barre des tâches si vous souhaitez répéter l'exécution de la tâche sélectionnée. Il vous suffit de reposer votre regard sur la barre lorsque vous souhaitez changer de tâche.

Lors de l'utilisation de la méthode Regard et interrupteur, la tâche Clic/frappe gauche est toujours « Active » par défaut. Ceci signifie que la fonction Clic gauche/frappe reste activée et sera toujours activée par l'activation de l'interrupteur, si rien d'autre n'est sélectionné. Si une autre tâche est sélectionnée, elle ne sera active qu'une seule fois (pour une sélection), puis Windows Control reviendra automatiquement à la fonction Clic gauche/frappe par défaut pour les sélections suivantes.

La seule exception est la tâche de double clic. Lorsqu'elle est sélectionnée à l'aide du mode Regard et contacteur, elle devient également active par défaut.

Ceci permet d'excellentes conditions d'usage, par exemple une navigation rapide et continue sur Internet en activant l'interrupteur et donc la tâche Clic gauche/frappe, puis en sélectionnant de manière répétée n'importe quel élément désiré sans avoir à choisir de nouveau la tâche Clic gauche/frappe plusieurs fois.

3.8.2 Activer une tâche avec une touche du clavier au lieu d'un interrupteur.



Si un clavier est connecté, la sélection du bouton « F12 », active une sélection de tâche. Cette fonction peut être utilisée exactement de la même façon qu'un contacteur connecté. Pour plus d'informations sur les interrupteurs, voir *3.8 Méthodes de sélection — Regard ou Contacteur*, page 19.

3.9 Clavier Regard

Avec la sélection de la touche de clavier Regard sur la barre des tâches, le clavier Regard est lancé comme un clavier sur l'écran. Le clavier Regard est toujours positionné en bas de l'écran lors de son ouverture. Il est possible de le déplacer en utilisant le bouton  (Déplacer le clavier vers le bas/haut) sur la barre des tâches du clavier.

La barre des tâches clavier se lancera en même temps que le clavier Regard. Pour en savoir plus, voir 3.9.1 *Barre des tâches clavier*, page 21.

Le clavier Regard se compose de quatre pages de clavier dans une boucle de rotation. L'utilisateur peut facilement basculer entre les différentes pages du clavier en sélectionnant les touches des pages suivantes situées à gauche et à droite sur toutes les pages du clavier Regard.

La touche sur le clavier où l'utilisateur regarde sera indiquée par un cadre lumineux autour du caractère/fonction  sur la touche.

Les quatre pages de clavier sont :

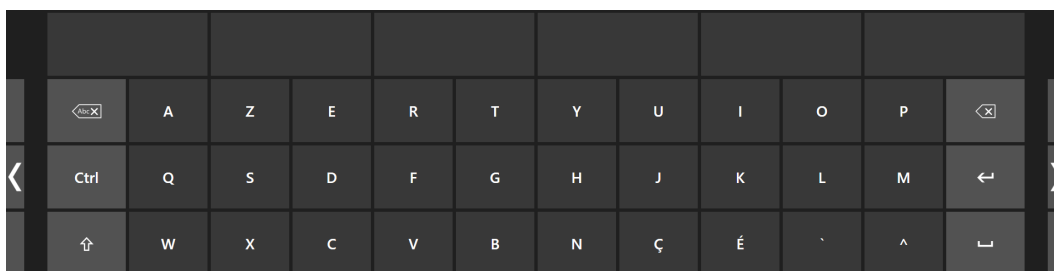


Figure 3.4 Page de démarrage par défaut

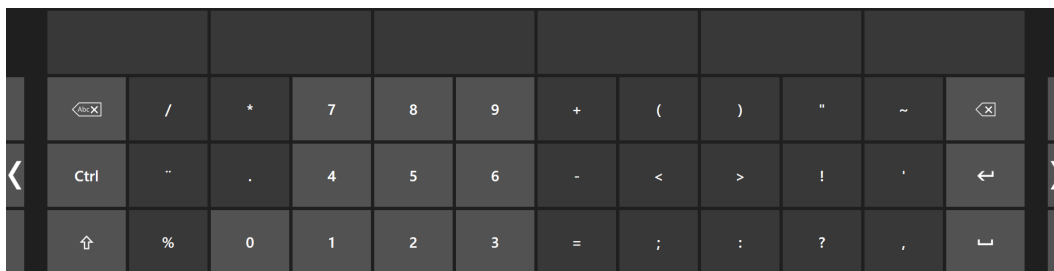


Figure 3.5 Première page à droite

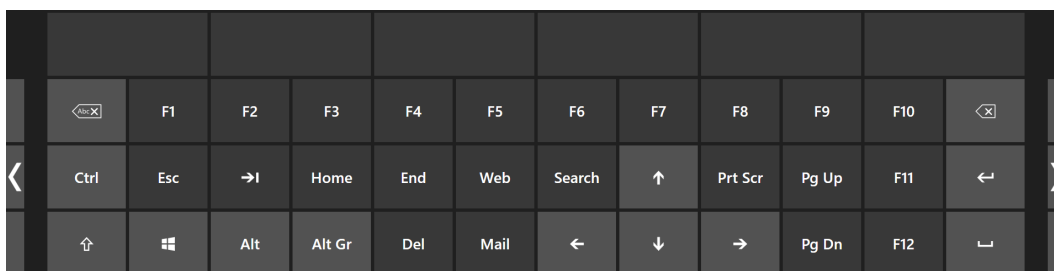


Figure 3.6 Deuxième page à droite ou à gauche



Figure 3.7 Première page à gauche

Pour modifier la langue du clavier et autres paramètres du clavier, voir *4 Paramètres de Windows Control, page 24*.



Les touches Maj, Ctrl, Alt, Win et Alt Gr deviennent activées une fois sélectionnées. Ceci signifie qu'elles demeurent sélectionnées jusqu'à ce que l'utilisateur sélectionne une nouvelle touche sur le clavier. Elles demeurent continues si la touche suivante sélectionnée est une autre touche continue.



Pour écrire une lettre avec un accent :

1. Sélectionnez l'accent
2. Sélectionnez le caractère
3. Le caractère apparaît avec l'accent choisi.

3.9.1 Barre des tâches clavier

En haut de la barre des tâches clavier se trouve la zone de visualisation de l'état du suivi, comme c'est le cas avec la barre des tâches de Windows Control. Celui-ci vous permet de vérifier que la commande oculaire reconnaît vos yeux et que vous êtes correctement positionné en face de l'appareil.

Les touches de tâche dans la barre des tâches Clavier peuvent se présenter dans trois modes différents, comme montré sur *Figure 3.8 Modes pour la barre des tâches Clavier, page 21*.

Pour plus d'informations sur les différents modes, voir *3.3.1 Modes pour la barre des tâches Windows Control, page 12*

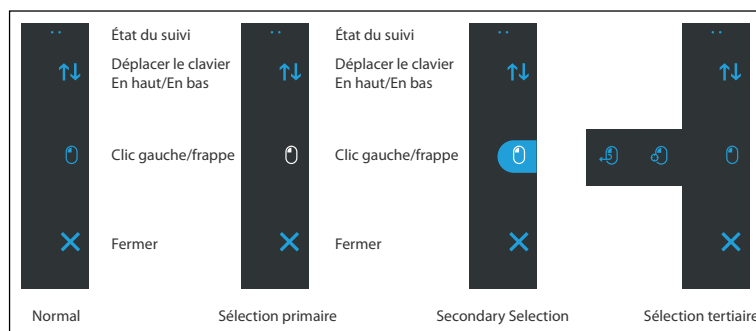


Figure 3.8 Modes pour la barre des tâches Clavier



La sélection tertiaire n'est disponible que pour la tâche clic gauche dans la barre des tâches du clavier.



Dans Windows 8.1 et Windows 10, les couleurs de la barre des tâches du clavier seront adaptées aux paramètres Windows.

3.9.2 Boutons de tâches pour la barre des tâches Clavier

Icône	Tâche/ action	Description
	Déplacer le clavier En haut/En bas	Tâche consistant à déplacer le clavier vers le haut ou le bas de l'écran.  Pour activer la fonction, fixez le bouton.
	Clic gauche/frappe	Tâche qui exécute un simple clic à gauche ou, pour les appareils tactiles, l'équivalent d'une frappe de doigt simple.
	Fermer	Tâche consistant à fermer le clavier.

3.9.3 Prédiction de mots

Le moteur de prédiction de mots utilisés par Windows Control provient de SwiftKey, et est communément utilisé sur les tablettes et smartphones. SwiftKey utilise différentes technologies d'intelligence artificielle afin de prédire le prochain mot que l'utilisateur a l'intention de taper. SwiftKey se base sur le texte déjà écrit par l'utilisateur et fournit des prédictions basées sur ses connaissances, et le texte actuellement tapé. La langue de la prédiction de mots est sélectionnée en fonction de la langue paramétrée pour le clavier.


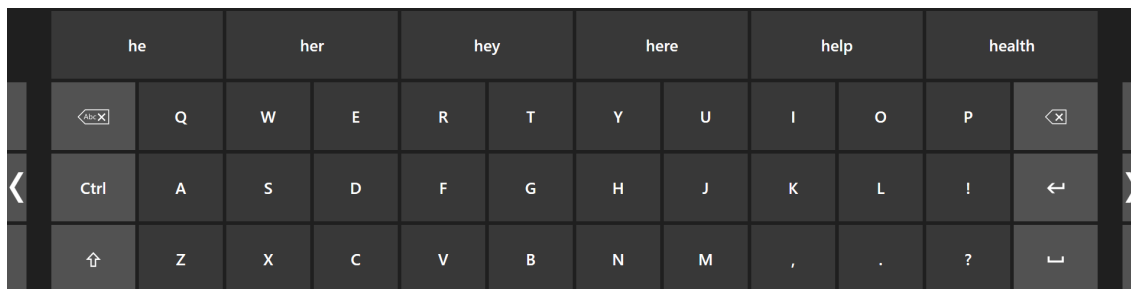


Figure 3.9 Clavier avec la prédiction de mots activée

Lorsque la prédiction de mots est utilisée, voir *4 Paramètres de Windows Control, page 24* pour plus d'informations pour activer/désactiver la prédiction de mots, six (6) boîtes apparaîtront au-dessus du clavier. La boîte la plus à gauche affichera le mot prédit le plus probable, et les cinq (5) autres contiendront chacune un mot prédit. Pour sélectionner un mot prédit, sélectionnez simplement la boîte contenant le bon mot. Si vous ne trouvez pas le mot que vous cherchez, continuez à taper : le mot apparaîtra peut-être parmi les propositions au prochain caractère.



Si vous utilisez la Prédiction de mots et souhaitez taper un mot contenant un accent, comme « café », il est préférable de laisser la Prédiction de mots se charger de l'accent. Tapez simplement « cafe », et vous obtiendrez la suggestion « café ».

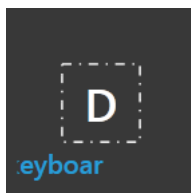

Pendant que l'utilisateur tape, les 5-10 derniers caractères sont affichés en bleu sur la touche indiquée/mise en évidence. Pour en savoir plus, voir *4 Paramètres de Windows Control, page 24*. Cette fonction aide l'utilisateur à facilement repérer les fautes d'orthographe et réduit la nécessité de regarder l'endroit même où le texte est inséré, augmentant ainsi la vitesse de frappe.

3.10 Windows Control combiné à des applications régionales

Windows Control peut être utilisé avec d'autres applications à commande oculaire. Les régions « activées par le regard » d'autres applications restent actives tant qu'aucune autre tâche n'est active dans la barre des tâches Windows Control. Si vous utilisez Windows Control en mode Regard et contacteur, les touches de tâches sont toujours « Actives par défaut ». Pour désélectionner une tâche, il vous suffit de reposer brièvement votre regard sur la tâche sélectionnée.

3.11 Eye Detection Indicator

L' **Eye Detection Indicator**  est un indicateur discret dans le champ Activité de Windows




qui indique si Windows Control a détecté les yeux de l'utilisateur.

L' **Eye Detection Indicator** a plusieurs status :

- Yeux détectés ().
 Sert également de guide de positionnement pour l'utilisateur.
- Yeux non détectés, ().
- Aucune commande oculaire connectée ou désactivée ().

4 Paramètres de Windows Control

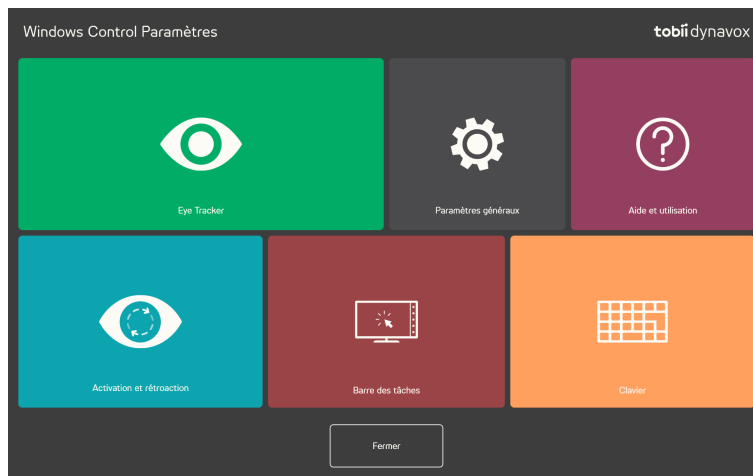


Icônes	Action	Description
	Commande oculaire	Ouvre les paramètres de la Commande oculaire . Pour en savoir plus, voir 4.1 <i>Commande oculaire</i> , page 25.
	Paramètres généraux	Ouvre les paramètres Généraux . Pour en savoir plus, voir 4.2 <i>Paramètres généraux</i> , page 30.
	Aide et utilisation	Ouvre les paramètres de l' Aide et utilisation . Pour en savoir plus, voir 4.3 <i>Aide et formation : </i> , page 31.
	Activation et rétroaction	Ouvre les paramètres de l' Activation et rétroaction . Pour en savoir plus, voir 4.4 <i>Activation et rétroaction</i> , page 32.
	Barre des tâches	Ouvre les paramètres de la Barre des tâches et clavier . Pour en savoir plus, voir 4.5 <i>Barre des tâches</i> , page 35.
	Clavier	Ouvre les paramètres du Clavier . Pour en savoir plus, voir 4.6 <i>Clavier</i> , page 38.

4.1 Commande oculaire



4.1.1 L'onglet Calibrage

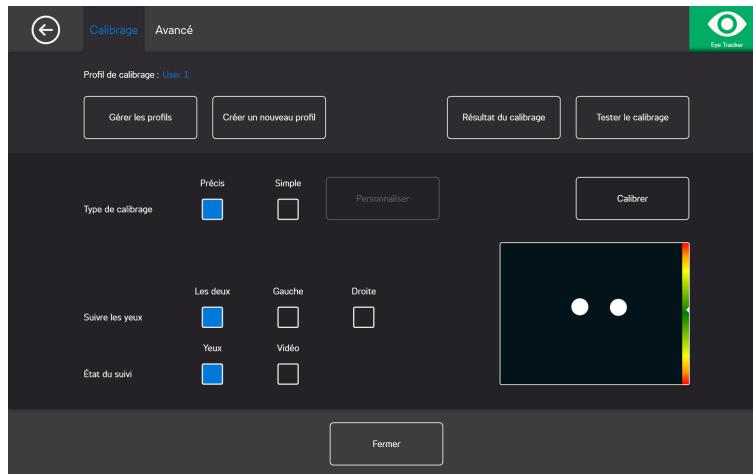

Profil de calibrage : Affiche le nom du profil actif.

Gérer les profils : Sélectionnez ce bouton pour utiliser un profil déjà existant. Pour en savoir plus, voir 4.1.1.1 *Gérer les Profils*, page 25.

Créer un nouveau profil : Sélectionnez ce bouton pour créer un nouveau profil. Pour en savoir plus, voir 4.1.1.2 *Créer un nouveau profil*, page 26.

Résultat du calibrage : Sélectionnez ce bouton pour voir le résultat du calibrage. Pour en savoir plus, voir 4.1.1.3 *Résultats du calibrage*, page 26.

Tester le calibrage : Sélectionnez ce bouton pour ouvrir la page de test de calibrage. Pour en savoir plus, voir 4.1.1.4 *Tester le calibrage*, page 27.

Type de calibrage : Il existe deux (2) différents types de calibrage : **Précis** ou **Simple**. Pour en savoir plus, voir 4.1.1.6 *Type de calibrage*, page 27.


Suivi du regard : Sélectionnez la façon dont l'appareil doit suivre le regard des utilisateurs entre les choix suivants : **Les deux**, **Gauche** ou **Droite**.

4.1.1.1 Gérer les Profils

Sur la page Gérer les profils, vous serez en mesure d'activer ou de supprimer un profil existant.

Au centre de l'écran, sous Profil actif, vous verrez le nom du profil actif.

Tous les profils disponibles apparaissent sous forme de boutons sur la page. Utilisez les boutons

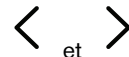

et

pour parcourir les profils disponibles.

4.1.1.1.1 Activer un profil

1. Sélectionnez le bouton sur lequel est inscrit le nom du profil à activer.
2. Sélectionnez le bouton **Activer** dans le coin supérieur droit de l'écran.
3. Sélectionnez **Oui** pour activer le profil spécifié ou **Non** pour annuler
4. Sélectionnez **Fermer** pour quitter la page.

4.1.1.1.2 Supprimer un profil

1. Sélectionnez le bouton sur lequel est inscrit le nom du profil à supprimer.

2. Sélectionnez le bouton **Supprimer** dans le coin supérieur droit de l'écran.
3. Sélectionnez **Oui** pour supprimer le profil spécifié ou **Non** pour annuler
4. Sélectionnez **Fermer** pour quitter la page.

4.1.1.2 Créer un nouveau profil

1. Sélectionnez le **Type de calibrage** à utiliser.
Pour en savoir plus, voir 4.1.1.6 *Type de calibrage*, page 27.
2. Sélectionnez le bouton **Créer un nouveau profil**.
3. Sélectionnez **Oui** pour continuer ou **Non** pour annuler
4. Donnez un nom au nouveau profil.



Vous devez utiliser le clavier et la souris.


Seuls des caractères alphanumériques peuvent être utilisés.

5. Sélectionnez le bouton **Suivant**.
6. Positionnez l'utilisateur afin que les deux points qui représentent les yeux de ce dernier soient au centre de la zone affichée à l'écran.
Le processus de calibrage démarrera lorsque le point situé à droite se mettra à clignoter.
7. Suivez les instructions affichées à l'écran pour effectuer le calibrage.
8. Consultez les résultats du calibrage.
Pour en savoir plus, voir 4.1.1.3 *Résultats du calibrage*, page 26.
9. Sélectionnez **Fermer** pour accepter le calibrage.

4.1.1.3 Résultats du calibrage



Cela ne fonctionne que sur les commandes oculaires IS-4, et non sur les commandes oculaires IS-20 et IS-3. Pour en savoir plus sur la plateforme de commande oculaire que vous utilisez, consultez les spécifications techniques de votre commande oculaire.

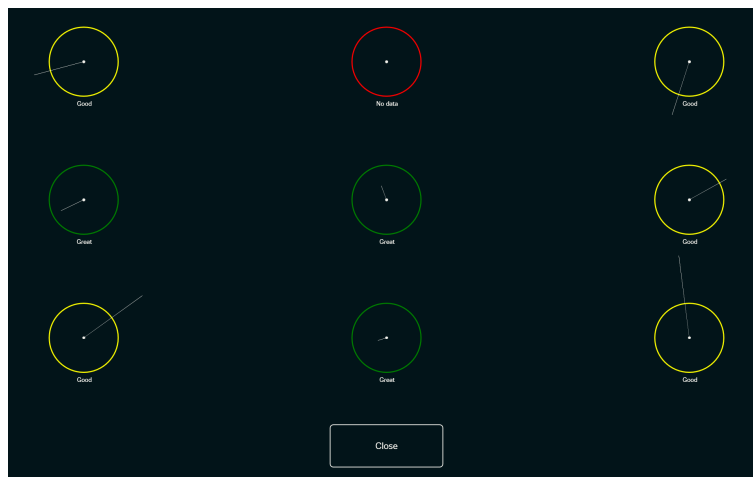

Sur la page des résultats du calibrage, vous verrez le résultat de calibrage de chaque point de calibrage. La quantité de points de calibrage affichée sur la page varie en fonction du type de calibrage que vous avez choisi et de la façon dont vous avez configuré le calibrage.


Un point de calibrage peut avoir (3) statuts différents :

- Excellent (vert)
- Bon (jaune)
- Aucune donnée (rouge)



Si le type de calibrage « Précis » est utilisé, le calibrage redémarrera automatiquement si la commande oculaire ne parvient pas à obtenir de données à partir d'un point de calibrage.

4.1.1.4 Tester le calibrage

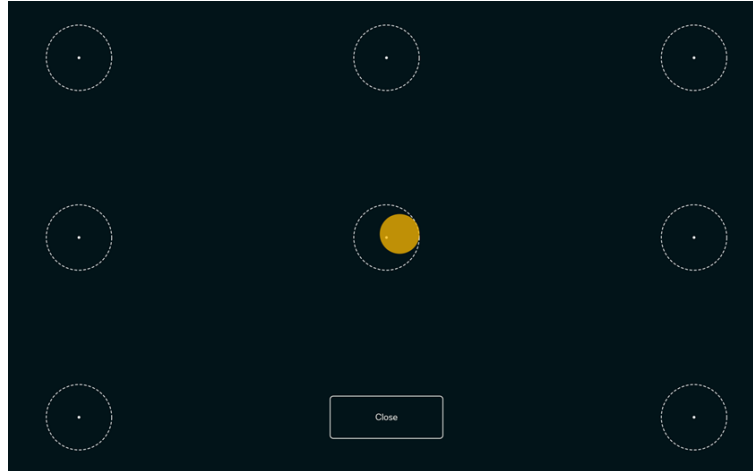

Sur la page de test de calibrage, le calibrage peut être testé à l'aide de cibles prédéfinies sur l'écran afin de voir si l'utilisateur doit recalibrer la commande oculaire.

1. Regardez chaque point dans chaque cercle affiché sur l'écran pour évaluer la précision du suivi du regard dans cette zone.
2. Sélectionnez **Fermer** lorsque vous avez terminé.

4.1.1.5 Recalibrage

1. Sélectionnez le **Type de calibrage** à utiliser.
Pour en savoir plus, voir 4.1.1.6 *Type de calibrage*, page 27.
2. Sélectionnez le bouton **Recalibrer** pour démarrer un nouveau processus de calibrage pour le profil actif.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran pour effectuer le calibrage.
4. Consultez les résultats du calibrage.
Pour en savoir plus, voir 4.1.1.3 *Résultats du calibrage*, page 26.
5. Sélectionnez **Fermer** pour accepter le calibrage.

4.1.1.6 Type de calibrage

Il existe deux (2) différents types de calibrage disponibles : **Précis** et **Simple**.

4.1.1.6.1 Précis

Sélectionnez la case **Précis** pour activer le type de calibrage le plus précis.

Lorsque le type de calibrage Précis est activé, le processus de calibrage consiste en (7) points à relier. Le type de calibrage Précis est le type de calibrage par défaut.

4.1.1.6.2 Simple

Sélectionnez la zone **Simple** si vous souhaitez personnaliser le processus de calibrage.

Sélectionnez le bouton **Personnaliser** situé près du bouton Simple afin de personnaliser le processus de calibrage.



Points de calibrage : Indiquez si **1**, **2**, **5**, ou **9** points de calibrage doivent être utilisés.



Le calibrage à 1 point n'est pas disponible sur PCEye Go.

Progression : Mettez la case Progression On/Off (Activé/Désactivé) sur On (Activé) pour activer la fonction avec laquelle vous utilisez la touche « S » sur un clavier ou tapez/cliquez sur l'écran pour progresser dans le processus de calibrage.

Stimulus :

Sélectionnez le bouton **Parcourir** pour modifier le point blanc représentant le **Stimulus** par défaut comme suit :

- L'un des stimulus inclus, image ou vidéo
- Une image du jouet favori de l'utilisateur
- Une vidéo favorite
- Ou quelque chose d'autre

Sélectionnez le bouton **Arrière-plan** pour modifier la couleur de l'arrière-plan pour le processus de calibrage.

Vitesse du stimulus : Sélectionnez la vitesse à laquelle le stimulus doit se déplacer sur l'écran parmi trois différents niveaux :


- Lent
- Moyen
- Rapide

Taille du stimulus : Sélectionnez la taille du stimulus lorsque celui-ci est affiché sur l'écran entre trois différents niveaux :

- Petit
- Moyen
- Grand

Fermer : Sélectionnez le bouton **Fermer** pour quitter la page.

4.1.2 L'onglet Avancé

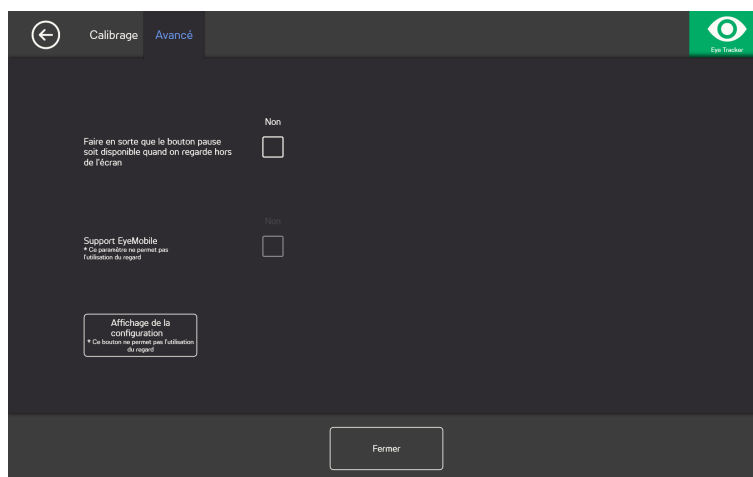

Faire en sorte que le bouton pause soit disponible lorsque l'utilisateur regarde hors de l'écran : Mettez la case On/Off (Activé/Désactivé) sur **On** (activé) si le bouton pause doit apparaître à l'écran lorsque l'utilisateur regarde en dehors de l'écran, afin que ce dernier puisse facilement mettre le suivi du regard en pause, puis le reprendre.


Support EyeMobile : Mettez la case On/Off (Activé/Désactivé) du support EyeMobile sur **On** si vous utilisez un EyeMobile ou EyeMobile Mini. Le paramètre du support EyeMobile ne concerne pas EyeMobile Plus. Il est par conséquent désactivé.

4.1.2.1 Affichage de la configuration

Si plus d'un (1) écran est utilisé, vous devrez spécifier celui auquel la commande oculaire est rattachée. Le système doit également connaître la taille de l'écran utilisé.



Ne fonctionne qu'en mode Bureau étendu et non en mode Bureau dupliqué.

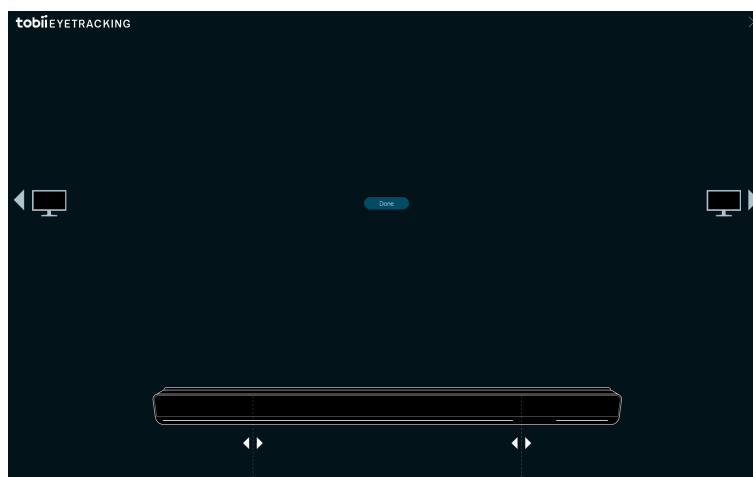

1. Utilisez  ou  pour sélectionner l'écran auquel la commande oculaire est rattachée.
2. Alignez la ligne verticale et la ligne horizontale qui se trouvent sous la zone de visualisation de la commande oculaire sur l'écran avec les marques qui se trouvent en haut de la commande oculaire en cours d'utilisation.




Cela établira la taille de l'écran utilisé pour Windows Control.

3. Sélectionnez **Terminé** pour finaliser.

4.2 Paramètres généraux


4.2.1 L'onglet Général

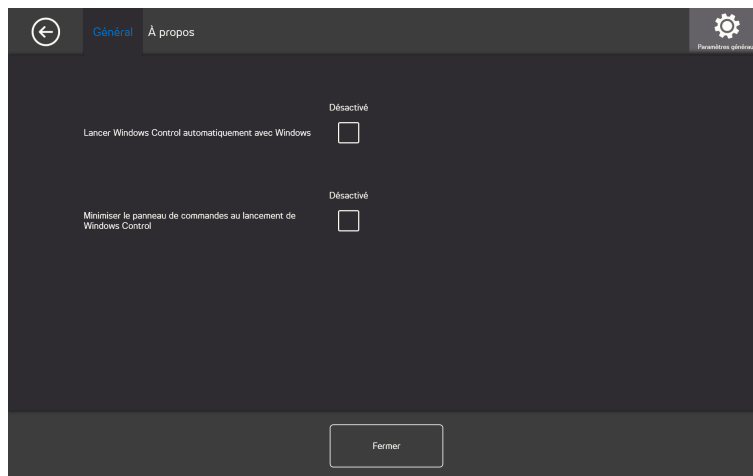

Lancer Windows Control automatiquement avec Windows Mettez la case On/Off (Activé/Désactivé) sur **On** (Activé) si vous souhaitez que Windows Control démarre automatiquement au démarrage de Windows.

Minimiser le panneau de commandes au lancement de Windows : Mettez la case On/Off (Activé/Désactivé) sur **On** (Activé) si vous souhaitez que le panneau de commande Windows Control démarre automatiquement au démarrage de Windows.

4.2.2 L'onglet À propos

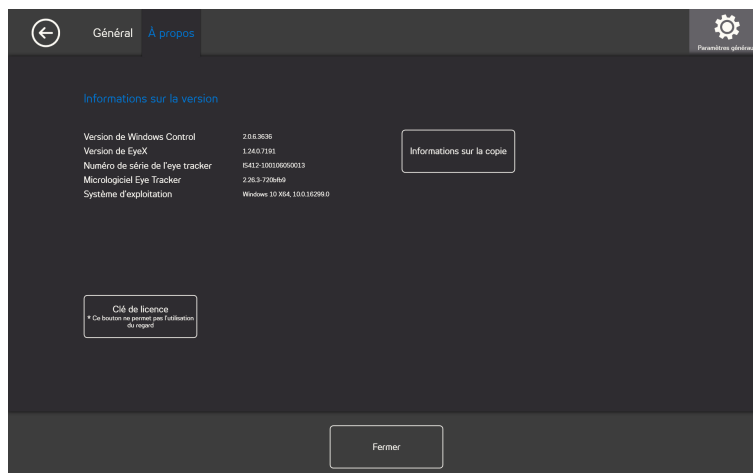

Toutes les informations relatives à la version du logiciel et de la commande oculaire sont disponibles sur la page À propos. Ces informations peuvent facilement être copiées à l'aide du bouton **Copier les informations** et peuvent ensuite être collées dans un e-mail ou un autre logiciel si nécessaire.

4.2.2.1 Clé de licence




Le bouton Licence ne permet pas l'utilisation de la commande oculaire. Par conséquent, demandez à quelqu'un de vous aider si vous devez changer la licence.

Pour activer la licence, voir 2.2.1 *Activation de la licence*, page 6.

Pour désactiver la licence, voir 2.2.2 *Désactivation de la licence*, page 8.

4.3 Aide et formation :

4.3.1 L'onglet Aide

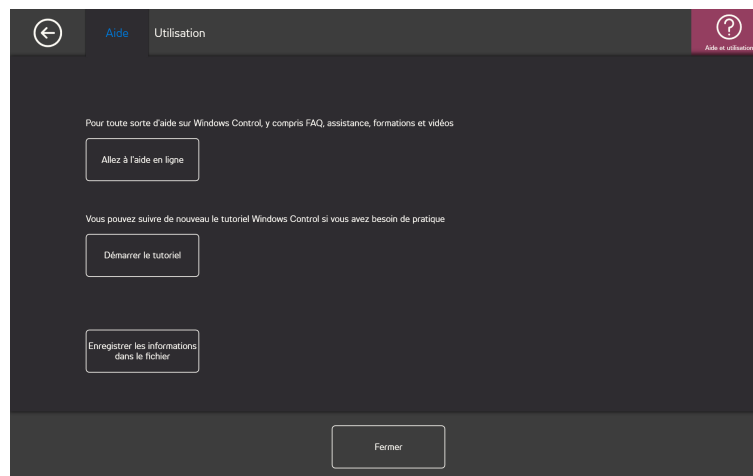

Sélectionnez le bouton **Accéder à l'aide en ligne** pour ouvrir les pages d'aide Tobii Dynavox sur internet avec le navigateur Web par défaut. Sur les pages Web d'aide, l'utilisateur trouvera des questions et des réponses, des formations, des vidéos et de la documentation à propos de Windows Control et de tous les autres produits de Tobii Dynavox.




Vérifiez que l'ordinateur/appareil est connecté à Internet.

Sélectionnez le bouton **Démarrer le tutoriel** pour lancer le tutoriel inclus si l'utilisateur a besoin de pratique supplémentaire. Le tutoriel peut être lancé autant de fois que l'utilisateur le souhaite.

Sélectionnez le bouton **Enregistrer les informations** sous forme de fichier pour copier tous les journaux importants si vous avez besoin d'aide. Ce fichier peut être facilement joint à un e-mail et envoyé à l'équipe technique.

4.3.2 L'onglet Utilisation

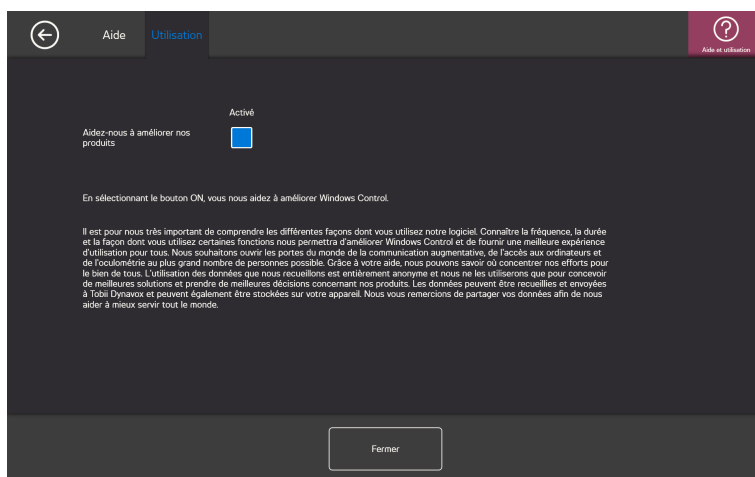


Aidez-nous à améliorer nos produits : Pour aider Tobii Dynavox à améliorer ses logiciels, mettez la case à cocher On/Off (Activé/Désactivé) sur **On** (Activé).

4.4 Activation et rétroaction



4.4.1 L'onglet Activation

4.4.1.1 Paramètres du mode Regard

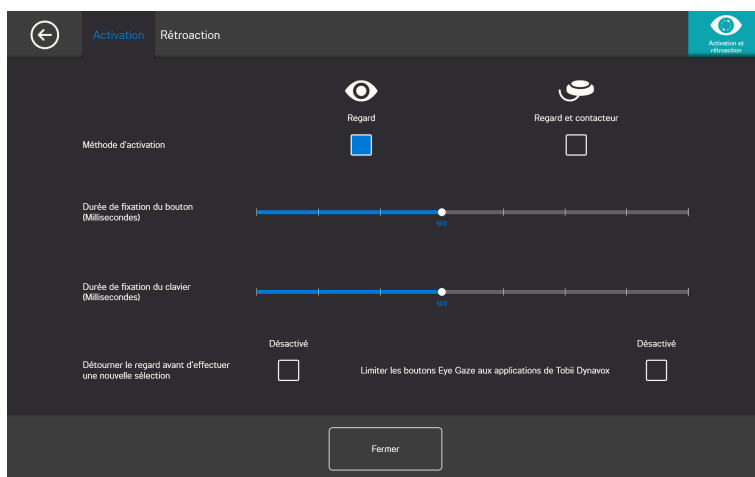

Tous les paramètres indiquant la façon dont l'utilisateur doit interagir avec Windows Control se trouvent dans l'onglet d'Activation. Indiquer si l'utilisateur doit utiliser le regard ou le regard et un contacteur pour exécuter les commandes et comment les interactions doivent se comporter.

Méthode d'activation :

- **Regard** - Sélectionnez Regard pour utiliser la position de votre regard pour activer la fonction de zoom, qui s'arrête avec l'exécution de la tâche souhaitée.
- **Regard et contacteur** - Sélectionnez Regard et contacteur pour utiliser un contacteur afin d'activer la fonction de zoom, qui s'arrête avec l'exécution de la tâche souhaitée.

Durée de fixation du bouton (en millisecondes)

La durée de fixation du bouton peut être réglée sur 8 niveaux différents. Il suffit de poser votre regard sur la position souhaitée pour modifier le réglage. La modification de la durée de fixation du bouton définit la durée pendant laquelle l'utilisateur doit fixer son regard sur un bouton pour que la tâche soit exécutée. L'échelle présente des durées de fixation du bouton inférieures à gauche et supérieures à droite.

Durée de fixation du clavier (en millisecondes)

La durée de fixation du clavier peut être réglée sur 8 niveaux différents. Il suffit de poser votre regard sur la position souhaitée pour modifier le réglage. La modification de la durée de fixation du clavier définit la durée pendant laquelle l'utilisateur doit fixer son regard sur une touche pour que celle-ci soit exécutée. L'échelle présente des durées de fixation du clavier inférieures à gauche et supérieures à droite.


Détourner le regard avant d'effectuer une nouvelle sélection

- **On** - Sélectionnez **On** (Activé) pour activer la fonction **Détourner le regard avant d'effectuer une nouvelle sélection**. Une fois cette fonction **On** (activée), l'utilisateur doit d'abord détourner le regard de la zone de regard active afin de pouvoir activer à nouveau cette même zone.
- **Off** (Désactivé) - Sélectionnez **Off** (Désactivé) pour désactiver la fonction **Détourner le regard avant d'effectuer une nouvelle sélection**. Une fois cette fonction **Off** (désactivée), la zone de regard restera activée tant que l'utilisateur y pose son regard. (Par défaut)

Limiter les boutons Eye Gaze aux applications de Tobii Dynavox

- **On** (Activé) - Sélectionnez **On** (Activé) pour **Limiter les boutons Eye Gaze aux applications de Tobii Dynavox**. Après avoir sélectionné **On** (Activé), la zone de regard active sera activée, les commandes associées à la zone exécutées et la rétroaction interactive Tobii Dynavox ne se manifestera **que** dans les logiciels et applications Tobii Dynavox.
- **Off** (Désactivé) - Sélectionnez **Off** (Désactivé) pour **Limiter les boutons Eye Gaze aux applications de Tobii Dynavox**. Après avoir sélectionné **Off** (Désactivé), la zone de regard active sera activée, les commandes associées à la zone exécutées et la rétroaction interactive Tobii Dynavox se manifestera dans les logiciels et applications Tobii Dynavox, ainsi que dans tous les autres logiciels et applications tiers. (Par défaut)

4.4.1.2 Paramètres du mode Regard et contacteur

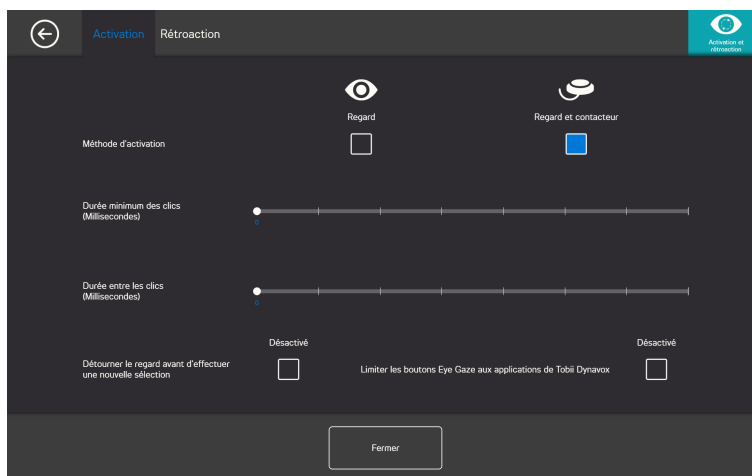

Durée minimum des clics : La durée minimum pendant laquelle l'utilisateur doit appuyer sur le contacteur avant que celui-ci n'effectue une sélection.

Durée entre les clics : La durée du « temps mort » pendant laquelle Windows Control patiente avant d'autoriser une autre saisie par contacteur.


Détourner le regard avant d'effectuer une nouvelle sélection

- **On** - Sélectionnez **On** (Activé) pour activer la fonction **Détourner le regard avant d'effectuer une nouvelle sélection**. Une fois cette fonction **On** (activée), l'utilisateur doit d'abord détourner le regard de la zone de regard active afin de pouvoir activer à nouveau cette même zone.
- **Off** (Désactivé) - Sélectionnez **Off** (Désactivé) pour désactiver la fonction **Détourner le regard avant d'effectuer une nouvelle sélection**. Une fois cette fonction **Off** (désactivée), la zone de regard restera activée tant que l'utilisateur y pose son regard. (Par défaut)

Limiter les boutons Eye Gaze aux applications de Tobii Dynavox

- **On (Activé)** - Sélectionnez **On (Activé)** pour **Limiter les boutons Eye Gaze aux applications de Tobii Dynavox**. Après avoir sélectionné **On (Activé)**, la zone de regard active sera activée, les commandes associées à la zone exécutées et la rétroaction interactive Tobii Dynavox ne se manifestera **que** dans les logiciels et applications Tobii Dynavox.
- **Off (Désactivé)** - Sélectionnez **Off (Désactivé)** pour **Limiter les boutons Eye Gaze aux applications de Tobii Dynavox**. Après avoir sélectionné **Off (Désactivé)**, la zone de regard active sera activée, les commandes associées à la zone exécutées et la rétroaction interactive Tobii Dynavox se manifestera dans les logiciels et applications Tobii Dynavox, ainsi que dans tous les autres logiciels et applications tiers. (Par défaut)

4.4.2 L'onglet Rétroaction

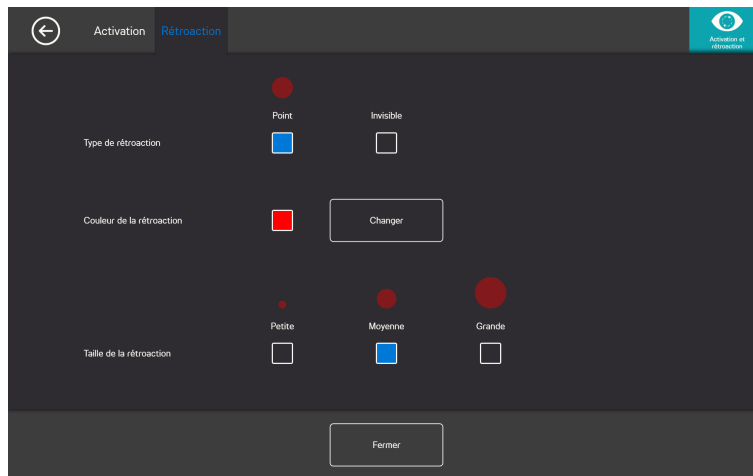

Type de rétroaction :

- **Horloge** - La rétroaction visuelle représente une horloge qui se remplit pendant la durée de fixation du bouton spécifiée. Lorsque l'horloge est pleine, la tâche est exécutée.
- **Point** - La rétroaction visuelle représente un point rétrécissant pour les utilisateurs en mode Regard ou un point statique pour les utilisateurs en mode Contacteur lorsqu'une tâche est exécutée.
- **Invisible** - Aucune rétroaction visuelle n'est affichée à l'écran lorsqu'une tâche est exécutée.

Couleur de la rétroaction : Sélectionnez le bouton **Modifier** pour sélectionner la couleur du point de la rétroaction. Pour connaître les couleurs disponibles, voir *Figure 4.1 Couleurs disponibles*, page 34.

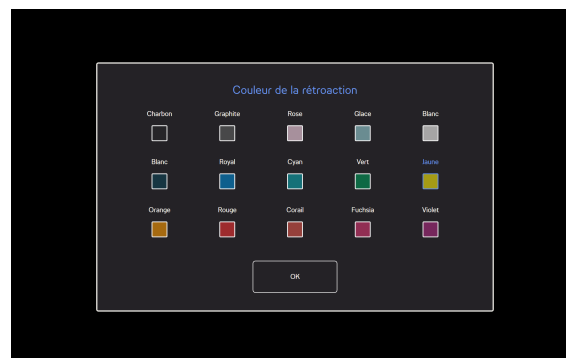


Figure 4.1 Couleurs disponibles


Taille de la rétroaction : La taille du type de rétroaction choisi peut être définie sur trois (3) valeurs différentes.

- **Petit**
- **Moyen**
- **Grand**

4.5 Barre des tâches




4.5.1 L'onglet barre des tâches

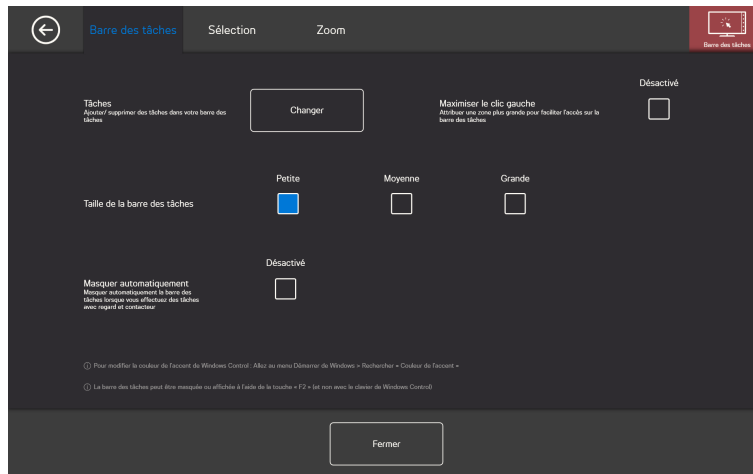

4.5.1.1 Tâches

Sélectionnez le bouton **Modifier** pour accéder à la fenêtre contextuelle dans laquelle des tâches peuvent être ajoutées ou supprimées de la barre des tâches.

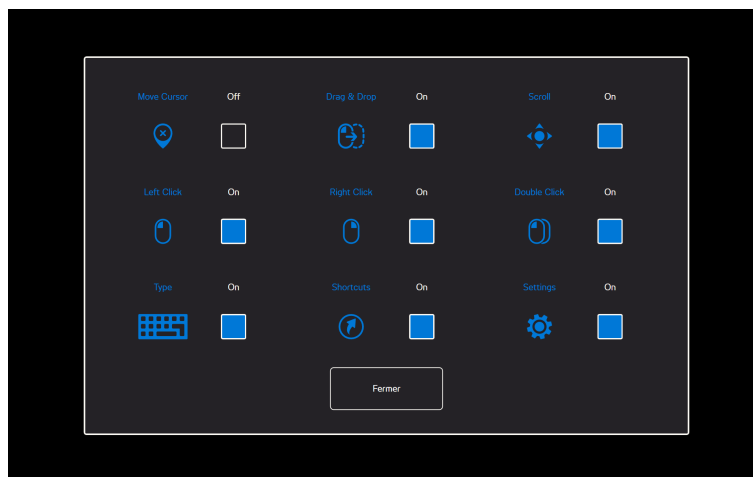

Sélectionnez les tâches à utiliser sur la barre des tâches. Pour plus d'informations sur les tâches, voir 3.4 *Tâches ordinaires*, page 13.



Sachez que plus les tâches utilisées sur la barre des tâches sont nombreuses, plus il peut devenir difficile de les sélectionner sur des écrans de petite taille.

Basculez la case à cocher On/Off (Activé/ Désactivé) sur **On** (Activé) pour chaque tâche afin qu'elle puisse être utilisée sur la barre des tâches.

Basculez la case à cocher On/Off sur **Off** (Désactivé) pour chaque tâche afin qu'elle ne soit plus utilisable sur la barre des tâches et qu'elle en disparaisse.




4.5.1.2 Maximiser le clic gauche

Activer Maximiser le clic gauche permet d'agrandir nettement la zone active du clic gauche dans la barre des tâches, ce qui rend la sélection de cette tâche bien plus aisée.

Utilisez la fonction **Maximiser le clic gauche** pour agrandir et mettre en valeur la tâche Clic gauche sur la barre. Si non activé (**Off**), toutes les tâches sélectionnées seront espacées également le long de la barre des tâches. Si activé (**On**), toutes les tâches autres que Clic gauche conservent leur taille d'origine plus petite et la tâche Clic gauche remplit l'espace restant sur la barre des tâches.

4.5.1.3 Taille de la barre des tâches

Avec le menu Taille de la barre des tâches, la taille de la barre des tâches peut être modifiée en trois (3) tailles :

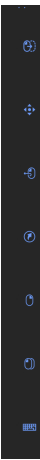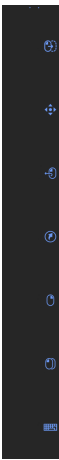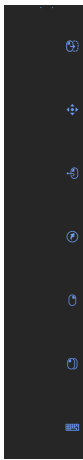Petit	Moyen	Grand
		

Sélectionnez une grande taille pour la barre des tâches afin d'agrandir la zone située autour de la tâche pour faciliter la sélection de la tâche par l'utilisateur. La zone active en cour sera agrandie jusqu'en dehors de l'écran et les icônes des tâches concernées se trouveront toujours au centre de la zone active.


4.5.1.4 Masquer automatiquement

Masque automatiquement la barre des tâches. Disponible pour toutes les tâches continues ainsi que toutes les tâches du mode Activation par contacteur.

Activez (**On**) pour activer la fonction Masquer automatiquement.

Désactivez (**Off**) pour désactiver la fonction Masquer automatiquement.

4.5.2 L'onglet Sélection

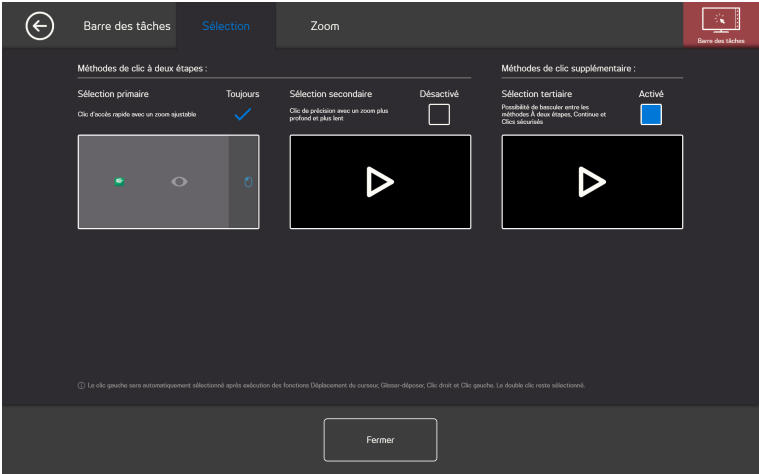

4.5.2.1 Sélection primaire

La sélection primaire est toujours activée et ne peut être désactivée.


4.5.2.2 Sélection secondaire

Par défaut, la sélection secondaire est toujours désactivée (**Off**). Si elle est activée (**On**), la sélection secondaire sera disponible.

4.5.2.3 Sélection tertiaire

Par défaut, la sélection tertiaire est toujours désactivée (**Off**). Si elle est activée (**On**), la sélection tertiaire sera disponible. Avec la sélection tertiaire, les tâches continues et de clic sécurisé seront disponibles. Pour en savoir plus, voir 3.5 *Tâches continues*, page 15 et 3.6 *Clic sécurisé*, page 16.

4.5.3 L'onglet Zoom

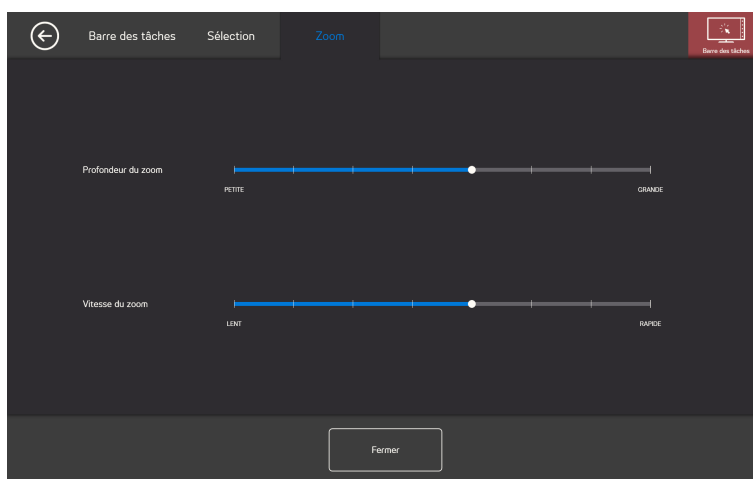

Profondeur du zoom

La profondeur du zoom peut être réglée sur 8 niveaux différents. Il suffit de poser votre regard sur la position souhaitée pour modifier le réglage. Modifiez la profondeur pour ajuster la profondeur du zoom avant l'exécution de la tâche. Plus le paramètre est réglé sur la droite de l'échelle, plus le zoom ira en profondeur.





Si la profondeur est définie comme égale à zéro, aucun zoom ne se produira. Il s'agira d'un clic instantané avec sélection primaire. Avec une sélection auxiliaire, il s'agira toujours d'un zoom.

Vitesse du zoom

La vitesse du zoom peut être réglée sur huit niveaux différents. Il suffit de poser votre regard sur la position souhaitée pour modifier le réglage. Modifiez ce paramètre pour définir la vitesse à laquelle le zoom doit avancer avant l'exécution de la tâche. Plus le paramètre est réglé sur la droite de l'échelle, plus le zoom sera rapide.

4.6 Clavier

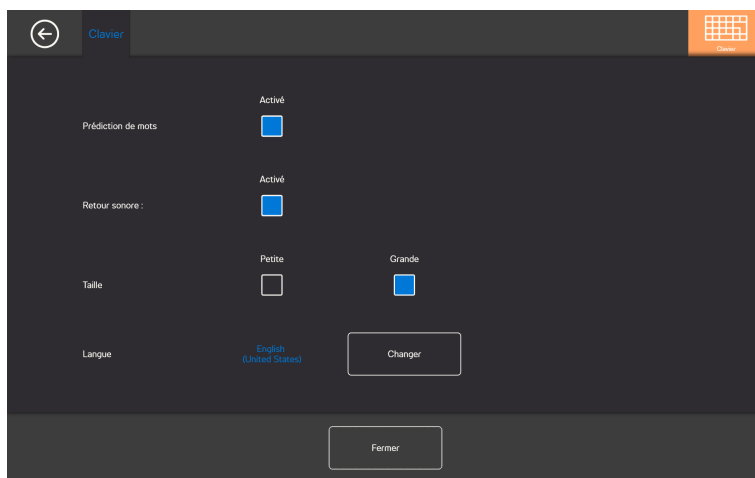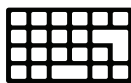

Prédiction de mots

- **On** (Activé) - Sélectionnez **On** pour activer la prédiction de mots en utilisant le clavier Regard. (Par défaut)
- **Off** (désactivé) - Sélectionnez **Off** (Désactivé) pour désactiver la prédiction de mots en utilisant le clavier Regard.

Retour sonore

- **On** (activé) - Sélectionnez **On** (Activé) pour activer le retour sonore lors de la sélection d'une touche sur le clavier Regard.
- **Off** (désactivé) - Sélectionnez **Off** (Désactivé) pour désactiver le retour sonore lors de la sélection d'une touche sur le clavier Regard.

Taille

- **Petit** - Sélectionnez Petit pour utiliser un clavier Regard de petite taille, qui couvrira moins de la moitié de l'écran, voir *Figure 4.2 Petit clavier (par défaut)*, page 38.
- **Grand** - Sélectionnez Grand pour utiliser un clavier Regard de grande taille, qui couvrira la moitié de l'écran, voir *Figure 4.3 Grand clavier*, page 39.



Figure 4.2 Petit clavier (par défaut)

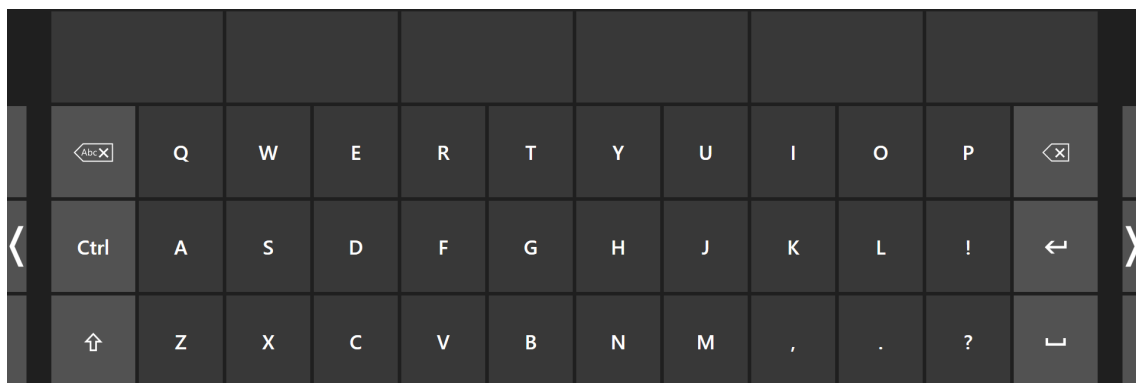


Figure 4.3 Grand clavier

Langue

La disposition du clavier de langue sélectionné est représentée. Sélectionnez le bouton **Modifier** pour obtenir la disposition du clavier dans une autre langue. Un certain nombre de différentes dispositions de clavier de langues sont disponibles.

5 Virtual Remote

5.1 Aperçu de Virtual Remote.



Figure 5.1 Aperçu de Virtual Remote.

Virtual Remote est divisé en deux zones :

- Le menu Virtual Remote, pour en savoir plus, voir 5.1.1 Menu Virtual Remote, page 40.
- La télécommande active, pour en savoir plus, voir 5.1.2 La télécommande active, page 41.

5.1.1 Menu Virtual Remote



Figure 5.2 Le menu Virtual Remote

Les icônes du menu Virtual Remote sont les suivantes :

Bouton de tâche	Action	Description
+	Ajouter télécommande	Sélectionnez cette action pour ajouter une nouvelle télécommande, voir 5.2.4 Ajouter une télécommande , page 43.
i	Informations	Sélectionnez cette action pour ouvrir la page d'informations 5.2.6 Informations , page 59.
<	Gauche	Sélectionnez cette action pour activer la télécommande qui est à gauche de la télécommande active.
>	Droite	Sélectionnez cette action pour activer la télécommande qui est à droite de la télécommande active.
✎	Mode Edit (Modifier)	Sélectionnez cette action pour atteindre le mode Edit (Modifier) de la télécommande active, voir 5.2.5 Mode Edit (Modifier) , page 51.
✕	Fermer/ réduire	Sélectionnez cette action pour réduire l'application Virtual Remote.

5.1.2 La télécommande active

La télécommande active est toujours celle qui se trouve au milieu du menu Virtual Remote, voir *Figure 5.3 Télécommande active*.

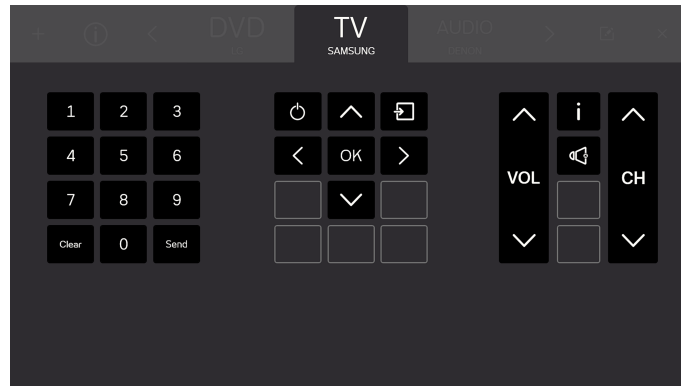


Figure 5.3 Télécommande active



Tous les boutons visibles à l'écran appartiennent à la télécommande active.

Vous pourrez également voir jusqu'à deux (2) noms de télécommande disponibles, un de chaque côté de la télécommande active. Vous ne verrez que les noms, et non les boutons, des télécommandes disponibles, jusqu'à ce que vous rendiez l'une d'entre elles active.

5.1.3 Les boutons

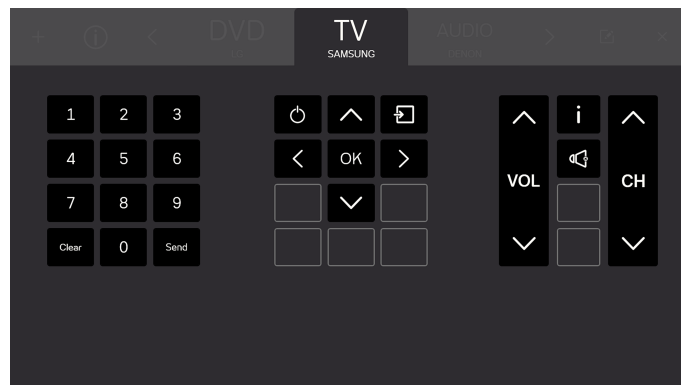


Figure 5.4 Les boutons

Tous les boutons visibles à l'écran appartiennent à la télécommande active. Il y a deux (2) types de boutons sur la télécommande.

- Boutons actifs , voir *Figure 5.5 Boutons actifs, page 42*
- Boutons inactifs , voir *Figure 5.6 Boutons inactifs, page 42*



Le nombre et les fonctions des boutons diffèrent en fonction du type de système que l'utilisateur souhaite contrôler.

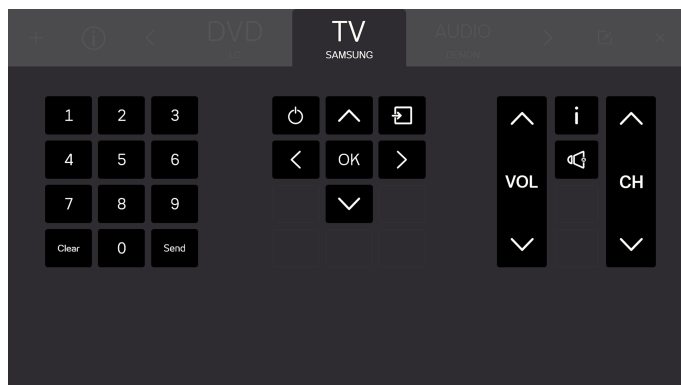


Figure 5.5 Boutons actifs

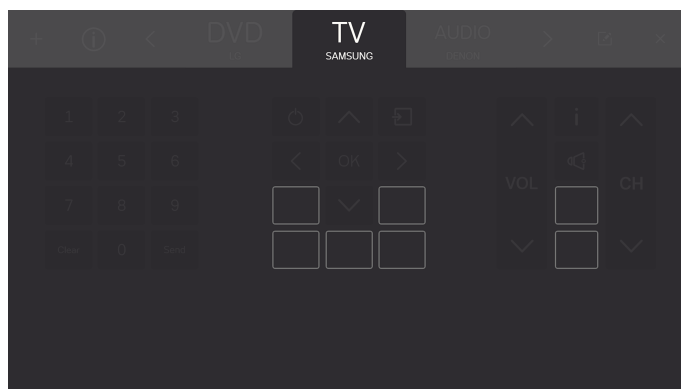


Figure 5.6 Boutons inactifs

5.2 Utilisation du Tobii Dynavox. Virtual Remote

Tobii Dynavox Virtual Remote permet à l'utilisateur de contrôler un téléviseur, un lecteur DVD, une chaîne stéréo etc. à partir de l'appareil.



Toutes les fonctions de Virtual Remote sont accessibles par la souris et l'écran tactile, ce qui facilite l'assistance qu'un aide-soignant ou un assistant peut apporter à l'utilisateur.

5.2.1 Au premier démarrage

Un guide rapide présentera la disposition du logiciel Virtual Remote. Suivez tout simplement les instructions qui s'affichent à l'écran.

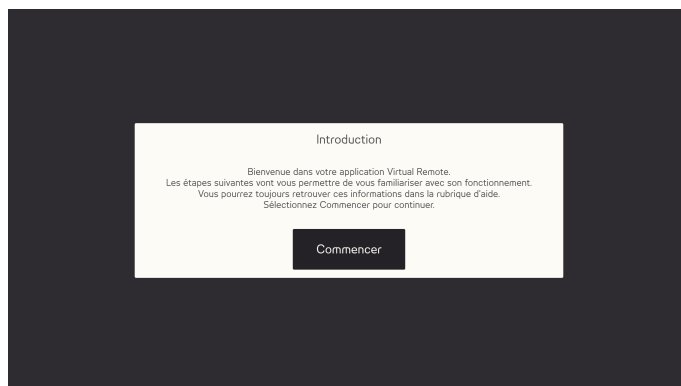


Figure 5.7 L'écran d'introduction de Virtual Remote.

5.2.2 Changer la télécommande active

Pour changer la télécommande active :

- Sélectionnez l'un des noms situés à droite ou à gauche de la télécommande active.
- ou utilisez les boutons  et  pour parcourir les télécommandes disponibles.



La télécommande active est toujours celle qui se trouve au milieu du menu Virtual Remote.


5.2.3 Utiliser les boutons d'une télécommande

Sélectionnez tout simplement le bouton que vous souhaitez utiliser pour envoyer le signal à l'appareil. Les boutons du Volume sont généralement configurés pour envoyer un signal continu tant qu'ils restent sélectionnés. Pour en savoir plus, voir 5.2.5.3.1 *Portée du signal*, page 54.

Pour saisir un nombre supérieur à 9 (ex. : un nombre à plusieurs chiffres), suivez cette procédure.

Liste des étapes pour les nombres supérieurs à 9

1. Sélectionnez tous les chiffres à envoyer dans l'ordre souhaité. Tous les chiffres sélectionnés seront visibles dans une zone blanche située sous la section des chiffres de la télécommande.

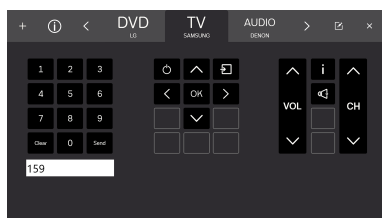

2. Sélectionnez le bouton **Envoyer** pour envoyer les signaux vers l'appareil ou **Effacer** pour supprimer tous les numéros sélectionnés.

5.2.4 Ajouter une télécommande




Il existe deux (2) façons d'ajouter une télécommande.

5.2.4.1 Ajouter une télécommande pré-programmée

Pour ajouter une nouvelle télécommande pré-programmée, suivez cette procédure :

Liste des étapes pour ajouter une télécommande pré-programmée

1. Sélectionnez  dans le menu.
2. Sélectionnez le bouton Pré-programmé

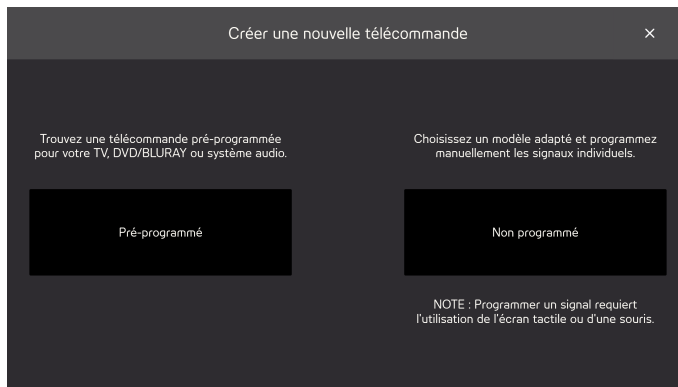

3. Sélectionnez le type de télécommande pré-programmée
 - Télévision
 - LECTEUR DVD/ BLURAY
 - AUDIO




4. Sélectionnez la marque dans la liste



Si vous ne trouvez pas la marque, sélectionnez **Autre**. Pour obtenir plus d'informations, voir 5.2.4.1.1 *Autres télécommandes*, page 46



5. Lorsqu'une marque est sélectionnée, une fenêtre contextuelle indiquant le nombre de télécommandes pré-programmées apparaît.

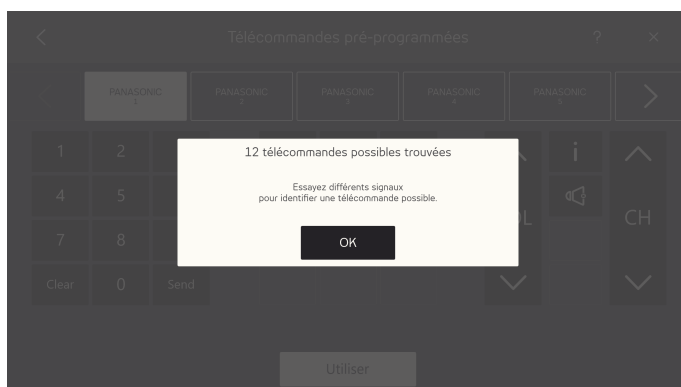

Sélectionnez le bouton **OK**.

6. Sélectionnez une télécommande.



7. Essayez nos différents signaux sur la télécommande sélectionnée afin d'identifier la télécommande qui convient.
8. Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que vous ayez trouvé la télécommande qui convient le mieux.




Utilisez les boutons < et > pour parcourir les télécommandes disponibles.

9. Sélectionnez la télécommande qui convient le mieux.

10. Sélectionnez le bouton **Utiliser**.



11. La télécommande sélectionnée sera ajoutée aux télécommandes disponibles.

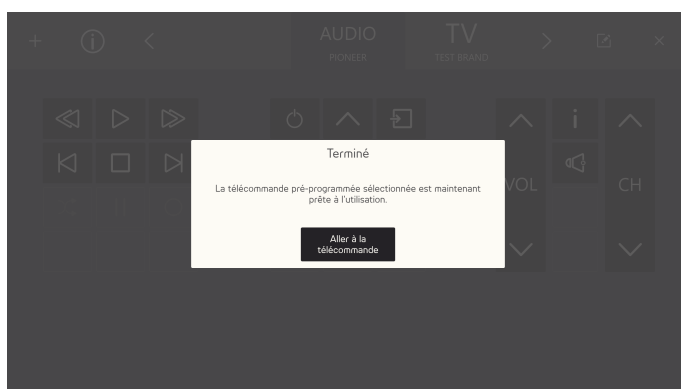


Sélectionnez le bouton **Accéder à la télécommande** pour finaliser.

5.2.4.1.1 Autres télécommandes

Pour ajouter d'autres télécommandes, suivez cette procédure :


Liste des étapes pour ajouter d'autres télécommandes

1. Suivez les étapes 1 à 3 dans la liste des étapes : *Liste des étapes pour ajouter une télécommande pré-programmée*, page 44.
2. Sélectionnez le bouton **Autre**.
3. Tapez le nom de la marque dans la zone de texte.

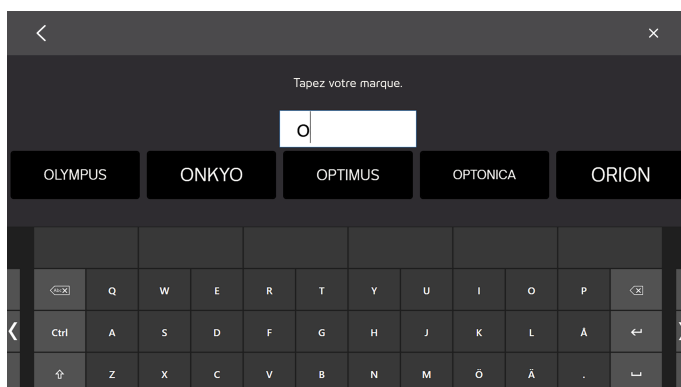





Pour limiter les résultats de recherche, tapez plus de caractères.

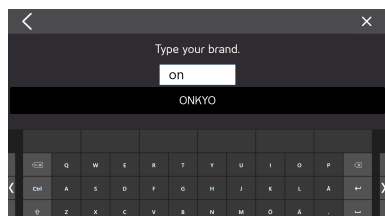

4. Sélectionnez la marque.

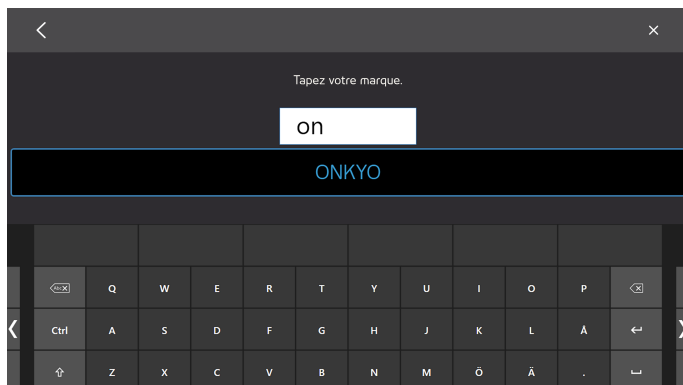

5. Lorsqu'une marque est sélectionnée, une fenêtre contextuelle indiquant le nombre de télécommandes pré-programmées apparaît.

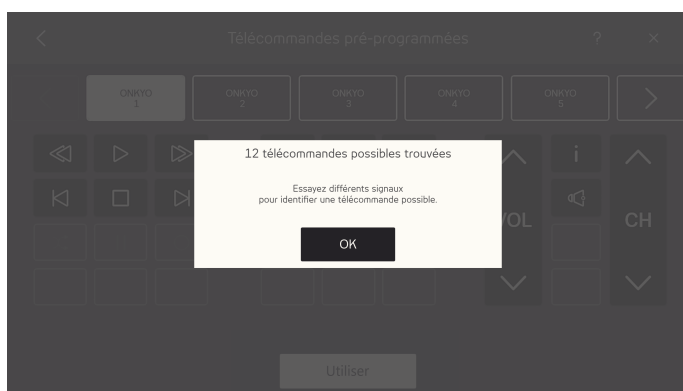

Sélectionnez le bouton **OK**.

6. Sélectionnez une télécommande.



7. Essayez différents signaux sur la télécommande sélectionnée afin d'identifier la télécommande qui convient.
8. Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que vous ayez trouvé la télécommande qui convient le mieux.




Utilisez les boutons  et  pour parcourir les télécommandes disponibles.

9. Sélectionnez la télécommande qui convient le mieux.
10. Sélectionnez le bouton **Utiliser**.



11. La télécommande sélectionnée sera ajoutée aux télécommandes disponibles.

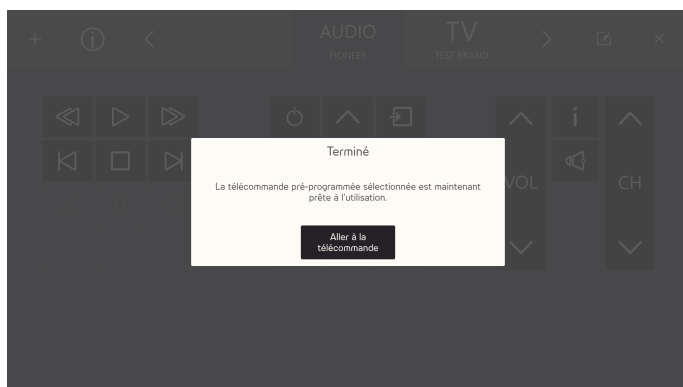

Sélectionnez le bouton **Accéder à la télécommande** pour finaliser.


5.2.4.2 Ajouter une télécommande non-programmée

Pour ajouter une nouvelle télécommande non-programmée, suivez cette procédure :

Liste des étapes pour ajouter une télécommande non-programmée

1. Sélectionnez  dans le menu.

2. Sélectionnez le bouton Non-programmé

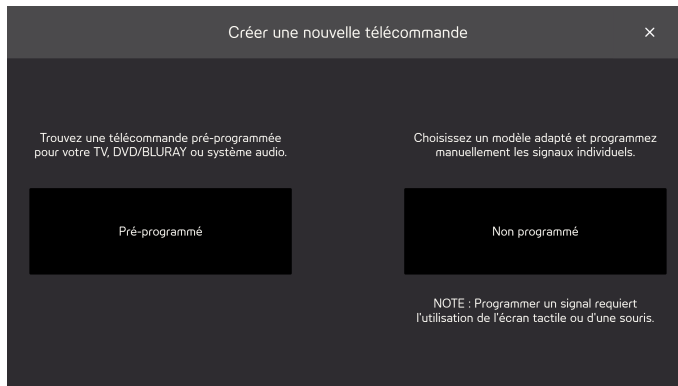

3. Sélectionnez le type de télécommande non-programmée

- Télévision
- AUDIO
- TERMINAL NUMÉRIQUE
- DVD ou BLURAY
- MODÈLE VIERGE



4. Sélectionne un bouton à programmer.




Les icônes disponibles peuvent différer en fonction du type de télécommande sélectionné à l'étape 3.

5. Sélectionne un bouton à programmer.

6. et appuyez sur le bouton de votre télécommande que vous souhaitez enregistrer sur Tobii Dynavox.



7. Lorsque le signal est enregistré sur Virtual Remote, une fenêtre contextuelle indiquant **Terminé** s'affiche.

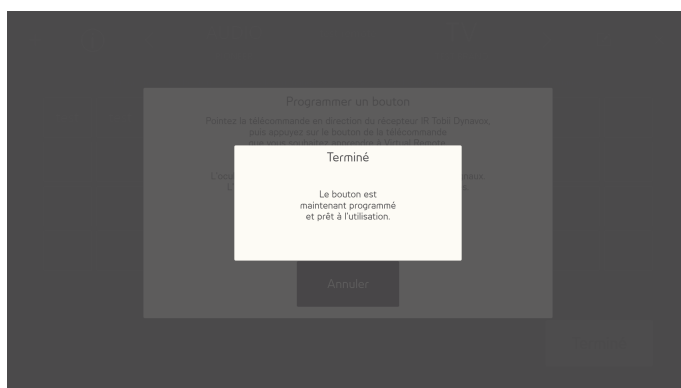


La fenêtre contextuelle sera fermée automatiquement après quelques secondes.

8. Répétez les étapes 5 à 7 jusqu'à ce que vous ayez programmé tous les boutons souhaités sur la télécommande.



Pour modifier ou supprimer des boutons sur la télécommande, vous devez avoir terminé la programmation et aller au mode Edit (Modifier). Pour en savoir plus sur le mode Edit (Modifier), voir *5.2.5 Mode Edit (Modifier)*, page 51.

9. Sélectionnez **Terminé** pour finaliser.

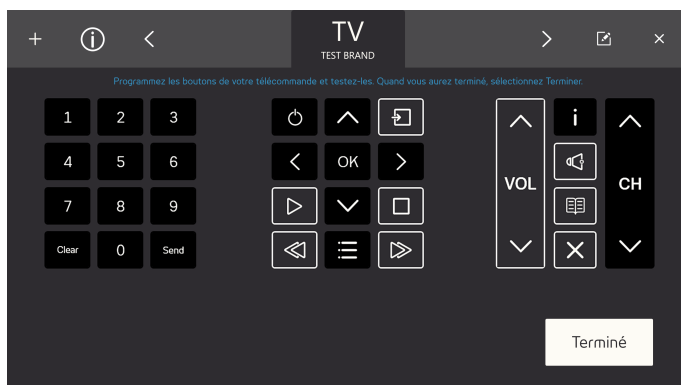


5.2.5 Mode Edit (Modifier)



Dans le mode Edit (Modifier), vous pouvez effectuer des modifications sur les télécommandes existantes. Assurez-vous que la télécommande que vous souhaitez modifier soit bien la télécommande active. Pour accéder au mode Edit (Modifier), suivez cette procédure :

Liste des étapes du mode Edit (Modifier)

1. Sélectionnez le bouton  (mode Edit).

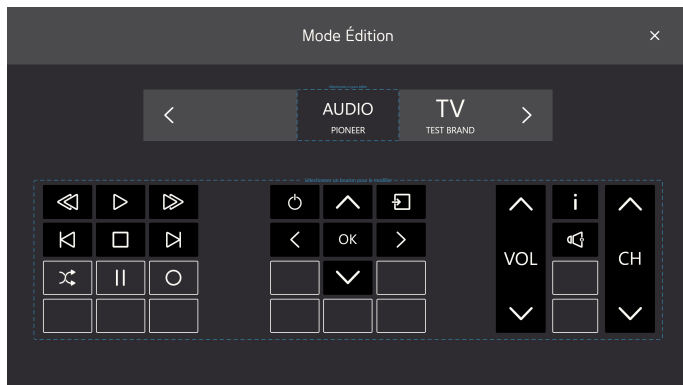


2. Sélectionnez la section de la télécommande sur laquelle vous souhaitez effectuer des modifications. Les modifications suivantes peuvent être effectuées :
 - Modifier le nom de la télécommande, voir 5.2.5.1 *Modifier le nom d'une télécommande*, page 51
 - Supprimer une télécommande, voir 5.2.5.2 *Supprimer une télécommande*, page 52
 - Modifier un bouton actif existant, voir 5.2.5.3 *Modifier un bouton actif existant*.
 - Modifier un bouton non-programmé existant, voir 5.2.5.4 *Modifier un bouton non-programmé existant*, page 56.
 - Ajouter un nouveau bouton dans un espace vide, voir 5.2.5.5 *Ajouter un nouveau bouton dans un espace vide*, page 58

5.2.5.1 Modifier le nom d'une télécommande

Pour modifier le nom d'une télécommande, suivez cette procédure :


Modifier le nom d'une télécommande

1. Sélectionnez le bouton  (mode Edit).

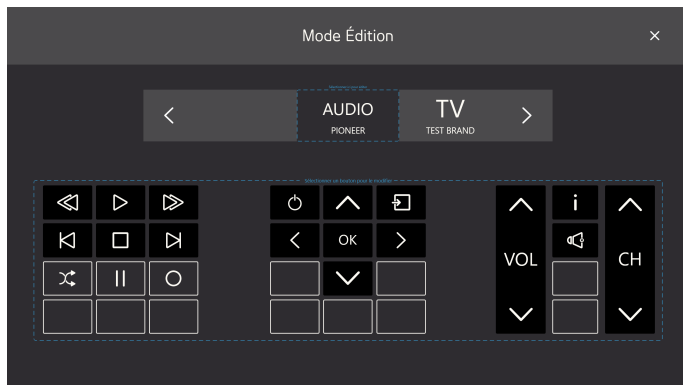

2. Sélectionnez la zone « Sélectionner ici pour modifier » autour du nom de la télécommande.


3. Sélectionnez le bouton **Renommer**.

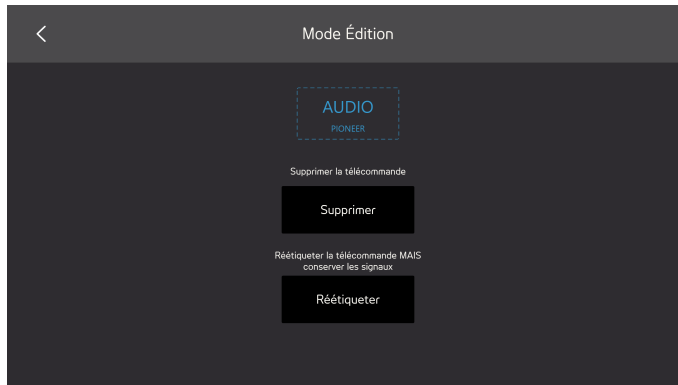

4. Tapez le nouveau nom.



Utilisez un nom court.

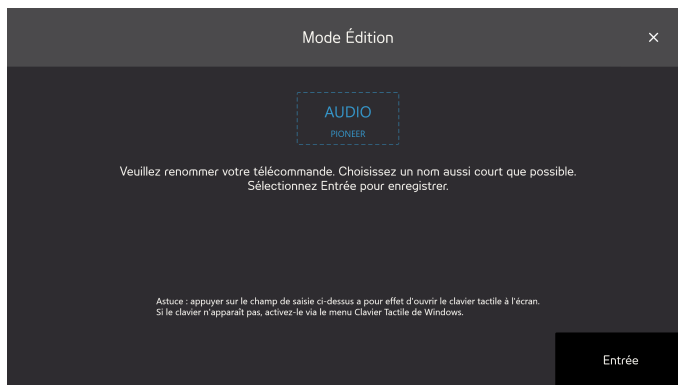


5. Sélectionnez la touche **Entrée** sur le clavier pour accepter le texte.
6. Sélectionnez l'icône  pour quitter le mode Edit (Modifier).

5.2.5.2 Supprimer une télécommande


Pour supprimer une télécommande, suivez cette procédure :

Liste des étapes pour supprimer une télécommande


1. Sélectionnez le bouton  (mode Edit).

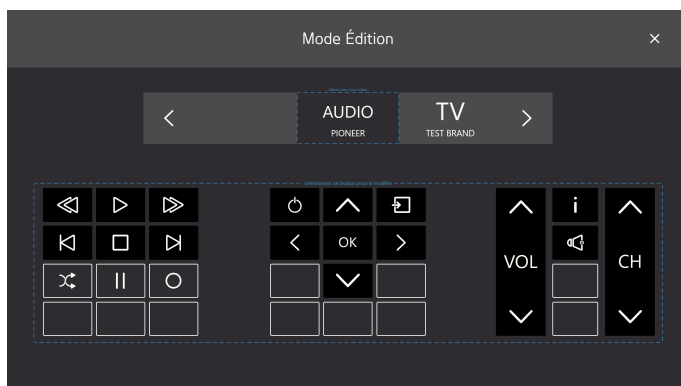

2. Sélectionnez la zone « Sélectionner ici pour modifier » autour du nom de la télécommande.
3. Sélectionnez le bouton **Supprimer**

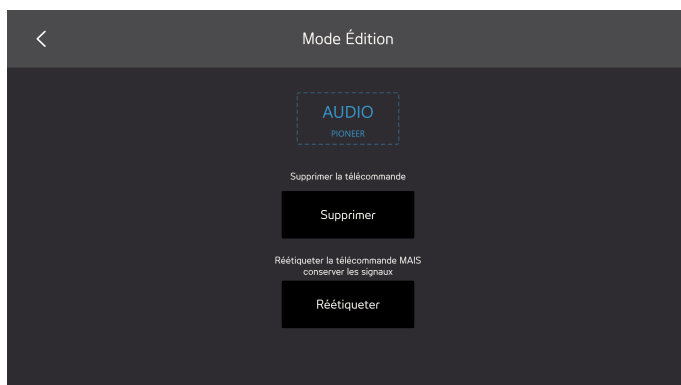

4. Sélectionnez :
 - **Oui** pour supprimer
 - **Non** pour annuler.

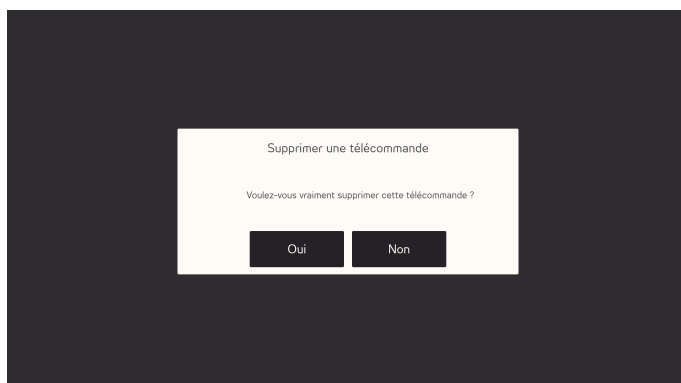


5. Sélectionnez l'icône  pour quitter le mode Edit (Modifier).

5.2.5.3 Modifier un bouton actif existant


Pour modifier un bouton actif existant, suivez cette procédure :

Liste des étapes pour modifier un bouton actif existant

1. Sélectionnez le bouton  (mode Edit).

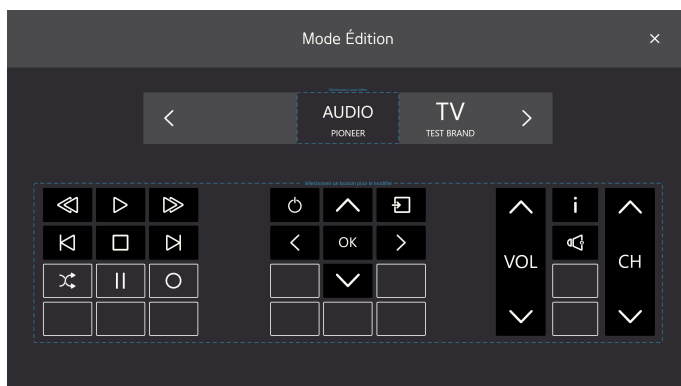

2. Sélectionnez un bouton avec un fond noir et une icône ou du texte, comme par exemple , dans la zone « Sélectionner un bouton à modifier » autour des boutons de la télécommande.
3. Sélectionner l'une des actions suivantes :
 - Portée du signal, voir 5.2.5.3.1 *Portée du signal*.
 - Nouveau signal, voir 5.2.5.3.2 *Nouveau signal*, page 55
 - Modifier le texte, voir 5.2.5.3.3 *Modifier le texte*, page 55
 - Modifier icône, voir 5.2.5.3.4 *Modifier l'icône*, page 56
 - Le bouton Effacer effacera toutes les informations stockées sur le bouton.

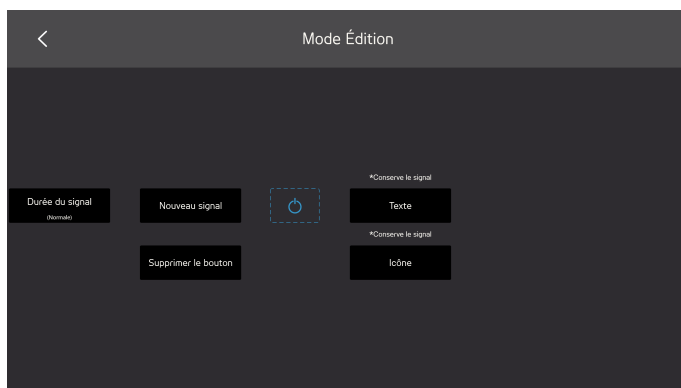

4. Sélectionnez l'icône  pour quitter le mode Edit (Modifier).

5.2.5.3.1 Portée du signal


Pour que l'unité réceptrice comprenne le signal envoyé à partir de Virtual Remote, il se peut que vous ayez à modifier la portée du signal. La portée du signal doit également être paramétrée si vous souhaitez qu'un bouton envoie un signal continu tant qu'il reste sélectionné.

Sélectionnez l'une (1) des alternatives suivantes :

- Normal — envoie un signal infrarouge par courte impulsion.
- Long — envoie un signal infrarouge pendant une (1) seconde.
- Long — envoie un signal infrarouge pendant deux (2) secondes.
- Continu — envoie un signal infrarouge tant que le bouton reste sélectionné.



Il s'agit d'une configuration typique pour un bouton de volume, par exemple.

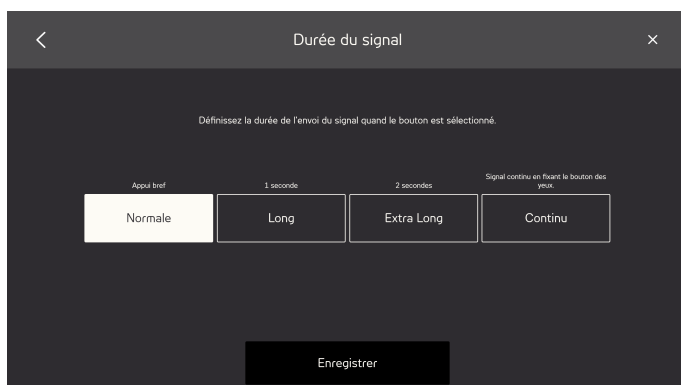

5.2.5.3.2 Nouveau signal


Pour programmer un nouveau signal pour un bouton, suivez cette procédure :

Liste des étapes pour un nouveau signal

1. Pointez la télécommande vers votre récepteur infrarouge Tobii Dynavox et appuyez sur le bouton que vous souhaitez enregistrer dans Virtual Remote.



2. Lorsque le signal est enregistré sur Virtual Remote, une fenêtre contextuelle indiquant **Terminé** s'affiche.

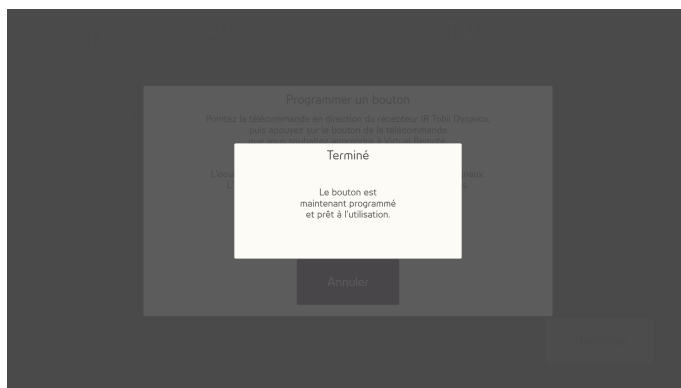


La fenêtre contextuelle sera fermée automatiquement après quelques secondes.

5.2.5.3.3 Modifier le texte

Pour modifier le texte, suivez cette procédure :

Liste des étapes pour modifier le texte :

1. Tapez le texte qui doit se trouver sur le bouton.

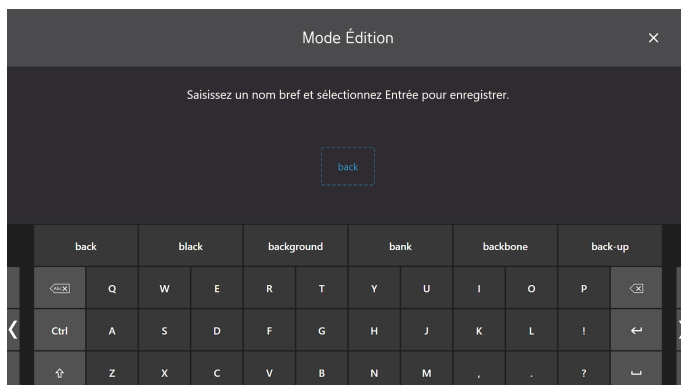

2. Sélectionnez la touche Entrée/ Retour sur le clavier pour accepter le texte.

5.2.5.3.4 Modifier l'icône

Pour modifier l'icône, suivez cette procédure :

1. Sélectionnez une icône disponible.




2. Sélectionnez le bouton **Enregistrer** pour accepter l'icône.

5.2.5.4 Modifier un bouton non-programmé existant


Pour modifier un bouton non-programmé existant, suivez cette procédure :

Liste des étapes pour modifier un bouton non-programmé existant

1. Sélectionnez le bouton  (mode Edit).

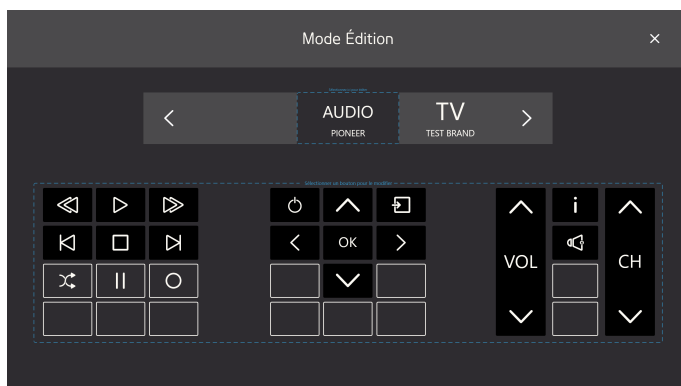

2. Sélectionnez un bouton avec un fond gris et une icône ou du texte, comme par exemple , dans la zone « Sélectionner un bouton à modifier » autour des boutons de la télécommande.
3. Sélectionner l'une des actions suivantes :
 - Programmer, voir 5.2.5.4.1 Programmer, page 57
 - Modifier le texte, voir 5.2.5.3.3 Modifier le texte, page 55
 - Modifier icône, voir 5.2.5.3.4 Modifier l'icône, page 56
 - Le bouton Effacer effacera toutes les informations stockées sur le bouton.

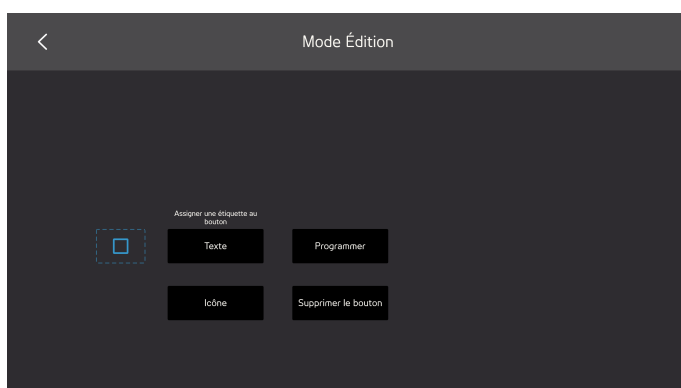

4. Sélectionnez l'icône  pour quitter le mode Edit (Modifier).

5.2.5.4.1 Programmer


Pour programmer un signal pour un bouton, suivez cette procédure :

Liste des étapes pour programmer

1. Pointez la télécommande vers votre récepteur infrarouge Tobii Dynavox et appuyez sur le bouton que vous souhaitez enregistrer dans Virtual Remote.



2. Lorsque le signal est enregistré sur Virtual Remote, une fenêtre contextuelle indiquant **Terminé** s'affiche.

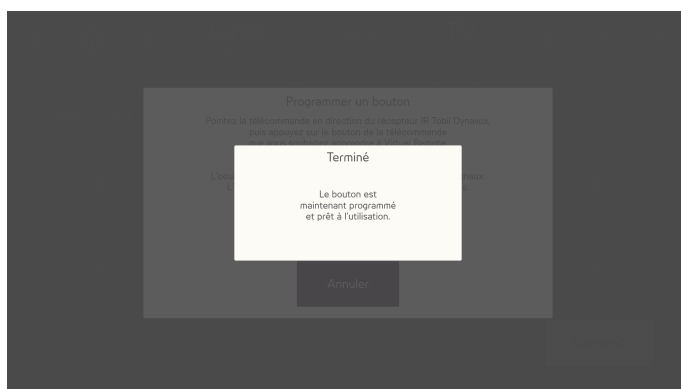


La fenêtre contextuelle sera fermée automatiquement après quelques secondes.

5.2.5.5 Ajouter un nouveau bouton dans un espace vide


Pour ajouter un nouveau bouton dans un espace vide, suivez cette procédure :

Liste des étapes pour ajouter un nouveau bouton dans un espace vide

1. Sélectionnez le bouton (mode Edit).

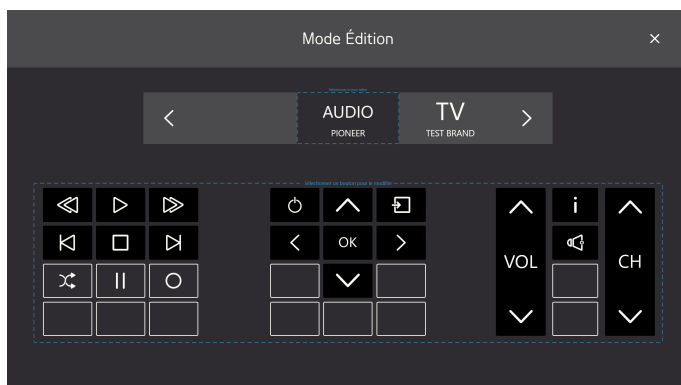


2. Sélectionnez un bouton avec un fond gris et vide, comme par exemple , dans la zone « Sélectionner un bouton à modifier » autour des boutons de la télécommande.
3. Sélectionner l'une des actions suivantes :
 - Modifier le texte, voir 5.2.5.3.3 *Modifier le texte*, page 55
 - Modifier icône, voir 5.2.5.3.4 *Modifier l'icône*, page 56

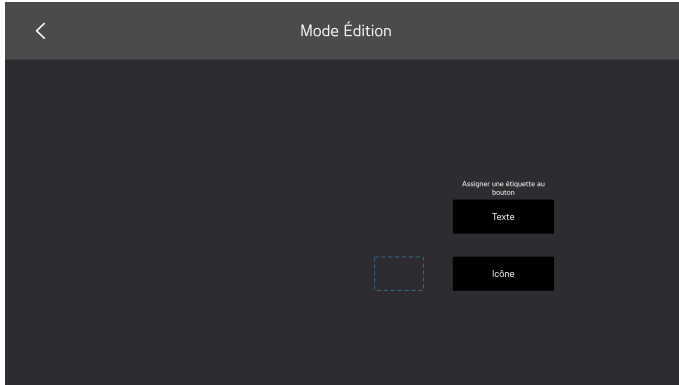

4. Sélectionnez l'icône  pour quitter le mode Edit (Modifier).

5.2.6 Informations

Vous trouverez toutes les informations relatives à la version pour le matériel et les différents logiciels sur la page d'informations.

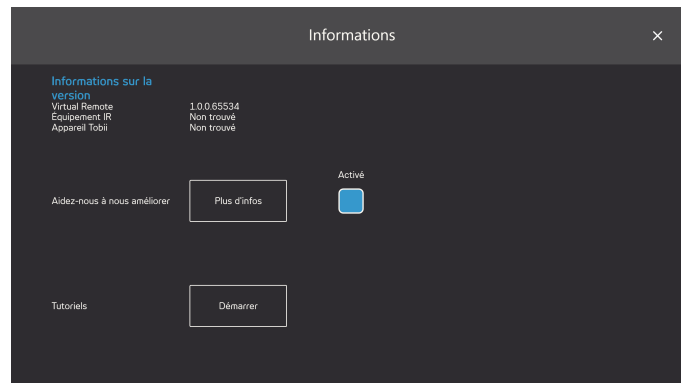

Aidez-nous à améliorer nos produits : Pour aider Tobii Dynavox à améliorer ses logiciels, mettez la case à cocher On/Off (Activé/Désactivé) sur **On** (Activé). Sélectionnez le bouton d'information En savoir plus afin d'ouvrir une page contenant des informations générales. Pour en savoir plus, voir *Figure 5.8 Collecte de données*, page 60.

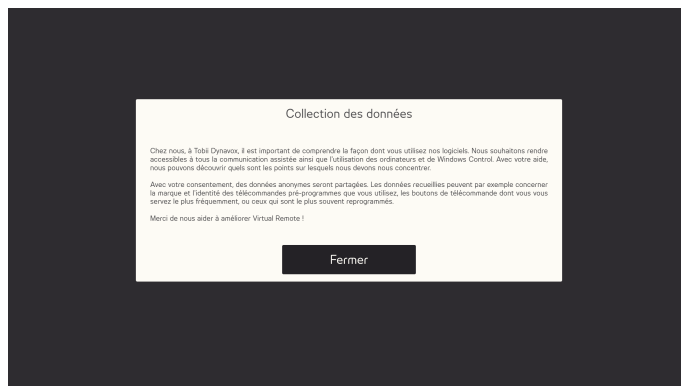


Figure 5.8 Collecte de données

Tutoriels: Vous pourrez également lancer le Tutoriel Virtual Remote en sélectionnant le bouton **Lancer**.

Tous droits réservés ©Tobii AB (publ). Les illustrations et spécifications ne s'appliquent pas nécessairement aux produits et services offerts sur chaque marché local. Les spécifications techniques peuvent être soumises à des modifications sans avertissement préalable. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Assistance pour votre appareil Tobii Dynavox

Obtenez de l'aide en ligne

Veuillez prendre connaissance de la page d'assistance spécifique de votre produit Tobii Dynavox. Cette page contient des informations à jour sur les problèmes connus, ainsi que des astuces sur l'utilisation du produit. Vous trouverez nos pages d'assistances sous le lien suivant : www.TobiiDynavox.com/support-training

Contactez votre représentant commercial ou revendeur

Pour les questions et problèmes concernant votre produit, contactez le représentant commercial Tobii Dynavox ou un revendeur autorisé. C'est lui qui connaît le mieux votre installation personnelle et est par conséquent le mieux à même de vous aider et vous former. Pour obtenir le détail des coordonnées, allez sur www.TobiiDynavox.com/contact