

Tobii Dynavox Windows Control Gebruikershandleiding

Incl. Virtual Remote 



Gebruikershandleiding Tobii Dynavox Windows Control

Versie 1.2

06/2018

Alle rechten voorbehouden.

Copyright © Tobii AB (publ)

Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke wijze dan ook (elektronisch, met gebruik van fotokopieën en opnamen of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De geclaimde copyright-bescherming omvat alle vormen van auteursrechtelijk beschermd materiaal en auteursrechtelijk beschermde informatie volgens de wet of hierin toegestaan, inclusief en niet beperkt tot materialen gegenereerd door de software-programma's die op het scherm worden weergegeven, zoals schermweergaven en menu's.

De informatie in dit document is eigendom van Tobii Dynavox. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tobii Dynavox is verboden.

Producten waarnaar in dit document wordt verwezen kunnen handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren. De uitgever en de auteur maken geen aanspraak op deze handelsmerken.

Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen in de voorbereiding van dit document, zijn de uitgever en de auteur niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen, noch voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie in dit document of uit het gebruik van programma's en eventuele bijbehorende broncode. De uitgever en de auteur kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van winst of enige andere commerciële schade die direct of indirect is veroorzaakt of wordt vermeend te zijn veroorzaakt door dit document.

De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Raadpleeg de website van Tobii Dynavox

www.TobiiDynavox.com voor bijgewerkte versies van dit document.

Contactgegevens:

Tobii Dynavox
Karlsrovagen 2D
182 53 Danderyd
Zweden

+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
VS

+1-800-344-1778

Inhoudsopgave

1	Over ons Tobii Dynavox Windows Control	5
1.1	Bedoeld gebruik.....	5
1.2	Systeemvereisten	5
2	Installeren, starten en licentiebeheer.....	6
2.1	Installeren Tobii Dynavox Windows Control	6
2.2	Licentiebeheer	6
2.2.1	Licentie activeren	6
2.2.1.1	Online activering	6
2.2.1.2	Offline activering	7
2.2.2	Licentie deactiveren.....	8
2.3	Eerste keer opstarten.....	9
3	Het gebruiken van Tobii Dynavox Windows Control	10
3.1	De Windows Control Controller	10
3.2	Trackstatus.....	11
3.3	De Windows Control Taakbalk.....	12
3.3.1	De Modi voor de Windows Control-Taakbalk	12
3.4	Gewone taken	13
3.4.1	Het gewone taakgedrag in de verschillende modi	14
3.5	“Klevende” Taken	15
3.5.1	Het “Klevende”-taakgedrag in de verschillende modi	15
3.6	Veilig Klikken	16
3.7	Snelkoppelingen	17
3.8	Selectiemethode — Blik of Schakelaar	19
3.8.1	Standaard actief met Blik & Schakelaar	19
3.8.2	Een taak activeren met een toetsenbordknop in plaats van een schakelaar.....	20
3.9	Bliktoetsenbord.....	20
3.9.1	Taakbalk Toetsenbord.....	21
3.9.2	Taakknoppen voor de taakbalk Toetsenbord	22
3.9.3	Woordvoorspelling.....	22
3.10	Windows Control in combinatie met Regionaal Gebaseerde Applicaties	23
3.11	Eye Detection Indicator	23
4	Instellingen Windows Control	24
4.1	Eye Tracker	25
4.1.1	Het tabblad Kalibratie	25
4.1.1.1	Profielen Beheren.....	25
4.1.1.2	Nieuw Profiel Aanmaken.....	26
4.1.1.3	Kalibratieresultaten	26
4.1.1.4	Kalibratie testen	27
4.1.1.5	Opnieuw Kalibreren	27
4.1.1.6	Type Kalibratie	27
4.1.2	Het tabblad Geavanceerd	29
4.1.2.1	Instellingen Beeldscherm	29
4.2	Algemene instellingen	30
4.2.1	Het tabblad Algemeen	30
4.2.2	De Info-tab.....	30
4.2.2.1	Licentiecode.....	31

4.3	Hulp & Gebruik	31
4.3.1	De Help Tab	31
4.3.2	Het tabblad Gebruik	32
4.4	Activatie & feedback	32
4.4.1	Het tabblad Activatie	32
4.4.1.1	Instellingen Blik	32
4.4.1.2	Instellingen Blik & Schakelaar	33
4.4.2	De Feedback tab	34
4.5	Taakbalk	35
4.5.1	De Taakbalk Tab	35
4.5.1.1	Taken	35
4.5.1.2	Links Klikken Maximaliseren	35
4.5.1.3	Grootte Taakbalk	36
4.5.1.4	Automatisch Verbergen	36
4.5.2	Het tabblad Selectie	36
4.5.2.1	Primaire Selectie	36
4.5.2.2	Secundaire Selectie	37
4.5.2.3	Tertiaire Selectie	37
4.5.3	Het tabblad Zoom	37
4.6	Toetsenbord	38
5	Virtual Remote	40
5.1	Virtual Remote Overzicht	40
5.1.1	Virtual Remote Menu	40
5.1.2	De Active Remote	41
5.1.3	De Knoppen	41
5.2	Het gebruiken van Tobii Dynavox Virtual Remote	42
5.2.1	Bij de eerste keer opstarten	43
5.2.2	Veranderen Actieve Afstandsbediening	43
5.2.3	Het gebruiken van knoppen op een afstandsbediening	43
5.2.4	Een afstandsbediening toevoegen	43
5.2.4.1	Een voorgeprogrammeerde afstandsbediening toevoegen	44
5.2.4.2	Een niet-voorgeprogrammeerde Afstandsbediening toevoegen.	48
5.2.5	Bewerkingsmodus	51
5.2.5.1	De naam van en afstandsbediening veranderen	51
5.2.5.2	Een Afstandsbediening verwijderen	52
5.2.5.3	Veranderingen doorvoeren aan een Bestaande Actieve Knop	53
5.2.5.4	Veranderingen doorvoeren aan een Bestaande, niet-geprogram- meerde Knop	56
5.2.5.5	Een nieuwe Knop toevoegen aan een lege plek	58
5.2.6	Informatie	59

1 Over ons Tobii Dynavox Windows Control

1.1 Bedoeld gebruik

Neem de volledige controle van uw computer over met enkel uw ogen, of met uw ogen en een schakelaar. U kunt alle types muis- en veegacties emuleren en typen in tekst typen met onze bekroonde software. We hebben ook slimme snelkoppelingen toegevoegd om het nog makkelijker te maken om toegang te krijgen tot alle delen van Windows!

1.2 Systeemvereisten

Component	Vereisten
Computer en processor	2,0 Gigahertz (GHz) of sneller, dual-core processor (aanbevolen minimum).
Geheugen (RAM)	4 gigabyte (GB) RAM (aanbevolen minimum).
Vaste schijf	450 megabyte (MB) beschikbaar
USB	USB 2.0
Besturingssysteem	64-bit versies van: • Windows 7 • Windows 8,1 • Windows 10
.NET-versie	4,5
Eye Tracker	Elke Eye Tracker van Tobii Dynavox van Tobii Tech die Tobii Eye Tracking Core Software ondersteunt.
Aanvullende vereisten en overwegingen	Om de licentie te kunnen activeren is een internetverbinding nodig
Tobii kernsoftware voor oogbesturing	Versie 2.8 of later
IR Afstandbediening	Elk apparaat dat is uitgerust met een HBR IR chip zoals: Tobii Dynavox EyeR, Indi, 1-Series I-110, of EyeMobile Plus

2 Installeren, starten en licentiebeheer

2.1 Installeren Tobii Dynavox Windows Control



Als het al geïnstalleerd is, moet Tobii Gaze Interaction Software worden verwijderd voordat u Windows Control installeert.

Windows Control kan worden gedownload van www.TobiiDynavox.com.

De installatiewizard installeert de volgende toepassingen:

- Tobii Dynavox Windows Control
- Tobii Dynavox Virtual Remote

Volg de instructies op het scherm om Windows Control te installeren.

2.2 Licentiebeheer


2.2.1 Licentie activeren



De Windows Control kan op maximaal drie (3) computers / apparaten tegelijk functioneren met dezelfde licentie. Om de Windows Control op meer dan drie (3) computers / apparaten te gebruiken moet de Windows Control eerst gedeactiveerd worden op een (1) van de andere computers / apparaten.

Wanneer u Windows Control aanschaft ontvangt u een Licence Activation Key ontvangen voor de software in de bestellingbevestiging e-mail.

Wanneer de Windows Control voor het eerst wordt uitgevoerd zal de **License Manager** starten.

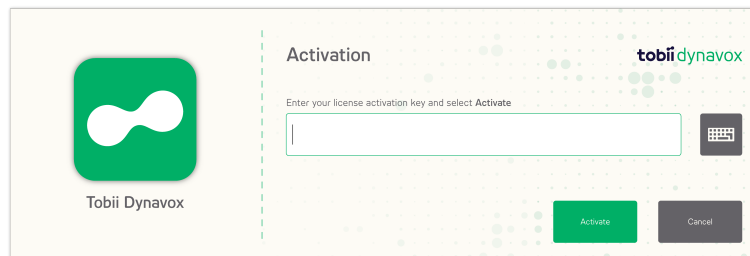

In het Licentie dialoogvenster wordt de actuele softwarepictogram weergegeven voor de licentie die wordt beheerd.


Uw **License Activation Key** kan worden gevonden in de bestellingbevestigingse-mail.

2.2.1.1 Online activering

Voor een computer / apparaat dat is verbonden met het internet.

1. Controleer of de computer/het apparaat is verbonden met internet.
2. Voer de **License activation key**.

3. Selecteer de **Activeren**-knop.

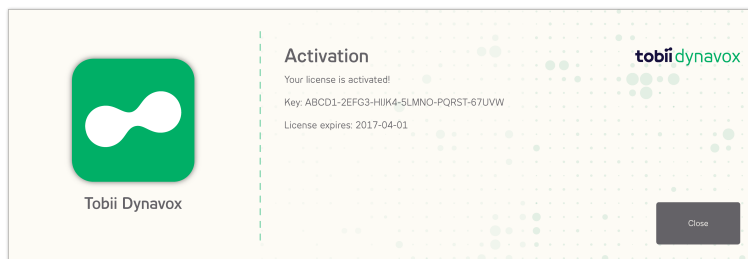


In het Licentie dialoogvenster wordt de actuele softwarepictogram weergegeven voor de licentie die wordt beheerd.

4. Selecteer de **Sluiten**-knop.


2.2.1.2 Offline activering


Voor een computer / apparaat dat niet is verbonden met het internet.


1. Voer de **License activation key**.
2. Selecteer de **Activeren**-knop.

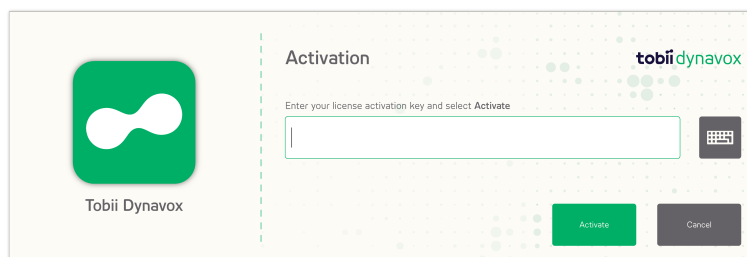

3. Selecteer het  (info) pictogram.

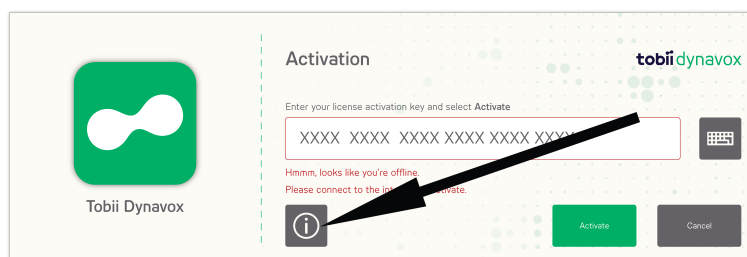

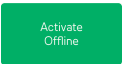
4. Selecteer de  (Offline Activeren) knop.

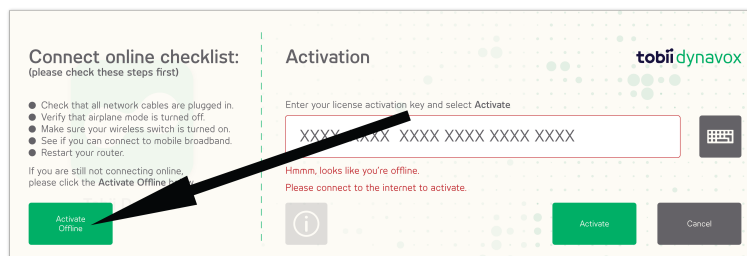


5. Voer één van de volgende acties uit:
 - Op een apparaat met internetverbinding ga naar: <https://www.tobiidynavox.com/activation-key/> en volg de instructies online.

- Neem contact op met de Tobii Dynavox klantenservice of uw lokale detailhandel.


U heeft de computernaam nodig die in dit dialoogvenster wordt weergegeven:

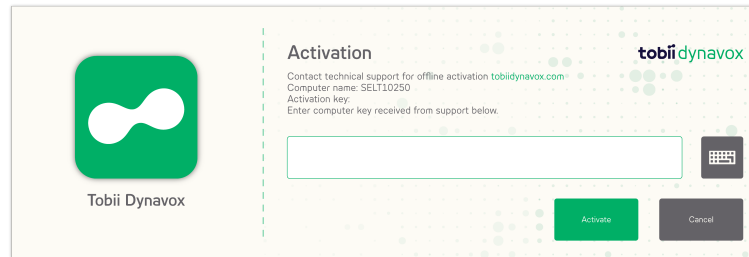

6. Voer de **Activeringssleutel** in die verstrekt wordt via één van de bovenstaande opties.

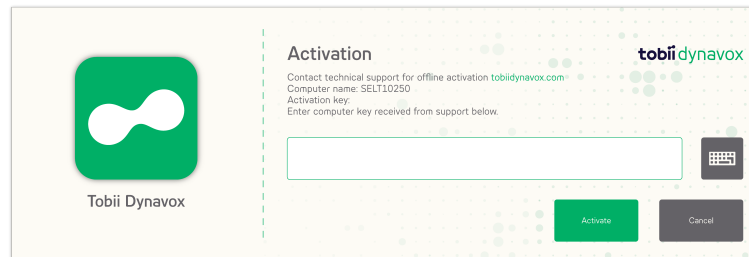

7. Selecteer de **Activeren**-knop.

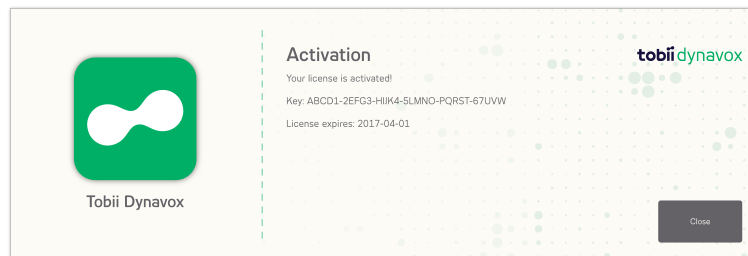

8. Selecteer de **Sluiten**-knop.

2.2.2 Licentie deactiveren

Om Windows Control te deactiveren, volg deze stappen.

1. Controleer of de computer/het apparaat is verbonden met internet.
2. Start Windows Control.
3. Selecteer de  (INSTELLINGEN) knop.
4. Selecteer de  (Algemene Instellingen) knop.
5. Selecteer de **Info**-tab.
6. Selecteer de **Licentiesleutel**-knop.

7. Selecteer de **Deactiveren**-knop.



In het Licentie dialoogvenster wordt de actuele softwarepictogram weergegeven voor de licentie die wordt beheerd.

8. Selecteer:
- **Ja** — om de licentie op dit apparaat te deactiveren.
 - **Nee** — om te annuleren.

2.3 Eerste keer opstarten

Wanneer Windows Control voor het eerst wordt gelanceerd wordt zal een Configuratiegids de gebruiker begeleiden via de opstartconfiguratie van Windows Control. De stappen in de gids zijn:

- Stel het beeldscherm in. Voor meer informatie raadpleegt u *4.1.2.1 Instellingen Beeldscherm, pagina 29*.
- Maak een nieuw profiel aan. Voor meer informatie raadpleegt u *4.1.1.2 Nieuw Profiel Aanmaken*.
- Test kalibratie, Voor meer informatie, zie *4.1.1.4 Kalibratie testen*


3 Het gebruiken van Tobii Dynavox Windows Control

Tobii Dynavox Windows Control maakt het mogelijk voor de gebruiker om de standaard Windows omgeving te bedienen via een selectiemethode in twee stappen, waardoor de kans op ongewenst klikken afneemt. Dit voorkomt ook dat uw blik de muis-cursor volgt in plaats van bedient (er zit geen zwevende muis-cursor in Windows Control).

1. De eerste stap is het selecteren van de gewenste taak in de vastgezette taakbalk door ernaar te kijken.
2. De tweede stap is het kijken naar het gewenste deel van het scherm (of pictogram op het scherm) waar u de taak wilt uitvoeren. Er wordt een automatische zoomfunctie ingeschakeld, die eindigt met het selecteren van het pictogram of het uitvoeren van de taak.

 Alle functies in Windows Control zijn voorbereid op Aanraken en de Muis, wat het gemakkelijker maakt voor een zorgverlener of assistent om de gebruiker te helpen indien nodig. Het is hiermee veel eenvoudiger voor de zorgverlener of assistent om een functie/taak te selecteren of de instellingen voor de gebruiker te wijzigen.

3.1 De Windows Control Controller

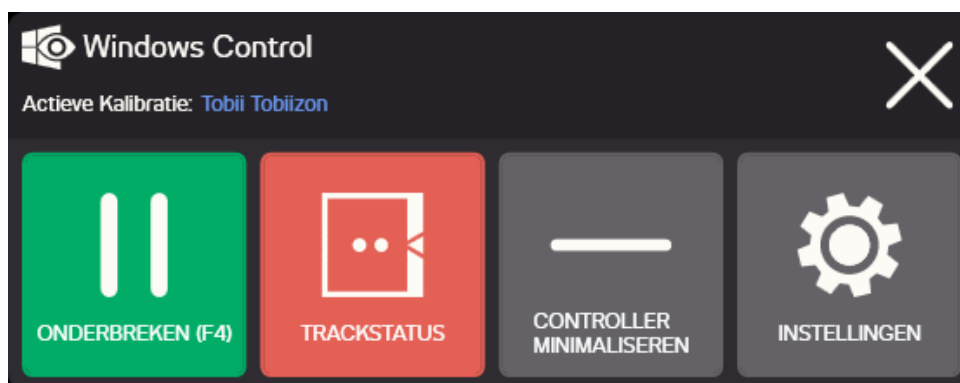


Afbeelding 3.1 De Windows Control Controller

Knop	Actie	Beschrijving
	PAUZE (F4)	Actie die Windows Control onderbreekt.  De Pauzefunctie activeren zal ervoor zorgen dat de knop wordt omgezet en de Startknop wordt getoond.  De F4 toets op het toetsenbord kan gebruikt worden om de taak te activeren.
	START (F4)	Actie die Windows Control start.  De Startfunctie activeren zal ervoor zorgen dat de knop wordt omgezet en de Pauzeknop wordt getoond.  De F4 toets op het toetsenbord kan gebruikt worden om de taak te activeren.
	TRACKSTATUS	Actie die het Track Status venster zal tonen. Gebruik dit om te controleren of de gebruiker goed voor het scherm zit. Voor meer informatie raadpleegt u 3.2 <i>Trackstatus</i> , pagina 11
	MINIMALISEER CONTROLLER	Actie die het venster het controller venster zal minimaliseren.

Knop	Actie	Beschrijving
	INSTELLINGEN	Actie die de Windows Control Instellingen opent. Voor meer informatie raadpleegt u 4 <i>Instellingen Windows Control</i> , pagina 24.
	Sluiten	Actie die Windows Control afsluit.

3.2 Trackstatus

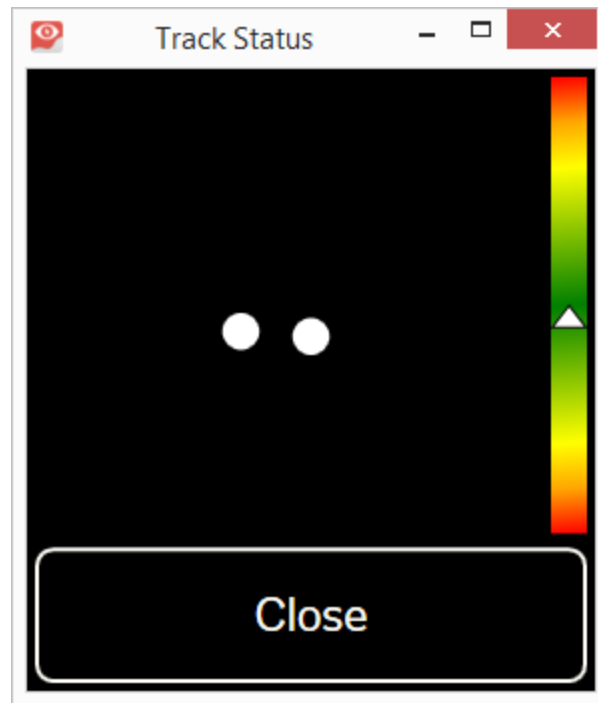

De **Track Status**-functie wordt gebruikt om te controleren of de gebruiker goed gepositioneerd is voor de eye tracker.

- De twee (2) witte stippen - De ogen van de gebruikers en hoe ze ten opzichte van het scherm staan. Voor een optimale positie moeten de witte stippen in het midden van het zwarte gebied liggen.
- De balk met de volledige kleur aan de rechterkant met de witte pijl - Hoe ver of dichtbij de gebruiker zich van het scherm bevindt.
 - Als de witte pijl in het midden van het groene gedeelte van de balk staat, zit de gebruiker op de optimale afstand van het scherm.
 - Als de pijl op het onderste gedeelte van de balk staat - laat de gebruiker dichterbij zitten.
 - Als de pijl op het bovenste gedeelte van de balk staat - laat de gebruiker verder weg zitten.

1. Open de Windows Control Controller.

2. Selecteer de  (Trackstatus) knop.

3. Positioneer de gebruiker.

4. Selecteer de knop **Sluiten** wanneer u klaar bent.



Deze knop is gebaseerd op het gebied van de ogen dus kijk gewoon naar de knop om het te activeren.

3.3 De Windows Control Taakbalk

Boven aan de Windows Control taakbalk bevindt zich een Besturingsstatusvenster. Hiermee kunt u controleren of de Eye Tracker uw ogen herkent en of u goed voor het apparaat zit.

De Taakknoppen in de Windows Control-taakbalk kunnen zich in drie verschillende modi bevinden, zoals getoond in *Afbeelding 3.2 De Modi voor de Windows Control-Taakbalk, pagina 13*.



De taakbalk kan worden verborgen / weergegeven met de "F2" -toets  op een gewoon toetsenbord (niet met het Windows Control-toetsenbord).

3.3.1 De Modi voor de Windows Control-Taakbalk



De drie verschillende modi zijn geldig voor zowel de gewone taken, zie 3.4 *Gewone taken* en voor de Sticky Tasks, zie 3.5 *"Klevende" Taken*.



Veilig Klikken-taken hebben geen secundaire selectiemodus.

- **Normaal (Niet geselecteerd)** - Er is geen Taakknop voor Windows Control gekozen.
- **Primaire selectie (wit)** - De gemarkeerde Taakknop is geselecteerd en de taak wordt uitgevoerd na het automatisch zoomen wanneer de gebruiker naar het gewenste deel van het scherm of het pictogram op het scherm kijkt. Als de selectiemethode is ingesteld op Schakelaar in het Windows Control-Instellingen Dialoog, blijft de gekozen Taakknop actief na het uitvoeren van de taak.
- **Secundaire selectie (Blauw/wit)** - Hetzelfde als **Primaire selectie**, maar met een hogere precisie. **Secundaire precisie** betekent dat er sterker wordt ingezoomd vóór het uitvoeren van de taak, waardoor het gewenste deel van het scherm groter wordt en het selecteren makkelijker gaat. Activeer deze modus door uw blik te laten rusten op de taakknop totdat de kleur verandert zoals hieronder getoond.




Niet geldig voor de taken Snelkoppelingen en Instellingen.

- **Tertiaire Selectie (popout menu)** — Voor sommige taken op de Taakbalk is er een popout menu beschikbaar met de corresponderende Klevende Taak, zie 3.5 *"Klevende" Taken, pagina 15* en Veilige Klik-taak, zie 3.6 *Veilig Klikken, pagina 16*. Ga naar de Klevende- of Veilige Klik-taak door uw blik te richten op de Taakknop tot het popout menu is geactiveerd volgens *Afbeelding 3.2 De Modi voor de Windows Control-Taakbalk, pagina 13* en selecteer de Klevende- of Veilige Klik-taak om de gewone taak te vervangen door de Klevende of Veilige Klik-taak op de Taakbalk. De Klevende of Veilige Klik-taak blijft op de taakbalk staan en de gewone taak is te vinden op de Tertiaire Selectie. Herhaal de procedure om de Klevende of Veilige Klik-taak te vervangen door de gewone taak op de Taakbalk.



Niet geldig voor de taken Snelkoppelingen en Instellingen.


Als u wilt configureren welke modi er voor de gebruiker moeten worden gebruikt, gaat u naar: 4.5.2 *Het tabblad Selectie, pagina 36*. Alleen de Primaire modus is standaard ingeschakeld.

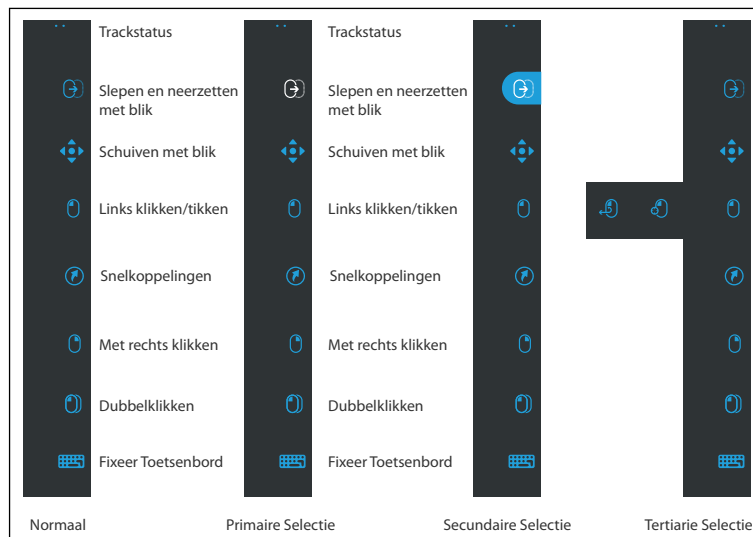

Afbeelding 3.2 De Modi voor de Windows Control-Taakbalk

3.4 Gewone taken

Pictogram	Taak / Actie	Beschrijving
	Cursor verplaatsen	Taak waarmee u de cursor kunt verplaatsen met uw blik. Zal een zoomactie uitvoeren wanneer het wordt uitgevoerd.
	Slepen en neerzetten met blik	Taak waarmee u twee 'klikken' uitvoert, waarbij de eerste klik de beginpositie voor het slepen en de tweede klik de neerzetpositie aan-geeft (om objecten te verplaatsen of gebieden te selecteren). • Selecteer de taak. • Kijk naar het object dat u wilt verplaatsen of naar het beginpunt voor de gebiedselectie. • Voert de Windows Control (eerste "klik") uit met Blik of Schakelaar. • Kijk onmiddellijk naar de neerzetpositie voor het object of het eindpunt voor de gebiedselectie. • Voer de tweede 'klik' uit met Blik of Schakelaar. Zal een zoomactie uitvoeren wanneer het wordt uitgevoerd.

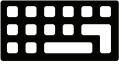Pictogram	Taak / Actie	Beschrijving
	Schuiven met blik	Taak die, indien uitgevoerd in een venster waarin kan worden geschoven, schuiven met uw blik binnen de pagina mogelijk maakt. • Selecteer de taak. • Kijk naar een gebied waarin kan worden geschoven en laat uw blik erop rusten. Het pictogram Schuiven met blik verschijnt op de bekeken plaats. • Kijk boven het pictogram om omhoog te schuiven. • Kijk onder het pictogram om omlaag te schuiven. • Kijk links van het pictogram om naar links te schuiven. • Kijk rechts van het pictogram om naar rechts te schuiven. • Kijk tijdens het schuiven opnieuw naar het pictogram (op het scherm, niet op de taakbalk) om te wisselen tussen omhoog/omlaag of links/rechts. • Kijk opnieuw naar de Windows Control-taakbalk (of weg van het scherm) om het schuiven te beëindigen.  Gebruik de taak Schuiven met blik om verticaal en horizontaal te schuiven in Modern UI-apps en in het Modern UI Windows-startscherm.
	Links klikken/tikken	Taak waarmee u eenmaal met de linkermuisknop klikt of, voor apparaten met aanraakbediening, eenmaal met de vinger tikt. In de Schakelaarmodus is Links klikken / tikken standaard ingeschakeld en "klevend" (zie 3.8.1 <i>Standaard actief met Blik & Schakelaar, pagina 19</i>). Zal een zoomactie uitvoeren wanneer het wordt uitgevoerd.
	Snelkoppelingen	Taak die opent: • 3 kolommen van voorgedefinieerde snelkoppelingen. • Iets andere zijn beschikbaar voor Windows 7, 8.1 en 10. Voor meer informatie raadpleegt u 3.7 <i>Snelkoppelingen, pagina 17</i>.
	Met rechts klikken	Taak waarmee u eenmaal met de rechtermuisknop klikt. Zal een zoomactie uitvoeren wanneer het wordt uitgevoerd.
	Dubbelklikken	Taak waarmee u dubbelklikt. Wanneer de activeringsmethode op Schakelaar staat, is de Dubbelklik een "Klevende Taak" (zie 3.8.1 <i>Standaard actief met Blik & Schakelaar, pagina 19</i>). Zal een zoomactie uitvoeren wanneer het wordt uitgevoerd.
	Bliktoetsenbord	Taak waarmee een toetsenbord op het scherm voor typen met uw blik wordt geopend. Voor meer informatie raadpleegt u 3.9 <i>Bliktoetsenbord, pagina 20</i>.
	Instellingen	Taak die de Windows Control-Instellingen opent. Voor meer informatie raadpleegt u 4 <i>Instellingen Windows Control, pagina 24</i>.

3.4.1 Het gewone taakgedrag in de verschillende modi

Taak	Primaire	Secundaire	Tertiair een
Cursor verplaatsen	Normale zoom	Diepe zoom	Schakel naar "Klevende" Cursor Verplaatsing
Slepen en neerzetten	Normale zoom	Diepe zoom	Schakel over naar Klevend Slepen & Neerzetten of Veilig Slepen & Neerzetten

Taak	Primaire	Secundaire	Tertiair een
Schuiven met blik	Normale zoom	Diepe zoom	Niet van toepassing
Links klikken/tikken	Normale zoom	Diepe zoom	Schakel over naar Klevend Links Klikken / Tikken of Veilig Links Klikken / Tikken
Snelkoppelingen	Geen Zoom	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Met rechts klikken	Normale zoom	Diepe zoom	Schakel over naar Klevend Rechts Klikken of Veilig Rechts Klikken
Dubbelklikken	Normale zoom	Diepe zoom	Schakel over naar Klevend Dubbelklikken of Veilig Dubbelklikken
Bliktoetsenbord	Voor meer informatie raadpleegt u 3.9 <i>Bliktoetsenbord, pagina 20</i> .		
Instellingen	Geen Zoom	Niet van toepassing	Niet van toepassing
a. Voor meer informatie over de verschillende "Klevende" Taken raadpleegt u 3.5 <i>"Klevende" Taken, pagina 15</i> .			

3.5 "Klevende" Taken


Pictogram	Taak / Actie	Beschrijving
	Sticky Links klikken/tikken	"Klevende" taken zorgen voor continue activiteiten van een taak zonder de taak steeds weer via de taakbalk te moeten selecteren. Selecteer éénmaal de "klevende" taak van de taakbalk en de cursor zal uw blik volgen. Een fixatie van uw blik op het scherm zal de bijbehorende actie op die locatie uitvoeren. De taak blijft actief nadat de actie is uitgevoerd, waardoor het niet opnieuw via de taakbalk geactiveerd hoeft te worden. Om de "klevende" taak te stoppen, kijkt u gewoon naar de taak op de taakbalk totdat het niet meer wordt gemarkeerd.  Voor "Sticky Move Cursor" is de secundaire selectiemodus niet beschikbaar, omdat met deze taak de cursor alleen op het scherm wordt verplaatst.
	"Klevende" Dubbel Klik	
	"Klevend" Slepen en Neerzetten	
	"Klevende" Cursor Verplaatsing	
	"Klevende" Rechts Klik	

3.5.1 Het "Klevende"-taakgedrag in de verschillende modi

Taak / Actie	Primaire	Secundaire	Tertiair een
Sticky Links klikken/tikken	Normale zoom	Diepe zoom	Schakel over naar Links Klikken / Tikken of Veilig Links Klikken / Tikken
"Klevende" Dubbel Klik	Normale zoom	Diepe zoom	Schakel over naar Dubbelklikken of Veilig Dubbelklikken
"Klevend" Slepen en Neerzetten	Normale zoom	Diepe zoom	Schakel over naar Slepen & Neerzetten of Veilig Slepen & Neerzetten
"Klevende" Cursor Verplaatsing	Geen Zoom	Niet van toepassing	Schakel naar Cursor Verplaatsing
"Klevende" Rechts Klik	Normale zoom	Diepe zoom	Schakel over naar Rechts Klikken of Veilig Rechts Klikken
a. Voor meer informatie over de verschillende "Klevende" Taken raadpleegt u 3.4 <i>Gewone taken, pagina 13</i> .			

3.6 Veilig Klikken

Pictogram	Taak / Actie	Beschrijving
	Veilig Links Klikken / Tikken	Met Veilig Klikken-taken kunt u uw bankzaken enz. veilig uitvoeren zonder het risico van missers vanwege de tweestaps-actie. Eerst zoomen en vervolgens selecteren om uit te voeren. Selecteer de Veilig Klikken-taak van de Tertiaire selectie-Taakbalk. Een fixatie van uw blik op het scherm zal de bijbehorende actie op die locatie uitvoeren. De taak voert een zoomactie uit in een nieuw venster, waar de fixatie van de blik wordt getoond met een  pictogram in het venster, zie <i>Afbeelding 3.3 Uitvoeren Veilig Klikken, pagina 16</i> . Om Veilig Klikken uit te voeren op het  centrum, selecteert u het  - pictogram.
	Veilig Dubbel Klik	
	Veilig Rechts Klik	
	Veilig Slepen en Neerzetten	
		 Veilig Klikken-taken zijn beschikbaar voor Links Klikken, Rechts Klikken, Dubbelklikken en Slepen & Neerzetten.

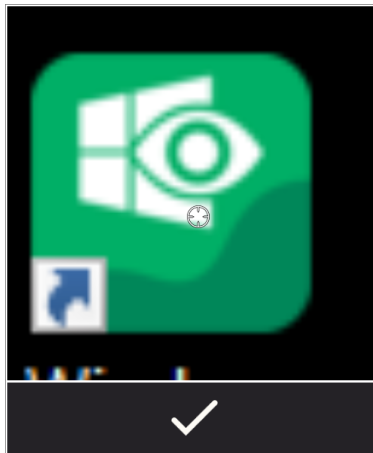

Afbeelding 3.3 Uitvoeren Veilig Klikken

3.7 Snelkoppelingen

Windows 8,1	Windows 10



Als een snelkoppelfunctie is gemarkeerd met het Pictogram, blijft het snelkoppelvingsvenster open na het activeren van de functie, waardoor er meerdere acties mogelijk zijn.



Sneltoets	Actie	Win 8.1	Win 10	Beschrijving
	Venster Maximaliseren	x	x	Snelkoppeling die het actieve venster / app / software maximaliseert.
	Terug	x	x	Snelkoppeling die de gebruiker een pagina terug-brengt in de browser of andere software die dezelfde functionaliteit ingebouwd heeft.
	Ongedaan maken	x	x	Snelkoppeling die het laatste commando ongedaan maakt.
	Kopiëren	x	x	Snelkoppeling die de actieve selectie zal kopiëren.
	Plakken	x	x	Snelkoppeling die de selectie die ervoor was gekopieerd zal plakken.
	Starten	x	x	Functie waarmee het Startmenu van Windows wordt opgeroepen.

Sneltoets	Actie	Win 8.1	Win 10	Beschrijving
	Taakbalk verbergen	x	x	Snelkoppeling waarmee de taakbalk wordt verborgen voor de volledige schermweergave. U kunt de taakbalk opnieuw weergeven door  of  te selecteren, afhankelijk van de zijde waar de taakbalk zich bevindt.
	Venster Minimaliseren	x	x	Snelkoppeling die het actieve venster / app / software minimaliseert.
	Browser	x	x	Snelkoppeling die de standaard webbrowser opstart.
	Volume omhoog	x	x	Snelkoppeling die het volume verhoogt.
	Gedempt	x	x	Snelkoppeling die de speakers uitschakelt.
	Volume omlaag	x	x	Snelkoppeling die het volume verlaagt.
 	Zoeken Cortana	x	x	Snelkoppeling die de zoekfunctie opent in Windows. Snelkoppeling waarmee Cortana wordt geopend. Cortana is uw slimme persoonlijke assistent. Cortana kan zoeken op internet, dingen op uw pc terugvinden, uw agenda bijhouden en meer.
	Schakelkant	x	x	Snelkoppeling waarmee de taakbalk van rechts/links wordt verplaatst.
	Venster sluiten	x	x	Snelkoppeling die het actieve venster / app / software afsluit.
	Spraakherkenning	x	x	Snelkoppeling die Windows Spraakherkenning start, of Dragon Spraakherkenning als het geïnstalleerd is.
	Virtual Remote	x	x	Snelkoppeling waarmee de toepassing "Virtuele Afstandsbediening" wordt geopend. Voor meer informatie raadpleegt u 5 <i>Virtual Remote</i> , pagina 40.
	Bureaublad	x	x	Snelkoppeling die het bureaublad naar voren brengt.
 	Charms Actiecentrum	x	x	Snelkoppeling waarmee het Charms menu wordt geopend. Snelkoppeling waarmee het Actiecentrum wordt geopend.
	Toepassingswisselaar	x		Snelkoppeling waarmee u door alle actieve Modern UI apps en het bureaublad loopt.  Alle programma's die actief zijn op het bureaublad zijn hier niet zichtbaar. Ze zijn alleen zichtbaar vanaf het bureaublad.

Sneltoets	Actie	Win 8.1	Win 10	Beschrijving
	Taakweergave		x	Snelkoppeling waarmee de taakweergave wordt geopend, waarop alle actieve Modern UI apps zichtbaar zijn.  De taakweergave wordt niet weergegeven als er slechts één of geen enkele app is geopend.
	Snelkoppelingen Afsluiten	x	x	Snelkoppeling die het menu Snelkoppelingen afsluit.

3.8 Selectiemethode — Blick of Schakelaar

Er zijn twee methoden om de gekozen taak uit te voeren.

- **Blik** - gebruik de ogen voor zowel het controleren als het uitvoeren van de geselecteerde taak.
- **Blik & Schakelaar** - gebruik de ogen om te controleren en een mechanische knop die aangesloten is op het apparaat om de geselecteerde taak uit te voeren.

De voorkeursmethode wordt ingesteld in het Windows Control Dialoogvenster Instellingen, zie 4 *Instellingen Windows Control*, pagina 24.

Voordat u een selectie uitvoert, moet u de uit te voeren taak selecteren in de taakbalk. Kijk naar de gekozen taak totdat deze wordt gemarkeerd als 'Primaire', 'Secundaire selectie' of 'Tertiaire Selectie'.

- **Blik** - Om de gekozen taak uit te voeren, laat u uw blik rusten op het gewenste deel van het scherm (of het pictogram op het scherm) waar u de taak wilt uitvoeren. Er wordt een automatische zoomfunctie ingeschakeld, die eindigt met het selecteren van het pictogram of het uitvoeren van de taak.
- **Blik & Schakelaar** - Twee verschillende uitvoeringsmodi.
 - **Enkelvoudige activatie van de Schakelaar** - De zoomfunctie wordt op dezelfde manier uitgevoerd als bij de methode Blik en volgens de instellingen die zijn gekozen in het Windows Control dialoogvenster Instellingen, zie 4 *Instellingen Windows Control*, pagina 24.
 - **Schakelaar activeren en ingedrukt houden** - De zoomfunctie zoomt continu in en eindigt pas na het loslaten / deactiveren van de schakelaar.



Als u de Blik-methode gebruikt, moet u terugkijken naar de taakbalk om een nieuwe taak te selecteren **voor** elke taakuitvoering.



Wanneer zoomdiepte is ingesteld op Oppervlakkig in Windows Control Instellingen - wordt er niet ingezoomd. Voor meer informatie raadpleegt u 4 *Instellingen Windows Control*, pagina 24.

3.8.1 Standaard actief met Blick & Schakelaar

Wanneer u de methode Blick & Schakelaar gebruikt, wordt gebruik gemaakt van een functie die "standaard actief" genoemd wordt.

Als een taak "standaard actief" wordt, betekent dit dat u niet naar de taakbalk hoeft terug te kijken als u de uitvoering van een geselecteerde taak wilt herhalen, maar alleen als u een andere taak wilt uitvoeren.

Wanneer u de methode Blick & Schakelaar gebruikt, is de taak Links Klikken / Tikken altijd standaard actief. Dit betekent dat Links klikken/tikken altijd is ingeschakeld en altijd actief wordt bij het activeren van de schakelaar, als er niets anders is geselecteerd. Als u een andere taak selecteert, wordt deze slechts één keer actief (voor één selectie). Daarna zal Windows Control automatisch standaard teruggaan naar Links Klikken / Tikken voor de volgende selecties.

De uitzondering hierop is de Dubbelklik-taak; wanneer het wordt geselecteerd bij het gebruik van de Blick & Schakelaar-modus, wordt het ook standaard actief.

Op deze manier kunt u bijvoorbeeld snel/doorlopend surfen op internet door de Schakelaar en dus de taak Links klikken/tikken eenmalig te activeren en vervolgens herhaaldelijk iets te selecteren, zonder dat u de taak Links klikken/tikken meermaals opnieuw hoeft te kiezen.

3.8.2 Een taak activeren met een toetsenbordknop in plaats van een schakelaar



Selectie van de "toetsenbordknop F12", op een aangesloten toetsenbord, activeert een Taakselectie. Deze kan op dezelfde manier worden gebruikt als een aangesloten schakelaar. Voor meer informatie over schakelaars raadpleegt u 3.8 Selectiemethode — *Blik of Schakelaar*, pagina 19.

3.9 Bliktoetsenbord

Door de knop Bliktoetsenbord te selecteren in de taakbalk, wordt het bliktoetsenbord als schermtoetsenbord geopend. Het Blik-toetsenbord zal dan op de onderkant van het scherm worden geplaatst wanneer het opent. Het is mogelijk om het te ver-



plaatsen met behulp van de (Beweeg Toetsenbord Omhoog / Omlaag)-knop op de Taakbalk van het toetsenbord.

Samen met het bliktoetsenbord wordt ook de taakbalk Toetsenbord geopend. Voor meer informatie raadpleegt u 3.9.1 Taakbalk Toetsenbord, pagina 21.


Het bliktoetsenbord bestaat uit vier toetsenbordpagina's die na elkaar worden weergegeven. De gebruiker kan eenvoudig tussen de verschillende toetsenbordpagina's schakelen met behulp van de knoppen voor volgende pagina die zich helemaal links en rechts op alle pagina's van het bliktoetsenbord bevinden.

De toets op het toetsenbord waar de gebruiker naar kijkt, wordt aangegeven door een licht kader rond het teken/de functie




van de toets.


Dit zijn de vier toetsenbordpagina's:

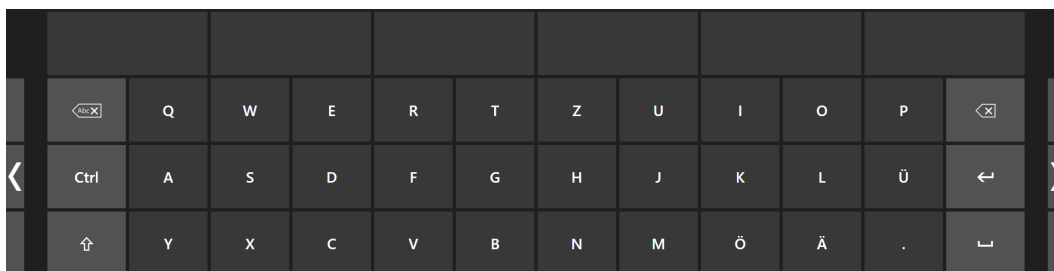

Afbeelding 3.4 Standaard opstartpagina

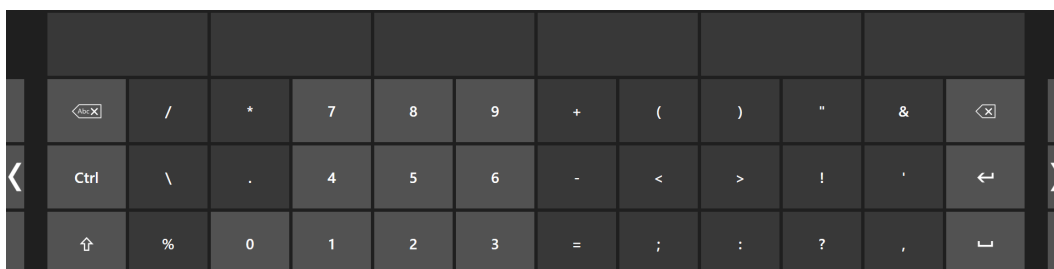

Afbeelding 3.5 Eerste pagina naar rechts

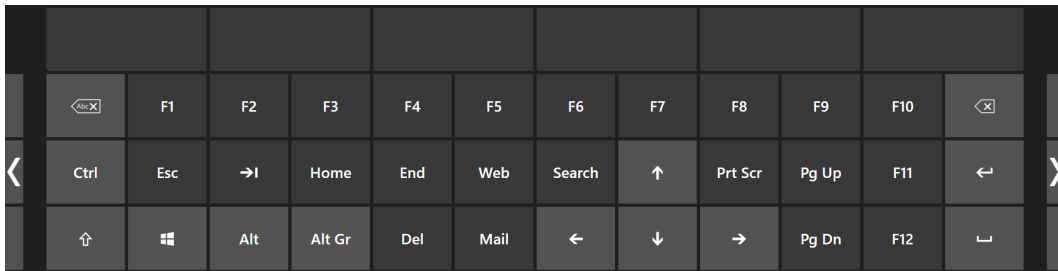

Afbeelding 3.6 Tweede pagina naar rechts of links



Afbeelding 3.7 Eerste pagina naar links

Om de taal van het toetsenbord te wijzigen en andere instellingen voor het toetsenbord, zie *4 Instellingen Windows Control, pagina 24*.



Na selectie van de Shift-, Ctrl-, Alt-, Win- en Alt Gr-toetsen blijven deze 'kleven'. Zo blijven deze toetsen geselecteerd tot de gebruiker een nieuwe toets op het toetsenbord selecteert. De toetsen blijven kleven als de volgende geselecteerde toets ook een klevende toets is.



Een letter met accent typen:


1. Selecteer het accent
2. Selecteer het teken
3. Het teken wordt weergegeven met het geselecteerde accent.

3.9.1 Taakbalk Toetsenbord

Boven aan de Taakbalk van het Toetsenbord bevindt zich een Besturingsstatusvenster, zoals in de Windows Control Taakbalk. Hiermee kunt u controleren of de Eye Tracker uw ogen herkent en of u goed voor het apparaat zit.

De taakknoppen in de Toetsenbord-taakbalk kunnen zich in drie verschillende modi bevinden, zoals getoond in *Afbeelding 3.8 Modi voor de Toetsenbord-taakbalk, pagina 21*.

Voor meer informatie over de verschillende modi raadpleegt u *3.3.1 De Modi voor de Windows Control-Taakbalk, pagina 12*.

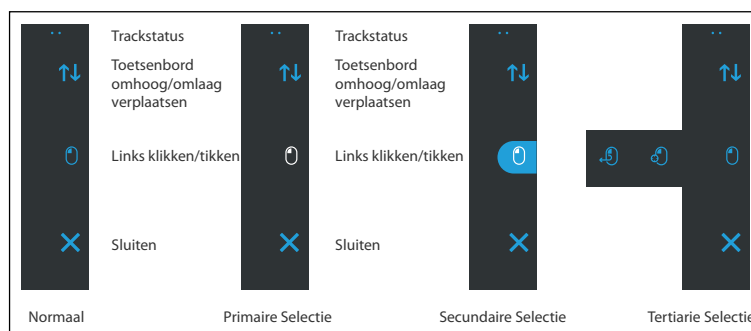

Afbeelding 3.8 Modi voor de Toetsenbord-taakbalk

 De Tertiaire Selectie is alleen beschikbaar voor de taak Links Klikken in de Taakbalk van het Toetsenbord.


 In Windows 8.1 en 10 zullen de kleuren op de taakbalk zich aanpassen aan de Windows-instellingen.

3.9.2 Taakknoppen voor de taakbalk Toetsenbord

Pictogram	Taak / Actie	Beschrijving
	Toetsenbord omhoog/omlaag verplaatsen	Taak waarmee het toetsenbord boven of onder aan het scherm wordt geplaatst.  Om de functie te activeren, blijft u zich op de knop fixeren (dwell).
	Links klikken/tikken	Taak waarmee u eenmaal met de linkermuisknop klikt of, voor apparaten met aanraakbediening, eenmaal met de vinger tikt.
	Sluiten	Taak waarmee het toetsenbord wordt gesloten.

3.9.3 Woordvoorspelling


De engine voor woordvoorspelling die in Windows Control wordt gebruikt, is afkomstig van SwiftKey en wordt veel gebruikt op tablets en smartphones. SwiftKey maakt gebruik van verschillende technologieën voor kunstmatige intelligentie, waarmee het volgende woord dat de gebruiker wil typen, kan worden voorspeld. SwiftKey leert van eerdere teksten die de gebruiker heeft geschreven en biedt voorspellingen op basis van de momenteel ingevoerde tekst en eerder ingevoerde tekst. De taal voor woordvoorspelling varieert naargelang de instelling van Toetsenbordtaal.

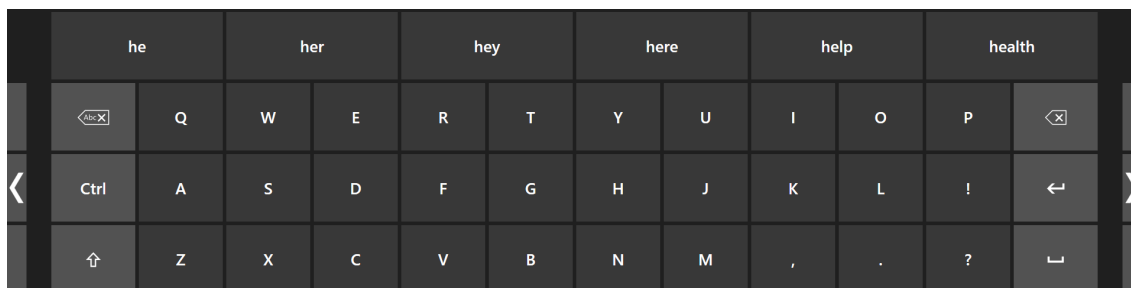

Afbeelding 3.9 Toetsenbord met woordvoorspelling geactiveerd

Wanneer woordvoorspelling wordt gebruikt (raadpleeg *4 Instellingen Windows Control, pagina 24* voor meer informatie over het activeren/deactiveren van Woordvoorspelling), worden er zes (6) vakjes boven het toetsenbord weergegeven. Het meest linkse vakje geeft het meest waarschijnlijke voorspelde woord weer en de overige vijf (5) vakjes bevatten elk één voorspeld woord. U kunt een voorspeld woord selecteren door het betreffende vakje te selecteren. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, typt u gewoon verder en hopelijk wordt het betreffende woord na invoer van het volgende teken weergegeven.

 Als u Woordvoorspelling gebruikt en een woord met een accent, zoals café, wilt typen, is het vaak makkelijker om het accent over te laten aan Woordvoorspelling. Typ gewoon "cafe" en een van de suggesties is dan "café".

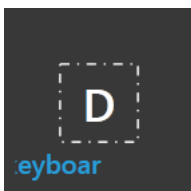

Terwijl de gebruiker typt, worden de laatste 5-10 tekens blauw weergegeven op de aangegeven/gemarkeerde toets. Voor meer informatie raadpleegt u *4 Instellingen Windows Control, pagina 24*. Met behulp van deze functie kan de gebruiker eenvoudig spelfouten opmerken en hoeft de gebruiker niet te kijken naar de plaats waar de tekst wordt ingevoegd en is sneller typen mogelijk.

3.10 Windows Control in combinatie met Regionaal Gebaseerde Applicaties

Windows Control kan in combinatie met andere oogbestuurde toepassingen worden gebruikt. “Blikbestuurde” gebieden in andere toepassingen zijn actief zolang er geen taak actief is in de Windows Control Taakbalk. Als u Windows Control in Blik & Schakelaar modus gebruikt zal een Taakknop altijd “standaard actief” zijn, als u een taak moet deselecteren kijkt u gewoon terug naar de geselecteerde taak voor een kort moment.

3.11 Eye Detection Indicator


Het **Eye Detection Indicator**, , is een discrete indicator in het veld Activiteit in Windows.

 toont of Windows Control de ogen van de gebruiker heeft gedetecteerd.

De **Oogdetectie-indicator** kan een andere status hebben:

- Ogen gedetecteerd ().
 Fungeert ook als positioneringsgids voor de gebruiker.
- Geen ogen gedetecteerd, ().
- Geen eye-tracker aangesloten of eye tracker uitgeschakeld, ().

4 Instellingen Windows Control

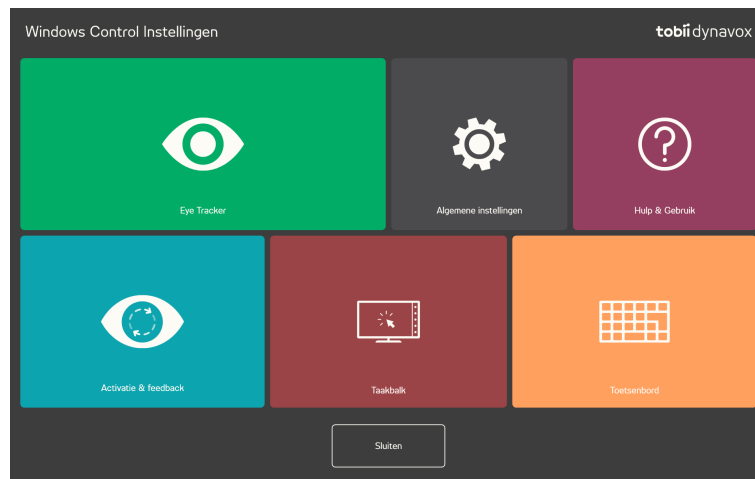


Pictogrammen	Actie	Beschrijving
	Eye Tracker	Opent de Eye Tracker -instellingen. Voor meer informatie raadpleegt u 4.1 <i>Eye Tracker</i> , pagina 25.
	Algemene instellingen	Opent de Algemene Instellingen. Voor meer informatie raadpleegt u 4.2 <i>Algemene instellingen</i> , pagina 30.
	Hulp & Gebruik	Opent de Help & Gebruik -instellingen. Voor meer informatie raadpleegt u 4.3 <i>Hulp & Gebruik</i> , pagina 31.
	Activatie & feedback	Opent de Activatie & Feedback -instellingen. Voor meer informatie raadpleegt u 4.4 <i>Activatie & feedback</i> , pagina 32.
	Taakbalk	Opent de Taakbalk -instellingen. Voor meer informatie raadpleegt u 4.5 <i>Taakbalk</i> , pagina 35.
	Toetsenbord	Opent de Toetsenbord -instellingen. Voor meer informatie, zie 4.6 <i>Toetsenbord</i> , pagina 38.

4.1 Eye Tracker



4.1.1 Het tabblad Kalibratie

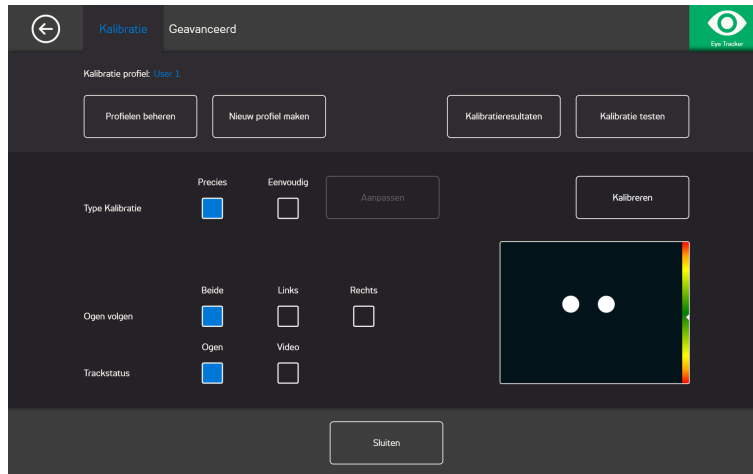

Kalibratie profiel: Zal de naam van het actieve profiel tonen.

Profielen beheren Selecteer deze knop om te veranderen naar een reeds bestaand profiel. Voor meer informatie raadpleegt u [4.1.1.1 Profielen Beheren, pagina 25](#).

Maak een nieuw profiel aan. U staat op het punt om een nieuw profiel aan te maken. Voor meer informatie raadpleegt u [4.1.1.2 Nieuw Profiel Aanmaken, pagina 26](#).

Kalibratieresultaten: Selecteer deze knop om het resultaat van de kalibratie te bekijken. Voor meer informatie raadpleegt u [4.1.1.3 Kalibratieresultaten, pagina 26](#).

Kalibratie testen: Selecteer deze knop om de testkalibratiepagina te openen. Voor meer informatie raadpleegt u [4.1.1.4 Kalibratie testen, pagina 27](#).

Type Kalibratie: Er zijn twee (2) verschillende soorten kalibraties: **Nauwkeurig** of **Eenvoudig**. Voor meer informatie raadpleegt u [4.1.1.6 Type Kalibratie, pagina 27](#).

Ogen volgen: Selecteer hoe het apparaat de ogen van de gebruikers moet volgen tussen: **Beide**, **Links** of **Rechts**.

4.1.1.1 Profielen Beheren

Op de pagina Profielen Beheren kunt u een bestaand profiel activeren of verwijderen.

In het midden van het scherm, onder Actief Profiel, kunt u de naam van het actieve profiel zien.

Alle beschikbare profielen worden weergegeven als knop op de pagina, gebruik de  en  knop om door de beschikbare profielen te scrollen.

4.1.1.1.1 Een profiel activeren

1. Selecteer de knop met de naam van het profiel om te activeren.
2. Selecteer de knop **Activeren** rechtsboven in het scherm.
3. Selecteer **Ja** om het geselecteerde profiel te activeren of **Nee** om te annuleren.
4. Selecteer **Afsluiten** om de pagina te verlaten.

4.1.1.1.2 Een profiel verwijderen

1. Selecteer de knop met de naam van het profiel om te verwijderen.
2. Selecteer de knop **Verwijderen** linksboven in het scherm.

3. Selecteer **Ja** om het geselecteerde profiel te verwijderen of **Nee** om te annuleren.
4. Selecteer **Afsluiten** om de pagina te verlaten.

4.1.1.2 Nieuw Profiel Aanmaken

1. Selecteer het **Kalibratietype** dat u wilt gebruiken.
Voor meer informatie raadpleegt u *4.1.1.6 Type Kalibratie, pagina 27*.
2. Selecteer de knop **Nieuw profiel aanmaken**.
3. Selecteer **Ja** om door te gaan of **Nee** om te annuleren.
4. Geef het nieuwe profiel een naam.




Toetsenbord en muis moeten worden gebruikt.
Alleen alfanumerieke tekens kunnen worden gebruikt.

5. Selecteer de **Volgende** knop.
6. Plaats de gebruiker zodanig dat de twee punten, die de ogen van de gebruikers vertegenwoordigen, in het midden van het vak op het scherm staan.
Het kalibratieproces begint wanneer de rechter punt naar de gebruiker knippert.
7. Volg de instructies op het scherm voor het uitvoeren van een kalibratie.
8. Bekijk de kalibratieresultaten.
Voor meer informatie raadpleegt u *4.1.1.3 Kalibratieresultaten, pagina 26*.
9. Selecteer **Afsluiten** om de kalibratie te accepteren.

4.1.1.3 Kalibratieresultaten



Dit werkt alleen op de IS-4 Eye Trackers, dus niet op de IS-20 en IS-3 Eye Trackers. Raadpleeg de technische specificaties van uw Eye Tracker voor meer informatie over het Eye Tracker-platform dat u gebruikt.

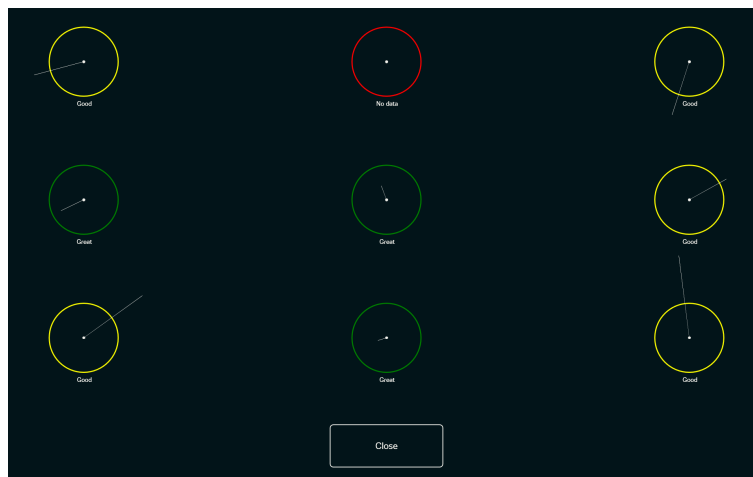

Op de pagina met kalibratieresultaten kunt u het resultaat van de kalibratie voor elk van de kalibratiepunten bekijken. Hoeveel kalibratiepunten er op de pagina worden getoond, is afhankelijk van het kalibratietype dat u heeft gekozen en de manier waarop u de kalibratie heeft aangepast.


Een kalibratiepunt kan drie (3) verschillende statussen hebben:

- Geweldig (groen)
- Goed (geel)
- Geen gegevens (rood)



Als u het kalibratietype "Accuraat" gebruikt, wordt de kalibratie automatisch opnieuw gestart als de eye tracker geen gegevens van een kalibratiepunt kan ontvangen.

4.1.1.4 Kalibratie testen

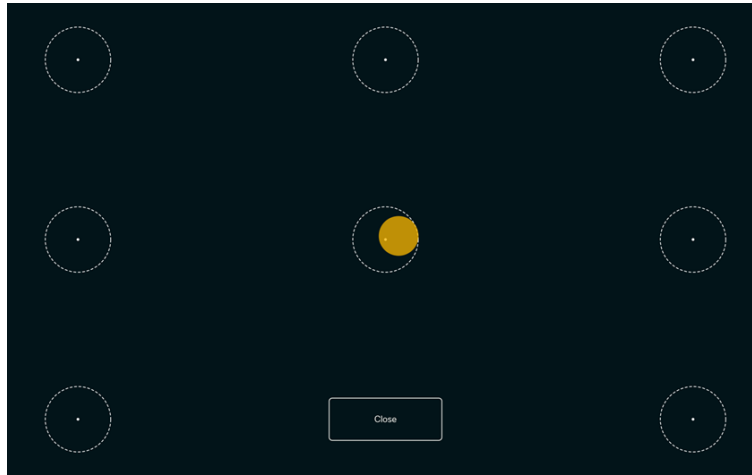

Op de kalibreringstestpagina kan de kalibratie worden getest, met behulp van vooraf gedefinieerde doelen op het scherm, om te zien of de gebruiker de Eye tracker opnieuw moet kalibreren.

1. Kijk naar elke punt in elke cirkel op het scherm om te zien hoe nauwkeurig het oogvolgen gaat dat gebied.
2. Selecteer **Afsluiten** als u klaar bent.

4.1.1.5 Opnieuw Kalibreren

1. Selecteer het **Kalibratietype** dat u wilt gebruiken.
Voor meer informatie raadpleegt u *4.1.1.6 Type Kalibratie, pagina 27*.
2. Selecteer de **Opnieuw Kalibreren**knop om een nieuw kalibratieproces te starten voor het actieve profiel.
3. Volg de instructies op het scherm voor het uitvoeren van een kalibratie.
4. Bekijk de kalibratieresultaten.
Voor meer informatie raadpleegt u *4.1.1.3 Kalibratieresultaten, pagina 26*.
5. Selecteer **Afsluiten** om de kalibratie te accepteren.

4.1.1.6 Type Kalibratie

Er zijn twee (2) verschillende soorten kalibratie beschikbaar: **Nauwkeurig** en **Eenvoudig**.

4.1.1.6.1 Precies

Selecteer het Nauwkeurig-vakje om het meest nauwkeurige kalibratietype te activeren.

Met het nauwkeurige kalibratietype geactiveerd wordt de kalibratieprocedure een zeven (7) punten, 'pop de punten'-kalibratie. Het nauwkeurige kalibratietype is het standaard kalibratietype.

4.1.1.6.2 Eenvoudig

Selecteer de **Eenvoudig**-vak als u het kalibratieproces wilt aanpassen.

Selecteer de knop **Aanpassen** naast de Eenvoudig-knop om het kalibratieproces aan te passen.



Kalibratiepunten: Selecteer of er **1, 2, 5, of 9** kalibratiepunten moeten worden gebruikt.



1-punts kalibratie is niet beschikbaar op PCEye Go.

Stappen-door: Schakel het Door heen lopen Aan/Uit selectievakje op “Aan” om de functie te activeren waarin u de “S” toets op een toetsenbord gebruikt of tikken/klikken op het scherm om door de kalibratie te lopen.

Prikkel:

Selecteer de knop **Bladeren** om de **Stimulus** van de standaard witte stip te wijzigen in:

- Één van de meegeleverde stimuli, Afbeelding of Video
- Een afbeelding van het favoriete speelgoed van de gebruiker
- Een favoriete video
- Of iets anders.

Selecteer de knop **Achtergrond** om de kleur van de achtergrond voor de kalibratieprocedure te wijzigen.

Snelheid van de Stimulus: Selecteer de snelheid voor de stimulus om over het scherm te bewegen tussen drie verschillende niveaus:


- Langzaam
- Middelgroot
- Snel

Grootte Stimulus: Selecteer de grootte van de stimulus wanneer de stimulus op het scherm wordt getoond tussen drie verschillende niveaus:

- Klein
- Middelgroot
- Groot

Sluiten Selecteer de **Afsluiten** knop om de pagina te verlaten.

4.1.2 Het tabblad Geavanceerd

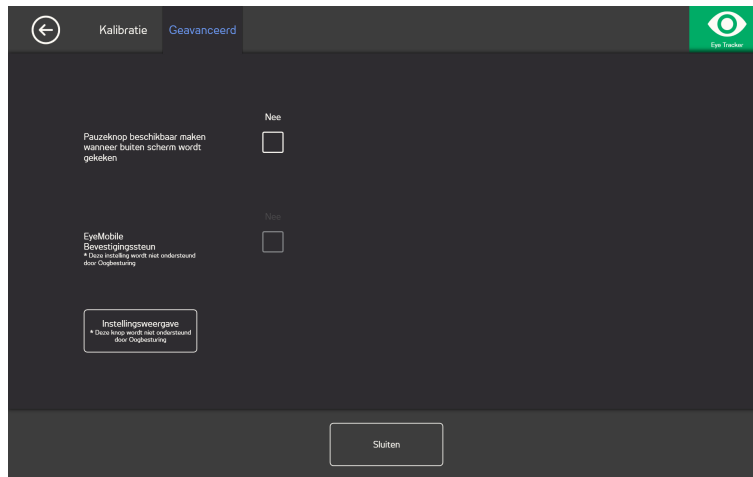

Pauzeknop beschikbaar maken wanneer buiten scherm wordt gekeken: Schakel het Aan/Uit selectievakje om op **Aan** als de pauzetoets op het scherm moet verschijnen wanneer de gebruiker buiten het scherm kijkt, zodat de gebruiker gemakkelijk kan pauzeren en opnieuw beginnen met eye tracking.


EyeMobile Bevestigingssteun: Schakel het Aan / Uit-selectievakje van de EyeMobile-bevestigingssteun op **Aan** als u een EyeMobile of EyeMobile Mini gebruikt. De EyeMobile-instelling voor de bevestigingssteun is niet relevant voor EyeMobile Plus en dus uitgeschakeld.

4.1.2.1 Instellingen Beeldscherm


Als er meer dan één (1) beeldscherm gebruikt wordt, moet u opgeven op welk beeldscherm de eye tracker is aangesloten. Het systeem zal ook moeten weten hoe groot het beeldscherm is dat wordt gebruikt.



Werkt alleen op Extended Desktop en niet op Geduplicateerde Desktop.

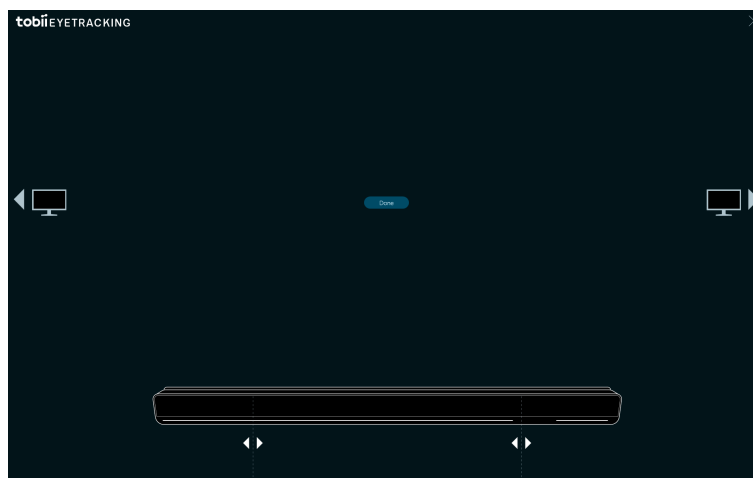

1. Gebruik de  of  om te selecteren op welk beeldscherm de oogtracker is aangesloten.
2. Lijn de linker- en rechter verticale lijn uit, die onder de visualisatie van de oogtracker op het scherm staan, met de markeringen die bovenop de oogtracker in gebruik zijn.

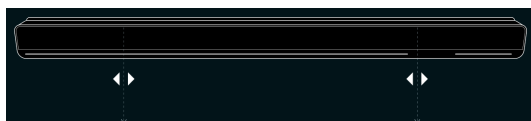


Dit zal de grootte van het beeldscherm instellen dat wordt gebruikt voor de Windows Control.

3. Selecteer **Gereed** om af te ronden.

4.2 Algemene instellingen


4.2.1 Het tabblad Algemeen

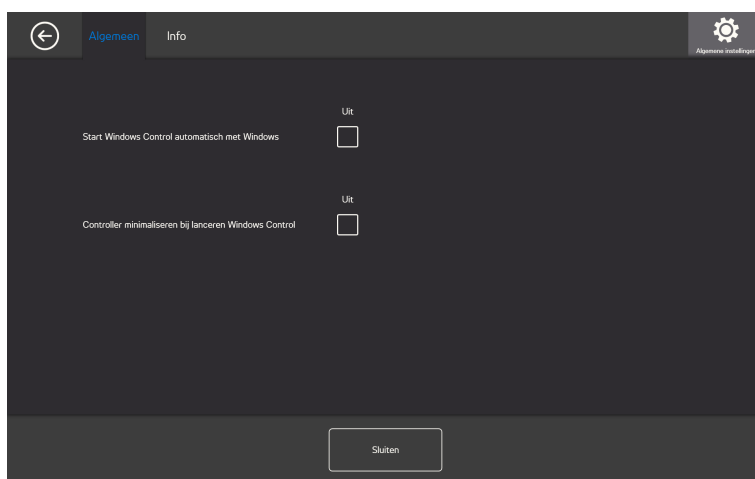

Lanceer Windows Control automatisch met Windows: Schakel het Selectievakje Aan of Uit op **Aan** als Windows Control automatisch start wanneer Windows wordt opgestart.

Controller minimaliseren bij starten Windows: Schakel het Selectievakje Aan / Uit op **Aan** als de Windows Control Controller automatisch wordt geminimaliseerd wanneer Windows wordt opgestart.

4.2.2 De Info-tab

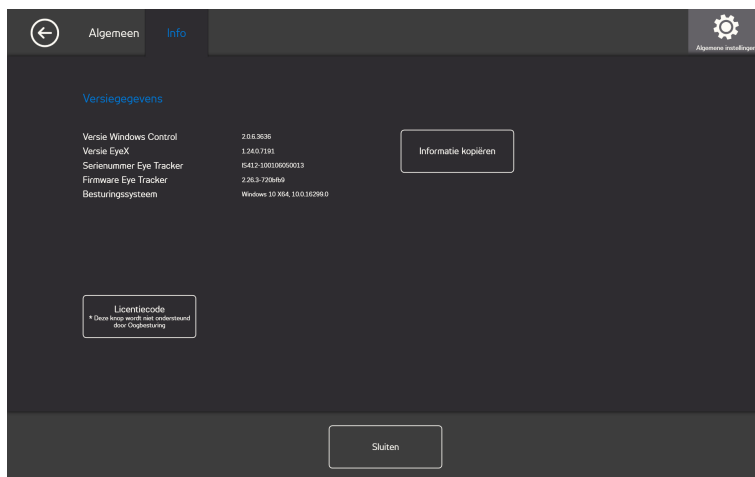

Op de Info-pagina is alle Versieinformatie te vinden voor de software en de Eye tracker hardware. Deze informatie kan gemakkelijk worden gekopieerd door de knop **Kopieer info** te selecteren en deze kan indien nodig in een e-mail of andere software worden geplakt.

4.2.2.1 Licentiecode




De licentieknop is niet Gaze-geschakeld, dus vraag iemand om te helpen als u de licentie moet wijzigen.

Om de licentie te activeren zie *2.2.1 Licentie activeren, pagina 6*.

Om de licentie te deactiveren zie *2.2.2 Licentie deactiveren, pagina 8*.

4.3 Hulp & Gebruik

4.3.1 De Help Tab

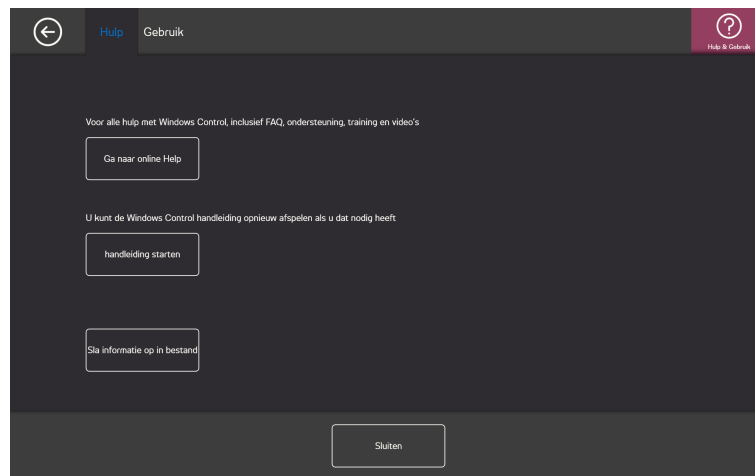

Selecteer de knop **Ga naar online help** om de Tobii Dynavoxproductondersteuningspagina's op internet in de standaardwebbrowser te openen. Op de ondersteuningswebpagina's kan de gebruiker veelgestelde vragen, ondersteuning, training, video's en documentatie vinden over Windows Control en alle andere producten van Tobii Dynavox.




Controleer of de computer/het apparaat is verbonden met internet.

Selecteer de **Start de Handleiding**-knop om de meegeleverde handleiding uit te voeren als de gebruiker meer oefening nodig heeft. De handleiding kan zo vaak gestart worden als de gebruiker wil.

Selecteer de knop **Informatie opslaan** naar bestand om om alle logboeken te kopiëren die van belang zijn als u ondersteuning nodig heeft. Dit bestand kan eenvoudig worden toegevoegd aan een e-mail en worden verzonden naar het ondersteuningsteam.

4.3.2 Het tabblad Gebruik

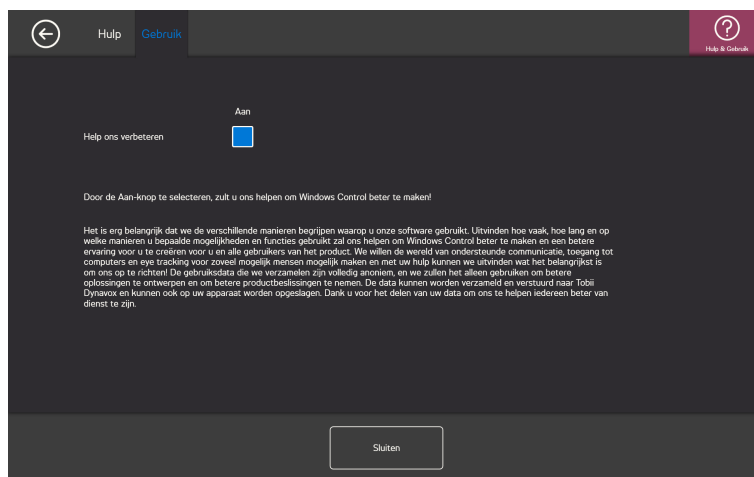


Help ons om te verbeteren: Om ons te helpen de Tobii Dynavox software te verbeteren, schakelt u het Aan/Uit vakje op **Aan**.

4.4 Activatie & feedback



4.4.1 Het tabblad Activatie

4.4.1.1 Instellingen Blik

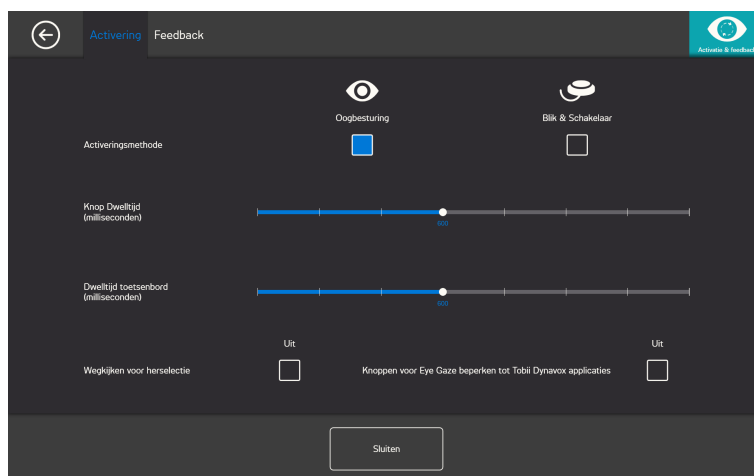

In het tabblad Activatie worden alle instellingen met betrekking tot hoe de gebruiker interacteert met Windows Control ingesteld. Of de gebruiker de Blik of Blik & Schakelaar moet gebruiken om de commando's uit te voeren en hoe de interactie zal werken.

Activeringsmethode:

- **Blik** - Kies Blik om de zoomfunctie die eindigt met het uitvoeren van de gewenste taak met uw blik te activeren.
- **Blik & Schakelaar** - Kies Blik & Schakelaar om een schakelaar te gebruiken om de zoomfunctie die eindigt met de uitvoering van de gewenste taak te activeren.

Knop Fixeertijd (miliseconden)

De knop Fixeertijd kan op 8 verschillende niveaus worden ingesteld. Kijk gewoon naar de gewenste positie om de instelling te wijzigen. Door de knop Fixeertijd te wijzigen, kunt u aanpassen hoelang de gebruiker naar een knop moet kijken voordat de taak wordt uitgevoerd. Links op de schaal worden de lagere fixeertijden weergegeven en rechts de hogere snelheden.

Toetsenbord Fixeertijd (miliseconden)

De Toetsenbord Fixeertijd kan op 8 verschillende niveaus worden ingesteld. Kijk gewoon naar de gewenste positie om de instelling te wijzigen. Door de Toetsenbord Fixeertijd te wijzigen, kunt u aanpassen hoelang de gebruiker naar een toets op het toetsenbord moet kijken voordat de toets wordt uitgevoerd. Links op de schaal worden de lagere Toetsenbord fixeertijden weergegeven en rechts de hogere.


Wegkijken voor herselectie

- **Aan** - Kies **Aan** om **Weg te kijken voor u opnieuw selecteert** te activeren. Wanneer de optie **Aan** staat, moet de gebruiker eerst weggijken van het actieve blikgebied om opnieuw hetzelfde blikgebied te kunnen activeren.
- **Uit** - Kies **Uit** om **Wegkijken voor u opnieuw selecteert** te deactiveren. Bij **Uit** wordt het actieve blikgebied steeds opnieuw geactiveerd zolang de gebruiker naar het blikgebied staart. (standaard)

Knoppen voor Eye Gaze beperken tot Tobii Dynavox applicaties

- **Aan** - Kies **Aan** om **Beperk Eye Gaze knoppen alleen tot Tobii Dynavox applicaties** te activeren. Bij **Aan**, wordt het actieve kijkgebied geactiveerd en wordt het commando dat aan het gebied is gekoppeld, uitgevoerd en de Tobii Dynavox feedbackinteractie wordt **alleen** getoond in Tobii Dynavox software en applicaties.
- **Uit** - Kies **Uit** om **Eye Gaze knoppen beperken tot alleen Tobii Dynavox applicaties** te deactiveren. Bij **Uit**, wordt het actieve kijkgebied geactiveerd en wordt het commando dat aan het gebied is gekoppeld, uitgevoerd en de Tobii Dynavox feedbackinteractie wordt getoond in Tobii Dynavox en software en applicaties van derden. (standaard)

4.4.1.2 Instellingen Blik & Schakelaar

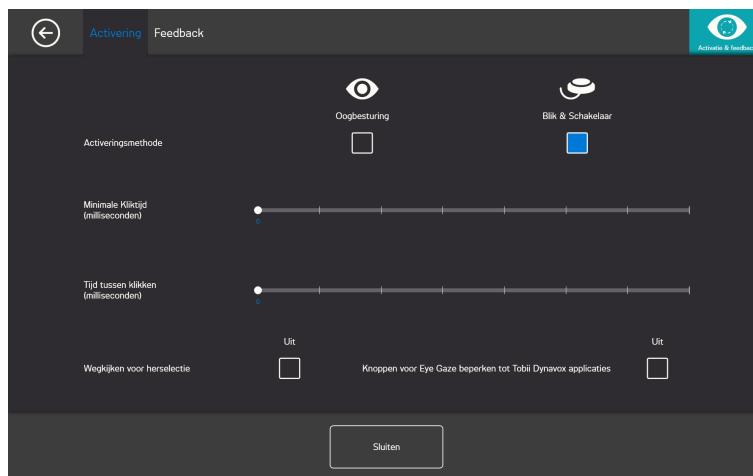

Minimale Kliktijd: De hoeveelheid tijd die de gebruiker op de schakelaar moet drukken voordat deze een selectie maakt.

Tijd tussen klikken: De hoeveelheid "dode tijd" die Windows Control wacht voordat er verdere schakelaarinput mogelijk is.


Wegkijken voor herselectie

- **Aan** - Kies **Aan** om **Weg te kijken voor u opnieuw selecteert** te activeren. Wanneer de optie **Aan** staat, moet de gebruiker eerst weggijken van het actieve blikgebied om opnieuw hetzelfde blikgebied te kunnen activeren.
- **Uit** - Kies **Uit** om **Wegkijken voor u opnieuw selecteert** te deactiveren. Bij **Uit** wordt het actieve blikgebied steeds opnieuw geactiveerd zolang de gebruiker naar het blikgebied staart. (standaard)

Knoppen voor Eye Gaze beperken tot Tobii Dynavox applicaties

- **Aan** - Kies **Aan** om **Beperk Eye Gaze knoppen alleen tot Tobii Dynavox applicaties** te activeren. Bij **Aan**, wordt het actieve kijkgebied geactiveerd en wordt het commando dat aan het gebied is gekoppeld, uitgevoerd en de Tobii Dynavox feedbackinteractie wordt **alleen** getoond in Tobii Dynavox software en applicaties.
- **Uit** - Kies **Uit** om **Eye Gaze knoppen beperken tot alleen Tobii Dynavox applicaties** te deactiveren. Bij **Uit**, wordt het actieve kijkgebied geactiveerd en wordt het commando dat aan het gebied is gekoppeld, uitgevoerd en de Tobii Dynavox feedbackinteractie wordt getoond in Tobii Dynavox en software en applicaties van derden. (standaard)


4.4.2 De Feedback tab

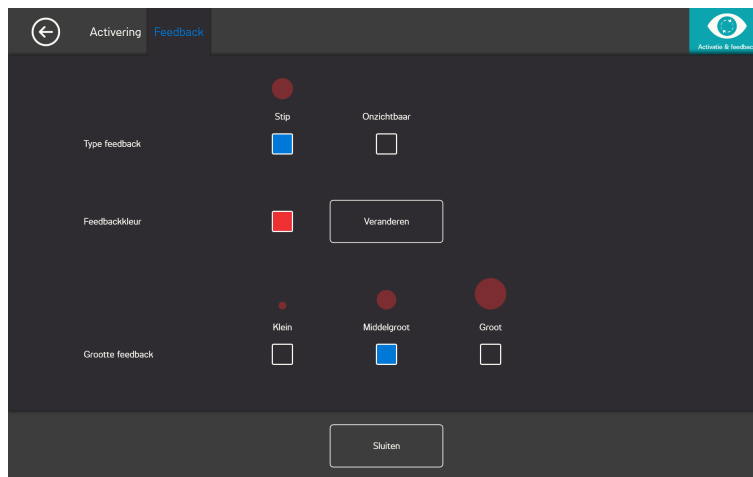

Type feedback:

- **Klok** - De visuele feedback is een klok die opgevuld wordt tijdens de gespecificeerde Knop Fixeertijd. Wanneer de klok volledig is opgevuld, wordt de taak uitgevoerd.
- **Stip** - De visuele feedback is een krimpende stip voor Blik-gebruikers of een statische stip voor gebruikers van de Schakelaar wanneer er een taak wordt uitgevoerd.
- **Onzichtbaar** - Er wordt geen visuele feedback getoond op het scherm wanneer er een taak wordt uitgevoerd.

Feedbackkleur: Selecteer de **Wijzigen**-knop om de kleur van de feedback te selecteren. Voor beschikbare kleuren, zie *Afbeelding 4.1 Beschikbare kleuren, pagina 34*.

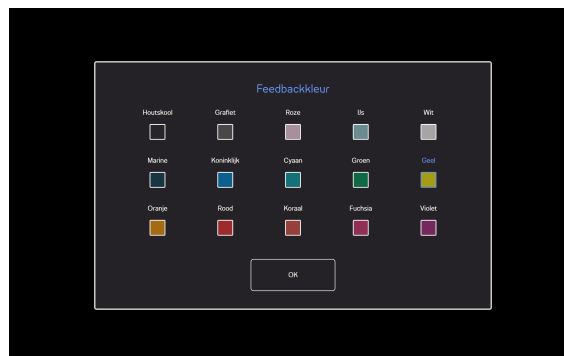

Afbeelding 4.1 Beschikbare kleuren


Grootte feedback: De feedbackgrootte van het gekozen feedbacktype kan worden ingesteld op drie (3) verschillende waarden.

- **Klein**
- **Middelgroot**
- **Groot**

4.5 Taakbalk




4.5.1 De Taakbalk Tab

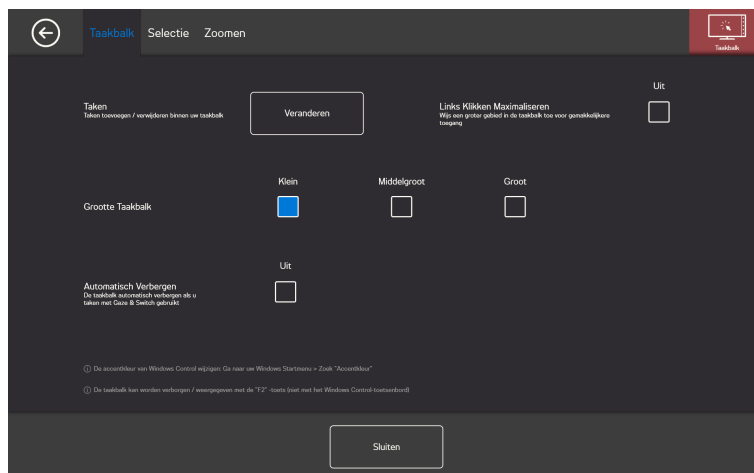

4.5.1.1 Taken

Selecteer de knop **Wijzigen** om toegang te krijgen tot de pop-up waar taken kunnen worden toegevoegd of verwijderd van de Taakbalk.

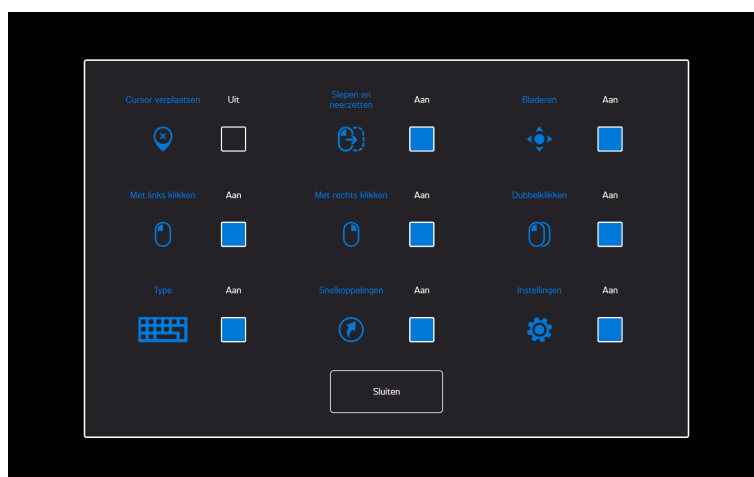

Selecteer welke taken u op de taakbalk wilt gebruiken. Voor meer informatie over de taken raadpleegt u 3.4 *Gewone taken*, pagina 13.



Maar denk erom: hoe meer taken er op de Taakbalk zijn hoe moeilijker het kan zijn om te selecteren op kleinere schermen.

Zet het selectievakje Aan/uit op **Aan** voor elke Taak om het in te schakelen voor gebruik op de Taakbalk.

Zet het selectievakje Aan/uit op **Uit** voor iedere taak om hem uit te schakelen en onzichtbaar te maken op de Taakbalk.

4.5.1.2 Links Klikken Maximaliseren



Door Maximaliseren Links klikken / tikken te activeren, kan het actieve gebied van de taak Links klikken / tikken in de taakbalk aanzienlijk worden vergroot, zodat de Links Klikken taak gemakkelijker geselecteerd kan worden.

Gebruik de **Links klikken Maximaliseren**-functie om de taak Links klikken op de taakbalk uit te vouwen en te benadrukken. Als deze op **Uit** staat, worden alle geselecteerde taken op gelijke afstand van elkaar geplaatst op de taakbalk. Als deze op **Aan**

staat, behouden alle andere taken dan Links klikken hun originele, kleinere maten en vult de taak Links klikken de resterende ruimte op de taakbalk.

4.5.1.3 Grootte Taakbalk

Met de grootte van de Taakbalk kan de Taakbalk worden gewijzigd in drie (3) groottes:

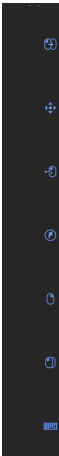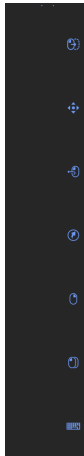Klein	Middelgroot	Groot
		

Als u een groter formaat selecteert voor de taakbalk, wordt het actieve gebied rond de taak uitgebreid zodat het gemakkelijker wordt voor de gebruiker om de taak te selecteren. De actuele actieve regio wordt buiten het scherm uitgebreid en het icoon voor de taken ligt altijd in het midden van de actieve regio.


4.5.1.4 Automatisch Verbergen

Verbergt de taakbalk automatisch. Beschikbaar voor alle Klevende taken en voor alle taken in de Schakelaar-activatiemodus.

Schakel het selectievakje Aan / Uit op **Aan** om Automatisch verbergen in te schakelen.

Schakel het selectievakje Aan / Uit op **Uit** om Automatisch verbergen uit te schakelen.

4.5.2 Het tabblad Selectie

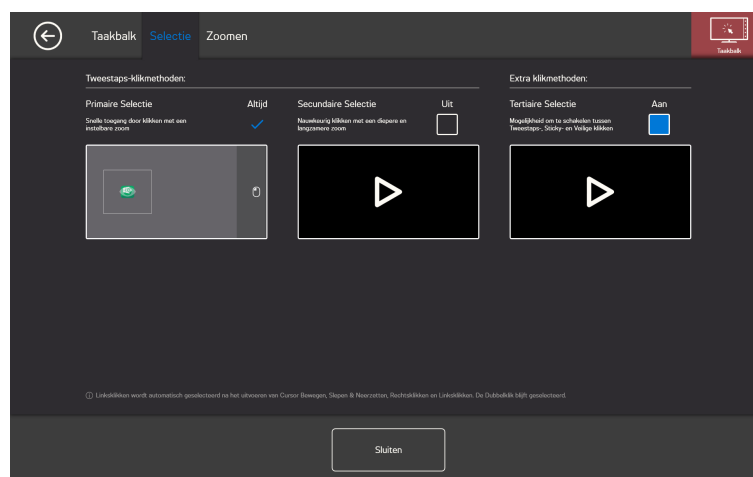

4.5.2.1 Primaire Selectie

De Primaire Selectie is altijd geactiveerd en kan niet worden gedeactiveerd.


4.5.2.2 Secundaire Selectie

De Secundaire Selectie staat standaard altijd **Uit**. Als u het op **Aan** heeft gezet, zal de Secundaire Selectie beschikbaar worden gemaakt.

4.5.2.3 Tertiaire Selectie

De Tertiaire Selectie staat standaard altijd **Uit**. Als u het op **Aan** heeft gezet, zal de Tertiaire Selectie beschikbaar worden gemaakt. Met de Tertiaire Selectie zijn de Klevende- en Veilig Klikken-taken beschikbaar. Voor meer informatie raadpleegt u 3.5 "Klevende" Taken, pagina 15 en 3.6 Veilig Klikken, pagina 16.

4.5.3 Het tabblad Zoom

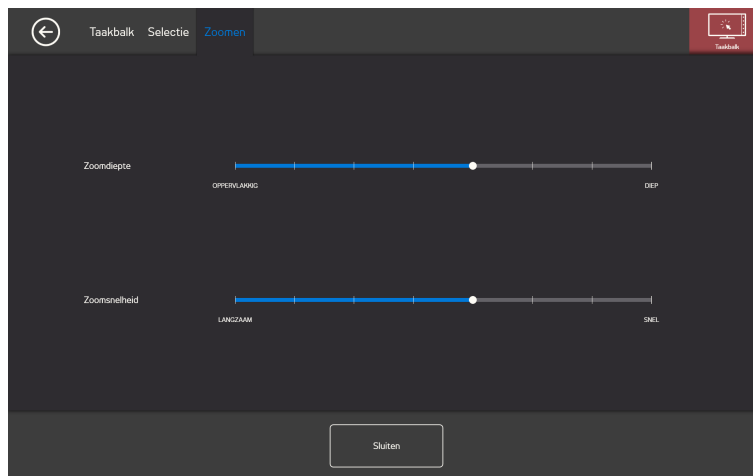

Zoomdiepte

De zoomdiepte kan op 8 verschillende niveaus worden ingesteld. Kijk gewoon naar de gewenste positie om de instelling te wijzigen. Door de diepte te wijzigen, kunt u bepalen hoe sterk er wordt ingezoomd vóór het uitvoeren van de taak. Hoe verder naar rechts op de schaal, hoe sterker er wordt ingezoomd.





Als de diepte is ingesteld op nul, wordt er niet gezoomd. Met Primaire selectie is dit een instant klik. Met Secundaire selectie is dit nog steeds zoomen.

Zoomsnelheid

De zoomsnelheid kan op 8 verschillende niveaus worden ingesteld. Kijk gewoon naar de gewenste positie om de instelling te wijzigen. Door de snelheid te wijzigen, kunt u bepalen hoe snel er wordt ingezoomd vóór het uitvoeren van de taak. Hoe verder naar rechts op de schaal, hoe sneller er wordt ingezoomd.

4.6 Toetsenbord

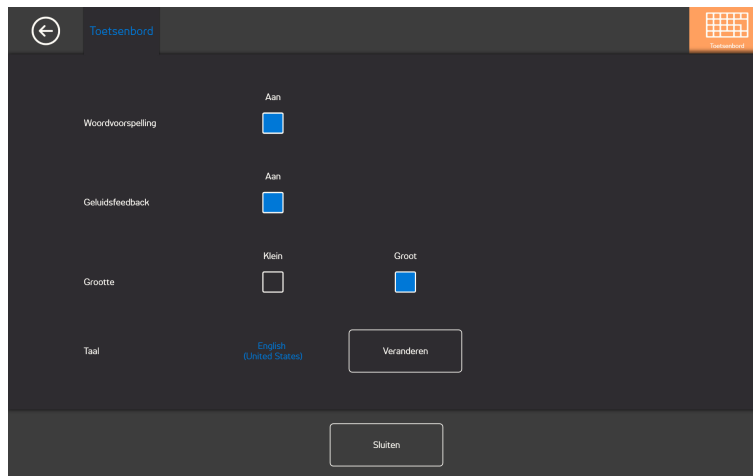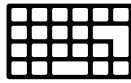

Woordvoorspelling

- **Aan** - Kies **Aan** om woordvoorspelling te activeren bij gebruik van het bliktoetsenbord. (standaard)
- **Uit** - Kies **Uit** om woordvoorspelling te deactiveren bij gebruik van het bliktoetsenbord.

Geluidsfeedback

- **Aan** - Kies **Aan** om geluidsfeedback te activeren bij het selecteren van een knop op het bliktoetsenbord.
- **Uit** - Kies **Uit** om geluidsfeedback te deactiveren bij selectie van een knop op het bliktoetsenbord.

Grootte

- **Klein** - Kies Klein om een kleiner bliktoetsenbord te gebruiken, dat minder dan de helft van het scherm in beslag neemt, zie *Afbeelding 4.2 Indeling klein toetsenbord (standaard)*, pagina 38.
- **Groot** - Kies Groot om een groter bliktoetsenbord te gebruiken, dat de helft van het scherm in beslag neemt, zie *Afbeelding 4.3 Indeling groot toetsenbord*, pagina 39.



Afbeelding 4.2 Indeling klein toetsenbord (standaard)



Afbeelding 4.3 Indeling groot toetsenbord

Taal

De geselecteerde taal voor toetsenbordindeling wordt getoond. Selecteer de knop **Wijzigen** om de toetsenbordindeling te wijzigen naar een andere taal. Er zijn een aantal verschillende talen voor toetsenbordindeling beschikbaar.

5 Virtual Remote

5.1 Virtual Remote Overzicht



Afbeelding 5.1 Overzicht van Virtual Remote

De Virtual Remote is onderverdeeld in twee gebieden:

- Het Virtual Remote Menu, voor meer informatie zie [5.1.1 Virtual Remote Menu, pagina 40](#).
- De Actieve Afstandsbediening, voor meer informatie zie [5.1.2 De Active Remote, pagina 41](#).

5.1.1 Virtual Remote Menu




Afbeelding 5.2 Het Virtual Remote Menu

De iconen in het Virtual Remote menu zijn:

Taakknop	Actie	Beschrijving
+	Afstandsbediening toevoegen	Selecteer deze actie om een nieuwe afstandsbediening toe te voegen, zie 5.2.4 Een afstandsbediening toevoegen , pagina 43 .
i	Informatie	Selecteer deze actie om de informatie te openen, zie 5.2.6 Informatie , pagina 59 .
<	Links	Selecteer deze actie om de afstandsbediening te activeren die aan de linkerkant zit van de actieve afstandbediening.
>	Rechts	Selecteer deze actie om de afstandbediening te activeren rechts van de actieve afstandsbediening.
	Bewerkingsmodus	Selecteer deze actie om naar de Bewerkingsmodus te gaan van de actie afstandsbediening, zie 5.2.5 Bewerkingsmodus , pagina 51 .
X	Afsluiten/Minimaliseren	Selecteer deze optie om de Virtual Remote applicatie te minimaliseren.

5.1.2 De Active Remote

De active remote control is altijd de afstandsbediening die in het midden staat in het Virtual Remote Menu, zie *Afbeelding 5.3 Active Remote*.

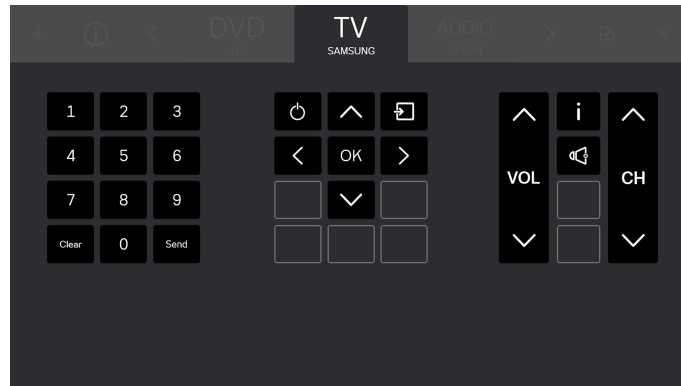


Afbeelding 5.3 Active Remote



Alle knoppen die zichtbaar zijn op het scherm behoren tot de active remote.

U zult ook in staat zijn om de namen van tot twee (2) of meer beschikbare afstandsbedieningen te zien, één aan elke kant van de active remote. U zult alleen de naam zien en niet de knoppen voor de beschikbare afstandsbedieningen totdat u een afstandsbediening actief maakt.

5.1.3 De Knoppen

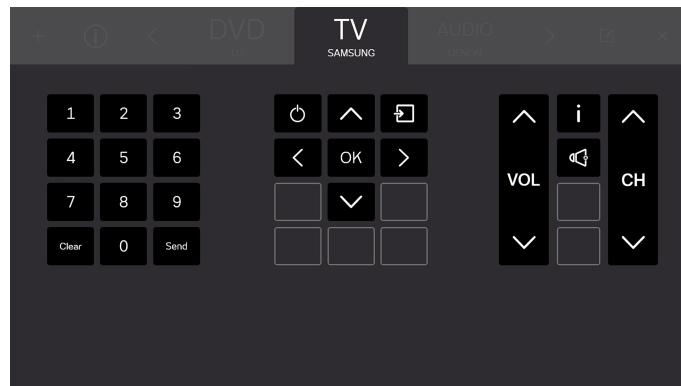


Afbeelding 5.4 De Knoppen

Alle knoppen die zichtbaar zijn op het scherm behoren tot de active remote. Er zijn twee (2) soorten knoppen op de afstandsbediening.


- Actieve Knop , zie *Afbeelding 5.5 Actieve Knoppen, pagina 42*
- Inactieve Knoppen , zie *Afbeelding 5.6 Inactieve Knoppen, pagina 42*



De hoeveelheid knoppen en de functies van de knoppen zal verschillend zijn afhankelijk van welk soort systeem de gebruiker wil controleren.

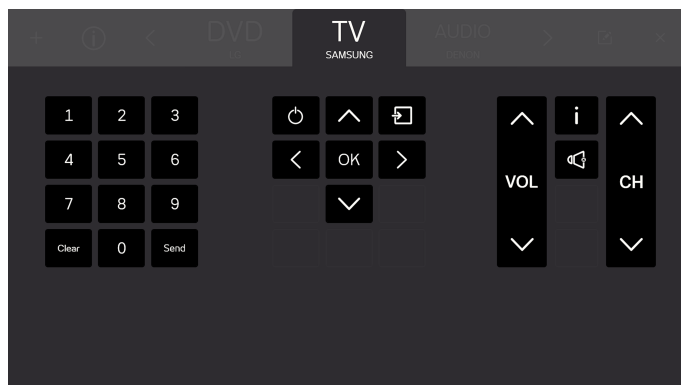

Afbeelding 5.5 Actieve Knoppen

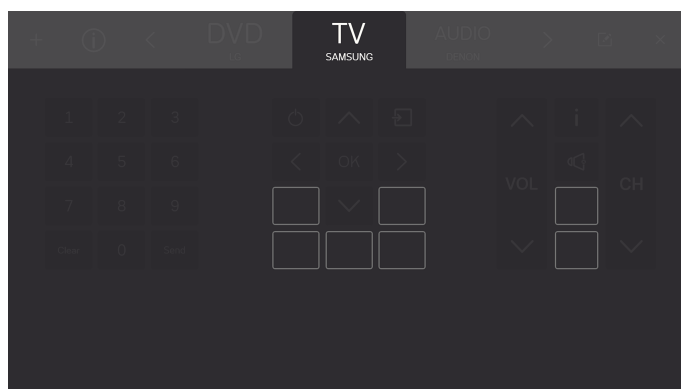

Afbeelding 5.6 Inactieve Knoppen

5.2 Het gebruiken van Tobii Dynavox Virtual Remote


Tobii Dynavox Virtual Remote maakt het voor de gebruiker mogelijk om een tv, dvd, audiosysteem etc. te bedienen vanaf het apparaat.



Alle functies in Virtual Remote zijn voorbereid op Aanraken en de Muis, wat het gemakkelijker maakt voor een zorgverlener of assistent om de gebruiker te helpen indien nodig.

5.2.1 Bij de eerste keer opstarten

Een korte handleiding zal de gebruiker kennis laten maken met de layout van de Virtual Remote software. Volg gewoon de instructies op het scherm.

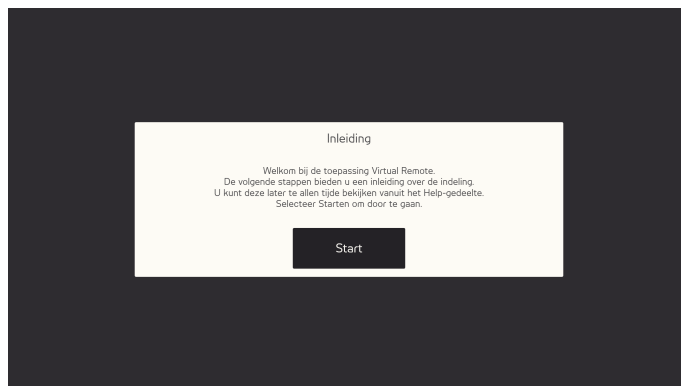

Afbeelding 5.7 Het Virtual Remote Introductiescherm.

5.2.2 Veranderen Actieve Afstandsbediening

Om de actieve afstandsbediening te veranderen:

- Selecteer één van de namen rechts of links van de actieve afstandsbediening.
- of gebruik de < en > knop om door de beschikbare afstandsbedieningen te scrollen.



De actieve afstandsbediening is altijd de afstandsbediening die in het midden van het Virtual Remote Menu staat.


5.2.3 Het gebruiken van knoppen op een afstandsbediening

Selecteer gewoon een knop die u wilt gebruiken en zend het signaal naar het apparaat. Volumeknoppen worden meestal geconfigureerd om een continu signaal uit te zenden zo lang de knop geselecteerd is. Voor meer informatie raadpleegt u 5.2.5.3.1 *Lengte Signaal*, pagina 54.

Om een getal groter dan 9 in te voeren (bv. meerdere cijfers) volg de volgende procedure.

Lijst met Stappen voor Getallen groter dan 9

1. Selecteer alle cijfers in de volgorde waarop ze moeten worden verstuurd.
Alle geselecteerde cijfers zullen zichtbaar zijn in een wit vak onder het cijfergedeelte van de afstandsbediening.

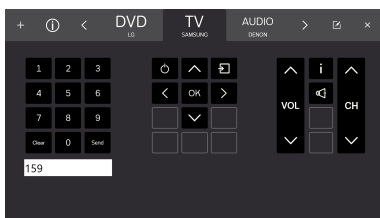

2. Selecteer de **Versturen** knop om de signalen naar het apparaat te versturen of **Wissen** om alle geselecteerde cijfers te verwijderen.

5.2.4 Een afstandsbediening toevoegen



Er zijn twee (2) manieren om een nieuwe afstandsbediening toe te voegen.

5.2.4.1 Een voorgeprogrammeerde afstandsbediening toevoegen

Om een voorgeprogrammeerde afstandsbediening toe te voegen volgt u deze procedure:

Stappenlijst om een Voorgeprogrammeerde Afstandsbediening toe te voegen

1. Selecteer de  van het menu.
2. Selecteer de Voorgeprogrammeerde afstandsbediening knop




3. Selecteer het type Voorgeprogrammeerde afstandsbediening
 - Tv
 - DVD/BLURAY
 - AUDIO




4. Selecteer het merk uit de lijst



Als u het merk niet kunt vinden, selecteer dan **Overige**, voor meer info zie 5.2.4.1.1 *Andere Afstandsbedieningen*, pagina 46

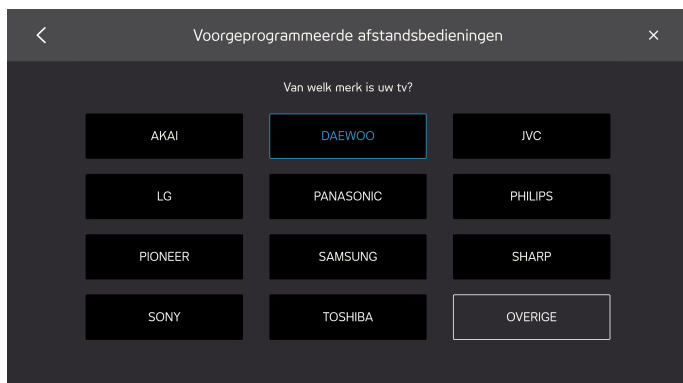

5. Als een merk geselecteerd is, zal er een popup met informatie verschijnen over hoe veel verschillende voorgeprogrammeerde afstandsbedieningen er zijn.

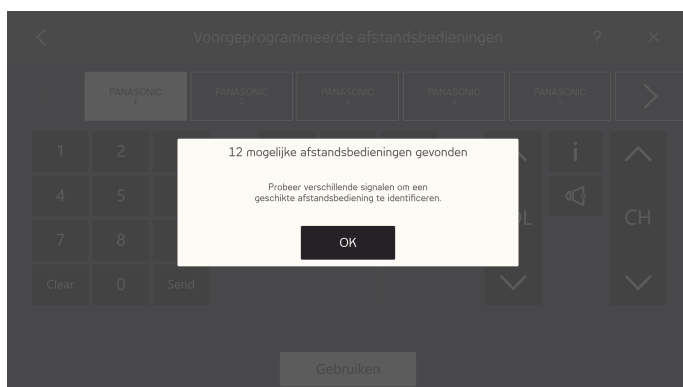

Selecteer de **OK** knop.

6. Selecteer een afstandsbediening



7. Probeer onze verschillende signalen op de geselecteerde afstandsbediening om een geschikte afstandsbediening te identificeren.
8. Herhaal stap 6 & 7 totdat de meest geschikte afstandsbediening is gevonden.




Gebruik de < en > knop om door de beschikbare afstandsbedieningen te scrollen.

9. Selecteer de geschiktste afstandsbediening.

10. Selecteer **Gebruiken** knop.



11. De geselecteerde afstandsbediening zal naar de beschikbare afstandsbedieningen gekopieerd worden.

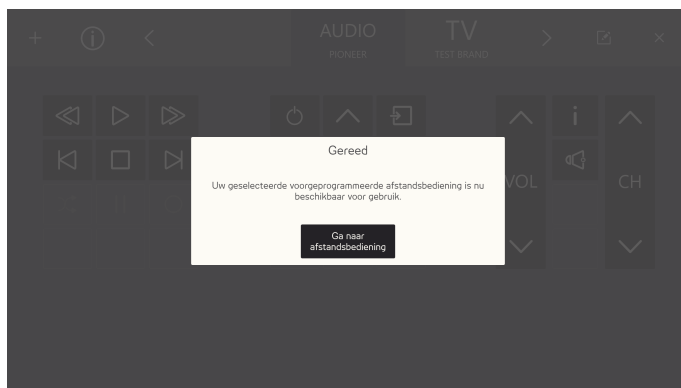


Selecteer de **Ga naar Afstandsbediening** knop om af te ronden.

5.2.4.1.1 Andere Afstandsbedieningen

Om andere afstandsbedieningen toe te voegen volgt u deze procedure:


Stappenlijst Andere Afstandsbedieningen Toevoegen

1. Volg stap 1 - 3 in de stappenlijst: *Stappenlijst om een Voorgeprogrammeerde Afstandsbediening toe te voegen, pagina 44.*
2. Selecteer de **Overige** knop.
3. Type de merknaam in het tekstvak.

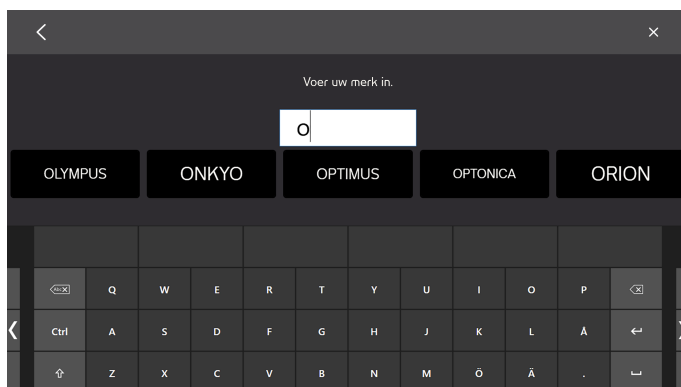





Om het zoekresultaat te beperken, type meer tekens in.

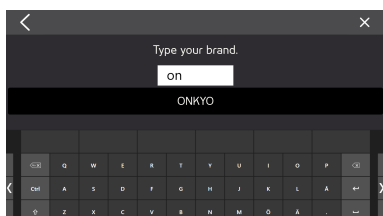

4. Selecteer het merk.

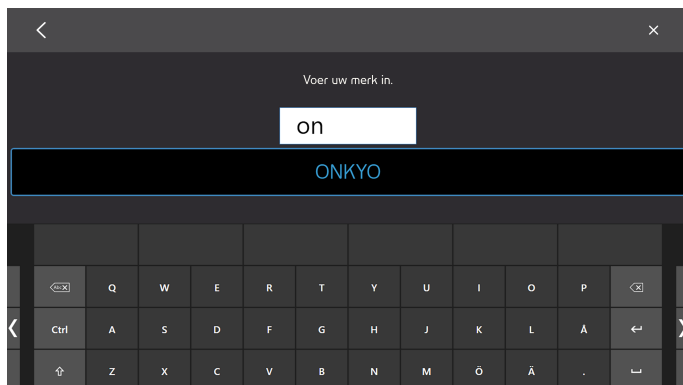

5. Als een merk geselecteerd is, zal er een popup met informatie verschijnen over hoe veel verschillende voorgeprogrammeerde afstandsbedieningen er zijn.

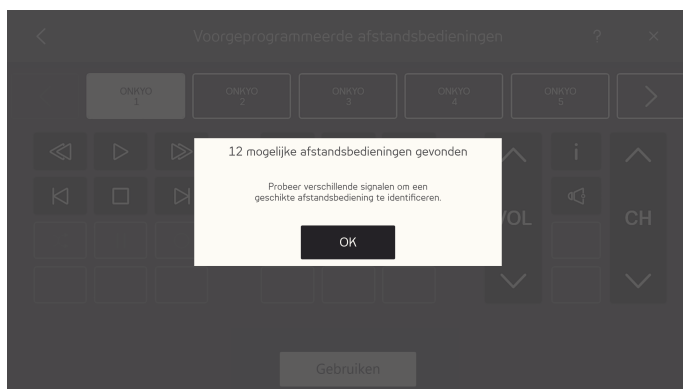

Selecteer de **OK** knop.

6. Selecteer een afstandsbediening



7. Probeer verschillende signalen op de geselecteerde afstandsbediening om een geschikte afstandsbediening te identificeren.
8. Herhaal stap 6 & 7 totdat de beste afstandsbediening is gevonden.




Gebruik de < en > knop om door de beschikbare afstandsbedieningen te scrollen.

9. Selecteer de geschiktste afstandsbediening.
10. Selecteer **Gebruiken** knop.



11. De geselecteerde afstandsbediening zal naar de beschikbare afstandsbedieningen gekopieerd worden.

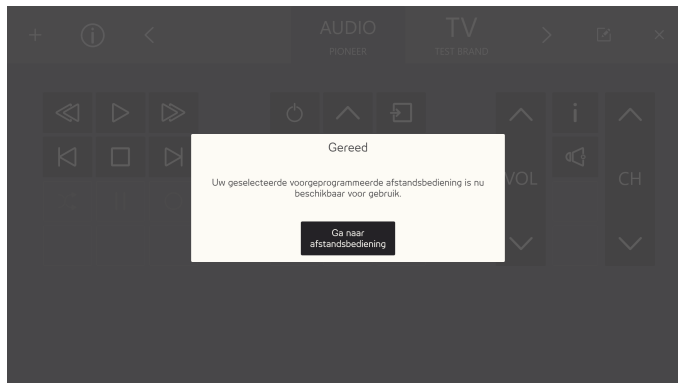

Selecteer de **Ga naar Afstandsbediening** knop om af te ronden.

5.2.4.2 Een niet-voorgeprogrammeerde Afstandsbediening toevoegen.

Om een nieuwe niet-voorgeprogrammeerde afstandsbediening toe te voegen, volgt u deze procedure:

Stappenlijst Toevoegen niet-voorgeprogrammeerde afstandsbediening


1. Selecteer de + van het menu.

2. Selecteer de Niet-Voorgeprogrammeerd knop




3. Selecteer type van Niet-Voorgeprogrammeerde Afstandsbediening knop

- Tv
- AUDIO
- KABEL DOOS
- DVD of BLURAY
- LEEG SJABLOON

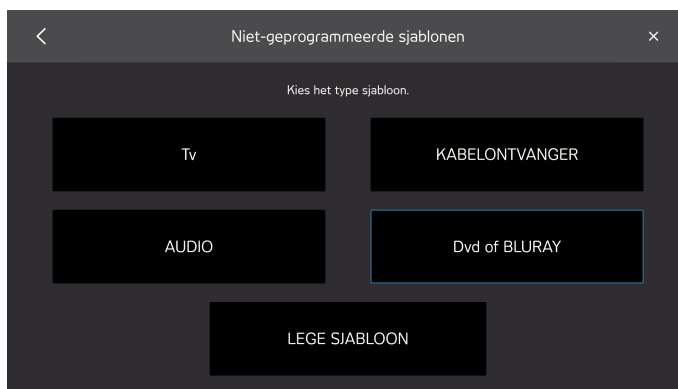


4. Selecteer een knop om te programmeren.

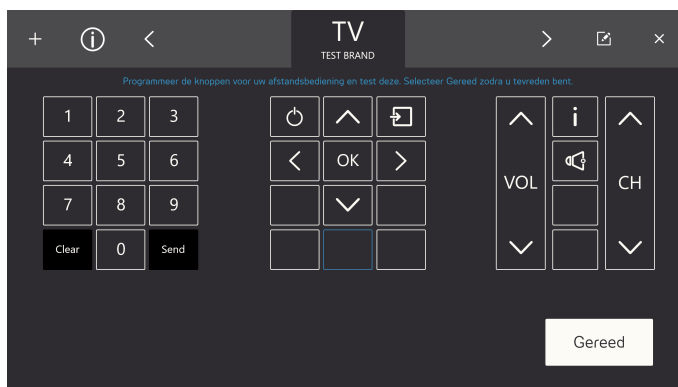


De beschikbare iconen zullen verschillen afhankelijk van welk type Afstandsbediening werd geselecteerd in Stap 3.

5. Selecteer een knop om te programmeren.

6. Richt met de afstandsbediening op uw Tobii Dynavox IR ontvanger en druk op de gewenste knop op de afstandsbediening waarvan u wilt dat Virtual Remote die leert.

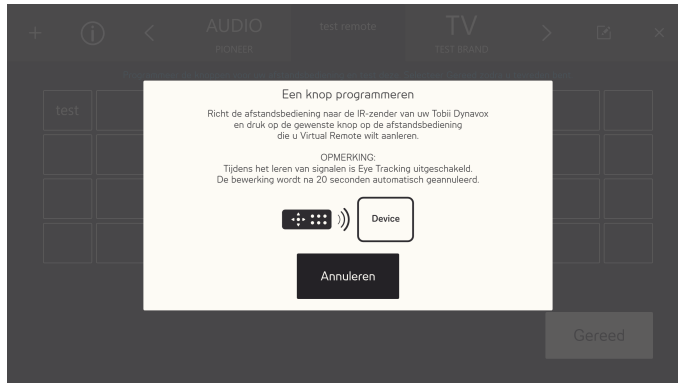

7. Als het signaal is bewaard in Virtual Remote zal de **Gereed** popup getoond worden.

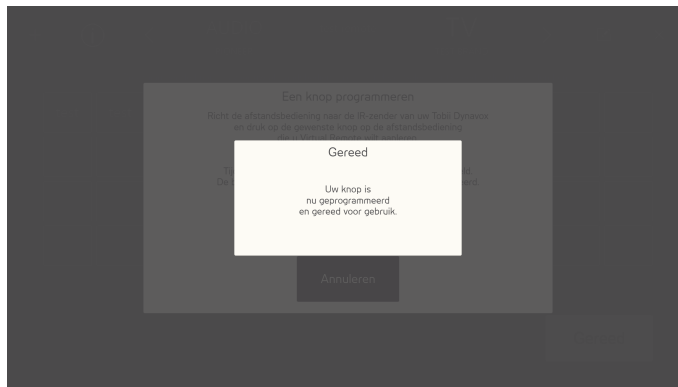


 De popup zal automatisch sluiten na een paar seconden.

8. Herhaal stap 5 - 7 totdat u alle benodigde knoppen heeft geprogrammeerd op de afstandsbediening.

 Om knoppen op de Afstandsbediening te veranderen of te verwijderen moet u programmeren beëindigen en naar de Bewerkingsmodus gaan. Voor meer informatie over Bewerkingsmodus, zie [5.2.5 Bewerkingsmodus](#), pagina 51.

9. Selecteer **Gereed** om af te ronden.

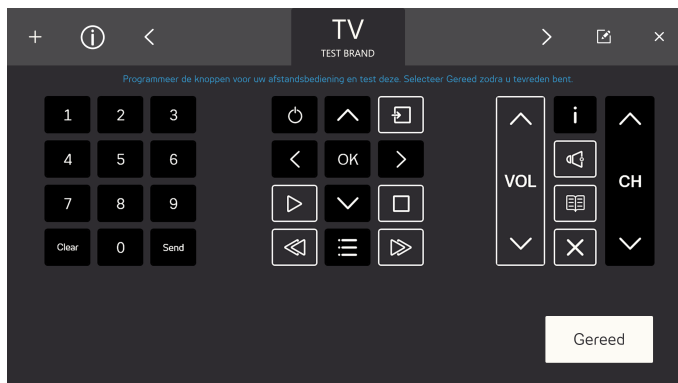


5.2.5 Bewerkingsmodus



Met Bewerkingsmodus kunt u veranderingen doorvoeren op bestaande afstandsbedieningen. Zorg ervoor dat de afstandsbediening die u wilt bewerken in de actieve modus staat. Om de Bewerkingsmodus in te gaan, volgt u de volgende procedure:

Stappenlijst Bewerkingsmodus

1. Selecteer de  (Bewerkingsmodus) knop.

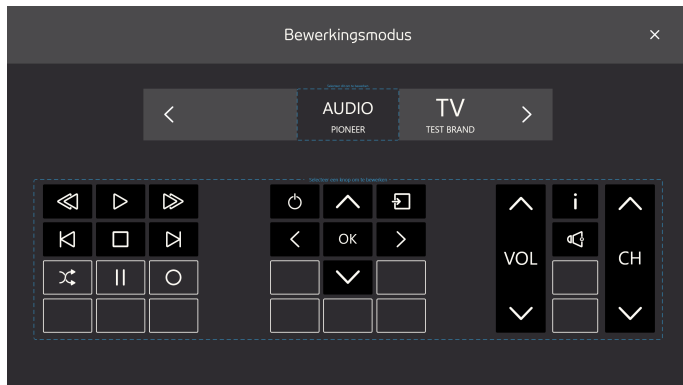


2. Selecteer welk onderdeel van de afstandsbediening u wilt veranderen. De volgende veranderingen kunnen worden doorgevoerd:
 - Naam veranderen van de Afstandsbediening, zie 5.2.5.1 *De naam van en afstandsbediening veranderen*, pagina 51
 - Een Afstandsbediening verwijderen, zie 5.2.5.2 *Een Afstandsbediening verwijderen*, pagina 52
 - Veranderingen doorvoeren op een bestaande actieve knop, zie 5.2.5.3 *Veranderingen doorvoeren aan een Bestaande Actieve Knop*.
 - Veranderingen doorvoeren op een bestaande, niet-geprogrammeerde knop, zie 5.2.5.4 *Veranderingen doorvoeren aan een Bestaande, niet-geprogrammeerde Knop*, pagina 56.
 - Een nieuwe knop toevoegen aan een lege plek, zie 5.2.5.5 *Een nieuwe Knop toevoegen aan een lege plek*, pagina 58

5.2.5.1 De naam van en afstandsbediening veranderen

Om de naam van een afstandsbediening te veranderen, volgt u deze procedure:


De naam van en afstandsbediening veranderen

1. Selecteer de  (Bewerkingsmodus) knop.

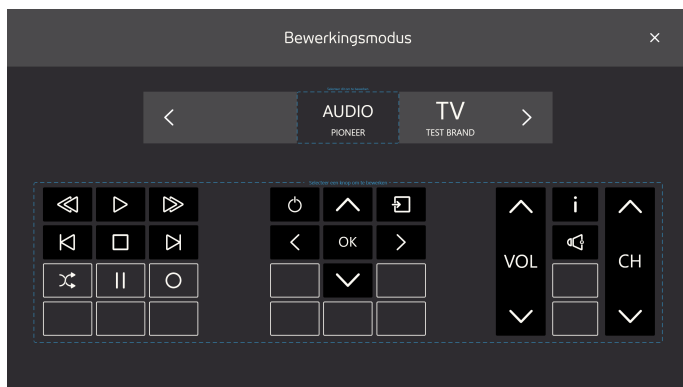

2. Selecteer het "Selecteer hier om te bewerken" vak rond de naam van de afstandsbediening.

3. Selecteer het **Hernoemen** knop.

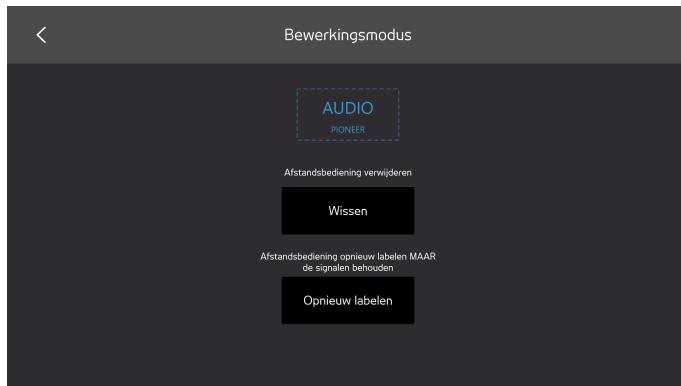

4. Type het nieuwe label in.



Zorg ervoor dat u een korte naam gebruikt.




5. Selecteer de **Enter** toets op het toetsenbord om het hernoemen af te ronden.
6. Selecteer het  icoon om de Bewerkingsmodus te verlaten.

5.2.5.2 Een Afstandsbediening verwijderen


Om een afstandsbediening te verwijderen, volgt u de volgende procedure:

Stappenlijst voor het Verwijderen van een Afstandsbediening

1. Selecteer de  (Bewerkingsmodus) knop.

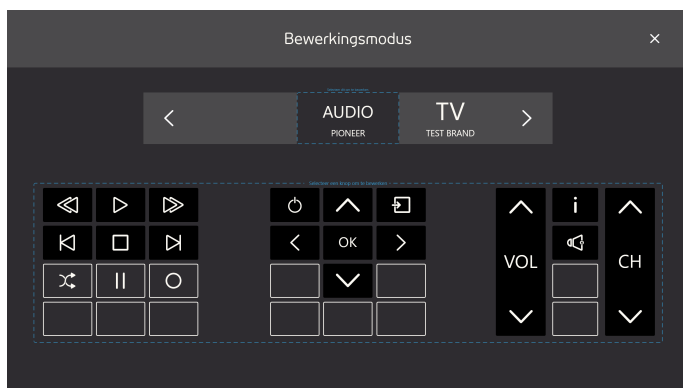

2. Selecteer het "Selecteer hier om te bewerken" vak rond de naam van de afstandsbediening.
3. Selecteer de **Verwijderen** knop.

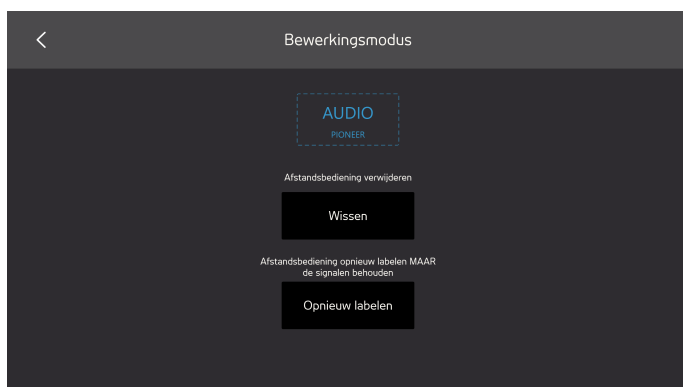

4. Selecteren:
 - **Ja** om te verwijderen
 - **Nee** om te Annuleren




5. Selecteer het  icoon om de Bewerkingsmodus te verlaten.

5.2.5.3 Veranderingen doorvoeren aan een Bestaande Actieve Knop


Om veranderingen door te voeren aan een bestaande actieve knop volgt u deze procedure:

Stappenlijst Veranderingen doorvoeren aan een Bestaande Actieve Knop

1. Selecteer de  (Bewerkingsmodus) knop.

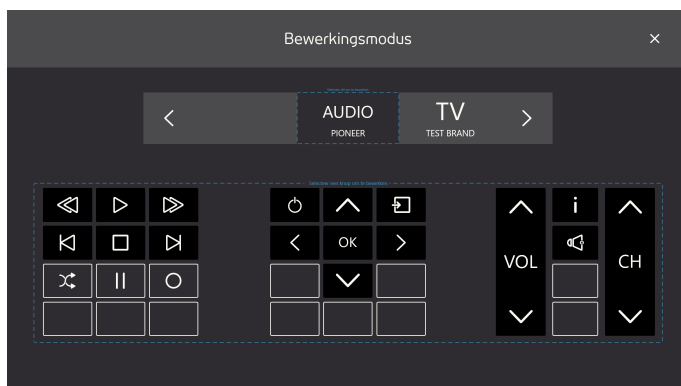

2. Selecteer een knop met een zwarte achtergrond en icoon of tekst, bv. , in het "Selecteer een knop om te bewerken" vak rond de afstandsbedieningsknoppen.
3. Selecteer een van de volgende acties:
 - Lengte Signaal, zie 5.2.5.3.1 *Lengte Signaal*.
 - Nieuw Signaal, zie 5.2.5.3.2 *Nieuw Signaal*, pagina 55
 - Tekst veranderen, zie 5.2.5.3.3 *Tekst veranderen*, pagina 55
 - Icoon veranderen, zie 5.2.5.3.4 *Veranderen Icoon*, pagina 56
 - Wisknop, zal alle informatie die opgeslagen is omtrent de knop verwijderen.

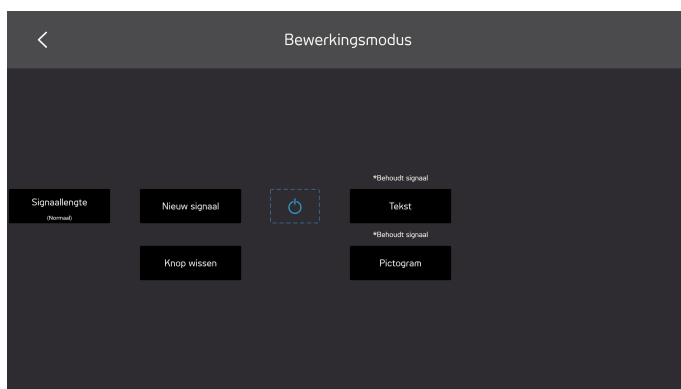

4. Selecteer het  icoon om de Bewerkingsmodus te verlaten.

5.2.5.3.1 Lengte Signaal


Om het ontvangende apparaat het signaal te laten begrijpen van de Virtual Remote, kan het nodig zijn om de lengte van het signaal te veranderen. De lengte van het signaal moet ook ingesteld worden als u een knop een signaal wilt laten uitzenden zolang u de knop geselecteerd heeft.

Selecteer één (1) van de volgende alternatieven:

- Normaal - zal het IR-signaal uitzenden in één korte stoot.
- Lang - zal het IR-signaal uitzenden gedurende één (1) seconde.
- Extra lang - zal het IR-signaal uitzenden gedurende twee (2) seconden.
- Continu - zal het signaal uitzenden zolang de knop is geselecteerd.



Dit is een typische instelling voor een volumeknop bijvoorbeeld.

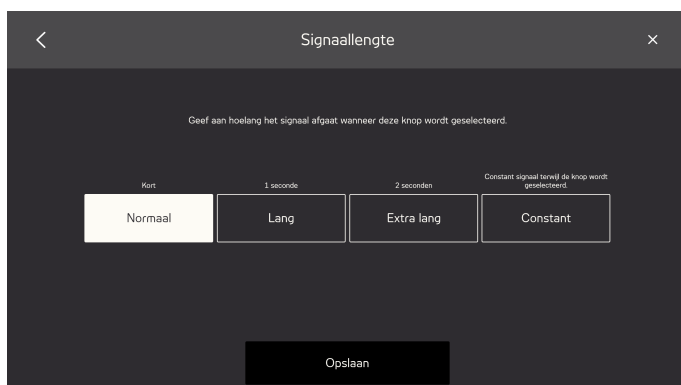


5.2.5.3.2 Nieuw Signaal


Om een nieuw signaal voor een knop te programmeren, volgt u de volgende procedure:

Stappenlijst Nieuw Signaal

1. Richt de afstandsbediening op uw Tobii Dynavox IR ontvanger en druk op de gewenste knop op de afstandsbediening die u wilt leren aan de Virtual Remote.

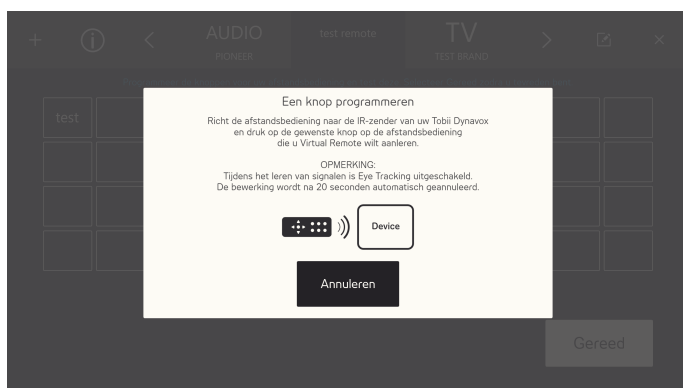

2. Als het signaal is bewaard in Virtual Remote zal de **Gereed** popup getoond worden.

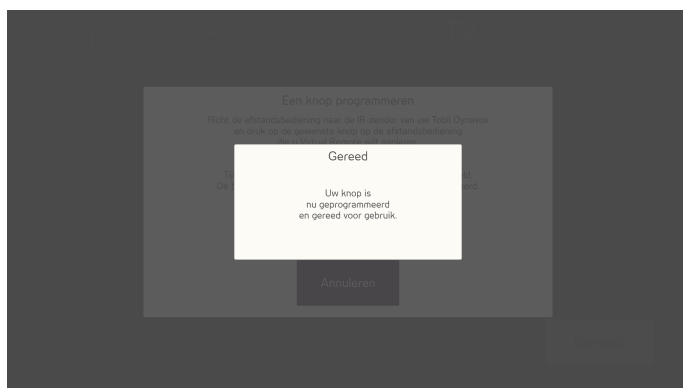


De popup zal automatisch sluiten na een paar seconden.

5.2.5.3.3 Tekst veranderen

Om tekst te veranderen, volgt u deze procedure:

Stappenlijst Tekst veranderen

1. Type de tekst in die op de knop moet staan.

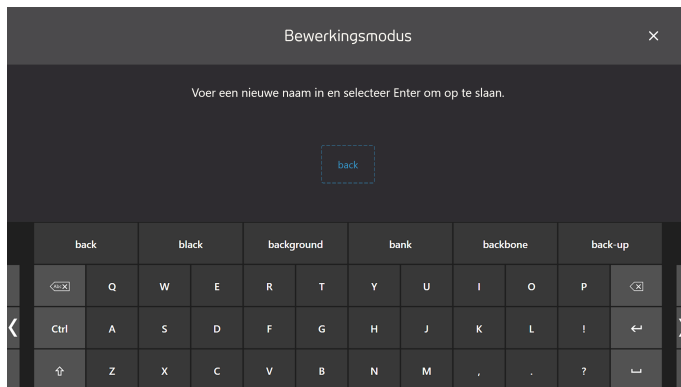


2. Selecteer de Enter/Return toets op het toetsenbord om de tekst te accepteren.

5.2.5.3.4 Veranderen Icoon

Om een icoon te veranderen, volgt u de volgende procedure:

1. Selecteer een beschikbaar icoon.

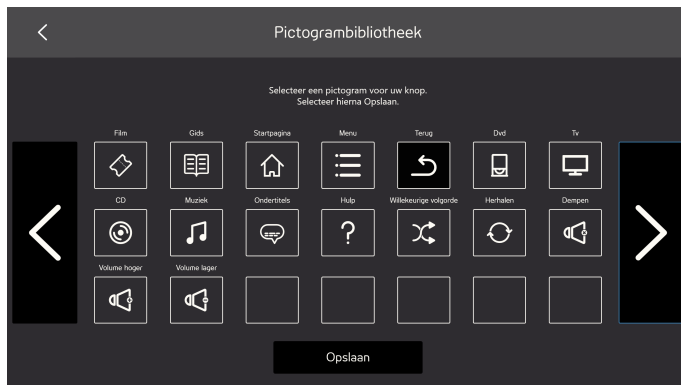


2. Selecteer de **Opslaan** knop om de icoon te accepteren.

5.2.5.4 Veranderingen doorvoeren aan een Bestaande, niet-geprogrammeerde Knop


Om veranderingen door te voeren aan een bestaande, niet-geprogrammeerde knop, volgt u deze procedure:

Stappenlijst Veranderingen doorvoeren aan een Bestaande, niet-geprogrammeerde knop

1. Selecteer de  (Bewerkingsmodus) knop.

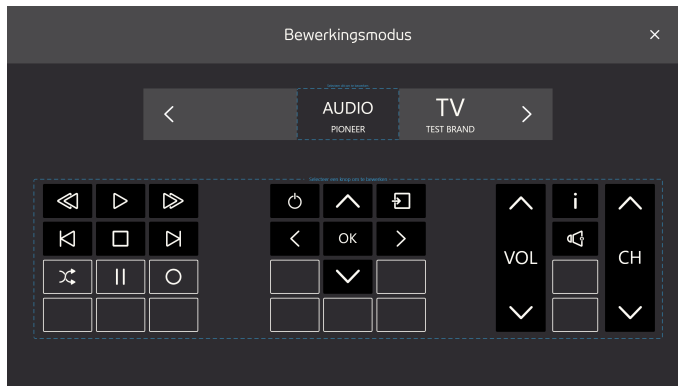

2. Selecteer een knop, met een grijze achtergrond en icoon of tekst, bv. , in het "Selecteer een knop om te bewerken" vak rond de afstandsbedieningsknoppen.
3. Selecteer een van de volgende acties:
 - Programmeren, zie 5.2.5.4.1 Programmeren, pagina 57
 - Tekst veranderen, zie 5.2.5.3.3 Tekst veranderen, pagina 55
 - Icoon veranderen, zie 5.2.5.3.4 Veranderen Icoon, pagina 56
 - Wisknop, zal alle informatie die opgeslagen is omtrent de knop verwijderen.

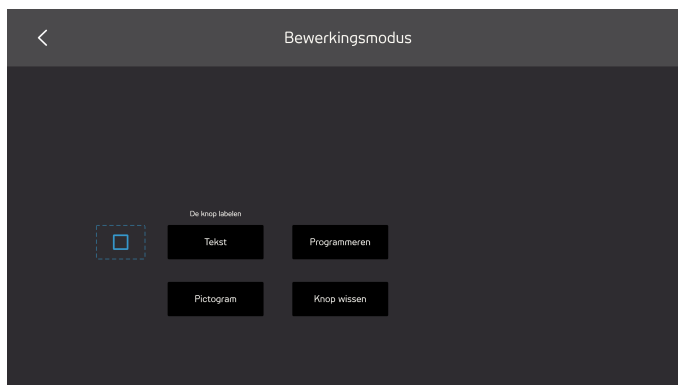


4. Selecteer het  icoon om de Bewerkingsmodus te verlaten.

5.2.5.4.1 Programmeren


Om een signaal voor een knop te programmeren, volgt u deze procedure:

Stappenlijst Programmeren

1. Richt de afstandsbediening op uw Tobii Dynavox IR ontvanger en druk op de gewenste knop op de afstandsbediening die u wilt leren aan de Virtual Remote.

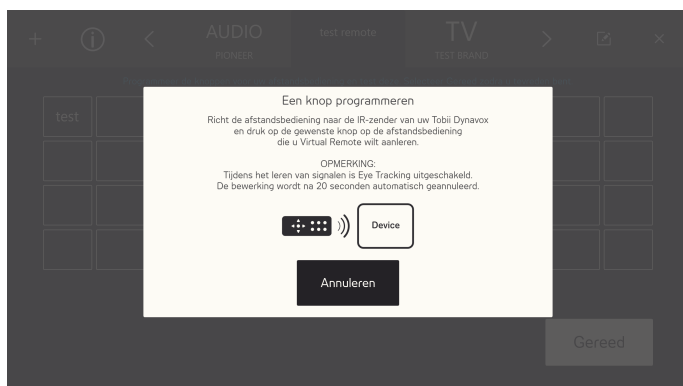

2. Als het signaal is bewaard in Virtual Remote zal de **Gereed** popup getoond worden.

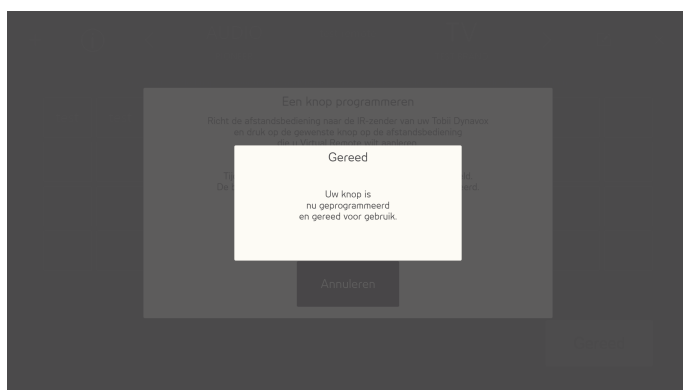


 De popup zal automatisch sluiten na een paar seconden.

5.2.5.5 Een nieuwe Knop toevoegen aan een lege plek


Om een nieuwe knop toe te voegen aan een lege plek volgt u deze procedure:

Stappenlijst voor Een nieuwe knop toevoegen aan een Lege Plek

1. Selecteer de  (Bewerkingsmodus) knop.

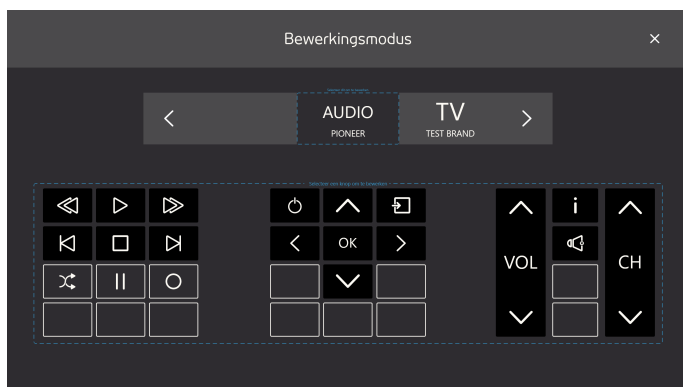


2. Selecteer een knop met een grijze achtergrond die leeg is, bv. , in het "Selecteer een knop om te bewerken" vak rond de afstandsbedieningsknoppen.
3. Selecteer een van de volgende acties:
 - Tekst veranderen, zie 5.2.5.3.3 *Tekst veranderen, pagina 55*
 - Icoon veranderen, zie 5.2.5.3.4 *Veranderen Icoon, pagina 56*

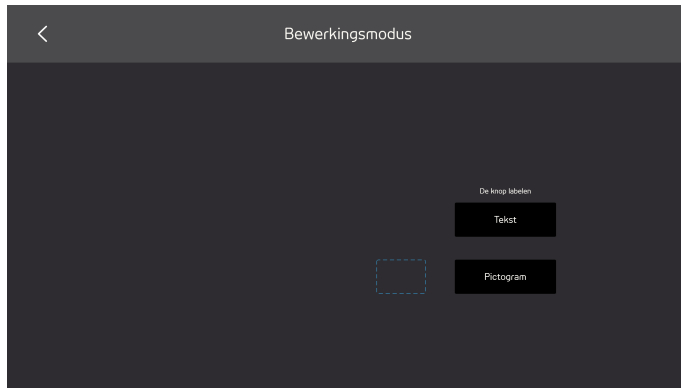


4. Selecteer het  icoon om de Bewerkingsmodus te verlaten.

5.2.6 Informatie

In de informatiepagina zult u alle Versie-informatie vinden voor zowel de hardware en de verschillende onderdelen van de software.

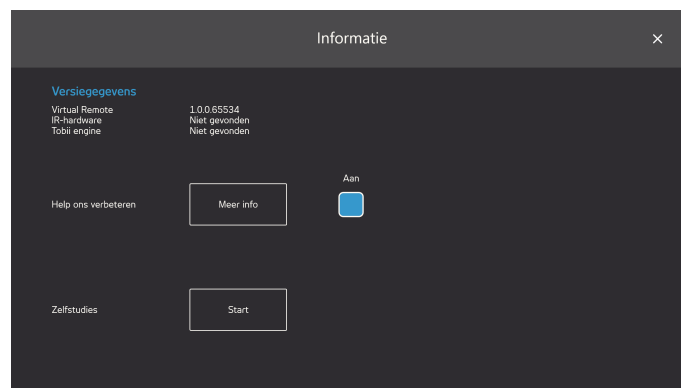

Help ons om te verbeteren: Om ons te helpen de Tobii Dynavox software te verbeteren, schakelt u het Aan/Uit vakje op **Aan**. Selecteer de Meer Informatie knop om een pagina te openen met informatie over waar dit allemaal over gaat. Voor meer informatie raadpleegt u *Afbeelding 5.8 Gegevens Verzamelen, pagina 60*.

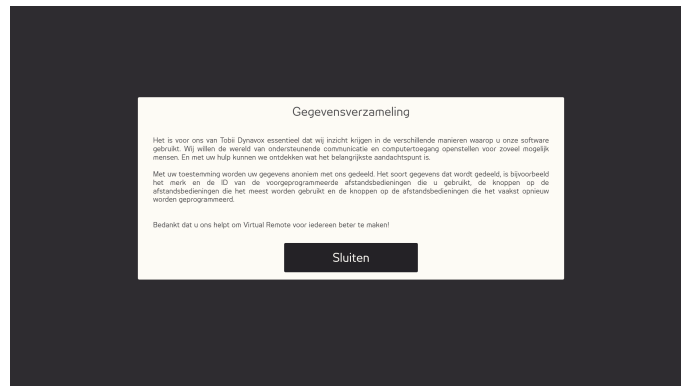

Afbeelding 5.8 Gegevens Verzamelen

Handleidingen: U zult ook in staat zijn om de Virtual Remote Handleiding te lanceren door de **Lanceren** knop te selecteren.

Copyright © Tobii AB (publ). Afbeeldingen en specificaties van producten en diensten gelden niet noodzakelijkerwijs voor elke lokale markt. Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren.

Ondersteuning voor uw Tobii Dynavox apparaat

Online help

Raadpleeg de productspecifieke ondersteuningspagina voor uw Tobii Dynavox apparaat. Hier vindt u actuele informatie over problemen en tips en trucs voor het product. Vind onze ondersteuningspagina's online op: www.TobiiDynavox.com/support-training

Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger of wederverkoper

Neem bij vragen of problemen met betrekking tot uw product contact op met uw Tobii Dynavox verkoopvertegenwoordiger of erkende wederverkoper voor hulp. Wederverkopers zijn het meest bekend met uw persoonlijke configuratie en kunnen u het beste helpen met tips en producttraining. Ga voor contactinformatie naar www.TobiiDynavox.com/contact