

Importera Sidsamlingar i Snap Core First

Sidsamlingar är en liten grupp sidor som kan importeras till Snap Core First. De här instruktionerna visar hur du gör det. Du behöver en internetuppkoppling för att följa dessa steg.

1. Logga in på www.mytobiidynavox.com eller skapa konto för gratis tillgång.
2. Gå till Page Set Central. Skriv in ett sökord och/eller använd filtreringsmöjligheterna till vänster på sidan för att hitta den Sidsamling du vill använda.



Tips: Leta efter Tobii Dynavox som tillverkare för innehåll som matchar organisationen i Snaps Siduppsättningar som Core First.

3. Välj Lägg till i Mina saker när du hittat det du vill ha. Sidsamlingen är nu redo att importeras i Snap.



Skript för Coronaviruset

Två skript skrivna i jagformat likt en social berättelse. Ladda ner som en sida i Snap Core First. Video med instruktioner hittas på Tobii Dynavox Sverige på YouTube under Tips och Tricks.

by Anna Fransson, utbildare på Tobii Dynavox [073 440 98 37](tel:0734409837)
3/12/2020

Snap Core First Swedish

Sidsamling

Categories

Symbol-Based Communication


↓ 24 927.00 KB Lägg till i Mina saker Ladda ned

4. Öppna Snap Core First  och se till att du är ansluten till internet.


5. Öppna sidan där du vill länka till den nya Sidsamlingen.

6. Välj Redigera  uppe till höger i appen.

7. Leta efter en tom cell (du kan behöva scrola ner) eller radera en knapp. Välj sedan den lilla länkikonen uppe i högre hörnet av cellen.

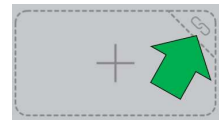

8. Välj Importera och länka till sida Från myTobiiDynavox.

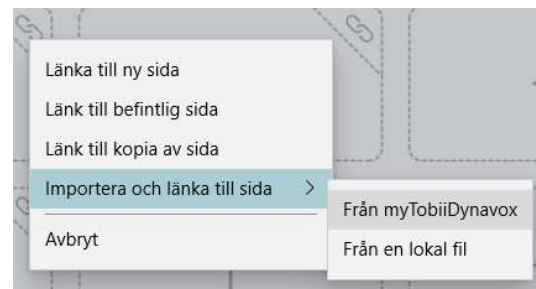


9. Markera Sidsamlingen du vill importera och tryck sedan Nästa.

Obs! Om du inte är inloggad på ditt www.mytobiidynavox.com-konto kommer Snap be dig att logga in nu.

10. Markera sidan du vill att knappen ska länka till och välj sedan Importera.

Tips: Sidsamlingar innehåller ofta ett Ämne eller en Kategori med underliggande sidor. Vanligtvis vill du välja Ämne eller Kategori som den sidan du länkar till. .

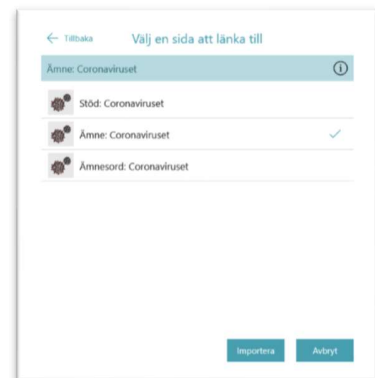

11. Den här Sidsamlingen är nu länkad. Välj Klara för att prova.

Tips: Om du ä ren resurs för andra och vill att de ska ha tillgång till samma Sidsamling, kan de också skapa ett kostnadsfritt konto på [lf www.mytobidynavox.com](http://www.mytobidynavox.com) och följa samma steg.