

Tobii Dynavox Laitteen desinfiointi

Vaadittu laitteisto

Sairaalatason puhdistuspyyhkeet tai vastaavat desinfiointipyyhkeet tartuntojen hallintaa varten.

Kyseiset tuotteet

Tobii I-Series	Tobii Dynavox PCEye Explore	Tobii Dynavox PCEye Bracket	Tobii M-Series
Tobii Dynavox I-Series(+)	Tobii Dynavox PCEye Mini	Tobii Dynavox Indi®	Tobii C-Series
Tobii Dynavox I-13/I-16	Tobii Dynavox PCEye Plus	Tobii Dynavox Indi® 7	Dynavox T-Series
Tobii Dynavox I-110	Tobii Dynavox PCEye 5	Tobii Dynavox Speech Case	Dynavox Maestro
Tobii PCEye	Tobii Dynavox EyeMobile Bracket	Tobii Dynavox AccessIT 3	Tobii S32
Tobii PCEye Go	Tobii Dynavox EyeMobile Plus	Tobii Dynavox EyeR	

Menettely

Desinfioi ja puhdista

1. Ennen puhdistusta, sulje laitteesi täysin.
2. Irrota laitteesi.
3. Poista kaikki johdot
4. Pyyhi kaikki ulkoiset pinnat käyttäen sairaalatason puhdistuspyyhkeitä tai vastaavia desinfiointipyyhkeitä tartuntojen hallintaa varten..
5. Salli laitteen kuivua luonnollisesti.
6. Kaikki sisällytetyt lisävarusteet tulee myös puhdistaa samalla tavoin
7. Mikäli juovikkaita jäänteitä jää puhdistuksesta, hankaa näyttöä pehmeällä kuivalla liinalla.
8. Hävitä käytetyt puhdistusmateriaalit asianmukaisesti.



Älä käytä suihkutettavaa puhdistusainetuotetta suoraan laitteeseen, koska nämä voivat kyllästää laitteen ja sallia ei-toivottua kosteutta yksikön sisään.

Tuki Tobii Dynavox -laitettasi varten

Online-tuki
Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa: www.TobiiDynavox.com/support-training

Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään
Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -ratkaisukonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta www.TobiiDynavox.com/contact