

Décontamination de l'appareil Tobii Dynavox

Exigences concernant l'équipement

Lingettes désinfectantes destinées aux hôpitaux ou équivalent afin de lutter contre les infections.

Produits applicables

Tobii I-Series	Tobii Dynavox PCEye Explore	Tobii Dynavox PCEye Bracket	Tobii M-Series
Tobii Dynavox I-Series(+)	Tobii Dynavox PCEye Mini	Tobii Dynavox Indi®	Tobii C-Series
Tobii Dynavox I-13/I-16	Tobii Dynavox PCEye Plus	Tobii Dynavox Indi® 7	Dynavox T-Series
Tobii Dynavox I-110	Tobii Dynavox PCEye 5	Tobii Dynavox Speech Case	Dynavox Maestro
Tobii PCEye	Tobii Dynavox EyeMobile Bracket	Tobii Dynavox AccessIT 3	Tobii S32
Tobii PCEye Go	Tobii Dynavox EyeMobile Plus	Tobii Dynavox EyeR	

Procédures

Décontaminez et nettoyez

1. Avant de procéder au nettoyage, éteignez complètement votre dispositif.
2. Débrancher votre dispositif.
3. Retirez tous les câbles.
4. Essuyez toutes les surfaces externes en utilisant des lingettes désinfectantes destinées aux hôpitaux ou équivalent afin de lutter contre les infections.
5. Laissez le dispositif sécher naturellement.
6. Tout accessoire inclus doit également être désinfecté de la même façon.
7. Si des stries de résidus provenant du nettoyage demeurent, essuyez l'écran avec un chiffon doux et sec.
8. Éliminez le matériel de nettoyage de manière adéquate.



Ne vaporisez pas de produits en vaporisateur directement sur le dispositif, car ces derniers pourraient saturer l'appareil ou laisser de l'humidité indésirable y pénétrer.

Obtenez de l'aide en ligne

Veuillez prendre connaissance de la page d'assistance spécifique de votre produit Tobii Dynavox. Cette page contient des informations à jour sur les problèmes connus, ainsi que des astuces sur l'utilisation du produit. Notre page d'assistance en ligne se trouve sur : www.TobiiDynavox.com/support-training

Contactez votre conseiller en solutions ou revendeur

Pour les questions et problèmes concernant votre produit, contactez votre conseiller en solutions Tobii Dynavox ou un revendeur autorisé. C'est lui qui connaît le mieux votre installation personnelle et est par conséquent le mieux à même de vous aider et vous former. Pour obtenir le détail des coordonnées, allez sur www.TobiiDynavox.com/contact