

Enhetssanering

Rekommenderad procedur för användning i klinisk miljö

Introduktion

Syftet med detta dokument är att ge en detaljerad beskrivning av hur man korrekt hanterar och dekontaminerar alla enheter och all utrustning som är tillgängliga och används på kliniken för att skydda personal mot infektioner och smittosamma sjukdomar.

Nödvändig utrustning

Antal	Artikelnummer	Beskrivning
1		Nitrilhandskar som ej innehåller latex
1		Skyddsglasögon
1		Kartongkniv
1		Mikrozid® känslig vätska eller liknande
1		Glasrengöring
1		Pappersservetter

Bakgrund

Antaganden

Detta dokument förutsätter att användaren har läst och förstår MSDB för alla rengöringsmedel

Applicerbara produkter

Tobii I-Series	Tobii PCEye Go	Tobii Dynavox PCEye Mini	Tobii Dynavox EyeMobile Plus
Tobii C-Series	Tobii Dynavox PCEye Explore	Tobii Dynavox PCEye Plus	Tobii Dynavox I-Series(+)
Tobii S32	Dynavox Maestro	Tobii Dynavox Indi®	Tobii Dynavox I-110
Tobii PCEye	Dynavox T-Series	Tobii Dynavox EyeR	

Procedur

Syfte

Att skydda personal i klinisk miljö mot infektioner och smittosamma sjukdomar genom att dekontaminera och rengöra alla enheter och all utrustning som finns tillgängliga och används.

Support för din Tobii Dynavox-enhet

Få hjälp online

Läs den produktspecifika supportsidan för din Tobii-enhet. Den innehåller uppdaterad information om frågor och tips & tricks som rör produkten. Hitta våra supportsidor online på: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontakta din försäljningsrepresentant eller återförsäljare

Kontakta din försäljningsrepresentant på Tobii Dynavox eller den auktoriserade återförsäljaren om du har frågor om eller problem med din produkt. De känner till din utrustning och är bäst lämpade att hjälpa dig med tips och övning. För kontaktuppgifter, se www.TobiiDynavox.com/contact

Omfattning

Det rekommenderas att alla tillgängliga och använda enheter dekontamineras före vidare hantering.

Mottagande av enhet

1. All utrustning för dekontaminering måste levereras till det angivna rengöringsområdet. Sådan utrustning får inte dekontamineras utanför detta område.
2. Nitrilhandskar utan latex samt ögonskydd MÅSTE bäras vid hantering av utrustning eller material som ännu inte har dekontaminerats.
3. Öppna försiktigt förpackningen med en kartongkniv. (Om tillämpligt)
4. Packa upp enheten och eventuella medföljande tillbehör. (Om tillämpligt)



Allt förpackningsmaterial kommer att kasseras. Se *Kassera förpackningsmaterial*

Dekontaminera och rengör

1. Om enheten har ett fuktskydd monterat, ta bort det och kassera det.
2. Spraya enheten med Mikrozyd® känslig vätska eller motsvarande och låt den vila i minst en minut. Desinficeringsmedlet kommer att evaporera under den tiden.
3. Eventuella tillbehör som ingår måste desinficeras med Mikrozyd® känslig vätska eller motsvarande.
4. Om enheten har en bildskärm, rengör du bildskärmen med glasrengörare och en pappershandduk.
5. Efter avslutad dekontaminering kommer enheterna att komma in tillsammans med alla medföljande tillbehör och släppas för inkommande inspektion och testning.
6. Kassera använda pappershanddukar och rengöringsmedel på rätt sätt.

Kassera förpackningsmaterial

1. Lådor ska slås ut så de är platta.
2. Kassera lådor och förpackningsmaterial i lämpliga avfallsbehållare.

Support för din Tobii Dynavox-enhet

Få hjälp online

Läs den produktspecifika supportsidan för din Tobii-enhet. Den innehåller uppdaterad information om frågor och tips & tricks som rör produkten. Hitta våra supportsidor online på: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontakta din försäljningsrepresentant eller återförsäljare

Kontakta din försäljningsrepresentant på Tobii Dynavox eller den auktoriserade återförsäljaren om du har frågor om eller problem med din produkt. De känner till din utrustning och är bäst lämpade att hjälpa dig med tips och övning. För kontaktuppgifter, se www.TobiiDynavox.com/contact