



---

# DynaVox T10

## Series 5 Page Converter - Was kann dieser?

### Allgemein

---

Der DynaVox Series 5 Page Converter wandelt eine bestehende Series 5 Benutzerdatei (.user) in eine DynaVox Compass Benutzerdatei (.bzf) um.

Die umgewandelte Datei enthält:

- Eine .bzf Datei mit allen Verzeichnissen und Seiten aus dem Series 5 Benutzer inklusive aller eingefügten Symbole und Geräusche, die auf den Seiten verwendet werden.
- My Symbols Symbolsammlung, welche die eigenen Symbole aus dem Series 5 Benutzer enthält, die auf den Seiten angezeigt werden. Es werden nicht alle Symbole aus der Symbolsammlung kopiert, sondern nur diejenigen, welche auf den Seiten verwendet werden.
- Unbedeutende Einstellungen .xml, UserVars.bpf und userdb.sqlite Dateien.
- Das Series 5 Abkürzungsverzeichnis und meine Phrasen

### UMGEWANDELTE OBJEKTE

---

#### Ordner

- Name

#### Seiten und Popups (Popups werden zu Seiten)

- Name
- Bildschirmbereich
- Hintergrundfarbe
- Hintergrundbild
  - **Hinweis:** gifs werden nicht umgewandelt
- Darstellung Hintergrundbild
- Aktionen beim Öffnen der Seite
- Aktionen beim Schließen der Seite
  - **Hinweis:** Series 5 Popup Darstellungen (Mit Titel, Beweglich, Statisch) werden in Compass alle zu einem Typ umgewandelt. In Compass gibt es keine *Mit Titel*

---

Darstellung und es müsste evtl. eine Aktion zum Schließen des Popups hinzugefügt werden.

## Buttons

- Bildschirmbereich
- Buttontyp:
  - Wortvorhersage, Buchstabenvorhersage, zuletzt verwendete Wörter > Wortvorhersage
  - Phrasenvorhersage > Phrasenvorhersage
  - Alle anderen > normal
- Wort- und Phrasenvorhersage haben:
  - Rahmenfarbe
  - Hintergrundfarbe
  - **Hinweis:** Die dickere Rahmendicke wird auf Symbol-Buttons nicht umgewandelt.
- Hintergrundfarbe
- Form:
  - Ordner und Flat 2D Ordner > Ordner
  - 2D, Rechteck und Photo-Button > Rechteck (flach)
  - Rund > Rund
  - Ellipse > Kreis
  - Normal > kantiges Rechteck
  - Alles andere > Rechteck (flach)
  - Bezeichnungen
  - Symbole
- Aktionen
- Name
- Mitteilungen
- Audiofeedback
  - **Hinweis:** Hinweise der Sprachsynthese, keine Sound-Dateien

## Bezeichnungen

- Bildschirmbereich
- Text der Bezeichnung
  - **Hinweis:** Die Position der Bezeichnung auf einem Button könnte sich manchmal ändern. Z.B. vom oberen Bereich des Buttons in den unteren
- Schrift



- **Hinweis:** Es könnten Schriftartveränderungen zwischen den beiden Plattformen vorhanden sein.
- Textfarbe
- Horizontale Textausrichtung
- Name
- Mitteilung
- Alle enthaltenen Alternativen werden in normalen Text umgewandelt, da die Alternativen nicht in der neuen Compass Software enthalten sind.

## Aktive Labels

- In der Series 5 Software konnten aktive Labels auf zwei Wegen erstellt werden:
  1. Mit dem Werkzeug "Aktives Label" in der Vollversion.
  2. Mit einer Aktion wie "Aktives Label senden", um ein aktives Label in die Bezeichnung eines Buttons zu integrieren.

Das Programm wandelt die aktiven Labels unter #1 um. Die aktiven Labels unter #2 werden in normalen Text umgewandelt.

- Bildschirmbereich
- Typ der Bezeichnung
  - Tag
  - Datum
  - Uhrzeit
  - Tastatur-Taste
  - Automatisches Leerzeichen am Wortende
  - Automatische Großschreibung am Satzanfang
  - Nach dem Sprechen löschen
  - Keines der weiteren Labels
- Schrift
- Textfarbe
- Horizontale Textausrichtung

## Symbole

- Bildschirmbereich
- Symbolverweis - Umgewandelt, wie unten beschrieben
- Name
- Mitteilung

---

## Nachrichtenfenster

- Bildschirmbereich
- Name
- Mitteilung

## Registerkarten

- Bildschirmbereich
- Höhe

## Einzelne Registerkarten

- Bezeichnung
- Symbol
- Name
  - **Hinweis:** Die Namen, welche auf den Registerkarten verwendet werden, sind in Compass nicht sichtbar.
- Mitteilungen
- Die Position von Symbol und Bezeichnung können von der Darstellung in der Series 5 abweichen.

## Themenbox (werden in Gruppenfelder umgewandelt)

- Bildschirmbereich
- Text
- Name
- Mitteilungen
- Der Titel der Box wird nicht umgewandelt.

## Interaktive Buttons

- Bildschirmbereich
- Aktionen
- Name
- Mitteilungen
- Audiofeedback
  - **Hinweis:** Hinweise der Sprachsynthese, keine Sound-Dateien

---

## Nicht umgewandelte Objekte

- Fundgrube
- Universalseiten
  - **Hinweis:** Diese werden so umgewandelt, dass gesehen werden kann, was in der Series 5 genutzt wurde. In der Compass Software muss in diesem Fall ein Wortlistenfeld genutzt werden
- Linien
- Freiformbuttons
  - **Hinweis:** Diese werden in rechteckige Buttons umgewandelt.
- Interaktive Freiformbuttons
  - **Hinweis:** Diese werden in rechteckige Buttons umgewandelt.
- Ebook Seiten
- Status der Augensteuerung
- Scanninggruppen werden nicht übertragen
- Bildschirmtastaturen werden übertragen, aber in Seiten umgewandelt.
- Vorlagen werden in Seiten umgewandelt (Können jedoch mit der Aktion "Wie Seite" auch als Vorlage verwendet werden)
- Systemvariablen

## Was passiert mit den Symbolen?

- PCS Symbole - Die Series 5 Software enthält Untersammlungen der PCS Symbole. Diese wurden in die DynaVox Compass Software übertragen. Die Symbol IDs sind unterschiedlich.
- My Symbole/Meine Symbole - Solche Symbole, welche auf einem Button verwendet werden, werden in die Symbolsammlung der Compass Software übertragen.
- Sonstige - Für alle weiteren wurde das Bild des Symbols genutzt und ein neues Symbol unter My Symbols in der Compass Software erstellt.
- Nur die erste Aktion eines animierten Symbols wird importiert.

## Daten und Weiteres

- Folgende Inhalte werden nicht umgewandelt:
  - Einstellungen
  - Alternativen
  - Einträge im Wörterbuch
  - Ausspracheausnahmen
  - Fotoalben
  - E-Mail

- 
- Makros werden in top-level Makros umgewandelt.
  - Phrasen, die in der Series 5 verschiedene Verweise haben, werden nur in einen Phrasenordner übertragen (unter Vokabular/Meine Phrasen) da die Organisation in Compass unterschiedlich ist.

## Aktionen

Im unteren Abschnitt finden Sie eine Liste der Aktionen, die in Compass Aktionen umgewandelt werden.

Bei Fortgeschrittener Programmierung werden einige Aktionen in die Compass Software übertragen. Manche verwendete Aktionen werden jedoch nicht umgewandelt. Der letzte Abschnitt dieses Dokuments zeigt Aktionen, die nicht umgewandelt werden.

### Nachrichtenfenster

- Cursor nach oben
- Cursor nach unten
- Cursor nach links
- Cursor nach rechts
- Scrollen - nach oben
- Scrollen - nach unten
- Markierung beginnen
- Markierung beenden
- Auf Pos1 im Nachrichtenfenster
- Auf ENDE im Nachrichtenfenster
- 1 Wort zurück
- 1 Wort weiter
- 1 Satz zurück
- 1 Satz weiter
- 1 Paragraph weiter
- 1 Paragraph zurück
- Text ins Nachrichtenfenster
- Symbole und Text einfügen
- Symbole und Aufnahme einfügen
- Bezeichnung ins Nachrichtenfenster
- Neue Zeile einfügen
- Abkürzung autom. ausschreiben
- 1 Zeichen nach links löschen
- 1 Zeichen nach rechts löschen



- Alles löschen
- 1 Wort löschen
- Wort auswählen
- Markierung hier beginnen
- Markierung hier stoppen
- Alles markieren
- Markierung des Texts aufheben
- Rechtschreibung prüfen
- Rechtschr. auf Symbolen prüfen
- Wortform anzeigen
- Wortform ändern
- Symbole Plus für mark. Text
- Symbole Minus für mark. Text
- Textpassage suchen
- Textpassage suchen - wiederholen
- Kopieren
- Ausschneiden
- Einfügen
- Memory Mode Ein/Aus
- Datei laden
- Text laden & Symbole Plus
- Text im Nachrichtenf. speichern
- Text im Nachrichtenf. speichern unter
- Nachrichtenfenster als Text speichern
- Kopieren zu "Abkürzungen"
- Markierung beginnen
- Markierung beenden
- Rückgängig
- Wiederholen
- Nächste Alternative
- Vorherige Alternative
- Aktuelle Alternative bearbeiten
- Alternative einfügen

- 
- Text einfügen vor Markierung
  - Text einfügen nach Markierung
  - Text einfügen, Alternativen auswählen
  - Bezeichnung einfügen, Alternativen auswählen
  - Zu "Meine Phrasen" hinzufügen
  - Alternative aus Auswahl erstellen

### **Seiten Navigation**

- Popup schließen
- Alle Popups schließen
- Seite öffnen
- 1 Seite zurück
- 1 Seite weiter
- Startseite öffnen
- Popup öffnen - exklusiv
- Popup-exklusiv zu Position

### **Stimme, Geräusch und Video**

- Aufnahme abspielen
- Video abspielen
- Text sprechen
- Bezeichnung sprechen
- Sprachausgabe lauter
- Sprachausgabe leiser
- Bestimmte Lautstärke einstellen
- Sprechgeschwindigkeit ändern
- Sprechgeschwindigkeit erhöhen
- Sprechgeschwindigkeit verringern
- Stimme wechseln
- Markierten Text sprechen
- Nachrichtenfenster sprechen
- Wort sprechen
- Satz sprechen
- Paragraph sprechen





---

## Setup Menüs

- Setup öffnen

## Tastaturbefehle

- Abbrechen & Systemtastatur schließen
- OK & Systemtastatur schließen
- Shift
- Strg
- Alt
- Feststelltaste
- Normal
- Einfg

## Programmierung

- Primärcode Kommentar
- Solange-Schleife
- Andernfalls
- Es sei
- Mitteilung zu Objekt senden
- Ausdruck sprechen
- Bezeichnung einfügen
- Symbol eingeben
- Farbe auswählen
- Rahmenfarbe auswählen
- Textfarbe auswählen
- Variable einfügen
- Verbergen
- Zeigen
- <Geöffnete Seiten speichern>
- Makro ausführen
- Mitteilung an alle senden
- Pause
- Millisekunde Pause

---

## Verschiedene

- Software-Anwendung öffnen
- Dokument öffnen
  - **Hinweis:** Wird in LaunchFile umgewandelt, welches in der Zukunft von der Compass Software unterstützt werden könnte.
- Vorhersage zurücksetzen
- Mehr Vorhersagen
- Nachricht anzeigen
- Wortvorhersage Ein/Aus
  - **Hinweis:** Wird zu TogglePrediction umgewandelt, welches in der Zukunft von der Compass Software unterstützt werden könnte.

## Aktionen, die nicht umgewandelt werden

Die folgenden Series 5 Aktionen können nicht in Aktionen für die Compass Software umgewandelt werden.

- Umfeldsteuerung
- Computerzugriff
- Telefonunterstützung
- E-Mail
- Ein paar Aktionen zur Navigation wie Popup minimieren, Suche, Lesezeichen etc.
- Ein paar grammatikalische Funktionen, wie Vorsilbe oder Nachsilbe mit Rechtschreibregeln hinzufügen, ähnliche Wörter finden, Erweiterungsregeln und mehrsprachige Unterstützung
- Interaktion zwischen Series 5 und Bildschirmtastaturen
- Textmitteilungen
- Ebooks
- Ein paar aktive Labels, die sich auf Variablen beziehen, welche nicht in Compass enthalten sind.
- Medien und MP3s über das einfache Abspielen der Datei hinaus.
- Der Series 5 Ansatz vom Fotoalbum
- Drucken
- Taschenrechneraktionen

Die meisten von diesen werden momentan in Compass nicht unterstützt. Ein paar Aktionen aus der folgenden Liste könnten möglicherweise unterstützt werden, wurden jedoch nicht mit einbezogen, da diese entweder zu komplex sind oder einen zu geringen Nutzen hätten



---

## Umfeldsteuerung, Computerzugriff, Telefonfunktionen

- IR Befehl senden
- IR Befehl einreihen
- Aktive Fernbedienung festlegen
- Befehl von aktueller Fernbedienung ausführen
- Befehl von bestimmter Fernbedienung ausführen
- IR Befehlsreihe senden
- IR Befehlsreihe löschen
- IR X10 Befehl ausführen
- GEWA Jupiter Befehl ausführen
- GEWA 200 Befehl ausführen
- Possum Phone Befehl ausführen
- Tash Phone Befehl ausführen
- 2007 Tash Phone Befehl ausführen
- Telefonat führen
- Modemverbindung unterbrechen
- Modemverbindung herstellen
- Fragen und mit Modem verbinden
- Telefon auflegen
- Ausgewählte Telefonnummer wählen
- Telefontaste wählen: Eins
- Telefontaste wählen: Zwei
- Telefontaste wählen: Drei
- Telefontaste wählen: Vier
- Telefontaste wählen: Fünf
- Telefontaste wählen: Sechs
- Telefontaste wählen: Sieben
- Telefontaste wählen: Acht
- Telefontaste wählen: Neun
- Telefontaste wählen: Null
- Telefontaste wählen: A
- Telefontaste wählen: B

- 
- Telefontaste wählen: C
  - Telefontaste wählen: D
  - Telefontaste wählen: Auflegen oder Annehmen
  - Telefontaste wählen: Stern
  - Telefontaste wählen: Raute
  - Bezeichnung senden
  - Tastendruck senden
  - Tasten-Loslassen senden
  - Sondertaste senden
  - Text senden
  - Text senden und Alternativen füllen
  - Mausklick senden
  - Absolute Mausbewegung senden
  - Dauerhafte Mausbewegung senden
  - Senden an...
  - Ins nächste Fenster übertragen
  - Alternative Ausgabe
  - Fensterposition oder Größe ändern
  - Windows Button senden (nur intern)
  - Dialogsteuerung senden (nur intern)
  - Scanning-Maus abrufen (nur intern)
  - Befehl "Serialkeys senden" (nur Bluetooth)
  - Aktives Programm wechseln (nur intern)
  - Bluetooth AccessIT-Ausgabe abbrechen
  - Series 5 minimieren
  - Series 5 maximieren oder wiederherstellen
  - Alternative Ausgabe einschalten
  - Alternative Ausgabe ausschalten
  - Sprachausgabe mit alternativer Ausgabe ausschalten
  - Sprachausgabe mit alternativer Ausgabe einschalten

---

## E-Mail und Textmitteilungen

- Textmitteilung Menü zeigen
- Neue Textmitteilung
- Direkt Textmitteilung
- Direkt Textmitteilung an...
- Textmitteilung fertigstellen
- Direkt auf diese Textmitteilung antworten
- Eingang Textmitteilungen
- Nächste Textmitteilung abrufen
- Vorherige Textmitteilung abrufen
- E-Mail Menü zeigen
- Anhangsbrowser anzeigen
- Neue E-Mail
- Direkt E-Mail
- Direkt E-Mail an...
- E-Mail fertigstellen
- Direkt auf diese E-Mail antworten
- Eingang E-Mails
- Nächste E-Mail-Nachricht abrufen
- Vorherige E-Mail-Nachricht abrufen
- E-Mail Menü zeigen

## eBooks

- eBook öffnen
- Nächste Seite
- Vorherige Seite
- eBook-Seite ins Nachrichtenfenster
- e-Book-Seite in den "Vokabular Zwischenspeicher"
- eBook-Seite symbolisieren
- eBook-Seite entsymbolisieren
- eBook laden
- eBook schließen

- 
- eBook-Viewer
  - Bildlauf in eBook
  - eBook-Schriftgröße anpassen
  - eBook herunterladen
  - Lesezeichen erstellen
  - Zu bestimmtem Lesezeichen springen
  - eBook -Sprachausgabe abspielen/anhalten/fortsetzen
  - Geladenes eBook einem Button zuweisen

## **Medien/MP3**

- Mediendatei öffnen
- Lied singen
- Eine Musikdatei abspielen
- Musikdatei aus diesem Ordner abspielen
- Nach Musikordnern suchen
- Nächstes Lied
- Vorheriges Lied
- Abspielen/Pause/Fortsetzen
- Beenden
- Abspielgeschwindigkeit ändern
- Schneller Vorlauf
- Rücklauf
- Zufällige Auswahl umschalten
- Wiedergabeliste löschen
- Musik lauter
- Musik leiser
- Musikeinstellungen
- Wiederholungsmodus ändern
- Pause oder Abspielen des Videos fortsetzen
- Video anhalten

## **Sprache und Vokabular**

- Sprache einstellen
- Flex. Abkürzungen zulassen Ein/Aus

- 
- Kontext berücksichtigen Ein/Aus
  - Abkürz. autom. ausschreiben Ein/Aus
  - "Meine Phrasen" automatisch schließen: An oder Aus
  - "Meine Phrasen" einfügen: An oder Aus
  - "Meine Phrasen" sprechen: An oder Aus
  - Ähnliche Wörter finden
  - Buchstabenvorhersage einfügen
  - Phrasenvorhersage einfügen
  - Wortvorhersage einfügen
  - Erweiterungsregel anwenden und ersetzen
  - Alle möglichen Erweiterungen anzeigen
  - Erweiterungsregeln laden
  - Erweiterungsregeln löschen
  - Vorsilbe hinzufügen
  - Nachsilbe hinzufügen
  - Schubladen-Wörter bearbeiten
  - Ist das Füllwort in Alternative?
  - Stimmt das Wort mit einem Satzteil überein?

## Navigation

- Popup schließen
- Popup minimieren
- Alle Popups maximieren
- Nach Seite mit best. Inhalt suchen
- Seite öffnen & Vok. in Fundgrube anzeigen
- Bildschirmtastatur verlassen
- Scrollen abwärts in Fundgrube
- Scrollen aufwärts in Fundgrube
- Lesezeichen setzen
- Lesezeichen öffnen
- Vorherige Seite und Popups öffnen
- Nächste Seite und Popups öffnen
- Registerkarte aufrufen
- Genannte Seite öffnen

---

## Taschenrechner

- Addieren
- Subtrahieren
- Multiplizieren
- Teilen
- Ist gleich
- Quadratwurzel
- Vorzeichen ändern
- Prozent
- Y hoch X
- (
- )
- reziprok/Kehrwert
- Im Quadrat
- Sinus
- Cosinus
- Tangens

## Nachrichtenfenster

- Bei Texteing. ins NF sprechen Ein/Aus
- Leerzeichen autom. einfügen Ein/Aus
- Großschr. am Satzanf. Ein/Aus
- Inh. des Nachrichtenf. autom. löschen Ein/Aus
- Wort b. Sprechen hervorheben Ein/Aus
- Standardschrift einstellen
- Beliebigen Text des Buttons sprechen
- Aktives Label einfügen
- Beliebigen Text des Buttons einfügen
- Schriftart ändern
- Datei laden
- Wort groß/klein schreiben
- Letzten 2 Wörter zusammenschreiben
- Datei laden und sprechen
- Schriftart des Meldungsfensters festlegen





---

## **Sprachausgabe**

- Temporäre Lautstärke
- Temporäre Geschwindigkeit
- Temporäre Stimme
- Sprechen anhalten
- Stimme auswählen
- Sprechgeschwindigkeit eingeben

## **Systemzugriff**

- Kategorienübersicht
- Grundeinstellungen
- Kamera
- Fotoalbumbrowser
- Medien Verzeichnis
- Dateimanager
- Ein Benutzerdateienverzeichnis öffnen
- Seitenverzeichnis
- Personalisierungs-ASSistent (PASS)
- Wortvorhersage
- Sprachausgabe
- Systemeinstellungen
- Extras
- E-Mail & Textmitteilungen
- Benutzerverzeichnis
- Makro Editor
- Symbolverzeichnis
- Akkuinfo
- IR Verzeichnis
- Telefonieren
- Adressbuch
- Erinnerungen
- Berichte
- Wörterbuch
- Technische Hilfe kontaktieren

- 
- MP3 Player
  - Abkürzungsverzeichnis
  - Taschenrechner
  - Seitennavigator
  - "Meine Phrasen" öffnen
  - "Meine Phrasen" und Kategorie öffnen

## **Augensteuerung und andere Auswahlmethoden**

- Augensteuerung Statusmenü
- Kalibrierung der Augensteuerung
- Kalibrierung der Augensteuerung - Verbessern
- Kalibrierung der Augensteuerung - Zurücksetzen
- Augensteuerung - Assistent
- Aktionsfelder ausblenden
- Zeitüberschreitung für Deaktivierung der Augensteuerung
- Langsame Feinabstimmung in der Nähe des Ziels umschalten
- Feinabstimmung umschalten (nur intern)
- Feinabstimmung aktivieren (nur intern)
- Feinabstimmung deaktivieren (nur intern)
- Scanning Geschwindigkeit erhöhen
- Scanning Geschwindigkeit verringern
- Pausenzeit für die Maus verkürzen
- Pausenzeit für die Maus verlängern
- Pausenzeit für den Joystick verkürzen
- Pausenzeit für den Joystick verlängern
- Verweilzeit für Augen verkürzen
- Verweilzeit für Augen verlängern
- "Auswahl durch" einstellen
- Scanninggeschw. auswählen
- Scanning Geschwindigkeit der Maus festlegen
- Pausenzeit für die Maus festlegen
- Verweilzeit für die Augensteuerung festlegen
- Auswahl für Augensteuerung festlegen
- Scanningmuster auswählen

- Mauspause Ein/Aus
- Augensteuerung Ein/Aus
- Audiofeedback lauter
- Audiofeedback leiser

## **Gerät**

- Ruhezustand
- Menü Lautstärke
- Gerät ausschalten
- Integriertes Bluetooth und drahtloses Netzwerk aktivieren
- Integriertes Bluetooth und drahtloses Netzwerk deaktivieren
- Software schließen
- Gerät neu starten
- Gerät in Ruhezustand versetzen
- Ruhezustand
- Helligkeit ändern
- Joystick Maus ein/aus (nur intern)

## **Kamera und Fotoalbum**

- Bezeichnung oder Text zum Foto sprechen
- Fotoalbum öffnen
- Fotoalbum auswählen
- Vorherige Seite
- Vorheriges Foto
- Als aktuelles Foto festlegen
- Nächstes Foto
- Nächste Seite
- Foto löschen
- Foto mit Bestätigung löschen
- Diashow abspielen/anhalt/fortsetzen (grundlegend)
- Diashow abspielen/anhalt/fortsetzen (erweitert)
- Diashow beenden
- Kamerasucher öffnen
- Kamerasucher schließen

- 
- Foto aufnehmen
  - Foto löschen
  - Foto speichern
  - Vergrößern
  - Verkleinern
  - Nach rechts schwenken
  - Nach links schwenken
  - Nach oben neigen
  - Nach unten neigen
  - Seite öffnen und Fotoalbum öffnen
  - Seite öffnen und Fotoalbum auswählen
  - Seite öffnen und dasselbe Fotoalbum beibehalten

## **Bearbeiten**

- Kopieren in "Text ins Nachrichtenf."
- Kopieren in "Text sprechen"
- Kopieren in "Text einfügen" mit Bestätigung
- Kopieren in "Text sprechen" mit Bestätigung
- Button bearbeiten - Vollversion
- Bearbeiten-Button
- Vollversion

## **Drucken**

- Bildschirm drucken
- Text & Symbole im NF drucken
- Text im Nachrichtenf. drucken
- Markierten Text drucken

## **Programmieren**

- Zufallsblock einfügen
- Unterprogramm erstellen
- Unterprogramm aufrufen
- Symbolname speichern
- Symbol einstellen (Symbol mit Name)
- Wort erweitern

- 
- Satz erweitern
  - Feld füllen mit Suche
  - Feld mit Alternativen-Symbolen füllen
  - Feld mit Alternativen-Wörtern füllen
  - Feld mit Systemvariablenauswahl füllen
  - Nachricht mit Verzögerung senden
  - Nachricht wiederholt senden
  - Ausdruck sprechen
  - Einstellung Hintergrund
  - Aktionen eingeben
  - Schrift
  - Objekt zu Position bewegen
  - Objekt schrittweise bewegen
  - Nach Zeichenfolge fragen
  - Nach Zahl fragen
  - Ja-Nein Frage stellen
  - Nutzer nach Symbol fragen
  - Nutzer nach Audiodatei fragen
  - Symbol einholen
  - Nach Seitennamen fragen
  - Bezeichnung einholen
  - Zwischenspeicher abrufen
  - Position einholen
  - Größe einholen
  - Genannte Liste kopieren
  - Vor dem Fortfahren Ja-Nein-Frage stellen
  - Aktionen stoppen

## **Verschiedenes**

- Vollbildschirm-Anzeige Ein/Aus
- Assistent: Benutzer erstellen
- Programmiertes Importieren von freigegebenen Paketen
- Eingefügte Bilder immer maximieren